

SUNRISE
MEDICAL

Mobility



BREEZY 200

Ersatzteilkatalog



SOPUR Ersatzteilkatalog

Wir sind für Sie von

Montag bis Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 16.00 Uhr

durchgehend erreichbar.

07253/ 980- 0	Empfang
07253/ 980- 400	Kundenservice SOPUR und JAY
07253/ 980- 500	Ersatzteilservice SOPUR und JAY
07253/ 980- 490	Power/ E-Stuhl und Ersatzteilservice
07253/ 980- 450	Sonderbau
07253/ 980- 440	Export

Kundenservice Fax: 0800 /8 120 128

Druckfehler und Technische Änderungen vorbehalten.
Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

INHALTSVERZEICHNIS

Baugruppe Antriebsrad

Antriebsrad 24“	4
Trommelbrems - Antriebsrad	5
Schraubachse	6
Steckachse	7

Baugruppe Bremse

Bremse	10
Bremshebelverlängerung	11

Baugruppe Fußraste

Fußraste	14
Fußrastenhalter	15
Fußraste hochschwenkbar	16

Baugruppe Lenkrad

Lenkrad 8“	18
Lenkradgabel	19

Baugruppe Rahmen

Rahmen ab FW 25/98	30
Rahmen bis FW 24/98	31
Achsaufnahme Standard ab FW 25/98	32
Achsaufnahme mit Zapfen bis FW 24/98	33

Baugruppe Rücken

Rücken	22
Rückenbespannung	23

Baugruppe Seitenteil

Seitenteil kurz/lang	26
Seitenteil höhenverstellbar	28

Baugruppe Sitz

Sitzbespannung	30
Kreuzstrebe	31

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör

Radstandsverlängerung	34
Sicherheitsrad	35
Stockhalter	36
Sicherheitsgurt	37
Therapietisch	38

Anzugsmomente


Anzugsmomente	40
---------------------	----

Baugruppe: ANTRIEBSRAD

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe ANTRIEBSRAD befinden sich keine Variantenabfragen.


Breezy 200 - Antriebsrad 24"

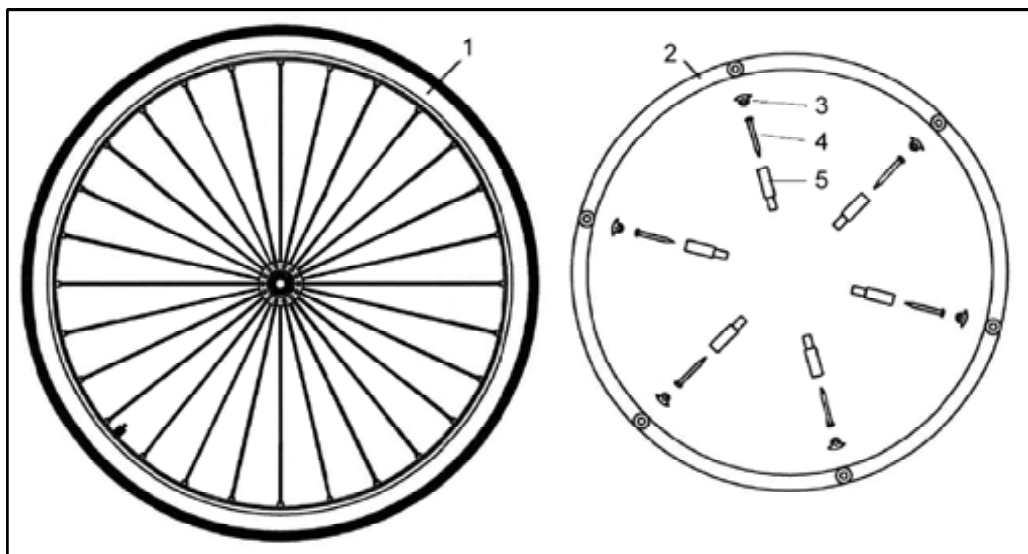

Antriebsrad 24 "

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UN30	1	Antriebsrad - pannensicher, für Steck- und Schraubachse		
UC06178	2 - 5	Greifring mit Montagezubehör kpl.	Für 1 Rad	


Breezy 200 - Trommelbrems-Antriebsrad 24"

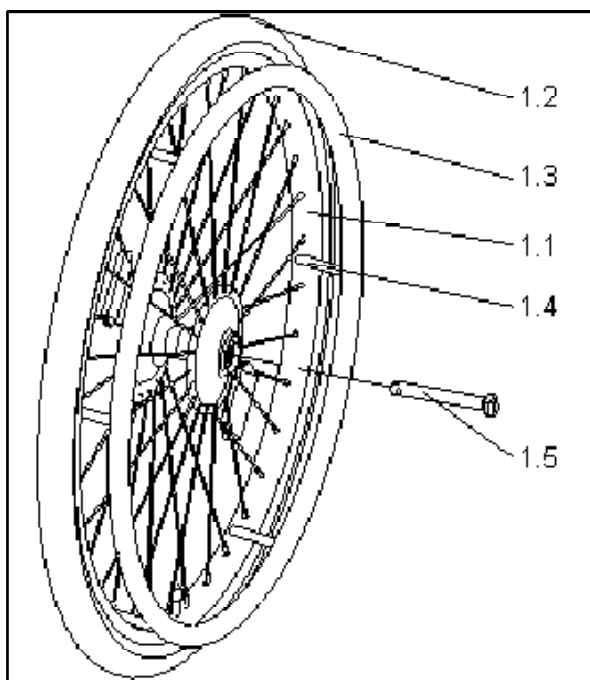

Trommelbremsrad 24"

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UN95/D	1.1 - 1.5	Trommelbrems-Antriebsrad 24", pannensicher (Schraubachse)	rechts	
UN95/I	1.1 - 1.5	Trommelbrems-Antriebsrad 24", pannensicher (Schraubachse)	links	

Breezy 200 - Schraubachse

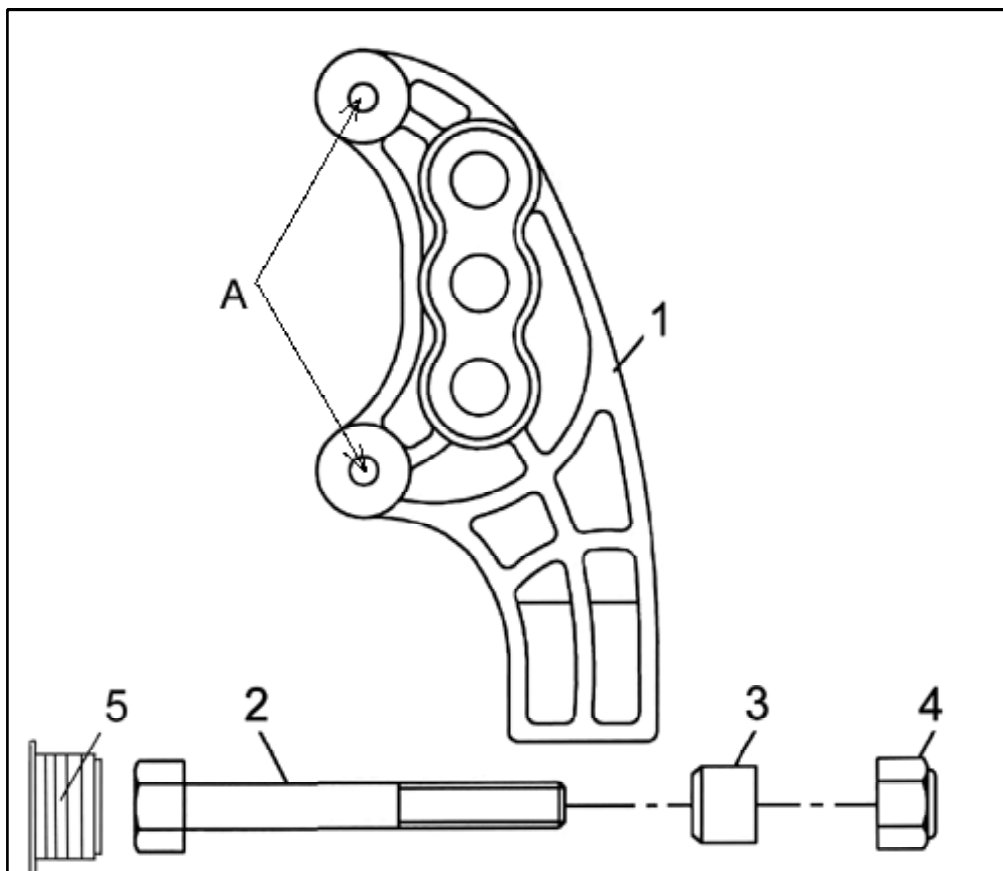

Anzugsdrehmoment:

Für Schraubachse (Pos. 4) :30 Nm.

Schraubensicherungen bitte nur einmal verwenden.

Schraubachse


Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UP01303	1	Achsaufnahme für Schraubachse	links und rechts verwendbar	
UP04292	A	Zyl.-Schraube M 6 x 45 DIN 912 für Befestigung der Achsaufnahme	3 St./Pkg.	
UP04013	ohne Bild	6kt-Mutter M 6 DIN 985	3 St./Pkg.	
UC06186	2 - 5	Schraubachse mit Abdeckkappe kpl.		
UP01031-ET	5	Abdeckkappe	20 St./Pkg.	

Baugruppe: BREMSE

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe BREMSE befinden sich keine Variantenabfragen.

Breezy 200 - Bremse

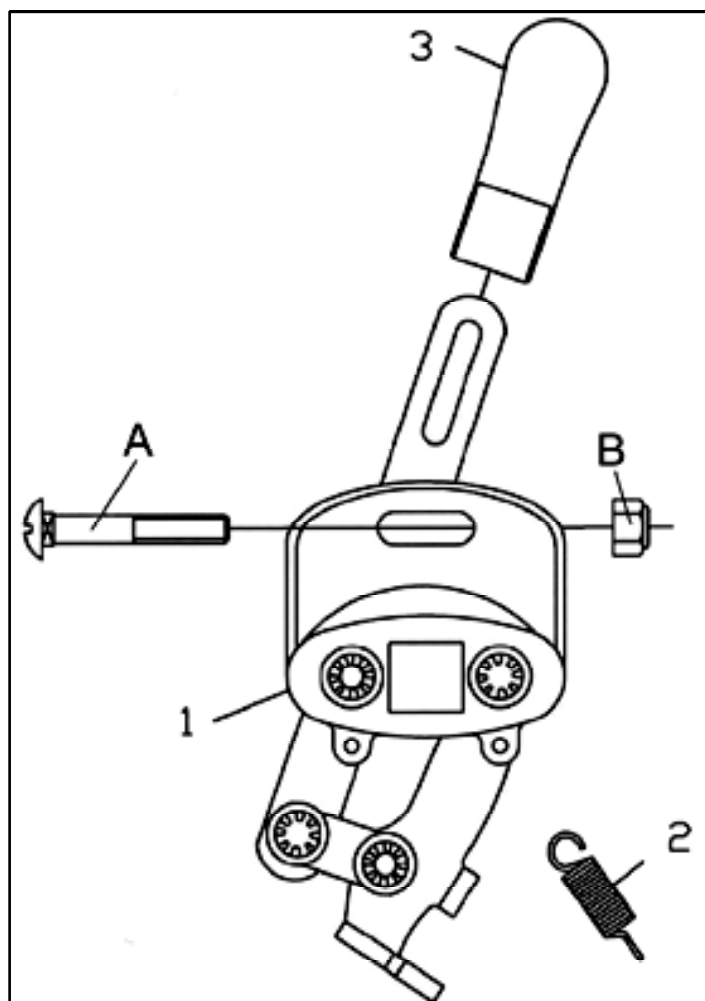

Anzugsdrehmoment:

Für Befestigungsschrauben (A,B) : 5 Nm

Bremse

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UC03038D	1 - 3	Bremse kpl.	rechts	
UC03039I	1 - 3	Bremse kpl.	links	
UP15044-ET	2	Rückholfeder	10 St./Pkg.	
UP01286-ET	3	Gummikappe	10 St./Pkg.	
A	A	Schraube M 6 x 40 DIN 603	Nur Montagehinweis. Artikel nicht als ET erhältlich	
	B	6kt-Mutter M 6 DIN 985	Nur Montagehinweis Artikel nicht als ET erhältlich	

Betätigung für Trommelbremse


Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
000 228 022	Ohne Bild	Betätigungshebel für Trommelbremse, selbstausslösend		
000 228 030	Ohne Bild	Kabelzug für Trommelbremse		
760 861 017-ET	Ohne Bild	Hülsenmutter mit Schraube	10 St./Pkg.	

Breezy 200 - Betätigung für Trommelbremse

Betätigung für Trommelbremse

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
000 228 022	1	Betätigungshebel für Trommelbremse		
000 228 030	2	Kabelzug für Trommelbremse		
760 861 017-ET	3	Hülsenmutter mit Schraube	10 St./Pkg.	

Breezy 200 - Bremshebelverängerung

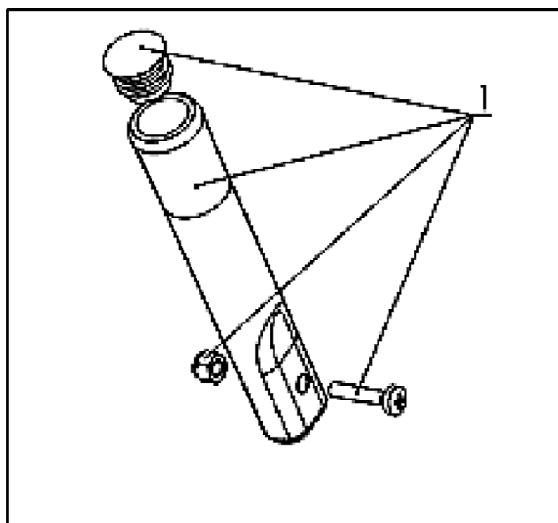

Bremshebelverängerung


Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
000 861 253	1	Bremshebelverängerung kpl.	2 St./Pkg.	

Baugruppe: FUSSRASTE

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe FUSSRASTE befinden sich keine Variantenabfragen.

Breezy 200 - Fußraste

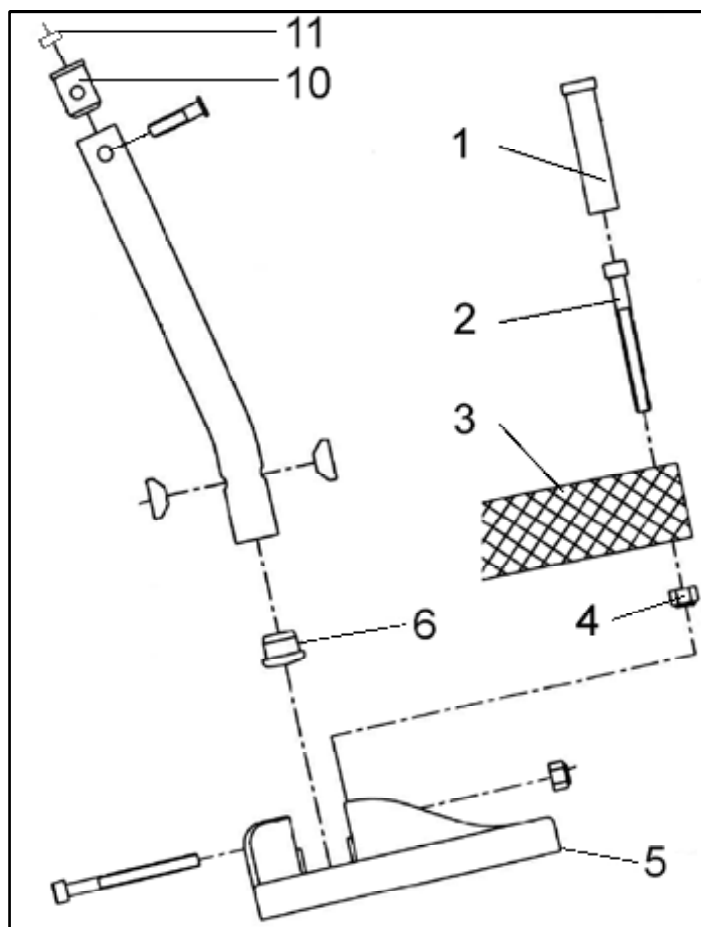


Anzugsdrehmoment:

Für Schraube zur Befestigung des Fußbrettes am Halter: 5 Nm.
Schraubensicherungen bitte nur einmal verwenden.

Fußraste ohne Fußrastenhalter

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UC05202D	1 - 11	Fußraste SB: 37 - 40 kpl.	rechts	
UC05204D	1 - 11	Fußraste SB: 43 - 52 kpl.	rechts	
UC05203I	1 - 11	Fußraste SB: 37 - 40 kpl.	links	
UC05205I	1 - 11	Fußraste SB: 43 - 52 kpl.	links	
UC05215	10, 11	Teleskophemmung kpl.	2 St./Pkg.	
UC05216	1 - 4	Fersenband SB: 37 - 40 kpl.		
UC05214	1 - 4	Fersenband SB: 43 - 52 kpl.		


Breezy 200 - Fußrastenhalter

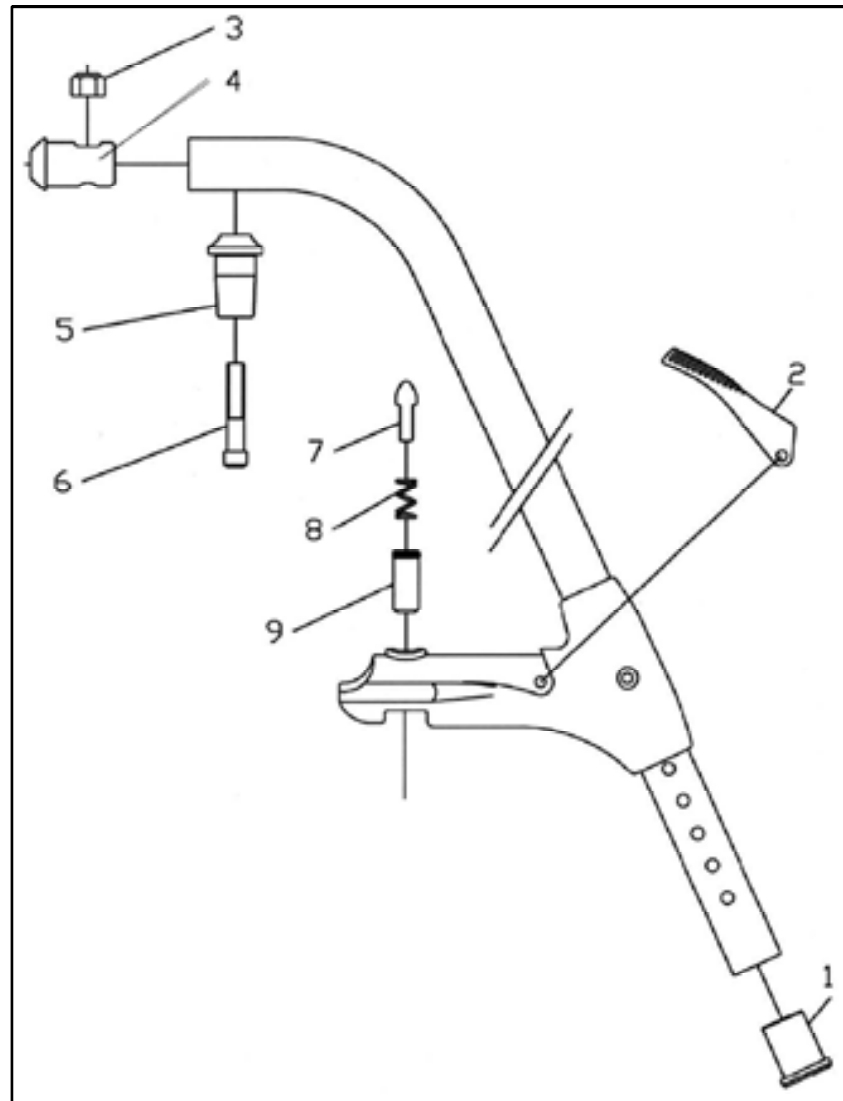

Fußrastenhalter

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UC05206S	1 - 9	Fußrastenhalter kpl.		
UP01294-ET	1	Einlegeteil	10 St./Pkg.	
UP01198	2	Fußrastenentriegelung		
UP01306	4	Fußrastenanschlag		
UC01671	7 - 9	Verriegelungsmechanismus		

Breezy 200 - Fußraste hochschwenkbar

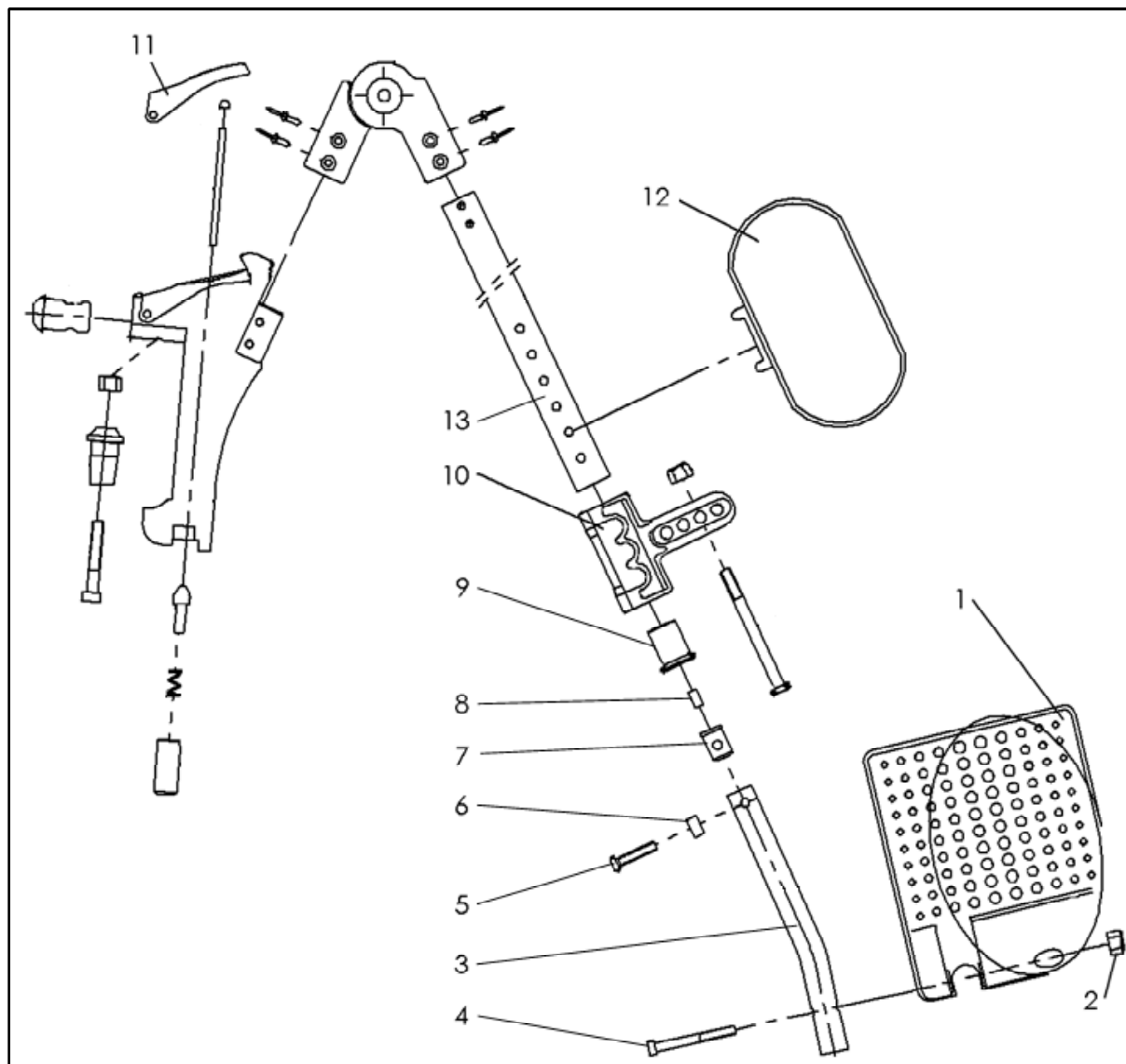

Fußraste hochschwenkbar

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UN21/D/P	1 - 13	Fußraste hochschwenkbar SB: 40 kpl. (ab FW 25)	rechts	
UN21/I/P	1 - 13	Fußraste hochschwenkbar SB: 40 kpl. (ab FW 25)	links	
UN21/D/G	1 - 13	Fußraste hochschwenkbar SB: 43 - 52 kpl. (ab FW 12)	rechts	
UN21/I/G	1 - 13	Fußraste hochschwenkbar SB: 43 - 52 kpl. (ab FW 12)	links	
UC05202D	1 - 8	Fußraste SB: 37 - 40 (ab FW 51/2001)	rechts	
UC05203I	1 - 8	Fußraste SB: 37 - 40 (ab FW 51/2001)	links	
UC05204D	1 - 8	Fußraste SB: 43 - 52 (ab FW 51/2001)	rechts	


Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UC05205I	1 - 8	Fußraste SB: 43 - 52 (ab FW 51/2001)	links	
UC05064	1 - 8	Fußraste für SB: 40 (bis FW 50/2001)	rechts	
UC05065	1 - 8	Fußraste für SB: 40 (bis FW 50/2001)	links	
UC05122	1 - 8	Fußraste für SB: 43 - 52 (bis FW 50/2001)	rechts	
UC05123	1 - 8	Fußraste für SB: 43 - 52 (bis FW 50/2001)	links	
UP01006D	2	Fußbrett (bis FW 50/2001)	rechts	
UP01006I	2	Fußbrett (bis FW 50/2001)	links	
UC05215	7, 8	Teleskophemmung kpl.	2 St./Pkg.	
UP01294-ET	9	Einlegeeteil	10 St.Pkg.	
UP01116	10	Halterung für Wadenpolster SB: 37 - 52		
UP01198	11	Fußrastenentriegelung		
UP01228	12	Wadenpolster SB: 37 - 52		

Baugruppe: LENKRAD

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe LENKRAD befinden sich keine Variantenabfragen.


Breezy 200 - Lenkrad 8"

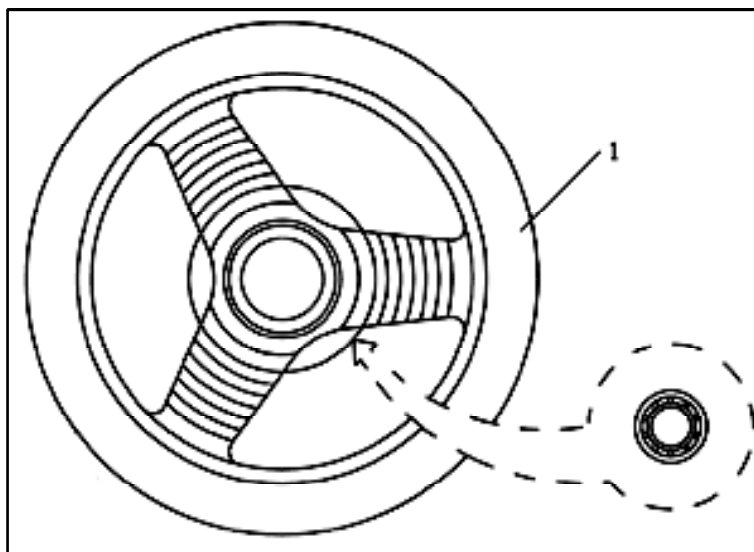

Lenkrad 8 "

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UN40	1	Vollgummi - Lenkrad 8" kpl.		
UP04006		6kt-Mutter M 8 DIN 985		
UP04132		Zyl.-Schraube M 8 x 75 DIN 912		

Breezy 200 - Lenkradgabel

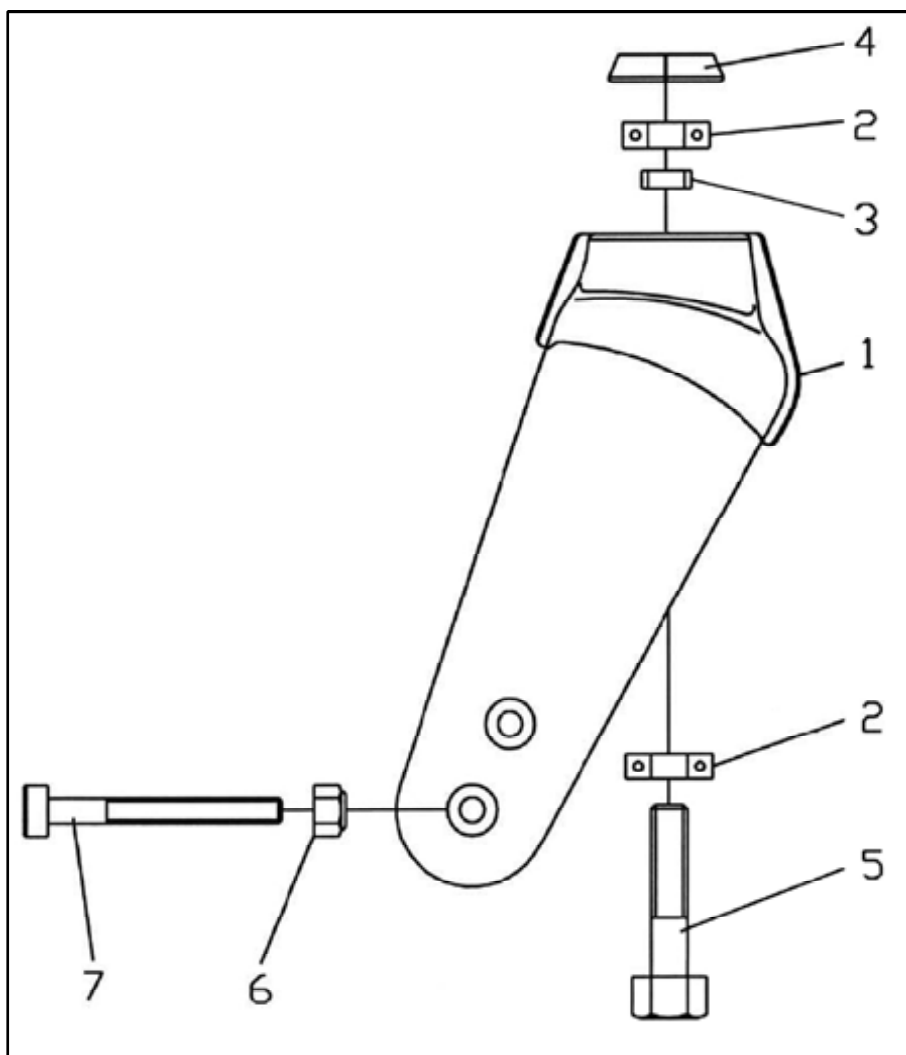

Anzugsdrehmoment:

Für Gabel-Befestigungsschraube (Pos. 5) 40 Nm. Achtung! Schraube mit "LOCTITE" sichern.
 Anzugsdrehmoment für Rad-Befestigungsschraube (Achse) 7 Nm.
 Schraubensicherungen bitte nur einmal verwenden.

Lenkradgabel


Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UC06163	1 - 3	Kunststoff - Lenkradgabel mit Lager		
UP10011	2	Radialkugellager für Kunststoffgabel		
UP01295-ET	4	Abdeckkappe	10 St./Pkg.	
UP04295	5	6kt-Schraube M 12 x 55 DIN 931		
UP04006	6	6kt-Mutter M 8 DIN 985		
UP04132	7	Zyl.-Schraube M 8 x 75 DIN 912		

Baugruppe: RÜCKEN / RAHMENANBAUTEILE

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe RÜCKEN befinden sich keine Variantenabfragen.


Breezy 200 - Rücken / Rahmenanbauteile

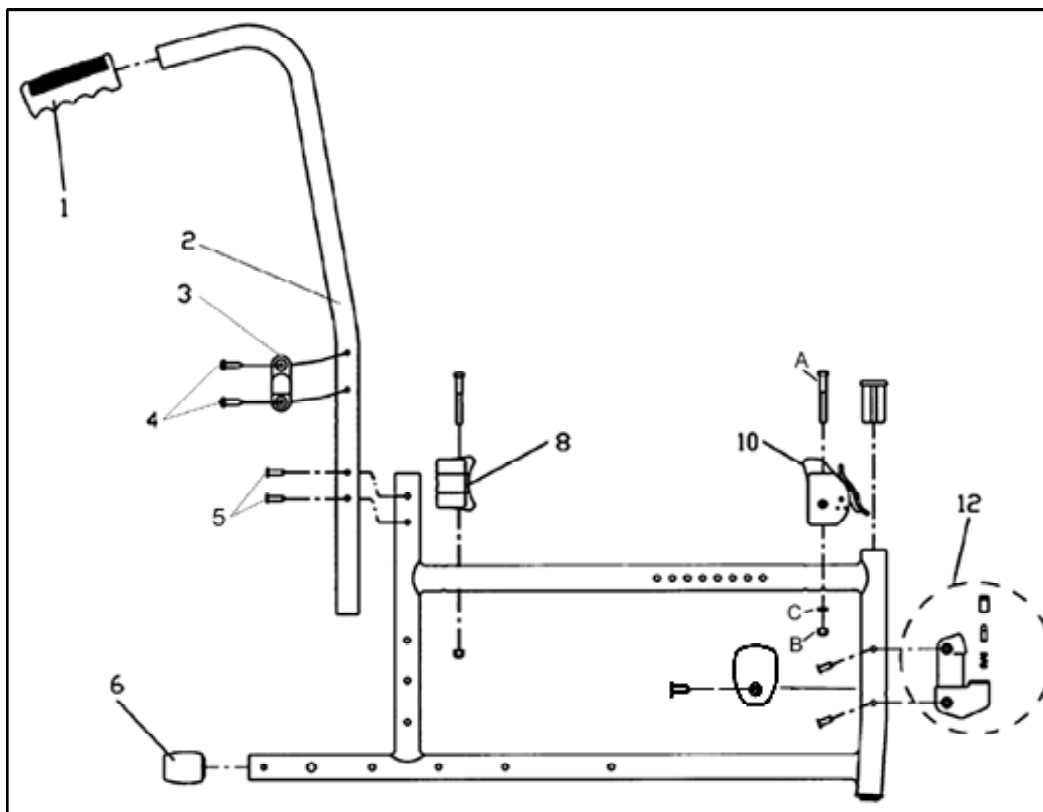

Rücken

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UC01670	1 - 5	Rückenrohr kpl.	rechts und links verwendbar	
UP01301	3	Seitenteilaufnahme am Rückenrohr		
UP01181-ET	6	Kappe für Ankippbügel	10 St./Pkg.	
UP01304	8	Seitenteilaufnahme am Rahmen		
UC01661D	10	Seitenteilentriegelung	rechts	
UC01662I	10	Seitenteilentriegelung	links	
UP01293-ET	11	Buchse	10 St./Pkg.	
UC01660	12	Fußrastenschloß		
A	A	6kt-Schraube M 5 x 45 DIN 931	Nur Montagehinweis. Artikel nicht als ET erhältlich	
B	B	6kt-Mutter M 5 DIN 985	Nur Montagehinweis Artikel nicht als ET erhältlich	
C	C	Scheibe 5,4 DIN 9021	Nur Montagehinweis. Artikel nicht als ET erhältlich	

Breezy 200 - Rückenbespannung

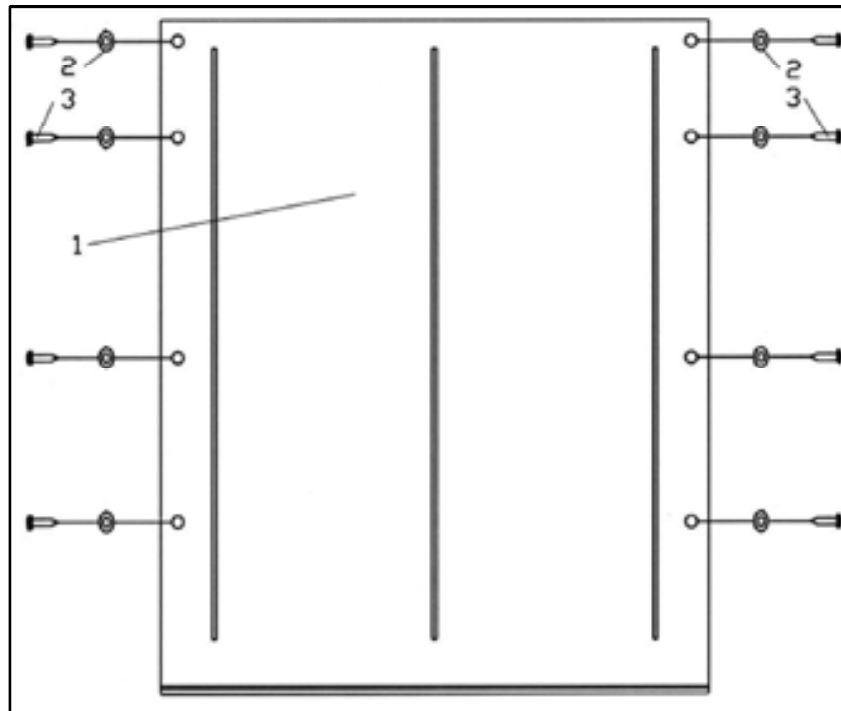

Rückenbespannung


Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UC02411	1 - 3	Rückenbespannung SB: 37 kpl.		
UC02412	1 - 3	Rückenbespannung SB: 40 kpl.		
UC02413	1 - 3	Rückenbespannung SB: 43 kpl.		
UC02414	1 - 3	Rückenbespannung SB: 46 kpl.		
UC02415	1 - 3	Rückenbespannung SB: 49 kpl.		
UC02416	1 - 3	Rückenbespannung SB: 52 kpl.		

Baugruppe: SEITENTEIL

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe SEITENTEIL befinden sich keine Variantenabfragen.

Breezy 200 - Seitenteil kurz/lang

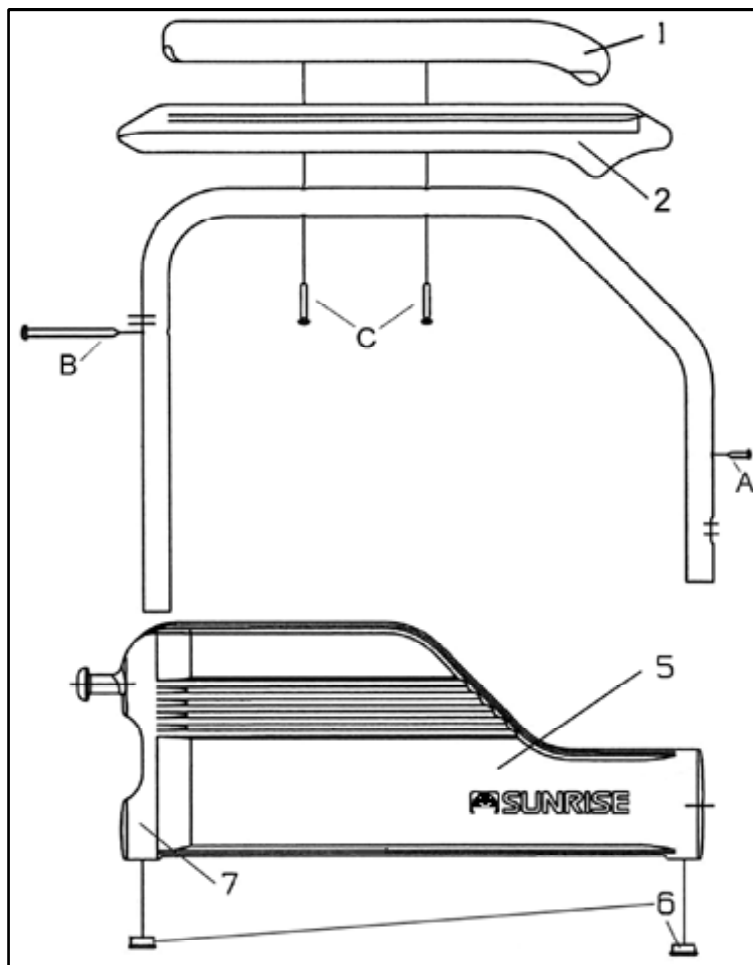

Anzugsdrehmoment:

Für Kleiderschutz (Pos. 5, 7) : 2 Nm.

Anzugsdrehmoment für Armauflage : 2 Nm


Schraubensicherungen bitte nur einmal verwenden.

Seitenteil kurz/lang

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UN11/D		Seitenteil kurz	rechts	
UN11/I		Seitenteil kurz	links	
UN12/D		Seitenteil lang	rechts	
UN12/I		Seitenteil lang	links	
UC02365D	1	Armauflage kurz	rechts	
UC02366I	1	Armauflage kurz	links	
UC02212D	2	Armauflage lang	rechts	
UC02213I	2	Armauflage lang	links	
UP01096-ET	6	Abdeckkappe	20 St./Pkg.	
UP01298	7, 5	Kleiderschutz		

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
A	A	Schraube 3,9 x 19 DIN 7981 selbstschneidend	Nur Montagehinweis. Artikel nicht als ET erhältlich	
B	B	Schraube 4,8 x 50 DIN 7981 selbstschneidend	Nur Montagehinweis Artikel nicht als ET erhältlich	
C	C	Schraube M 5 x 25 DIN 966	Nur Montagehinweis. Artikel nicht als ET erhältlich	

Breezy 200 - Seitenteil höhenverstellbar

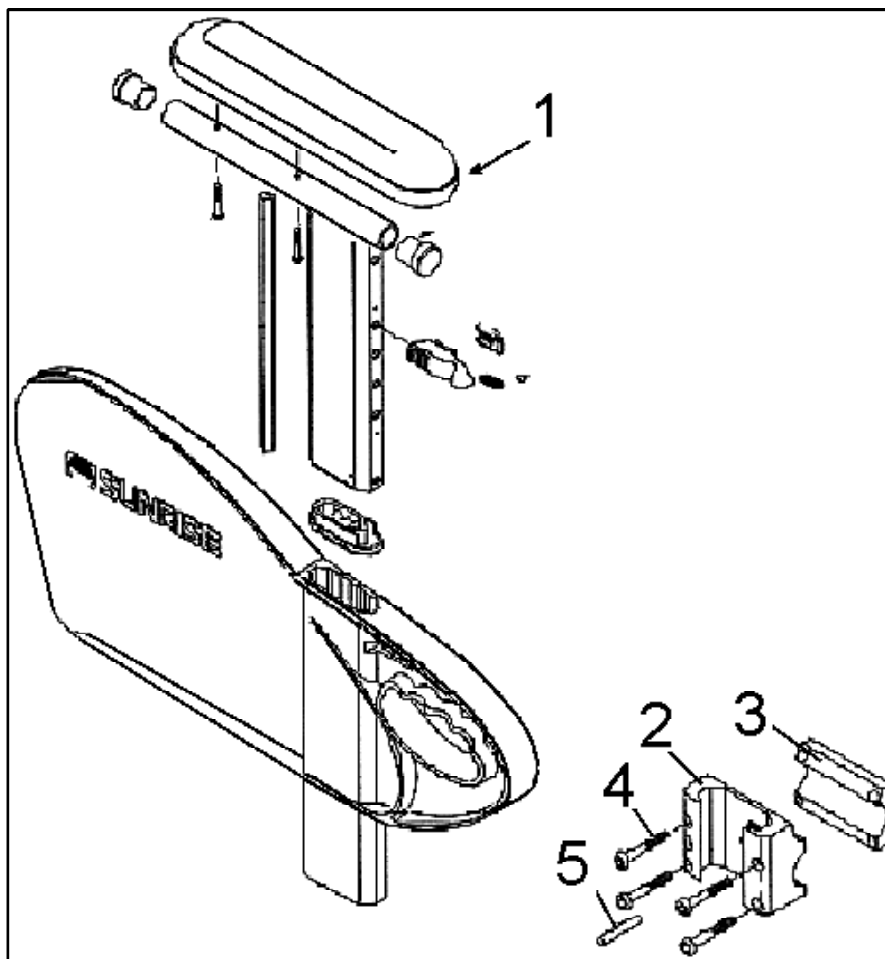

Anzugsdrehmoment:

Für Armauflage : 2 Nm

Schraubensicherungen bitte nur einmal verwenden.

Seitenteil höhenverstellbar


Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UN15	1 - 5	Seitenteile höhenverstellbar kpl.	Paar	
UN15/D	1 - 5	Seitenteil höhenverstellbar kpl.	rechts	
UN15/I	1 - 5	Seitenteil höhenverstellbar kpl.	links	
L561024	1	Armauflage kurz	rechts und links verwendbar	
L872051	2 - 5	Seitenteilaufnahme kpl.	rechts und links verwendbar	

Baugruppe: SITZ / KREUZSTREBE

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe SITZ / KREUZSTREBE befinden sich keine Variantenabfragen.


Breezy 200 - Sitzbespannung

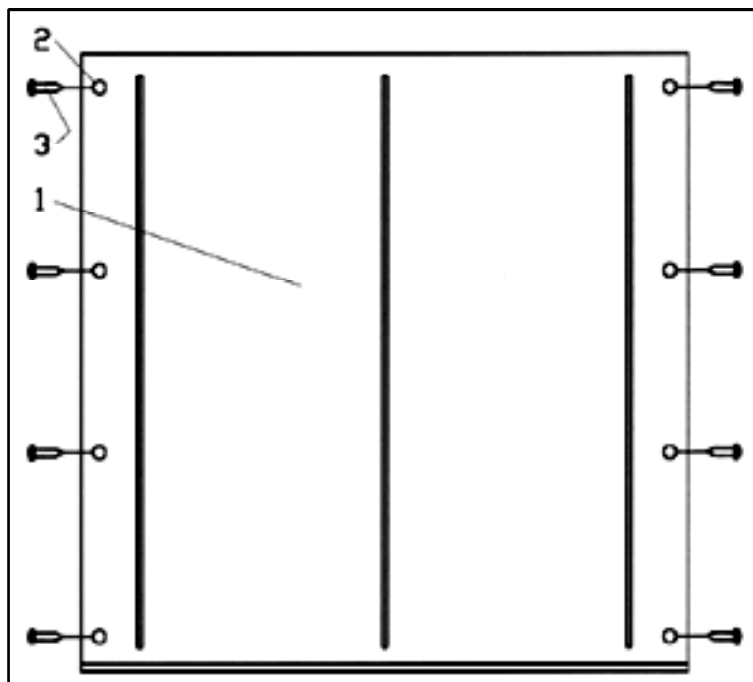

Sitzbespannung

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UC02405	1 - 3	Sitzbespannung SB: 37 kpl.		
UC02406	1 - 3	Sitzbespannung SB: 40 kpl.		
UC02407	1 - 3	Sitzbespannung SB: 43 kpl.		
UC02408	1 - 3	Sitzbespannung SB: 46 kpl.		
UC02409	1 - 3	Sitzbespannung SB: 49 kpl.		
UC02410	1 - 3	Sitzbespannung SB: 52 kpl.		

Breezy 200 - Kreuzstrebe

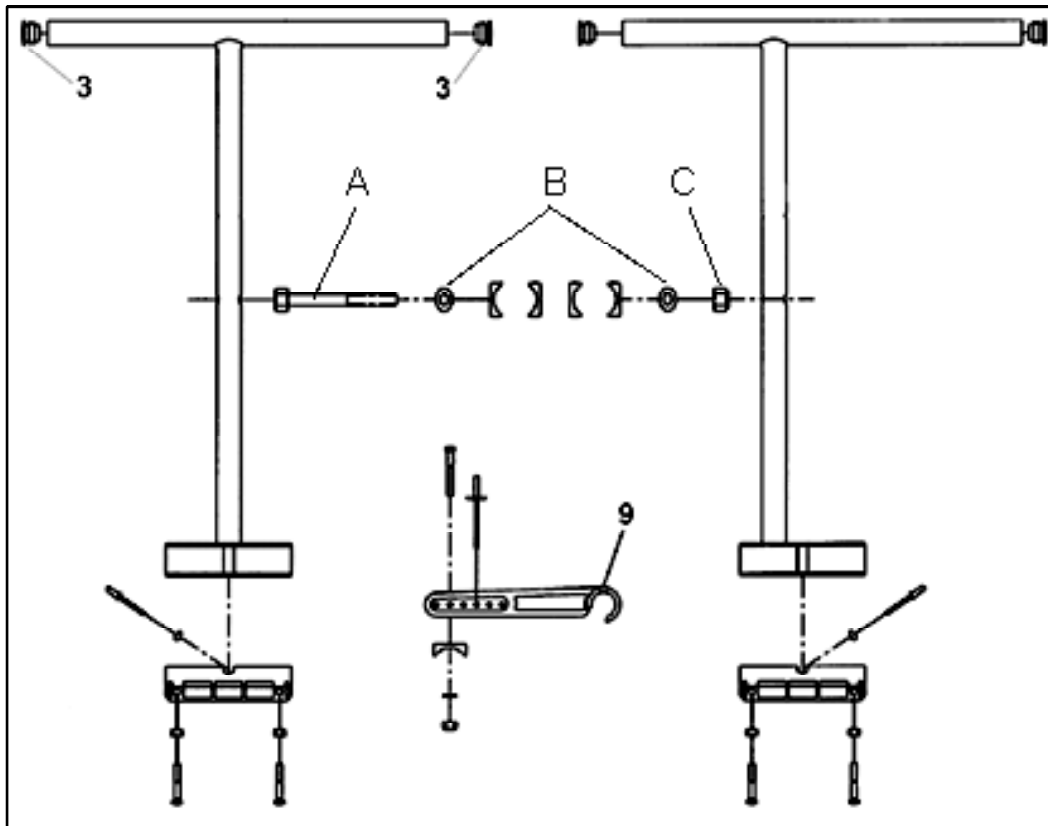

Kreuzstrebe


Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UP01305	9	Kreuzstrebenlasche	rechts und links verwendbar	
UP01197-ET	3	Abdeckkappe	20 St./Pkg.	
A	A	6kt-Schraube M 7 x 75 DIN 931	Nur Montagehinweis. Artikel nicht als ET erhältlich.	
B	B	Scheibe A 8,4 DIN 125	Nur Montagehinweis Artikel nicht als ET erhältlich.	
C	C	6kt-Mutter M 8 DIN 985	Nur Montagehinweis. Artikel nicht als ET erhältlich.	

Baugruppe: ZUBEHÖR

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe ZUBEHÖR befinden sich keine Variantenabfragen.


Breezy 200 - Radstandsverlängerung

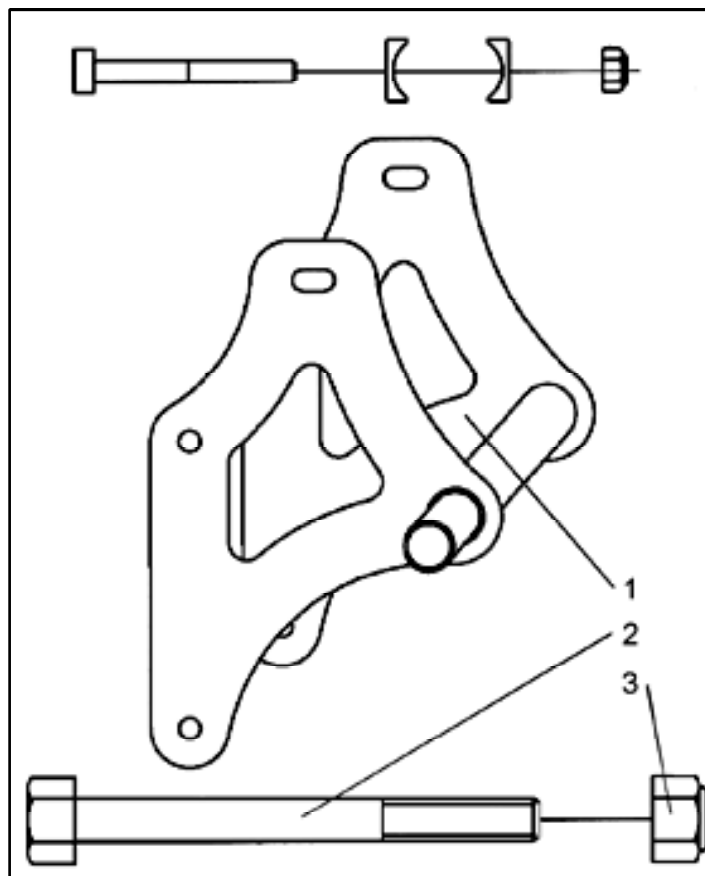

Radstandsverlängerung

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UN98	1 - 3	Radstandsverlängerung, 7 cm mit Steckachse und Montagezubehör kpl.	rechts und links verwendbar	


Breezy 200 - Sicherheitsgurt

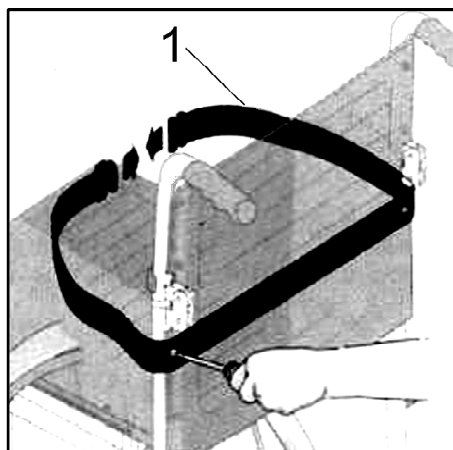

Sicherheitsgurt


Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UN74	1	Sicherheitsgurt		

Breezy 200 - Sicherheitsrad

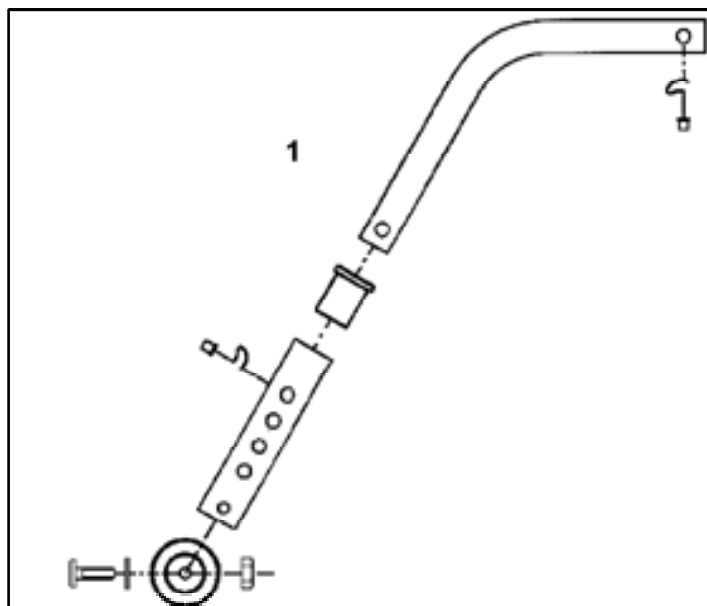


Sicherheitsrad

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UN77	1	Sicherheitsräder kpl.	2 St./Pkg.	

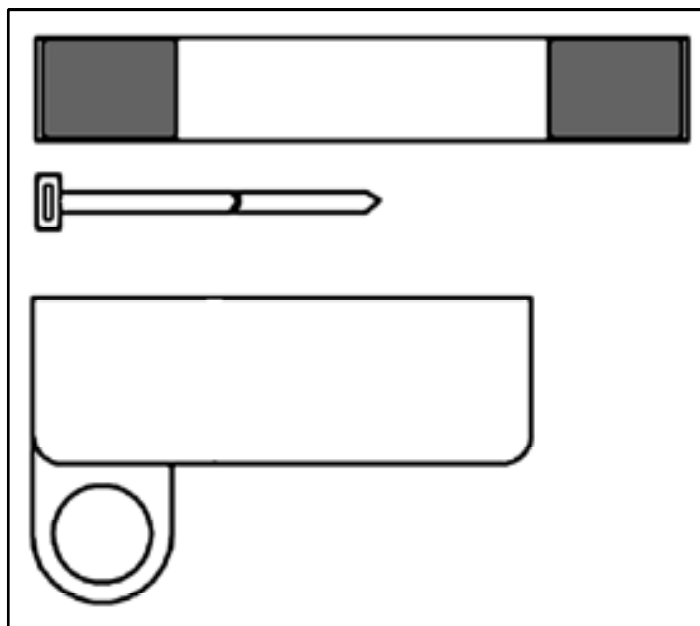Breezy 200 - Stockhalter**Stockhalter**

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
UN71		Stockhalterung		

Breezy 200 - Therapietisch

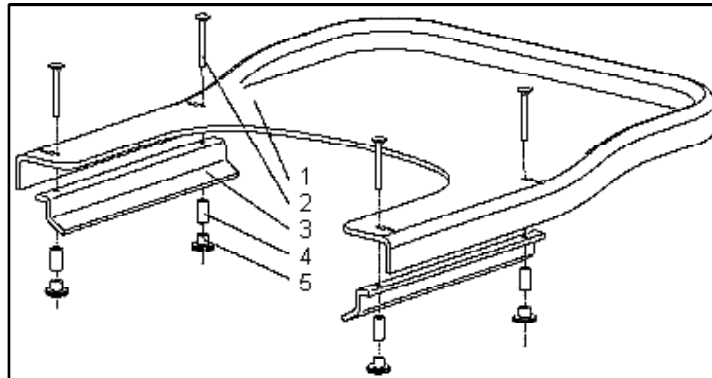

Therapietisch

Artikelnr.	Pos.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
760 848 050.01	1 - 5	Therapietisch für SB: 37 - 40 kpl.		
760 848 050.02	1 - 5	Therapietisch für SB: 43 kpl.		
760 848 050.03	1 - 5	Therapietisch für SB: 46 - 49 kpl.		
760 848 052				

ANZUGSMOMENTE

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe ANZUGSMOMENTE befinden sich keine Variantenabfragen.

Breezy 200 - Anzugsmomente

