

classic

130



SOPUR

SUNRISE MEDICAL

Ersatzteilkatalog

Wir sind für Sie von

Montag bis Donnerstag **08.00 – 17.00 Uhr**
Freitag **08.00 – 16.00 Uhr**

durchgehend erreichbar.

07253/ 980- 0	Empfang
07253/ 980- 400	Kundenservice SOPUR und JAY
07253/ 980- 500	Ersatzteilservice SOPUR und JAY
07253/ 980- 490	Power/ E-Stuhl und Ersatzteilservice
07253/ 980- 450	Sonderbau
07253/ 980- 440	Export

Kundenservice Fax: 0800 /8 120 128

Druckfehler und Technische Änderungen vorbehalten.
Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

© Sunrise Medical GmbH

Classic 140	5
Baugruppe ANTRIEBSRAD	5
Antriebsrad	6
Classic 140 - Komplett-Antriebsrad	6
Classic 140 - Kompletttrommelbremsrad	8
Classic 140 - Speichenschutz	10
Baugruppe BREMSE	12
Bremse	13
Classic 140 - Kniehebelbremse mit Rahmenbefestigung ab FM 12/99	13
Classic 140 - Trommelbremse Standard ab FW 25/98	15
Classic 140 - Trommelbremse mit Zapfen bis FW 24/98	16
Classic 140 - Betätigung für Trommelbremse	17
Classic 140 - Einhand - Bremse (Neu)	18
Baugruppe FUSSRASTE	20
Fußraste	21
Classic 140 - Fußraste mit Kunststoff - Fußbrett	21
Classic 140 - Fußraste hochschwenkbar	23
Baugruppe LENKRAD	25
Lenkrad	26
Classic 140 - Lenkrad starr bis FW 49/99	26
Classic 140 - Lenkrad winkelverstellbar bis FW 49/99	28
Classic 140 - Lenkrad winkelverstellbar mit Kunststoffgabel ab FW 50/99	30
Baugruppe RAHMEN	32
Rahmen	33
Classic 140 - Rahmen ab FW 25/98	33
Classic 140 - Rahmen bis FW 24/98	34
Classic 140 - Achsaufnahme Standard ab FW 25/98	36
Classic 140 - Achsaufnahme mit Zapfen bis FW 24/98	37
Baugruppe RÜCKEN	38
Rücken	39
Classic 140 - Rücken ab FW 25/98	39
Classic 140 - Rücken bis FW 24/98	40
Classic 140 - Rückenbespannung anpaßbar ab FW 49/99	41
Classic 140 - Schiebegriffe höhenverstellbar ab FW 25/98	42
Baugruppe SEITENTEIL	44
Seitenteil	45
Classic 140 - Armlehne und Kleiderschutz	45
Classic 140 - Desk III-Seitenteil	47
Classic 140 - Seitenteil / Armauflage fest	49
Baugruppe SITZ	51
Classic 140 - Sitz / Kreuzstrebe	52
Baugruppe ZUBEHÖR	54
Zubehör	55
Classic 140 - F16 Adapter	55
Classic 140 - Sicherheitsrad mit Rahmenadapter	57
Classic 140 - Sitzkissen	59
Classic 140 - Stockhalter mit Klettschlaufe	60

Inhaltsverzeichnis


Classic 140 - Therapietisch.....	61
Classic 140 - Transitrolle mit Rahmenadapter	62
ANZUGSMOMENTE.....	64
Anzugsmomente	65
Classic - Anzugsmomente	65

Baugruppe ANTRIEBSRAD

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe **ANTRIEBSRAD** befinden sich keine Variantenabfragen.


Classic 140 - Komplett-Antriebsrad

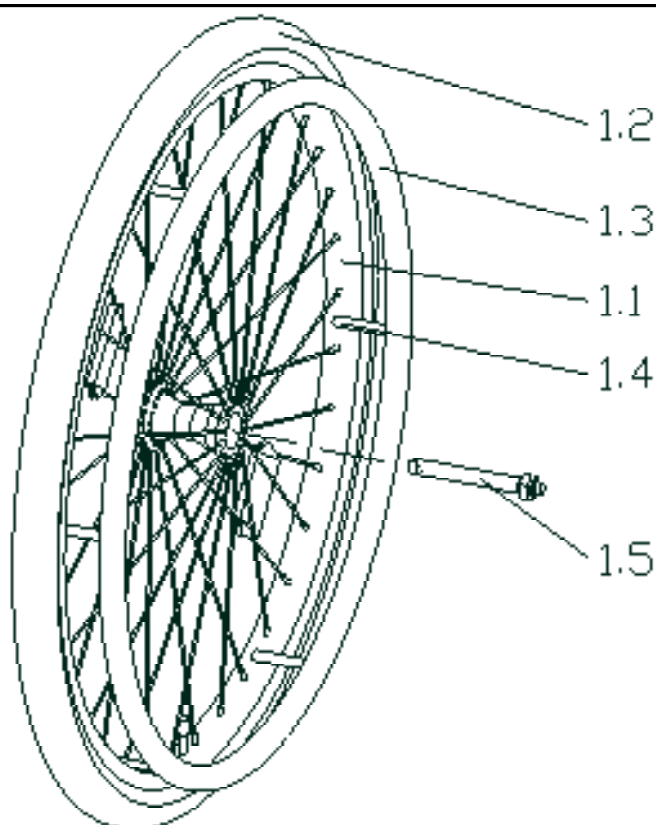

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1.1-1.4	000 850 322.01	Standardrad 22" Luftbereift		
1.1-1.4	000 850 522.01	Standardrad 22" Pannensicher		
1.3	000 854 070	Aluminium-Greifring 22"		
1.2	000 857 225.01	Bereifung 22" x 1" kpl. Grobprofil		
1.2	000 283 028	Bereifung 22" x 1 3/8" Pannensicher		
1.2	000 283 018	Reifen 22" x 1" Grobprofil		
	000 283 114-ET	Luftschlauch 22" x 1"	10 St./Pkg.	
	000 283 151-ET	Felgenband	10 St./Pkg.	
1.1-1.4	000 850 324.01	Standardrad 24" Luftbereift		
1.1-1.4	000 850 524.01	Standardrad 24" Pannensicher		
1.2	000 857 224.02	Bereifung 24" x 1" kpl. Luftbereift		
1.2	000 283 015.01	Bereifung 24" x 1 3/8" Pannensicher		
1.3	000 854 072	Aluminium-Greifring 24"		
1.2	000 283 013-ET	Reifen 24" x 1" Grobprofil	5 St./Pkg.	
	000 283 113-ET	Luftschlauch 24" x 1"	10 St./Pkg.	
	000 283 152-ET	Felgenband 24"	10 St./Pkg.	
	000 854 512	Greifringüberzug 22" hoch (für 24" Kompletttrad)		

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1.5	000 220 288	Steckachse mit Mutter für Standardrad		
1.4	000 854 053-ET	Montageclip für Kompletttrad/Greifring	20 St./Pkg.	


Classic 140 - Kompletttrommelbremsrad

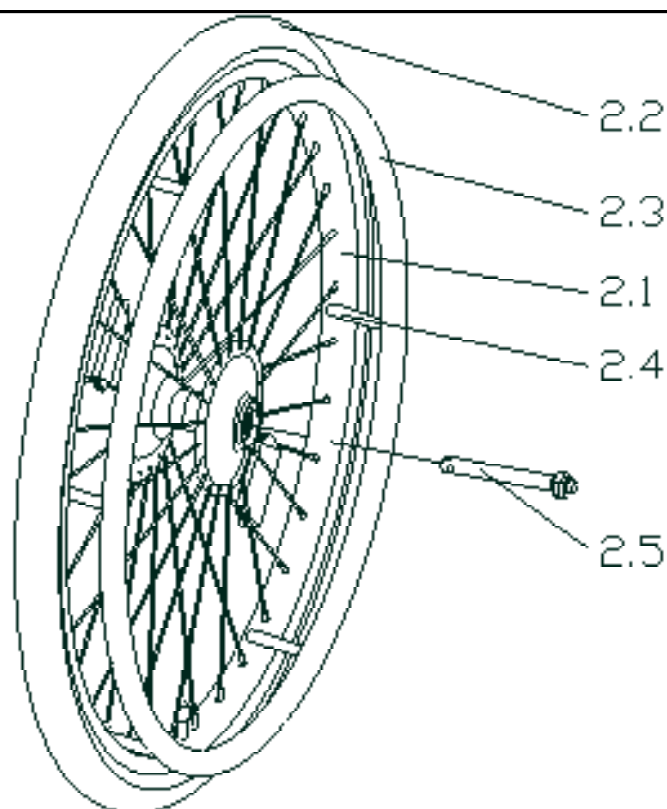

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
2.1-2.4	000 850 422.01	Trommelbremsrad 22" Luftbereift		
2.1-2.4	000 850 422.02	Trommelbremsrad 22" Pannensicher		
2.2	000 857 225.01	Bereifung 22" x 1" kpl. Grobprofil		
2.2	000 283 028	Bereifung 22" x 1 3/8" Pannensicher		
2.2	000 283 018	Reifen 22" x 1" Grobprofil		
2.3	000 854 070	Aluminium-Greifring 22"		
	000 283 114-ET	Luftschlauch 22" x 1"	10 St./Pkg.	
	000 283 151-ET	Felgenband	10 St./Pkg.	
2.1-2.4	000 850 424.02	Trommelbremsrad 24" Luftbereift		
2.1-2.4	000 850 424.01	Trommelbremsrad 24" Pannensicher		
2.2	000 857 224.02	Bereifung 24" x 1" kpl. Luftbereift		
2.2	000 283 015.01	Bereifung 24" x 1 3/8" Pannensicher		
2.2	000 283 013-ET	Reifen 24" x 1" Grobprofil	5 St./Pkg.	
2.3	000 854 072	Aluminium-Greifring 24"		
	000 283 113-ET	Luftschlauch 24" x 1"	10 St./Pkg.	
	000 283 152-ET	Felgenband 24"	10 St./Pkg.	
	000 854 512	Greifringüberzug 22" hoch (für 24" Kompletttrad)		
	000 854 514	Greifringüberzug 24" mittig		

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
2.5	000 220 246	Steckachse mit Mutter für Trommelbremse		
	000 220 230	Design-Steckachse für Trommelbremsrad		

Classic 140 - Speichenschutz

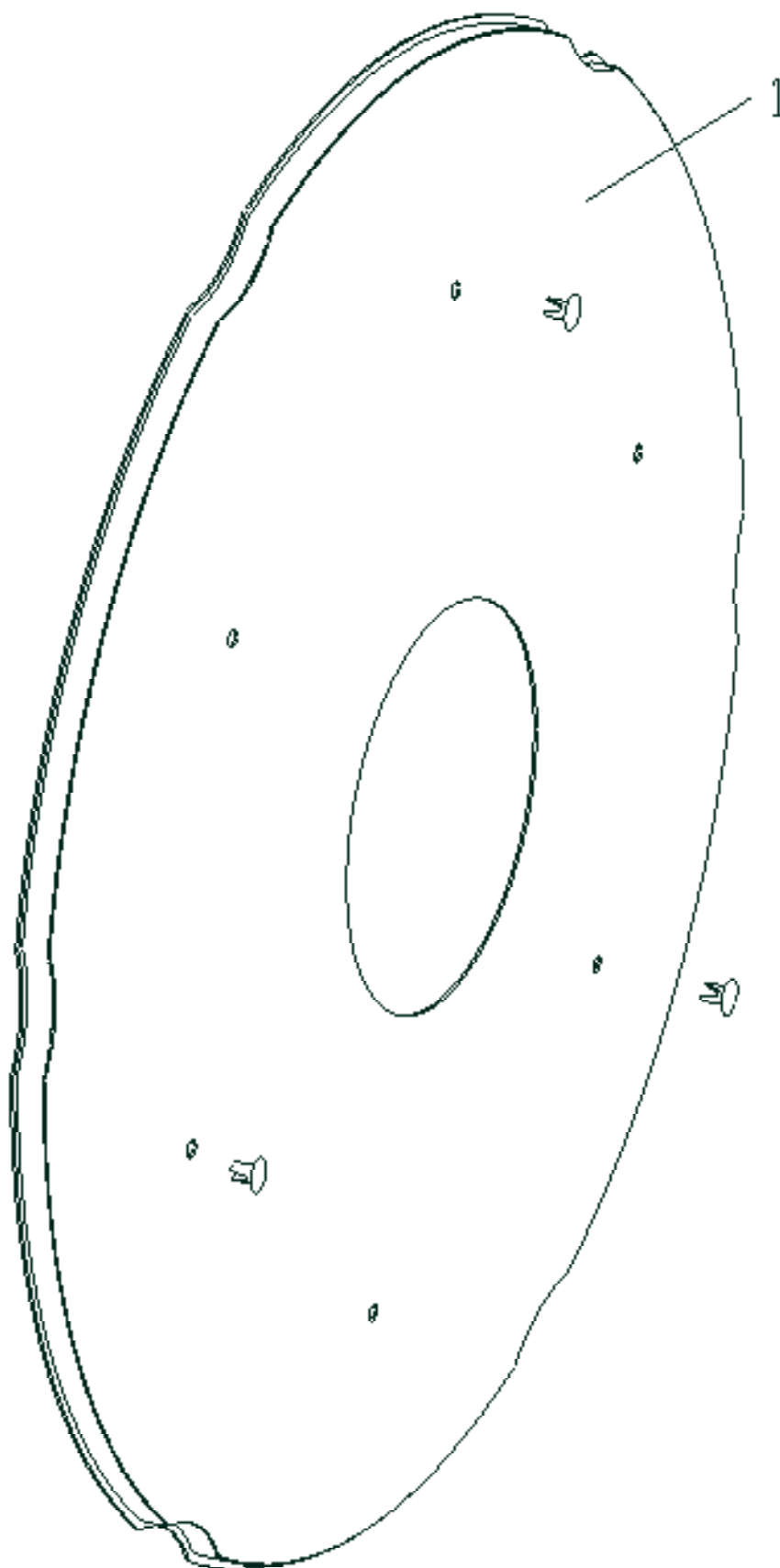

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1.1	000 856 340.01	Speichenschutz-Universal transparent für 24" Komplettrad kpl.		
1.2	000 118 004-ET	Schnapper für Speichenschutz	25 St./Pkg.	


Baugruppe BREMSE

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe **BREMSE** befinden sich folgende Variantenabfragen:

Abfrage	Bedeutung	Wählbare Varianten
SB	Sitzbreite in cm	38-52 in 2 cm-Schritten


Classic 140 - Kniehebelbremse mit Rahmenbefestigung ab FM 12/99

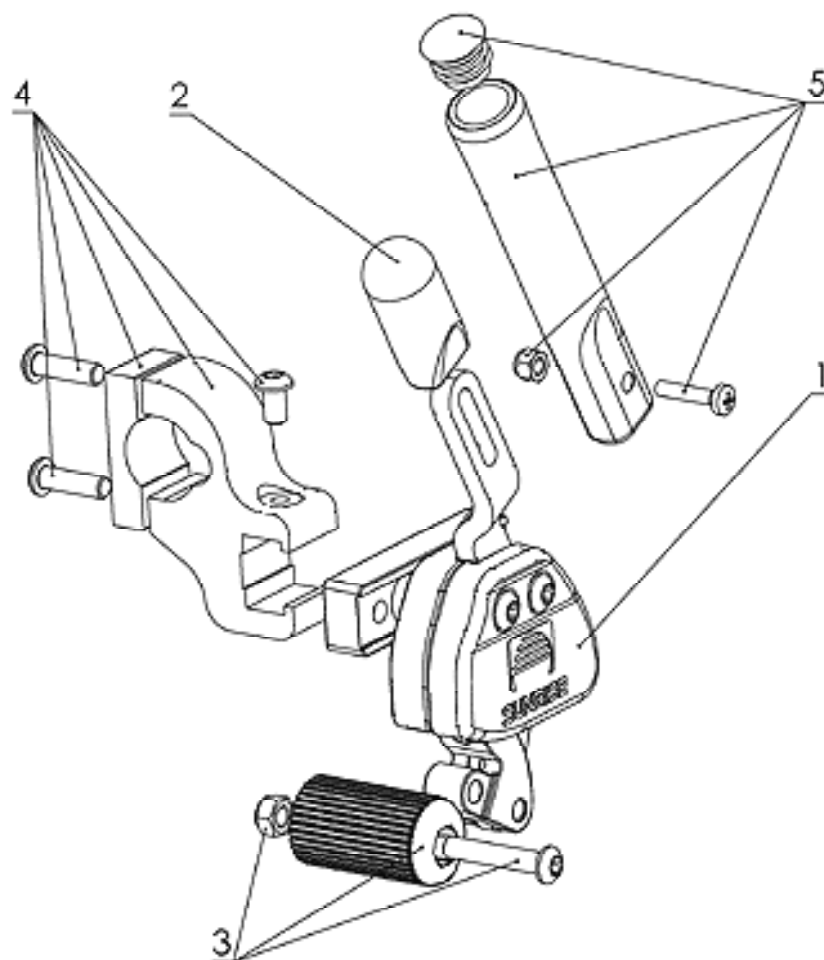

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1-4	000 961 255	Kniehebelbremsen mit Rahmenbefestigung kpl. ersetzt 750 961 055	Paar	
1-4	000 861 255	Kniehebelbremse mit Rahmenbefestigung kpl. ersetzt 750 861 055	rechts	
1-4	000 761 255	Kniehebelbremse mit Rahmenbefestigung kpl. ersetzt 750 761 055	links	
1-3	000 961 250	Kniehebelbremsen ersetzt 760 961 020	Paar	
1-3	000 861 250	Kniehebelbremse ersetzt 760 861 020	rechts	
1-3	000 761 250	Kniehebelbremse ersetzt 760 761 020	links	
2	000 861 156-ET	Bremshebel-Abdeckkappe schwarz	5 St./Pkg.	
3	000 861 252	Bremsbolzen kpl.		
	000 102 312.01-ET	Linsenschraube M 6 x 32 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M 6 DIN 985	25 St./Pkg.	


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
4	000 861 251	Rahmenbefestigung für Kniehebelbremse kpl.	rechts und links verwendbar	
	000 102 307.01- ET	Linsenschraube M 6 x 20 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 102 310.01- ET	Linsenschraube M 6 x 10 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
5	000 861 253	Bremshebelverlängerung Paar kpl. ersetzt 750 861 062		
	000 102 066-ET	Linsenschraube M 5 x 20 DIN 7985	12 St./Pkg.	
	000 128 006-ET	6kt-Mutter M 5 DIN 985	25 St./Pkg.	

Classic 140 - Trommelbremse Standard ab FW 25/98

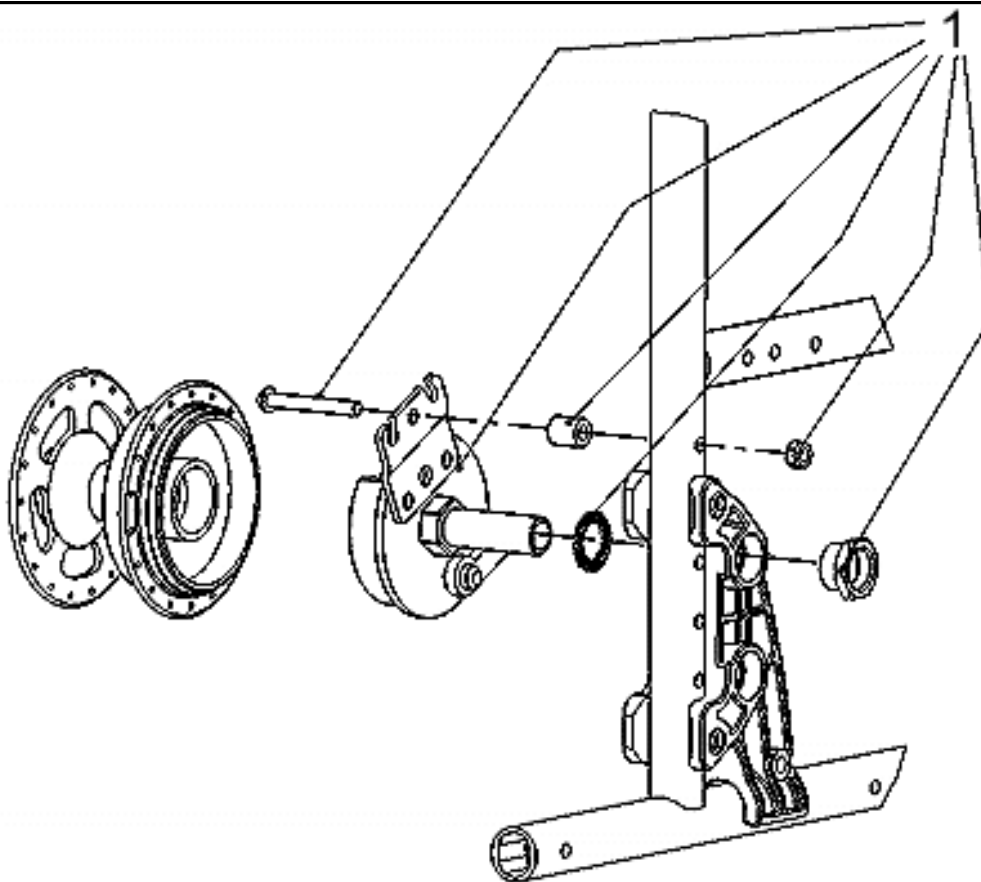


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1	752 961 072	Trommelbremsen - Achsaufnahme Standard kpl. Ab Fertigungswoche 25/98	Paar	
	752 861 072	Trommelbremse - Achsaufnahme Standard kpl. Ab Fertigungswoche 25/98	rechts	
	752 761 072	Trommelbremse - Achsaufnahme Standard kpl. Ab Fertigungswoche 25/98	links	
	000 102 305.01- ET	Linsenschraube M 6 x 40 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 102 314.01- ET	Linsenschraube M 6 x 55 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M 6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 138 002-ET	Sicherungsscheibe VS 16	10 St./Pkg.	
	752 850 004-ET	Achsmutter M 16 x 1 / 14,5	4 St./Pkg.	

Classic 140 - Trommelbremse mit Zapfen bis FW 24/98

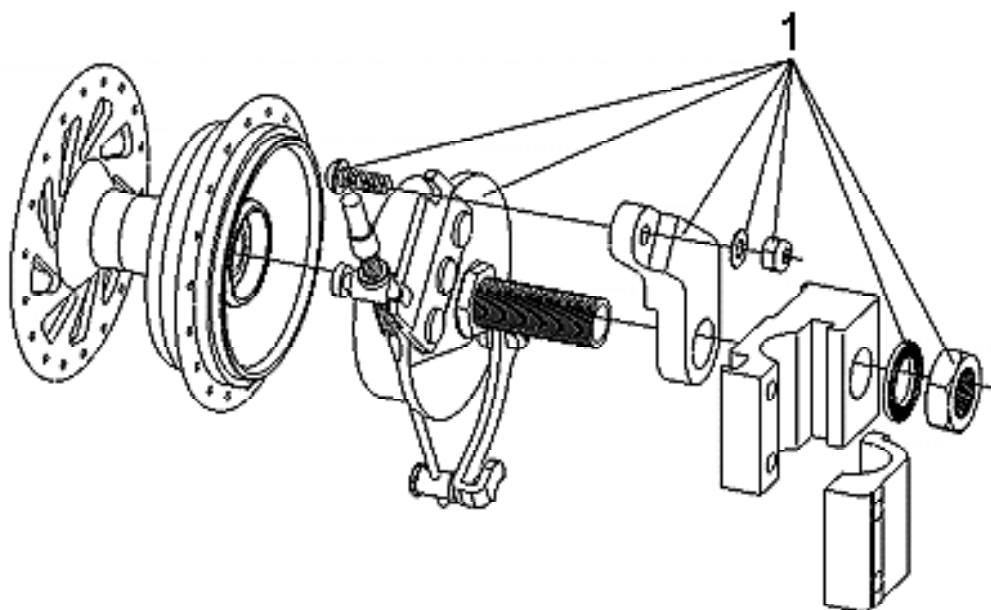


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
	750 961 072	Trommelbremsen für Achsaufnahme mit Zapfen kpl. Bis Fertigungswoche 24/98	Paar	
	750 861 072	Trommelbremse für Achsaufnahme mit Zapfen kpl. Bis Fertigungswoche 24/98	rechts	
1	750 761 072	Trommelbremse für Achsaufnahme mit Zapfen kpl. Bis Fertigungswoche 24/98	links	
	000 851 376	Bremsträger	rechts	
	000 751 376	Bremsträger	links	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M 6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 130 107-ET	Scheibe A 6,4 DIN 125	25 St./Pkg.	
	000 102 307.01-ET	Linsenschraube M 6 x 20 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	

Classic 140 - Betätigung für Trommelbremse

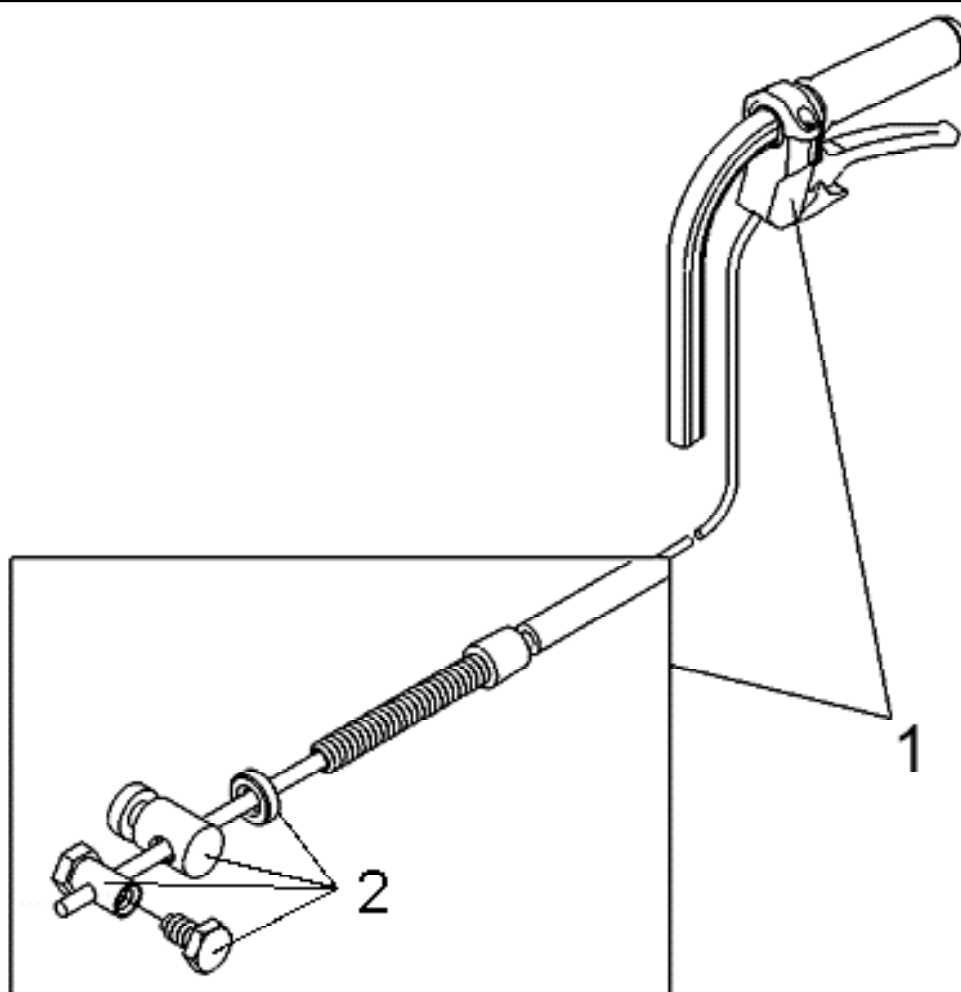

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1	000 861 014	Betätigung für Trommelbremse mit Kabelzug kpl.		
	UP01024-ET	Griff für Rückenrohr bei Trommelbremse	10 St./Pkg.	
	000 228 044-ET	Verschraubungsteile für Kabelzug	4 St./Pkg.	
	752 961 071	Trommelbrems-Umbausatz für Achsaufnahme mit Zapfen (Classic 140 bis Fertigungswoche 24/98) Enthält komplette Trommelbremsen mit Bedienelementen und Antriebsräder für Trommelbremse	Paar	BRFNG...?
	753 961 071	Trommelbrems-Umbausatz für Achsaufnahme Standard (Classic 140 ab Fertigungswoche 25/98) Enthält komplette Trommelbremsen mit Bedienelementen und Antriebsräder für Trommelbremse	Paar	BRFNG...?

Classic 140 - Einhand - Bremse (Neu)

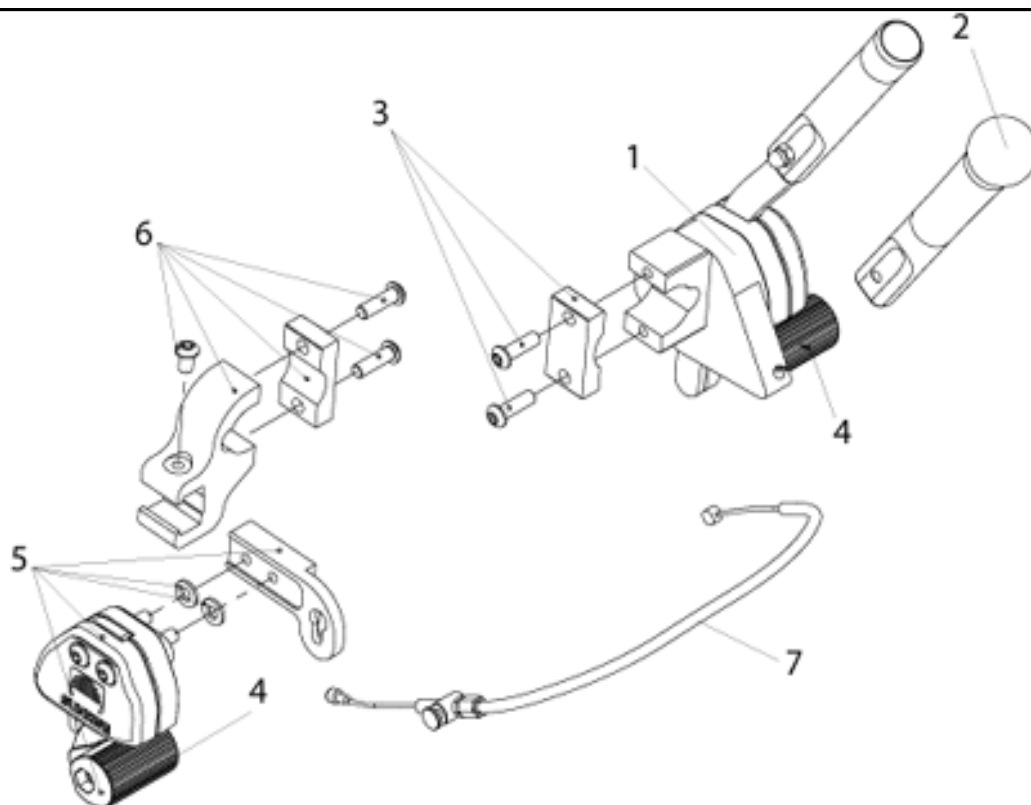

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1 - 7	000 862 240	Einhandbremse mit Betätigung kpl.	rechts	SB ... ?
	000 762 240	Einhandbremse mit Betätigung kpl.	links	SB ... ?
1 - 4	000 862 220	Einhandbremse Betätigungsseite kpl.	rechts	
	000 762 220	Einhandbremse Betätigungsseite kpl.	links	
4 - 6	000 862 230	Einhandbremse Mitläuferseite kpl.	rechts	
	000 762 230	Einhandbremse Mitläuferseite kpl.	links	
2	000 861 253	Bremshebelverlängerung kpl.		
	000 102 066-ET	Linsenschraube M 5 x 20 DIN 7985	12 St./Pkg.	
	000 128 006-ET	6kt-Mutter M5 DIN 985	25 St./Pkg.	
3	000 862 218	Befestigung für Betätigungsseite kpl.	rechts und links verwendbar	
	000 102 307.01-ET	Linsenschraube M 6 x 20 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
4	000 861 252	Bremsbolzen kpl.		
	000 102 312.01-ET	Linsenschraube M 6 x 32 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 862 229	Einhandbremse Mitläuferseite	rechts	
5	000 762 229	Einhandbremse Mitläuferseite	links	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
6	000 861 251	Befestigung für Mitläuferseite kpl.	rechts und links verwendbar	
	000 102 307.01- ET	Linsenschraube M 6 x 20 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 102 310.01- ET	Linsenschraube M 6 x 10 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
7	000 862 223.01	Kabelzug für Einhandbremse kurz kpl.	SB 24-30	
7	000 862 223.02	Kabelzug für Einhandbremse mittel kpl.	SB 32-40	
7	000 862 223.03	Kabelzug für Einhandbremse lang kpl.	SB 42-50	


Baugruppe FUSSRASTE

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe **FUSSRASTE** befinden sich folgende Variantenabfragen:

Abfrage	Bedeutung	Wählbare Varianten
SB	Sitzbreite in cm	38-52 in 2 cm-Schritten
FM	Farbe der Metallteile	siehe Bestellblatt


Classic 140 - Fußraste mit Kunststoff - Fußbrett

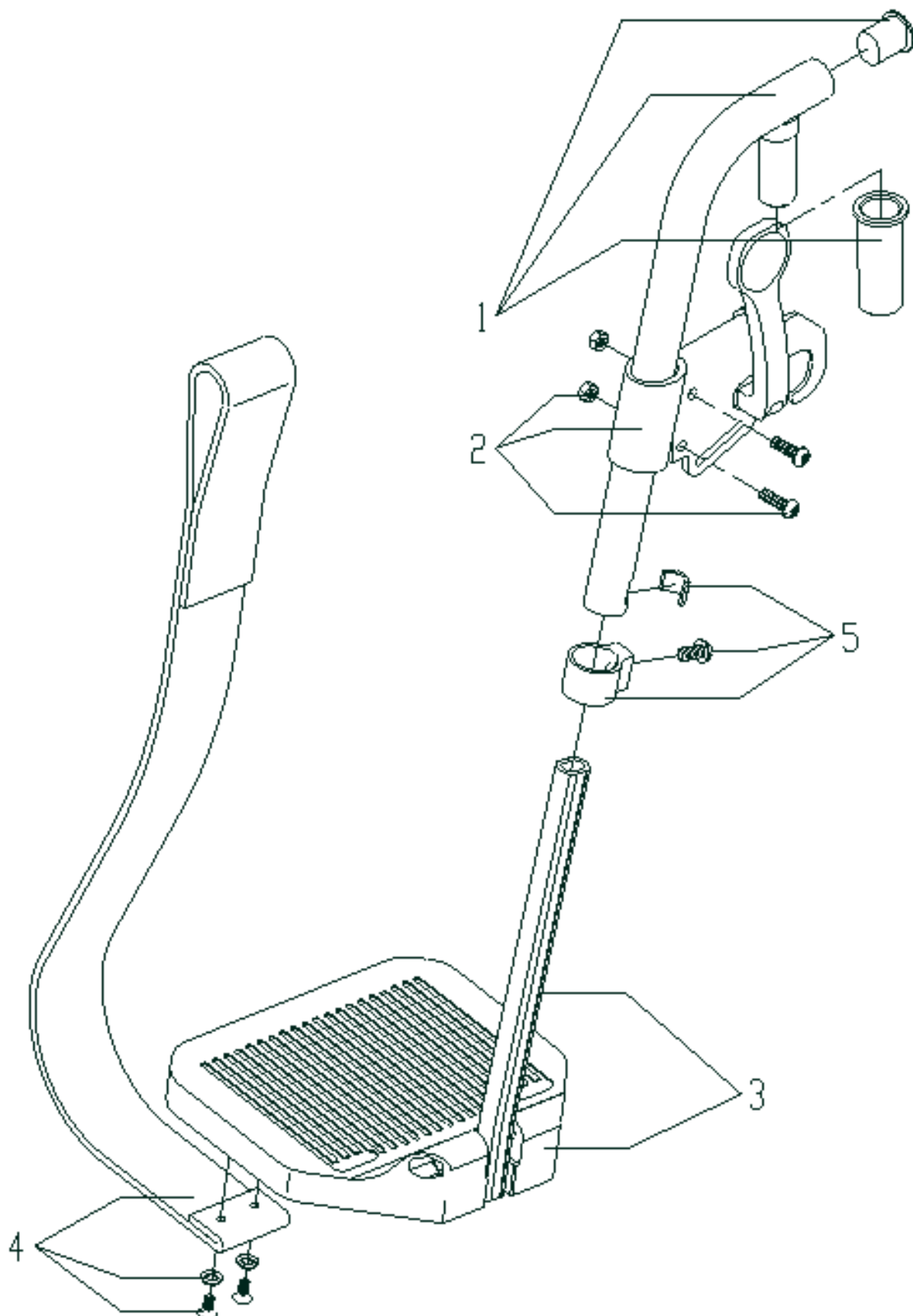

Classic 140 - Fußraste mit Kunststoff - Fußbrett [Stand: 01/2003]

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1-5	752 920 001	Fußrasten geteilt, Kunststoff, schwarz kpl. mit vertikalem Entriegelungshebel	Paar	FM...?
1-5	752 820 001	Fußraste geteilt, Kunststoff, schwarz kpl. mit vertikalem Entriegelungshebel	rechts	FM...?
1-5	752 720 001	Fußraste geteilt, Kunststoff, schwarz kpl. mit vertikalem Entriegelungshebel	links	FM...?
	752 927 010	Fußrastenhalter kpl. mit vertikalem Entriegelungshebel	Paar	FM...?
	752 827 010	Fußrastenhalter kpl. mit vertikalem Entriegelungshebel	rechts	FM...?
1, 2	752 727 010	Fußrastenhalter kpl. mit vertikalem Entriegelungshebel	links	FM...?
1	000 827 002-ET	Buchse mit Rippen für Drehlager	4 St./Pkg.	
	760 827 007-ET	Verschlußstopfen	10 St./Pkg.	
	752 827 003	Verriegelungsadapter kpl.	rechts	
2	752 727 003	Verriegelungsadapter kpl.	links	
	000 102 307.01-ET	Linsenschraube M 6 x 20 mit TORX-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M 6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 923 001	Fußbrett, Fußbügel und Wadenband kpl.	Paar	
	000 823 001	Fußbrett, Fußbügel und Wadenband kpl.	rechts	
3, 4	000 723 001	Fußbrett, Fußbügel und Wadenband kpl.	links	
4	750 822 004	Wadenband, diagonal kpl. rechts und links verwendbar		
5	750 826 006	Montagezubehör für Fußbügel am Fußrastenhalter kpl.		
	000 102 308.01-ET	Linsenschraube M 6 x 12 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	760 827 002-ET	Druckstück	10 St./Pkg.	

Classic 140 - Fußraste hochschwenkbar

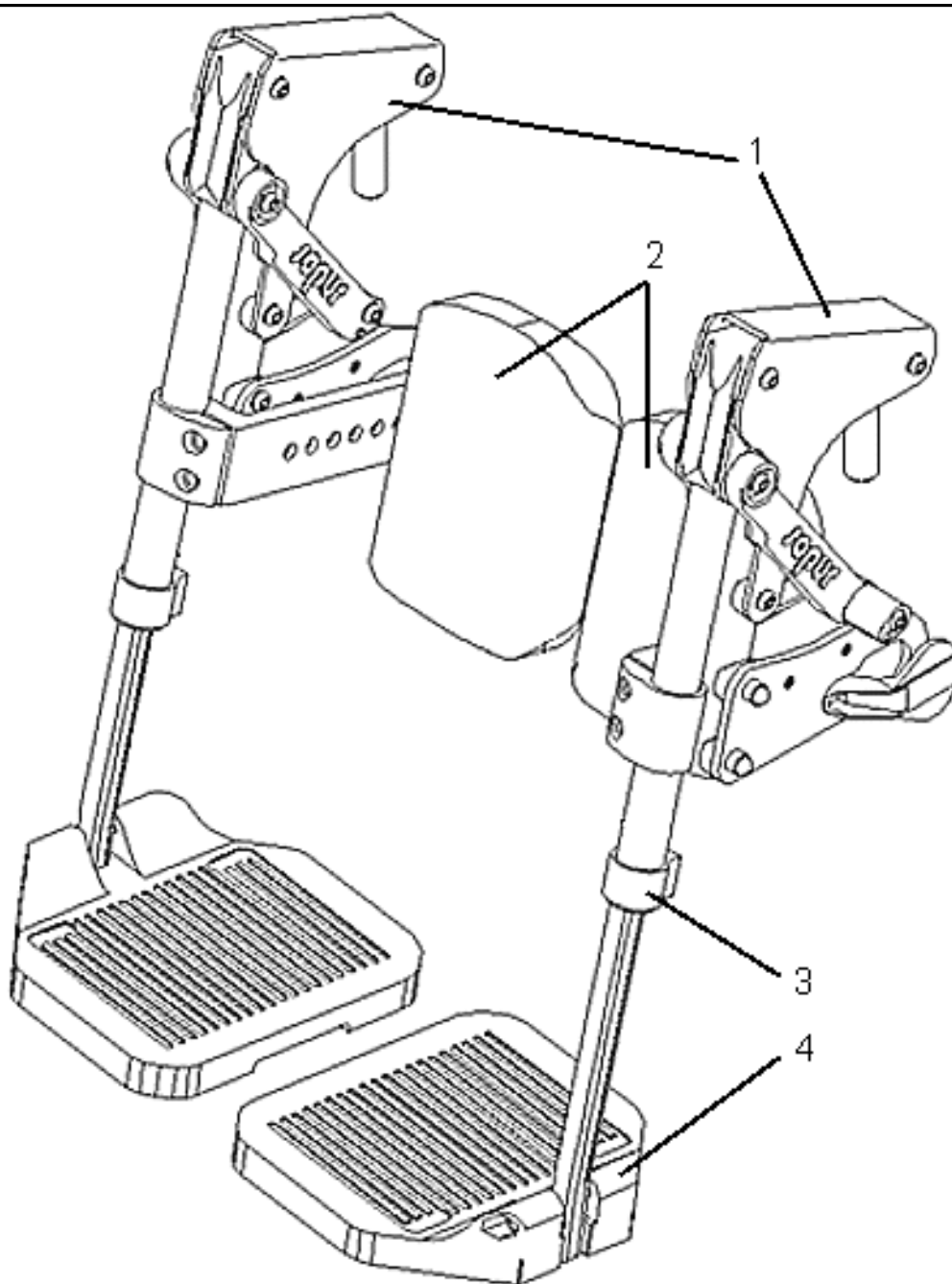

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1 - 4	760 929 100	Fußrasten - Standard, hochschwenkbar kpl. (ohne Längenausgleich)	Paar	SB...?
1 - 4	760 829 100	Fußraste - Standard, hochschwenkbar kpl. (ohne Längenausgleich)	rechts	SB...?
1 - 4	760 729 100	Fußraste - Standard, hochschwenkbar kpl. (ohne Längenausgleich)	links	SB...?
2	760 829 066	Wadenauflage		SB...?
1	760 829 099.10	Fußbügelaufnahme kpl.	rechts	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1	760 729 099.10	Fußbügelaufnahme kpl.	links	
3	750 826 006	Montagezubehör für Fußbügel am Fußrastenhalter kpl.		
	000 829 001	Fußbrett, Fußbügel kpl.	rechts	
4	000 729 001	Fußbrett, Fußbügel kpl.	links	


Baugruppe LENKRAD

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe **LENKRAD** befinden sich folgende Variantenabfragen:

Abfrage	Bedeutung	Wählbare Varianten
SB	Sitzbreite in cm	38-52 in 2 cm-Schritten
FM	Farbe der Metallteile	siehe Bestellblatt


Classic 140 - Lenkrad starr bis FW 49/99

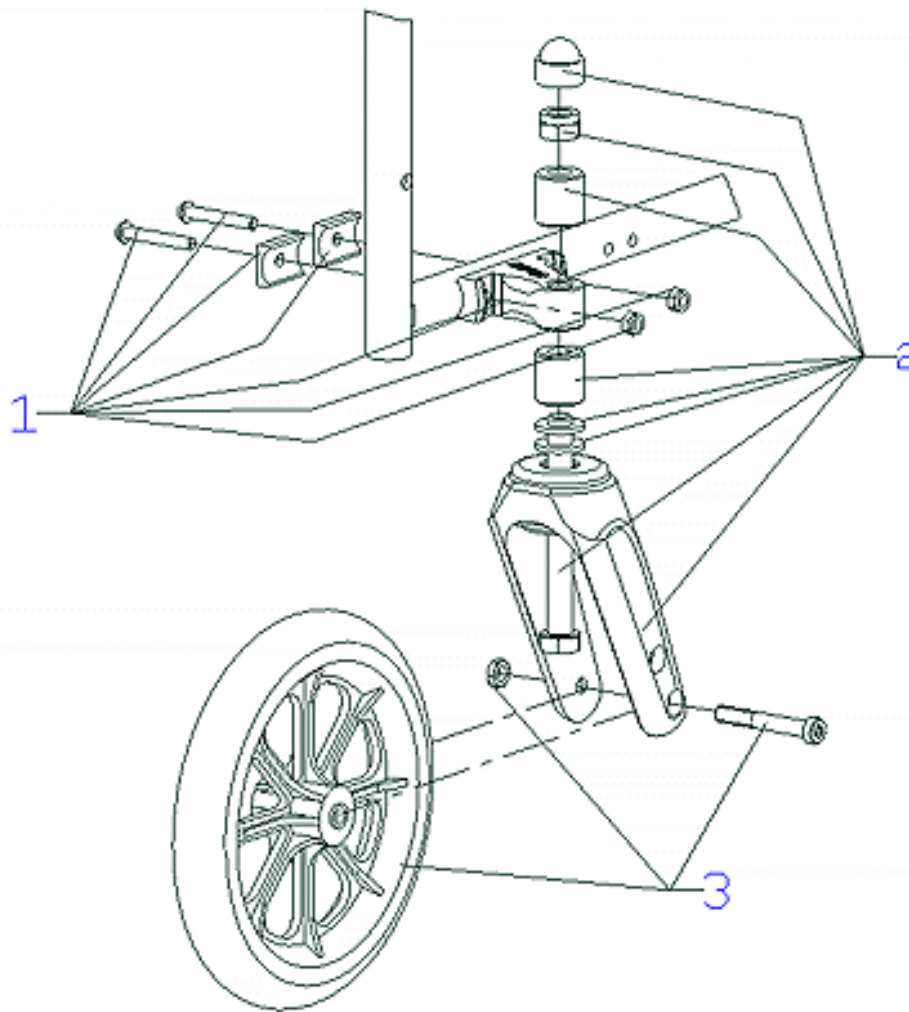

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1 - 3	752 858 015	Vollgummi Lenkrad 4" Kunststoffgabel, kurz Mit Rahmenabbau, ab KW 25/98 rechts und links verwendbar		
3	000 858 155	Lenkrad 4" Vollgummi kpl. Mit Achse für Kunststoffgabel		
	000 102 122-ET	Zyl.-Schraube M 8 x 55 DIN 7984	10 St./Pkg.	
	000 128 020-ET	6kt-Mutter BM 8 DIN 439	25 St./Pkg.	
1 - 3	752 858 010	Soft Lenkrad 6" Kunststoffgabel Mit Rahmenanbau, ab KW 25/98	rechts und links verwendbar	
3	000 858 153	Lenkrad 6" Soft kpl. Mit Achse für Kunststoffgabel		
	000 102 122-ET	Zyl.-Schraube M 8 x 55 DIN 7984	10 St./Pkg.	
	000 128 020-ET	6kt-Mutter BM 8 DIN 439	25 St./Pkg.	
1 - 3	752 858 011	Luftbereiftes Lenkrad 7" Kunststoffgabel Mit Rahmenanbau, ab KW 25/98	rechts und links verwendbar	
3	000 858 151	Lenkrad 7" luftbereift kpl. Mit Achse für Kunststoffgabel		


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
	000 102 122-ET	Zyl.-Schraube M 8 x 55 DIN 7984	10 St./Pkg.	
	000 128 020-ET	6kt-Mutter BM 8 DIN 439	25 St./Pkg.	
1 - 3	752 858 012	Vollgummi Lenkrad 8" Kunststoffgabel Mit Rahmenanbau, ab KW 25/98	rechts und links verwendbar	
3	000 858 154	Lenkrad 8" Vollgummi kpl. Mit Achse für Kunststoffgabel		
	000 102 122-ET	Zyl.-Schraube M 8 x 55 DIN 7984	10 St./Pkg.	
	000 128 020-ET	6kt-Mutter BM 8 DIN 439	25 St./Pkg.	
1	753 858 005	Rahmenanbau für Lenkrad starr kpl. Ab Fertigungswoche 25/98	rechts und links verwendbar	
	000 102 305.01-ET	Linsenschraube M 6 x 40 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M 6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	752 858 008	Rahmenanbau für Lenkrad starr kpl. Bis Fertigungswoche 24/98	rechts und links verwendbar	
	000 100 066.01-ET	6kt-Schraube M 6 x 40 DIN 931 Dacromet	10 St./Pkg.	
	000 133 023-ET	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	50 St./Pkg.	
2	752 858 009	Kunststoffgabel, kpl. rechts und links verwendbar	rechts und links verwendbar	
2	752 858 017	Kunststoffgabel, kurz kpl. , nur für 4 Zoll-Lenkrad	rechts und links verwendbar	
	000 100 078-ET	6kt-Schraube M 12 x 110 DIN 931	10 St./Pkg.	
	000 128 024-ET	6kt-Mutter M 12 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 138 004-ET	Sicherungsscheibe VS 12	25 St./Pkg.	
	000 282 071-ET	6kt-Schutzkappe M 12	10 St./Pkg.	

Classic 140 - Lenkrad winkelverstellbar bis FW 49/99

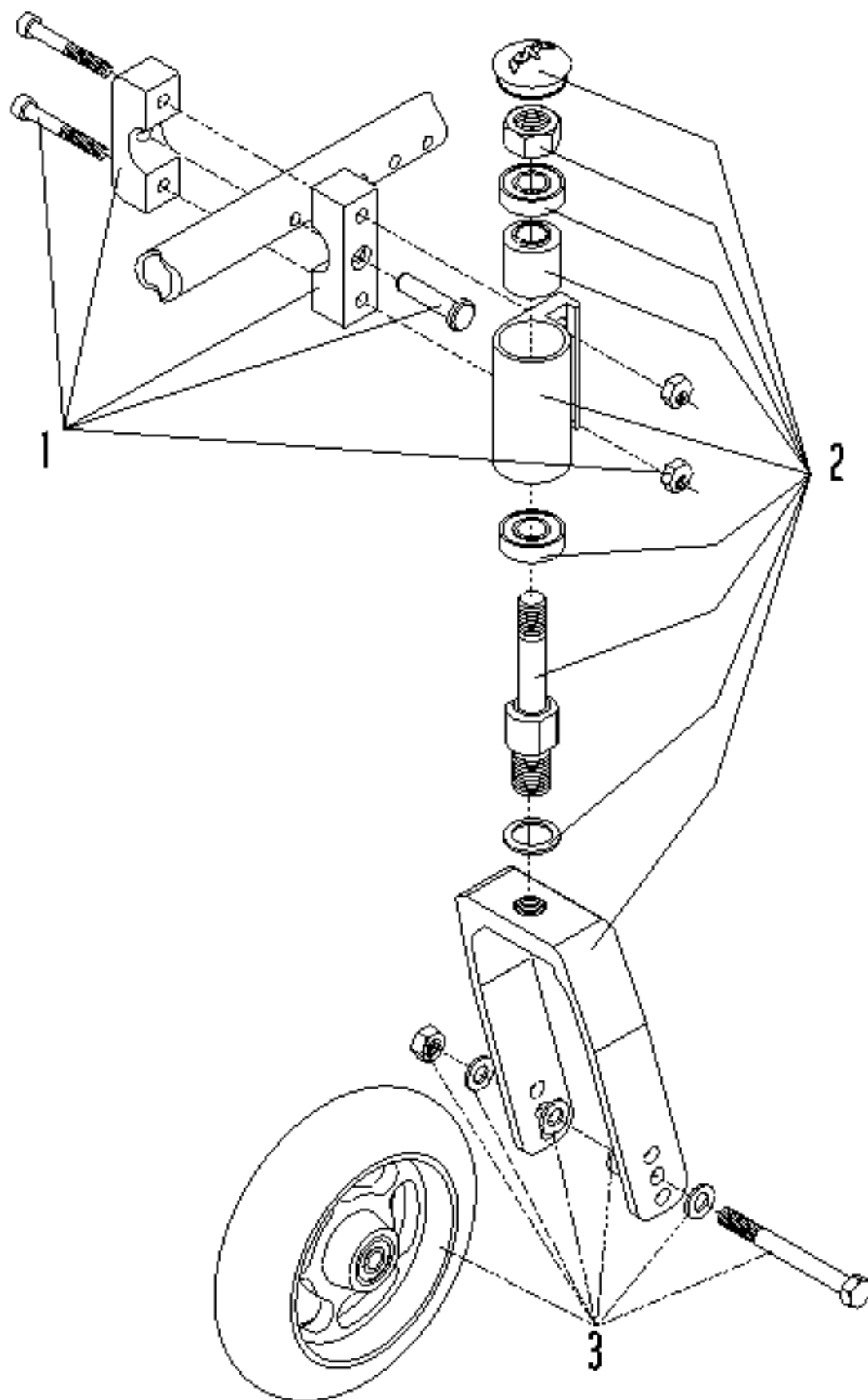

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
	760 958 536	Soft Lenkrad 6" Gabel 147mm kpl. Mit Rahmenanbau	Paar	
	760 858 536	Soft Lenkrad 6" Gabel 147mm kpl. Mit Rahmenanbau	rechts	
1 - 3	760 758 536	Soft Lenkrad 6" Gabel 147mm kpl. Mit Rahmenanbau	links	
3	000 858 064	Lenkrad 6" Soft kpl. Mit Achse für Gabel 147mm		
	000 100 025-ET	6kt-Schraube M 8 x 80 DIN 931 für Gabel 147mm	10 St./Pkg.	
	000 128 015-ET	6kt-Mutter M 8 DIN 985	25 St./Pkg.	
	760 958 528	Luftbereiftes Lenkrad 7" Gabel 147mm kpl. Mit Rahmenanbau	Paar	
	760 858 528	Luftbereiftes Lenkrad 7" Gabel 147mm kpl. Mit Rahmenanbau	rechts	
1 - 3	760 758 528	Luftbereiftes Lenkrad 7" Gabel 147mm kpl. Mit Rahmenanbau	links	
3	000 858 575	Lenkrad 7" luftbereift kpl. Mit Achse für Gabel 147mm		
	000 100 025-ET	6kt-Schraube M 8 x 80 DIN 931 für Gabel 147mm	10 St./Pkg.	
	000 128 015-ET	6kt-Mutter M 8 DIN 985	25 St./Pkg.	
	760 958 538	Vollgummi Lenkrad 8" Gabel 147mm kpl. Mit Rahmenanbau	Paar	
	760 858 538	Vollgummi Lenkrad 8" Gabel 147mm kpl. Mit Rahmenanbau	rechts	
1 - 3	760 758 538	Vollgummi Lenkrad 8" Gabel 147mm kpl. Mit Rahmenanbau	links	
3	000 858 580	Lenkrad 8" Vollgummi kpl. Mit Achse für Gabel 147mm		
	000 100 025-ET	6kt-Schraube M 8 x 80 DIN 931 für Gabel 147mm	10 St./Pkg.	
	000 128 015-ET	6kt-Mutter M 8 DIN 985	25 St./Pkg.	
	760 858 005	Rahmenanbau für Lenkradbefestigung 5°	rechts	
1	760 758 005	Rahmenanbau für Lenkradbefestigung 5°	links	
	000 102 056.01-ET	Linsenschraube M 6 x 45 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	630 858 008-ET	6kt-Mutter M 6 exzentrisch	4 St./Pkg.	
	000 958 570	Gabel 147mm kpl. mit Schraubachse und Lenkradadapter	Paar	
	000 858 570	Gabel 147mm kpl. Mit Schraubachse und Lenkradadapter	rechts	
2	000 758 570	Gabel 147mm kpl. Mit Schraubachse und Lenkradadapter	links	
	000 281 008-ET	Abdeckkappe	10 St./Pkg.	

Classic 140 - Lenkrad winkelverstellbar mit Kunststoffgabel ab FW 50/99

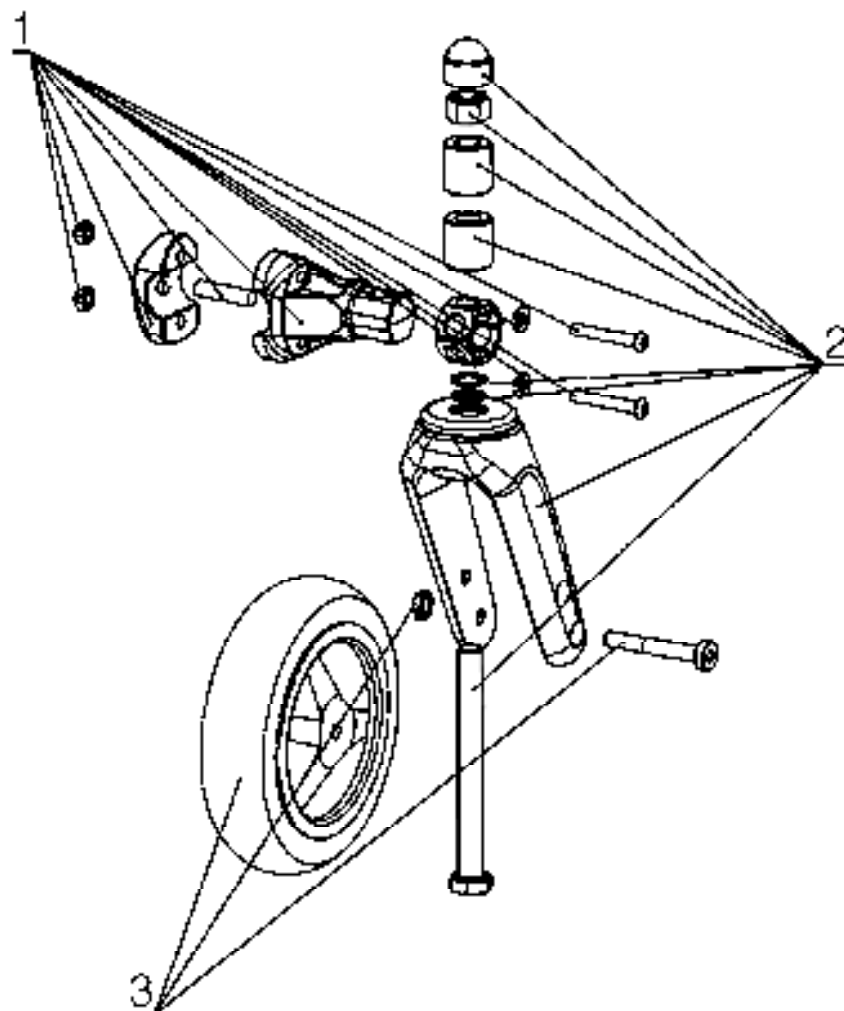

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1 - 3	753 858 100	Vollgummi Lenkrad 4" mit Kunststoffgabel mit Rahmenanbau ab KW 49/99	rechts und links verwendbar	
3	000 858 155	Vollgummi Lenkrad 4" mit Achse für Kunststoffgabel kpl.		
	000 102 122-ET	Zylinderschraube M 8 x 55 DIN 7984	10 St./Pkg.	
	000 128 020-ET	6kt-Mutter M 8 Trelox, halbhoch NO 439	25 St./Pkg.	
1 - 3	753 858 101	Soft Lenkrad 6" mit Kunststoffgabel mit Rahmenanbau ab KW 49/99	rechts und links verwendbar	
3	000 858 153	Soft Lenkrad 6" mit Achse für Kunststoffgabel kpl.		
	000 102 122-ET	Zylinderschraube M 8 x 55 DIN 7984	10 St./Pkg.	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
	000 128 020-ET	6kt-Mutter M 8 Treloc, halbhoch NO 439	25 St./Pkg.	
1 - 3	753 858 102	Luftbereiftes Lenkrad 7" mit Kunststoffgabel mit Rahmenanbau ab KW 49/99	rechts und links verwendbar	
3	000 858 151	Luftbereiftes Lenkrad 7" mit Achse für Kunststoffgabel kpl.		
	000 102 122-ET	Zylinderschraube M 8 x 55 DIN 7984	10 St./Pkg.	
	000 128 020-ET	6kt-Mutter M 8 Treloc, halbhoch NO 439	25 St./Pkg.	
1 - 3	753 858 103	Vollgummi Lenkrad 8" mit Kunststoffgabel mit Rahmenausbau ab KW 49/99	rechts und links verwendbar	
3	000 858 154	Vollgummi Lenkrad 8" mit Achse für Kunststoffgabel kpl.		
	000 102 122-ET	Zylinderschraube M 8 x 55 DIN 7984	10 St./Pkg.	
	000 128 020-ET	6kt-Mutter M 8 Treloc, halbhoch NO 439	25 St./Pkg.	
1	753 858 030	Rahmenanbau für Lenkrad winkelverstellbar ab KW 49/99	rechts und links verwendbar	
	000 154 205-ET	Zylinderstift 8 x 32	25 St./Pkg.	
	000 102 305.01-ET	Linsenschraube M 6 x 40 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 130 107-ET	Scheibe A 6,4 DIN 125	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M 6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	752 858 017	Kunststoffgabel kurz kpl. nur für 4 Zoll-Lenkrad	links und rechts verwendbar	
2	752 858 009	Kunststoffgabel lang kpl.	links und rechts verwendbar	
	000 100 078-ET	6kt-Schraube M 12 x 110 DIN 931	10 St./Pkg.	
	000 128 024-ET	6kt-Mutter M12 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 138 004-ET	Sicherungsscheibe VS 12	25 St./Pkg.	
	000 282 071-ET	6kt-Schutzkappe M 12	10 St./Pkg.	

Baugruppe RAHMEN


Baugruppe RAHMEN

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe **RAHMEN** befinden sich folgende Variantenabfragen:


Abfrage	Bedeutung	Wählbare Varianten
FM	Farbe der Metallteile	siehe Bestellblatt

Classic 140 - Rahmen ab FW 25/98

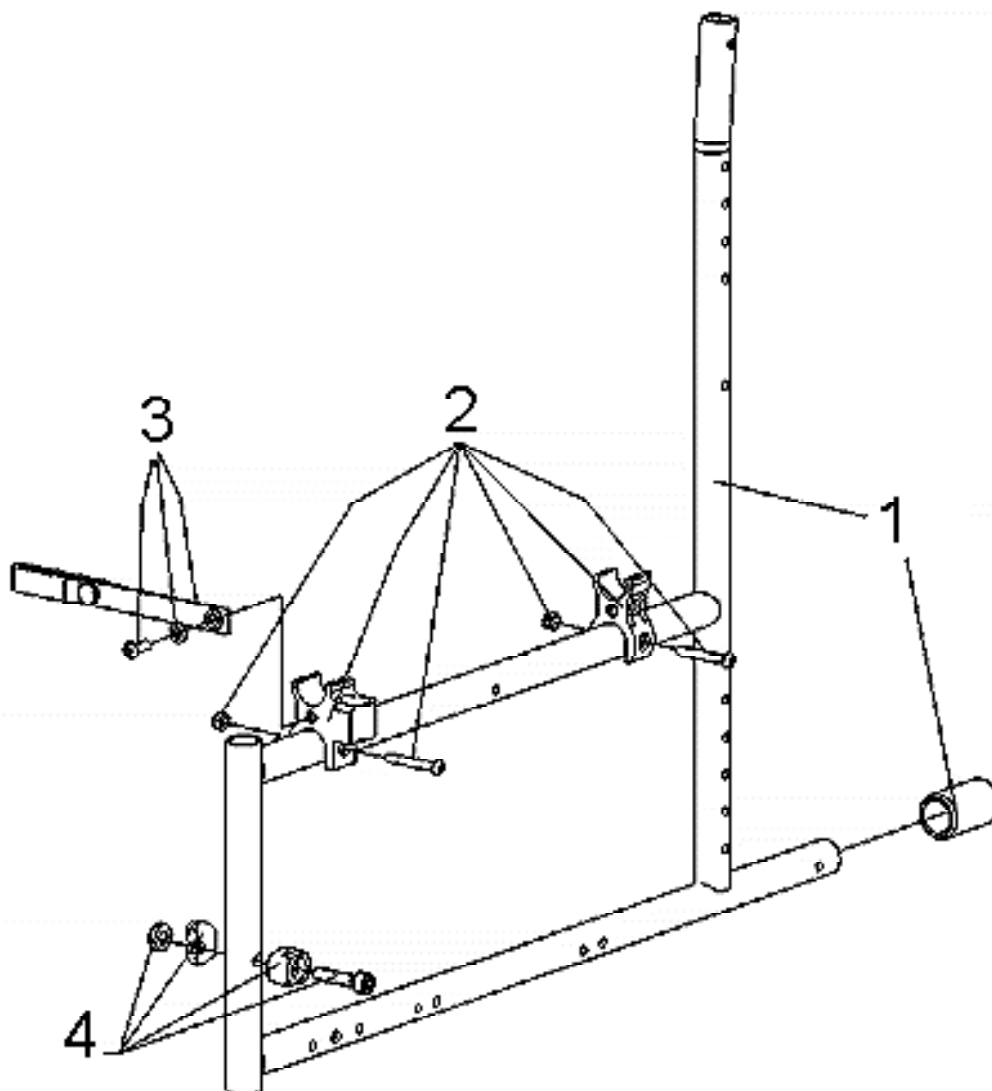

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1	753 812 000	Rahmenteil beschichtet (ab Fertigungswoche 25/98)	rechts und links verwendbar	FM ...?
	000 282 023-ET	Auftrittskappe, schwarz	20 St./Pkg.	
2, 3	750 812 015	Auflagerset incl. Faltfixierung kpl.		
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 102 304.01-ET	Linsenschraube M 6 x 35 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
4	760 822 200	Montagezubehör für Fußrastenanbau kpl.	rechts	
4	760 722 200	Montagezubehör für Fußrastenanbau kpl.	links	
	000 102 098-ET	Zyl. Schraube M 8 x 35 DIN 912	25 St./Pkg.	


Classic 140 - Rahmen bis FW 24/98

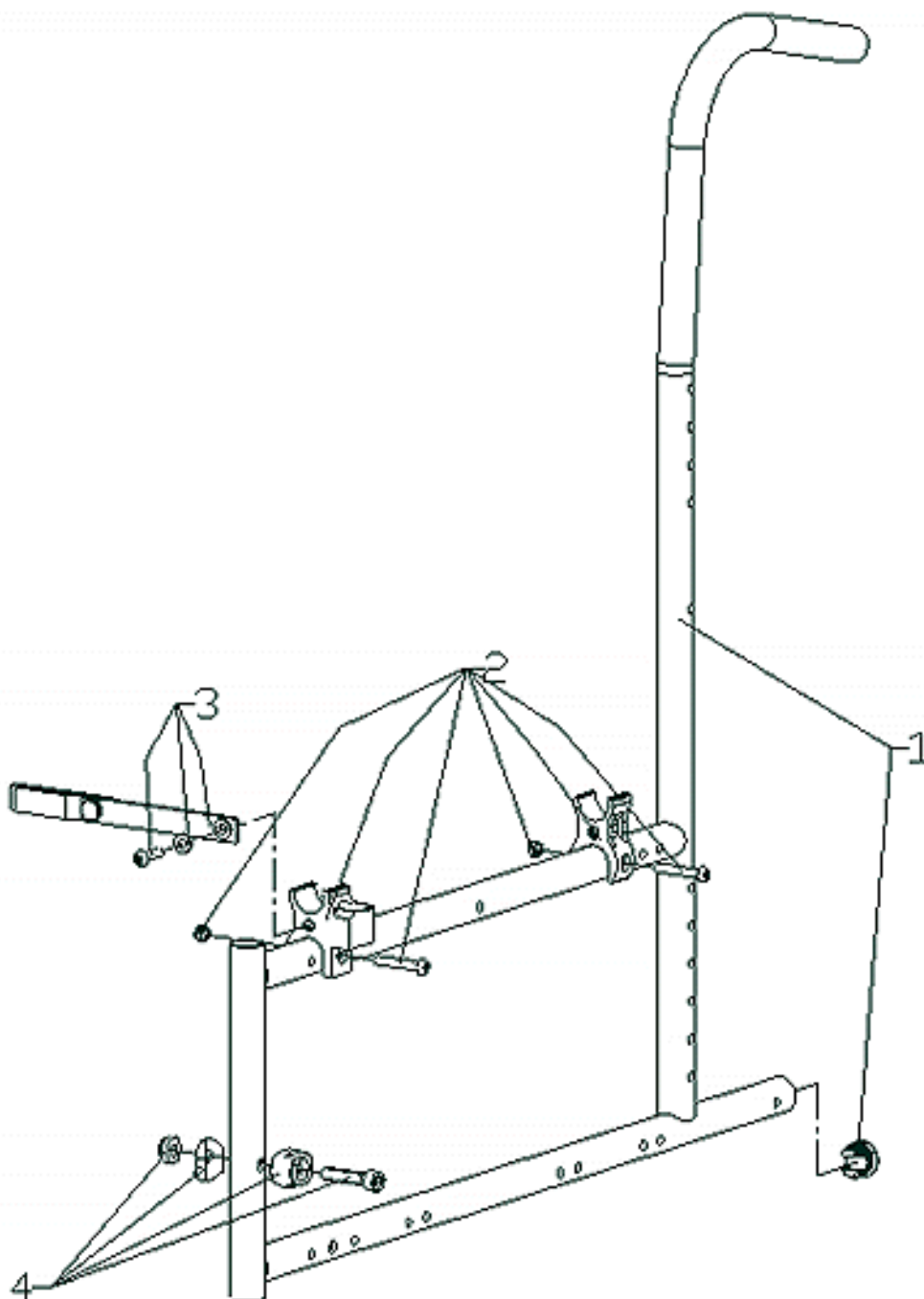

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1	752 812 001	Rahmenteil beschichtet (bis Fertigungswoche 24/98)	rechts und links verwendbar	FM...?
	760 827 007-ET	Lamellenkappe Kunststoff, schwarz	10 St./Pkg.	
2, 3	750 812 015	Auflagerset incl. Faltfixierung kpl.		


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 102 304.01-ET	Linsenschraube M 6 x 35 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
4	752 812 024	Montagezubehör für Fußrastenanbau kpl.		
	000 102 098-ET	Zyl. Schraube M 8 x 35 DIN 912	25 St./Pkg.	

Classic 140 - Achsaufnahme Standard ab FW 25/98

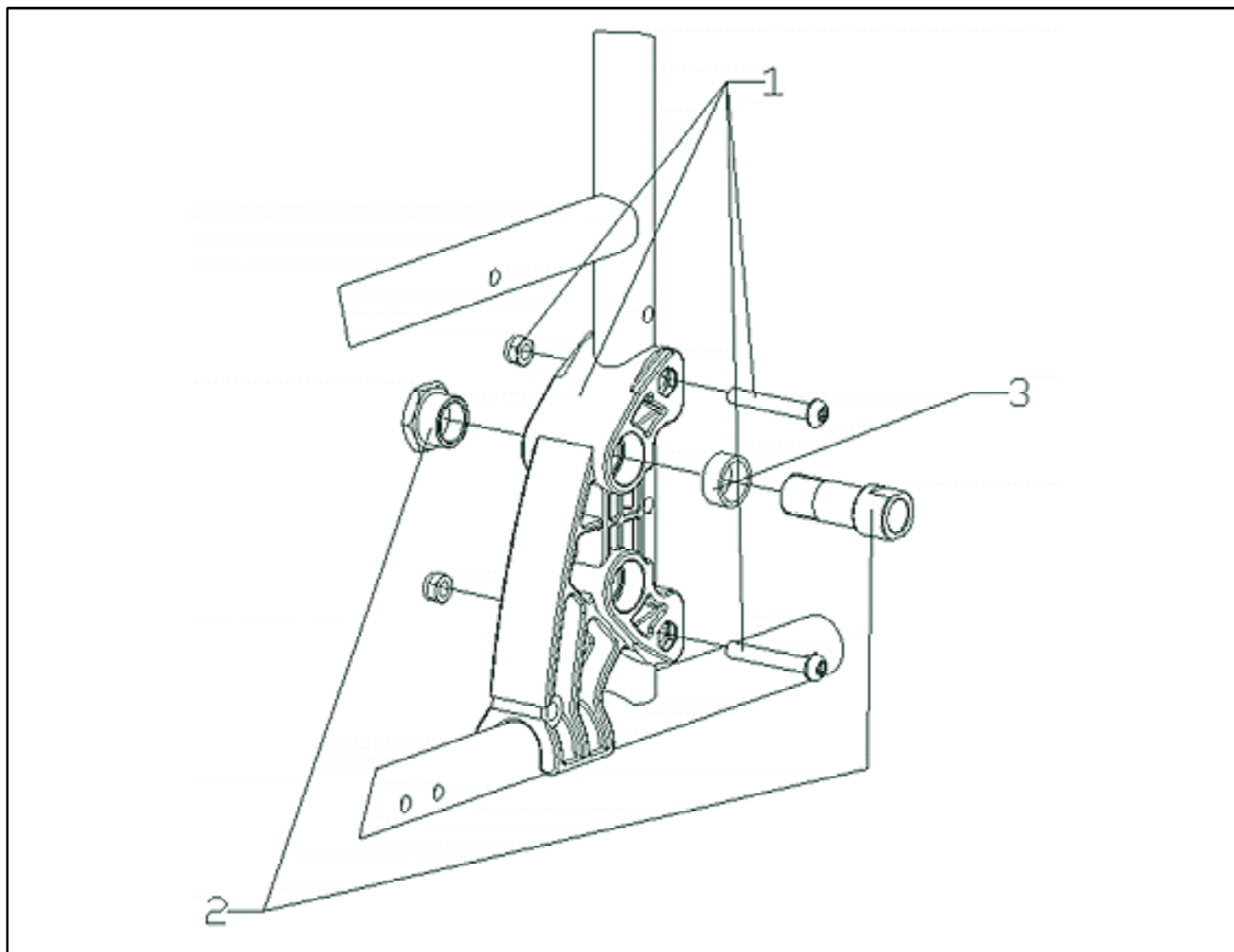

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1-2	752 850 001	Achsaufnahme - Standard kpl. (auch Radstandsverlängerung) ab Fertigungswoche 25/98	rechts und links verwendbar	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 102 305.01-ET	Linsenschraube M 6 x 40 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
1	753 850 002	Achsaufnahme für Trommelbremsbau kpl. (ohne Steckachsenadapter) ab Fertigungswoche 25/98		
2	753 850 003	Steckachsenadapter kpl. ab Fertigungswoche 25/98		
3	753 850 001-ET	Distanz für Anbau Desk III-Seitenteil	2 St./Pkg.	

Classic 140 - Achsaufnahme mit Zapfen bis FW 24/98

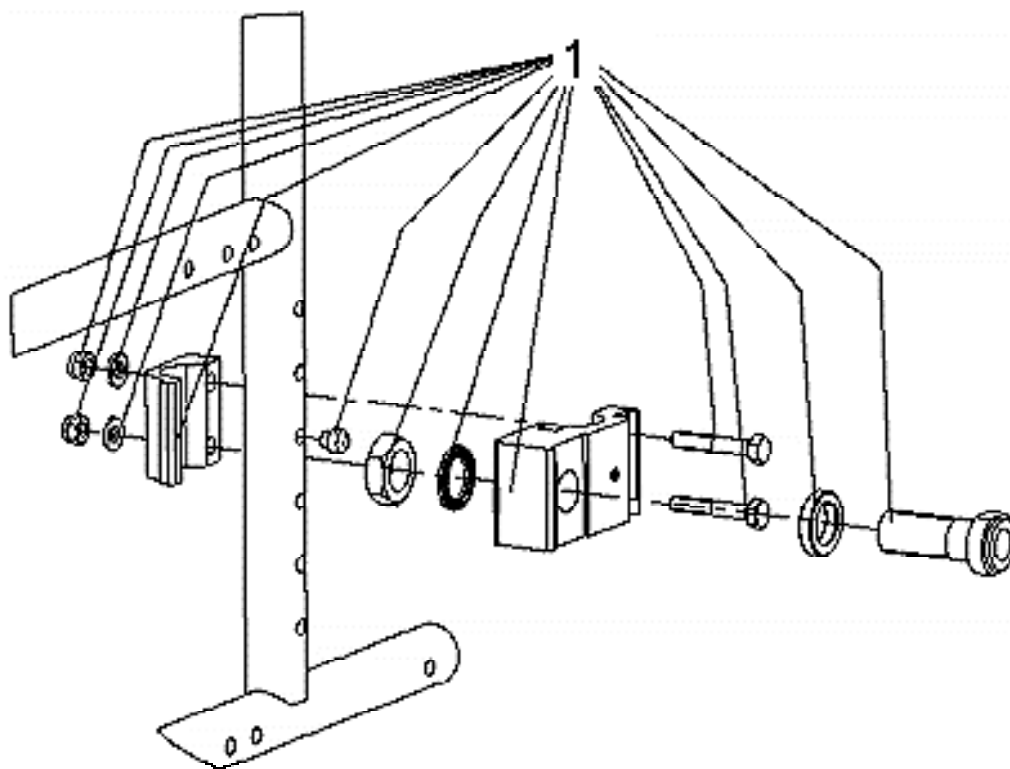

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1	752 850 030	Achsaufnahme mit Zapfen kpl. (bis Fertigungswoche 24/98) (auch Radstandsverlängerung)	rechts und links verwendbar	
	000 100 068.01-ET	6kt-Schraube M 6 x 35 DIN 931 Dacromet	10 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 130 107-ET	Scheibe A 6,4 DIN 125	25 St./Pkg.	
	000 138 002-ET	Sicherungsscheibe VS 16	10 St./Pkg.	
	752 850 005-ET	Zapfen	10 St./Pkg.	

Baugruppe RÜCKEN


Varianten-Erklärung

In der Baugruppe **RÜCKEN** befinden sich folgende Variantenabfragen:

Abfrage	Bedeutung	Wählbare Varianten
SB	Sitzbreite in cm	38-52 in 2 cm-Schritten


Classic 140 - Rücken ab FW 25/98

Sitz- und Rückenbespannungen, sowie alle weiteren Nähteile werden auftragsbezogen angefertigt und sind daher vom Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen.

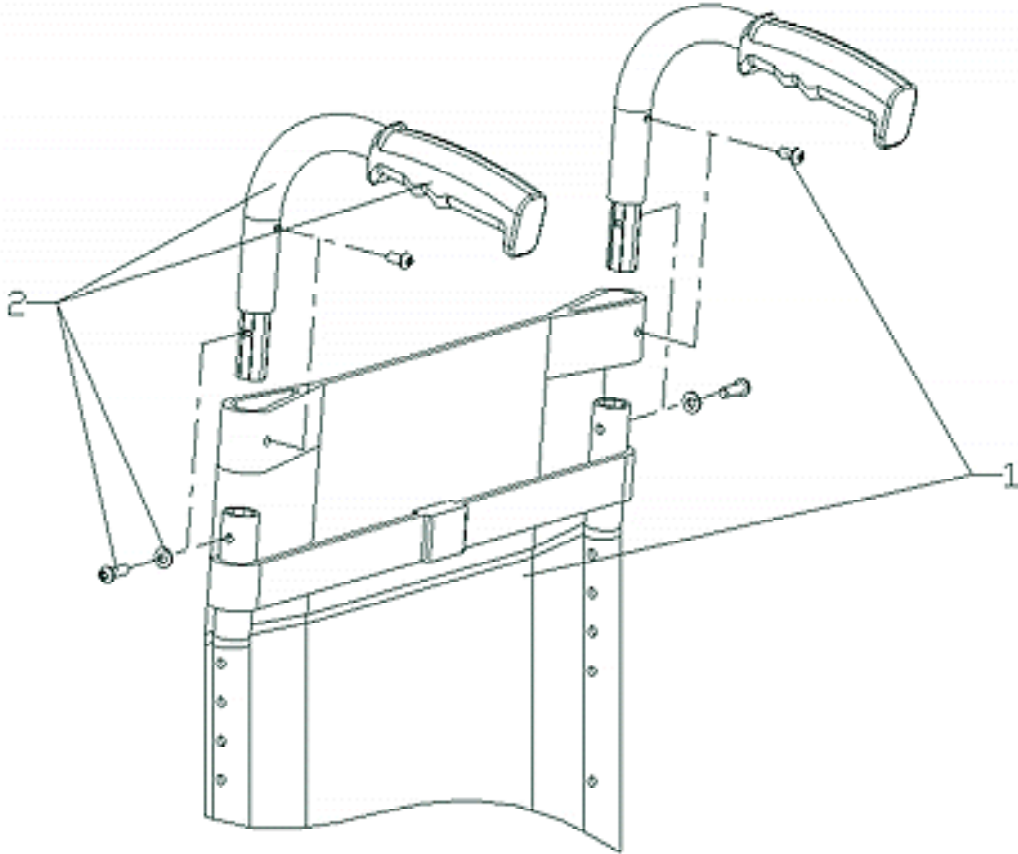

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1	753 843 001	Rückenbespannung schwarz kpl. (ab Fertigungswoche 25/98)		SB...?
	000 102 308.01-ET	Linsenschraube M 6 x 12 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
2	753 841 001	Rückengriff Standard (ab Fertigungswoche 25/98)	rechts und links verwendbar	
	000 130 107-ET	Scheibe A 6,4 DIN 125	25 St./Pkg.	
	000 102 311.01-ET	Linsenschraube M 6 x 27 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	UP01024-ET	Griff für Rückenrohr, schwarz	10 St./Pkg.	


Classic 140 - Rücken bis FW 24/98

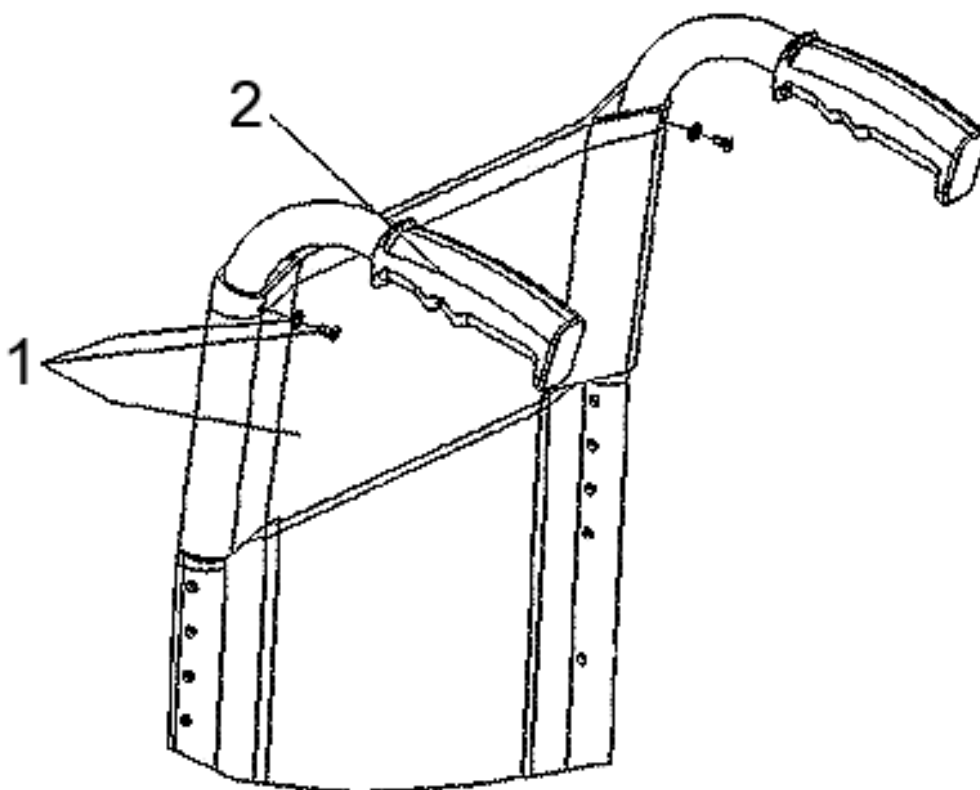

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1	753 843 001	Rückenbespannung kpl. bis Fertigungswoche 24/98		SB...?
	000 114 001-ET	Senkschraube ST 3,9 x 13 DIN 7892	25 St. / Pkg.	
	000 138 018-ET	Rosette für Senkschraube M 5	25 St. / Pkg.	
2	UP01024-ET	Griff für Rückenrohr, schwarz	10 St./Pkg.	


Classic 140 - Rückenbespannung anpaßbar ab FW 49/99

Sitz- und Rückenbespannungen, sowie alle weiteren Nähteile werden auftragsbezogen angefertigt und sind daher vom Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen.

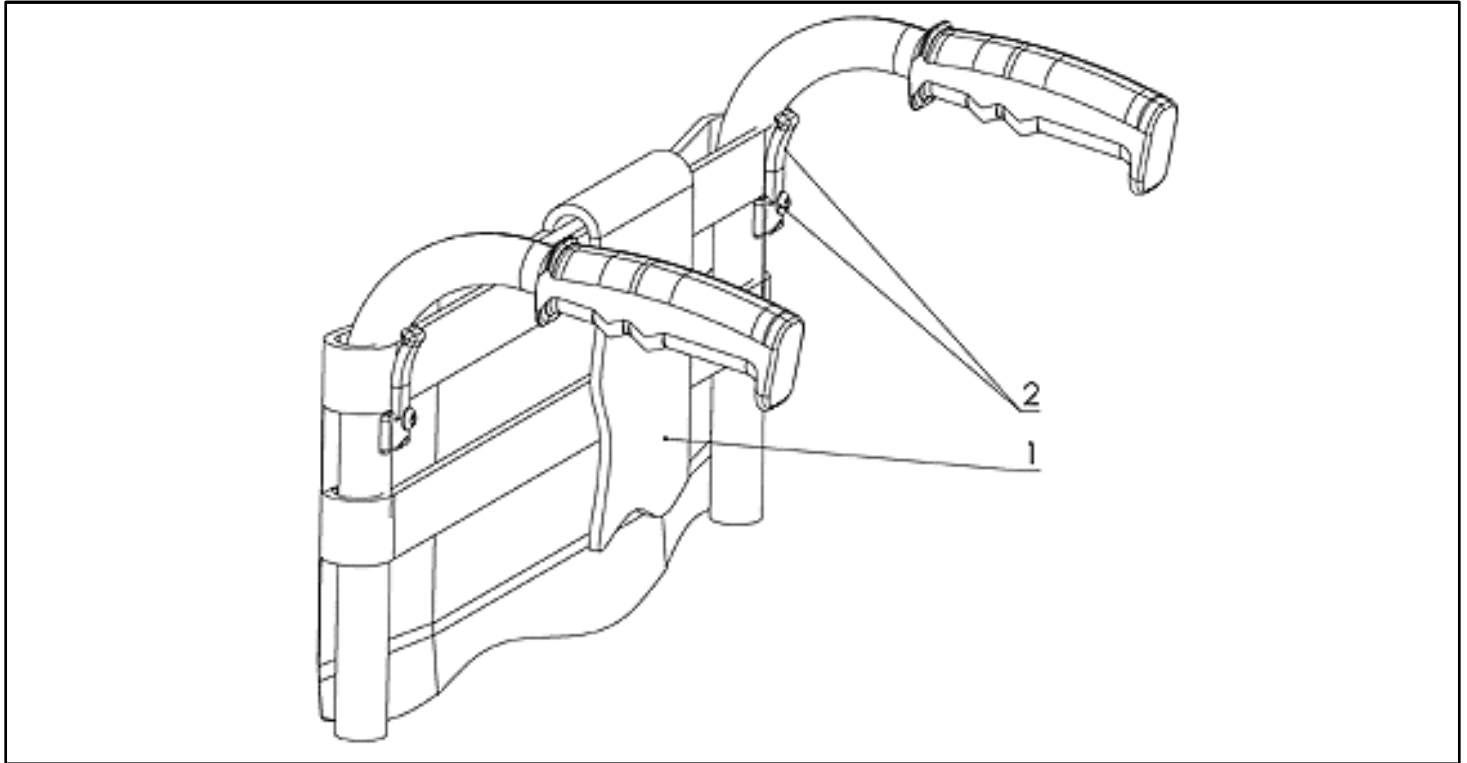

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1 - 2	753 845 001	Rückenbespannung anpaßbar, schwarz kpl. (ab Fertigungswoche 49/99)		SB...?
2	753 949 902	Montagezubehör für Rückenbespannung anpaßbar Für kpl. Rollstuhl (mit gebogenem Halter)		
	000 102 307.01-ET	Linsenschraube M 6 x 20 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	

Classic 140 - Schiebegriffe höhenverstellbar ab FW 25/98

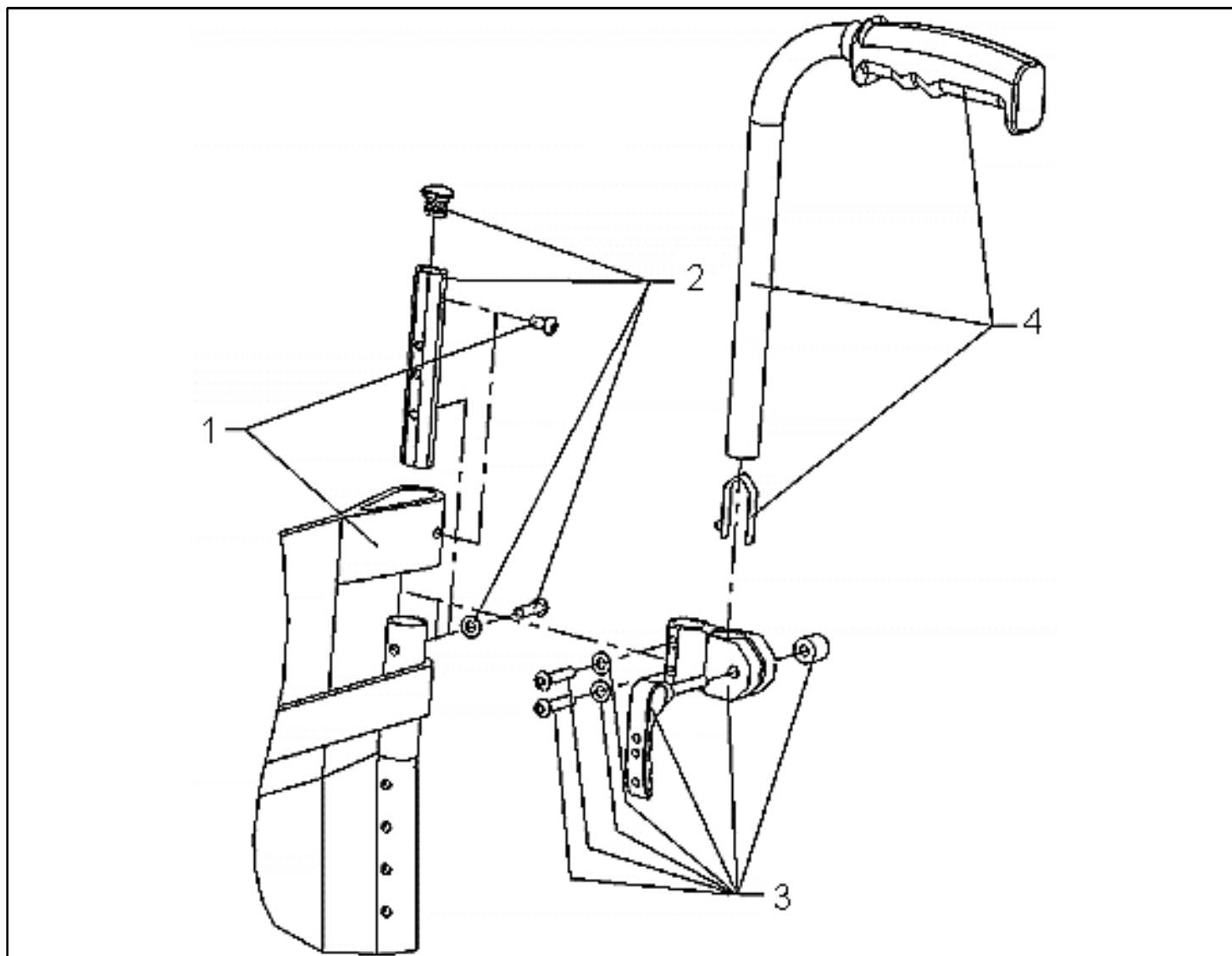

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1	753 843 001	Rückenbespannung schwarz kpl. (ab Fertigungswoche 25/98)		SB...?
	000 102 308.01-ET	Linsenschraube M 6 x 12 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
2-4	753 841 059	Schiebegriff höhenverstellbar mit Schiebegriffhalter und Rückenrohr kpl.	rechts und links verwendbar	
2	753 841 055	Rückenrohr für Schiebegriff höhenverstellbar kpl.	rechts und links verwendbar	
	000 102 311.01-ET	Linsenschraube M 6 x 27 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	760 841 001-ET	Verschlußstopfen für Profilrohr	10 St./Pkg.	
	000 130 107-ET	Scheibe A 6,4 DIN 125	25 St./Pkg.	


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
3	753 841 056	Schiebegriffhalter kpl.	rechts und links verwendbar	
	000 130 107-ET	Scheibe A 6,4 DIN 125	25 St./Pkg.	
	000 102 311.01- ET	Linsenschraube M 6 x 27 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 233 027	Schnellspannhebel		
4	753 841 057	Schiebegriff höhenverstellbar kpl.	rechts und links verwendbar	
	UP01024-ET	Griff für Rückenrohr, schwarz	10 St./Pkg.	

Baugruppe SEITENTEIL

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe **SEITENTEIL** befinden sich keine Variantenabfragen.


Classic 140 - Armlehne und Kleiderschutz

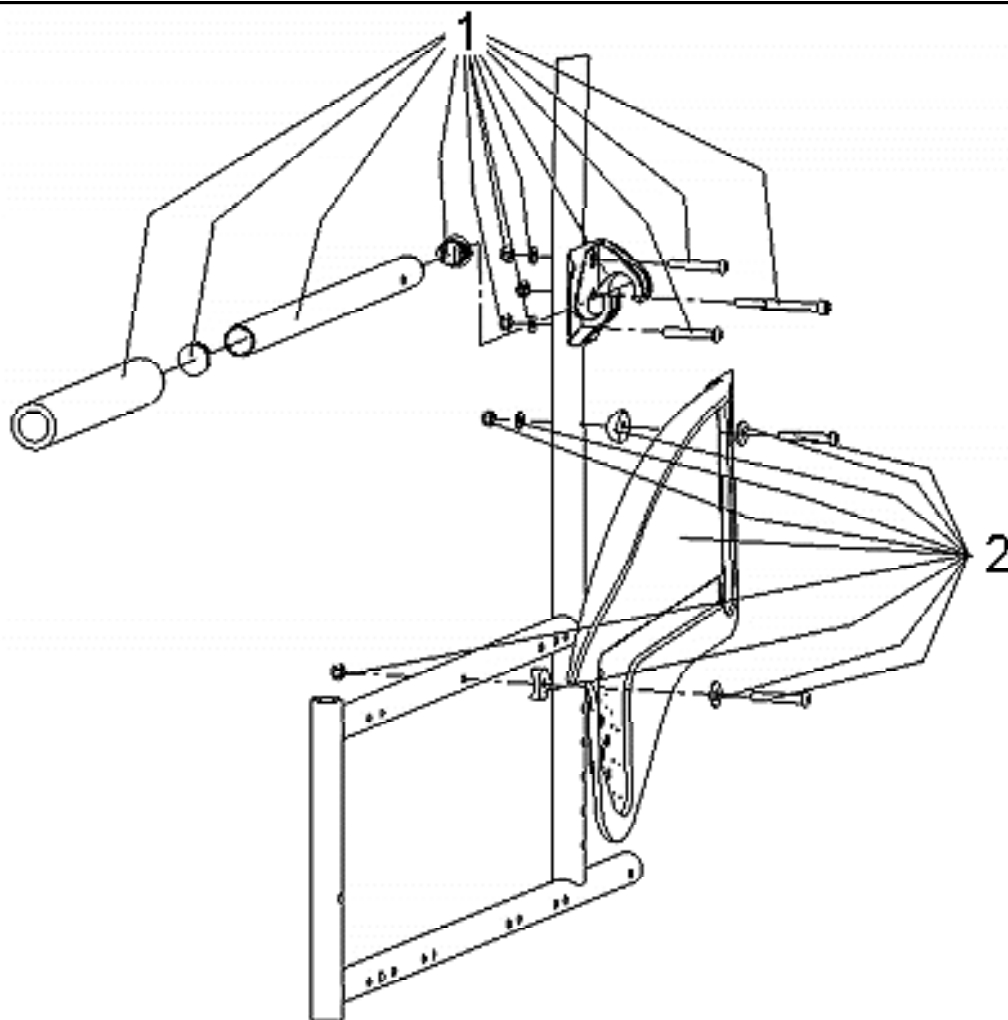

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
	752 942 003	Kleiderschutz mit Armlehne kpl.	Paar	
	752 842 003	Kleiderschutz mit Armlehne kpl.	rechts	
1, 2	752 742 003	Kleiderschutz mit Armlehne kpl.	links	
	752 942 002	Armlehne kpl.	Paar	
	752 842 002	Armlehne kpl.	rechts	
1	752 742 002	Armlehne kpl.	links	
	000 281 009-ET	Soft - Armpolster	10 St./Pkg.	
	760 827 007-ET	Verschußstopfen	10 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 130 107-ET	Scheibe A 6,4 DIN 125	25 St./Pkg.	
	000 102 304.01-ET	Linsenschraube M 6 x 35 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 102 144-ET	Zyl.-Schraube M 6 x 65 DIN 912	25 St./Pkg.	
	760 941 525	Kleiderschutz kpl.	Paar	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
2	760 841 525	Kleiderschutz kpl.	rechts	
	760 741 525	Kleiderschutz kpl.	links	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 130 107-ET	Scheibe A 6,4 DIN 125	25 St./Pkg.	
	000 102 305.01-ET	Linsenschraube M 6 x 40 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 831 232-ET	Halbschale	10 St./Pkg.	
	000 130 116-ET	Scheibe A 6,4 DIN 9021	25 St./Pkg.	


Classic 140 - Desk III-Seitenteil

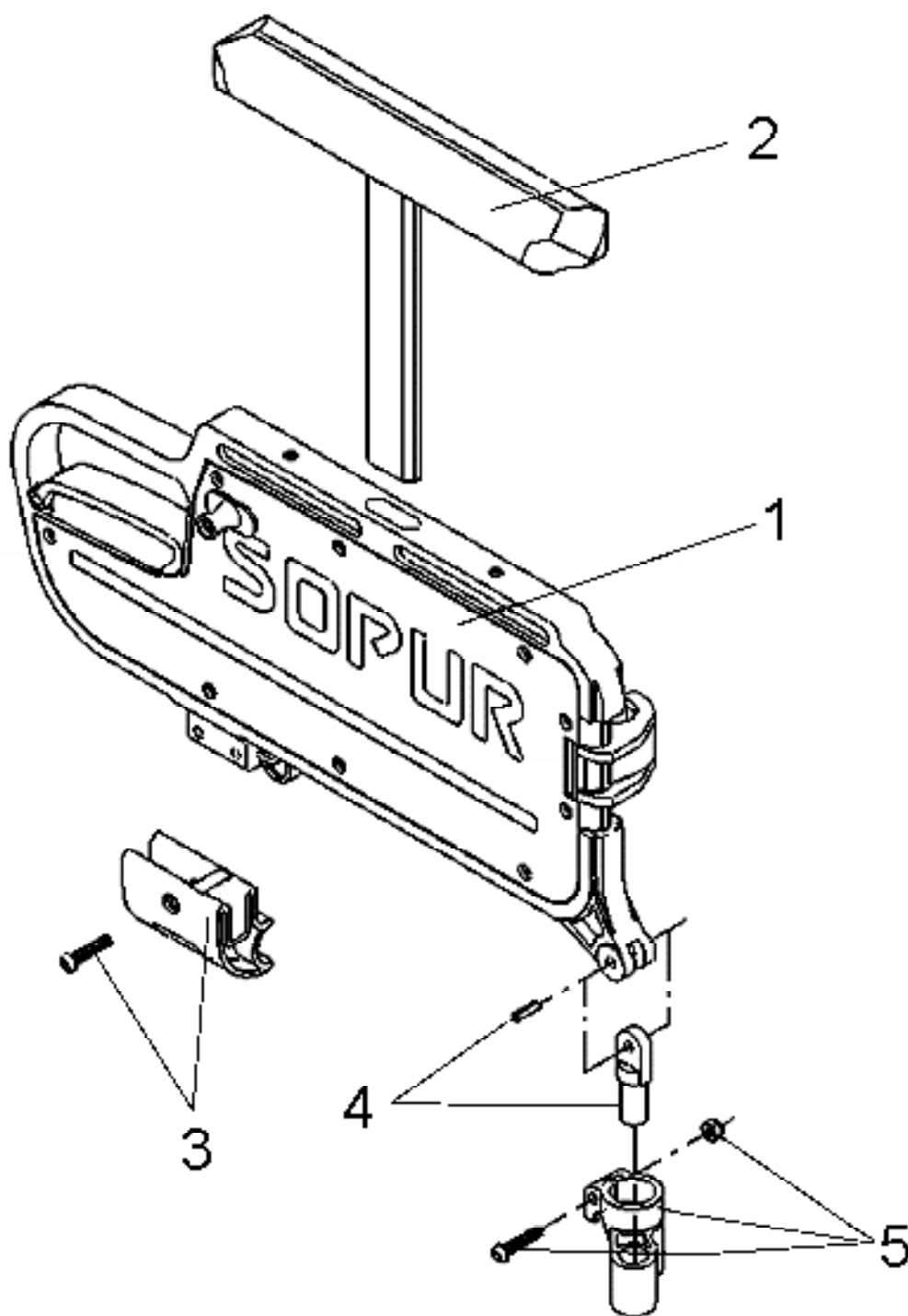

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
	760 942 050.01	Desk-III 19 cm Seitenteile mit Armauflage kurz, höhenverstellbar kpl.	Paar	
	760 842 050.01	Desk-III 19 cm Seitenteil mit Armauflage kurz, höhenverstellbar kpl.	rechts	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1 - 5	760 742 050.01	Desk-III 19 cm Seitenteil mit Armauflage kurz, höhenverstellbar kpl.	links	
	760 942 150.01	Desk-III 19 cm Seitenteile mit Armauflage lang, höhenverstellbar kpl.	Paar	
	760 842 150.01	Desk-III 19 cm Seitenteil mit Armauflage lang, höhenverstellbar kpl.	rechts	
	760 742 150.01	Desk-III 19 cm Seitenteil mit Armauflage lang, höhenverstellbar kpl.	links	
2	760 842 030	Armauflage kurz, höhenverstellbar kpl. rechts und links verwendbar		
	760 842 082	Armauflage lang, höhenverstellbar kpl.	rechts	
	760 742 082	Armauflage lang, höhenverstellbar kpl.	links	
	760 842 053	Seitenteilaufnahme unten kpl.	rechts	
3	760 742 053	Seitenteilaufnahme unten kpl.	links	
	000 102 304.01-ET	Linsenschraube M 6 x 35 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
4	760 842 055	Gelenk kpl.		
	000 156 019-ET	Spannhülse 6 x 22 DIN 7346	25 St./Pkg.	
	760 842 054	Gelenkaufnahme für Desk-III kpl.	rechts	
5	760 742 054	Gelenkaufnahme für Desk-III kpl.	links	
	000 102 311.01-ET	Linsenschraube M 6 x 27 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	

Classic 140 - Seitenteil / Armauflage fest

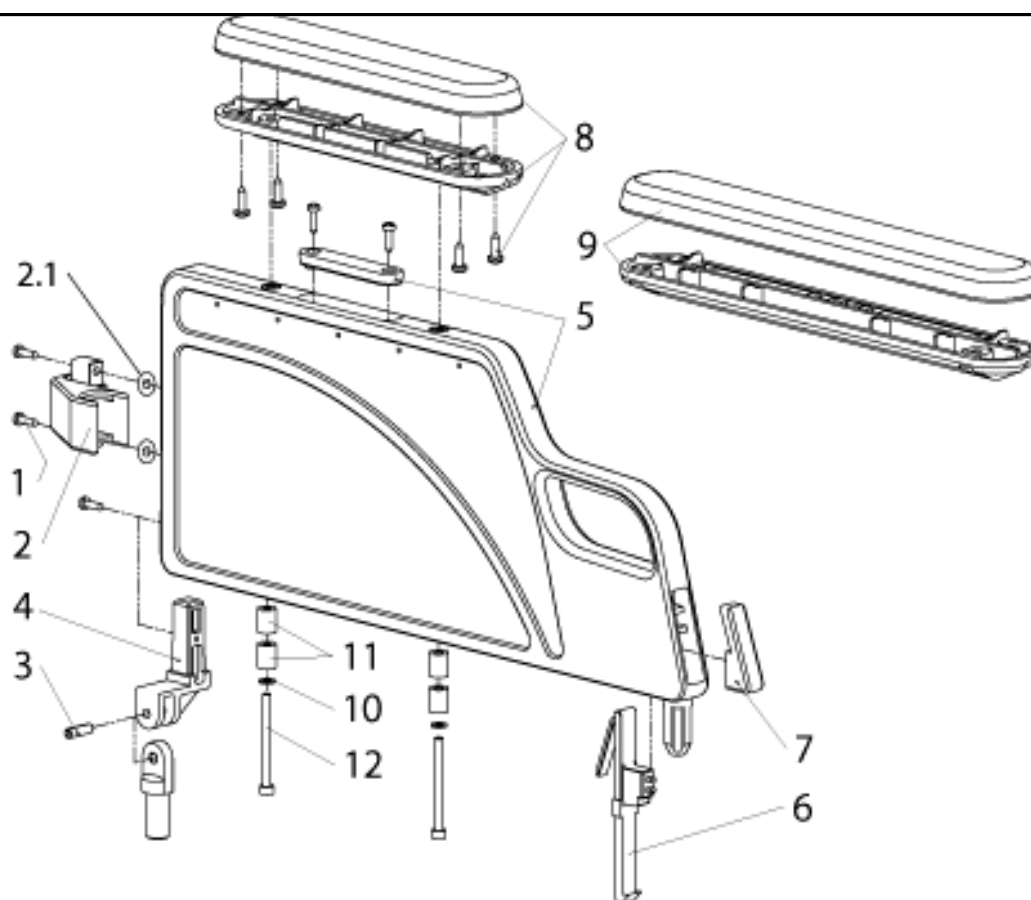

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1-7, 9-12	753 942 003	Seitenteile - Standard, lang	Paar	
1-7, 9-12	753 842 003	Seitenteil - Standard, lang	rechts	
1-7, 9-12	753 742 003	Seitenteil - Standard, lang	links	
9-12	757 842 060	Armauflage lang kpl.		
1-8, 10-12	753 942 002	Seitenteile - Standard, kurz	Paar	
1-8, 10-12	753 842 002	Seitenteil - Standard, kurz	rechts	
1-8, 10-12	753 742 002	Seitenteil - Standard, kurz	links	
8, 10-12	757 842 061	Armauflage kurz kpl.		
1-2.1	757 842 050-ET	Seitenteilaufnahme hinten	2 St./Pkg.	
3-4	757 842 051-ET	Gelenk für Seitenteil kpl.	2 St./Pkg.	
11	000 130 150-ET	Abstandshalter	10 St./Pkg.	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
6-7	757 842 052	Seitenteilverriegelung	recht und links verwendbar	


Baugruppe SITZ

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe **SITZ** befinden sich folgende Variantenabfragen:

Abfrage	Bedeutung	Wählbare Varianten
SB	Sitzbreite in cm	38 - 52 in 2 cm-Schritten
ST	Sitztiefe in cm	40 - 44

Classic 140 - Sitz / Kreuzstrebe

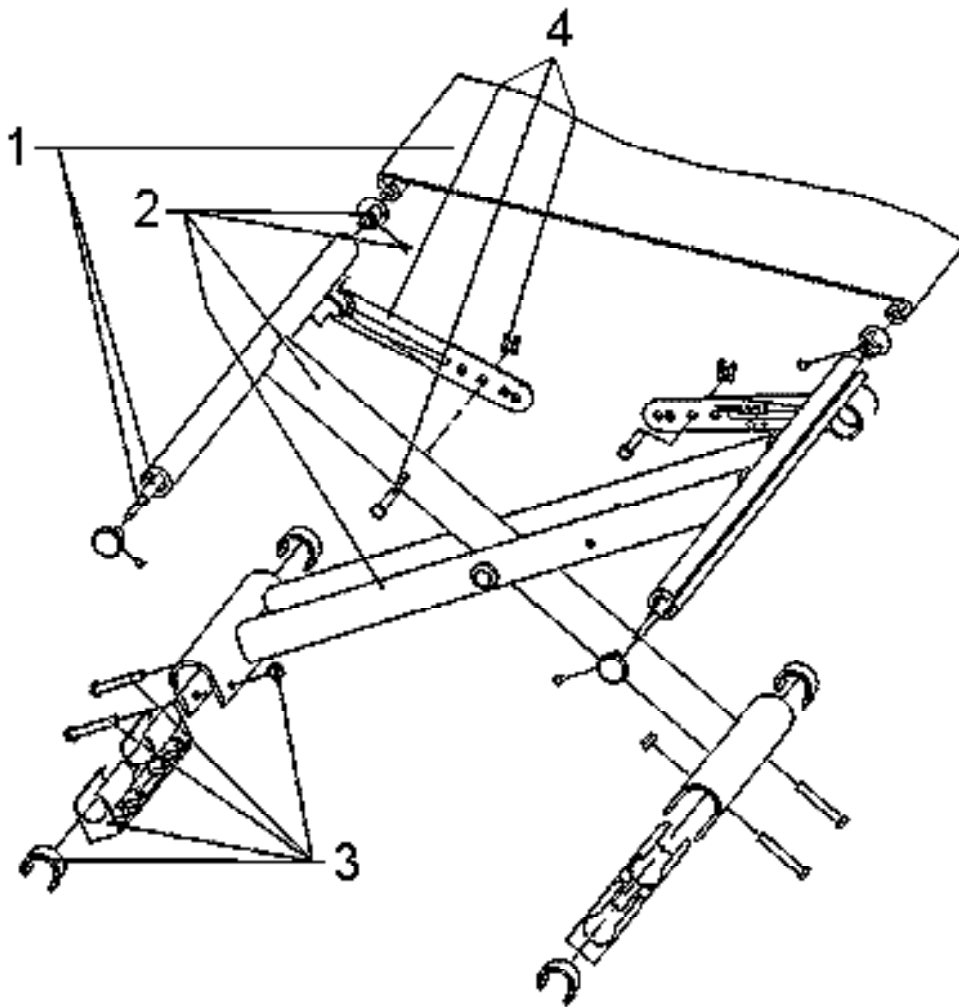

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1	752 832 000	Sitzbespannung kpl.		SB...? ST...?
2 - 4	752 831 001	Kreuzstrebe (vormontiert) kpl.		SB...? ST...?
	000 114 000-ET	Senkschraube ST 3,9 x 9,5 DIN 7982	25 St./Pkg.	
	720 831 606-ET	Verschußstopfen für Formrohr	10 St./Pkg.	
	752 831 003	Montagezubehör: Kreuzstrebe-mitte kpl. (Drehachse kpl.)		
3	752 831 004	Montagezubehör: Kreuzstrebe-unten kpl.	rechts und links verwendbar	
	000 102 305.01-ET	Linsenschraube M 6 x 40 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	752 831 007-ET	Klemmgleiter	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
4	752 831 009	Kreuzstrebenlasche für SB: 38-48 kpl.	rechts und links verwendbar	
4	752 831 015	Kreuzstrebenlasche für SB: 52 kpl.	rechts und links verwendbar	
	752 831 016	Montagezubehör für Kreuzstrebenlasche SB: 38 - 48		
	752 831 017	Montagezubehör für Kreuzstrebenlasche SB: 52		
	000 185 002-ET	SL-Sicherung 6mm	25 St./Pkg.	


Baugruppe ZUBEHÖR

Varianten-Erklärung

In der Baugruppe **ZUBEHÖR** befinden sich folgende Variantenabfragen:

Abfrage	Bedeutung	Wählbare Varianten
SB	Sitzbreite in cm	38 - 52 in 2 cm-Schritten
ST	Sitztiefe in cm	40 - 44


Classic 140 - F16 Adapter

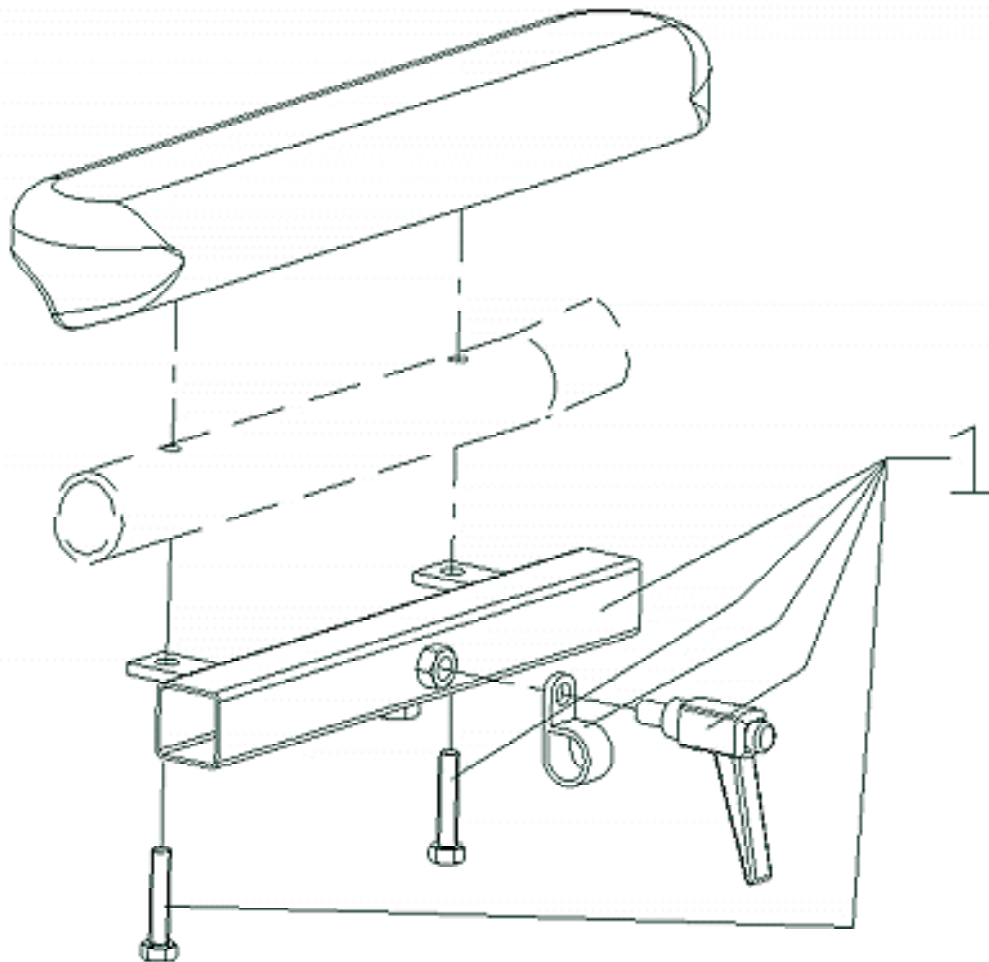

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1 - 4	753 990 001	Umbausatz F 16 kpl. (bis Fertigungswoche 24/98)	Paar	
1 - 3	753 990 002	Umbausatz F 16 kpl. (ab Fertigungswoche 25/98)	Paar	
1	753 842 010	Joystick-Halterung für F16 Bedienpult kpl.		
	000 100 064-ET	6kt-Schraube M 5 x 35 DIN 933	10 St./Pkg.	
2	753 990 005	F 16 Adapter kpl.	Paar	
	000 102 313.01-ET	Linsenschraube M 6 x 50 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
3	000 890 017	Distanzblech (nur für SB 46)		
	000 102 314.01-ET	Linsenschraube M 6 x 55 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
4	752 850 001	Achsaufnahme Standard kpl.		
	000 130 107-ET	Scheibe A 6,4 DIN 125	25 St./Pkg.	
	000 102 314.01-ET	Linsenschraube M 6 x 55 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
	000 102 313.01- ET	Linsenschraube M 6 x 50 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	

Classic 140 - Sicherheitsrad mit Rahmenadapter

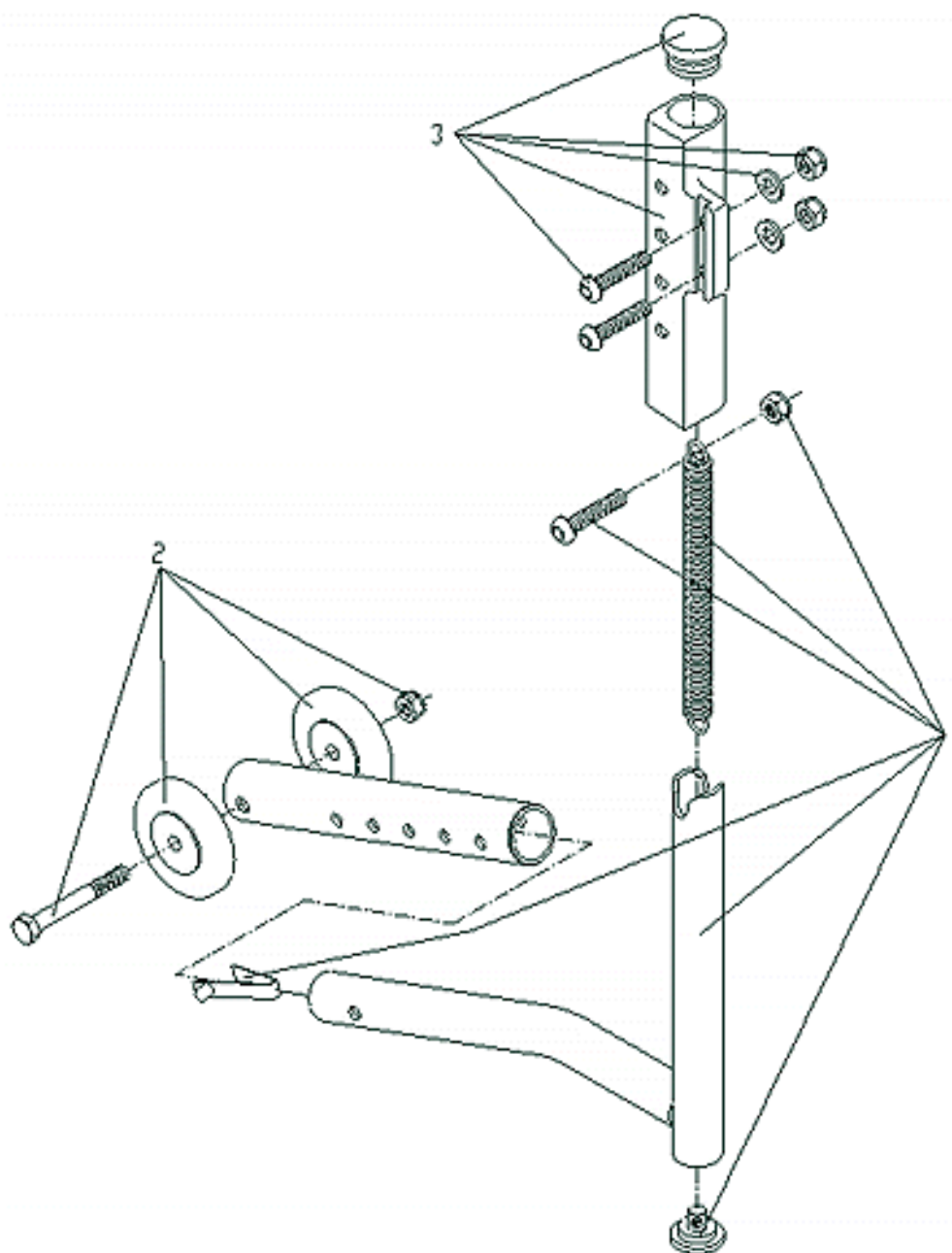


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1 - 3	752 859 001	Sicherheitsrad mit Rahmenadapter kpl.	Anbau rechts	
1 - 3	752 759 001	Sicherheitsrad mit Rahmenadapter kpl.	Anbau links	
1, 2	000 859 202	Sicherheitsrad abschwenkbar, gekröpft kpl. (ohne Rahmenadapter) für 24" und 26" Antriebsräder		
	000 102 304.01- ET	Linsenschraube M 6 x 35 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
2	000 242 002-ET	Stativfeder mit Bolzen Ø 5 mm	5 St./Pkg.	
	000 859 208	Halter für Sicherheitsrad kpl.		
	000 100 031-ET	6kt-Schraube M 6 x 50 DIN 931	10 St./Pkg.	
3	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	752 859 003	Rahmenadapter für Transitrolle und Sicherheitsrad	rechts	
	752 759 003	Rahmenadapter für Transitrolle und Sicherheitsrad	links	
	000 102 305.01-ET	Linsenschraube M 6 x 40 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 102 314.01-ET	Linsenschraube M 6 x 55 mit Torx-Antrieb (nur in Kombination mit Trommelbremse)	25 St./Pkg.	
	000 130 107-ET	Scheibe A 6,4 DIN 125	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 282 061-ET	Lamellenkappe 22	10 St./Pkg.	


Classic 140 - Sitzkissen

Komplette Sitz- und Rückenkissen, sowie Bezüge und Füllungen werden auftragsbezogen angefertigt und sind daher vom Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen.

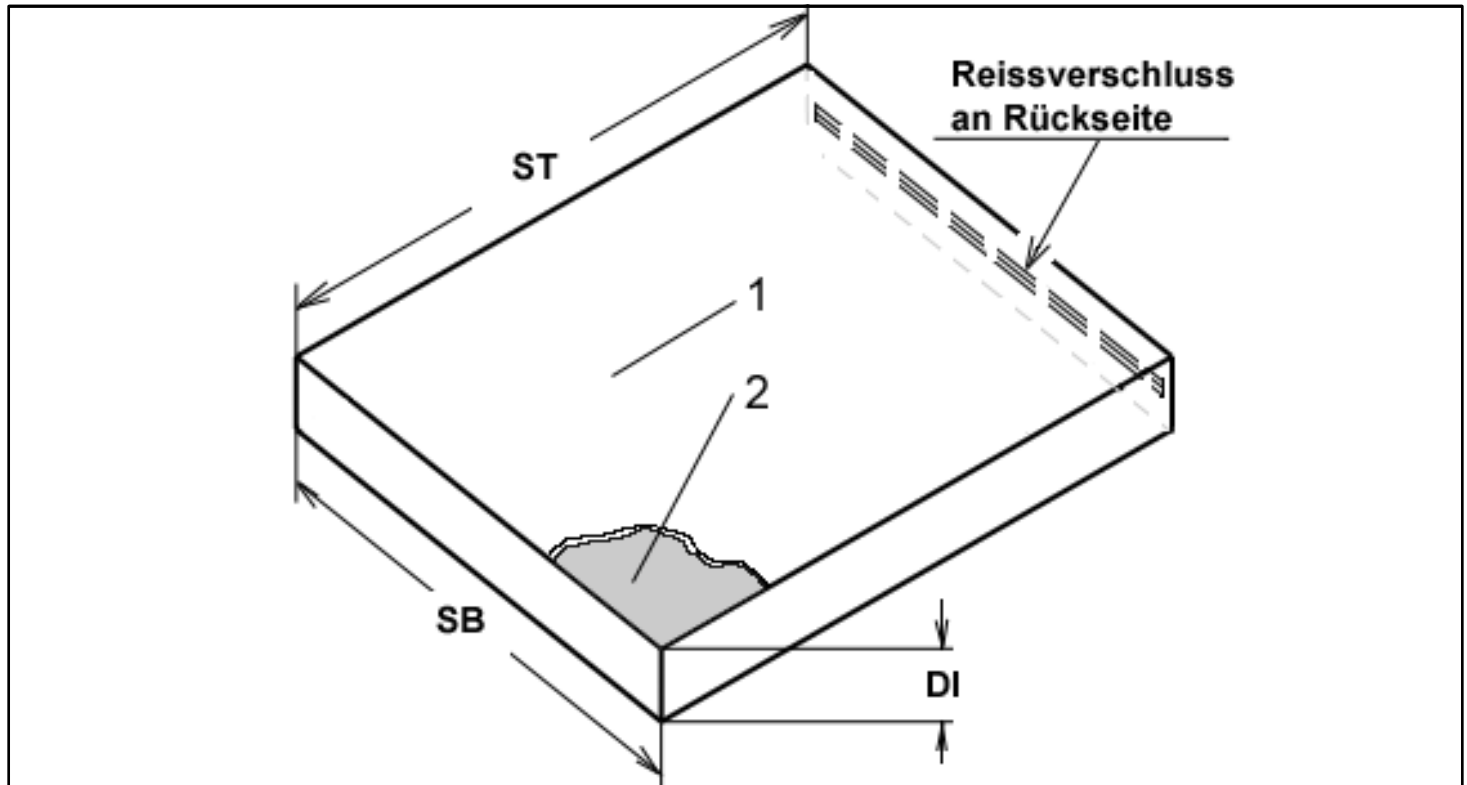


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1-2	000 835 002	Sitzkissen mit Bezug schwarz, kpl. Kissenfüllung: Verbundschaum		SB...? ST...? DI...?
2	000 835 810	Sitzkissenfüllung Verbundschaum		SB...? ST...? DI...?
1	000 836 002	Sitzkissenbezug schwarz		SB...? ST...? DI...?

Classic 140 - Stockhalter mit Klettschlaufe

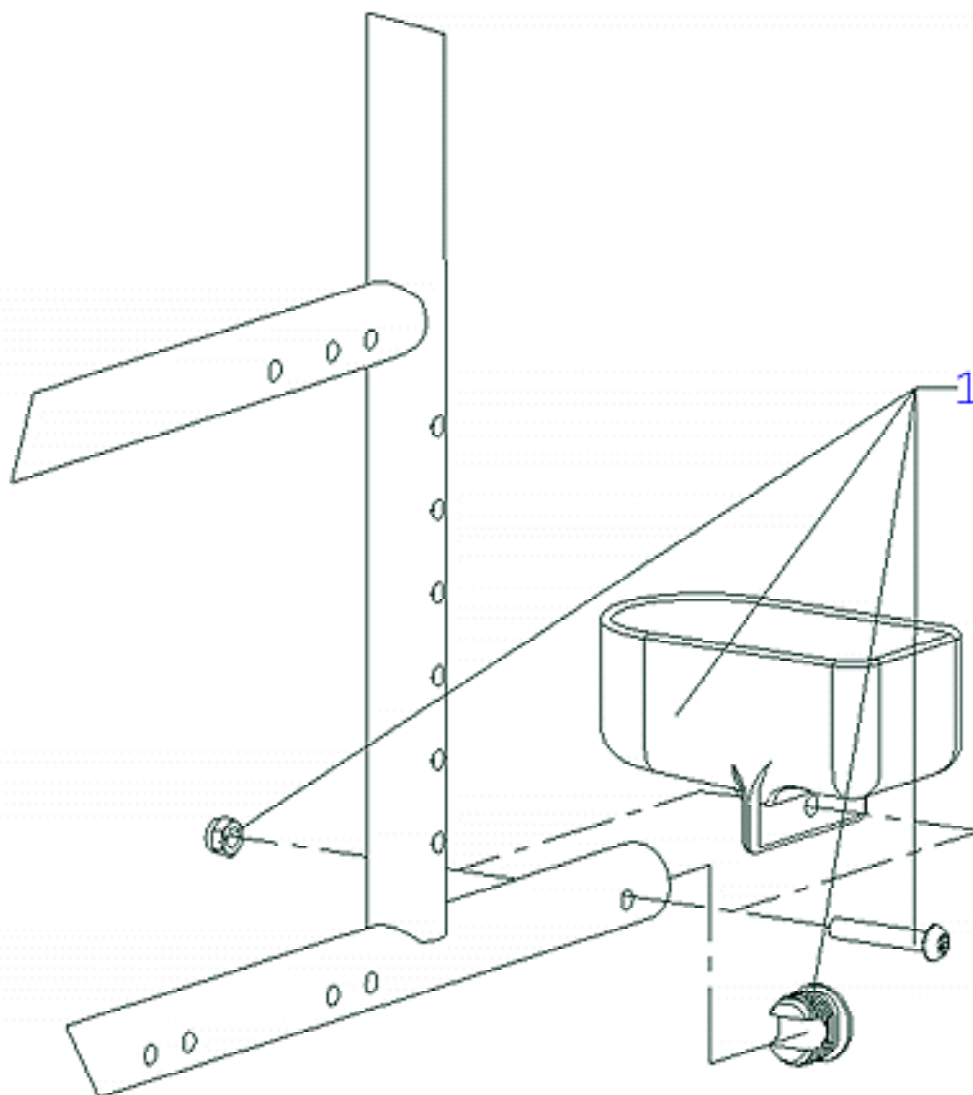


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1	752 815 120	Stockhalter mit Klettschlaufe kpl.		
	000 102 304.01-ET	Linsenschraube M 6 x 35 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	760 827 007-ET	Lamellenkappe Kunststoff, schwarz	10 St./Pkg.	
	000 815 123-ET	Klettschlaufe	5 St./Pkg.	

Classic 140 - Therapietisch

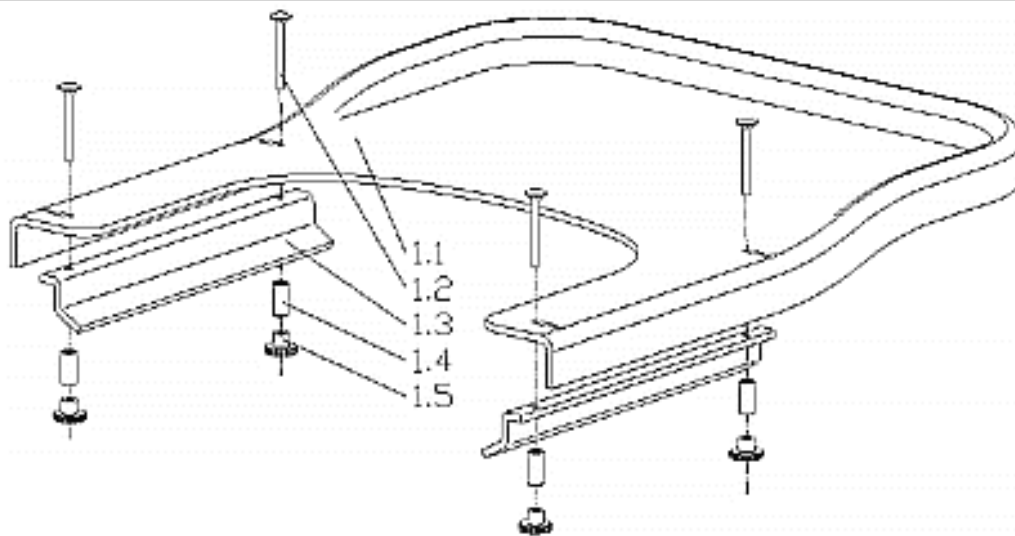

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
1.1 - 1.5	760 848 050.01	Therapietisch für SB: 38 - 40 kpl.		
1.1 - 1.5	760 848 050.02	Therapietisch für SB: 42 - 44 kpl.		
1.1 - 1.5	760 848 050.03	Therapietisch für SB: 46 - 48 kpl.		
1.1, 1.4, 1.5	760 848 060	Umrüstsatz für Therapietisch		

Classic 140 - Transitrolle mit Rahmenadapter

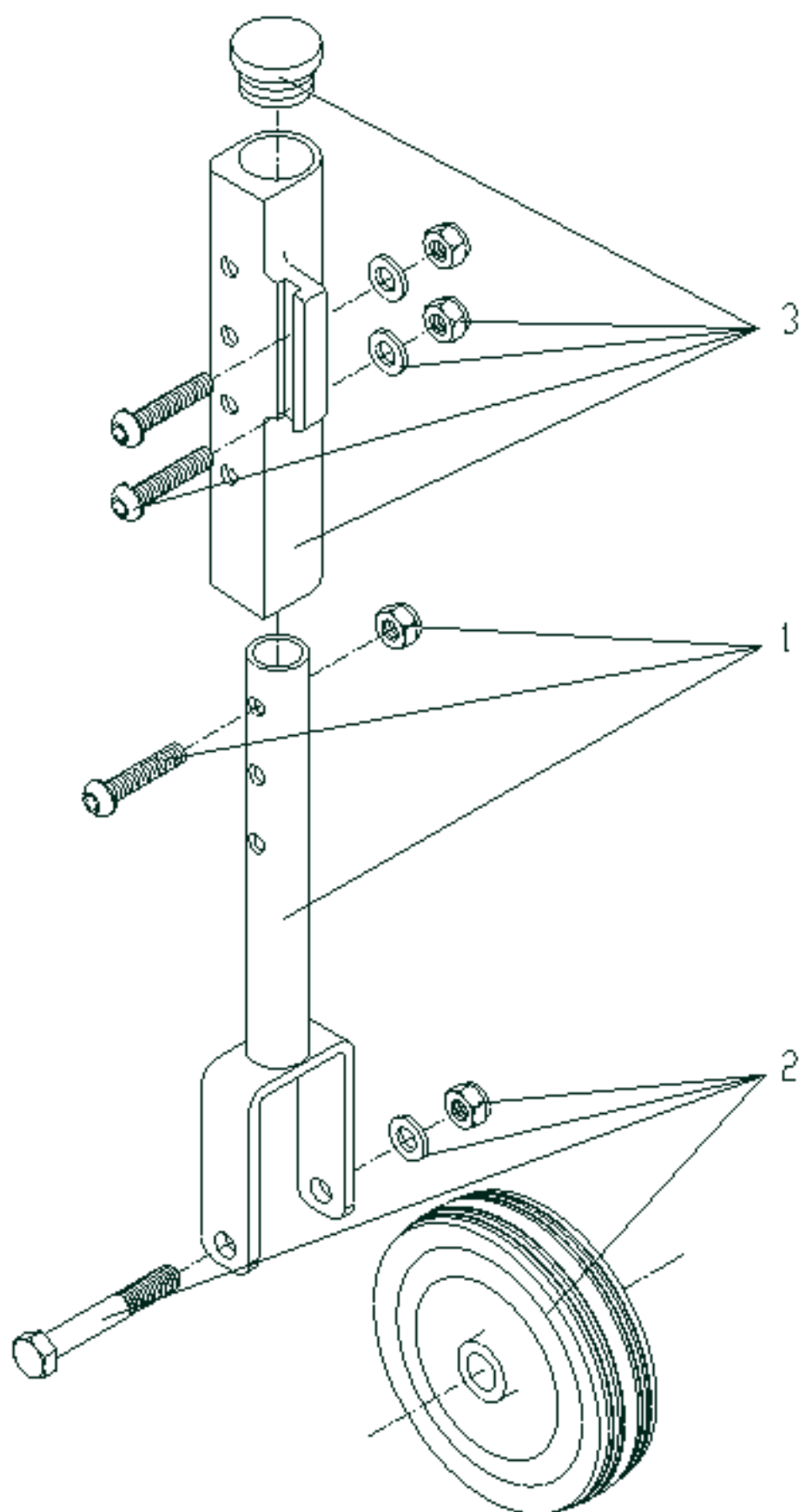

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Bemerkung/ Menge	Variante
	752 958 020	Transitrolle mit Rahmenadapter kpl.	Paar	
1 - 3	752 858 020	Transitrolle mit Rahmenadapter kpl.	rechts	
1 - 3	752 758 020	Transitrolle mit Rahmenadapter kpl.	links	
1, 2	760 858 020	Transitrolle kpl. rechts und links verwendbar		
	000 102 304.01-ET	Linsenschraube M 6 x 35 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
2	000 858 249	Vollgummirad mit Achse kpl.		
	000 100 016-ET	6kt-Schraube M 8 x 50 DIN 931	10 St./Pkg.	
	000 128 015-ET	6kt-Mutter M 8 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 130 108-ET	Scheibe A 8,4 DIN 125	25 St./Pkg.	
3	752 859 003	Rahmenadapter für Transitrolle und Sicherheitsrad	rechts	
	752 759 003	Rahmenadapter für Transitrolle und Sicherheitsrad	links	
	000 102 305.01-ET	Linsenschraube M 6 x 40 mit Torx-Antrieb	25 St./Pkg.	
	000 102 314.01-ET	Linsenschraube M 6 x 55 mit Torx-Antrieb (nur in Kombination mit Trommelbremse)	25 St./Pkg.	
	000 130 107-ET	Scheibe A 6,4 DIN 125	25 St./Pkg.	
	000 128 007-ET	6kt-Mutter M6 DIN 985	25 St./Pkg.	
	000 282 061-ET	Lamellenkappe 22	10 St./Pkg.	

ANZUGSMOMENTE

Classic - Anzugsmomente

