

Otto Bock[®]

QUALITY FOR LIFE



**Avantgarde T, Ti8.9, VR, Teen 2,
Teen 2 VR, XXL 2**

Ersatzteilekatalog



Allgemein

Rahmen

Fußraste

Sitz

Rücken

Seitenteil

Lenkrad

Antriebsrad

Bremse

Zubehör

A

B

C

D

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
E

F

G

H

S



Bitte geben Sie bei allen Ersatzteilbestellungen die folgenden Grunddaten an, um eine reibungslose Lieferung zu gewährleisten:

1. Serien-Nr. des Rollstuhls
2. Sitzbreite
3. Sitztiefe
4. Rückenhöhe
5. Rahmenkröpfung
6. Unterschenkellänge
7. Dicke des verwendeten Sitzkissens
8. Rahmenfarbe
9. Bespannungsfarbe

Übersicht

Sitzbreiten:	Modell Teen2	22*, 24*, 26, 28, 30, 32, 34, 36 cm		
	Modell Teen2 VR	26, 28, 30, 32, 34, 36 cm		
	Modell T, Ti 8.9	32**, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 cm		
	Modell VR	36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 cm		
	Modell XXL2	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm		
Sitztiefen:	Modell Teen2	24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 cm		
	Modell Teen2 VR	30, 32, 34, 36, 38, 40 cm		
	Modell T, Ti 8.9, VR	36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 cm		
	Modell XXL2	40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 cm		
Rückenhöhen:	Modell Teen2, Teen2 VR	17.5, 20, 22.5, 25, 27.5, 30, 32.5, 35, 37.5, 40 cm		
	Modell T, Ti 8.9, VR, XXL2	25, 27.5, 30, 32.5, 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5, 50 cm		
Rahmenfarben:	RAL 3001 signalrot	schwarz/goldglitter	silbermetallic (ab 01/04)	
	brilliant Silber (bis 12/03)	anthrazit-metallic		
	saturnblau-metallic	enchante` blau		
	jeans-metallic	grün-metallic		
	shimano matt	RAL 9005 tiefschwarz matt		
	Sparkle rot	Sparkle orange		
	Sparkle blau-grün	Sparkle Granny Smith		
	Sparkle lemon	poliert		
Bespannungsfarben:	Nylon	4001 (schwarz)		
		4322 (rot)		
		4836 (blau)		

* Nur in Verbindung mit verbreitertem Rahmenvorderteil.

** Nur in Verbindung mit geradem Rahmenvorderteil bei Modell Ti 8.9.

A

Adapter für Seitenteil	174
AirMan-Pumpe	233
Amputationsbeinstütze	86, 87
Ankipphilfe	51
Antriebsradadapter Modell T, VR und Teen2	218
Modell Ti 8.9	219
Modell XXL2	220
Antriebsradadapter für Servoantrieb Modell T und VR	270, 271, 272, 273
für e-clips für Modell T und VR	274, 275
Antriebsrad mit Nabenbremse	226, 227, 228
Antriebsrad mit Trommelbremse Modell T, VR und Teen2	230, 231, 232
Modell XXL2	234, 235
Armlehne gepolstert	150, 151

B

Baugruppenübersicht	7
Bespannungsfarben	3
Bereifung	211, 212, 113, 214, 215
Bestelladresse	278
Bestellhinweise	3
Bremsadapter bei Radstandsverlängerung	266

D

Desk-Seitenteil abnehmbar, Armauflage höhenverstellbar	152, 153
--	----------

E

Einhandantrieb	236
Entriegelungshilfe für Fußraste mit automatischem Längenausgleich	85
Ergo-Rücken Modell T, VR, Teen2 und XXL2	122, 123
Modell Ti 8.9	123

F

Fersenband für geteilte Fußraste	73
Fester Rücken "The Back"	134
Fußplatte Kunststoff	76
Fußraste durchgehend 12,5 cm tief Modell T, VR, Teen2 und XXL2	58, 59, 60, 61
durchgehend 12,5 cm tief Modell Ti 8.9	74, 75
durchgehend 16 cm tief Modell T, VR, Teen2 und XXL2	62, 63, 64
geteilt Modell T, VR, Teen2 und XXL2	66, 67, 68, 69
durchgehend für kleine Unterschenkelänge Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	70, 71, 72
hochschwenkbar mit automatischem Längenausgleich Modell VR	78, 79, 80, 81
hochschwenkbar Modell VR	82, 83, 84

G

Greifring	242, 243, 244, 245, 246, 247
Grunddaten	3

H

Hochdruckpumpe	221
----------------	-----

K

Kippschutz	46, 47, 48
Kleiderschutz steckbar	145
für Ergo-Rücken	142
für Standard-Rücken	141
Carbon für Ergo-Rücken	144
Carbon für Standard-Rücken	143
standard Modell Teen2	147
Kniehebelbremse abschwenkbar Modell T und Ti 8.9	254, 255
für Benutzer und Begleiter Modell T, VR und XXL2	258, 259
für Einhandbedienung Modell T, VR und XXL2	260, 261
mit Rückrollsperrung Modell T, Ti 8.9 und VR	256, 257
standard Modell T	250, 251
standard Modell Ti 8.9	250, 251
standard Modell VR und XXL2	252
standard Modell Teen2	262
mit anpassbarem Bedienhebel Modell Teen2	263, 264, 265
Kreuzstrebe Modell T, Ti 8.9 und VR	90, 91, 92, 93
Modell Teen2	94, 95
Modell XXL2	96, 97

L

Lackstift	55
Lenkrad	194, 195, 196, 197, 198
Lenkradadapter für große vordere Sitzhöhe	199
für kleine vordere Sitzhöhe	200
Lenkradgabel Schraubachse Modell T und VR	178, 179
Schraubachse Modell Ti 8.9	180, 181
Schraubachse Modell Teen2	182, 183
Schraubachse Modell XXL2	184, 185
Steckachse Modell T und VR	186, 187
Steckachse Modell Ti 8.9	188, 189
Steckachse Modell Teen2	190, 191
Steckachse Modell XXL2	192, 193

M

Maße	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Montageanleitung für Kippschutz	49
Montageanleitung für Umbau Brems-Bedien-Hebel	266

R

Radstandsverlängerung	222, 223
Rahmenfarben	3
Rahmenpolster	54
Rahmen Modell T	18, 19, 20, 21, 22, 23
Modell Ti 8.9	24, 25, 26, 27, 28, 29
Modell VR	30, 31, 32, 33, 34
Modell Teen2	34, 35, 36, 37
Modell Teen2 VR	38, 39, 40, 41
Modell XXL2	42, 43, 44, 45, 46
Rückenbespannung Modell T, VR und XXL2	124, 125, 126
Modell Ti 8.9	127, 128, 129
Modell Teen2	130, 131, 132

Rückenkissen, Rückenkissenbezüge	135
Rücken standard Modell T, VR, Teen2 und XXL2	120
Modell Ti 8.9	121

S

Schiebegriff	108
kurz für Ergo-Rücken	108
kurz für Standard-Rücken	106
lang für Ergo-Rücken Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	109
lang für Standard-Rücken Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	107
lang für Ergo-Rücken Modell XXL2	115, 116
lang für Standard-Rücken Modell XXL2	114, 115, 116
höhenverstellbar kurz für Standard-Rücken Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	108
höhenverstellbar lang für Standard-Rücken Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	109
höhenverstellbar lang für Standard-Rücken Modell XXL2	115, 116
höhenverstellbar abnehmbar gerade Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	110, 111
höhenverstellbar abnehmbar gerade Modell XXL2	117, 118
höhenverstellbar abnehmbar abgewinkelt Modell Teen2	112, 113
Seitenteil Modell Teen2	146, 147
Seitenteil mit Armauflage höhenverstellbar Modell Teen2	148, 149
Seitenteil lang abnehmbar, Armauflage höhenverstellbar	154, 155
Seitenteil mit Armauflage, abnehmbar Modell Teen2 und VR	156, 157
Seitenteil abnehmbar	158, 159
mit kurzer Armauflage für Standard-Rücken Modell Teen2 und VR	162, 163
mit langer Armauflage für Standard-Rücken Modell Teen2 und VR	160, 161
mit kurzer Armauflage für Ergo-Rücken Modell Teen2 und VR	164, 165
mit langer Armauflage für Ergo-Rücken Modell Teen2 und VR	166, 167
mit kurzer Armauflage für Standard-Rücken Modell T, Ti 8.9, VR und XXL2	170, 171
mit langer Armauflage für Standard-Rücken Modell T, Ti 8.9, VR und XXL2	168, 169
mit kurzer Armauflage für Ergo-Rücken Modell T, Ti 8.9, VR und XXL2	172, 173
mit langer Armauflage für Ergo-Rücken Modell T, Ti 8.9, VR und XXL2	140
Seitenteil für Ergo-Rücken	138, 139
für Standard-Rücken	146
kurz/lang Modell Teen2	77
Seitliche Arretierung für Fußbrett	229
Silikon-Greifringüberzug	224, 225
Shock-Absorber-System	98
Sitzbespannung Modell T, Ti 8.9 und VR	100
Modell Teen2	101
Modell Teen2 VR	98
Modell XXL2	99
Sitzbespannung mit Kathetertasche Modell T, Ti 8.9 und VR	99
Modell XXL2	268, 269
Sitzgurte	103
Sitzkissen, Sitzkissenbezüge	202, 203
Speichenrad	209
standard Modell T, VR und Teen2	204
standard Modell XXL2	205
mit Hohlwandfelge	206
mit Hohlwandfelge radial gespeicht	207
Six-Star	208
Spox-Light	210
Infinity-Super-Light	237, 238, 239, 240, 241
Mountainbike	119
Speichenschutz	216, 217
Stabilisierungsstange	4, 5, 6, 7
Steckachse für Antriebsrad	53
Stichwortverzeichnis	
Stockhalter	

T

Therapietisch	175
Transitrolle Modell T, VR und Teen2	50
Modell XXL2	51

Ü

Übersicht	3
-----------------	---

V

Verlängerung für Bremshebel	253
Verlängerung für Schiebegriff	133
Verriegelung für durchgehendes Fußbrett	65
Verstellbarer fester Sitz „The Seat“	102

W

Werkzeug für Utensilientasche	276
-------------------------------------	-----

Baugruppenübersicht

Baugruppe A Rahmen	17 - 56
Baugruppe B Fußraste	57 - 88
Baugruppe C Sitz	89 - 104
Baugruppe D Rücken/Schiebegriffe	105 - 136
Baugruppe E Seitenteil	137 - 176
Baugruppe F Lenkrad	177 - 200
Baugruppe G Antriebsrad	201 - 248
Baugruppe H Bremse	249 - 266
Baugruppe S Zubehör, Accessoires	267 - 276

Technische Daten Avantgarde Teen2

Empfohlene Antriebsradgröße in Abhängigkeit der Sitztiefe bei Avantgarde Teen2

	ST24	ST26	ST28	ST30	ST32	ST34	ST36	ST38	ST40
Antriebsradgröße 20"									
Antriebsradgröße 22"									

	empfohlene Antriebsradgröße	bedingt empfohlene Antriebsradgröße, mit Einschränkungen
	Kombination nicht möglich	

Gesamtlänge Avantgarde Teen2

Sitztiefe	Gesamtlänge (in cm)			
	Antriebsradgröße 20"		Antriebsradgröße 22"	
	Vordere Achsposition	Hintere Achsposition	Vordere Achsposition	Hintere Achsposition
24	–	72	–	–
26	–	74	–	–
28	–	76	–	–
30	73,5	78	75	79,5
32	75,5	80	77	81,5
34	77,5	82	79	83,5
36	79,5	84	81	85,5
38	81,5	86	83	87,5
40	83,5	88	85	89,5

Zwischen der vorderen und hinteren Achsposition kann die Achse horizontal in 1,5 cm-Schritten verstellt werden (siehe Tab. S. ?? hinteres Rahmenteil Pos. A, B, C, D). Die Werte wurden mit Standard Fußraste bei UL32 ermittelt. Bei Anbau der Fußraste für kurze Unterschenkelängen Werte -3 cm.

Gesamtbreite¹⁾ Avantgarde Teen2

Sitzbreite	Gesamtbreite (in cm)	
	Seitenteile standard & Kleiderschutz	Antriebsrad mit Trommelbremse
22	39	42
24	41	44
26	43	46
28	45	48
30	47	50
32	49	52
34	51	54
36	53	56

¹⁾ Angaben bei Greifreifenanbau eng und 0° Radsturz der Antriebsräder (bei Anbau weit: +20 mm).

Erhöhung der Gesamtbreite durch den Radsturz der Antriebsräder

Radsturz	Erhöhung der Gesamtbreite (in cm)	
	Antriebsradgröße 20"	Antriebsradgröße 22"
0°	0	0
2°	2	4
4°	6	8

Faltmaß inkl. Antriebsrädern: ab 26 cm

Technische Daten Avantgarde Teen2 VR

Empfohlene Antriebsradgröße in Abhängigkeit der Sitztiefe bei Avantgarde Teen2 VR

	ST30	ST32	ST34	ST36	ST38	ST40
Antriebsradgröße 20"						
Antriebsradgröße 22"						

	empfohlene Antriebsradgröße	bedingt empfohlene Antriebsradgröße, mit Einschränkungen
	Kombination nicht möglich	

Gesamtlänge Avantgarde Teen2 VR

Sitztiefe	Gesamtlänge (in cm)			
	Antriebsradgröße 20"		Antriebsradgröße 22"	
	Vordere Achsposition	Hintere Achsposition	Vordere Achsposition	Hintere Achsposition
30	–	76	–	–
32	–	78	–	–
34	–	80	–	–
36	77,5	82	79,5	84
38	79,5	84	81,5	86
40	81,5	86	83,5	88

Zwischen der vorderen und hinteren Achsposition kann die Achse horizontal in 1,5 cm-Schritten verstellt werden (siehe Tab. S. ?? hinteres Rahmenteil Pos. A, B, C, D). Die Werte wurden bei UL25 ermittelt.

Gesamtbreite¹⁾ Avantgarde Teen2 VR

Sitzbreite	Gesamtbreite (in cm)	
	Seitenteile standard & Kleiderschutz	Antriebsrad mit Trommelbremse
22	44	47
24	46	49
26	48	51
28	50	53
30	52	55
32	54	57
34	56	59
36	58	61

¹⁾ Angaben bei Greifreifenanbau eng und 0° Radsturz der Antriebsräder (bei Anbau weit: +20 mm).

Erhöhung der Gesamtbreite durch den Radsturz der Antriebsräder

Radsturz	Erhöhung der Gesamtbreite (in cm)	
	Antriebsradgröße 20"	Antriebsradgröße 22"
0°	0	0
2°	2	4
4°	6	8

Faltmaß inkl. Antriebsrädern: ab 26 cm

Technische Daten Avantgarde T und Ti 8.9

Gesamtlänge Avantgarde T und Ti 8.9

Sitztiefe	Gesamtlänge (in cm)							
	Antriebsradgröße 22"		Antriebsradgröße 24"		Antriebsradgröße MTB 24"		Antriebsradgröße 26"	
	Hintere Achsposition	Vordere Achsposition	Hintere Achsposition	Vordere Achsposition	Hintere Achsposition	Vordere Achsposition	Hintere Achsposition	Vordere Achsposition
36 - 42	79	70,5	82	73,5	83	74,5	84	75,5
44 - 48	83	74,5	86	77,5	87	78,5	88	79,5

Gesamtbreite¹⁾ Avantgarde T und Ti 8.9

Sitzbreite	Gesamtbreite (in cm)		
	Seitenteile standard & Kleiderschutz	Seitenteil mit Armauflage höhenverstellbar	Antriebsrad mit Trommelbremse
32	48,5	51	52
34	50,5	53	54
36	52,5	55	56
38	54,5	57	58
40	56,5	59	60
42	58,5	61	62
44	60,5	63	64
46	62,5	65	66
48	64,5	67	68
50	66,5	69	70

¹⁾ Angaben bei Greifreifenanbau eng und 0° Radsturz der Antriebsräder (bei Anbau weit: +20 mm).

Erhöhung der Gesamtbreite durch den Radsturz der Antriebsräder

Radsturz	Erhöhung der Gesamtbreite (in cm)		
	Antriebsradgröße 22"	Antriebsradgröße 24"	Antriebsradgröße 26"
0°	0	0	0
2°	4	4	4,5
4°	8	8,5	9

Faltmaß inkl. Antriebsrädern: ab 26 cm

Technische Daten Avantgarde VR

Gesamtlänge Avantgarde VR

Sitztiefe	UL _{max} UL _{min}	Gesamtlänge (in cm)							
		Antriebsradgröße 22"		Antriebsradgröße 24"		Antriebsradgröße MTB		Antriebsradgröße 26"	
		Hintere Achsposi-	Vordere Achsposi-	Hintere Achsposi-	Vordere Achsposi-	Hintere Achsposi-	Vordere Achsposi-	Hintere Achsposi-	Vordere Achsposi-
36	55	89	80,5	91,5	83	92,5	84	94	85,5
	32	83	74,5	85,5	77	86,5	78	88	79,5
38	55	91	82,5	93,5	85	94,5	86	96	87,5
	32	85	76,5	87,5	79	88,5	80	90	81,5
40	55	93	84,5	95,5	87	96,5	88	98	89,5
	32	87	78,5	89,5	81	90,5	82	92	83,5
42	55	95	86,5	97,5	89	98,5	90	100	91,5
	32	89	80,5	91,5	83	92,5	84	94	85,5
44	55	97	88,5	99,5	91	100,5	92	102	93,5
	32	91	82,5	93,5	85	94,5	86	96	87,5
46	55	99	90,5	101,5	93	102,5	94	104	95,5
	32	93	84,5	95,5	87	96,5	88	98	89,5
48	55	101	92,5	103,5	95	104,5	96	106	97,5
	32	95	86,5	97,5	89	98,5	90	100	91,5

Gesamtbreite¹⁾ Avantgarde VR

Sitzbreite	Gesamtbreite (in cm)		
	Seitenteile standard & Kleiderschutz	Seitenteil mit Armauflage höhenverstellbar	Antriebsrad mit Trommelbremse
32	48,5	51	52
34	50,5	53	54
36	52,5	55	56
38	54,5	57	58
40	56,5	59	60
42	58,5	61	62
44	60,5	63	64
46	62,5	65	66
48	64,5	67	68
50	66,5	69	70

¹⁾ Angaben bei Greifreifenanbau eng und 0° Radsturz der Antriebsräder (bei Anbau weit: +20 mm).

Erhöhung der Gesamtbreite durch den Radsturz der Antriebsräder

Radsturz	Erhöhung der Gesamtbreite (in cm)		
	Antriebsradgröße 22"	Antriebsradgröße 24"	Antriebsradgröße 26"
0°	0	0	0
2°	4	4	4,5
4°	8	8,5	9

Faltmaß inkl. Antriebsrädern: ab 26 cm

Technische Daten Avantgarde XXL2

Gesamtlänge Avantgarde XXL2

Sitztiefe	UL _{max} UL _{min}	Gesamtlänge (in cm)			
		Antriebsradgröße 24"		Antriebsradgröße 26"	
		Hintere Achsposition	Vordere Achsposition	Hintere Achsposition	Vordere Achsposition
40	55	95,5	85	98	87,5
	32	89,5	79	92	81,5
42	55	97,5	87	100	89,5
	32	91,5	81	94	83,5
44	55	99,5	89	102	91,5
	32	93,5	83	96	85,5
46	55	101,5	91	104	93,5
	32	95,5	85	98	87,5
48	55	103,5	93	106	95,5
	32	97,5	87	100	89,5
50	55	105,5	95	108	97,5
	32	99,5	89	102	91,5
52	55	107,5	97	110	99,5
	32	101,5	91	104	93,5
54	55	109,5	99	112	101,5
	32	103,5	93	106	95,5
54	55	111,5	101	114	103,5
	32	105,5	95	108	97,5

Gesamtbreite¹⁾ Avantgarde XXL2

Sitzbreite	Gesamtbreite (in cm)		
	Seitenteile standard & Kleiderschutz	Seitenteil mit Armauflage höhenverstellbar	Antriebsrad mit Trommelbremse
50	66,5	69	70
52	68,5	71	72
54	70,5	73	74
56	72,5	75	76
58	74,5	77	78
60	76,5	79	80
62	78,5	81	82

¹⁾ Angaben bei Greifreifenanbau eng (bei Anbau weit: +20 mm).

Faltmaß inkl. Antriebsrädern: ab 26 cm

Unterschenkellänge


Einstellbare Unterschenkellänge für geteilte und durchgehende Fußrasten und winkelverstellbare Fußraste bei Avantgarde Teen2

		Unterschenkellänge (in cm)														
		Rahmen kurz					Rahmen mittel					Rahmen lang				
		Lenkraddurchmesser					Lenkraddurchmesser					Lenkraddurchmesser				
		3"	4"	5"	140 mm	6"	3"	4"	5"	140 mm	6"	3"	4"	5"	140 mm	6"
Lenkradgabel lang	Position 1	*)	*)	*)	*)	*)	45	*)	*)	*)	*)	45	32	*)	*)	*)
	Position 2	32	*)	*)	*)	*)	45	32	*)	*)	*)	45	34	32	*)	*)
	Position 3	34	*)	*)	*)	*)	45	34	32	*)	*)	45	36	34	*)	*)
	Position 4	36	32	*)	*)	*)	45	36	34	*)	*)	45	38	36	34	32
Lenkradgabel kurz	Position 1	36	32	*)	*)	*)	45	36	34	*)	*)	45	38	36	34	32
	Position 2	45	36	34	*)	*)	45	38	36	34	32	45	40	38	36	34
	Position 3	45	38	36	34	32	45	45	38	36	34	45	45	40	38	36
	Position 4	45	45	40	38	36	45	45	40	38	36	45	45	42	40	38

*) Kombination ist nicht möglich.

Unterschenkellänge bei Avantgarde Teen2, Teen2 VR, T, Ti 8.9, VR und XXL2 (siehe Skizze)

Maß vordere Kante der Sitzbespannung bis hintere Kante Fußbrett
(Unterschenkellänge abzüglich der Dicke des Sitzkissens).

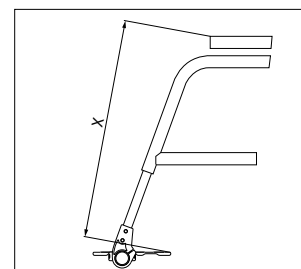

Modellreihe T

Avantgarde Modell	Unterschenkellänge (in cm)							
	Fußraste für kleine Unterschenkellängen		Fußbrettbügel kurz		Fußbrettbügel mittel		Fußbrettbügel lang	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Teen2	16	31	32	45	—	—	—	—
T (70°)	16	31	30,5	43,5	41	54,5	47	60,5
T (80°)	16	31	32,5	43,5	43	54,5	49	60,5
T (90°)	16	31	33,5	43,5	44,5	54	50,5	60
Ti 8.9 (70°)	16	31	33	45	39,5	53	50	62
Ti 8.9 (80°)	16	31	32	45,5	41	51	51,5	60

Modellreihe VR


Avantgarde Modell	Unterschenkellänge (in cm)									
	Fußbrettbügel 175 mm		Fußbrettbügel 225 mm		Fußbrettbügel 275 mm		Fußbrettbügel 325 mm		Fußbrettbügel 375 mm	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Teen2 VR	25	35	31	41	—	—	—	—	—	—
VR	30,5	39,5	35,5	44,5	40,5	49,5	45,5	54,5	50,5	59,5
XXL2	30,5	39,5	35,5	44,5	40,5	49,5	45,5	54,5	50,5	59,5

Die angegebenen Unterschenkellängen sind theoretisch ermittelte Werte und können deswegen von der Realität geringfügig abweichen. Des weiteren sind die angegebenen Unterschenkellängen teilweise nicht zu erreichen, weil die Unterschenkellänge in Abhängigkeit zu der Sitztiefe, Lenkradgabel, Lenkrad und dessen Einbauposition und Sitzneigung steht.

Sitzhöhentabelle Avantgarde Teen2 und Teen2 VR

Vordere Sitzhöhe

Die vordere Sitzhöhe (VSH) wird gemessen ohne Sitzkissen. Sie ist abhängig von der gewählten Radgröße, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

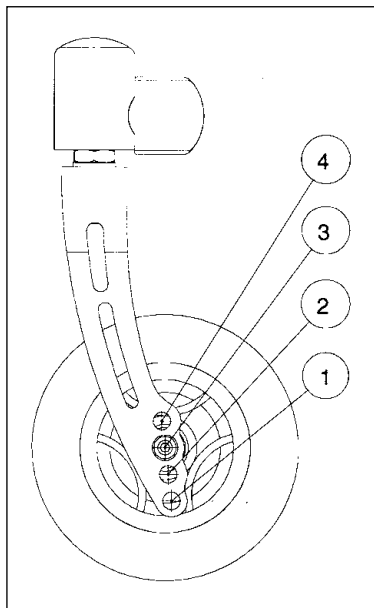

		Vordere Sitzhöhe (in cm)				
		Lenkraddurchmesser				
		3"	4"	5"	140 mm	6" Luft
Lenkradgabel kurz	Position 4	*)	*)	*)	*)	*)
	Position 3	*)	42	*)	*)	*)
	Position 2	40,75	43,25	43,75	43,9	44,25
	Position 1	42	44,5	45	45,15	45,5
Lenkradgabel lang	Position 4	*)	*)	45	45,15	45,5
	Position 3	*)	45,75	46,25	46,4	46,75
	Position 2	44,5	47	47,5	47,65	48
	Position 1	45,75	48,25	48,75	48,9	49,2

*) Kombination ist nicht möglich.

Bei Verwendung des Adapters für große vordere Sitzhöhen alle Werte +35 mm.
Bei Verwendung des Adapters für kleine vordere Sitzhöhen alle Werte -35 mm.

Hintere Sitzhöhe

Die hintere Sitzhöhe (HSH) wird gemessen ohne Sitzkissen. Sie ist abhängig von der gewählten Radgröße und Montageposition in der Antriebsradaufnahme. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!


Die Montageposition ist abzählbar am hinteren Holm der Antriebsradaufnahme (siehe Skizze).

Der Antriebsradadapter kann, abhängig von der gewählten Rahmenlänge und Radgröße, horizontal verstellt werden.

Werkseitig wird Position A vormontiert.

Sitzneigung: 10 cm maximale Sitzhöhendifferenz zwischen VSH und HSH (entspricht ca. 15° Sitzgefälle).

Hinweis: Ohne Angabe wird werkseitig ca. 4° Sitzgefälle eingestellt.

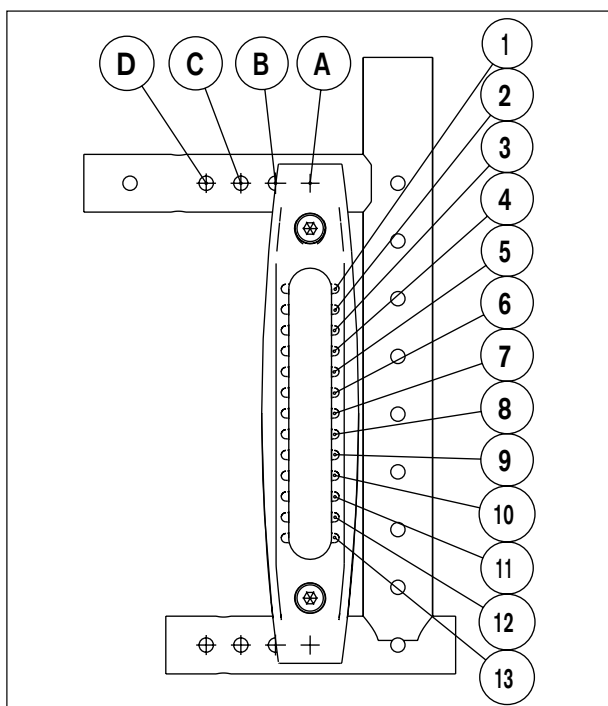

Freie Rastpositionen	Hintere Sitzhöhe (in cm)			
	Antriebsradgröße/Bereifung			
	20x1"	20x1 3/8"	22x1"	22x1 3/8"
1	35	36	37,2	37,3
2	35,9	36,9	38,1	38,2
3	36,8	37,8	39	39,1
4	37,7	38,7	39,9	40
5	38,6	39,6	40,8	40,9
6	39,5	40,5	41,7	41,8
7	40,4	41,4	42,6	42,7
8	41,3	42,3	43,5	43,6
9	42,2	43,2	44,4	44,5
10	43,1	44,1	45,3	45,4
11	44	45	46,2	46,3
12	44,9	45,9	47,1	47,2
13	45,8	46,8	48	48,1


Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte Maße. Nicht bei allen Rollstuhlvarianten können alle Einstellungsmöglichkeiten

genutzt werden; ebenso finden die Einstellkombinationen ihre Grenzen in der kompakten Rahmengeometrie. Wir behalten uns technische Änderungen und Toleranzen vor.

Sitzhöhentabelle Avantgarde T, Ti 8.9 und VR

Vordere Sitzhöhe

Die vordere Sitzhöhe (VSH) wird gemessen ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung. Sie ist abhängig von der gewählten Radgröße, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

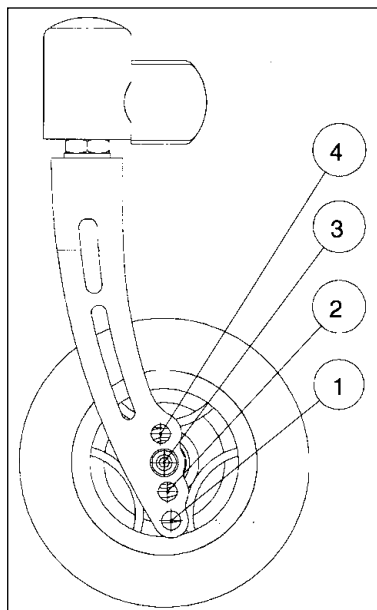

		Vordere Sitzhöhe (in cm)					
		Lenkraddurchmesser					
		3"	4"	5"	140 mm	6"	7"
Lenkradgabel kurz	Position 4	*)	*)	*)	*)	*)	*)
	Position 3	*)	43	*)	*)	*)	*)
	Position 2	42	44	45	45	46	*)
	Position 1	43	45	46	46	47	48
Lenkradgabel lang	Position 4	*)	*)	47	47	48	49
	Position 3	*)	47	48	48	49	50
	Position 2	46	48	49	49	50	51
	Position 1	47	49	50	50	51	52

*) Kombination ist nicht möglich.

Bei Verwendung des Adapters für große vordere Sitzhöhen alle Werte +35 mm.

Bei Verwendung des Adapters für kleine vordere Sitzhöhen alle Werte -35 mm.

Hintere Sitzhöhe


Die hintere Sitzhöhe (HSH) wird gemessen ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung. Sie ist abhängig von der gewählten Radgröße und Montageposition in der Antriebsradaufnahme. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Die Montageposition ist abzählbar am hinteren Holm der Antriebsradaufnahme (siehe Skizze).

Zwischen der vorderen und hinteren Achsposition kann die Achse horizontal in 6 Positionen (A bis F) verstellt werden. Die Position A ermöglicht eine passive Schwerpunktlage. In Position F wird der aktivste Schwerpunkt erreicht. Ohne Angabe der gewünschten Antriebsradposition wird werkseitig Position C/7 montiert.

Sitzneigung: 10 cm maximale Sitzhöhendifferenz zwischen VSH und HSH (entspricht ca. 15° Sitzgefälle).

Hinweis: Ohne Angabe wird werkseitig ca. 4° Sitzgefälle eingestellt.

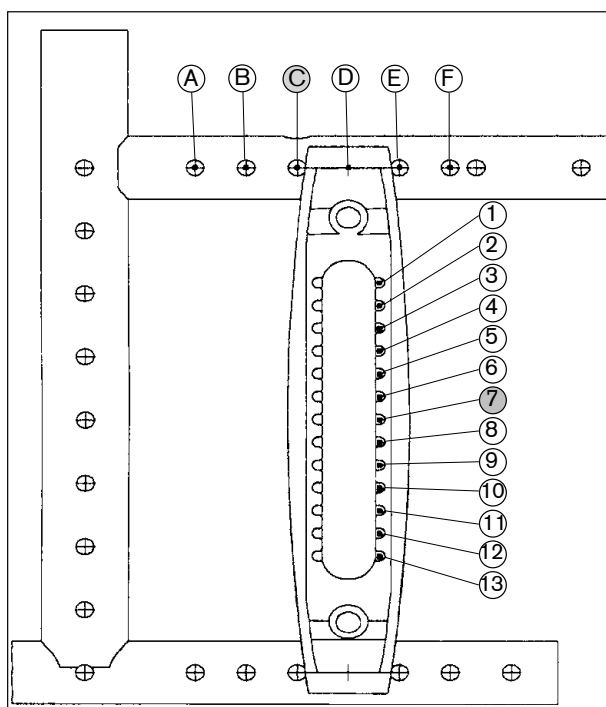

Freie Rastpositionen	Hintere Sitzhöhe (in cm)			
	Antriebsradgröße/Bereifung			
	22"	24"	24 MTB"	26"
1	37	40	41	42
2	38	41	42	43
3	39	42	43	43
4	40	43	44	45
5	41	43,5	45	46
6	42	44	45,5	47
7	43	45	46	48
8	44	46	47	49
9	45	47	48	50
10	45,5	48	49	50,5
11	46	49	50	51
12	47	50	51	52
13	48	51	52	53


Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte Maße. Nicht bei allen Rollstuhlvarianten können alle Einstellungsmöglichkeiten

genutzt werden; ebenso finden die Einstellkombinationen ihre Grenzen in der kompakten Rahmengestaltung. Wir behalten uns technische Änderungen und Toleranzen vor.

Sitzhöhentabelle Avantgarde XXL2

Vordere Sitzhöhe

Die vordere Sitzhöhe (VSH) wird gemessen ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung. Sie ist abhängig von der gewählten Radgröße, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

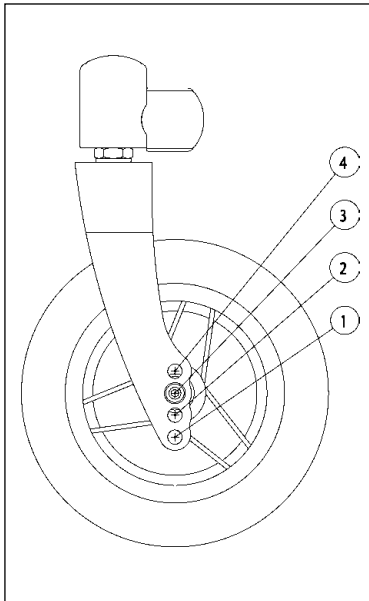

		Vordere Sitzhöhe (in cm)		
		Lenkraddurchmesser		
		140 mm	7"	8"
Lenkradgabel kurz	Position 4	*)	*)	*)
	Position 3	*)	*)	*)
	Position 2	45	*)	*)
	Position 1	47	49	*)
Lenkradgabel lang	Position 4	47	49	*)
	Position 3	48	50	51
	Position 2	49,5	51,5	52,5
	Position 1	50,5	52,5	53,5

*) Kombination ist nicht möglich.

Bei Verwendung des Adapters für große vordere Sitzhöhen alle Werte +35 mm.
Bei Verwendung des Adapters für kleine vordere Sitzhöhen alle Werte -35 mm.

Hintere Sitzhöhe

Die hintere Sitzhöhe (HSH) wird gemessen ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung. Sie ist abhängig von der gewählten Radgröße und Montageposition in der Antriebsradaufnahme. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!


Die Montageposition ist abzählbar am hinteren Holm der Antriebsradaufnahme (siehe Skizze).

Zwischen der vorderen und hinteren Achsposition kann die Achse horizontal in 7 Positionen (A bis G) verstellt werden.

Die Position A ermöglicht eine passive Schwerpunktlage. In Position G wird der aktivste Schwerpunkt erreicht. Ohne Angabe der gewünschten Antriebsradposition wird werkseitig Position D/4 montiert.

Sitzneigung: 10 cm maximale Sitzhöhendifferenz zwischen VSH und HSH (entspricht ca. 15° Sitzgefälle).

Hinweis: Ohne Angabe wird werkseitig ca. 4° Sitzgefälle eingestellt.

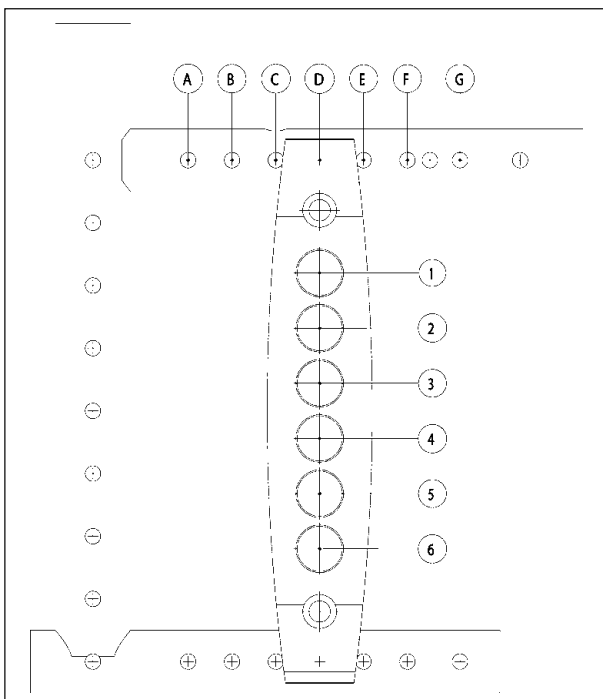


Freie Rastpositionen	Hintere Sitzhöhe (in cm)	
	Antriebsradgröße/ Bereifung	
	24"	26"
1	40	42,5
2	42,5	45
3	44,5	47
4	47	49,5
5	49	51,5
6	51	53,5

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte Maße. Nicht bei allen Rollstuhlvarianten können alle Einstellungsmöglichkeiten genutzt werden; ebenso finden die Einstellkombinationen ihre Grenzen in der kompakten Rahmengeometrie. Wir behalten uns technische Änderungen und Toleranzen vor.

Baugruppe A

Rahmen


A

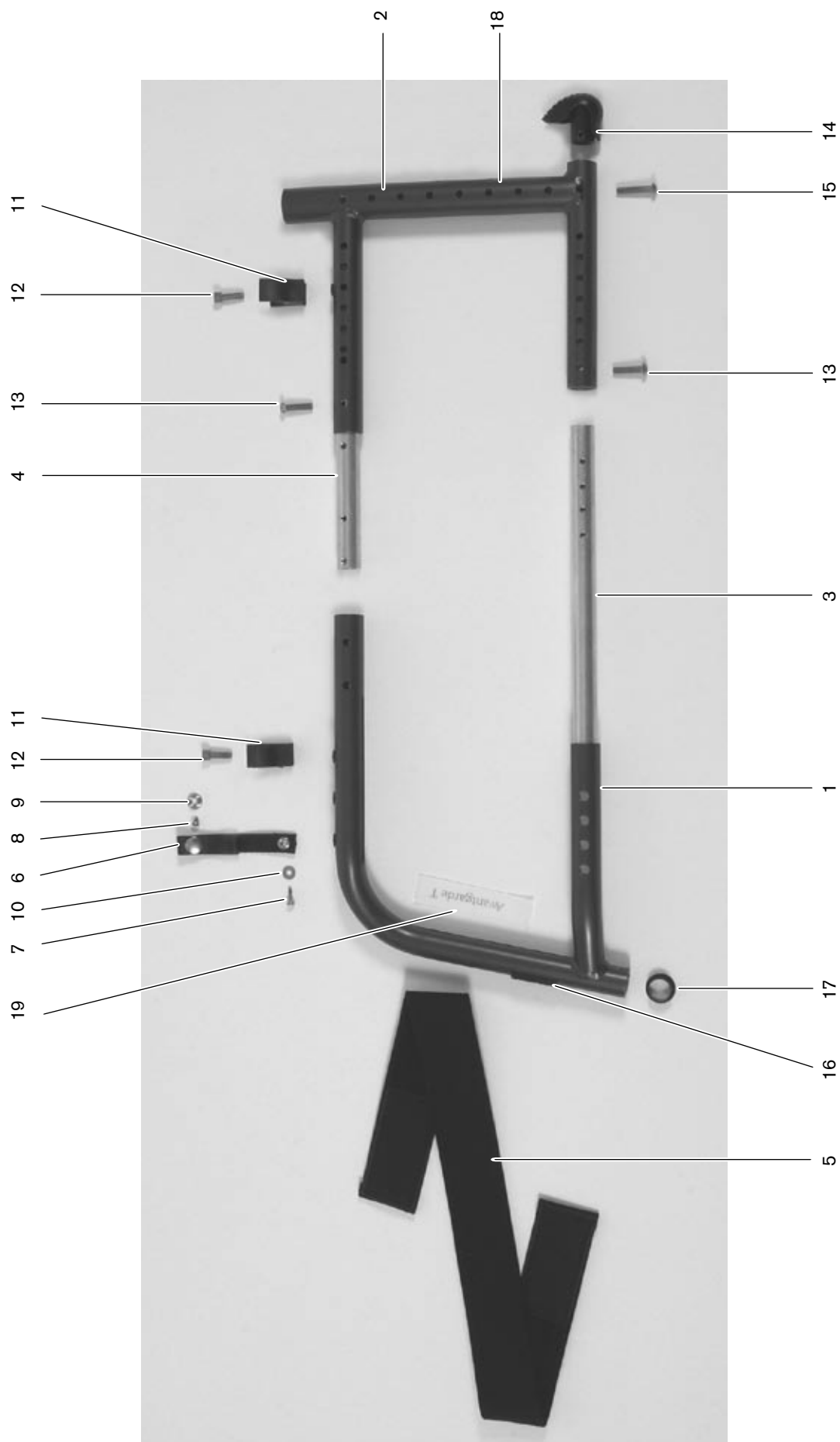

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK050	Rahmen Modell Avantgarde T 70/42 (Pos. 1-19; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
	481A45=SK051	Rahmen Modell Avantgarde T 70/48 (Pos. 1-19; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB023	Rahmenteil vorn Modell T 70/42, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB024	Rahmenteil vorn Modell T 70/48, bunt beschichtet, li.*	1	St.
o. B.	481A45=RB023	Rahmenteil vorn Modell T 70/42, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB024	Rahmenteil vorn Modell T 70/48, bunt beschichtet, re.*	1	St.
2	481A45=SB022	Rahmenteil hinten, bunt beschichtet*	2	St.
3	481A45=SR034	Gelenkrohr unten bis ST42	2	St.
3	481A45=SR062	Gelenkrohr unten ab ST44	2	St.
4	481A45=SR019	Gelenkrohr oben	2	St.
5	481A08=ST019	Wadenband 680 mm	1	St.
5	481A08=ST020	Wadenband 800 mm	1	St.
5	481A08=ST022	Wadenband 900 mm	1	St.
5	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
5	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
6	481A08=SV050	Faltfixierband kurz für Modell T bei Anbau Fußraste durchgehend 12.5 cm/ durchgehend 16 cm und für Fußraste Modell Ti 8.9	1	St.
6	481A08=SV078	Faltfixierband mittel für Modell T/Ti 8.9 bei Anbau Fußraste durchgehend für kleine UL	1	St.
6	481A08=SV053	Faltfixierband lang für Modell T bei Anbau Fußraste geteilt	1	St.
7		Linsen-Blechschrabe m. Kreuzschlitz, A2	1	St.
8		Linsen-Blechschrabe m. Kreuzschlitz, A2	1	St.
9		Kugelteil für Ringfeder-Druckknopf	1	St.
10		Scheibe DIN 9021, A2	1	St.
	481A45=SW048	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Seitenteil (Pos. 11-15)	2	St.
11		Auflager Standard	2	St.
12		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
13		Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x25, A2	2	St.
14		Rohrabschlusstopfen	1	St.
15		Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
	481A45=SW067	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Desk-Seitenteil (Pos. 11-15)	2	St.
11		Auflager Standard	1	St.
o. B.		Aufnahme Desk	1	St.
o. B.		Aufnahme Desk für ST34-38	1	St.
12		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
13		Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x25, A2	2	St.
14		Rohrabschlusstopfen	1	St.
15		Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
	481A45=SW201	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Kleiderschutz steckbar (Pos. 11-15)	2	St.
11		Auflager Standard	2	St.
12		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
13		Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
14		Rohrabschlussstopfen	1	St.
15		Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
16	623Z28=1002x25	Klettverschluss Haken, starr, selbstklebend	0,08	m
17	481B08=ST030	Buchse für Fußbrettbügel (bei Anbau Fußraste 481B45=PK085, 481B45=SK060 und 481B45=SK080)	2	St.
o. B.	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen (bei Anbau Fußraste 481B45=SK090)	2	St.
18	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
o. B.	481A45=ST047	Typenschild „Avantgarde“	1	St.
19	481A45=ST074	Aufkleber „Avantgarde T“ schwarz oder	2	St.
19	481A45=ST075	Aufkleber „Avantgarde T“ weiß	2	St.


* Rahmenfarbe:

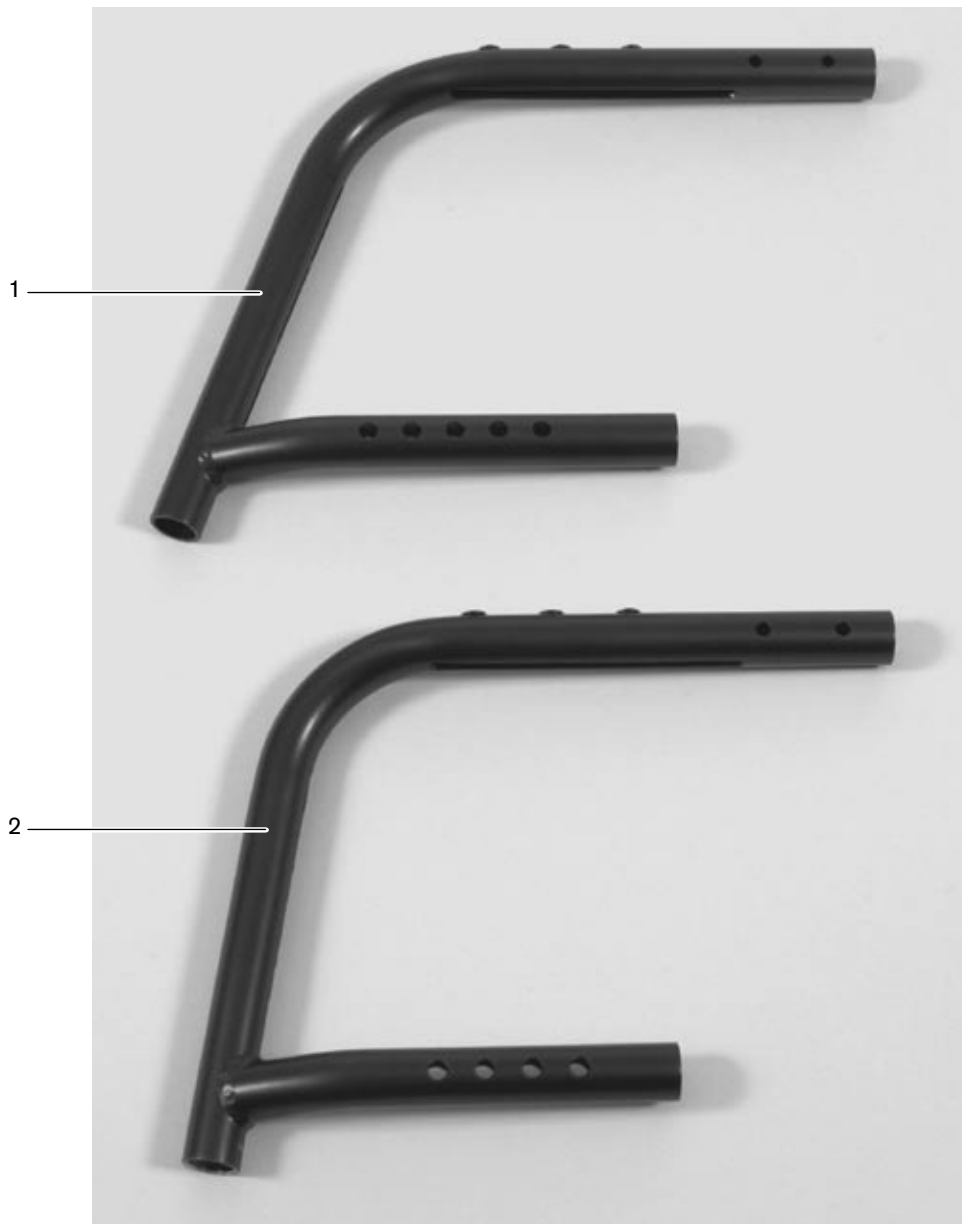

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK055	Rahmen Modell Avantgarde T 70/42, 2 cm Kröpfung (Pos. 1; Seite 18-20 Pos. 2-19; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
	481A45=SK056	Rahmen Modell Avantgarde T 70/48, 2 cm Kröpfung (Pos. 1; Seite 18-20 Pos. 2-19; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
	481A45=SK065	Rahmen Modell Avantgarde T 80/42, 2 cm Kröpfung (Pos. 2; Seite 18-20 Pos. 2-19; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
	481A45=SK066	Rahmen Modell Avantgarde T 80/48, 2 cm Kröpfung (Pos. 2; Seite 18-20 Pos. 2-19; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB012	Rahmenteil vorn Modell T 70/42, 2 cm gekröpft, bunt besch., li.*	1	St.
1	481A45=LB036	Rahmenteil vorn Modell T 70/48, 2 cm gekröpft, bunt besch., li.*	1	St.
2	481A45=LB010	Rahmenteil vorn Modell T 80/42, 2 cm gekröpft, bunt besch., li.*	1	St.
2	481A45=LB035	Rahmenteil vorn Modell T 80/48, 2 cm gekröpft, bunt besch., li.*	1	St.
o. B.	481A45=RB012	Rahmenteil vorn Modell T 70/42, 2 cm gekröpft, bunt besch., re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB036	Rahmenteil vorn Modell T 70/48, 2 cm gekröpft, bunt besch., re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB010	Rahmenteil vorn Modell T 80/42, 2 cm gekröpft, bunt besch., re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB035	Rahmenteil vorn Modell T 80/48, 2 cm gekröpft, bunt besch., re.*	1	St.
o. B.	481A45=SB022	Rahmenteil hinten, bunt beschichtet*	2	St.
o. B.	481A45=SR034	Gelenkrohr unten bis ST42	2	St.
o. B.	481A45=SR062	Gelenkrohr unten ab ST44	2	St.
o. B.	481A45=SR019	Gelenkrohr oben	2	St.
o. B.	481A08=ST019	Wadenband 680 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST020	Wadenband 800 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST022	Wadenband 900 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW048	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Seitenteil (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 11-15)	2	St.
	481A45=SW067	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Desk-Seitenteil (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 11-15)	2	St.
	481A45=SW201	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Kleiderschutz steckbar (Einzelteile s. Seite 18-20 Pos. 11-15)	2	St.
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
o. B.	623Z28=1002x25	Klettverschluss Haken, starr, selbstklebend	0,08	m
o. B.	481B08=ST030	Buchse für Fußbrettbügel (bei Anbau Fußraste 481B45=PK085, 481B45=SK060 und 481B45=SK080)	2	St.
o. B.	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen (bei Anbau Fußraste 481B45=SK090)	2	St.
o. B.	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
o. B.	481A45=ST047	Typenschild „Avantgarde“	1	St.
o. B.	481A45=ST074	Aufkleber „Avantgarde T“ schwarz oder	2	St.
o. B.	481A45=ST075	Aufkleber „Avantgarde T“ weiß	2	St.

* Rahmenfarbe:


A

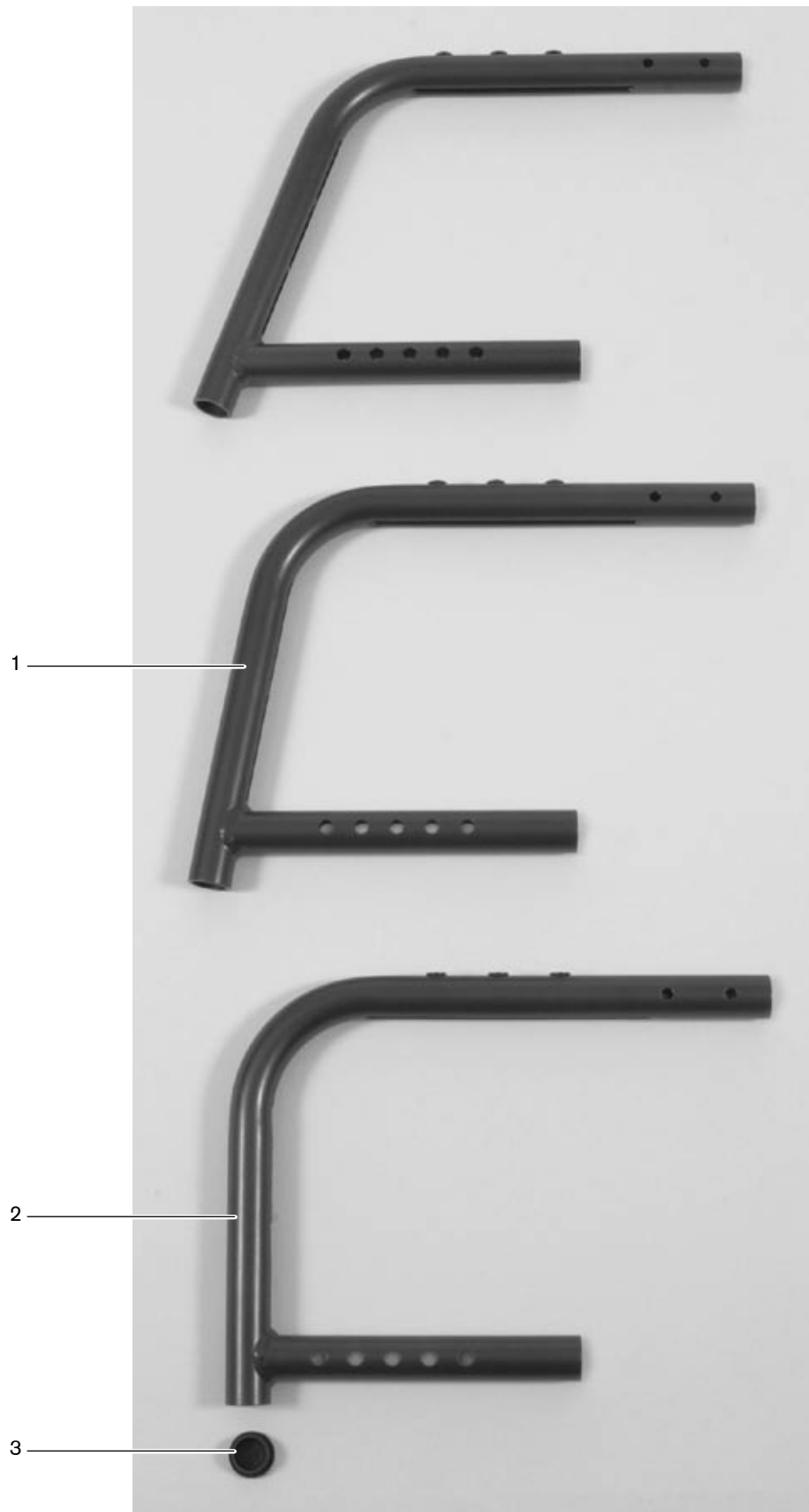

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK060	Rahmen Modell Avantgarde T 80/42 (Pos. 1; Seite 18-20 Pos. 2-19; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
	481A45=SK061	Rahmen Modell Avantgarde T 80/48 (Pos. 1; Seite 18-20 Pos. 2-19; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
	481A45=SK070	Rahmen Modell Avantgarde T 90/42 (Pos. 2, 3; Seite 18-20 Pos. 2-16, 18, 19; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
	481A45=SK071	Rahmen Modell Avantgarde T 90/48 (Pos. 2, 3; Seite 18-20 Pos. 2-16, 18, 19; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB025	Rahmenteil vorn Modell T 80/42, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB033	Rahmenteil vorn Modell T 80/48, bunt beschichtet, li.*	1	St.
2	481A45=LB045	Rahmenteil vorn Modell T 90/42, bunt beschichtet, li.*	1	St.
2	481A45=LB046	Rahmenteil vorn Modell T 90/48, bunt beschichtet, li.*	1	St.
o. B.	481A45=RB025	Rahmenteil vorn Modell T 80/42, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB033	Rahmenteil vorn Modell T 80/48, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB045	Rahmenteil vorn Modell T 90/42, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB046	Rahmenteil vorn Modell T 90/48, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=SB022	Rahmenteil hinten, bunt beschichtet*	2	St.
o. B.	481A45=SR034	Gelenkrohr unten bis ST42	2	St.
o. B.	481A45=SR062	Gelenkrohr unten ab ST44	2	St.
o. B.	481A45=SR019	Gelenkrohr oben	2	St.
o. B.	481A08=ST019	Wadenband 680 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST020	Wadenband 800 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST022	Wadenband 900 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW048	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Seitenteil (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 11-15)	2	St.
	481A45=SW067	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Desk-Seitenteil (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 11-15)	2	St.
	481A45=SW201	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Kleiderschutz steckbar (Einzelteile s. Seite 18-20 Pos. 11-15)	2	St.
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
o. B.	623Z28=1002x25	Klettverschluss Haken, starr, selbstklebend	0,08	m
o. B.	481B08=ST030	Buchse für Fußbrettbügel (bei Anbau Fußraste 481B45=PK085, 481B45=SK060 und 481B45=SK080)	2	St.
3.	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen (bei Anbau Fußraste 481B45=SK090)	2	St.
o. B.	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
o. B.	481A45=ST047	Typenschild „Avantgarde“	1	St.
o. B.	481A45=ST074	Aufkleber „Avantgarde T“ schwarz oder	2	St.
o. B.	481A45=ST075	Aufkleber „Avantgarde T“ weiß	2	St.

* Rahmenfarbe:

A

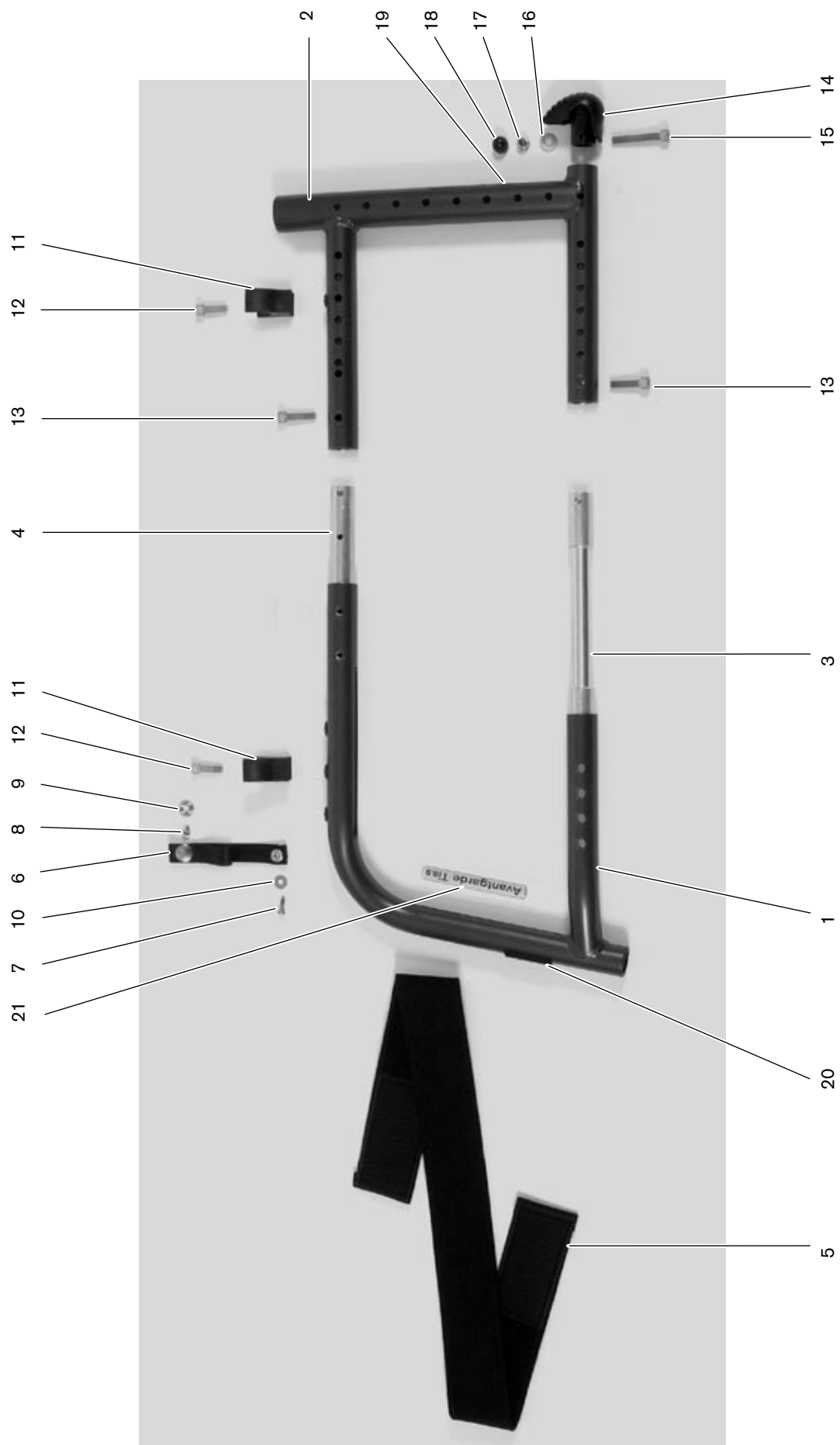


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK150	Rahmen Modell Avantgarde Ti 8.9 70/42 (Pos. 1-21; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
	481A45=SK151	Rahmen Modell Avantgarde Ti 8.9 70/48 (Pos. 1-21; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB023	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/42, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LP023	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/42, poliert, li.	1	St.
1	481A45=LB024	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/48, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LP024	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/48, poliert, li.	1	St.
o. B.	481A45=RB023	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/42, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RP023	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/42, poliert, re.	1	St.
o. B.	481A45=RB024	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/48, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RP024	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/48, poliert, re.	1	St.
2	481A45=SB022	Rahmenteil hinten, bunt beschichtet*	2	St.
2	481A45=SP022	Rahmenteil hinten, poliert	2	St.
3	481A45=SR049	Gelenkrohr unten Modell Ti 8.9 bis ST42	2	St.
3	481A45=SR063	Gelenkrohr unten Modell Ti 8.9 für Rahmen gerade ab ST44	2	St.
4	481A45=SR019	Gelenkrohr oben	2	St.
5	481A08=ST019	Wadenband 680 mm	1	St.
5	481A08=ST020	Wadenband 800 mm	1	St.
5	481A08=ST022	Wadenband 900 mm	1	St.
5	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
5	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW052	Montagezubehör Rahmen Modell Ti 8.9 bei Anbau Seitenteil (Pos. 11-18)	2	St.
11		Auflager Standard	2	St.
12		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
13		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
14		Rohrabschlusstopfen	1	St.
15		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
16		Scheibe DIN 125, Aluminium	1	St.
17		Sechskantmutter, selbstsichernd, Aluminium	1	St.
18		Sechskantschutzkappe für M6	1	St.
	481A45=SW068	Montagezubehör Rahmen Modell Ti 8.9 bei Anbau Desk-Seitenteil (Pos. 11-18)	2	St.
11		Auflager Standard	1	St.
o. B.		Aufnahme Desk	1	St.
o. B.		Aufnahme Desk für ST34-38	1	St.
12		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
13		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
14		Rohrabschlusstopfen	1	St.
15		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
16		Scheibe DIN 125, Aluminium	1	St.
17		Sechskantmutter, selbstsichernd, Aluminium	1	St.
18		Sechskantschutzkappe für M6	1	St.
	481A45=SW202	Montagezubehör Rahmen Modell Ti 8.9 bei Anbau Kleiderschutz steckbar (Pos. 11-18)	2	St.
11		Auflager Standard	2	St.
12		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.

A

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
13		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
14		Rohrabschlussstopfen	1	St.
15		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
16		Scheibe DIN 125, Aluminium	1	St.
17		Sechskantmutter, selbstsichernd, Aluminium	1	St.
18		Sechskantschutzkappe für M6	1	St.
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
19	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
20	623Z28=1002x25	Klettverschluss Haken, starr, selbstklebend	0,08	m
o. B.	481B08=ST030	Buchse für Fußbrettbügel (bei Anbau Fußraste 481B45=PK085, 481B45=SK060 und 481B45=SK080)	2	St.
o. B.	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen (bei Anbau Fußraste 481B45=SK090)	2	St.
o. B.	481A45=ST047	Typenschild „Avantgarde“	1	St.
21	481A45=ST078	Schild „Avantgarde Ti 8.9“	1	St.

* Rahmenfarbe:

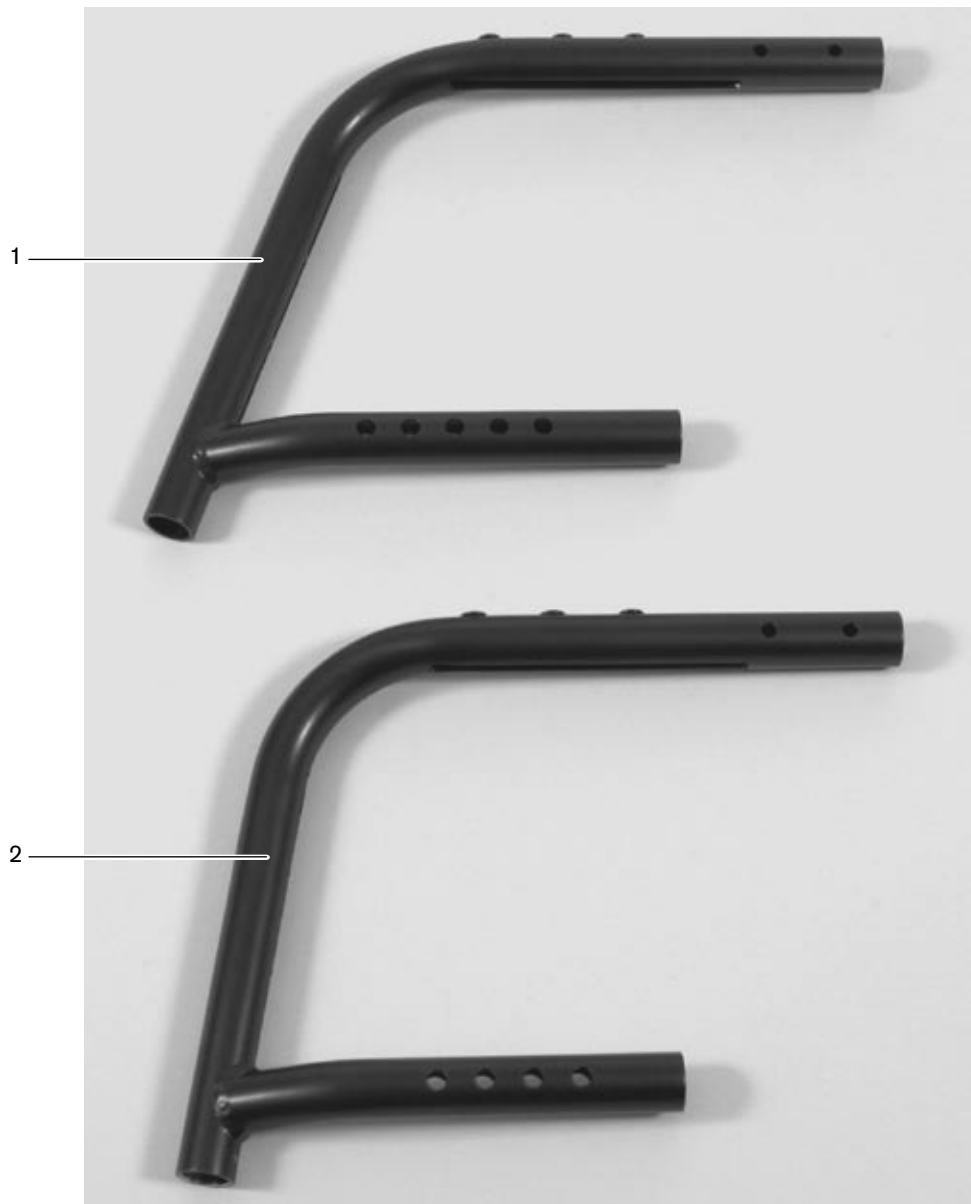

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK155	Rahmen Modell Avantgarde Ti 8.9 70/42, 2 cm Kröpfung (Pos. 1; Seite 24-26 Pos. 2-21; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
	481A45=SK156	Rahmen Modell Avantgarde Ti 8.9 70/48, 2 cm Kröpfung (Pos. 1; Seite 24-26 Pos. 2-21; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
	481A45=SK165	Rahmen Modell Avantgarde Ti 8.9 80/42, 2 cm Kröpfung (Pos. 2; Seite 24-26 Pos. 2-21; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
	481A45=SK166	Rahmen Modell Avantgarde Ti 8.9 80/48, 2 cm Kröpfung (Pos. 2; Seite 24-26 Pos. 2-21; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB012	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/42, 2 cm gekröpft, bunt besch., li.*	1	St.
1	481A45=LP012	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/42, 2 cm gekröpft, poliert, li.	1	St.
1	481A45=LB036	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/48, 2 cm gekröpft, bunt besch., li.*	1	St.
1	481A45=LP036	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/48, 2 cm gekröpft, poliert, li.	1	St.
2	481A45=LB010	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/42, 2 cm gekröpft, bunt besch., li.*	1	St.
2	481A45=LP010	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/42, 2 cm gekröpft, poliert, li.	1	St.
2	481A45=LB035	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/48, 2 cm gekröpft, bunt besch., li.*	1	St.
2	481A45=LP035	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/48, 2 cm gekröpft, poliert, li.	1	St.
o. B.	481A45=RB012	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/42, 2 cm gekröpft, bunt besch., re.*	1	St.
o. B.	481A45=RP012	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/42, 2 cm gekröpft, poliert, re.	1	St.
o. B.	481A45=RB036	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/48, 2 cm gekröpft, bunt besch., re.*	1	St.
o. B.	481A45=RP036	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 70/48, 2 cm gekröpft, poliert, re.	1	St.
o. B.	481A45=RB010	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/42, 2 cm gekröpft, bunt besch., re.*	1	St.
o. B.	481A45=RP010	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/42, 2 cm gekröpft, poliert, re.	1	St.
o. B.	481A45=RB035	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/48, 2 cm gekröpft, bunt besch., re.*	1	St.
o. B.	481A45=RP035	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/48, 2 cm gekröpft, poliert, re.	1	St.
o. B.	481A45=SB022	Rahmenteil hinten, bunt beschichtet*	2	St.
o. B.	481A45=SP022	Rahmenteil hinten, poliert	2	St.
o. B.	481A45=SR049	Gelenkrohr unten Modell Ti 8.9 70/42	2	St.
o. B.	481A45=SR054	Gelenkrohr unten Modell Ti 8.9 80/42	2	St.
o. B.	481A45=SR063	Gelenkrohr unten Modell Ti 8.9 70/48 für Rahmen gekröpft	2	St.
o. B.	481A45=SR064	Gelenkrohr unten Modell Ti 8.9 80/48 für Rahmen gekröpft	2	St.
o. B.	481A45=SR019	Gelenkrohr oben	2	St.
o. B.	481A08=ST019	Wadenband 680 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST020	Wadenband 800 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST022	Wadenband 900 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW052	Montagezubehör Rahmen Modell Ti 8.9 bei Anbau Seitenteil (Einzelteile s. Seite 24, 25 Pos. 11-18)	2	St.
	481A45=SW068	Montagezubehör Rahmen Modell Ti 8.9 bei Anbau Desk-Seitenteil (Einzelteile s. Seite 24, 25 Pos. 11-18)	2	St.
	481A45=SW202	Montagezubehör Rahmen Modell Ti 8.9 bei Anbau Kleiderschutz steckbar (Einzelteile s. Seite 24-26 Pos. 11-18)	2	St.

A

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
o. B.	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
o. B.	623Z28=1002x25	Klettverschluss Haken, starr, selbstklebend	0,08	m
o. B.	481B08=ST030	Buchse für Fußbrettbügel (bei Anbau Fußraste 481B45=PK085, 481B45=SK060 und 481B45=SK080)	2	St.
o. B.	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen (bei Anbau Fußraste 481B45=SK090)	2	St.
o. B.	481A45=ST047	Typenschild „Avantgarde“	1	St.
o. B.	481A45=ST078	Schild „Avantgarde Ti 8.9“	1	St.

* Rahmenfarbe:


1



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK160	Rahmen Modell Avantgarde Ti 8.9 80/42 (Pos. 1; Seite 24-26 Pos. 2-19; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
	481A45=SK161	Rahmen Modell Avantgarde Ti 8.9 80/48 (Pos. 1; Seite 24-26 Pos. 2-19; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB025	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/42, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LP025	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/42, poliert, li.	1	St.
1	481A45=LB033	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/48, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LP033	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/48, poliert, li.	1	St.
o. B.	481A45=RB025	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/42, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RP025	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/42, poliert, re.	1	St.
o. B.	481A45=RB033	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/48, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RP033	Rahmenteil vorn Modell Ti 8.9 80/48, poliert, re.	1	St.
o. B.	481A45=SB022	Rahmenteil hinten, bunt beschichtet*	2	St.
o. B.	481A45=SP022	Rahmenteil hinten, poliert	2	St.
o. B.	481A45=SR054	Gelenkrohr unten Modell Ti 8.9 80/42	2	St.
o. B.	481A45=SR064	Gelenkrohr unten Modell Ti 8.9 80/48	2	St.
o. B.	481A45=SR019	Gelenkrohr oben	2	St.
o. B.	481A08=ST019	Wadenband 680 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST020	Wadenband 800 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST022	Wadenband 900 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW052	Montagezubehör Rahmen Modell Ti 8.9 bei Anbau Seitenteil (Einzelteile s. Seite 24, 25 Pos. 11-18)	2	St.
	481A45=SW068	Montagezubehör Rahmen Modell Ti 8.9 bei Anbau Desk-Seitenteil (Einzelteile s. Seite 24, 25 Pos. 11-18)	2	St.
	481A45=SW202	Montagezubehör Rahmen Modell Ti 8.9 bei Anbau Kleiderschutz steckbar (Einzelteile s. Seite 24-26 Pos. 11-18)	2	St.
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
o. B.	623Z28=1002x25	Klettverschluss Haken, starr, selbstklebend	0,08	m
o. B.	481B08=ST030	Buchse für Fußbrettbügel (bei Anbau Fußraste 481B45=PK085, 481B45=SK060 und 481B45=SK080)	2	St.
o. B.	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen (bei Anbau Fußraste 481B45=SK090)	2	St.
o. B.	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
o. B.	481A45=ST047	Typenschild „Avantgarde“	1	St.
o. B.	481A45=ST078	Schild „Avantgarde Ti 8.9“	1	St.

* Rahmenfarbe:


A

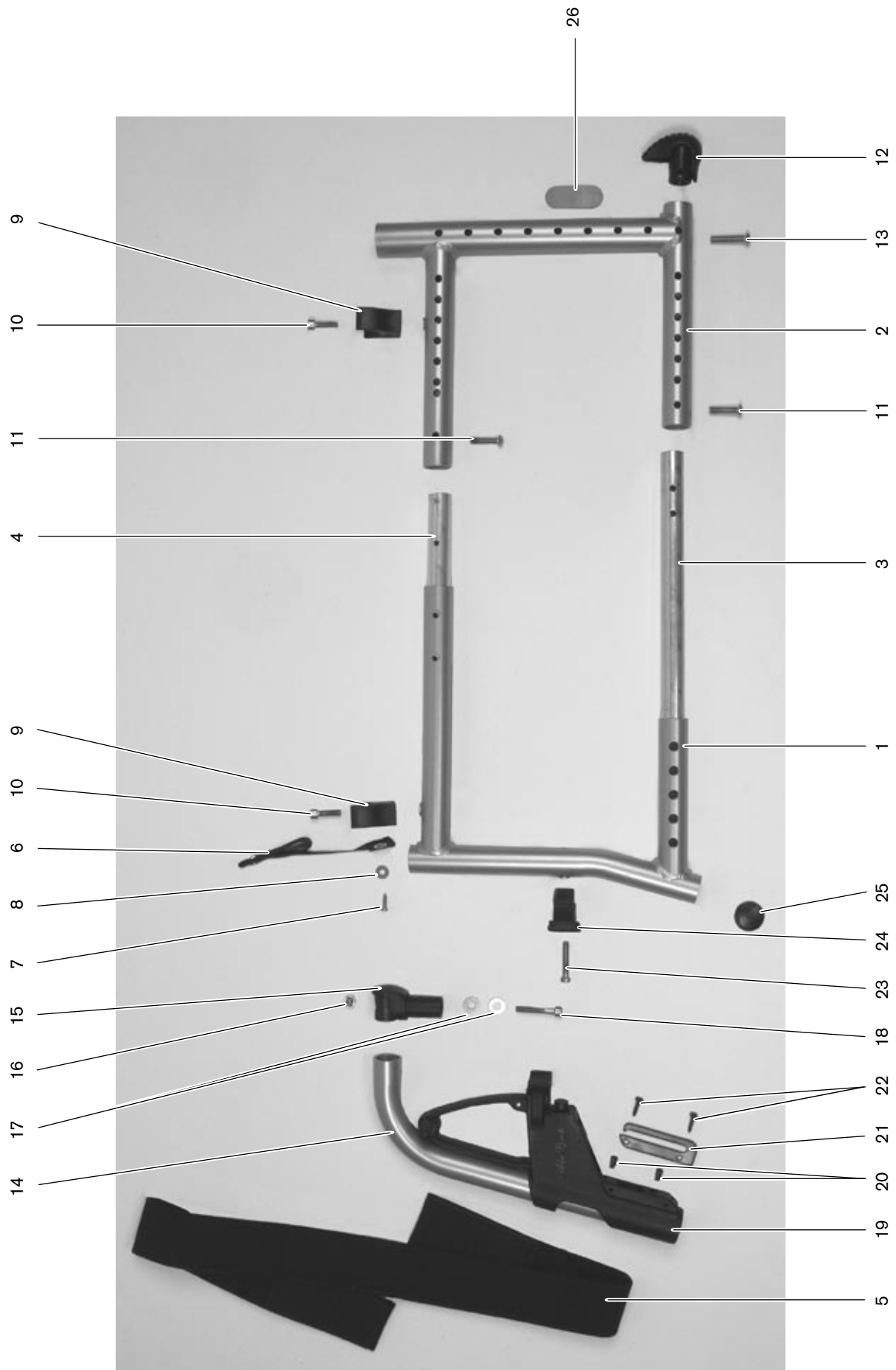

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK135	Rahmen standard Modell Avantgarde VR (Pos. 1-26; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB027	Rahmenteil vorn Modell VR 36, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB028	Rahmenteil vorn Modell VR 38, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB029	Rahmenteil vorn Modell VR 40, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB030	Rahmenteil vorn Modell VR 42, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB031	Rahmenteil vorn Modell VR 44, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB032	Rahmenteil vorn Modell VR 46, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB117	Rahmenteil vorn Modell VR 48, bunt beschichtet, li.*	1	St.
o. B.	481A45=RB023	Rahmenteil vorn Modell VR 36, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB024	Rahmenteil vorn Modell VR 38, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB029	Rahmenteil vorn Modell VR 40, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB030	Rahmenteil vorn Modell VR 42, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB031	Rahmenteil vorn Modell VR 44, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB032	Rahmenteil vorn Modell VR 46, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB117	Rahmenteil vorn Modell VR 48, bunt beschichtet, re.*	1	St.
2	481A45=SB022	Rahmenteil hinten, bunt beschichtet*	2	St.
3	481A45=SR125	Gelenkrohr unten Modell VR 36	2	St.
3	481A45=SR126	Gelenkrohr unten Modell VR 38	2	St.
3	481A45=SR127	Gelenkrohr unten Modell VR 40	2	St.
3	481A45=SR128	Gelenkrohr unten Modell VR 42	2	St.
3	481A45=SR129	Gelenkrohr unten Modell VR 44	2	St.
3	481A45=SR130	Gelenkrohr unten Modell VR 46	2	St.
3	481A45=SR131	Gelenkrohr unten Modell VR 48	2	St.
4	481A45=SR019	Gelenkrohr oben	2	St.
5	481A08=ST019	Wadenband 680 mm	1	St.
5	481A08=ST020	Wadenband 800 mm	1	St.
5	481A08=ST022	Wadenband 900 mm	1	St.
5	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
5	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Pos. 6-8, Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW048	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Seitenteil (Pos. 9-13, Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 11-15)	2	St.
	481A45=SW067	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Desk-Seitenteil (Pos. 9-13, Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 11-15)	2	St.
	481A45=SW201	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Kleiderschutz steckbar (Pos. 9-13, Einzelteile s. Seite 18-20 Pos. 11-15)	2	St.
	481B08=LK190	Fußrastenhalter links, kpl. (Pos. 14-24)*	1	St.
	481B08=RK190	Fußrastenhalter rechts, kpl. *	1	St.
	481B08=SV202	Fußrastenhalter vormontiert (Pos. 14-18)*	1	St.
14	481B08=SB198	Fußrastenhalter beschichtet*	1	St.
15	481B08=ST191	Drehlager FL	1	St.
16	502S18=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, verzinkt	1	St.
17	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
18	501T35=M6x35	Zylinderschraube DIN 912, A2	1	St.
19	481B08=LV201	Schwenksegment links	1	St.
o. B.	481B08=RV201	Schwenksegment rechts	1	St.
	481B08=SW203	Montagezubehör Fußrastenhalter (Pos. 20-24)	1	St.
20		Gewindestift DIN 915	2	St.
21		Wadenbandhalter	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
22		Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz, A2	2	St.
o. B.		Klemmstück	1	St.
23		Zylinderschraube DIN 6912, selbstsichernd, M6x30, A2	1	St.
24		Arretierstück	1	St.
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
25	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen	2	St.
26	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
o. B.	481A45=ST047	Typenschild „Avantgarde“	1	St.
o. B.	481A45=ST133	Aufkleber „Avantgarde VR“ schwarz oder	2	St.
o. B.	481A45=ST134	Aufkleber „Avantgarde VR“ weiß	2	St.

* Rahmenfarbe:

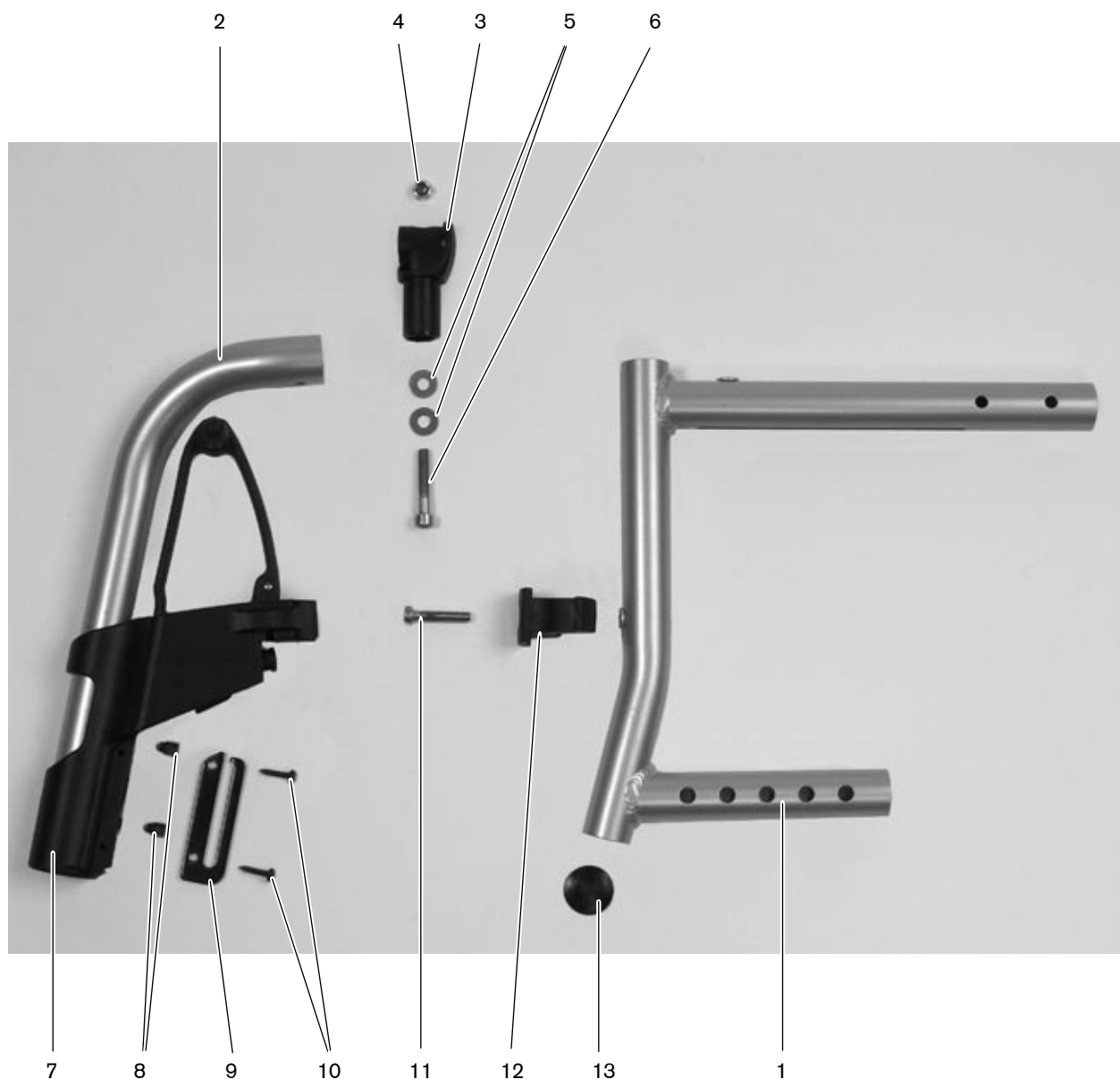


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK136	Rahmen 2 cm Kröpfung Modell Avantgarde VR (Pos. 1-13; Seite 30, 31 Pos. 2-13; Seite 90, 91 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB027	Rahmenteil vorn Modell VR 36, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB028	Rahmenteil vorn Modell VR 38, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB029	Rahmenteil vorn Modell VR 40, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB030	Rahmenteil vorn Modell VR 42, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB031	Rahmenteil vorn Modell VR 44, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB032	Rahmenteil vorn Modell VR 46, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB117	Rahmenteil vorn Modell VR 48, bunt beschichtet, li.*	1	St.
o. B.	481A45=RB023	Rahmenteil vorn Modell VR 36, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB024	Rahmenteil vorn Modell VR 38, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB029	Rahmenteil vorn Modell VR 40, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB030	Rahmenteil vorn Modell VR 42, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB031	Rahmenteil vorn Modell VR 44, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB032	Rahmenteil vorn Modell VR 46, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB117	Rahmenteil vorn Modell VR 48, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=SB022	Rahmenteil hinten, bunt beschichtet*	2	St.
o. B.	481A45=SR125	Gelenkrohr unten Modell VR 36	2	St.
o. B.	481A45=SR126	Gelenkrohr unten Modell VR 38	2	St.
o. B.	481A45=SR127	Gelenkrohr unten Modell VR 40	2	St.
o. B.	481A45=SR128	Gelenkrohr unten Modell VR 42	2	St.
o. B.	481A45=SR129	Gelenkrohr unten Modell VR 44	2	St.
o. B.	481A45=SR130	Gelenkrohr unten Modell VR 46	2	St.
o. B.	481A45=SR131	Gelenkrohr unten Modell VR 48	2	St.
o. B.	481A45=SR019	Gelenkrohr oben	2	St.
o. B.	481A08=ST019	Wadenband 680 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST020	Wadenband 800 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST022	Wadenband 900 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW048	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Seitenteil (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 11-15)	2	St.
	481A45=SW067	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Desk-Seitenteil (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 11-15)	2	St.
	481A45=SW201	Montagezubehör Rahmen bei Anbau Kleiderschutz steckbar (Einzelteile s. Seite 18-20 Pos. 11-15)	2	St.
	481B08=LK052	Fußrastenhalter links, Modell VR, kpl. (Pos. 2-12)*	1	St.
	481B08=RK052	Fußrastenhalter rechts, Modell VR, kpl.*	1	St.
	481B08=LV051	Fußrastenhalter Modell VR vormontiert (Pos. 2-6)*	1	St.
	481B08=RV051	Fußrastenhalter Modell VR vormontiert*	1	St.
2	481B45=LB046	Fußrastenhalter Modell VR beschichtet*	1	St.
o. B.	481B45=RB046	Fußrastenhalter Modell VR beschichtet*	1	St.
3	481B08=ST191	Drehlager FL	1	St.
4	502S18=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, verzinkt	1	St.
5	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
6	501T35=M6x35	Zylinderschraube DIN 912, A2	1	St.
7	481B45=LV076	Schwenksegment adduziert links	1	St.
o. B.	481B45=RV076	Schwenksegment adduziert rechts	1	St.
	481B08=SW203	Montagezubehör Fußrastenhalter (Pos. 8-12, Einzelteile s. Seite 30-32 Pos. 20-24)	1	St.

A

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
13	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen	2	St.
o. B.	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
o. B.	481A45=ST047	Typenschild „Avantgarde“	1	St.
o. B.	481A45=ST133	Aufkleber „Avantgarde VR“ schwarz oder	2	St.
o. B.	481A45=ST134	Aufkleber „Avantgarde VR“ weiß	2	St.

* Rahmenfarbe:

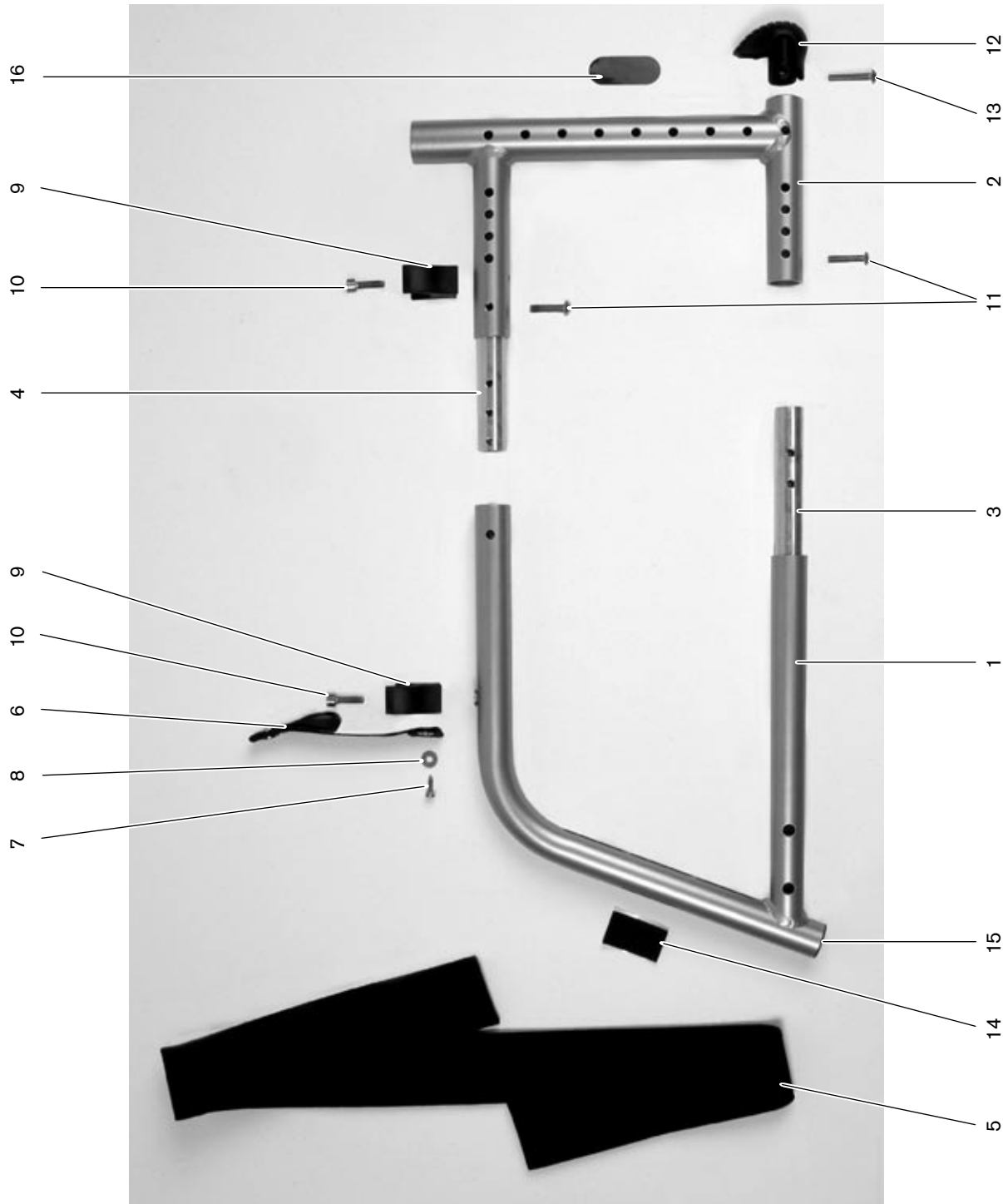

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK185	Rahmen Modell Avantgarde Teen2 (Pos. 1-16; Seite 94, 95 Pos. 1-11) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB146	Rahmenteil vorn gerade kurz Modell Teen2, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB147	Rahmenteil vorn gerade mittel Modell Teen2, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB148	Rahmenteil vorn gerade lang Modell Teen2, bunt beschichtet, li.*	1	St.
o. B.	481A45=RB146	Rahmenteil vorn gerade kurz Modell Teen2, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB147	Rahmenteil vorn gerade mittel Modell Teen2, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB148	Rahmenteil vorn gerade lang Modell Teen2, bunt beschichtet, re.*	1	St.
2	481A45=SB142	Rahmenteil hinten, bunt beschichtet*	2	St.
3	481A45=SR176	Gelenkrohr unten für gerade kurze Rahmen	2	St.
3	481A45=SR177	Gelenkrohr unten für gerade mittlere Rahmen	2	St.
3	481A45=SR178	Gelenkrohr unten für gerade lange Rahmen	2	St.
4	481A45=SR163	Gelenkrohr oben	2	St.
5	481A08=ST024	Wadenband 580 mm	1	St.
5	481A08=ST019	Wadenband 680 mm	1	St.
5	481A08=ST020	Wadenband 800 mm	1	St.
5	481A08=ST022	Wadenband 900 mm	1	St.
5	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
5	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Pos. 6-8, Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW184	Montagezubehör Rahmen Modell Teen2 bei Anbau Seitenteil (Pos. 9-13)	2	St.
9		Auflager Standard	2	St.
10		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
11		Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x25, A2	2	St.
12		Rohrabschlusstopfen	1	St.
13		Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
o. B.		Clip Rahmenverlängerung (entfällt bei ST24, 30 und 36, 2 Stück bei ST26, 32 und 38 und 4 Stück bei ST28, 34 und 40)		St.
	481A45=SW186	Montagezubehör Rahmen Modell Teen2 bei Anbau Desk-Seitenteil (Pos. 9-13)	2	St.
9		Auflager Standard	1	St.
o. B.		Aufnahme Desk	1	St.
o. B.		Aufnahme Desk für ST34-38	1	St.
10		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
11		Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x25, A2	2	St.
12		Rohrabschlusstopfen	1	St.
13		Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
o. B.		Clip Rahmenverlängerung (entfällt bei ST24, 30 und 36, 2 Stück bei ST26, 32 und 38 und 4 Stück bei ST28, 34 und 40)		St.
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
14	623Z28=1002x25	Klettverschluß Haken, starr, selbstklebend	0,08	m
15	481B08=ST030	Buchse für Fußbrettbügel (bei Anbau Fußraste 481B45=PK085, 481B45=SK060 und 481B45=SK080)	2	St.
o. B.	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen (bei Anbau Fußraste 481B45=SK090)	2	St.
16	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
o. B.	481A45=ST183	Typenschild „Avantgarde Teen2“	1	St.
o. B.	481A45=ST181	Aufkleber „Avantgarde Teen2“ schwarz oder	2	St.
o. B.	481A45=ST182	Aufkleber „Avantgarde Teen2“ weiß	2	St.
* Rahmenfarbe:				
Hinweis: Rahmen kurz: ST24 bis ST26 in Kombination mit SB22 bis SB30				
Rahmen mittel: ST30 bis ST34 in Kombination mit SB26 bis SB36				
Rahmen lang: ST36 bis ST40 in Kombination mit SB26 bis SB36				




Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK195	Rahmen Modell Avantgarde Teen2, 6 cm Abduktion (Pos. 1, 2; Seite 34, 35 Pos. 2-14, 16; Seite 94, 95 Pos. 1-11) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB143	Rahmenteil vorn abduziert kurz Modell Teen2, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB144	Rahmenteil vorn abduziert mittel Modell Teen2, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB145	Rahmenteil vorn abduziert lang Modell Teen2, bunt beschichtet, li.*	1	St.
o. B.	481A45=RB143	Rahmenteil vorn abduziert kurz Modell Teen2, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB144	Rahmenteil vorn abduziert mittel Modell Teen2, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB145	Rahmenteil vorn abduziert lang Modell Teen2, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=SB142	Rahmenteil hinten, bunt beschichtet*	2	St.
o. B.	481A45=SR162	Gelenkrohr unten Modell Teen2	2	St.
o. B.	481A45=SR163	Gelenkrohr oben	2	St.
o. B.	481A08=ST024	Wadenband 580 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST019	Wadenband 680 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST020	Wadenband 800 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST022	Wadenband 900 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW184	Montagezubehör Rahmen Modell Teen2 bei Anbau Seitenteil (Einzelteile s. Seite 34, 35 Pos. 9-13)	2	St.
	481A45=SW186	Montagezubehör Rahmen Modell Teen2 bei Anbau Desk-Seitenteil (Einzelteile s. Seite 34, 35 Pos. 9-13)	2	St.
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
o. B.	623Z28=1002x25	Klettverschluß Haken, starr, selbstklebend	0,08	m
2	481B08=ST030	Buchse für Fußbrettbügel (bei Anbau Fußraste 481B45=PK085, 481B45=SK060 und 481B45=SK080)	2	St.
o. B.	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen (bei Anbau Fußraste 481B45=SK090)	2	St.
o. B.	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
o. B.	481A45=ST183	Typenschild „Avantgarde Teen2“	1	St.
o. B.	481A45=ST181	Aufkleber „Avantgarde Teen2“ schwarz oder	2	St.
o. B.	481A45=ST182	Aufkleber „Avantgarde Teen2“ weiß	2	St.

* Rahmenfarbe:

Hinweis: Rahmen kurz: ST24 bis ST26 in Kombination mit SB22 bis SB30
Rahmen mittel: ST30 bis ST34 in Kombination mit SB26 bis SB36
Rahmen lang: ST36 bis ST40 in Kombination mit SB26 bis SB36

A

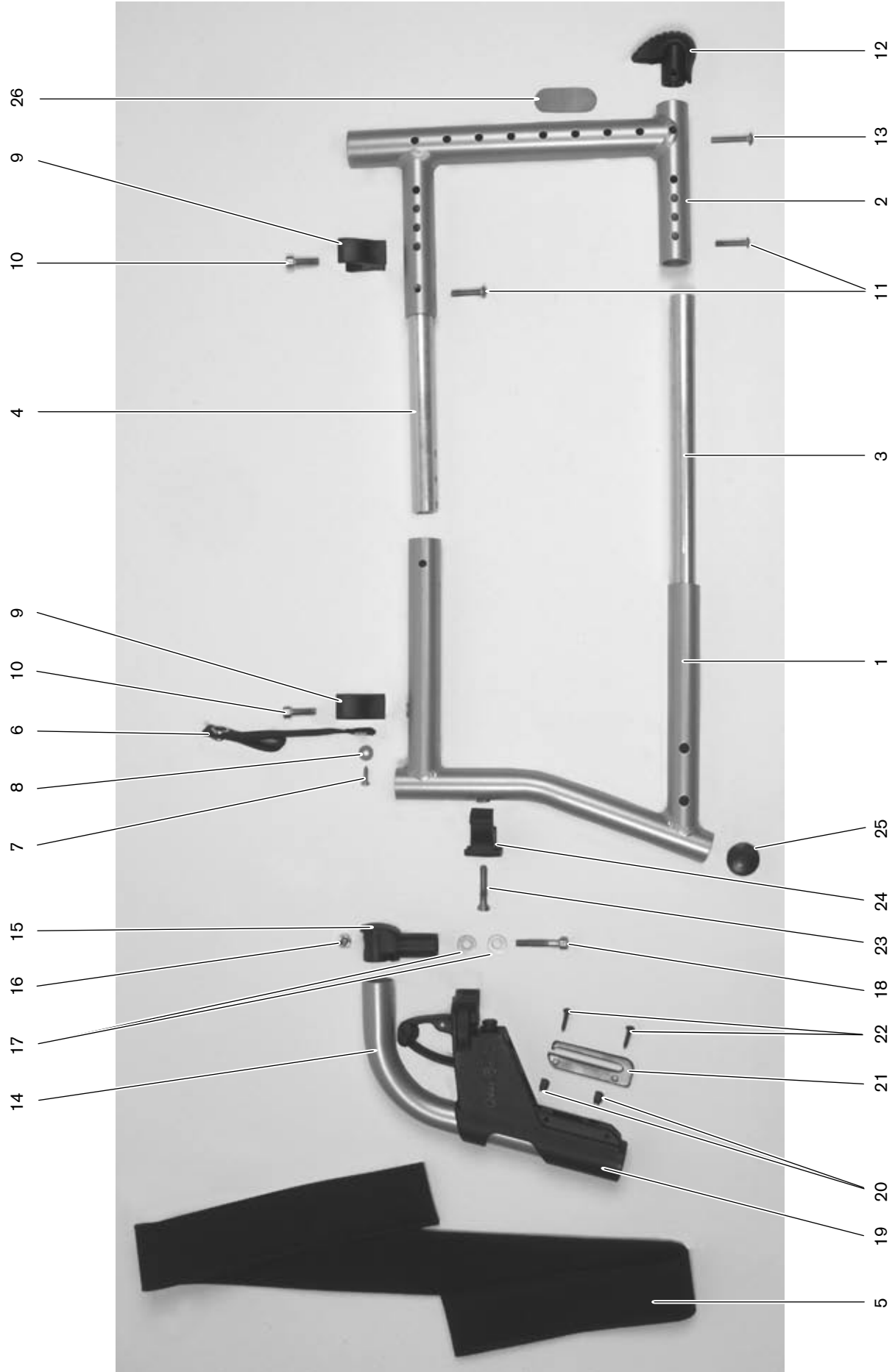

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK200	Rahmen Modell Avantgarde Teen2 VR (Pos. 1-26; Seite 94, 95 Pos. 1-11) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB150	Rahmenteil vorn gerade mittel Modell Teen2 VR, bunt besch., li.*	1	St.
1	481A45=LB151	Rahmenteil vorn gerade lang Modell Teen2 VR, bunt beschichtet, li.*	1	St.
o. B.	481A45=RB150	Rahmenteil vorn gerade mittel Modell Teen2 VR, bunt besch., re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB151	Rahmenteil vorn gerade lang Modell Teen2 VR, bunt besch., re.*	1	St.
2	481A45=SB142	Rahmenteil hinten, bunt beschichtet*	2	St.
3	481A45=SR177	Gelenkrohr unten für gerade mittlere Rahmen	2	St.
3	481A45=SR178	Gelenkrohr unten für gerade lange Rahmen	2	St.
4	481A45=SR163	Gelenkrohr oben	2	St.
5	481A08=ST024	Wadenband 580 mm	1	St.
5	481A08=ST019	Wadenband 680 mm	1	St.
5	481A08=ST020	Wadenband 800 mm	1	St.
5	481A08=ST022	Wadenband 900 mm	1	St.
5	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
5	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Pos. 6-8, Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW184	Montagezubehör Rahmen Modell Teen2 bei Anbau Seitenteil (Einzelteile s. Seite 34, 35 Pos. 9-13)	2	St.
	481B45=LK186	Fußrastenhalter kurz gerade links, kpl. (Pos. 14-24)*	1	St.
	481B45=RK186	Fußrastenhalter kurz gerade rechts, kpl.*	1	St.
	481B45=SV182	Fußrastenhalter kurz gerade vormontiert (Pos. 14-18)*	1	St.
14	481B08=SB198	Fußrastenhalter kurz gerade beschichtet*	1	St.
15	481B08=ST191	Drehlager FL	1	St.
16	502S18=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, verzinkt	1	St.
17	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
18	501T35=M6x35	Zylinderschraube DIN 912, A2	1	St.
19	481B45=LV075	Schwenksegment links	1	St.
o. B.	481B45=RV075	Schwenksegment rechts	1	St.
	481B08=SW203	Montagezubehör Fußrastenhalter (Einzelteile s. Seite Pos. 20-24)	2	St.
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
25	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen	2	St.
26	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
o. B.	481A45=ST183	Typenschild „Avantgarde Teen2“	1	St.
o. B.	481A45=ST181	Aufkleber „Avantgarde Teen2“ schwarz oder	2	St.
o. B.	481A45=ST182	Aufkleber „Avantgarde Teen2“ weiß	2	St.

* Rahmenfarbe:

Hinweis: Rahmen mittel: ST30 bis ST34 in Kombination mit SB26 bis SB36
Rahmen lang: ST36 bis ST40 in Kombination mit SB26 bis SB36

A




Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK205	Rahmen Modell Avantgarde Teen2 VR, 6 cm Abduktion (Pos. 1, 2; Seite 94, 95 Pos. 1-11) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB152	Rahmenteil vorn abduziert mittel Modell Teen2 VR, bunt besch., li.*	1	St.
1	481A45=LB153	Rahmenteil vorn abduziert lang Modell Teen2 VR, bunt besch., li.*	1	St.
o. B.	481A45=RB152	Rahmenteil vorn abduziert mittel Modell Teen2 VR, bunt besch., re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB153	Rahmenteil vorn abduziert lang Modell Teen2 VR, bunt besch., re.*	1	St.
o. B.	481A45=SB142	Rahmenteil hinten, bunt beschichtet *	2	St.
o. B.	481A45=SR162	Gelenkrohr unten Modell Teen2	2	St.
o. B.	481A45=SR163	Gelenkrohr oben	2	St.
o. B.	481A08=ST024	Wadenband 580 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST019	Wadenband 680 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST020	Wadenband 800 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST022	Wadenband 900 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW184	Montagezubehör Rahmen Modell Teen2 bei Anbau Seitenteil (Einzelteile s. Seite 34, 35 Pos. 9-13)	2	St.
	481B45=LK186	Fußrastenhalter kurz gerade links, kpl. (Einzelteile s. Seite 38, 39 Pos. 14-24)*	1	St.
	481B45=RK186	Fußrastenhalter kurz gerade rechts, kpl.*	1	St.
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
2	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen	2	St.
o. B.	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
o. B.	481A45=ST183	Typenschild „Avantgarde Teen2“	1	St.
o. B.	481A45=ST181	Aufkleber „Avantgarde Teen2“ schwarz oder	2	St.
o. B.	481A45=ST182	Aufkleber „Avantgarde Teen2“ weiß	2	St.

* Rahmenfarbe:

Hinweis: Rahmen mittel: ST30 bis ST34 in Kombination mit SB26 bis SB36
Rahmen lang: ST36 bis ST40 in Kombination mit SB26 bis SB36


A

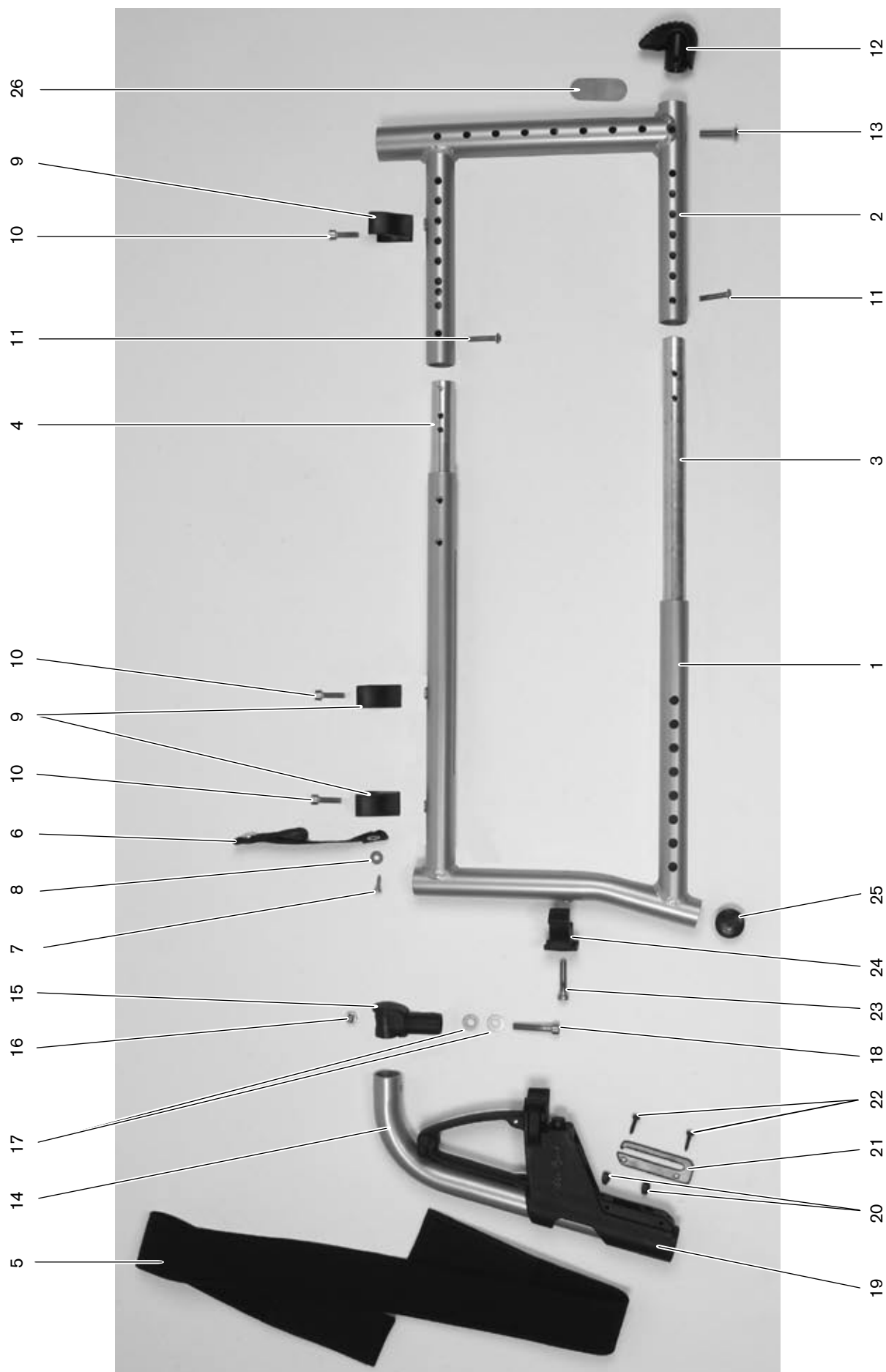

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK214	Rahmen standard Modell Avantgarde XXL2 (Pos. 1-26; Seite 96, 97 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB029	Rahmenteil vorn Modell VR 40, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB030	Rahmenteil vorn Modell VR 42, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB031	Rahmenteil vorn Modell VR 44, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB032	Rahmenteil vorn Modell VR 46, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB117	Rahmenteil vorn Modell VR 48, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB118	Rahmenteil vorn Modell XXL2 50, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB119	Rahmenteil vorn Modell XXL2 52, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB120	Rahmenteil vorn Modell XXL2 54, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB105	Rahmenteil vorn Modell XXL2 56, bunt beschichtet, li.*	1	St.
o. B.	481A45=RB029	Rahmenteil vorn Modell VR 40, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB030	Rahmenteil vorn Modell VR 42, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB031	Rahmenteil vorn Modell VR 44, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB032	Rahmenteil vorn Modell VR 46, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB117	Rahmenteil vorn Modell VR 48, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB118	Rahmenteil vorn Modell XXL2 50, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB119	Rahmenteil vorn Modell XXL2 52, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB120	Rahmenteil vorn Modell XXL2 54, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB105	Rahmenteil vorn Modell XXL2 56, bunt beschichtet, re.*	1	St.
2	481A45=SB194	Rahmenteil hinten Modell XXL2, bunt beschichtet*	2	St.
3	481A45=SR127	Gelenkrohr unten Modell VR 40	2	St.
3	481A45=SR128	Gelenkrohr unten Modell VR 42	2	St.
3	481A45=SR129	Gelenkrohr unten Modell VR 44	2	St.
3	481A45=SR130	Gelenkrohr unten Modell VR 46	2	St.
3	481A45=SR131	Gelenkrohr unten Modell VR 48	2	St.
3	481A45=SR122	Gelenkrohr unten Modell XXL2 50	2	St.
3	481A45=SR123	Gelenkrohr unten Modell XXL2 52	2	St.
3	481A45=SR124	Gelenkrohr unten Modell XXL2 54	2	St.
3	481A45=SR106	Gelenkrohr unten Modell XXL2 56	2	St.
4	481A45=SR196	Gelenkrohr oben Modell XXL2	2	St.
5	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
5	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
5	481A08=ST134	Wadenband 1240 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Pos. 6-8, Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW216	Montagezubehör Rahmen Modell XXL2 bei Anbau Seitenteil (Pos. 9-13)	2	St.
9		Auflager Standard	3	St.
10		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x20, A2	3	St.
11		Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x25, A2	2	St.
12		Rohrabschlusstopfen	1	St.
13		Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
	481A45=SW217	Montagezubehör Rahmen Modell XXL2 bei Anbau Desk-Seitenteil (Pos. 9-13)	2	St.
9		Auflager Standard	2	St.
o. B.		Aufnahme Desk	1	St.
10		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x20, A2	3	St.
11		Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x25, A2	2	St.
12		Rohrabschlusstopfen	1	St.
13		Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SW218	Montagezubehör Rahmen Modell XXL2 bei Anbau Kleiderschutz steckbar (Pos. 9-13)	2	St.
9		Auflager Standard	3	St.
10		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x20, A2	3	St.
11		Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x25, A2	1	St.
12		Rohrabschlusstopfen	1	St.
13		Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
	481B08=LK190	Fußrastenhalter links, kpl. (Einzelteile s. Seite 30, 31 Pos. 14-24)*	1	St.
	481B08=RK190	Fußrastenhalter rechts, kpl.*	1	St.
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
25	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen	2	St.
26	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
o. B.	481A45=ST219	Typenschild „Avantgarde XXL2“	1	St.
o. B.	481A45=ST203	Aufkleber „Avantgarde XXL2“ schwarz oder	2	St.
o. B.	481A45=ST204	Aufkleber „Avantgarde XXL2“ weiß	2	St.


* Rahmenfarbe:

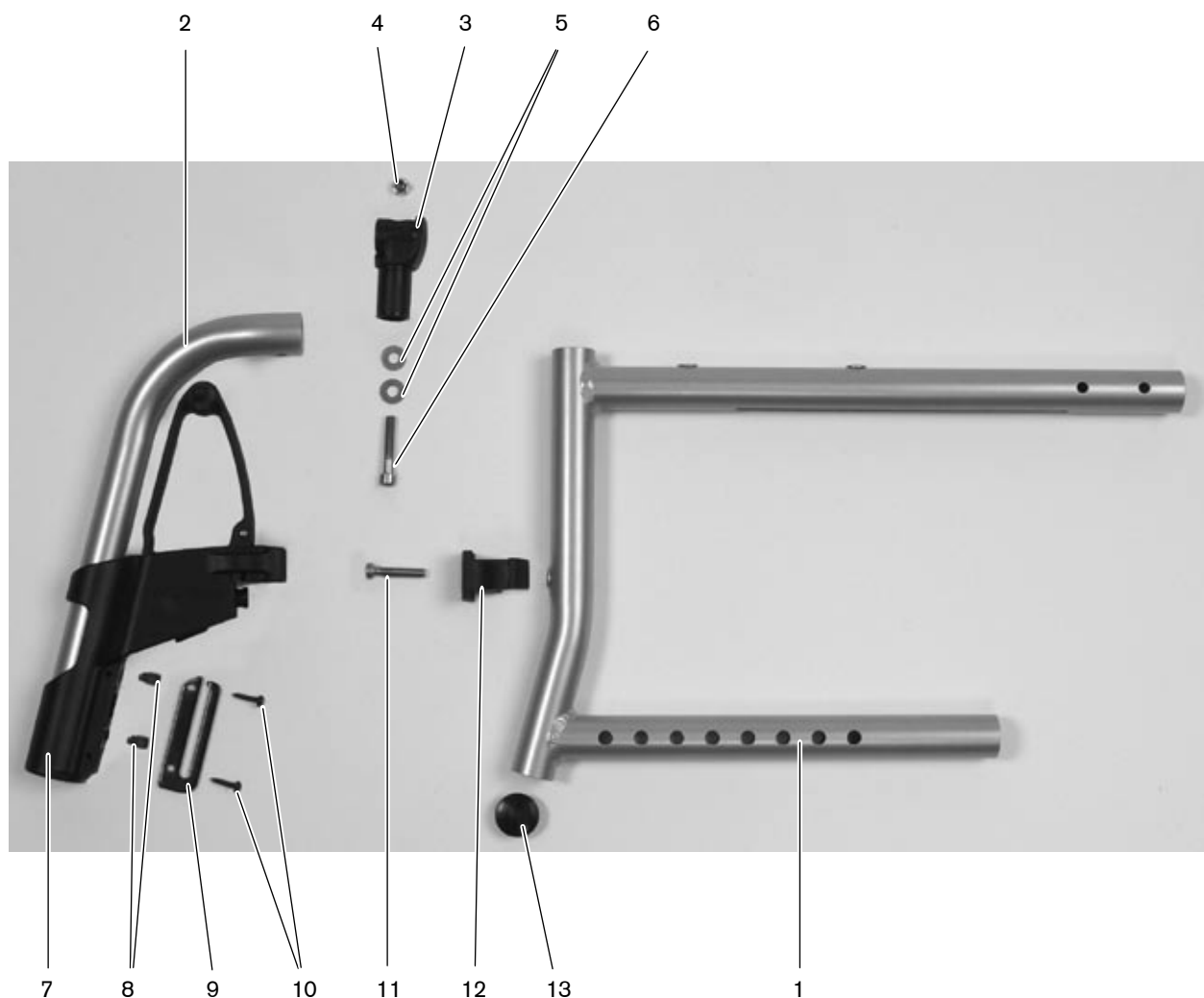

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK215	Rahmen 2 cm Kröpfung Modell Avantgarde XXL2 (Pos. Nr. 1-13; Seite 96, 97 Pos. 1-8) Sitzbreite: Sitztiefe: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481A45=LB029	Rahmenteil vorn Modell VR 40, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB030	Rahmenteil vorn Modell VR 42, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB031	Rahmenteil vorn Modell VR 44, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB032	Rahmenteil vorn Modell VR 46, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB117	Rahmenteil vorn Modell VR 48, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB118	Rahmenteil vorn Modell XXL2 50, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB119	Rahmenteil vorn Modell XXL2 52, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB120	Rahmenteil vorn Modell XXL2 54, bunt beschichtet, li.*	1	St.
1	481A45=LB105	Rahmenteil vorn Modell XXL2 56, bunt beschichtet, li.*	1	St.
o. B.	481A45=RB029	Rahmenteil vorn Modell VR 40, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB030	Rahmenteil vorn Modell VR 42, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB031	Rahmenteil vorn Modell VR 44, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB032	Rahmenteil vorn Modell VR 46, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB117	Rahmenteil vorn Modell VR 48, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB118	Rahmenteil vorn Modell XXL2 50, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB119	Rahmenteil vorn Modell XXL2 52, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB120	Rahmenteil vorn Modell XXL2 54, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=RB105	Rahmenteil vorn Modell XXL2 56, bunt beschichtet, re.*	1	St.
o. B.	481A45=SB194	Rahmenteil hinten Modell XXL2, bunt beschichtet*	2	St.
o. B.	481A45=SR127	Gelenkrohr unten Modell VR 40	2	St.
o. B.	481A45=SR128	Gelenkrohr unten Modell VR 42	2	St.
o. B.	481A45=SR129	Gelenkrohr unten Modell VR 44	2	St.
o. B.	481A45=SR130	Gelenkrohr unten Modell VR 46	2	St.
o. B.	481A45=SR131	Gelenkrohr unten Modell VR 48	2	St.
o. B.	481A45=SR122	Gelenkrohr unten Modell XXL2 50	2	St.
o. B.	481A45=SR123	Gelenkrohr unten Modell XXL2 52	2	St.
o. B.	481A45=SR124	Gelenkrohr unten Modell XXL2 54	2	St.
o. B.	481A45=SR106	Gelenkrohr unten Modell XXL2 56	2	St.
o. B.	481A45=SR196	Gelenkrohr oben Modell XXL2	2	St.
o. B.	481A08=ST023	Wadenband 1040 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST133	Wadenband 1160 mm	1	St.
o. B.	481A08=ST134	Wadenband 1240 mm	1	St.
	481A08=SK050	Faltfixierung kpl. (Pos. 6-8, Einzelteile s. Seite 18, 19 Pos. 6-10) Fußrastenvariante:	1	St.
	481A45=SW216	Montagezubehör Rahmen Modell XXL2 bei Anbau Seitenteil (Einzelteile s. Seite 42, 43 Pos. 9-13)	2	St.
	481A45=SW217	Montagezubehör Rahmen Modell XXL2 bei Anbau Desk-Seitenteil (Einzelteile s. Seite 42-44 Pos. 9-13)	2	St.
	481A45=SW218	Montagezubehör Rahmen Modell XXL2 bei Anbau Kleiderschutz steckbar (Einzelteile s. Seite 42-44 Pos. 9-13)	2	St.
	481B45=LK052	Fußrastenhalter links, Modell VR, kpl. (Einzelteile s. Seite 32, 33 Pos. 2-12)*	1	St.
	481B45=RK052	Fußrastenhalter rechts, Modell VR, kpl.*	1	St.
o. B.	481F08=ST012	Libelle	1	St.
13	481A08=ST003	Kunststoff-Blindstopfen	2	St.
o. B.	481D00=ST302	Rückstrahler	2	St.
o. B.	481A45=ST219	Typenschild „Avantgarde XXL2“	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
o. B.	481A45=ST203	Aufkleber „Avantgarde XXL2“ schwarz oder	2	St.
o. B.	481A45=ST204	Aufkleber „Avantgarde XXL2“ weiß	2	St.

* Rahmenfarbe:

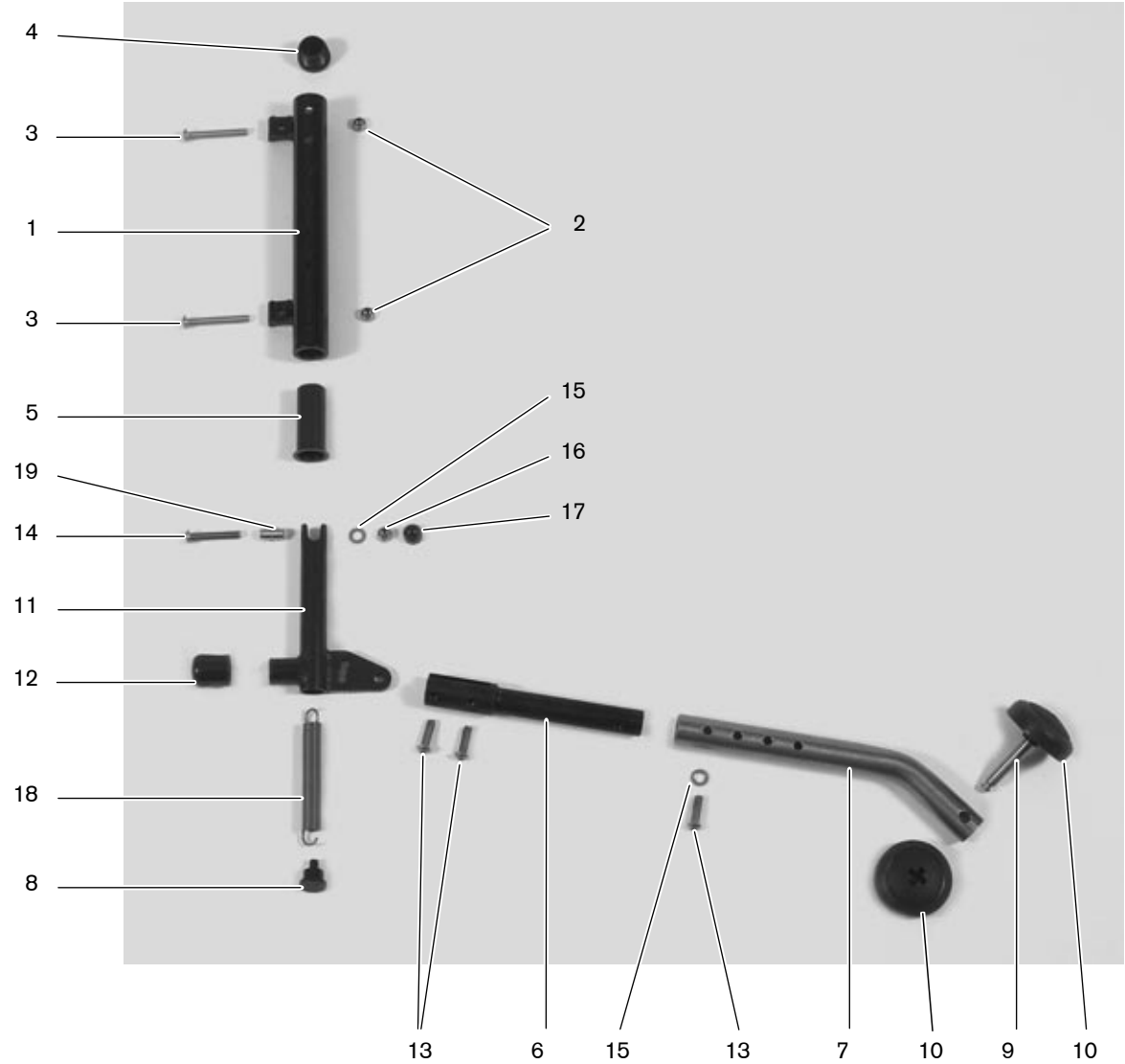

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=LK080	Kippschutz Modell T, VR und XXL2 links, kpl. (Pos. 1-19)*	1	St.
	481A45=RK080	Kippschutz Modell T, VR und XXL2 rechts, kpl.*	1	St.
	481A45=LV089	Zubehöraufnahme links Modell T, VR, Teen2 und XXL2 (Pos. 1-5)	1	St.
	481A45=RV089	Zubehöraufnahme rechts Modell T, VR, Teen2 und XXL2	1	St.
1	481A45=LS088	Zubehöraufnahme links, schwarz beschichtet	1	St.
o. B.	481A45=RS088	Zubehöraufnahme rechts, schwarz beschichtet	1	St.
2	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	2	St.
3	501S89=M6x45	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	2	St.
4	702F80=25	Lamellenstopfen	1	St.
5	471A00=ST106	Reduzierhülse	1	St.
6	481A08=SE039	Verstellelement für Kippschutz	1	St.
o. B.	481A03=SP034	Radhalter für Kippschutz gerade bis hintere SH40	1	St.
7	481A08=SP034	Radhalter für Kippschutz gebogen ab hintere SH42	1	St.
8	481A08=ST049	Federhalter für Kippschutz	1	St.
9	481A08=ST037	Achse für Kippschutz	1	St.
10	471A00=ST103	Kunststoffrad Ø=50	2	St.
11	481A08=SZ036	Halter für Kippschutz	1	St.
11	481A02=SZ039	Halter für Kippschutz (nur bei Radstandsverlängerung ab hintere SH50)	1	St.
12	481H00=ST058	Abdeckkappe	1	St.
13	501S92=12	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	3	St.
14	501S89=M6x35	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
15	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
16	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
17	481G00=ST006	Sechskantschutzkappe für M6	1	St.
18	513F8=1.8x12.6x72	Zugfeder	1	St.
18	513F8=1.8x12.6x147	Zugfeder (nur bei Radstandsverlängerung ab hintere SH50)	1	St.
19	481A09=ST017	Hülse für Kippschutz	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=LK079	Kippschutz Modell Ti 8.9 links, kpl. (Pos. 1, 2, 4-12, 15-19)*	1	St.
	481A45=RK079	Kippschutz Modell Ti 8.9 rechts, kpl.*	1	St.
	481A45=LV073	Zubehöraufnahme links Modell Ti 8.9 (Pos. 1, 2, 4, 5)	1	St.
	481A45=RV073	Zubehöraufnahme rechts Modell Ti 8.9	1	St.
1	481A45=LS088	Zubehöraufnahme links, schwarz beschichtet	1	St.
o. B.	481A45=RS088	Zubehöraufnahme rechts, schwarz beschichtet	1	St.
2	502S44=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, Aluminium	2	St.
o. B.	501T69=M6x45	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
4	702F80=25	Lamellenstopfen	1	St.
5	471A00=ST106	Reduzierhülse	1	St.
6	481A08=SE039	Verstellelement für Kippschutz	1	St.
o. B.	481A03=SP034	Radhalter für Kippschutz gerade bis hintere SH40	1	St.
7	481A08=SP034	Radhalter für Kippschutz gebogen ab hintere SH42	1	St.
8	481A08=ST049	Federhalter für Kippschutz	1	St.
9	481A08=ST037	Achse für Kippschutz	1	St.
10	471A00=ST103	Kunststoffrad Ø=50	2	St.
11	481A08=SZ036	Halter für Kippschutz	1	St.
11	481A02=SZ039	Halter für Kippschutz (nur bei Radstandsverlängerung ab hintere SH50)	1	St.
12	481H00=ST058	Abdeckkappe	1	St.
o. B.	501T69=M6x20	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	3	St.
o. B.	501T69=M6x40	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
15	507U64=6.4	Scheibe DIN 125, Aluminium	2	St.
16	502S44=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, Aluminium	1	St.
17	481G00=ST006	Sechskantschutzkappe für M6	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
18	513F8=1.8x12.6x72	Zugfeder	1	St.
18	513F8=1.8x12.6x147	Zugfeder (nur bei Radstandsverlängerung ab hintere SH50)	1	St.
19	481A09=ST017	Hülse für Kippschutz	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=LK210	Kippschutz Modell Teen2 links, kpl. (Pos. 1-19)*	1	St.
	481A45=RK210	Kippschutz Modell Teen2 rechts, kpl.*	1	St.
	481A45=LV089	Zubehöraufnahme links Modell T, VR, Teen2, XXL2 (Einzelteile s. 46, 47 Seite Pos. 1-5)	1	St.
	481A45=RV089	Zubehöraufnahme rechts Modell T, VR, Teen2, XXL2	1	St.
6	481A08=SE039	Verstellelement für Kippschutz	1	St.
o. B.	481A45=SP069	Radhalter für Kippschutz Modell Teen2	1	St.
o. B.	481A03=SP034	Radhalter für Kippschutz gerade bis hintere SH40	1	St.
7	481A08=SP034	Radhalter für Kippschutz gebogen ab hintere SH42	1	St.
8	481A08=ST049	Federhalter für Kippschutz	1	St.
9	481A08=ST037	Achse für Kippschutz	1	St.
10	471A00=ST103	Kunststoffrad Ø=50	2	St.
11	481A08=SZ036	Halter für Kippschutz	1	St.
12	481H00=ST058	Abdeckkappe	1	St.
13	501S92=12	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	3	St.
14	501S89=M6X35	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
15	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
16	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
17	481G00=ST006	Sechskantschutzkappe für M6	1	St.
18	513F8=1.8X12.6X72	Zugfeder	1	St.
19	481A09=ST017	Hülse für Kippschutz	1	St.

Hinweis: Kippschutz in Verbindung mit Transitrollen nicht möglich.

* Bitte angeben: Hintere SH.

Montageanleitung für Kippschutz

1. Montieren Sie die Aufnahmealterung mit den Linsenkopfschrauben (Abb. I, Pos. 1) und den Muttern (Abb. I, Pos. 2) an der Innenseite des hinteren Rahmenteils. Stecken Sie die Distanzbuchse (Abb. II, Pos. 3) durch die geschlossene Öse der Feder.
2. Haken Sie eine Kordel (Abb. II, Pos. 5) oder eine zweite Zugfeder in die offene Öse der ersten Zugfeder ein.
3. Stecken Sie dann die Zugfeder (Abb. II, Pos. 4) mit der geschlossenen Öse in das Aufnahmerohr. Stecken Sie die Schraube (Abb. III, Pos. 7) durch die gezeigte Bohrung und durch die Distanzbuchse und Öse der Feder. Ziehen Sie die Mutter (Abb. III, Pos. 8) nicht zu stark an.
4. Schieben Sie nun den Kippschutz (Abb. III, Pos. 9) in das Rohr der Aufnahmealterung.
5. Ziehen Sie an der Kordel (Abb. III, Pos. 10), bis ein Stück der Zugfeder aus dem Kippschutzrohr (Abb. III, Pos. 9) herauschaut.
6. Sichern Sie die Zugfeder mit einem Schraubendreher (Abb. IV, Pos. 11). In dieser Position entfernen Sie die Kordel und stecken den Federhalter (Abb. IV, Pos. 12) auf. Ziehen Sie den Schraubendreher weg, der Federhalter rastet ein.

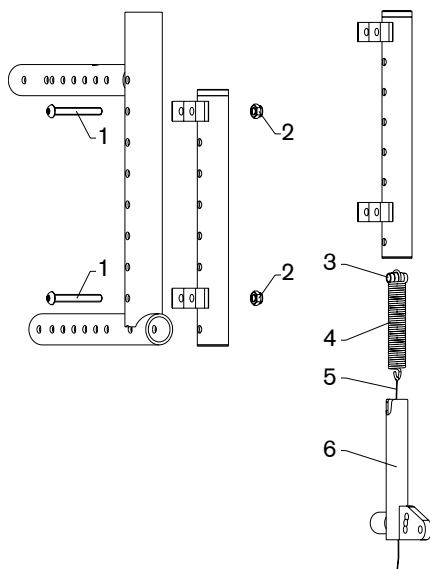


Abb. I

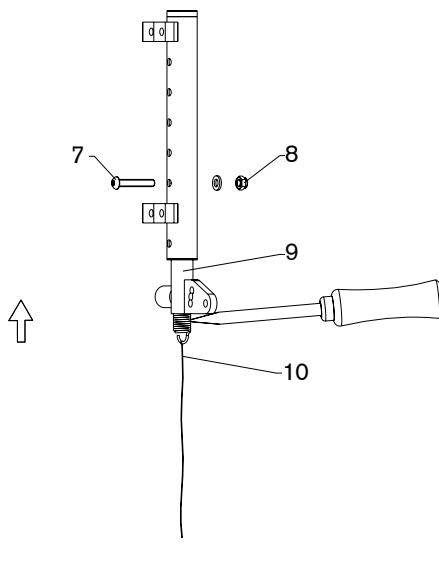


Abb. II

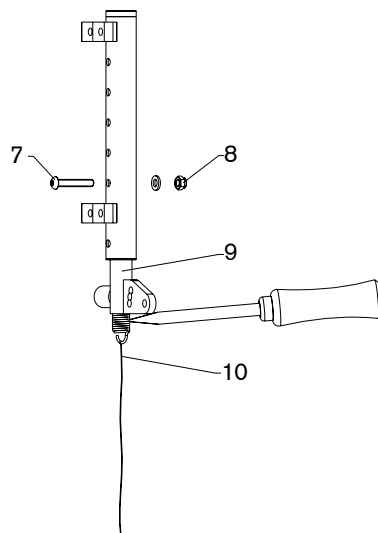


Abb. III


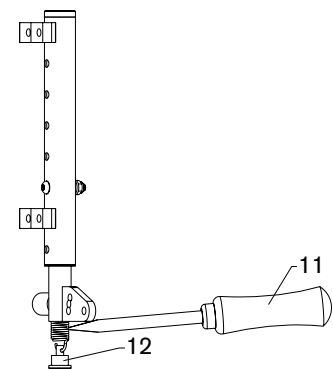


Abb. IV

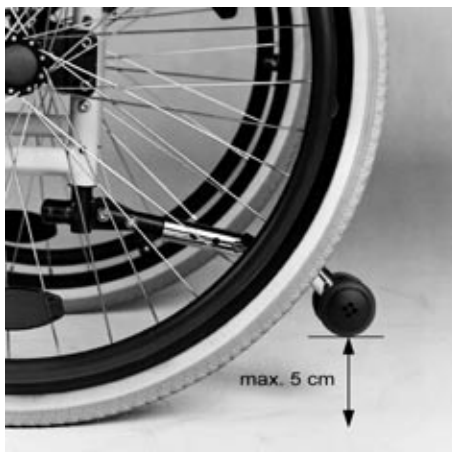


Anschließend können Sie den Kippschutz der Position Ihres Antriebsrades entsprechend einstellen. Durch Lösen der Schraubverbindungen kann der Kippschutz sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung eingestellt werden. Zusätzlich kann der Radhalter um 180° gedreht werden. Das Kippschutzrad muss mindestens vollständig nach hinten über das Antriebsrad herauschauen und das lichte Maß zwischen Rad und Boden darf maximal 5 cm betragen. Finden Sie mit sichernder Unterstützung eines Helfers die für Sie geeignete Position.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=PK085	Transitrolle Modell T, VR und Teen2, kpl.*	1	Paar
	481A45=LK085	Transitrolle Modell T, VR und Teen2, links, kpl. (Pos. 1-8)*	1	St.
	481A45=RK085	Transitrolle Modell T, VR und Teen2, rechts, kpl.*	1	St.
	481A45=LV089	Zubehöraufnahme links Modell T, VR, Teen2 und XXL2 (Pos. 1-4 Einzelteile s. 46, 47 Seite 22, 23 Pos. 1-5)	1	St.
	481A45=RV089	Zubehöraufnahme rechts Modell T, VR, Teen2 und XXL2	1	St.
5	481A45=SZ084	Halter für Transitrolle hintere SH35-42	1	St.
5	481A45=SZ082	Halter für Transitrolle hintere SH40-44	1	St.
5	481A45=SZ072	Halter für Transitrolle hintere SH46-53	1	St.
6	481A45=ST083	Achse für Transitrolle	1	St.
7	481A08=ST073	Kunststoffrad Ø=75	2	St.
8	513Z12=1	Stativfeder	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=PK086	Transitrolle Modell Ti 8.9, kpl.*	1	Paar
	481A45=LK086	Transitrolle Modell Ti 8.9, links, kpl. (Pos. 1-8)*	1	St.
	481A45=RK086	Transitrolle Modell Ti 8.9, rechts, kpl.*	1	St.
	481A45=LV073	Zubehöraufnahme links Modell Ti 8.9 (Pos. 1-4 Einzelteile s. 46, 47 Seite 22, 23 Pos. 1, 3, 4, 5)	1	St.
	481A45=RV073	Zubehöraufnahme rechts Modell Ti 8.9	1	St.
5	481A45=SZ084	Halter für Transitrolle hintere SH35-42	1	St.
5	481A45=SZ082	Halter für Transitrolle hintere SH40-44	1	St.
5	481A45=SZ072	Halter für Transitrolle hintere SH46-53	1	St.
6	481A45=ST083	Achse für Transitrolle	1	St.
7	481A08=ST073	Kunststoffrad Ø=75	2	St.
8	513Z12=1	Stativfeder	1	St.

Hinweis: Transitrolle in Verbindung mit Kippschutz nicht möglich.


* Bitte angeben: Hintere SH.

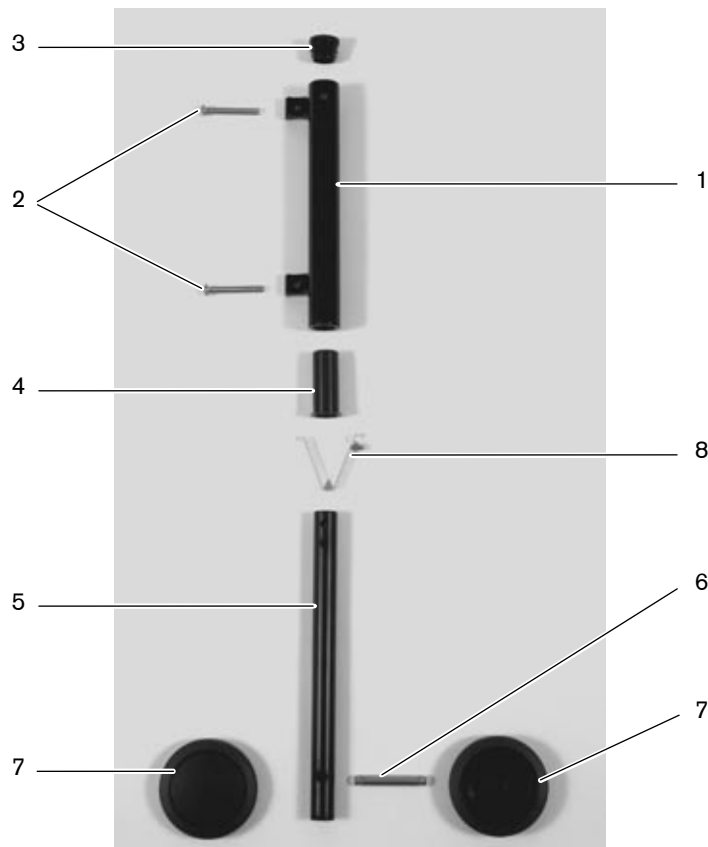


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=PK220	Transitrolle Modell XXL2, kpl.*	1	Paar
	481A45=LK220	Transitrolle Modell XXL2, links, kpl. (Pos. 1-12)*	1	St.
	481A45=RK220	Transitrolle Modell XXL2, rechts, kpl.*	1	St.
	481A45=LV089	Zubehöraufnahme links Modell T, VR, Teen2, XXL2 (Einzelteile s. S. 46, 47 Pos. 1-5)	1	St.
	481A45=RV089	Zubehöraufnahme rechts Modell T, VR, Teen2 und XXL2	1	St.
6	481A45=SZ082	Halter für Transitrolle hintere SH40-44	1	St.
6	481A45=SZ072	Halter für Transitrolle hintere SH46-53	1	St.
7	481A45=ST083	Achse für Transitrolle	1	St.
8	481A08=ST073	Kunststoffrad Ø=75	2	St.
9	501S89=M6x35	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
10	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	1	St.
11	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
12	481G00=ST006	Sechskantschutzkappe für M6	1	St.

Hinweis: Transitrolle in Verbindung mit Kippschutz nicht möglich.


* Bitte angeben: Hintere SH.

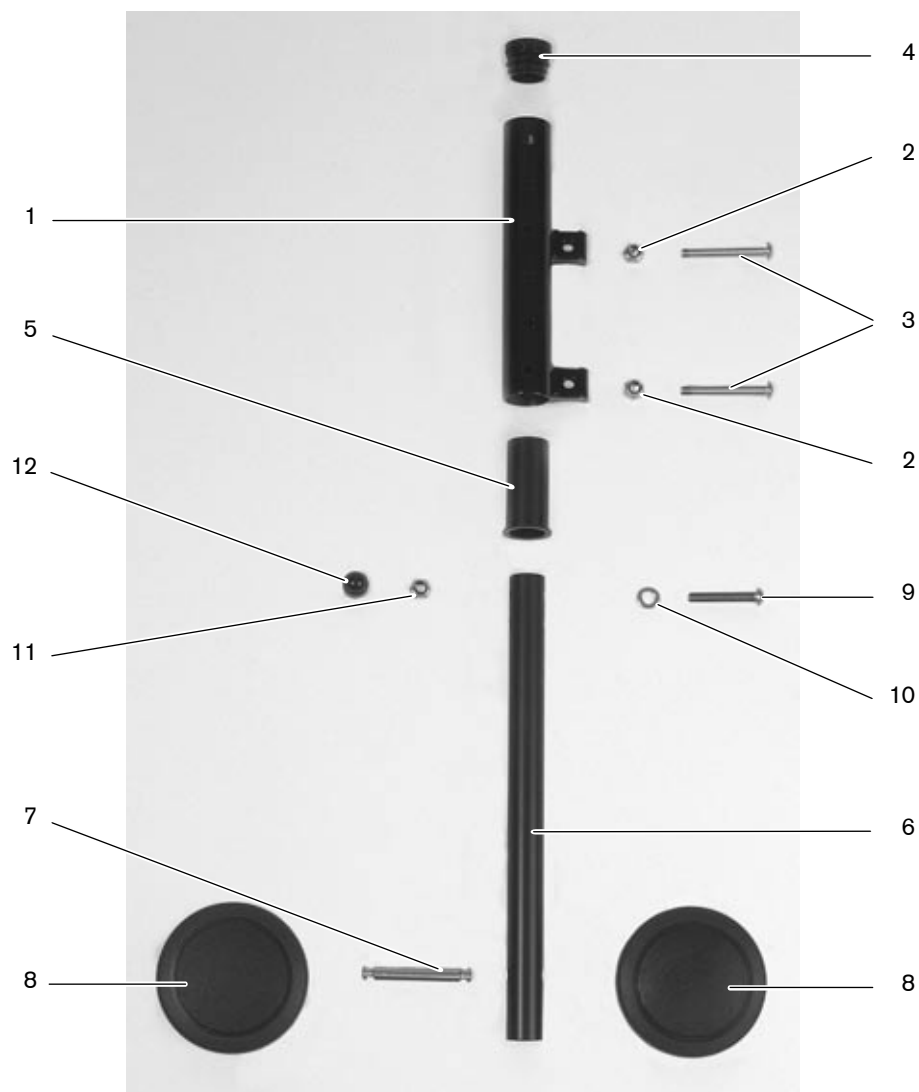

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK094	Ankipphilfe Modell T, VR, Teen2 und XXL2, kpl. (Pos. 1-3)	1	St.
	481A45=SK096	Ankipphilfe für Radstandsverlängerung Modell T, VR, Teen2 und XXL2, kpl. (Pos. 1-3)	1	St.
1	481A45=SR095	Ankippbügel	1	St.
1	481A45=SR097	Ankippbügel für Radstandsverlängerung	1	St.
2	481A45=ST003	Auftrittelement	1	St.
3	501S89=M6x30	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.

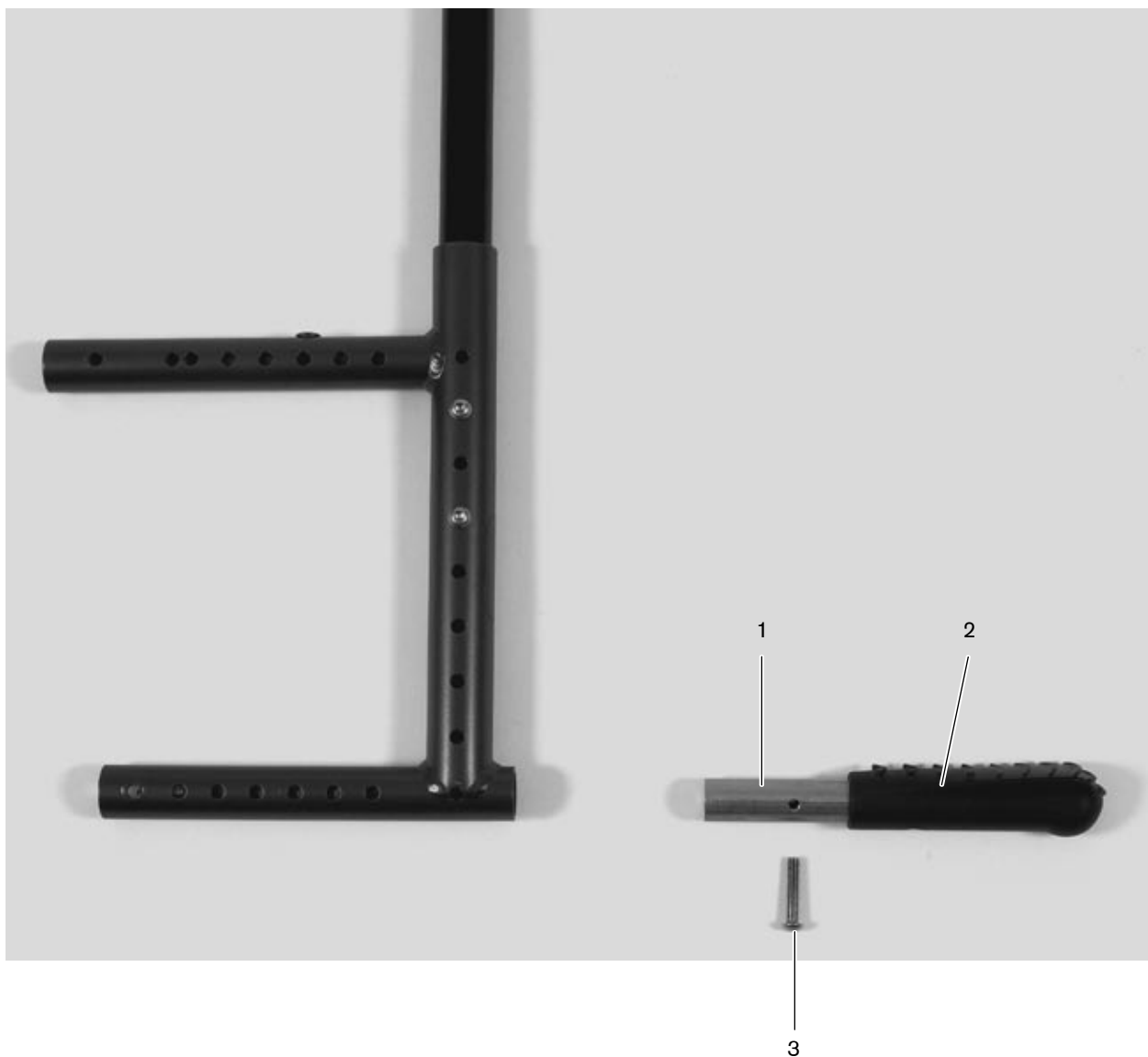

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481A45=SK099	Stockhalter Modell T, VR, Teen2 und XXL2, kpl. (Pos. 1-7)	1	St.
	481A45=SK087	Stockhalter für Radstandsverlängerung Modell T, VR, Teen2 und XXL2, kpl. (Pos. 1-7)	1	St.
1	481A45=SR095	Ankippbügel	1	St.
1	481A45=SR097	Ankippbügel für Radstandsverlängerung	1	St.
2	481A45=ST003	Auftrittelement	1	St.
3	501S89=M6x30	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
4	481A00=ST130	Stockhalter	1	St.
5	501S84=M6x35	Senkschraube DIN 7991, A2	1	St.
6	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
7	481A08=ST144	Schlaufe für Stockhalter	1	St.

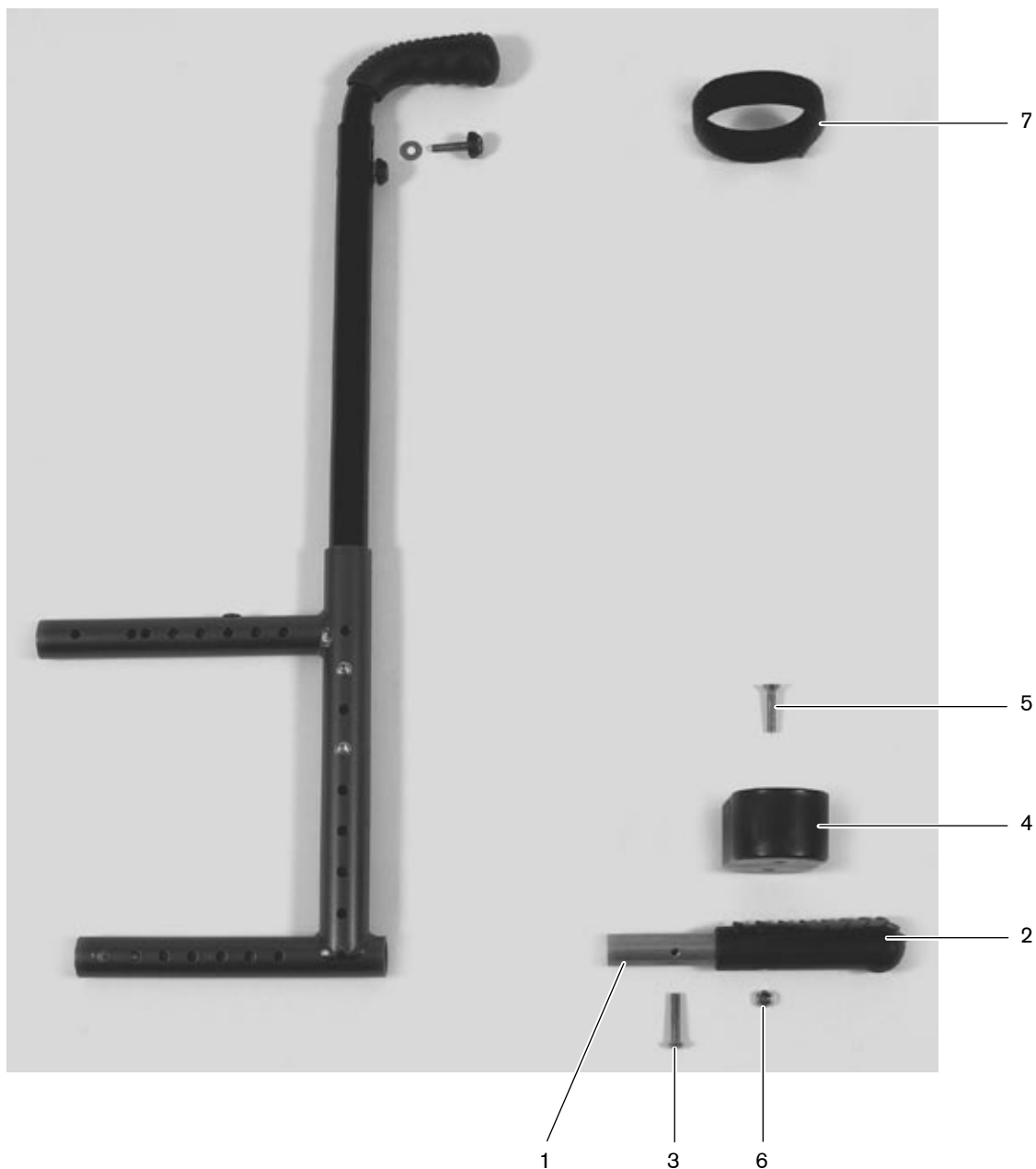

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481A08=ST236	Rahmenpolster kurz (für Modelle T, Ti 8.9 und Teen2) Bespannungsfarbe:	2	St.
2	481A08=ST235	Rahmenpolster lang (für Modelle T, Ti 8.9, Teen2 bei oberster Stellung des Fußbrettes) Bespannungsfarbe:	2	St.
Hinweis: Bei den Modellen VR, Teen2 VR und XXL2 ist kein Rahmenpolster möglich!				

1

2



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	635L65=0001	Lackstift anthrazit-metallic	1	St.
	635L65=0002	Lackstift goldglitter	1	St.
	635L65=0003	Lackstift jeansmetallic	1	St.
	635L65=0009	2-Schicht-Klarlack	1	St.
	635L65=0011	Lackstift saturnblau-metallic	1	St.
	635L65=0012	Lackstift grün-metallic	1	St.
	635L65=0014	Lackstift enchante` blau	1	St.
	635L65=0016	Lackstift silberbrilliant	1	St.
	635L65=0017	Lackstift shimano matt	1	St.
	635L65=0018	Lackstift sparkle rot	1	St.
	635L65=0019	Lackstift sparkle blau-grün	1	St.
	635L65=0021	Lackstift sparkle hellorange inkl. Lackstift grau zum Untermischen	1	St.
	635L65=0022	Lackstift sparkle Granny Smith inkl. Lackstift grau zum Untermischen	1	St.
	635L65=3001	Lackstift signalrot	1	St.
	635L65=9005	Lackstift tiefschwarz	1	St.
	635L65=9005M	Lackstift tiefschwarz matt	1	St.
	635L65=0023	Lackstift silbermetallic	1	St.


Hinweis: Bei den Farben saturnblau-metallic, grün-metallic, silberbrilliant, sparkle rot und sparkle blau-grün unbedingt 2-Schicht-Klarlack mitbestellen!

A

Baugruppe B

Fußraste

B

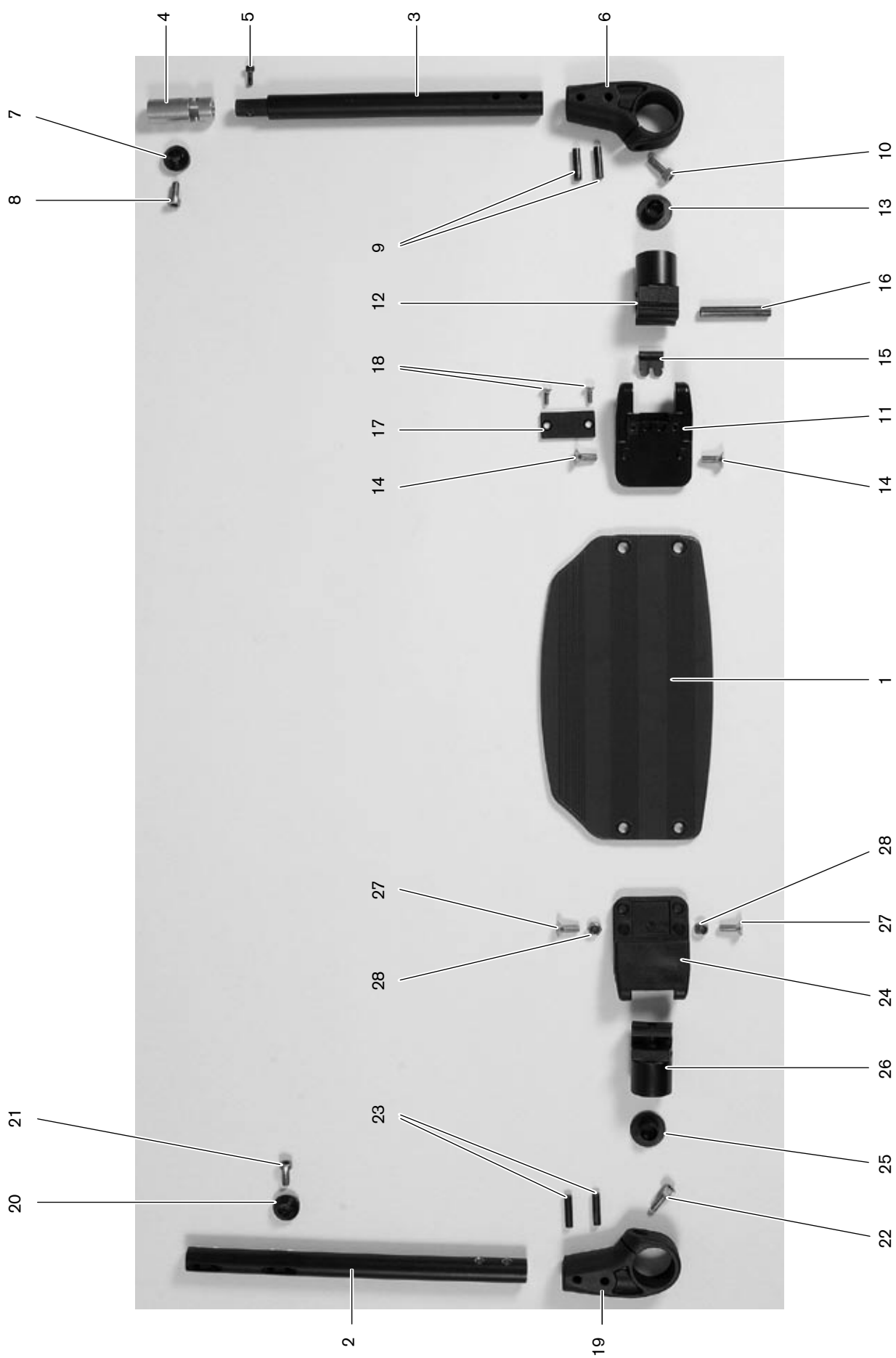


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=SK060	Fußraste Modell T, Teen2 durchgehend winkelverstellbar 12,5 cm tief (Pos. 1-28) Kröpfung: Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
	481B45=SK180	Fußraste Modell VR, Teen2 VR, XXL2 durchgehend winkelverstellbar 12,5 cm tief (Pos. 1, 6, 9-28) Kröpfung: Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481B45=SB184	Fußbrett schmal durchgehend, bunt beschichtet* SB26 Rahmen gerade Modell Teen2	1	St.
1	481B45=SB020	Fußbrett schmal durchgehend, bunt beschichtet* SB22 Rahmen abduziert und SB28 Rahmen gerade Modell Teen2 SB32 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=SB021	Fußbrett schmal durchgehend, bunt beschichtet* SB24 Rahmen abduziert und SB30 Rahmen gerade Modell Teen2 SB34 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=SB022	Fußbrett schmal durchgehend, bunt beschichtet* SB26 Rahmen abduziert und SB32 Rahmen gerade Modell Teen2 SB32 Rahmen gerade und SB36 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=SB023	Fußbrett schmal durchgehend, bunt beschichtet* SB28 Rahmen abduziert und SB34 Rahmen gerade Modell Teen2 SB34 Rahmen gerade und SB38 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=SB024	Fußbrett schmal durchgehend, bunt beschichtet* SB30-36 Rahmen abduziert und SB36 Rahmen gerade Modell Teen2 SB36-42 Rahmen gerade und SB40-46 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=SB025	Fußbrett schmal durchgehend, bunt beschichtet* SB44-50 Rahmen gerade und SB48-50 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB50 Rahmen gerade und SB48-54 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
1	481B45=SB224	Fußbrett schmal durchgehend, bunt beschichtet* SB52-58 Rahmen gerade und SB56-62 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
1	481B45=SB225	Fußbrett schmal durchgehend, bunt beschichtet* SB60 Rahmen gerade Modell XXL2	1	St.
1	481B45=SB226	Fußbrett schmal durchgehend, bunt beschichtet* SB62 Rahmen gerade Modell XXL2	1	St.
		<u>Fußbrettbügel für Modell T und Teen2</u>		
	481B45=SK057	Fußbrettbügel standard kurz (Pos. 2, 19, 23)**	1	St.
	481B45=SK058	Fußbrettbügel standard mittel (Pos. 2, 19, 23)**	1	St.
	481B45=SK059	Fußbrettbügel standard lang (Pos. 2, 19, 23)**	1	St.
2	481B45=SE057	Fußbrettbügel standard kurz**	1	St.
2	481B45=SE058	Fußbrettbügel standard mittel**	1	St.
2	481B45=SE059	Fußbrettbügel standard lang**	1	St.
19	481B45=SE048	Aufnahme	1	St.
23	506A28=6x25	Passkerbstift ISO 8745, schwarz (Version bis 09/03 2 Stück)	1	St.
o. B.	636W63	Delomet 01 rapid	0,01	Pkg.
	481B45=LK056	Fußbrettbügel abschwenkbar kurz, kpl. (Pos. 3-6, 9)**	1	St.
	481B45=LK055	Fußbrettbügel abschwenkbar mittel, kpl. (Pos. 3-6, 9)**	1	St.
	481B45=LK049	Fußbrettbügel abschwenkbar lang, kpl. (Pos. 3-6, 9)**	1	St.
3	481B45=LE056	Fußbrettbügel abschwenkbar kurz**	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
3	481B45=LE055	Fußbrettbügel abschwengbar mittel**	1	St.
3	481B45=LE049	Fußbrettbügel abschwengbar lang**	1	St.
4	481B08=ST169	Abschwenggelenk	1	St.
5	501T60=1	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M4x10, schwarz verzinkt	1	St.
6	481B45=SE048	Aufnahme	1	St.
9	506A28=6x25	Passkerbstift ISO 8745, schwarz (Version bis 09/03 2 Stück)	1	St.
o. B.	636W63	Delomet 01 rapid	0,01	Pkg.
		<u>Fußbrettbügel für Modell VR, Teen2 VR und XXL2</u>		
	481B45=SK231	Fußbrettbügel standard 175 mm, kpl. (Pos. 19, 23)**	2	St.
	481B45=SK232	Fußbrettbügel standard 225 mm, kpl. (Pos. 19, 23)**	2	St.
	481B45=SK124	Fußbrettbügel standard 275 mm, kpl. (Pos. 19, 23)**	2	St.
	481B45=SK125	Fußbrettbügel standard 325 mm, kpl. (Pos. 19, 23)**	2	St.
	481B45=SK126	Fußbrettbügel standard 375 mm, kpl. (Pos. 19, 23)**	2	St.
o. B.	481B45=SE231	Fußbrettbügel standard 175 mm**	1	St.
o. B.	481B45=SE232	Fußbrettbügel standard 225 mm**	1	St.
o. B.	481B45=SE124	Fußbrettbügel standard 275 mm**	1	St.
o. B.	481B45=SE125	Fußbrettbügel standard 325 mm**	1	St.
o. B.	481B45=SE126	Fußbrettbügel standard 375 mm**	1	St.
19	481B45=SE048	Aufnahme	1	St.
23	506A28=6x25	Passkerbstift ISO 8745, schwarz (Version bis 09/03 2 Stück)	1	St.
o. B.	636W63	Delomet 01 rapid	0,01	Pkg.
	481B45=LW068	Montagezubehör für Fußbrettbügel links für Modell T und Teen2 (Pos. 7, 8, 10-18) Kröpfung: Sitzbreite:	1	St.
	481B45=LW118	Montagezubehör für Fußbrettbügel links für Modell VR, Teen2 VR und XXL2 (Pos. 10-18) Kröpfung: Sitzbreite:	1	St.
7		Rosette	1	St.
8		Zylinderschraube DIN 6912, selbstsichernd, M6x20, A2	1	St.
10		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x16, A2	1	St.
11		Lagersegment Größe 1 SB26-36 Rahmen gerade und SB22-30 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB32-36 und 44 Rahmen gerade und SB32-40 und 48 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB52 Rahmen gerade und SB56 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
11		Lagersegment Größe 2 SB32 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB38 und 46 Rahmen gerade und SB42 und 50 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB54 Rahmen gerade und SB50 und 58 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
11		Lagersegment Größe 3 SB34 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB40 und 48 Rahmen gerade und SB44 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB56 Rahmen gerade und SB52 und 60 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
11		Lagersegment Größe 4 SB36 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB42 und 50 Rahmen gerade und SB46 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB50 und 58-62 Rahmen gerade und SB54 und 62 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
12		Lager 25 mm	1	St.
13		Kappe	1	St.
14		Senkschraube DIN 7991, selbstsichernd, M5x14, A2	2	St.
15		Rastklipp	1	St.
16		Passkerbstift ISO 8745, schwarz	1	St.
17		Abdeckung für Lagersegment Größe 2	1	St.
17		Abdeckung für Lagersegment Größe 3 und 4	1	St.
18		Senkschraube DIN 7991, A2	2	St.
	481B45=RW069	Montagezubehör für Fußbrettbügel rechts für Modell T und Teen2 (Pos. 20, 21, 23-28) Kröpfung: Sitzbreite:	1	St.
	481B45=RW119	Montagezubehör für Fußbrettbügel rechts für Modell VR, Teen2 VR und XXL2 (Pos. 23-28) Kröpfung: Sitzbreite:	1	St.
20		Rosette	1	St.
21		Zylinderschraube DIN 6912, selbstsichernd, M6x20, A2	1	St.
23		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x16, A2	1	St.
24		Auflagersegment Größe 1 SB26-36 Rahmen gerade und SB22-30 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB32-36 und 44 Rahmen gerade und SB32-40 und 48 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB52 Rahmen gerade und SB56 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
24		Auflagersegment Größe 2 SB32 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB38 und 46 Rahmen gerade und SB42 und 50 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB54 Rahmen gerade und SB50 und 58 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
24		Auflagersegment Größe 3 SB34 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB40 und 48 Rahmen gerade und SB44 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB56 Rahmen gerade und SB52 und 60 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
24		Auflagersegment Größe 4 SB36 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB42 und 50 Rahmen gerade und SB46 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB50 und 58-62 Rahmen gerade und SB54 und 62 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
25		Kappe	1	St.
26		Auflager 25 mm	1	St.
27		Senkschraube DIN 7991, A2	2	St.
28		Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	2	St.

* Rahmenfarbe:

** Maße für Fußbrettbügel s. Seite 13

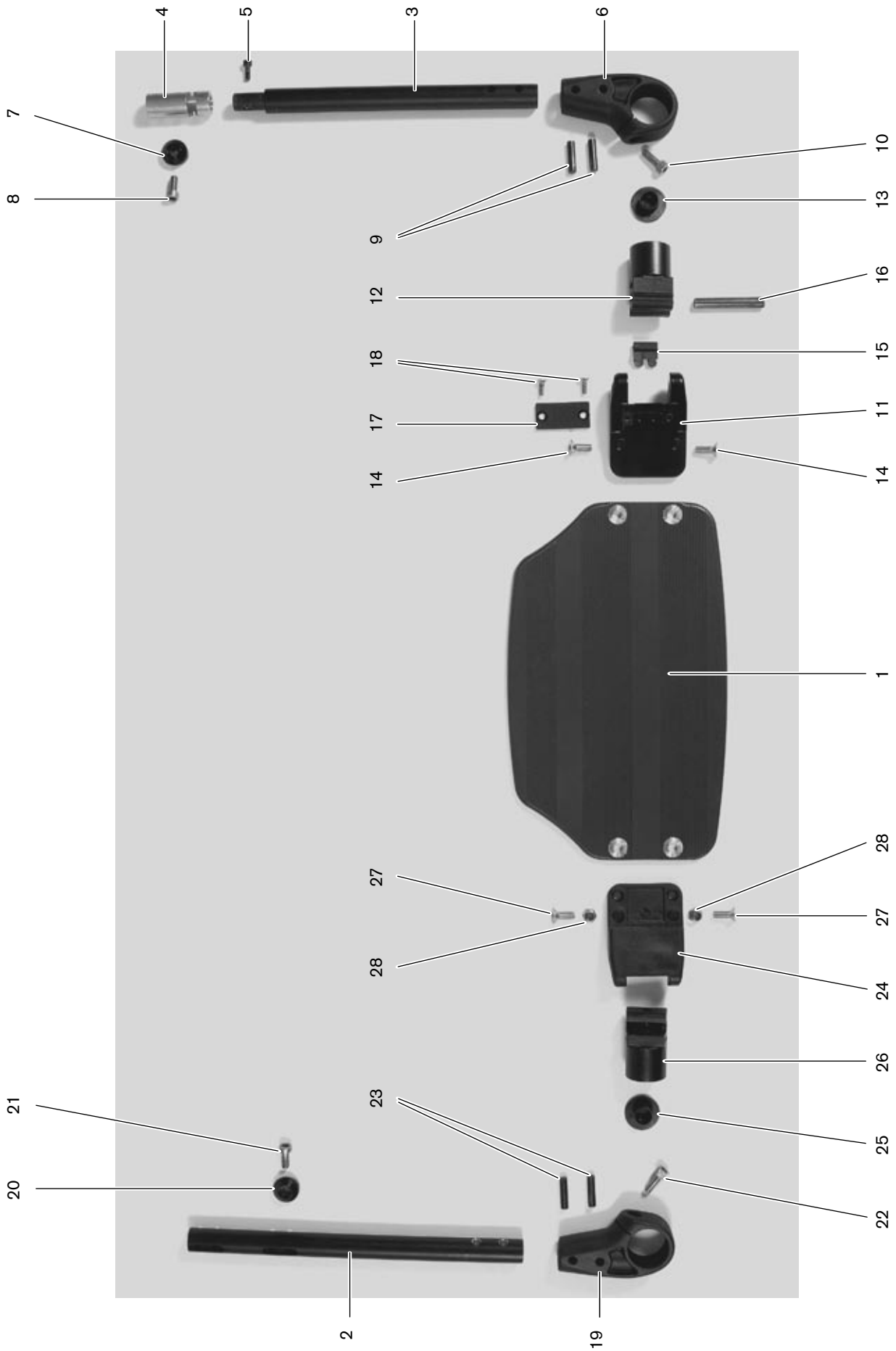

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=SK080	Fußraste Modell T, Teen2 durchgehend winkelverstellbar 16 cm tief (Pos. 1-28) Kröpfung: Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
	481B45=SK185	Fußraste Modell VR, Teen2 VR, XXL2 durchgehend winkelverstellbar 16 cm tief (Pos. 1, 6-28) Kröpfung: Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481B45=SB053	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet* SB26 Rahmen gerade Modell Teen2		
1	481B45=SB032	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet* SB22 Rahmen abduziert und SB28 Rahmen gerade Modell Teen2 SB32 Rahmen gekröpft Modell T und VR		
1	481B45=SB033	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet* SB24 Rahmen abduziert und SB30 Rahmen gerade Modell Teen2 SB34 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=SB034	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet* SB26 Rahmen abduziert und SB32 Rahmen gerade Modell Teen2 SB32 Rahmen gerade und SB36 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=SB035	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet* SB28 Rahmen abduziert und SB34 Rahmen gerade Modell Teen2 SB34 Rahmen gerade und SB38 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=SB036	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet* SB30-36 Rahmen abduziert und SB36 Rahmen gerade Modell Teen2 SB36-42 Rahmen gerade und SB40-46 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=SB037	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet* SB44-50 Rahmen gerade und SB48-50 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB50 Rahmen gerade und SB48-54 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
1	481B45=SB127	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet * SB52-58 Rahmen gerade und SB56-62 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St
1	481B45=SB128	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet * SB60 Rahmen gerade Modell XXL2	1	St
1	481B45=SB129	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet * SB62 Rahmen gerade Modell XXL2	1	St
		<u>Fußbrettbügel für Modell T und Teen2</u>		
	481B45=SK057	Fußbrettbügel standard kurz (Einzelteile s. Seite 58, 59 Pos. 2, 19, 23)**	1	St.
	481B45=SK058	Fußbrettbügel standard mittel (Einzelteile s. Seite 58, 59 Pos. 2, 19, 23)**	1	St.
	481B45=SK059	Fußbrettbügel standard lang (Einzelteile s. Seite 58, 59 Pos. 2, 19, 23)**	1	St.
	481B45=LK056	Fußbrettbügel abschwenkbar kurz, kpl. (Einzelteile s. Seite 58-60 Pos. 3-6, 9)**	1	St.
	481B45=LK055	Fußbrettbügel abschwenkbar mittel, kpl. (Einzelteile s. Seite 58-60 Pos. 3-6, 9)**	1	St.
	481B45=LK049	Fußbrettbügel abschwenkbar lang, kpl. (Einzelteile s. Seite 58-60 Pos. 3-6, 9)**	1	St.


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
		Fußbrettbügel für Modell VR, Teen2 VR und XXL2		
	481B45=SK231	Fußbrettbügel standard 175 mm, kpl. (Einzelteile s. Seite 58, 60 Pos. 19, 23)**	2	St
	481B45=SK232	Fußbrettbügel standard 225 mm, kpl. (Einzelteile s. Seite 58, 60 Pos. 19, 23)**	2	St
	481B45=SK124	Fußbrettbügel standard 275 mm, kpl. (Einzelteile s. Seite 58, 60 Pos. 19, 23)**	2	St
	481B45=SK125	Fußbrettbügel standard 325 mm, kpl. (Einzelteile s. Seite 58, 60 Pos. 19, 23)**	2	St
	481B45=SK126	Fußbrettbügel standard 375 mm, kpl. (Einzelteile s. Seite 58, 60 Pos. 19, 23)**	2	St
	481B45=LW068	Montagezubehör für Fußbrettbügel links für Modell T und Teen2 (Einzelteile s. Seite 58, 60, 61 Pos. 7, 8, 10-18) Kröpfung: Sitzbreite:	1	St.
	481B45=LW118	Montagezubehör für Fußbrettbügel links für Modell VR, Teen2 VR und XXL2 (Einzelteile s. Seite 58, 60, 61 Pos. 10-18) Kröpfung: Sitzbreite:	1	St.
	481B45=RW069	Montagezubehör für Fußbrettbügel rechts Modell T und Teen2 (Einzelteile s. Seite 58, 61 Pos. 20, 21, 23-28) Kröpfung: Sitzbreite:	1	St.
	481B45=RW119	Montagezubehör für Fußbrettbügel rechts für Modell VR, Teen2 VR und XXL2 (Einzelteile s. Seite 58, 61 Pos. 23-28) Kröpfung: Sitzbreite:	1	St.

* Rahmenfarbe:


** Maße für Fußbrettbügel s. Seite 13

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=SK063	Verriegelung für durchgehendes Fußbrett Modell T, VR, Teen2 und XXL2 (Pos. 1-7)	1	St.
1	481B45=ST013	Aufnahme für Fußbrettverriegelung	1	St.
2	481B45=ST014	Bolzen für Fußbrettverriegelung	1	St.
3	513D52=6	Druckfeder	1	St.
4	501S37=7	Senkschraube DIN 7991, selbstsichernd, M3x8, verzinkt	1	St.
5	481B45=ST015	Griff für Fußbrettverriegelung	1	St.
o. B.	636W55	Delo-Duopox 1895	0,01	Pkg.
6	HR10910055	Schlüsselring vernickelt SP30x2	1	St.
7	481B45=ST009	Auflager 25 mm	1	St.

Hinweis: Nur in Verbindung mit Fußraste durchgehend 16 cm und 12,5 cm tief.

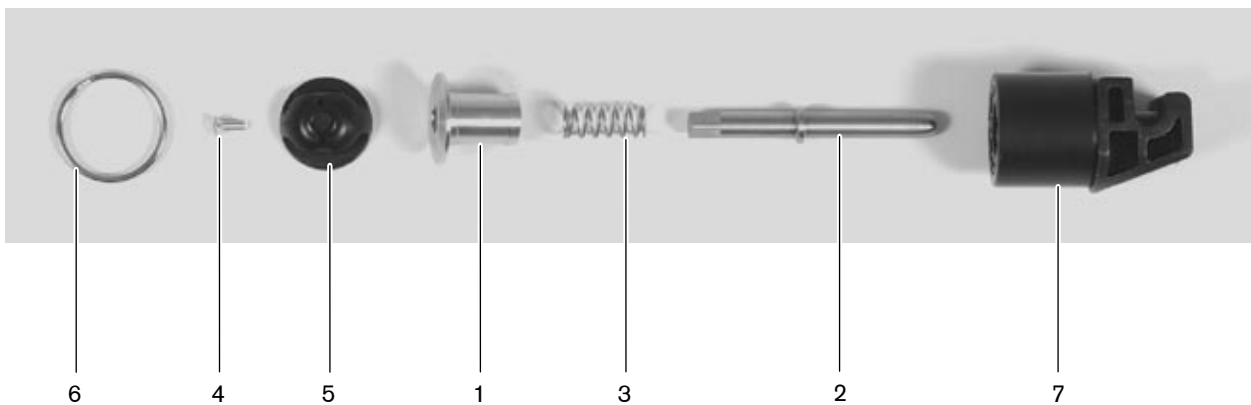

B

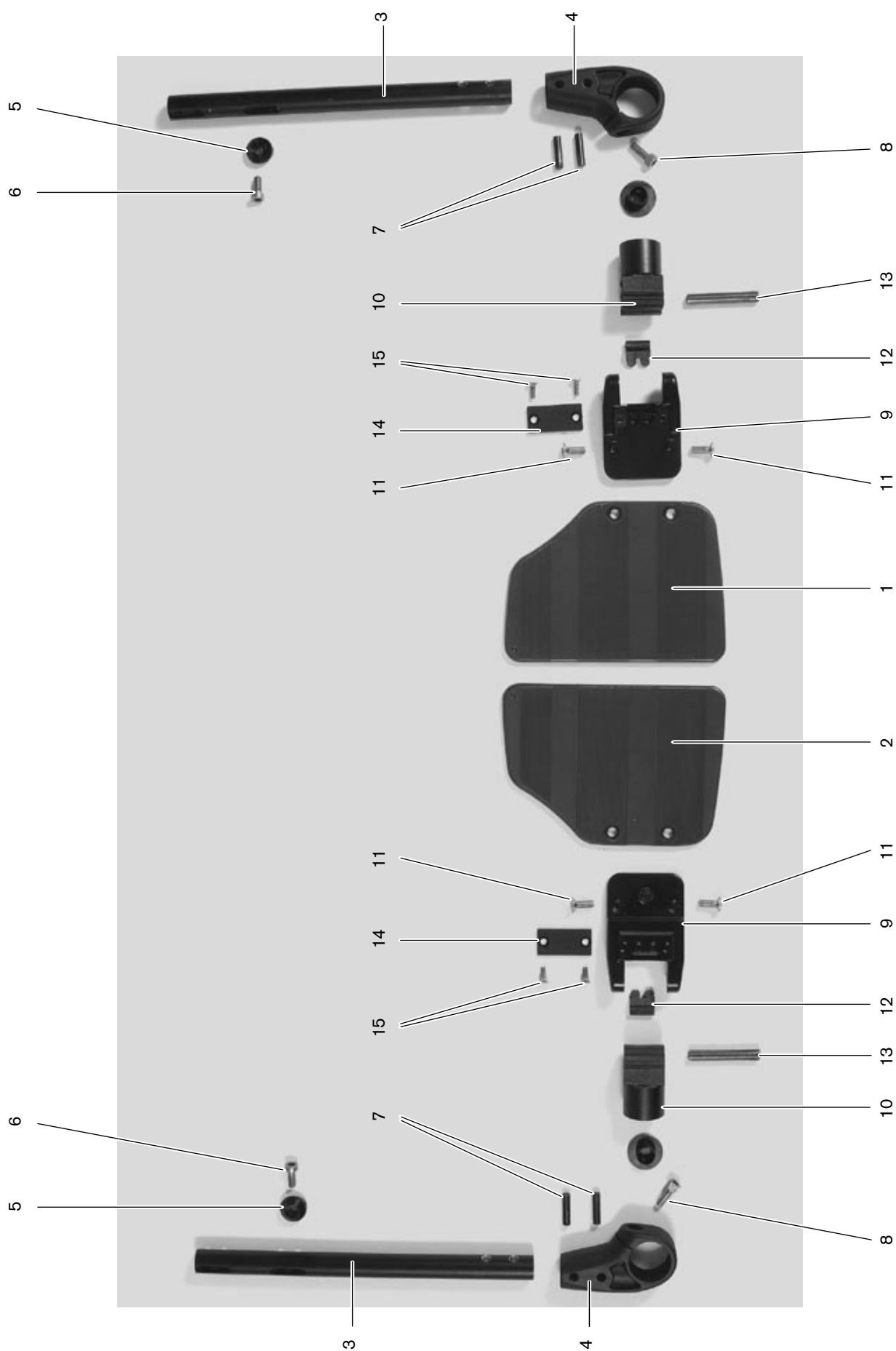


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=PK085	Fußraste Modell T und Teen2 geteilt winkelverstellbar 16 cm tief Kröpfung: Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	Paar
	481B45=PK190	Fußraste Modell VR, Teen2 VR und XXL2 geteilt winkelverstellbar 16 cm tief Kröpfung: Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	Paar
	481B45=LK085	Fußraste Modell T und Teen2 geteilt winkelverstellbar 16 cm tief, links (Pos. 1-15) Kröpfung: Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
	481B45=LK190	Fußraste Modell VR, Teen2 VR und XXL2 geteilt winkelverstellbar 16 cm tief, links (Pos. 1, 2, 4, 7-15) Kröpfung: Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
	481B45=RK085	Fußraste Modell T und Teen2 geteilt winkelverstellbar 16 cm tief, rechts Kröpfung: Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
	481B45=RK190	Fußraste Modell VR, Teen2 VR und XXL2 geteilt winkelverstellbar 16 cm tief, rechts Kröpfung: Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481B45=LB054	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB26 Rahmen gerade Modell Teen2	1	St.
1	481B45=LB038	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB22 Rahmen abduziert und SB28 Rahmen gerade Modell Teen2 SB32 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=LB039	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB24 Rahmen abduziert und SB30 Rahmen gerade Modell Teen2 SB34 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=LB040	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB26 Rahmen abduziert und SB32 Rahmen gerade Modell Teen2 SB32 Rahmen gerade und SB36 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=LB041	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB28 Rahmen abduziert und SB34 Rahmen gerade Modell Teen2 SB34 Rahmen gerade und SB38 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
1	481B45=LB042	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB30-34 Rahmen abduziert und SB36 Rahmen gerade Modell Teen2 SB36-40 Rahmen gerade und SB40-44 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481B45=LB043	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB36 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB42-46 Rahmen gerade und SB46-50 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB50 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
1	481B45=LB044	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB48-50 Rahmen gerade Modell T und VR SB50-52 Rahmen gerade und SB52-56 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
1	481B45=LB173	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB54-58 Rahmen gerade und SB58-62 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
1	481B45=LB174	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB60-62 Rahmen gerade Modell XXL2	1	St.
2	481B45=RB054	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB26 Rahmen gerade Modell Teen2	1	St.
2	481B45=RB038	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB22 Rahmen abduziert und SB28 Rahmen gerade Modell Teen2 SB32 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
2	481B45=RB039	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB24 Rahmen abduziert SB30 Rahmen gerade Modell Teen2 SB34 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
2	481B45=RB040	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB26 Rahmen abduziert und SB32 Rahmen gerade Modell Teen2 SB32 Rahmen gerade und SB36 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
2	481B45=RB041	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB28 Rahmen abduziert und SB34 Rahmen gerade Modell Teen2 SB34 Rahmen gerade und SB38 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
2	481B45=RB042	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB30-34 Rahmen abduziert und SB36 Rahmen gerade Modell Teen2 SB36-40 Rahmen gerade und SB40-44 Rahmen gekröpft Modell T und VR	1	St.
2	481B45=RB043	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB36 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB42-46 Rahmen gerade und SB46-50 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB50 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
2	481B45=RB044	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB48-50 Rahmen gerade Modell T und VR SB50-52 Rahmen gerade und SB52-56 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
2	481B45=RB173	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB54-58 Rahmen gerade und SB58-62 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
2	481B45=RB174	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB60-62 Rahmen gerade Modell XXL2	1	St.
		<u>Fußbrettbügel für Modell T und Teen2</u>		
	481B45=SK057	Fußbrettbügel standard kurz ** (Pos. 3, 4, 7, Einzelteile s. Seite 58, 59 Pos. 2, 19, 23)	2	St
	481B45=SK058	Fußbrettbügel standard mittel ** (Pos. 3, 4, 7, Einzelteile s. Seite 58, 59 Pos. 2, 19, 23)	2	St
	481B45=SK059	Fußbrettbügel standard lang ** (Pos. 3, 4, 7, Einzelteile s. Seite 58, 59 Pos. 2, 19, 23)	2	St
		<u>Fußbrettbügel für Modell VR, Teen2 VR und XXL2</u>		
	481B45=SK231	Fußbrettbügel standard 175 mm, kpl. ** (Pos. 4, 7, Einzelteile s. Seite 58, 60 Pos. 19, 23)	1	St

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=SK232	Fußbrettbügel standard 225 mm, kpl.** (Pos. 4, 7, Einzelteile s. Seite 58, 60 Pos. 19, 23)	1	St
	481B45=SK124	Fußbrettbügel standard 275 mm, kpl. ** (Pos. 4, 7, Einzelteile s. Seite 58, 60 Pos. 19, 23)	1	St
	481B45=SK125	Fußbrettbügel standard 325 mm, kpl.** (Pos. 4, 7, Einzelteile s. Seite 58, 60 Pos. 19, 23)	1	St
	481B45=SK126	Fußbrettbügel standard 375 mm, kpl. ** (Pos. 4, 7, Einzelteile s. Seite 58, 60 Pos. 19, 23)	1	St
	481B45=SW074	Montagezubehör für Fußbrettbügel für Fußraste geteilt Modell T und Teen2 (Pos. 5, 6, 8-15) Kröpfung: Sitzbreite:	2	St.
	481B45=SW176	Montagezubehör für Fußbrettbügel für Fußraste geteilt Modell VR, Teen2 VR und XXL2 (Pos. 8-15) Kröpfung: Sitzbreite:	2	St.
5		Rosette	1	St.
6		Zylinderschraube DIN 6912, selbstsichernd, M6x20, A2	1	St.
8		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x16, A2	1	St.
9		Lagersegment Größe 1 SB26-36 Rahmen gerade und SB22-30 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB32-36 und 44 Rahmen gerade und SB32-40 und 48 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB52 Rahmen gerade und SB56 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
9		Lagersegment Größe 2 SB32 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB38 und 46 Rahmen gerade und SB42 und 50 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB54 Rahmen gerade und SB50 und 58 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
9		Lagersegment Größe 3 SB34 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB40 und 48 Rahmen gerade und SB44 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB56 Rahmen gerade und SB52 und 60 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
9		Lagersegment Größe 4 SB36 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB42 und 50 Rahmen gerade und SB46 Rahmen gekröpft Modell T und VR SB50 und 58-62 Rahmen gerade und SB54 und 62 Rahmen gekröpft Modell XXL2	1	St.
10		Lagerung für geteilte Fußraste	1	St.
11		Senkschraube DIN 7991, selbstsichernd, M6x16, A2	2	St.
12		Rastklipp	1	St.
13		Passkerbstift ISO 8745, schwarz	2	St.
14		Abdeckung für Lagersegment Größe 2	1	St.
14		Abdeckung für Lagersegment Größe 3 und 4	1	St.
15		Senkschraube DIN 7991, A2	2	St.
o. B.		Kunststoff-Distanzscheibe	2	St.

* Rahmenfarbe:

** Maße für Fußbrettbügel s. Seite 13

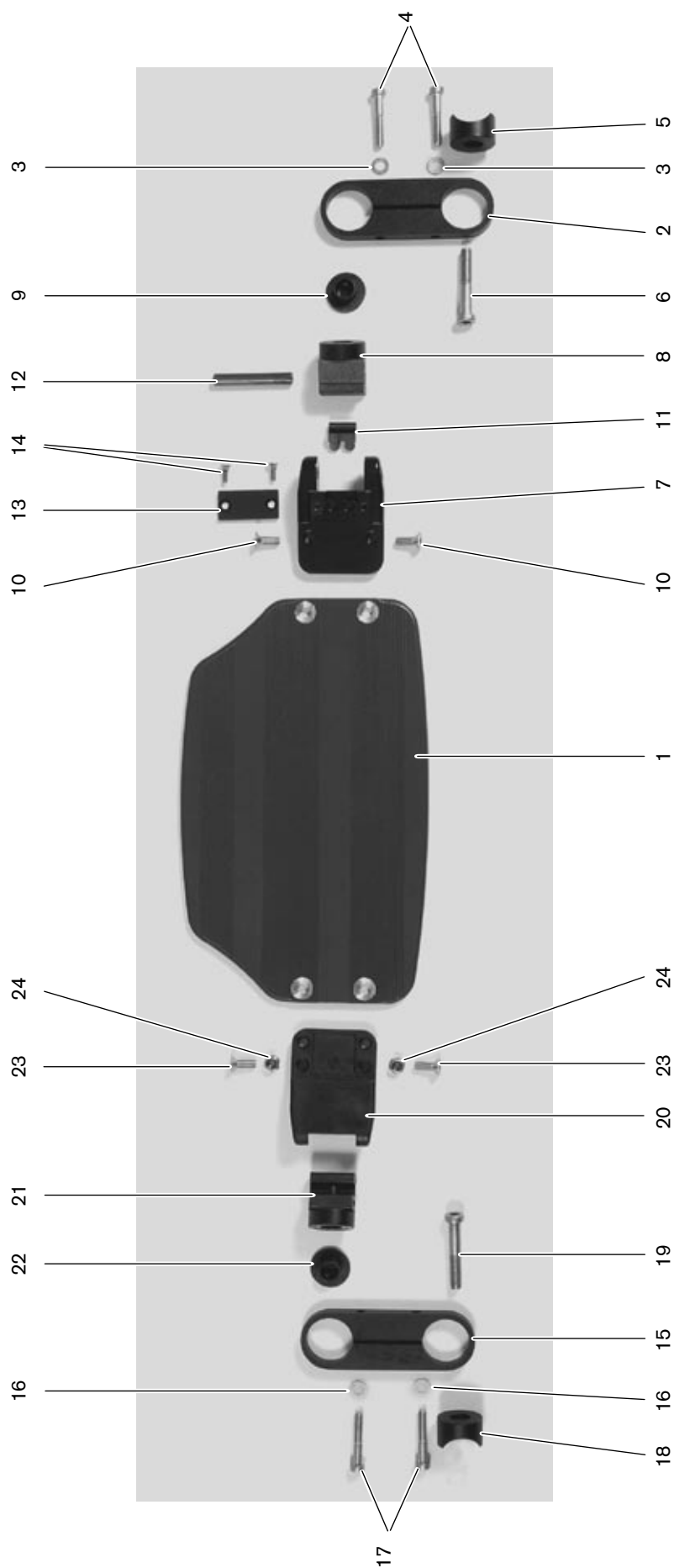


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=SK090	Fußraste Modell T und Ti 8.9 VR, Teen2 durchgehend für kleine Unterschenkellängen von 16-31 cm (Pos. 1-24) Kröpfung: Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481B45=SB081	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet * SB26 Rahmen gerade Modell Teen2	1	St.
1	481B45=SB053	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet * SB22 Rahmen abduziert und SB28 Rahmen gerade Modell Teen2 SB32 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
1	481B45=SB032	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet* SB24 Rahmen abduziert und SB30 Rahmen gerade Modell Teen2 SB34 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
1	481B45=SB033	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet* SB26 Rahmen abduziert und SB32 Rahmen gerade Modell Teen2 SB32 Rahmen gerade und SB36 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
1	481B45=SB034	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet* SB22 Rahmen abduziert und SB32 Rahmen gerade Modell Teen2 SB34 Rahmen gerade und SB34 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
1	481B45=SB035	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet* SB30 Rahmen abduziert und SB36 Rahmen gerade Modell Teen2 SB36-42 Rahmen gerade und SB40-46 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
1	481B45=SB061	Fußbrett breit durchgehend, bunt beschichtet* SB32-36 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB44-50 Rahmen gerade und SB48-50 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
	481B45=LW093	Montagezubehör für Fußraste für kleine UL, links (Pos. 2-14) Kröpfung: Sitzbreite:	1	St.
2		Klemmung	1	St.
3		Passscheibe	2	St.
4		Zylinderschraube DIN 6912, A2	2	St.
5		Halbschale für Rahmen gerade	1	St.
5		Halbschale für Rahmen gekröpft	1	St.
6		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M8x40, A2	1	St.
6		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M8x45, A2, bei Rahmen gerade	1	St.
6		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M8x50, A2, bei Rahmen abduziert	1	St.
6		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M8x65, A2, bei Rahmen gekröpft	1	St.
7		Lagersegment Größe 1 SB26-36 Rahmen gerade und SB22 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB32-36 und 44 Rahmen gerade und SB32-40 und 48 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
7		Lagersegment Größe 2 SB32 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB38 und 46 Rahmen gerade und SB42 und 50 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
7		Lagersegment Größe 3 SB34 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB40 und 48 Rahmen gerade und SB44 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
7		Lagersegment Größe 4 SB36 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB42 und 50 Rahmen gerade und SB46 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
8		Lager 10 mm	1	St.
9		Kappe	1	St.
10		Senkschraube DIN 7991, selbstsichernd, M5x14, A2	2	St.
11		Rastklipp	1	St.
12		Passkerbstift ISO 8745, schwarz	2	St.
13		Abdeckung für Lagersegment Größe 1	1	St.
13		Abdeckung für Lagersegment Größe 3 und 4	1	St.
14		Senkschraube DIN 7991, A2	2	St.
	481B45=RW094	Montagezubehör für Fußraste für kleine UL, rechts (Pos. 15-24)	1	St.
		Kröpfung:		
		Sitzbreite:		
15		Klemmung	1	St.
16		Passscheibe	2	St.
17		Zylinderschraube DIN 6912, A2	2	St.
18		Halbschale für Rahmen gerade	1	St.
18		Halbschale für Rahmen gekröpft	1	St.
19		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M8x40, A2	1	St.
19		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M8x45, A2, bei Rahmen gerade	1	St.
19		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M8x50, A2, bei Rahmen abduziert	1	St.
19		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M8x65, A2, bei Rahmen gekröpft	1	St.
20		Auflagersegment Größe 1 SB26-36 Rahmen gerade und SB22-30 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB32-36 und 44 Rahmen gerade und SB32-40 und 48 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
20		Auflagersegment Größe 2 SB32 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB38 und 46 Rahmen gerade und SB42 und 50 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
20		Auflagersegment Größe 3 SB34 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB40 und 48 Rahmen gerade und SB44 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
20		Auflagersegment Größe 4 SB36 Rahmen abduziert Modell Teen2 SB42 und 50 Rahmen gerade und SB46 Rahmen gekröpft Modell T, Ti 8.9 und VR	1	St.
21		Auflager 25 mm	1	St.
22		Kappe	1	St.
23		Senkschraube DIN 7991, A2	2	St.
24		Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	2	St.


* Rahmenfarbe:

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=SK065	Fersenband für geteilte Fußraste (Pos. 1, 2) Kröpfung: Sitzbreite:	2	St.
1	481B45=ST016	Fersenbandhalter incl. Schraube	2	St.
2	481B45=ST067	Fersenband für Fußraste geteilt Kröpfung: Sitzbreite:	1	St.

Hinweis: Anbau erst möglich ab UL30.

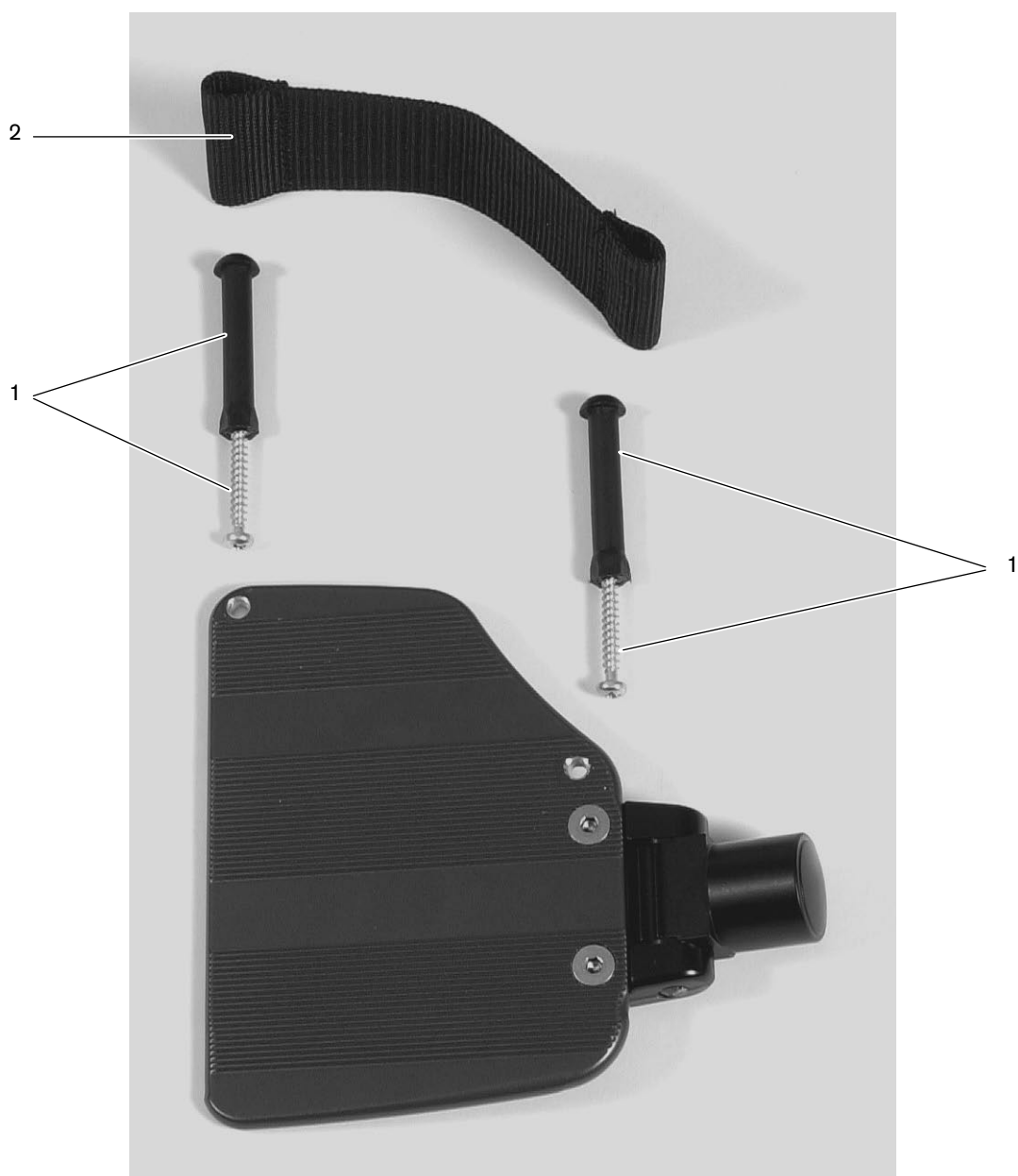


B

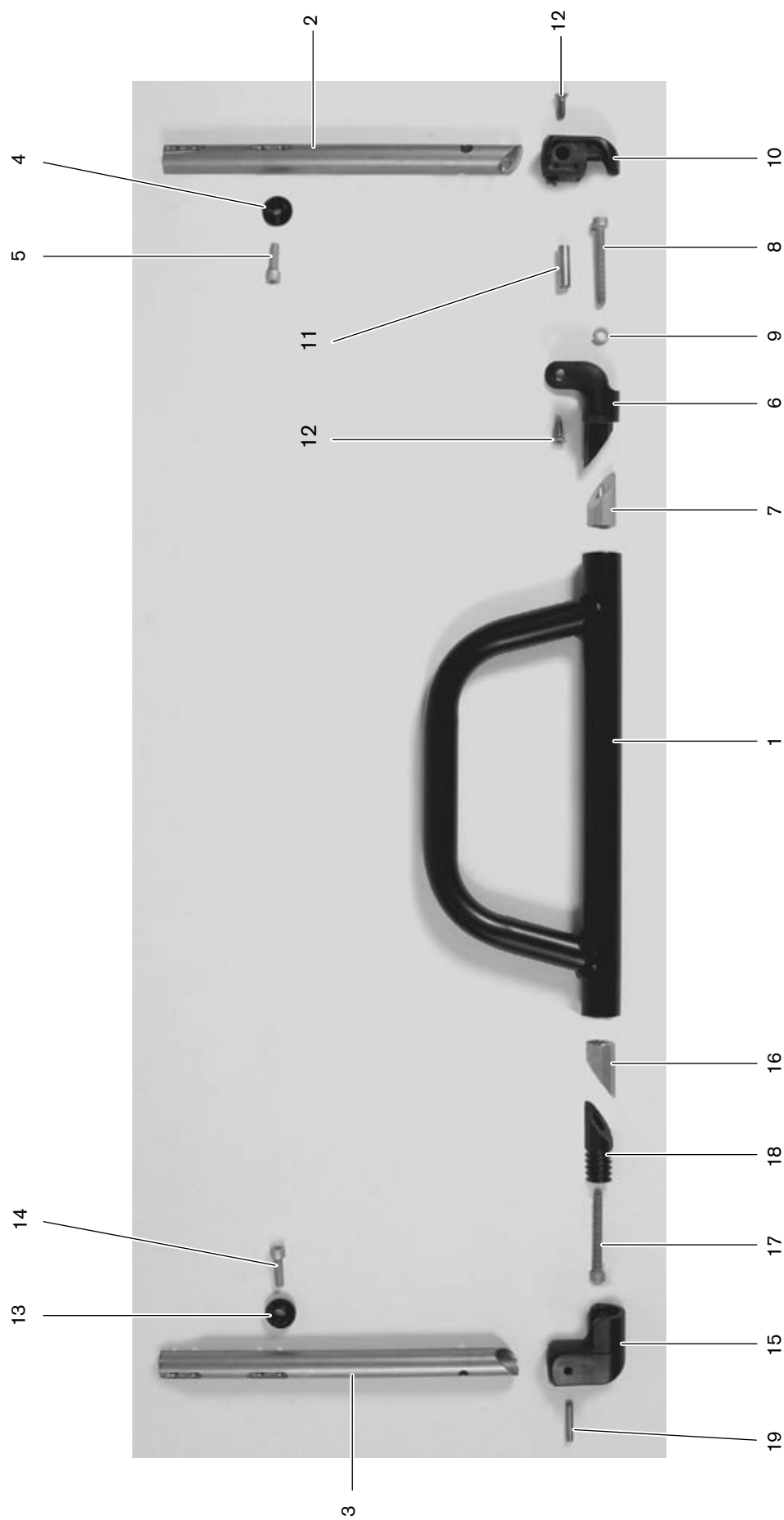

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=SK100	Fußraste Modell Ti 8.9 durchgehend winkelverstellbar 12.5 cm tief (Pos. 1-19) Kröpfung: Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
1	481B45=SE132	Fußauflage geschweißt, Modell Ti 8.9, schwarz SB34 Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=SE147	Fußauflage geschweißt, Modell Ti 8.9, schwarz SB32 Rahmen gerade und SB36 Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=SE148	Fußauflage geschweißt, Modell Ti 8.9, schwarz SB34 Rahmen gerade und SB38 Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=SE149	Fußauflage geschweißt, Modell Ti 8.9, schwarz SB36 Rahmen gerade und SB40 Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=SE097	Fußauflage geschweißt, Modell Ti 8.9, schwarz SB38 Rahmen gerade und SB42 Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=SE150	Fußauflage geschweißt, Modell Ti 8.9, schwarz SB40 Rahmen gerade und SB44 Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=SE151	Fußauflage geschweißt, Modell Ti 8.9, schwarz SB42 Rahmen gerade und SB46 Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=SE152	Fußauflage geschweißt, Modell Ti 8.9, schwarz SB44 Rahmen gerade und SB48 Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=SE153	Fußauflage geschweißt, Modell Ti 8.9, schwarz SB46 Rahmen gerade und SB50 Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=SE154	Fußauflage geschweißt, Modell Ti 8.9, schwarz SB48 Rahmen gerade	1	St.
1	481B45=SE155	Fußauflage geschweißt, Modell Ti 8.9, schwarz SB50 Rahmen gerade	1	St.
2	481B45=LV134	Fußbrettbügel links kurz, Modell Ti 8.9*	1	St.
2	481B45=LV115	Fußbrettbügel links mittel, Modell Ti 8.9*	1	St.
2	481B45=LV135	Fußbrettbügel links lang, Modell Ti 8.9*	1	St.
3	481B45=RV136	Fußbrettbügel links kurz, Modell Ti 8.9*	1	St.
3	481B45=RV104	Fußbrettbügel rechts mittel, Modell Ti 8.9*	1	St.
3	481B45=RV137	Fußbrettbügel rechts lang, Modell Ti 8.9*	1	St.
	481B45=LW083	Montagezubehör für Fußbrettbügel Modell Ti 8.9 li. (Pos. 4-12)	1	St.
4		Rosette	1	St.
5		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
6		Gabelteil, Modell Ti 8.9	1	St.
7		Klemmstück	1	St.
8		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
9		Federring DIN 127, Aluminium	1	St.
10		Abdeckung	1	St.
11		Gelenkbolzen	1	St.
12		Senkschraube DIN 7991, selbstsichernd, M5x14, A2	2	St.
	481B45=RW084	Montagezubehör für Fußbrettbügel Modell Ti 8.9 re. (Pos. 13-19)	1	St.
13		Rosette	1	St.
14		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
15		Gabelteil rechts	1	St.
16		Klemmstück	1	St.
17		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
18		Rastbolzen Modell Ti 8.9	1	St.
o. B.		Buchse	1	St.
19		Passkerbstift ISO 8745	1	St.


* Maße für Fußbrettbügel s. Seite 13


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=SK105	Fußplatte Kunststoff, Modell Ti 8.9 (Pos. 1-3) Kröpfung: Sitzbreite:	1	St.
1	481B45=ST140	Kunststoffauflage Fußbrett, Modell Ti 8.9 SB32-34 bei Rahmen gerade und SB34-38 bei Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=ST141	Kunststoffauflage Fußbrett, Modell Ti 8.9 SB36 bei Rahmen gerade und SB40 bei Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=ST095	Kunststoffauflage Fußbrett, Modell Ti 8.9 SB38 bei Rahmen gerade und SB42 bei Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=ST142	Kunststoffauflage Fußbrett, Modell Ti 8.9 SB40 bei Rahmen gerade und SB44 bei Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=ST116	Kunststoffauflage Fußbrett, Modell Ti 8.9 SB42 bei Rahmen gerade und SB46 bei Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=ST101	Kunststoffauflage Fußbrett, Modell Ti 8.9 SB44 bei Rahmen gerade und SB48 bei Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=ST143	Kunststoffauflage Fußbrett, Modell Ti 8.9 SB46 bei Rahmen gerade und SB50 bei Rahmen gekröpft	1	St.
1	481B45=ST144	Kunststoffauflage Fußbrett, Modell Ti 8.9 SB48 bei Rahmen gerade	1	St.
1	481B45=ST115	Kunststoffauflage Fußbrett, Modell Ti 8.9 SB50 bei Rahmen gerade	1	St.
2	481B45=ST045	Antirutschplatte für SB32-42 bei Rahmen gerade und SB34-46 bei Rahmen gekröpft	4	St.
		für SB44-50 bei Rahmen gerade und SB48-50 bei Rahmen gekröpft	5	St.
3	504F14=3.2x12	Dichtblindniet	4	St.

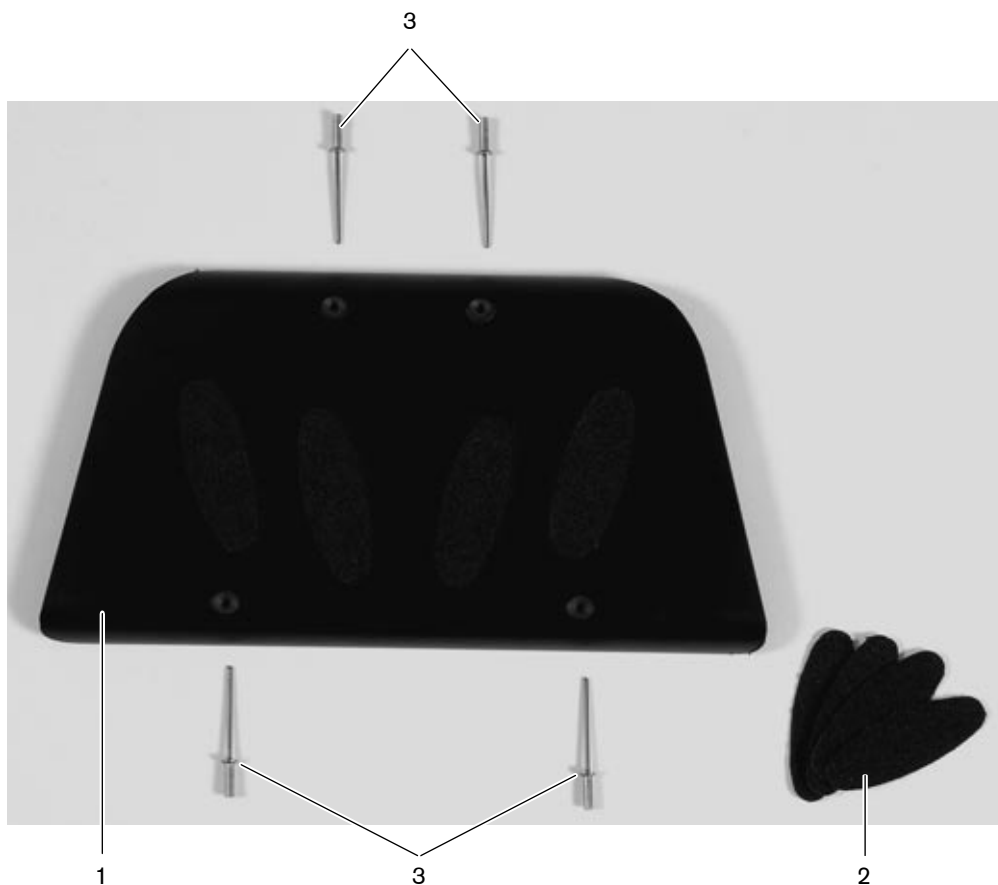

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=SK110	Seitliche Arretierung (Pos. 1, 2)	2	St.
1	481B45=ST113	Seitliche Arretierung	1	St.
2	504F11=5X12	Blindniet mit Sollbruchdorn DIN 7337	1	St.

Hinweis: Nur in Verbindung mit Fußraste 16 cm tief.

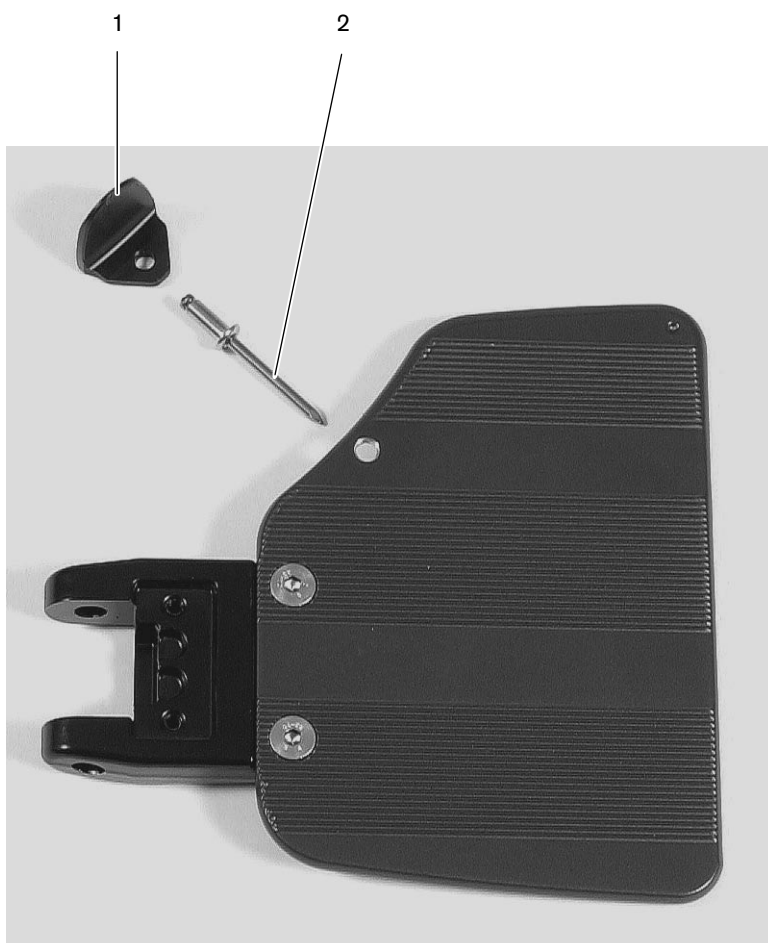

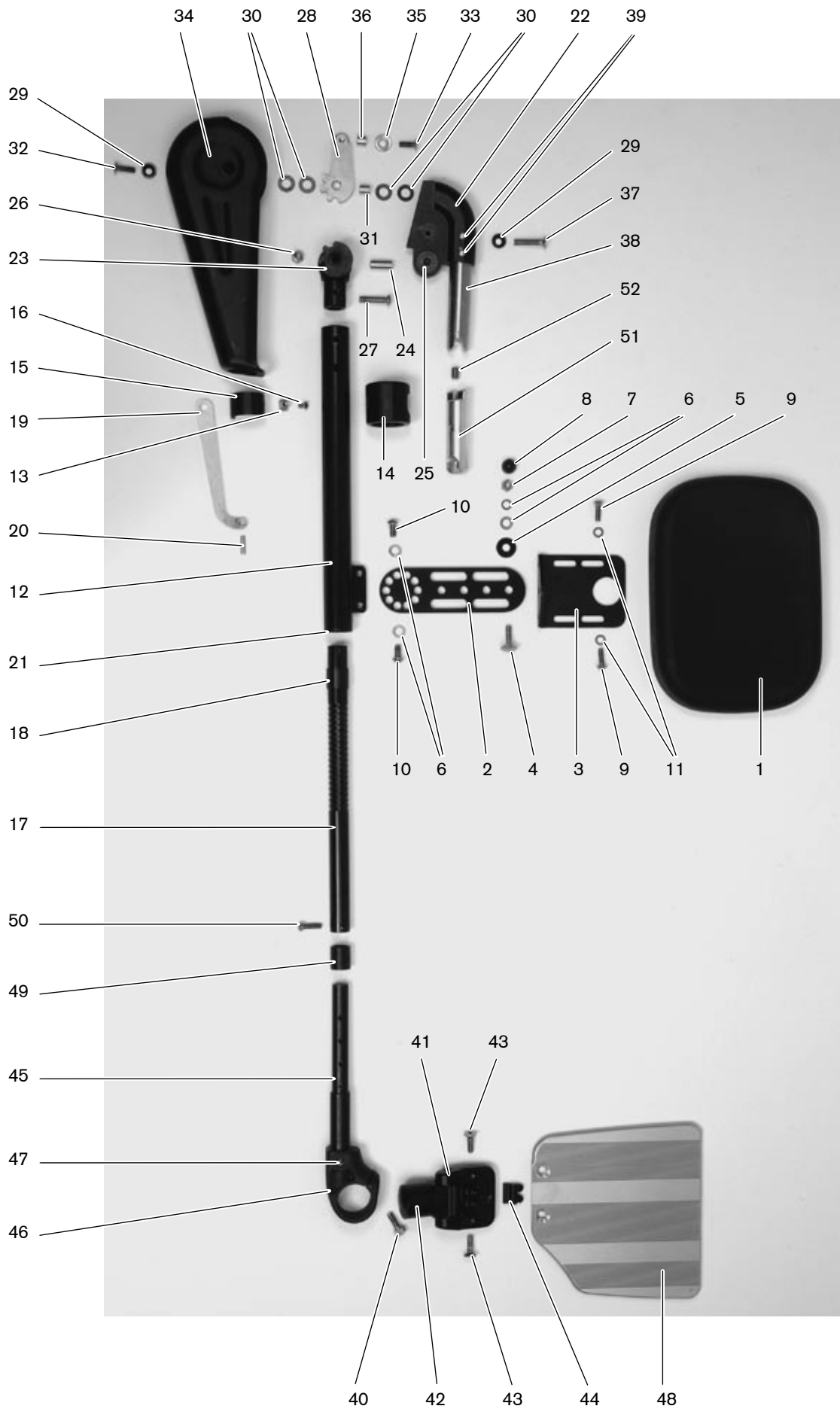

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=PK195	Fußraste hochschwenkbar mit automatischem Längenausgleich Modell VR, kpl. Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	Paar
	481B45=LK195	Fußraste hochschwenkbar mit automatischem Längenausgleich Modell VR, links, kpl. (Pos. 1-52) Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
	481B45=RK195	Fußraste hochschwenkbar mit automatischem Längenausgleich Modell VR, rechts, kpl. Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
	481B08=SK107	Wadenpolster kpl. (Pos. 1-11) Sitzbreite:	1	St.
1	481B08=ST109	Wadenpolster 150x125 mm	1	St.
1	481B08=ST151	Wadenpolster 220x155 mm (ab SB40 möglich)	1	St.
2	481B08=SE127	Winkelverstellung	1	St.
3	481B08=SZ128	Wadenhalteplatte	1	St.
4	501Z20=M6x20	Flachrundschrabe mit Vierkantansatz, A2	1	St.
5	481B08=ST136	Scheibe Durchmesser 18x1	1	St.
6	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	4	St.
7	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
8	481G00=ST006	Sechskantschutzkappe für M6	1	St.
9	501S92=10	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M5x16, A2	2	St.
10	501S92=6	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x12, A2	2	St.
11	507U27=5.3	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
	481B08=LV214	Schwenkrohr vormontiert, links (Pos. 12-39)*	1	St.
	481B08=RV214	Schwenkrohr vormontiert, rechts*	1	St.
12	481B08=LB137	Schwenkrohr beschichtet, links*	1	St.
o. B.	481B08=RB137	Schwenkrohr beschichtet, rechts*	1	St.
13	481B08=ST125	Keil	1	St.
14	481B08=ST121	Federhalter	1	St.
15	481B08=ST122	Feder	1	St.
16	501S89=M4x6	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
17	481B08=ST132	Rastbügel gefräst	1	St.
18	481B08=ST123	Gleitbuchse	1	St.
19	481B08=SR119	Lasche	1	St.
20	506A23=4x16	Spannstift ISO 8752	1	St.
21	481B08=ST030	Buchse für Fußbrettbügel	1	St.
22	481B08=SE206	Halteplatte	1	St.
23	481B08=SE117	Gelenkgabel	1	St.
24	481A02=SR009	Gelenkhülse	1	St.
o. B.	509G1=10x1x10	DU-Buchse	1	St.
25	509G6=10x20x1.5	Anlaufscheibe	2	St.
o. B.	501S84=M6x30	Senkschraube DIN 7991, A2	1	St.
26	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
27	501S92=2	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x25, A2	1	St.
28	481B08=SR118	Zahnlache	1	St.
29	481B08=SE153	Scheibe	2	St.
30	471H00=ST017	Gleitscheibe	4	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
31	481B08=ST154	Distanzbuchse	1	St.
32	501S84=M5x12	Senkschraube DIN 7991, A2	1	St.
33	501S84=M5x16	Senkschraube DIN 7991, A2	1	St.
o. B.	481B08=ST155	Aufkleber „Press“	1	St.
34	481B08=ST152	Abdeckung	1	St.
35	481B08=SR124	Scheibe	1	St.
36	481B08=ST131	Distanz 9 mm	1	St.
37	501S87=15	Senkschraube DIN 7991, selbstsichernd, M5x20, A2	1	St.
38	481B08=ST205	Drehlager	1	St.
39	506A20=6x26	Zylinderkerbstift DIN 1473	2	St.
	481B45=SW199	Montagezubehör für Fußbrettbügel für Fußraste hochschwenkbar (Pos. 40-44)	1	St.
		Sitzbreite:		
40		Zylinderkopfschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x16, A2	1	St.
41		Lagersegment Größe 1 für SB32-36 und 44 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
41		Lagersegment Größe 2 für SB38 und 46 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
41		Lagersegment Größe 3 für SB40 und 48 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
41		Lagersegment Größe 4 für SB42 und 50 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
42		Lagerung für geteilte Fußraste	1	St.
43		Senkschraube DIN 7991, selbstsichernd, M6x16, A2	2	St.
44		Rastklipp	1	St.
o. B.		Passkerbstift ISO 8745, schwarz	1	St.
o. B.		Abdeckung für Lagersegment Größe 1	1	St.
o. B.		Abdeckung für Lagersegment Größe 3 und 4	1	St.
o. B.		Senkschraube DIN 7991, A2	2	St.
o. B.		Kunststoff-Distanzscheibe	2	St.
	481B45=SK196	Fußbrettbügel kurz, kpl. (Pos. 45-47)**	1	St.
	481B45=SK197	Fußbrettbügel mittel, kpl. (Pos. 45-47)**	1	St.
	481B45=SK198	Fußbrettbügel lang, kpl. (Pos. 45-47)**	1	St.
45	481B45=SE196	Fußbrettbügel kurz, kpl.**	1	St.
45	481B45=SE197	Fußbrettbügel mittel, kpl.**	1	St.
45	481B45=SE198	Fußbrettbügel lang, kpl.**	1	St.
46	481B45=SE048	Aufnahme	1	St.
47	506A28=6x25	Passkerbstift ISO 8745, schwarz	1	St.
o. B.	636W63	Delomet 01 rapid	0,01	Pkg.
48	481B45=LB040	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB32 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
48	481B45=LB041	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB34 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
48	481B45=LB042	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB36-40 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
48	481B45=LB043	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB42-46 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
48	481B45=LB044	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB48-50 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
o. B.	481B45=RB040	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB32 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
o. B.	481B45=RB041	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB34 Rahmen gerade Modell VR	1	St.


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
o. B.	481B45=RB042	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB36-40 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
o. B.	481B45=RB043	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB42-46 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
o. B.	481B45=RB044	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB48-50 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
48	481B08=ST129	Hülse	3	St.
50	501S92=9	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M5x18, A2	1	St.
51	481B08=SZ230	Klemmbolzen	1	St.
52	506G21=M8x10	Gewindestift DIN 913, A2	1	St.
o. B.	636W63	Delomet 01 rapid	0,01	Pkg.

* Rahmenfarbe:

** Maße für Fußbrettbügel s. Seite 13

Hinweis: Anbau der Fußraste hochschwenkbar nur in Verbindung mit Rahmen gerade und Kniehebelbremse 481H05=PK001 möglich!

B

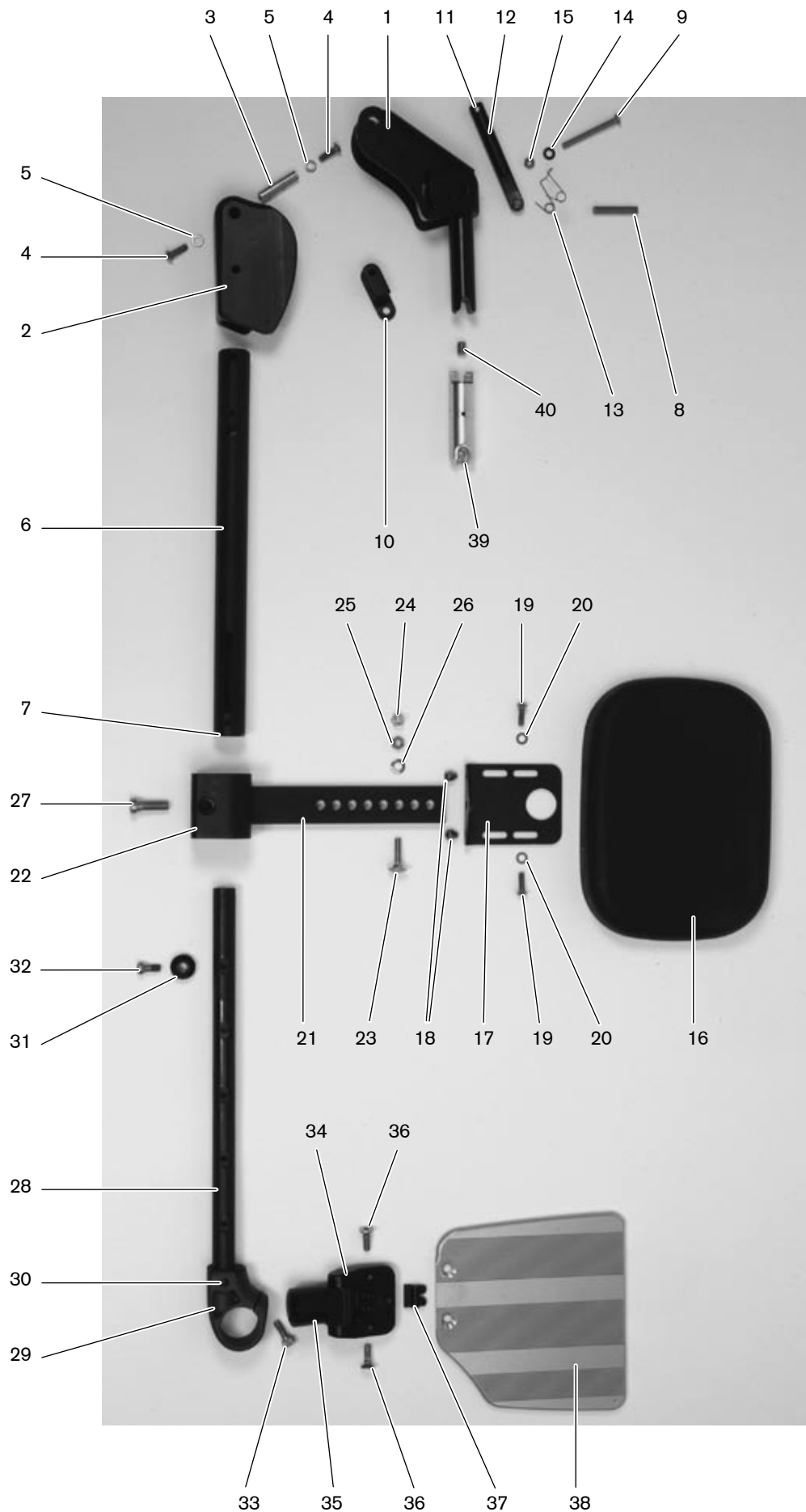

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=PK200	Fußraste hochschwenkbar Modell VR, kpl. Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	Paar
	481B45=LK200	Fußraste hochschwenkbar Modell VR, kpl., links (Pos. 1-40) Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
	481B45=RK200	Fußraste hochschwenkbar Modell VR, kpl., rechts Sitzbreite: Unterschenkellänge: Rahmenfarbe:	1	St.
	481B08=LV240	Fußrastenhalter links, vormontiert (Pos. 1-15)	1	St.
	481B08=RV240	Fußrastenhalter rechts, vormontiert	1	St.
1	481B08=SS233	Fußrastenaufnahme	1	St.
2	481B08=LT235	Rastsegment links	1	St.
o. B.	481B08=RT235	Rastsegment rechts	1	St.
3	481B08=ST248	Gewindehülse	1	St.
4	501S92=10	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M5x16, A2	2	St.
5	507U27=5.3	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
6	481B08=SE244	Fußbrettbügelaufnahme für HSF	1	St.
7	481B08=ST030	Buchse für Fußbrettbügel	1	St.
8	506A22=6x38	Passkerbstift ISO 8745, A2	1	St.
9	501S89=M5x50	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
10	481B08=ST255	Arretierhebel für HSF	1	St.
11	481B08=SE241	Rastbolzen	1	St.
12	506A22=4x14	Passkerbstift ISO 8745, A2	1	St.
13	513S9=1	Schenkelfeder	1	St.
14	507U57=6	Kunststoff-Distanzscheibe	1	St.
15	502S27=M5	Sechskantmutter DIN 934, A2	1	St.
	481B08=SK251	Wadenpolster kpl. (Pos. 16-27) Sitzbreite:	1	St.
16	481B08=ST109	Wadenpolster 150x125 mm	1	St.
16	481B08=ST151	Wadenpolster 220x155 mm (ab SB40 möglich)	1	St.
17	481B08=SZ128	Wadenhalteplatte	1	St.
18	501T38=10	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x5, A2	2	St.
19	501S92=10	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M5x16, A2	2	St.
20	507U34=5.3	Scheibe DIN 9021, A2	1	St.
21	481B08=SE237	Schwenkbügel	1	St.
22	481B08=SE236	Schwenkeinheit	1	St.
23	501Z20=M6x25	Flachrundschrabe mit Vierkantansatz, A2	1	St.
24	502K5=M6	Hutmutter DIN 986, verzinkt	1	St.
25	502S27=M6	Sechskantmutter DIN 934, A2	1	St.
o. B.	481B08=ST136	Scheibe Durchmesser 18x1	1	St.
26	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	1	St.
27	501T39=M8x25	Zylinderschraube DIN 912, A2	1	St.
o. B.	506A22=5x50	Passkerbstift ISO 8745	1	St.
o. B.	507U39=5.3	Kunststoff-Scheibe ähnlich DIN 125	2	St.
	481B45=SK201	Fußbrettbügel für HSF, kpl. (Pos. 28-30)**	1	St.
	481B45=SK202	Fußbrettbügel für HSF, kpl. (Pos. 28-30)**	1	St.
28	481B45=SE201	Fußbrettbügel für HSF**	1	St.
28	481B45=SE202	Fußbrettbügel für HSF**	1	St.
29	481B45=SE048	Aufnahme	1	St.
30	506A28=6x25	Passkerbstift ISO 8745, schwarz	1	St.
o. B.	636W63	Delomet 01 rapid	0,01	Pkg.


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=SW074	Montagezubehör für Fußbrettbügel für Fußraste geteilt (Pos. 31-37, Einzelteile s. Seite Pos. 5, 6, 8-15) Kröpfung: Sitzbreite:	1	St.
38	481B45=LB040	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB32 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
38	481B45=LB041	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB34 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
38	481B45=LB042	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB36-40 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
38	481B45=LB043	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB42-46 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
38	481B45=LB044	Fußbrett geteilt links, bunt beschichtet* SB48-50 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
o. B.	481B45=RB040	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB32 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
o. B.	481B45=RB041	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB34 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
o. B.	481B45=RB042	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB36-40 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
o. B.	481B45=RB043	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB42-46 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
o. B.	481B45=RB044	Fußbrett geteilt rechts, bunt beschichtet* SB48-50 Rahmen gerade Modell VR	1	St.
39	481B08=SZ230	Klemmbolzen	1	St.
40	506G21=M8x10	Gewindestift DIN 913, A2	1	St.
o. B.	636W63	Delomet 01 rapid	0,01	Pkg.

* Rahmenfarbe:


** Maße für Fußbrettbügel s. Seite 13

Hinweis: Anbau der Fußraste hochschwenkbar nur in Verbindung mit Rahmen gerade möglich!

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B08=PK165	Entriegelungshilfe für Fußraste hochschwenkbar mit automatischem Längenausgleich kpl., Modell VR	1	Paar
	481B08=LK165	Entriegelungshilfe für Fußraste hochschwenkbar mit automatischem Längenausgleich kpl., links Modell VR (Pos. 1-6)	1	Paar
	481B08=RK165	Entriegelungshilfe für Fußraste hochschwenkbar mit automatischem Längenausgleich kpl., rechts Modell VR	1	Paar
1	481B08=SE157	Hebel	1	St.
2	481B08=LE158	Halter links	1	St.
o. B.	481B08=RE158	Halter rechts	1	St.
3	481H08=ST018	Tauchgriff 14x6x60 mm	1	St.
4	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	4	St.
5	501S92=6	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x12, A2	2	St.
6	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.

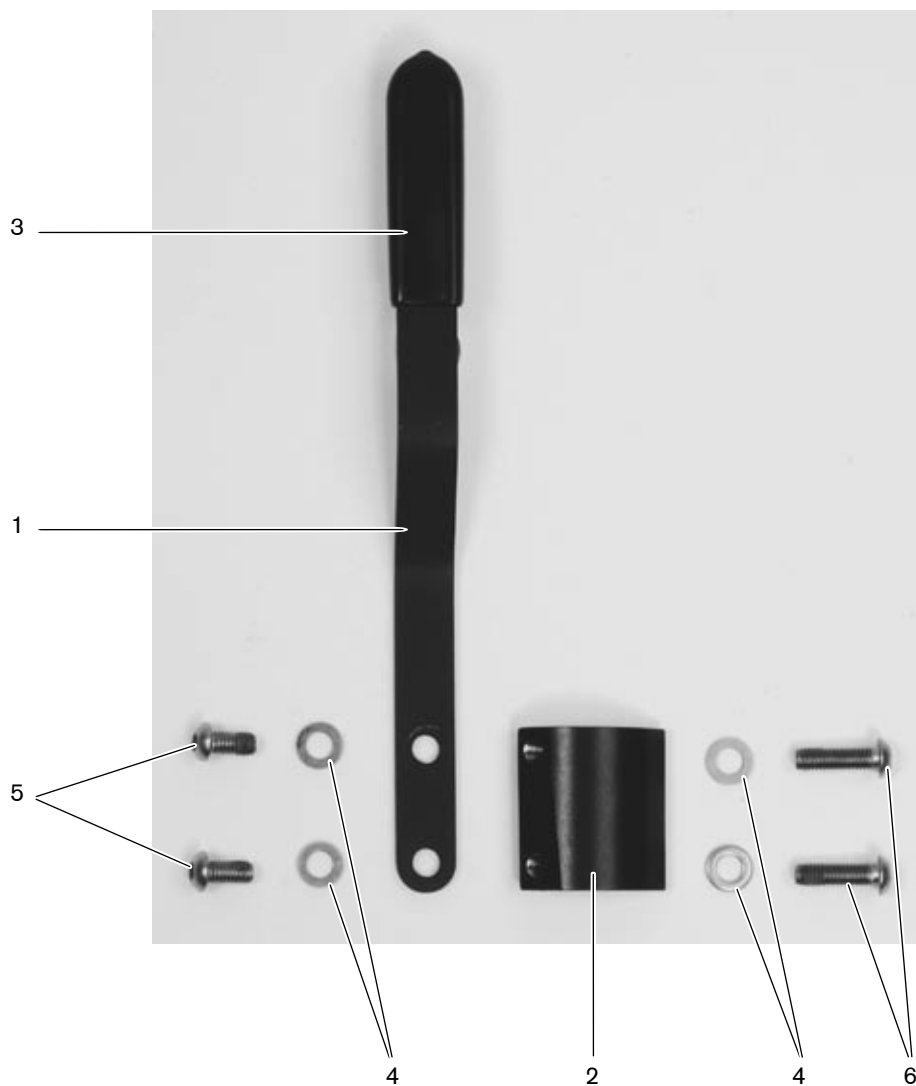

B

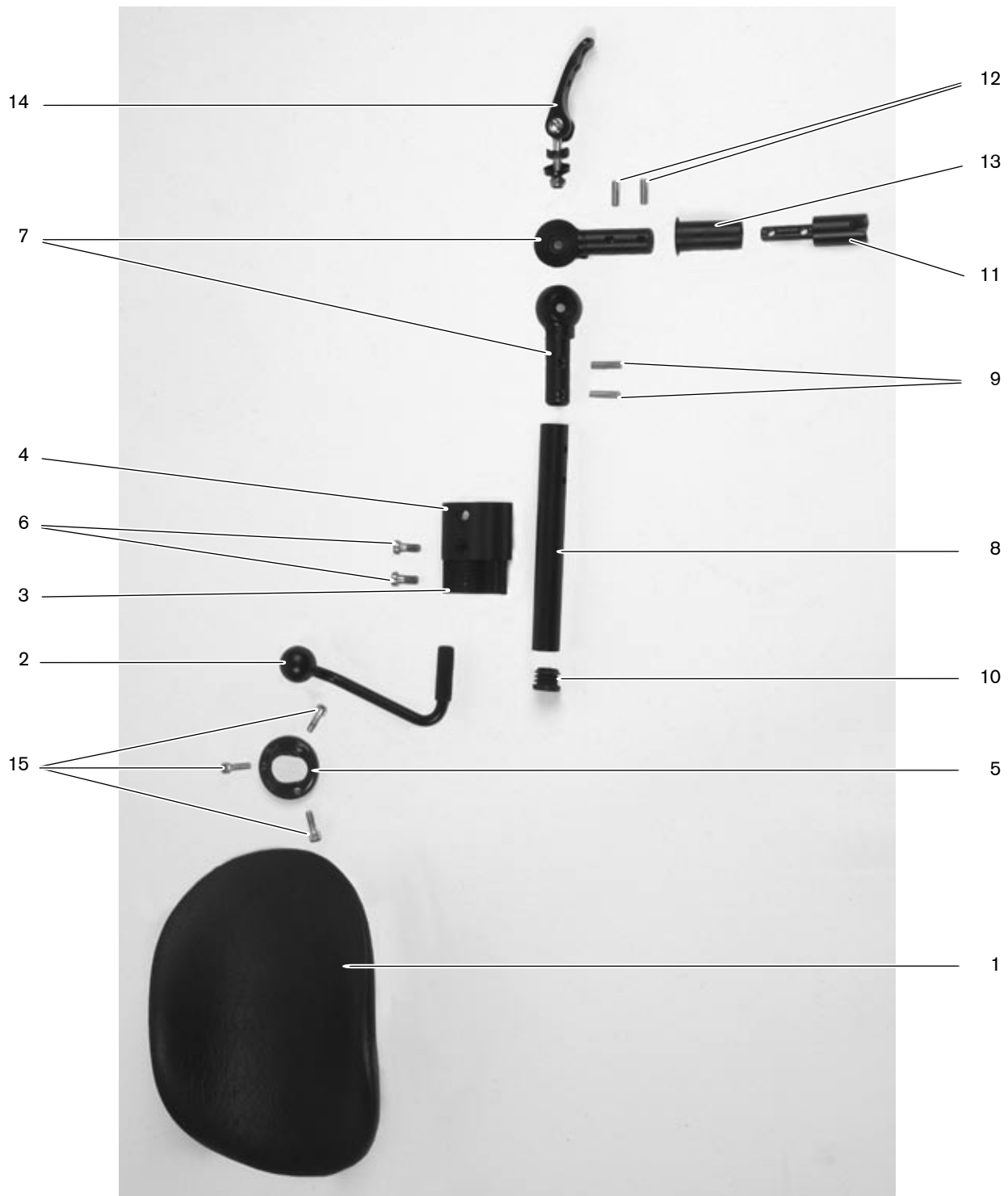


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481B45=LK230	Amputationsbeinstütze links, kpl. Modell VR und XXL2 (Pos. 1-15) Sitzbreite:	1	St.
	481B45=RK230	Amputationsbeinstütze rechts, kpl. Modell VR und XXL2 Sitzbreite:	1	St.
	481B45=LK229	Wadenhalteplatte links (Pos. 1-6, 15) Sitzbreite:	1	St.
	481B45=RK229	Wadenhalteplatte rechts Sitzbreite:	1	St.
1	440P2=1-7	Wadenstütze	1	St.
2	481B45=LZ214	Rotierelement geschweißt, links (möglich bis SB48)	1	St.
o. B.	481B45=RZ214	Rotierelement geschweißt, rechts (möglich bis SB48)	1	St.
2	481B45=LZ233	Rotierelement geschweißt, links (möglich ab SB50)	1	St.
o. B.	481B45=RZ233	Rotierelement geschweißt, rechts (möglich ab SB50)	1	St.
3	481B45=SE210	Klemmschelle innen	1	St.
4	481B45=SE211	Klemmschelle außen	1	St.
5	435A5=5	Formscheibe blau	1	St.
6	501T28=M6x14	Zylinderschraube DIN 912, verzinkt	2	St.
7	481D45=SZ043	Rastengelenk mit Bohrung	2	St.
8	481B45=SZ209	Aufnahmerohr für Amputationsbeinstütze	1	St.
9	506A22=5x18	Passkerbstift ISO 8745	2	St.
10	702F80=19	Lamellenstopfen	1	St.
11	481B45=SS206	Drehlager für Amputationsbeinstütze	1	St.
12	506A22=5x16	Passkerbstift ISO 8745	2	St.
13	481B45=ST207	Gleitbuchse	1	St.
14	431A62	Verstellbarer Klemmhebel	1	St.
o. B.	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
15	501T28=M6x16	Zylinderschraube DIN 912, verzinkt	3	St.
o. B.	481B08=SZ230	Klemmbolzen	1	St.
o. B.	506G21=M8x10	Gewindestift DIN 913	1	St.
o. B.	636W63	Delomet rapid 01	0,01	Pkg.

B

Baugruppe C

Sitz


C

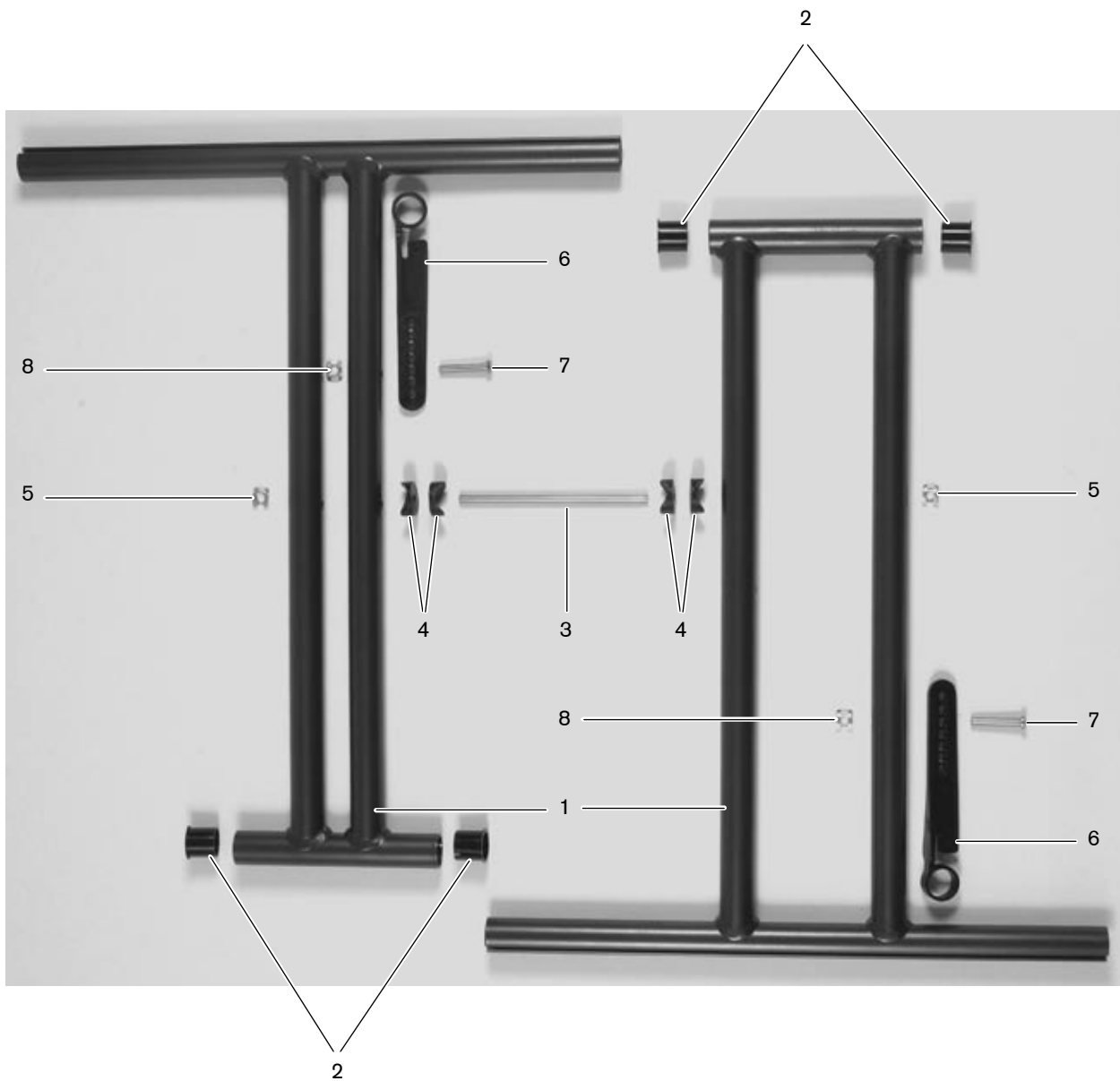

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481C45=SM009	Kreuzstrebe Modell T, Ti 8.9 und VR kpl. (Pos. 1-8)	1	St.
		Version ab 06/03 für Modell Ti 8.9		
		Sitzbreite:		
		Sitztiefe:		
		Rahmenfarbe:		
1	481C08=SB270	Kreuzstrebe, beschichtet, SB32*	1	St.
1	481C08=SB271	Kreuzstrebe, beschichtet, SB34*	1	St.
1	481C08=SB272	Kreuzstrebe, beschichtet, SB36*	1	St.
1	481C08=SB273	Kreuzstrebe, beschichtet, SB38*	1	St.
1	481C08=SB274	Kreuzstrebe, beschichtet, SB40*	1	St.
1	481C08=SB275	Kreuzstrebe, beschichtet, SB42*	1	St.
1	481C08=SB276	Kreuzstrebe, beschichtet, SB44*	1	St.
1	481C08=SB277	Kreuzstrebe, beschichtet, SB46*	1	St.
1	481C08=SB278	Kreuzstrebe, beschichtet, SB48*	1	St.
1	481C08=SB279	Kreuzstrebe, beschichtet, SB50*	1	St.
1	481C08=SP270	Kreuzstrebe, poliert, SB32**	1	St.
1	481C08=SP271	Kreuzstrebe, poliert, SB34**	1	St.
1	481C08=SP272	Kreuzstrebe, poliert, SB36**	1	St.
1	481C08=SP273	Kreuzstrebe, poliert, SB38**	1	St.
1	481C08=SP274	Kreuzstrebe, poliert, SB40**	1	St.
1	481C08=SP275	Kreuzstrebe, poliert, SB42**	1	St.
1	481C08=SP276	Kreuzstrebe, poliert, SB44**	1	St.
1	481C08=SP277	Kreuzstrebe, poliert, SB46**	1	St.
1	481C08=SP278	Kreuzstrebe, poliert, SB48**	1	St.
1	481C08=SP279	Kreuzstrebe, poliert, SB50**	1	St.
2	509G3=1	Gleitbuchse	4	St.
	481C08=SW009	Montagezubehör Kreuzstrebe Mitte (Pos. 3-5)	1	St.
3		Steckbolzen lang	1	St.
4		Halbschale Durchmesser 25x6,2	4	St.
5		SL-Sicherung für Bolzen	2	St.
	481C45=SK002	Kreuzstrebenlasche SB32-44, kpl. (Pos. 6-8)	2	St.
	481C45=SK003	Kreuzstrebenlasche SB46-50, kpl. (Pos. 6-8)	2	St.
6		Kreuzstrebenlasche SB32-44	2	St.
6		Kreuzstrebenlasche SB46-50	2	St.
7		Steckbolzen kurz	1	St.
8		SL-Sicherung für Bolzen	1	St.

* Rahmenfarbe und Sitztiefe:

** Sitztiefe:

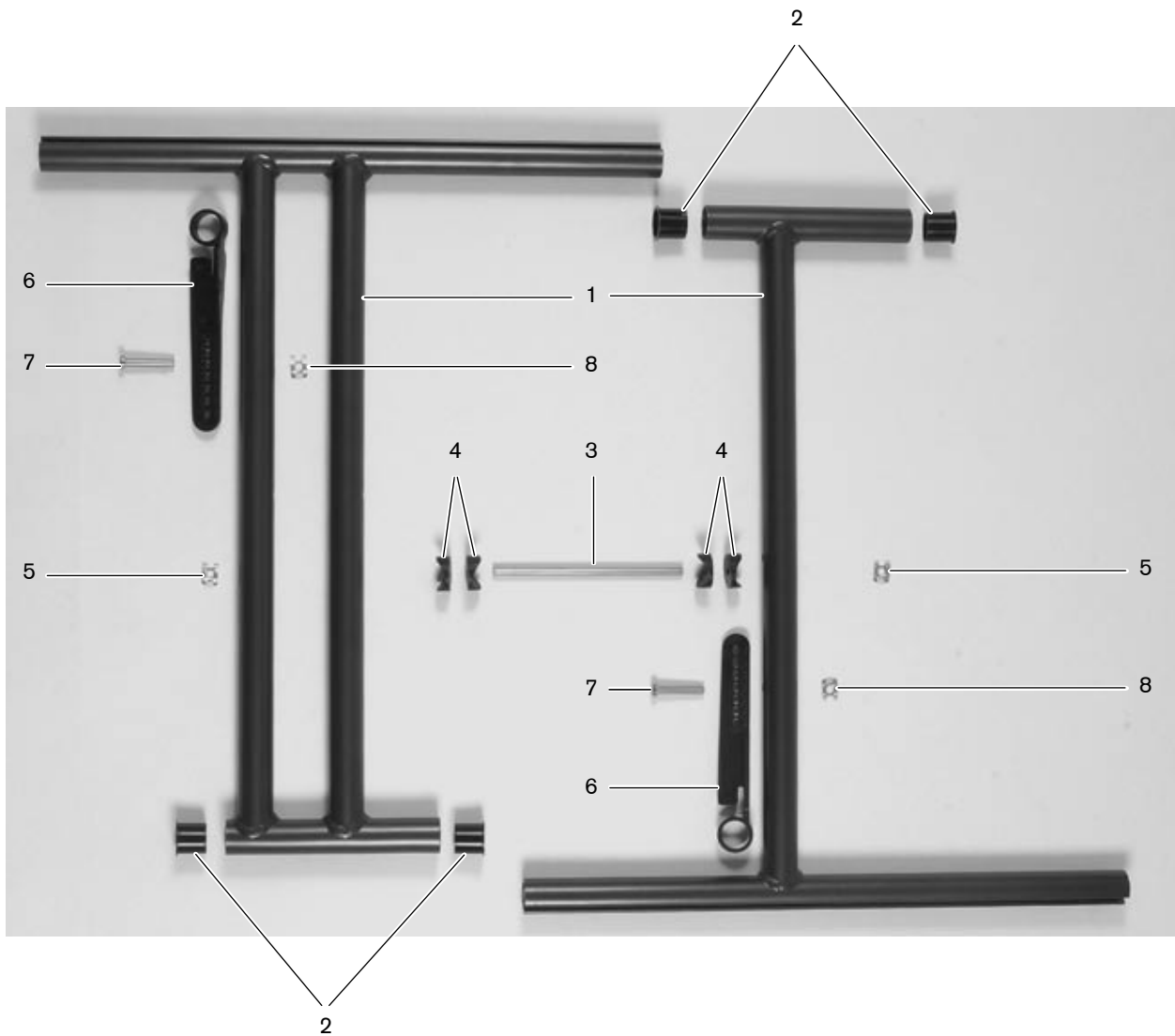


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481C45=SM007	Kreuzstrebe Modell Ti 8.9 kpl. (Pos. 1-8)	1	St.
		Version bis 06/03		
		Sitzbreite:		
		Sitztiefe:		
		Rahmenfarbe:		
1	481C45=SB006	Kreuzstrebe, beschichtet, SB32*	1	St.
1	481C45=SB010	Kreuzstrebe, beschichtet, SB34*	1	St.
1	481C45=SB011	Kreuzstrebe, beschichtet, SB36*	1	St.
1	481C45=SB012	Kreuzstrebe, beschichtet, SB38*	1	St.
1	481C45=SB013	Kreuzstrebe, beschichtet, SB40*	1	St.
1	481C45=SB014	Kreuzstrebe, beschichtet, SB42*	1	St.
1	481C45=SB016	Kreuzstrebe, beschichtet, SB44*	1	St.
1	481C45=SB017	Kreuzstrebe, beschichtet, SB46*	1	St.
1	481C45=SB018	Kreuzstrebe, beschichtet, SB48*	1	St.
1	481C45=SB019	Kreuzstrebe, beschichtet, SB50*	1	St.
1	481C45=SP006	Kreuzstrebe, poliert, SB32**	1	St.
1	481C45=SP010	Kreuzstrebe, poliert, SB34**	1	St.
1	481C45=SP011	Kreuzstrebe, poliert, SB36**	1	St.
1	481C45=SP012	Kreuzstrebe, poliert, SB38**	1	St.
1	481C45=SP013	Kreuzstrebe, poliert, SB40**	1	St.
1	481C45=SP014	Kreuzstrebe, poliert, SB42**	1	St.
1	481C45=SP016	Kreuzstrebe, poliert, SB44**	1	St.
1	481C45=SP017	Kreuzstrebe, poliert, SB46**	1	St.
1	481C45=SP018	Kreuzstrebe, poliert, SB48**	1	St.
1	481C45=SP019	Kreuzstrebe, poliert, SB50**	1	St.
2	509G3=1	Gleitbuchse	4	St.
	481C45=SW020	Montagezubehör Kreuzstrebe Mitte Modell Ti 8.9	1	St.
		(Pos. 3-5)		
3		Steckbolzen Modell Ti 8.9	1	St.
4		Halbschale Durchmesser 25x6,2	4	St.
5		SL-Sicherung für Bolzen	2	St.
	481C45=SK002	Kreuzstrebenlasche SB32-44, kpl.	2	St.
		(Einzelteile s. Seite 50, 51 Pos. 6-8)		
	481C45=SK003	Kreuzstrebenlasche SB46-50, kpl.	2	St.
		(Einzelteile s. Seite 50, 51 Pos. 6-8)		

* Rahmenfarbe und Sitztiefe:


** Sitztiefe:

C

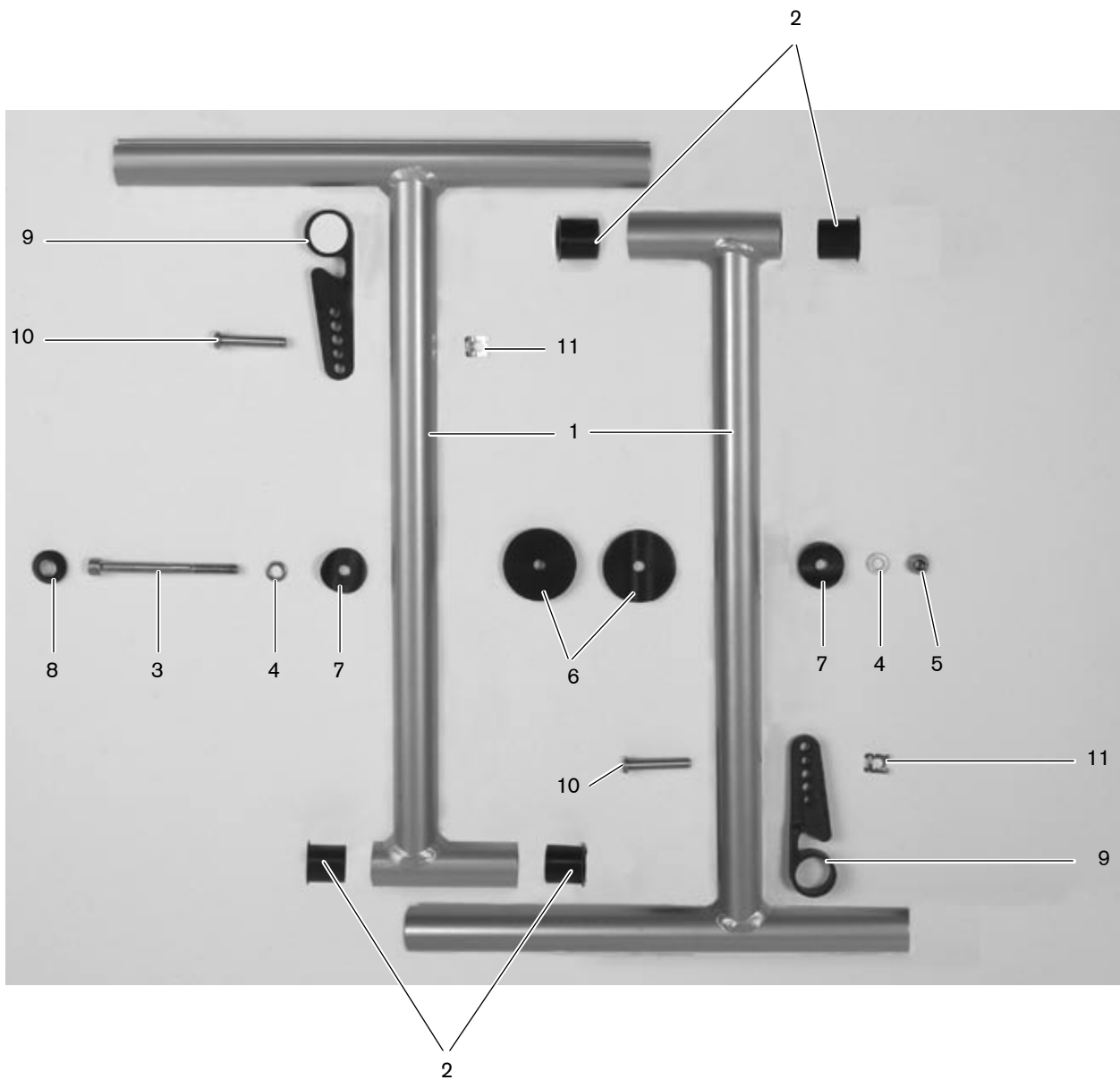

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481C45=SM040	Kreuzstrebe Modell Teen2 kpl. (Pos. 1-8)	1	St.
		Sitzbreite:		
		Sitztiefe:		
		Rahmenfarbe:		
1	481C45=SB041	Kreuzstrebe, beschichtet, SB22*	1	St.
1	481C45=SB042	Kreuzstrebe, beschichtet, SB24*	1	St.
1	481C45=SB043	Kreuzstrebe, beschichtet, SB26*	1	St.
1	481C45=SB044	Kreuzstrebe, beschichtet, SB28*	1	St.
1	481C45=SB045	Kreuzstrebe, beschichtet, SB30*	1	St.
1	481C45=SB046	Kreuzstrebe, beschichtet, SB32*	1	St.
1	481C45=SB047	Kreuzstrebe, beschichtet, SB34*	1	St.
1	481C45=SB048	Kreuzstrebe, beschichtet, SB36*	1	St.
1	481C08=SB278	Kreuzstrebe, beschichtet, SB38*	1	St.
2	509G3=1	Gleitbuchse	4	St.
	481C05=SW004	Montagezubehör Kreuzstrebe Mitte (Pos. 3-8)	1	St.
3		Zylinderschraube DIN 912, A2	1	St.
4		Scheibe DIN 125, A2	2	St.
5		Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
6		Halbschale für Kreuzstrebenmitte	2	St.
7		Halbschale Durchmesser 25x6,2	2	St.
o. B.		Sechskantschutzkappe für M6	1	St.
8		Schraubenkappe	1	St.
	481C45=SK001	Kreuzstrebenlasche SB22-30, kpl. (Pos. 9-11)	2	St.
	481C45=SK002	Kreuzstrebenlasche SB32-40, kpl. (Pos. 9-11)	2	St.
9		Kreuzstrebenlasche SB22-30	2	St.
9		Kreuzstrebenlasche SB32-40	2	St.
10		Steckbolzen kurz	1	St.
11		SL-Sicherung für Bolzen	1	St.

* Rahmenfarbe und Sitztiefe:

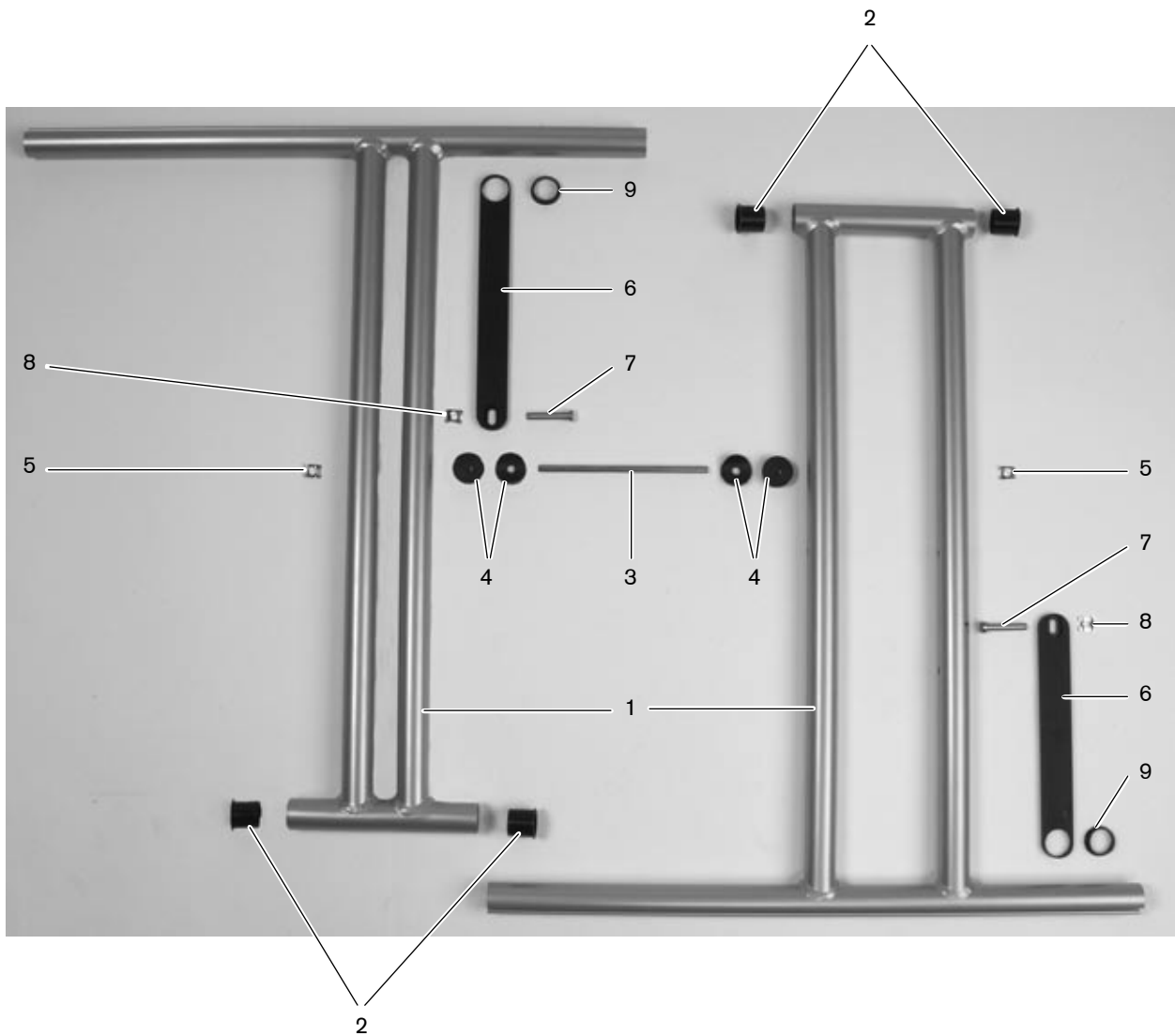

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481C45=SM099	Kreuzstrebe Modell XXL2 kpl. (Pos. 1-9)	1	St.
		Sitzbreite:		
		Sitztiefe:		
		Rahmenfarbe:		
1	481C45=SB079	Kreuzstrebe, beschichtet, SB50*	1	St.
1	481C45=SB080	Kreuzstrebe, beschichtet, SB52*	1	St.
1	481C45=SB081	Kreuzstrebe, beschichtet, SB54*	1	St.
1	481C45=SB082	Kreuzstrebe, beschichtet, SB56*	1	St.
1	481C45=SB083	Kreuzstrebe, beschichtet, SB58*	1	St.
1	481C45=SB084	Kreuzstrebe, beschichtet, SB60*	1	St.
1	481C45=SB085	Kreuzstrebe, beschichtet, SB62*	1	St.
2	509G3=1	Gleitbuchse	4	St.
	481C08=SW009	Montagezubehör Kreuzstrebe Mitte	1	St.
		(Einzelteile s. Seite 90, 91 Pos. 3-5)		
	481C45=SK087	Kreuzstrebenlasche SB50, kpl. (Pos. 6-9)	2	St.
	481C45=SK088	Kreuzstrebenlasche SB52, kpl. (Pos. 6-9)	2	St.
	481C45=SK089	Kreuzstrebenlasche SB54, kpl. (Pos. 6-9)	2	St.
	481C45=SK090	Kreuzstrebenlasche SB56, kpl. (Pos. 6-9)	2	St.
	481C45=SK091	Kreuzstrebenlasche SB58, kpl. (Pos. 6-9)	2	St.
	481C45=SK092	Kreuzstrebenlasche SB60, kpl. (Pos. 6-9)	2	St.
	481C45=SK058	Kreuzstrebenlasche SB62, kpl. (Pos. 6-9)	2	St.
6		Kreuzstrebenlasche SB50	1	St.
6		Kreuzstrebenlasche SB52	1	St.
6		Kreuzstrebenlasche SB54	1	St.
6		Kreuzstrebenlasche SB56	1	St.
6		Kreuzstrebenlasche SB58	1	St.
6		Kreuzstrebenlasche SB60	1	St.
6		Kreuzstrebenlasche SB62	1	St.
7		Steckbolzen kurz	1	St.
8		SL-Sicherung für Bolzen	1	St.
o. B.		Distanz	1	St.
o. B.		Halbschale Durchmesser 25x6,2	1	St.
9		Distanzbuchse für Kreuzstrebenlasche	1	St.

* Rahmenfarbe und Sitztiefe:

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481C08=SK005	Sitzbespannung Modell T, Ti 8.9 und VR (Pos. 1-3) Sitzbreite: Sitztiefe: Bespannungsfarbe:	1	St.
	481C45=SK101	Sitzbespannung Modell XXL2 (Pos. 1-3) Sitzbreite: Sitztiefe: Bespannungsfarbe:	1	St.
1	481C08=SV004	Sitzbespannung Modell T, Ti 8.9 und VR (incl. Pos. 2) Sitzbreite: Sitztiefe: Bespannungsfarbe:	1	St.
1	481C45=SV101	Sitzbespannung Modell XXL2 (incl. Pos. 2) Sitzbreite: Sitztiefe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481C15=ST030	Endstopfen für profiliertes Sitzrohr	4	St.
3	481C08=ST285	Bespannungsstange ST36	2	St.
3	481C08=ST286	Bespannungsstange ST38	2	St.
3	481C08=ST287	Bespannungsstange ST40	2	St.
3	481C45=ST288	Bespannungsstange ST42	2	St.
3	481C08=ST289	Bespannungsstange ST44	2	St.
3	481C08=ST290	Bespannungsstange ST46	2	St.
3	481C08=ST291	Bespannungsstange ST48	2	St.
3	481C45=ST292	Bespannungsstange ST50	2	St.
3	481C08=ST293	Bespannungsstange ST52	2	St.
3	481C08=ST294	Bespannungsstange ST54	2	St.
3	481C45=ST037	Bespannungsstange ST56	2	St.



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481C45=SV025	Sitzbespannung mit Kathedertasche Modell T, Ti 8.9 und VR (incl. Pos. 2 und 3) Sitzbreite: Sitztiefe: Bespannungsfarbe:	1	St.
	481C45=SV039	Sitzbespannung mit Kathedertasche Modell XXL2 (incl. Pos. 2 und 3) Sitzbreite: Sitztiefe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481C15=ST030	Endstopfen für profiliertes Sitzrohr	4	St.
3	481C08=ST287	Bespannungsstange ST40	2	St.
3	481C45=ST288	Bespannungsstange ST42	2	St.
3	481C08=ST289	Bespannungsstange ST44	2	St.
3	481C08=ST290	Bespannungsstange ST46	2	St.
3	481C08=ST291	Bespannungsstange ST48	2	St.
3	481C45=ST292	Bespannungsstange ST50	2	St.
3	481C08=ST293	Bespannungsstange ST52	2	St.
3	481C08=ST294	Bespannungsstange ST54	2	St.
3	481C45=ST037	Bespannungsstange ST56	2	St.


Hinweis: Erst möglich ab SB36/ST40 cm.



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481C45=SK095	Sitzbespannung Modell Teen2 (Pos. 1-4) Sitzbreite: Sitztiefe: Bespannungsfarbe:	1	St.
	481C08=SV004	Sitzbespannung Modell Teen2 (incl. Pos. 2) Sitzbreite: Sitztiefe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481C15=ST030	Endstopfen für profiliertes Sitzrohr	2	St.
3	481C45=ST053	Bespannungsstange ST24	2	St.
3	481C45=ST054	Bespannungsstange ST26	2	St.
3	481C45=ST281	Bespannungsstange ST28	2	St.
3	481C08=ST282	Bespannungsstange ST30	2	St.
3	481C08=ST283	Bespannungsstange ST32	2	St.
3	481C08=ST284	Bespannungsstange ST34	2	St.
3	481C08=ST285	Bespannungsstange ST36	2	St.
3	481C08=ST286	Bespannungsstange ST38	2	St.
3	481C08=ST287	Bespannungsstange ST40	2	St.
o. B.	481C15=ST030	Endstopfen für profiliertes Sitzrohr (für ST24, 30 und 36)	2	St.
4	481C45=ST004	Verlängerung Sitzrohr 20 mm (für ST26, 32 und 38)	2	St.
4	481C45=ST005	Verlängerung Sitzrohr 40 mm (für ST28, 34 und 40)	2	St.




Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481C45=SK100	Sitzbespannung Modell Teen2 VR (Pos. 1-4) Sitzbreite: Sitztiefe: Bespannungsfarbe:	1	St.
	481C08=SV004	Sitzbespannung Modell Teen2 (incl. Pos. 2) Sitzbreite: Sitztiefe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481C45=ST093	Endstopfen für profiliertes Sitzrohr	2	St.
3	481C45=ST053	Bespannungsstange ST24	2	St.
3	481C45=ST054	Bespannungsstange ST26	2	St.
3	481C45=ST281	Bespannungsstange ST28	2	St.
3	481C08=ST282	Bespannungsstange ST30	2	St.
3	481C08=ST283	Bespannungsstange ST32	2	St.
3	481C08=ST284	Bespannungsstange ST34	2	St.
3	481C08=ST285	Bespannungsstange ST36	2	St.
3	481C08=ST286	Bespannungsstange ST38	2	St.
3	481C08=ST287	Bespannungsstange ST40	2	St.
o. B.	481C15=ST030	Endstopfen für profiliertes Sitzrohr (für ST24, 30 und 36)	2	St.
4	481C45=ST004	Verlängerung Sitzrohr 20 mm (für ST26, 32 und 38)	2	St.
4	481C45=ST005	Verlängerung Sitzrohr 40 mm (für ST28, 34 und 40)	2	St.

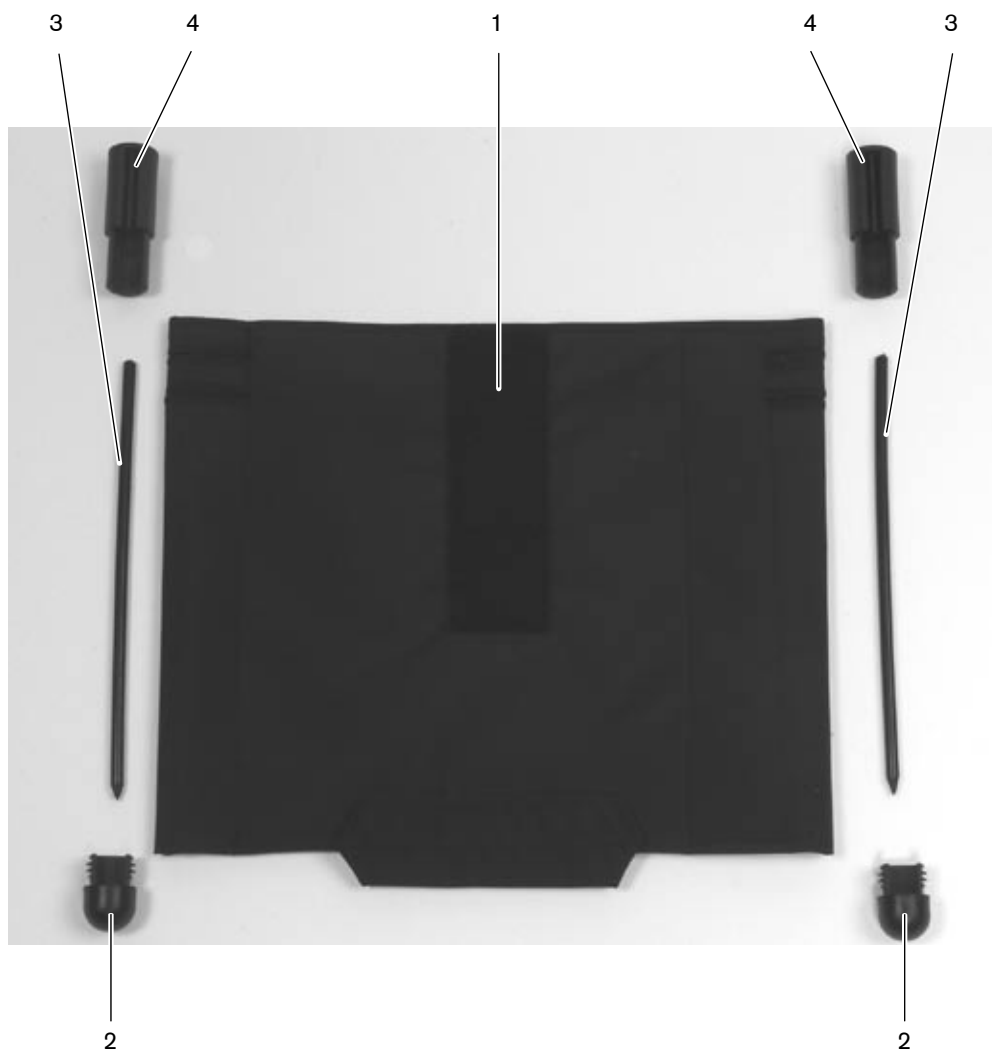

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	476C01=DS13-15	Verstellbarer fester Sitz „The Seat“ SB34-38 (Pos. 1-11)	1	St.
	476C01=DS14-18	Verstellbarer fester Sitz „The Seat“ SB40-50 (Pos. 1-11)	1	St.
1		Formteil SB34-38	1	St.
1		Formteil SB40-50	1	St.
2		Breitenjustierschraube	4	St.
3		Breitenverlängerungsmutter	4	St.
4		Tragarm für Breitenverlängerung	4	St.
5		Hakenjustierbolzen	8	St.
6		Hakenjustier-Federring	8	St.
7		Hakenjustier-Unterlegscheibe	8	St.
8		„J“-Haken für Sitz	4	St.
9		Metallschlauchklemme	4	St.
10		hintere Halteklammer mit Nase	2	St.
11		hintere Halteklammer ohne Nase	2	St.

Hinweis: Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte den separaten Produktbeschreibungen 647A164 und 646A79

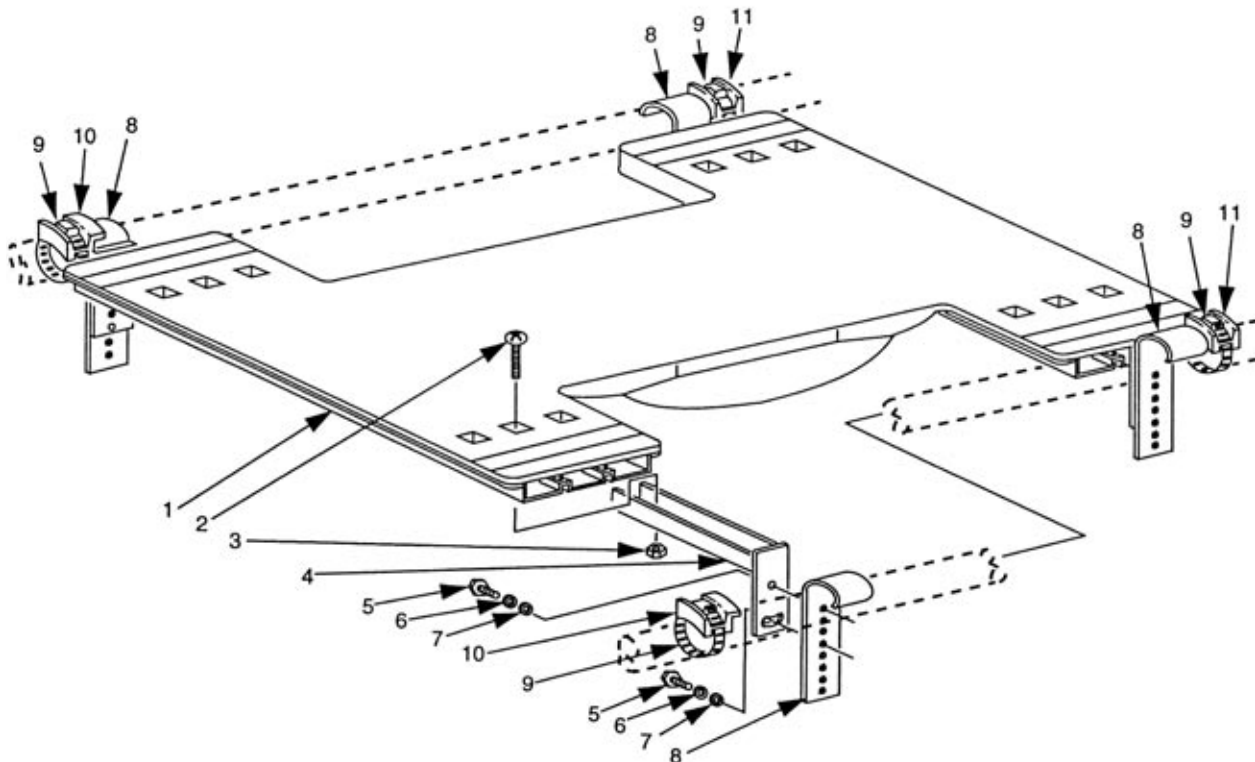

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481C00=SM850	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz Sitzbreite: Sitztiefe: Dicke: 3, 5 oder 8 cm	1	St.
	481C00=ST840	Sitzkissen Schaumstoff Sitzbreite: Sitztiefe: Dicke: 3, 5 oder 8 cm	1	St.
	481C00=SV850	Sitzkissenbezug schwarz Sitzbreite: Sitztiefe: Dicke: 3, 5 oder 8 cm	1	St.




Baugruppe D

Rücken

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D00=SK200	Schiebegriff kurz Modell T, VR, Teen2 und XXL2 (Pos. 1-5)	2	St.
1	481D00=SS205	Schiebegriff kurz	1	St.
2	481D45=ST023	Schiebegriff kurz	1	St.
3	433A1=7	Schraubenkappe	2	St.
4	501T40=2	Zylinderschraube DIN 912, mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x28, A2	2	St.
5	507U45=15x6.2x1	Scheibe	2	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK300	Schiebegriff kurz Modell Ti 8.9 (Pos.1, 2, 5)	2	St.
1	481D00=SS205	Schiebegriff kurz	1	St.
2	481D45=ST023	Schiebegriff kurz	1	St.
o. B.	501T69=M6x28	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
5	507U45=15x6.2x1	Scheibe	2	St.


Hinweis: Nur für Standard-Rücken.

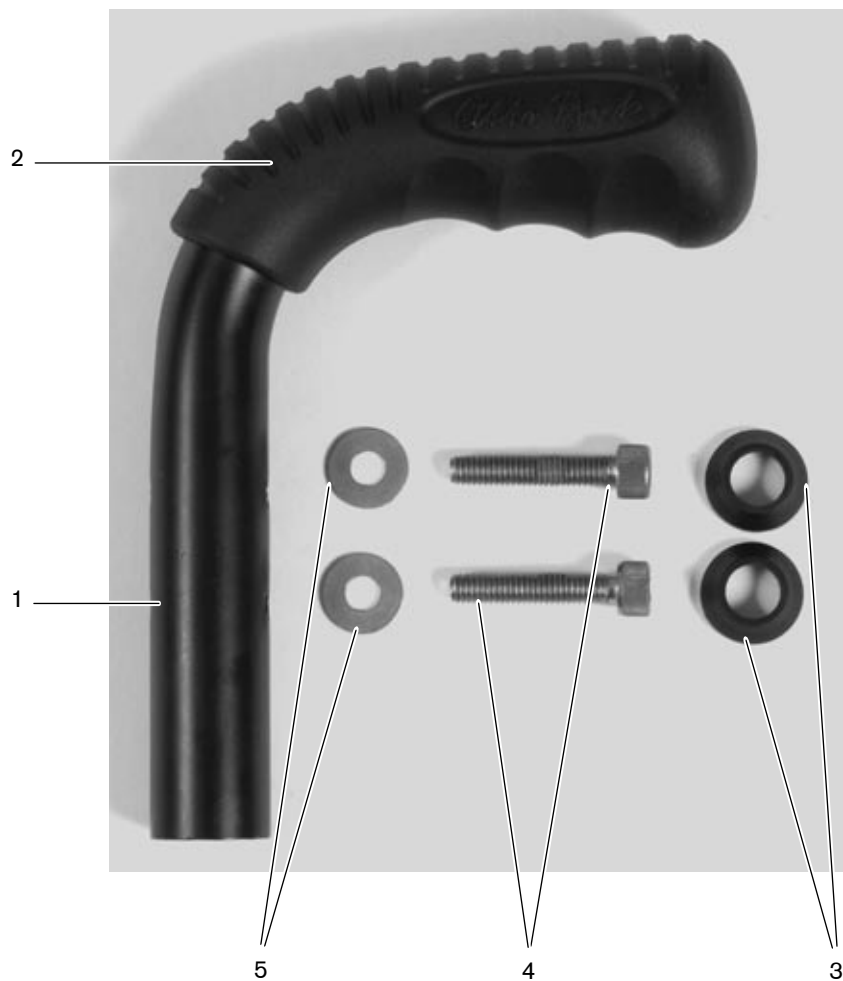

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D00=SK300	Schiebegriff lang Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1-5)	2	St.
1	481D00=SS305	Schiebegriff lang	1	St.
2	481D00=ST040	Griff	1	St.
3	433A1=7	Schraubenkappe	2	St.
4	501T40=2	Zylinderschraube DIN 912, mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x28, A2	2	St.
5	507U45=15x6.2x1	Scheibe	2	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK300	Schiebegriff lang Modell Ti 8.9 (Pos.1, 2, 5)	2	St.
1	481D00=SS305	Schiebegriff lang	1	St.
2	481D00=ST040	Griff	1	St.
o. B.	501T69=M6x28	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
5	507U45=15x6.2x1	Scheibe	2	St.

Hinweis: Nur für Standard-Rücken.

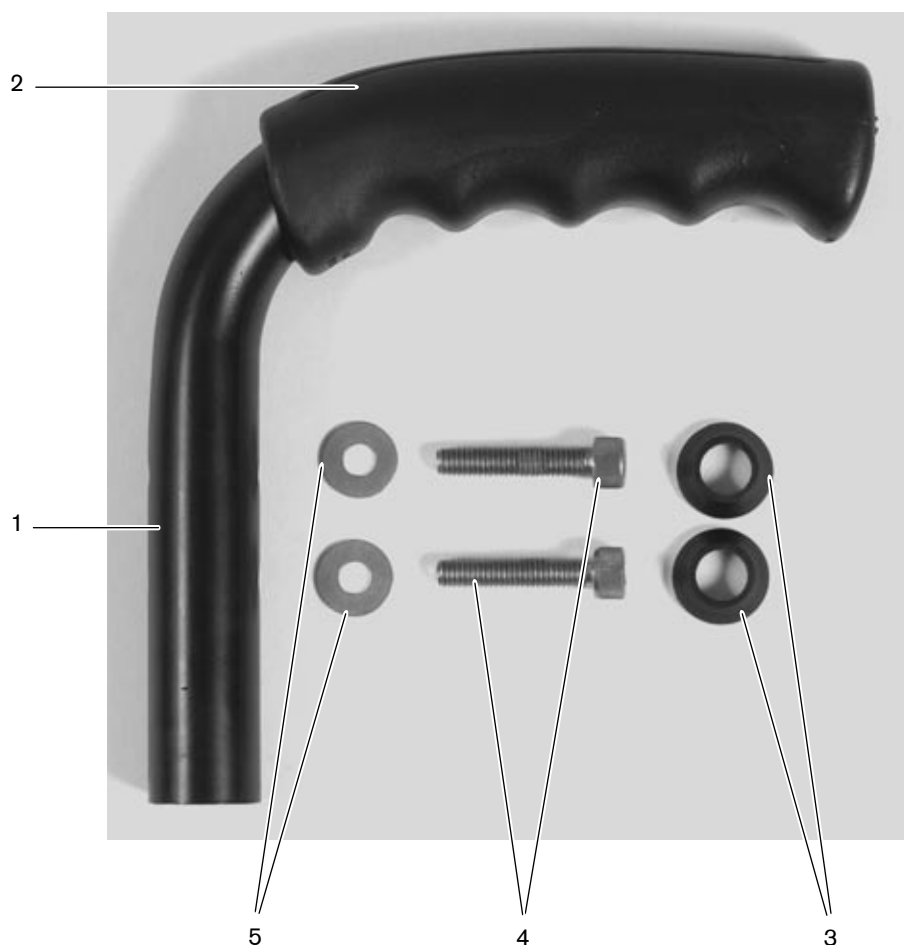


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D08=SK003	Schiebegriff höhenverstellbar kurz Modell T, Ti 8.9, VR, Teen2 und XXL2 (Pos. 1-8)	2	St.
1	481D08=SS003	Schiebegriff höhenverstellbar kurz	1	St.
2	481D45=ST023	Schiebegriff kurz	1	St.
3	481D00=ST001	verstellbarer Klemmhebel	1	St.
4	507U45=15x6.2x1	Scheibe	1	St.
5	702F80=22	Lamellenstopfen	1	St.
6	481D00=ST003	Klemmbolzen	1	St.
7	481D00=ST042	Schraubenrosette	1	St.
8	481D00=ST041	Stopfen	1	St.

Hinweis: Nur für Ergo-Rücken.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D08=SK004	Schiebegriff höhenverstellbar kurz Modell T, Ti 8.9, VR, Teen2 und XXL2 (Pos. 1-8)	2	St.
1	481D08=SS004	Schiebegriff höhenverstellbar kurz	1	St.
2	481D45=ST023	Schiebegriff kurz	1	St.
3	481D00=ST001	verstellbarer Klemmhebel	1	St.
4	507U45=15x6.2x1	Scheibe	1	St.
5	702F80=22	Lamellenstopfen	1	St.
6	481D00=ST003	Klemmbolzen	1	St.
7	481D00=ST042	Schraubenrosette	1	St.
8	481D00=ST041	Stopfen	1	St.

Hinweis: Nur für Standard-Rücken, Verstellbereich 10 cm.

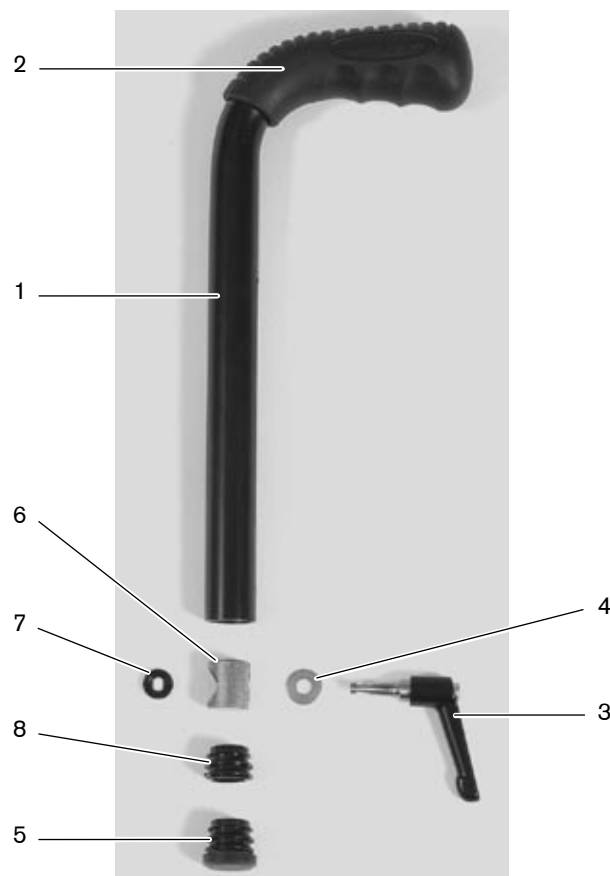


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D08=SK001	Schiebegriff höhenverstellbar lang Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2 (Pos. 1-8)	2	St.
1	481D08=SS001	Schiebegriff höhenverstellbar lang	1	St.
2	481D00=ST040	Griff	1	St.
3	481D00=ST001	verstellbarer Klemmhebel	1	St.
4	507U45=15x6.2x1	Scheibe	1	St.
5	702F80=22	Lamellenstopfen	1	St.
6	481D00=ST003	Klemmbolzen	1	St.
7	481D00=ST042	Schraubenrosette	1	St.
8	481D00=ST041	Stopfen	1	St.

Hinweis: Nur für Ergo-Rücken.


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D08=SK002	Schiebegriff höhenverstellbar lang Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2 (Pos. 1-8)	2	St.
1	481D08=SS002	Schiebegriff höhenverstellbar lang	1	St.
2	481D00=ST040	Griff	1	St.
3	481D00=ST001	verstellbarer Klemmhebel	1	St.
4	507U45=15x6.2x1	Scheibe	1	St.
5	702F80=22	Lamellenstopfen	1	St.
6	481D00=ST003	Klemmbolzen	1	St.
7	481D00=ST042	Schraubenrosette	1	St.
8	481D00=ST041	Stopfen	1	St.

Hinweis: Nur für Standard-Rücken, Verstellbereich 10 cm.

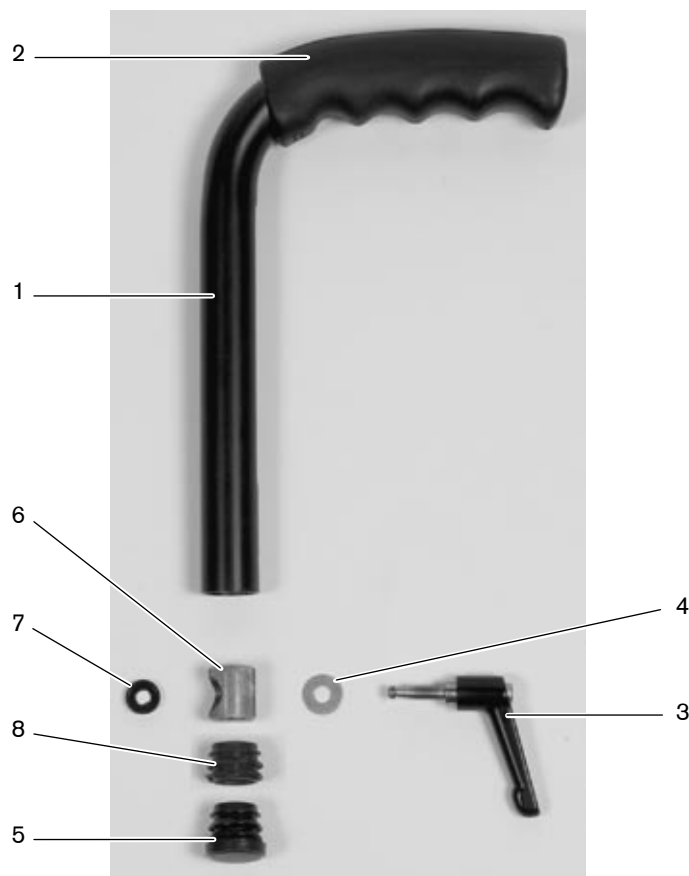


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D05=SK006	Schiebegriff höhenverstellbar Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2 (Pos. 1-11)	2	St.
1	481D45=SV046	Schiebegriff höhenverstellbar gerade (Version bis 11/03)	1	St.
o. B.	481D05=SV006	Schiebegriff höhenverstellbar gerade (Version ab 12/03)	1	St.
2	481D05=SE002	Buchse für Griffadapter	1	St.
3	481D05=SE001	Griffadapter	1	St.
	481D45=SW048	Montagezubehör für Schiebegriff höhenverstellbar (Pos. 4-11) (Version bis 11/03)	1	St.
	481D05=SW005	Montagezubehör für Schiebegriff (Pos. 4, 5, 7-11) (Version ab 12/03)	1	St.
4		Scheibe DIN 125, A2	4	St.
5		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x25, A2	2	St.
6		Schiebegriff kurz (Version bis 11/03)	1	St.
o. B.		Griff (Version ab 12/03)	1	St.
7		Stativfeder	1	St.
8		Schnellspannhebel	1	St.
9		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x14, A2	2	St.
10		Rosette für DIN 6912, M6	2	St.
11		Lamellenstopfen	1	St.

Hinweis: Nur für Standard-Rücken.

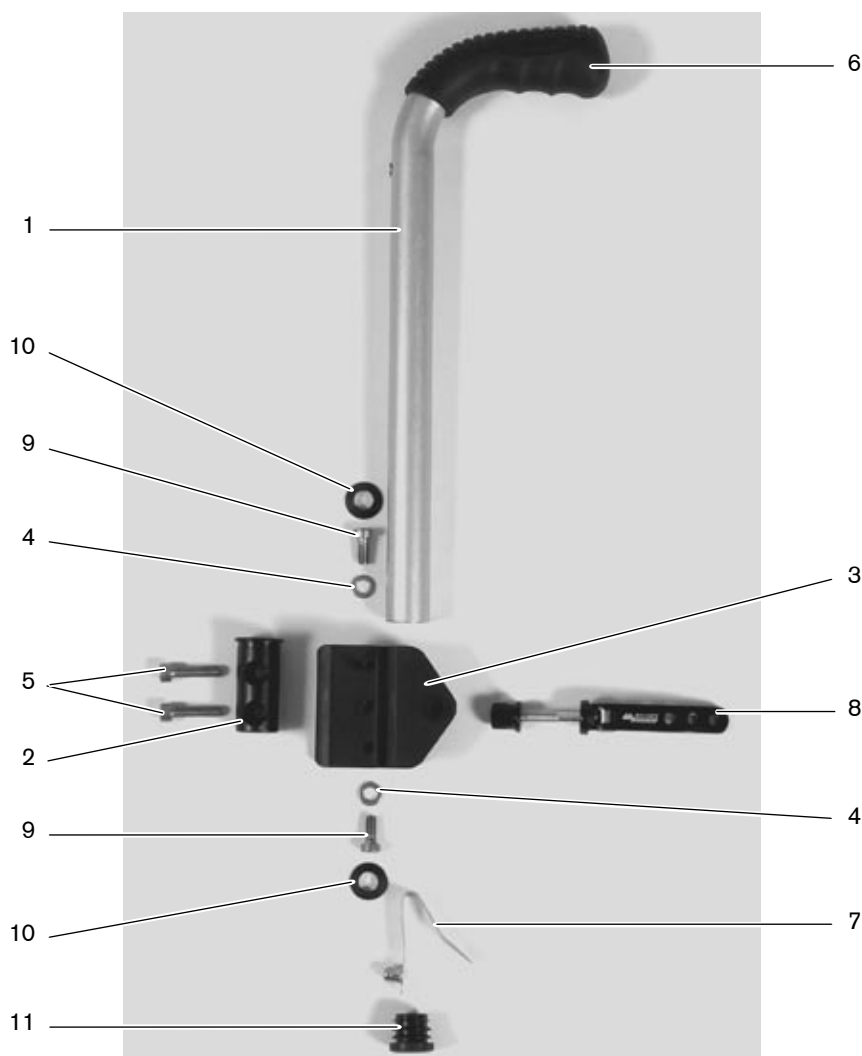


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK030	Schiebegriff höhenverstellbar Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2 (Pos. 1-12)	2	St.
1	481D45=SV046	Schiebegriff höhenverstellbar gerade (Version bis 11/03)	1	St.
o. B.	481D05=SV006	Schiebegriff höhenverstellbar gerade (Version ab 12/03)	1	St.
2	481D45=SE025	Aufnahmesegment Ergo	1	St.
3	501S89=M6x25	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	2	St.
4	481D05=SE001	Griffadapter	1	St.
	481D45=SW048	Montagezubehör für Schiebegriff höhenverstellbar (Pos. 5-12 Einzelteile s. Seite 110 Pos. 4-11) (Version bis 11/03)	1	St.
	481D05=SW005	Montagezubehör für Schiebegriff (Pos. 5, 6, 8-12 Einzelteile s. Seite 110 Pos. 4, 5, 7-11) (Version ab 12/03)	1	St.

Hinweis: Nur für Ergo-Rücken.

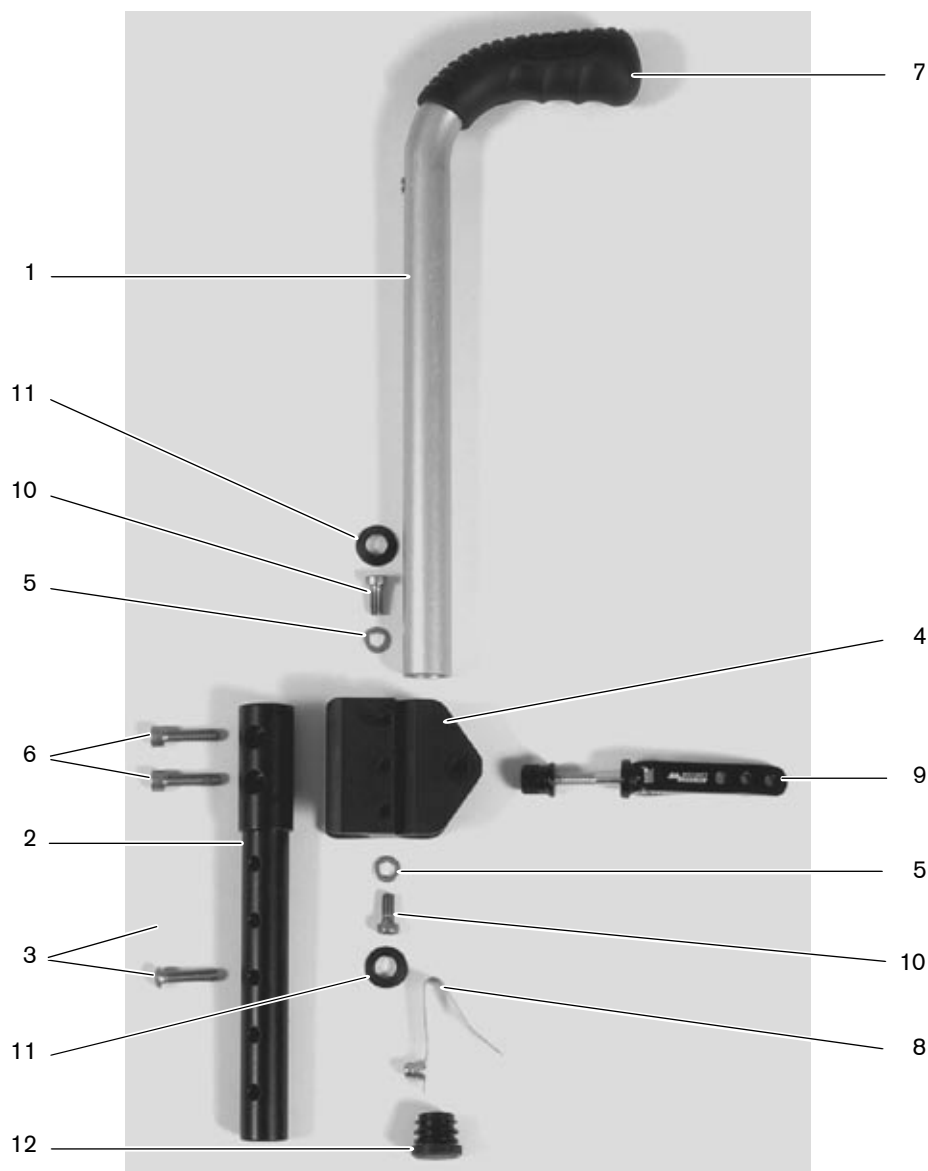


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D05=PK003	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt Modell Teen2	1	Paar
	481D05=LK003	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt links Modell Teen2	1	St.
	481D05=RK003	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt rechts Modell Teen2	1	St.
1	481D45=LV076	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt links (Version bis 11/03)	1	St.
1	481D45=RV076	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt rechts (Version bis 11/03)	1	St.
o. B.	481D05=LV003	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt links (Version ab 12/03)	1	St.
o. B.	481D05=RV003	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt rechts (Version ab 12/03)	1	St.
2	481D05=SE002	Buchse für Griffadapter	1	St.
3	481D05=SE001	Griffadapter	1	St.
	481D45=SW048	Montagezubehör für Schiebegriff höhenverstellbar	1	St.
		(Einzelteile s. Seite 110 Pos. 4-11) (Version bis 11/03)		
	481D05=SW005	Montagezubehör für Schiebegriff	1	St.
		(Einzelteile s. Seite 110 Pos. 4, 5, 7-11) (Version ab 12/03)		

Hinweis: Nur für Standard-Rücken.

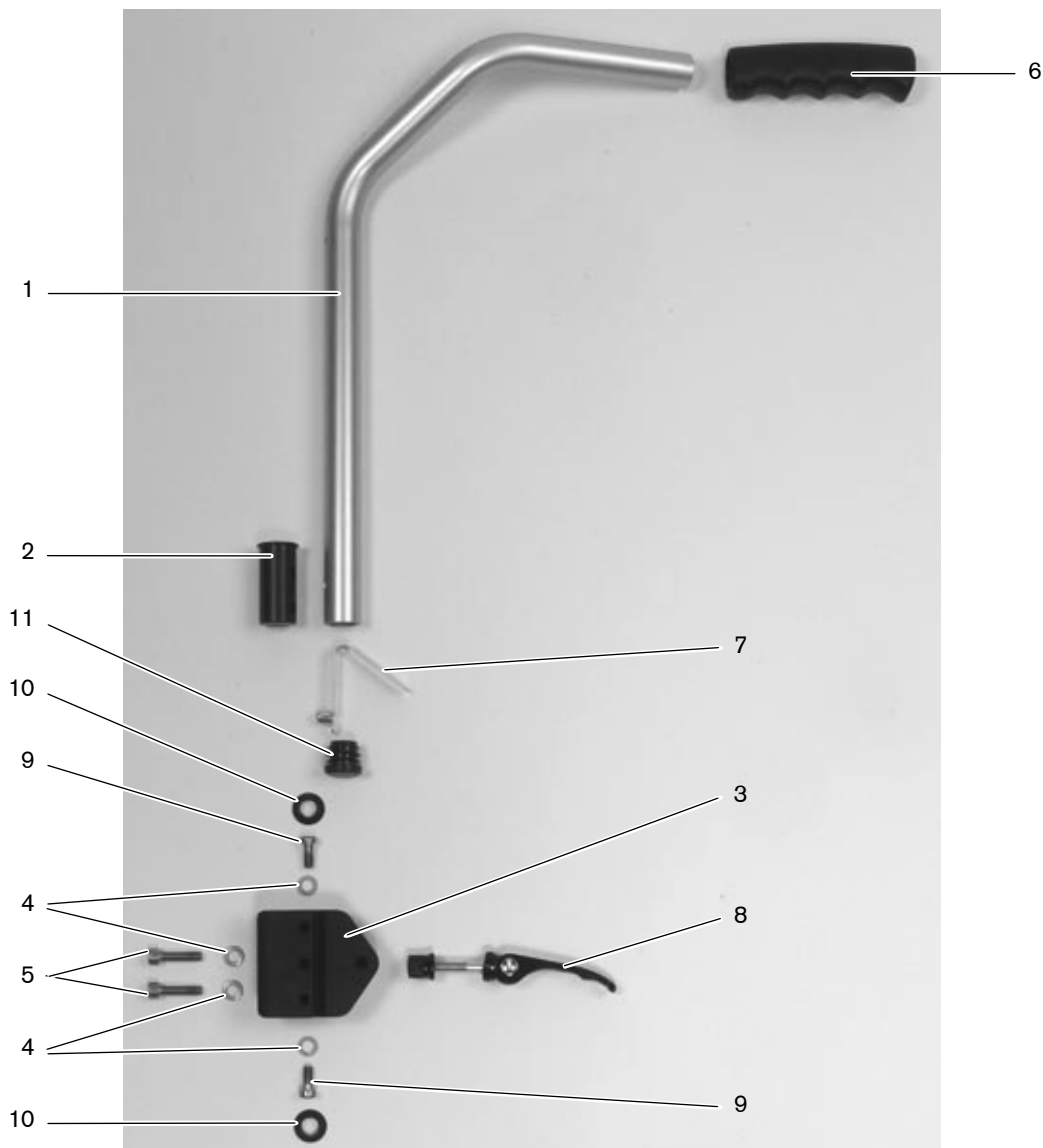

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=PK073	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt Modell Teen2	1	Paar
	481D45=LK073	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt links Modell Teen2	1	St.
	481D45=RK073	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt rechts Modell Teen2	1	St.
1	481D45=LV076	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt links (Version bis 11/03)	1	St.
1	481D45=RV076	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt rechts (Version bis 11/03)	1	St.
o. B.	481D05=LV003	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt links (Version ab 12/03)	1	St.
o. B.	481D05=RV003	Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt rechts (Version ab 12/03)	1	St.
2	481D45=SE025	Aufnahmesegment Ergo	1	St.
3	501S89=M6x25	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	2	St.
4	481D05=SE001	Griffadapter	1	St.
	481D45=SW048	Montagezubehör für Schiebegriff höhenverstellbar	1	St.
		(Einzelteile s. Seite 110 Pos. 4-11) (Version bis 11/03)		
	481D05=SW005	Montagezubehör für Schiebegriff	1	St.
		(Einzelteile s. Seite 110 Pos. 4, 5, 7-11) (Version ab 12/03)		


Hinweis: Nur für Ergo-Rücken.

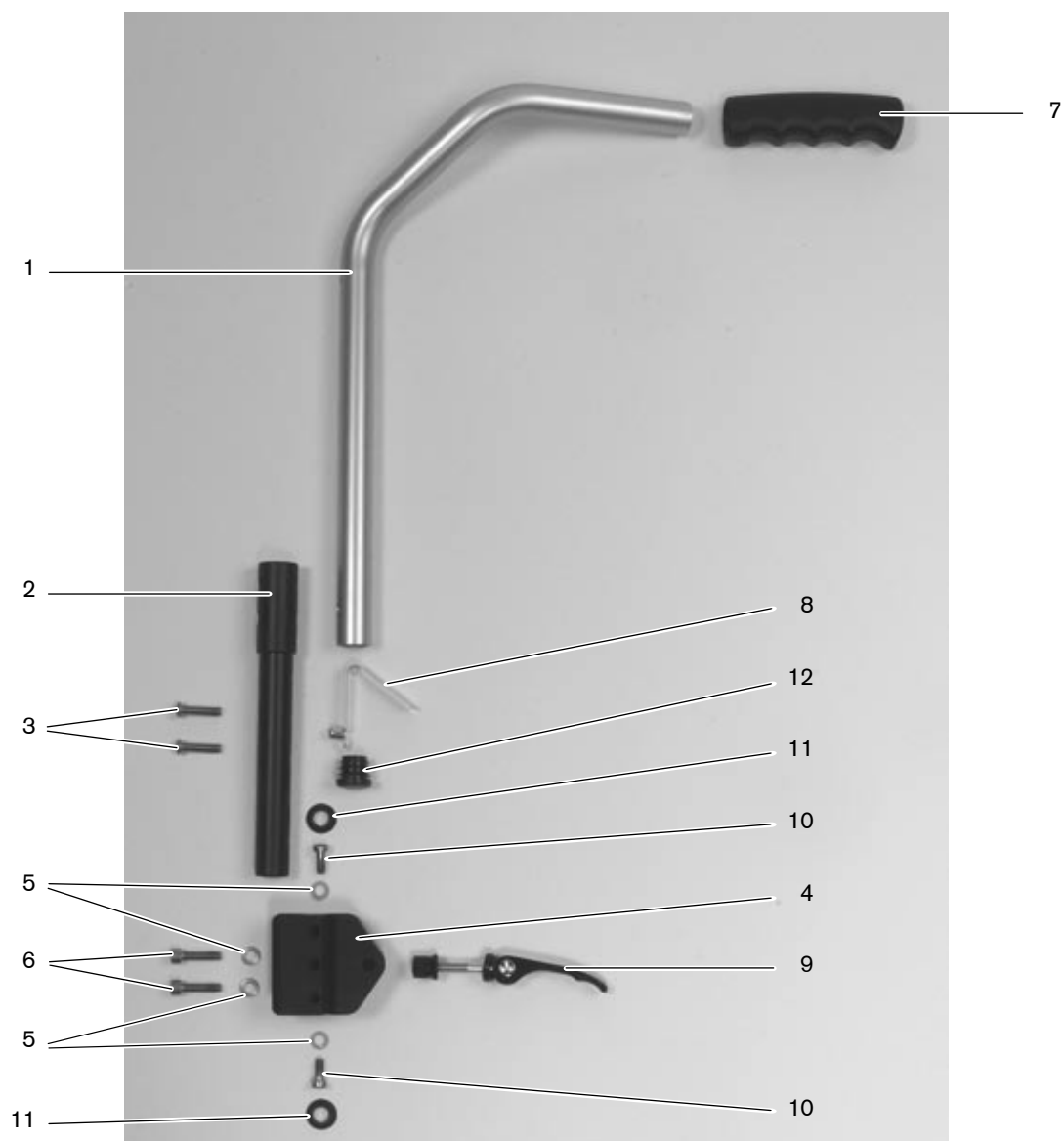


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK100	Schiebegriff standard lang Modell XXL2 (Pos. 1-7)	2	St.
	481D45=SV086	Schiebegriff standard Modell XXL2 mit Buchse (Pos. 1-3)	1	St.
1		Schiebegriff standard Modell XXL2	1	St.
2		Buchse für Schiebegriff	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	2	St.
o. B.		Delo-Duopox 1895	0,01	Pkg.
4	481D45=ST084	Schiebegriff lang mit Bohrung	1	St.
5	433A1=7	Schraubenkappe	2	St.
6	501T40=2	Zylinderschraube DIN 912, mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x28, A21	2	St.
7	507U45=15x6.2x1	Scheibe	2	St.
o. B.	481D45=ST137	Stopfen für Schiebegriff	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK130	Schiebegriff standard mit Verlängerung Modell XXL2 (Pos. 1, 3-7)	2	St.
	481D45=SV126	Schiebegriff standard Modell XXL2 mit Verlängerung (Pos. 1, 3)	1	St.
1		Schiebegriff standard Modell XXL2	1	St.
2		Buchse lang für Schiebegriff	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	2	St.
o. B.		Delo-Duopox 1895	0,01	Pkg.
4	481D45=ST084	Schiebegriff lang mit Bohrung	1	St.
5	433A1=7	Schraubenkappe	2	St.
6	501T40=2	Zylinderschraube DIN 912, mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x28, A21	2	St.
7	507U45=15x6.2x1	Scheibe	2	St.
o. B.	481D45=ST137	Stopfen für Schiebegriff	1	St.

Hinweis: Nur für Standard-Rücken.

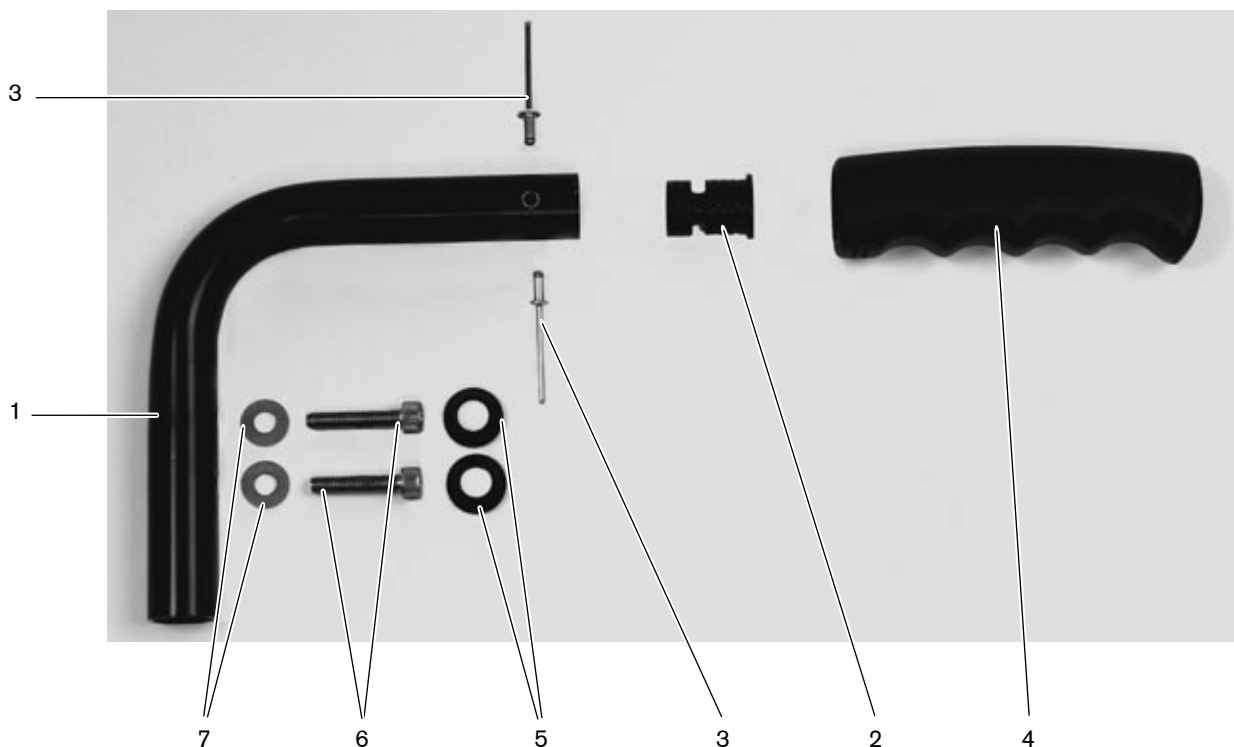

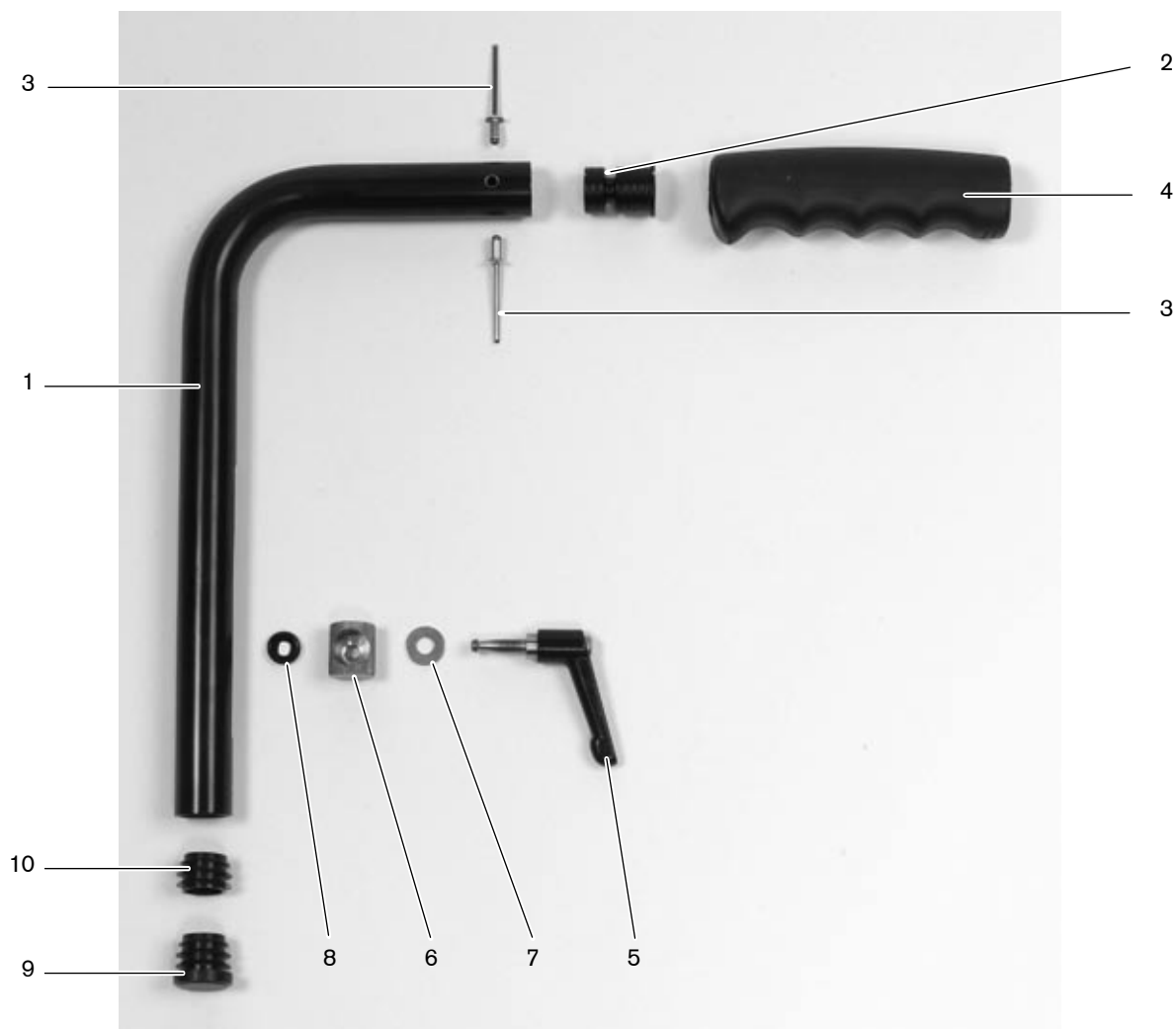

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK101	Schiebegriff lang Modell XXL2 (Pos. 1-10) (nur für Rücken standard)	2	St.
	481D45=SV087	Schiebegriff standard Modell XXL2 mit Buchse (Pos. 1-3)	1	St.
1		Schiebegriff lang Modell XXL2	1	St.
2		Buchse für Schiebegriff	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	2	St.
o. B.		Delo-Duopox 1895	0,01	Pkg.
4	481D45=ST084	Schiebegriff lang mit Bohrung	1	St.
5	481D00=ST001	Verstellbarer Klemmhebel	1	St.
6	481D00=ST003	Klemmbolzen Durchmesser 16.5	1	St.
7	507U45=16x6.2x1	Scheibe	1	St.
8	481D00=ST042	Schraubenrosette	1	St.
9	702F80=22	Lamellenstopfen	1	St.
10	481D00=ST041	Stopfen	1	St.
o. B.	481D45=ST137	Stopfen für Schiebegriff	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK102	Schiebegriff teleskopierbar lang Modell XXL2 (Pos. 1, 3-10) (nur für Ergo-Rücken)	2	St.
	481D45=SV088	Schiebegriff teleskopierbar lang Modell XXL2 (Pos. 1, 3)	1	St.
1		Schiebegriff teleskopierbar lang Modell XXL2	1	St.
2		Buchse für Schiebegriff	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	2	St.
o. B.		Delo-Duopox 1895	0,01	Pkg.
4	481D45=ST084	Schiebegriff lang mit Bohrung	1	St.
5	481D00=ST001	Verstellbarer Klemmhebel	1	St.
6	481D00=ST003	Klemmbolzen Durchmesser 16.5	1	St.
7	507U45=16x6.2x1	Scheibe	1	St.
8	481D00=ST042	Schraubenrosette	1	St.
9	702F80=22	Lamellenstopfen	1	St.
10	481D00=ST041	Stopfen	1	St.
o. B.	481D45=ST137	Stopfen für Schiebegriff	1	St.


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK131	Schiebegriff lang mit Verlängerung Modell XXL2 (Pos. 1, 3-10) (nur für Rücken standard)	2	St.
	481D45=SV127	Schiebegriff lang Modell XXL2 mit Verlängerung (Pos. 1, 3)	1	St.
1		Schiebegriff lang Modell XXL2	1	St.
o. B.		Buchse lang für Schiebegriff	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	2	St.
o. B.		Delo-Duopox 1895	0,01	Pkg.
4	481D45=ST084	Schiebegriff lang mit Bohrung	1	St.
5	481D00=ST001	Verstellbarer Klemmhebel	1	St.
6	481D00=ST003	Klemmbolzen Durchmesser 16.5	1	St.
7	507U45=16x6.2x1	Scheibe	1	St.
8	481D00=ST042	Schraubenrosette	1	St.
9	702F80=22	Lamellenstopfen	1	St.
10	481D00=ST041	Stopfen	1	St.
o. B.	481D45=ST137	Stopfen für Schiebegriff	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK132	Schiebegriff teleskopierbar lang mit Verlängerung Modell XXL2 (Pos. 1, 3-9) (nur für Ergo-Rücken)	2	St.
	481D45=SV127	Schiebegriff teleskopierbar lang Modell XXL2 mit Verlängerung (Pos. 1, 3)	1	St.
1		Schiebegriff teleskopierbar lang Modell XXL2	1	St.
2		Buchse lang für Schiebegriff	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	2	St.
o. B.		Delo-Duopox 1895	0,01	Pkg.
4	481D45=ST084	Schiebegriff lang mit Bohrung	1	St.
5	481D00=ST001	Verstellbarer Klemmhebel	1	St.
6	481D00=ST003	Klemmbolzen Durchmesser 16.5	1	St.
7	507U45=16x6.2x1	Scheibe	1	St.
8	481D00=ST042	Schraubenrosette	1	St.
9	702F80=22	Lamellenstopfen	1	St.
10	481D00=ST041	Stopfen	1	St.
o. B.	481D45=ST137	Stopfen für Schiebegriff	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK103	Schiebegriff abnehmbar Modell XXL2 (Pos. 1-13)	2	St.
	481D45=SV089	Schiebegriff abnehmbar Modell XXL2 mit Buchse (Pos. 1-3)	1	St.
1		Schiebegriff abnehmbar Modell XXL2	1	St.
2		Buchse für Schiebegriff	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	2	St.
o. B.		Delo-Duopox 1895	0,01	Pkg.
4	481D05=SE002	Buchse für Griffadapter	1	St.
5	481D05=SE001	Griffadapter	1	St.
	481D45=SW138	Montagezubehör für Schiebegriff Modell XXL2 (Pos. 6-13)	1	St.
6		Scheibe DIN 125, A2	4	St.
7		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x25, A2	2	St.
8		Schiebegriff lang mit Bohrung	1	St.
9		Stativfeder	1	St.
10		Schnellspannhebel	1	St.
11		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x14, A2	2	St.
12		Rosette für DIN 6912, M6	2	St.
13		Lamellenstopfen	1	St.
o. B.		Stopfen für Schiebegriff	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK133	Schiebegriff abnehmbar mit Verlängerung Modell XXL2 (Pos. 1, 3-13)	2	St.
	481D45=SV129	Schiebegriff abnehmbar mit Verlängerung Modell XXL2 (Pos. 1, 3)	1	St.
1		Schiebegriff abnehmbar Modell XXL2	1	St.
o. B.		Buchse lang für Schiebegriff	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	2	St.
o. B.		Delo-Duopox 1895	0,01	Pkg.
4	481D05=SE002	Buchse für Griffadapter	1	St.
5	481D05=SE001	Griffadapter	1	St.
	481D45=SW138	Montagezubehör für Schiebegriff Modell XXL2 (Pos. 6-13)	1	St.


Hinweis: Nur für Standard-Rücken.

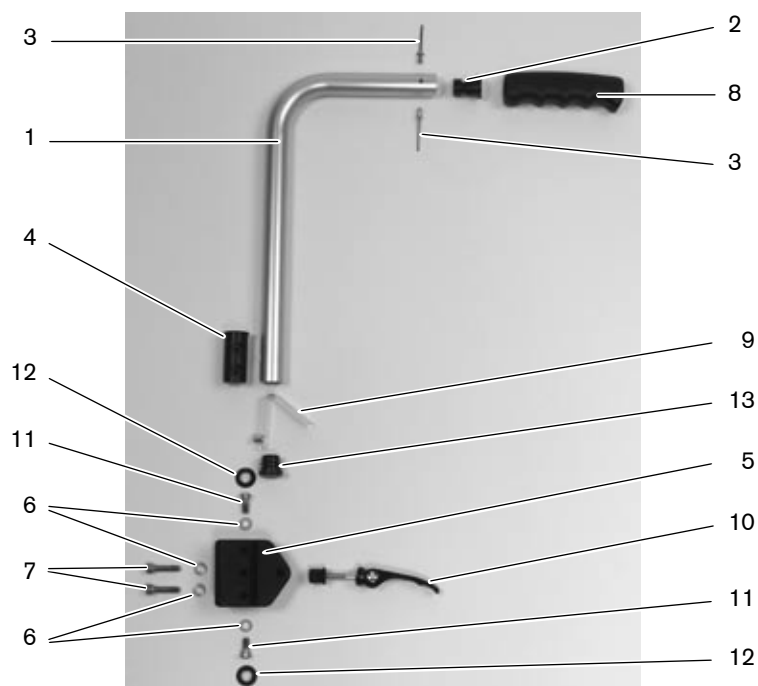

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK104	Schiebegriff abnehmbar Modell XXL2 (Pos. 1-14)	2	St.
	481D45=SV089	Schiebegriff abnehmbar Modell XXL2 mit Buchse (Pos. 1-3)	1	St.
1		Schiebegriff abnehmbar Modell XXL2	1	St.
2		Buchse für Schiebegriff	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	2	St.
o. B.		Delo-Duopox 1895	0,01	Pkg.
4	481D45=SE025	Aufnahmesegment Ergo	1	St.
5	501S89=M6x25	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	2	St.
6	481D05=SE001	Griffadapter	1	St.
	481D45=SW138	Montagezubehör für Schiebegriff Modell XXL2 (Pos. 7-14, Einzelteile s. Seite 117 Pos. 6-13)	1	St.


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK134	Schiebegriff abnehmbar mit Verlängerung Modell XXL2 (Pos. 1, 3-14)	2	St.
	481D45=SV129	Schiebegriff abnehmbar mit Verlängerung Modell XXL2 (Pos. 1-3)	1	St.
1		Schiebegriff abnehmbar Modell XXL2	1	St.
o. B.		Buchse lang für Schiebegriff	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	2	St.
o. B.		Delo-Duopox 1895	0,01	Pkg.
4	481D45=SE025	Aufnahmesegment Ergo	1	St.
5	501S89=M6x25	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	2	St.
6	481D05=SE001	Griffadapter	1	St.
	481D45=SW138	Montagezubehör für Schiebegriff Modell XXL2 (Pos. 7-14, Einzelteile s. Seite 117 Pos. 6-13)	1	St.

Hinweis: Nur für Ergo-Rücken.

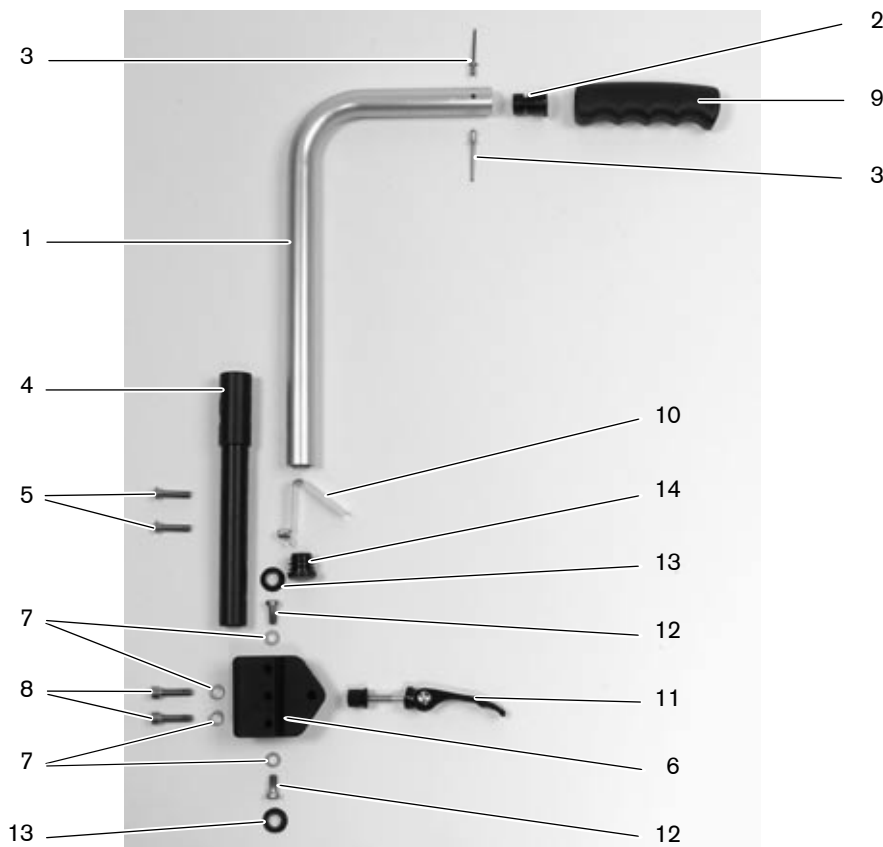


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK095	Stabilisierungsstange Modell XXL2 (Pos. 1-9)	1	St.
	481D45=SV112	Rohr für Stabilisierungsstange SB50, vormontiert (Pos. 1-7)	1	St.
	481D45=SV113	Rohr für Stabilisierungsstange SB52, vormontiert (Pos. 1-7)	1	St.
	481D45=SV114	Rohr für Stabilisierungsstange SB54, vormontiert (Pos. 1-7)	1	St.
	481D45=SV115	Rohr für Stabilisierungsstange SB56, vormontiert (Pos. 1-7)	1	St.
	481D45=SV116	Rohr für Stabilisierungsstange SB58, vormontiert (Pos. 1-7)	1	St.
	481D45=SV117	Rohr für Stabilisierungsstange SB60, vormontiert (Pos. 1-7)	1	St.
	481D45=SV118	Rohr für Stabilisierungsstange SB62, vormontiert (Pos. 1-7)	1	St.
1		Rohr für Stabilisierungsstange SB50	1	St.
1		Rohr für Stabilisierungsstange SB52	1	St.
1		Rohr für Stabilisierungsstange SB54	1	St.
1		Rohr für Stabilisierungsstange SB56	1	St.
1		Rohr für Stabilisierungsstange SB58	1	St.
1		Rohr für Stabilisierungsstange SB60	1	St.
1		Rohr für Stabilisierungsstange SB62	1	St.
2		Aufnahme für Sterngriffschraube	1	St.
3		Buchse für Schiebestange	1	St.
4		Blindniet DIN 7337	4	St.
5		Augenschraube DIN444, schwarz	1	St.
6		Sechskantmutter DIN 934, schwarz verzinkt	1	St.
7		Schaumstoffgriff 430 mm für SB50	1	St.
7		Schaumstoffgriff 450 mm für SB52	1	St.
7		Schaumstoffgriff 470 mm für SB54	1	St.
7		Schaumstoffgriff 490 mm für SB56	1	St.
7		Schaumstoffgriff 510 mm für SB58	1	St.
7		Schaumstoffgriff 530 mm für SB60	1	St.
7		Schaumstoffgriff 550 mm für SB62	1	St.
8	501Z14=40-M8x40	Sterngriffschraube	2	St.
9	481D45=ST093	Distanzscheibe	1	St.

Hinweis: Nicht möglich in Verbindung mit Schiebegriffen kurz bzw. teleskopierbar kurz.

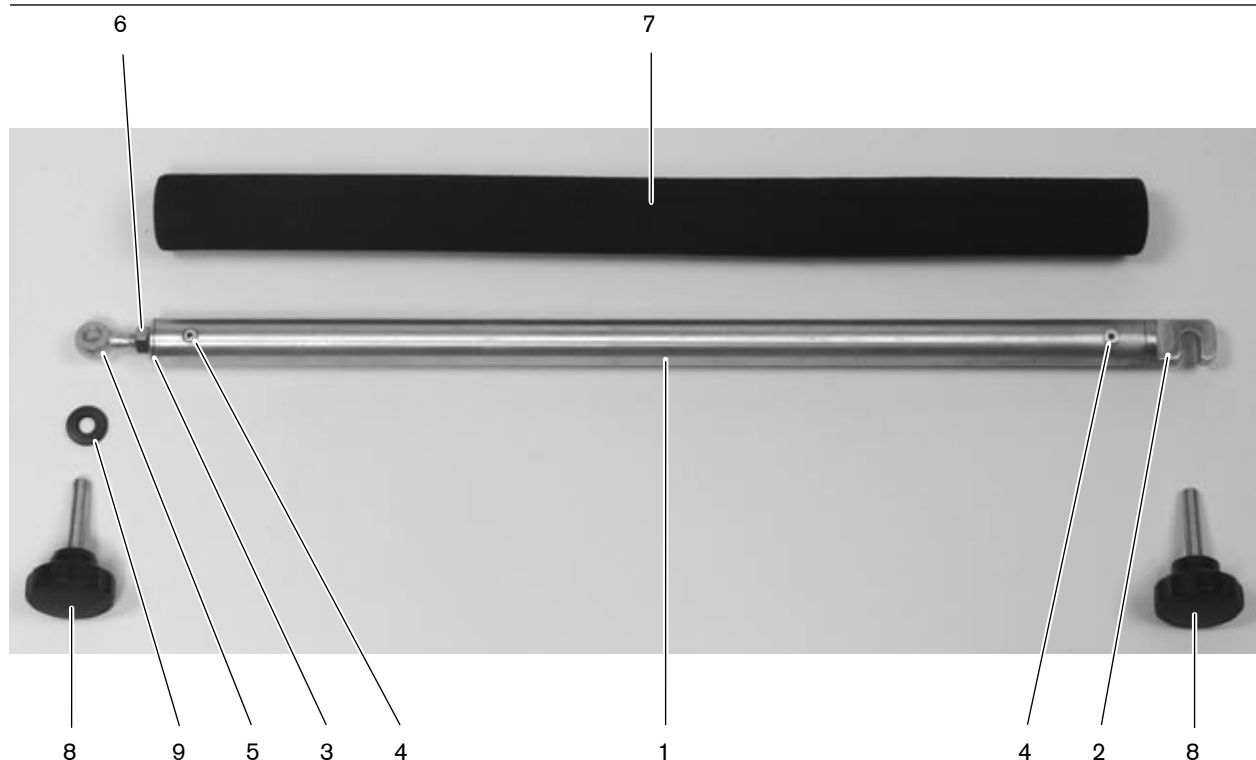


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK072	Rücken standard Modell Teen2 RH17,5-27,5 (Pos. 1-5)	2	St.
	481D45=SK001	Rücken standard Modell T, VR, Teen2 und XXL2 RH25-35 (Pos. 1-5)	2	St.
	481D45=SK002	Rücken standard Modell T, VR, Teen2 und XXL2 RH30-40 (Pos. 1-5)	2	St.
	481D45=SK022	Rücken standard Modell T, VR und XXL2 RH37,5-47,5 (Pos. 1-5)	2	St.
1	481D45=SS074	Rücken standard RH17,5-27,5	1	St.
1	481D45=SS001	Rücken standard RH25-35	1	St.
1	481D45=SS002	Rücken standard RH30-40	1	St.
1	481D45=SS022	Rücken standard RH37,5-47,5	1	St.
2	501S89=M6x40	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	2	St.
3	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
4	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	2	St.
5	481G00=ST006	Sechskantschutzkappe für M6	2	St.

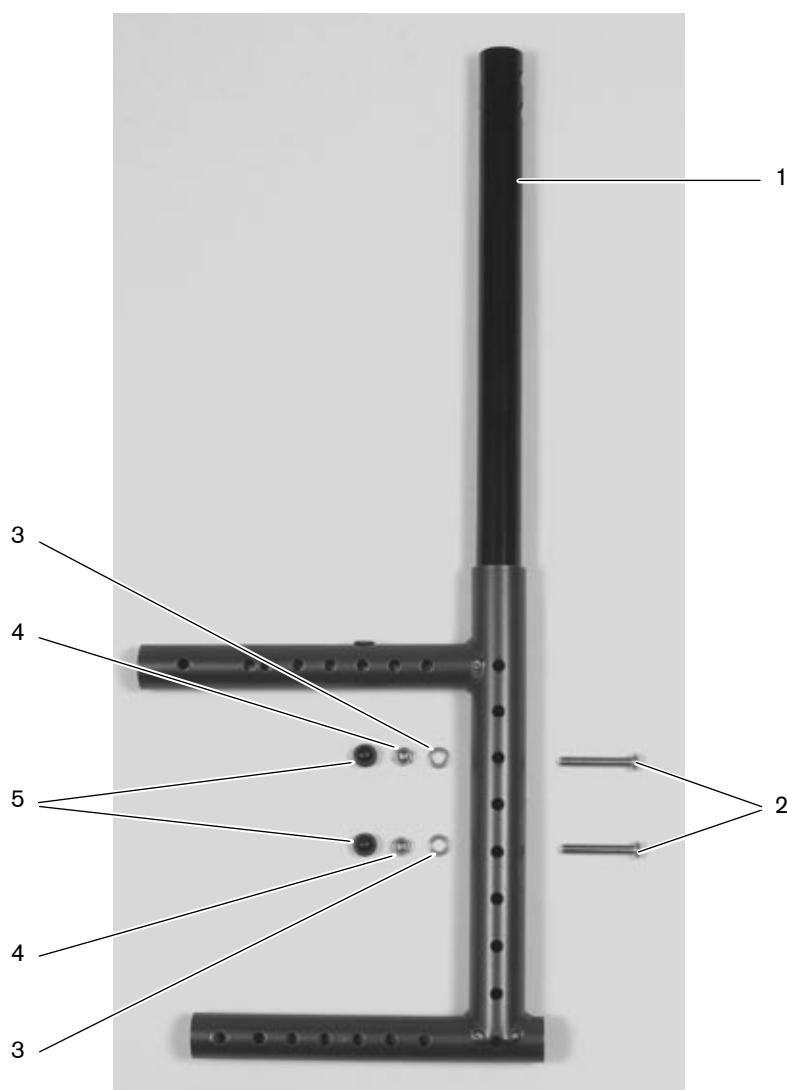


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK045	Rücken standard Modell Ti 8.9 (Pos. 1-5)	2	St.
		Rückenhöhe:		
		Rahmenfarbe:		
1	481D45=SB027	Rücken standard RH25, bunt beschichtet*	1	St.
1	481D45=SB028	Rücken standard RH27,5, bunt beschichtet*	1	St.
1	481D45=SB029	Rücken standard RH30, bunt beschichtet*	1	St.
1	481D45=SB031	Rücken standard RH32,5, bunt beschichtet*	1	St.
1	481D45=SB032	Rücken standard RH35, bunt beschichtet*	1	St.
1	481D45=SB033	Rücken standard RH37,5, bunt beschichtet*	1	St.
1	481D45=SB034	Rücken standard RH40, bunt beschichtet*	1	St.
1	481D45=SB039	Rücken standard RH42,5, bunt beschichtet*	1	St.
1	481D45=SB040	Rücken standard RH45, bunt beschichtet*	1	St.
1	481D45=SB041	Rücken standard RH47,5, bunt beschichtet*	1	St.
1	481D45=SP027	Rücken standard RH25, poliert	1	St.
1	481D45=SP028	Rücken standard RH27,5, poliert	1	St.
1	481D45=SP029	Rücken standard RH30, poliert	1	St.
1	481D45=SP031	Rücken standard RH32,5, poliert	1	St.
1	481D45=SP032	Rücken standard RH35, poliert	1	St.
1	481D45=SP033	Rücken standard RH37,5, poliert	1	St.
1	481D45=SP034	Rücken standard RH40, poliert	1	St.
1	481D45=SP039	Rücken standard RH42,5, poliert	1	St.
1	481D45=SP040	Rücken standard RH45, poliert	1	St.
1	481D45=SP041	Rücken standard RH47,5, poliert	1	St.
2	501T69=M6X40	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
3	507U64=6.4	Scheibe DIN 125, Aluminium	2	St.
4	502S44=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, Aluminium	2	St.
5	481G00=ST006	Sechskantschutzkappe für M6	2	St.

* Rahmenfarbe:

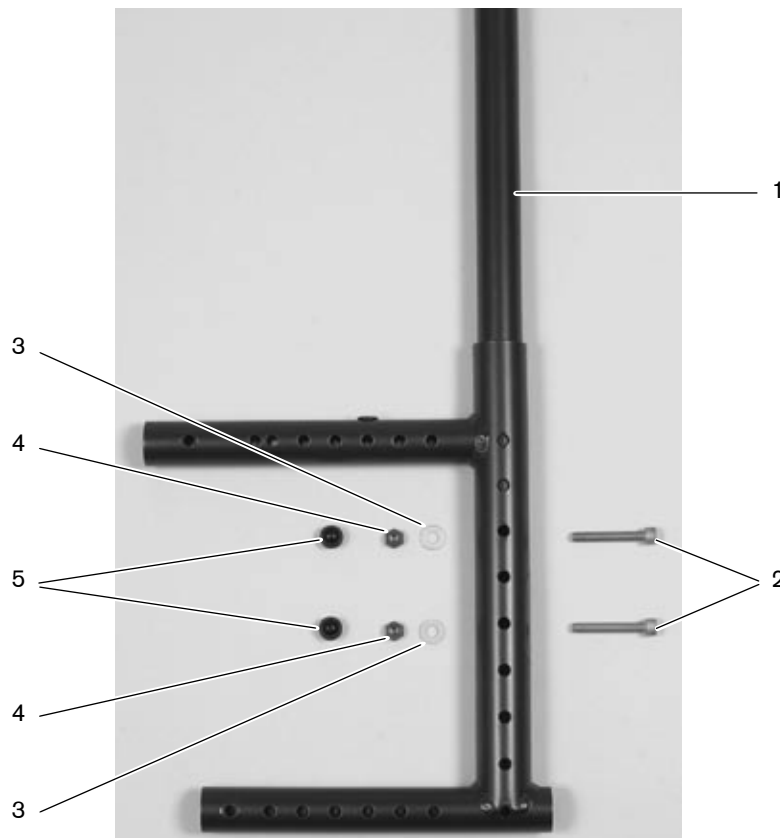

D

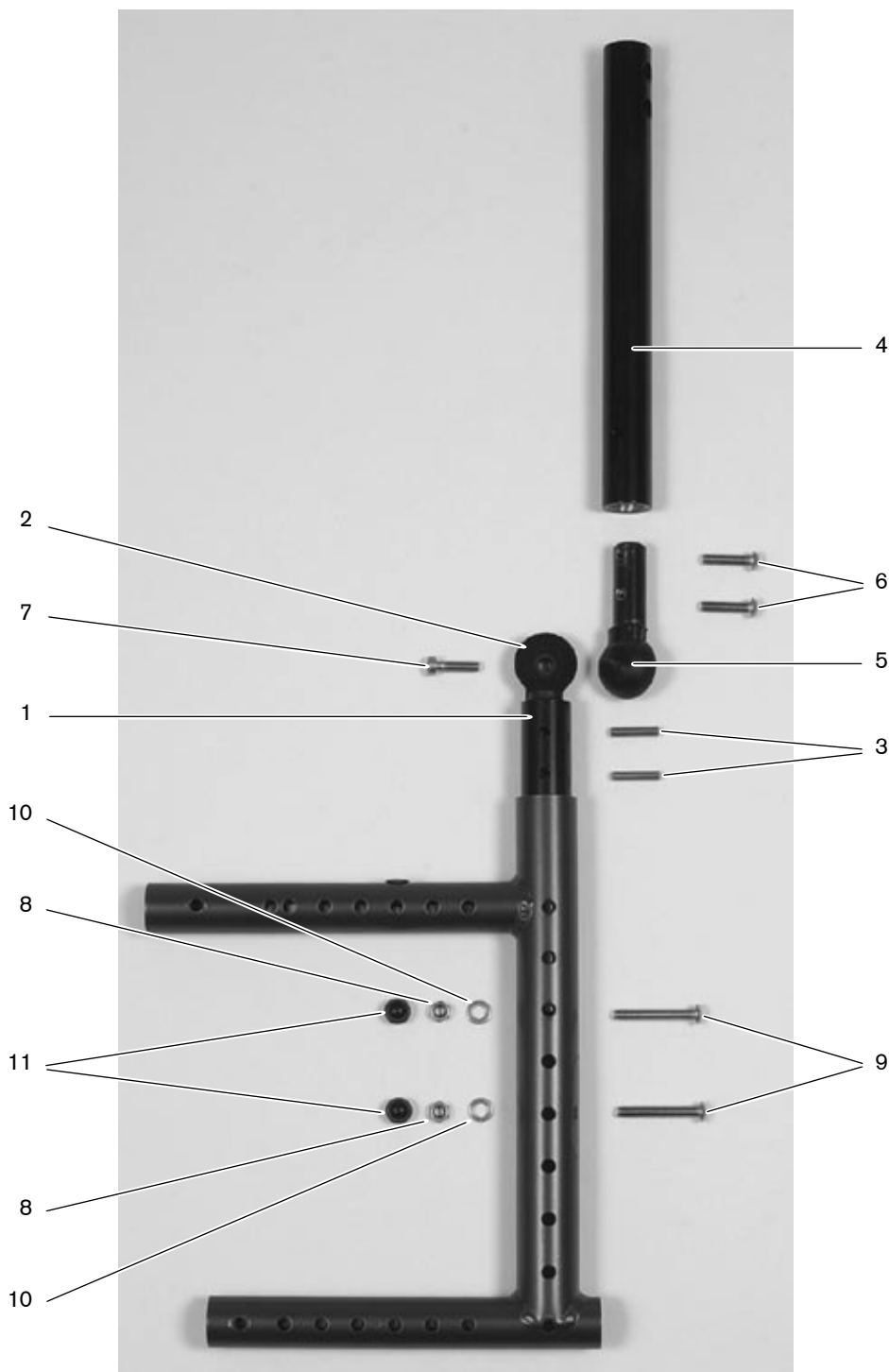


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK017	Ergo-Rücken RH30-40 Modell T, VR, Teen2 und XXL2 incl. Schiebegriffe (Pos. 1-11)*	2	St.
	481D45=SK019	Ergo-Rücken RH35-45 Modell T, VR und XXL2 incl. Schiebegriffe (Pos. 1-11)*	2	St.
	481D45=SK021	Ergo-Rücken RH40-50 Modell T, VR und XXL2 incl. Schiebegriffe (Pos. 1-11)*	2	St.


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SV017	Ergo-Rücken RH30-40 Modell T, VR, Teen2 und XXL2 (Pos. 1-11)*	1	St.
	481D45=SV019	Ergo-Rücken RH35-45 Modell T, VR und XXL2 (Pos. 1-11)*	1	St.
	481D45=SV021	Ergo-Rücken RH40-50 Modell T, VR und XXL2 (Pos. 1-11)*	1	St.
1	481D45=SV015	Rückenrohraufnahme Ergo	1	St.
2	481D45=SZ043	Rastengelenk mit Bohrung	1	St.
3	506A22=5x10	Passkerbstift ISO 8745	4	St.
4	481D45=SV016	Rückenrohraufnahme Ergo RH30-40	1	St.
4	481D45=SV018	Rückenrohraufnahme Ergo RH35-45	1	St.
4	481D45=SV020	Rückenrohraufnahme Ergo RH40-50	1	St.
5	481D45=SZ044	Rastengelenk mit Gewinde	1	St.
6	501S89=M6x25	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	2	St.
7	501T35=M6x20	Zylinderschraube DIN 912, A2	1	St.
8	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	3	St.
9	501S89=M6x25	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	2	St.
10	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
11	481G00=ST006	Sechskantschutzhülse für M6	2	St.
	481D08=SK003	Schiebegriff höhenverstellbar kurz Modell T, VR, Teen2 und XXL2 (Einzelteile s. Seite 108 Pos. 1-8)	1	St.
	481D08=SK001	Schiebegriff höhenverstellbar lang Modell T, VR und Teen2 (Einzelteile s. Seite 109 Pos. 1-8)	1	St.
	481D08=SK101	Schiebegriff höhenverstellbar lang Modell XXL2 (Einzelteile s. Seite 115, 116 Pos. 1-10)	1	St.
Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK047	Ergo-Rücken RH30-40 Modell Ti 8.9 incl. Schiebegriffe (Pos. 1-7, 11)*	2	St.
	481D45=SK049	Ergo-Rücken RH35-45 Modell Ti 8.9 incl. Schiebegriffe (Pos. 1-7, 11)*	2	St.
	481D45=SK051	Ergo-Rücken RH40-50 Modell Ti 8.9 incl. Schiebegriffe (Pos. 1-7, 11)*	2	St.
	481D45=SV047	Ergo-Rücken RH30-40 Modell Ti 8.9 (Pos. 1-7, 11)	1	St.
	481D45=SV049	Ergo-Rücken RH35-45 Modell Ti 8.9 (Pos. 1-7, 11)	1	St.
	481D45=SV051	Ergo-Rücken RH40-50 Modell Ti 8.9 (Pos. 1-7, 11)	1	St.
1	481D45=SV015	Rückenrohraufnahme Ergo	1	St.
2	481D45=SZ043	Rastengelenk mit Bohrung	1	St.
3	506A22=5x10	Passkerbstift ISO 8745	4	St.
4	481D45=SV016	Rückenrohraufnahme Ergo RH30-40	1	St.
4	481D45=SV018	Rückenrohraufnahme Ergo RH35-45	1	St.
4	481D45=SV020	Rückenrohraufnahme Ergo RH40-50	1	St.
5	481D45=SZ044	Rastengelenk mit Gewinde	1	St.
6	501S89=M6x25	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	2	St.
7	501T35=M6x20	Zylinderschraube DIN 912, A2	1	St.
o. B.	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
o. B.	501T69=M6x25	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
o. B.	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, Aluminium	2	St.
o. B.	502S44=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, Aluminium	2	St.
11	481G00=ST006	Sechskantschutzhülse für M6	2	St.
	481D08=SK003	Schiebegriff höhenverstellbar kurz Modell Ti 8.9 (Einzelteile s. Seite 108 Pos. 1-8)	1	St.
	481D08=SK001	Schiebegriff höhenverstellbar lang Modell Ti 8.9 (Einzelteile s. Seite 109 Pos. 1-8)	1	St.

* Bitte Schiebegriffvariante angeben!


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481D00=SK315	Rückenbespannung anpassbar für Standard-Rücken Modell T, VR und XXL2 (incl. Pos. 2-5) Sitzbreite: Rückenhöhe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481D00=ST329	Schlaufe für Rückenbespannung 38 mm breit		St.
3	481D00=ST330	Gurtband für Rückenbespannung 38 mm breit Sitzbreite:		St.
4	481D00=ST326	Schlaufe für Rückenbespannung 50 mm breit	1	St.
5	481D00=ST327	Gurtband für Rückenbespannung 50 mm breit Sitzbreite:	1	St.
o. B.	623Z14=1002x25	Klettverschluss Flausch selbstklebend	0,18	m

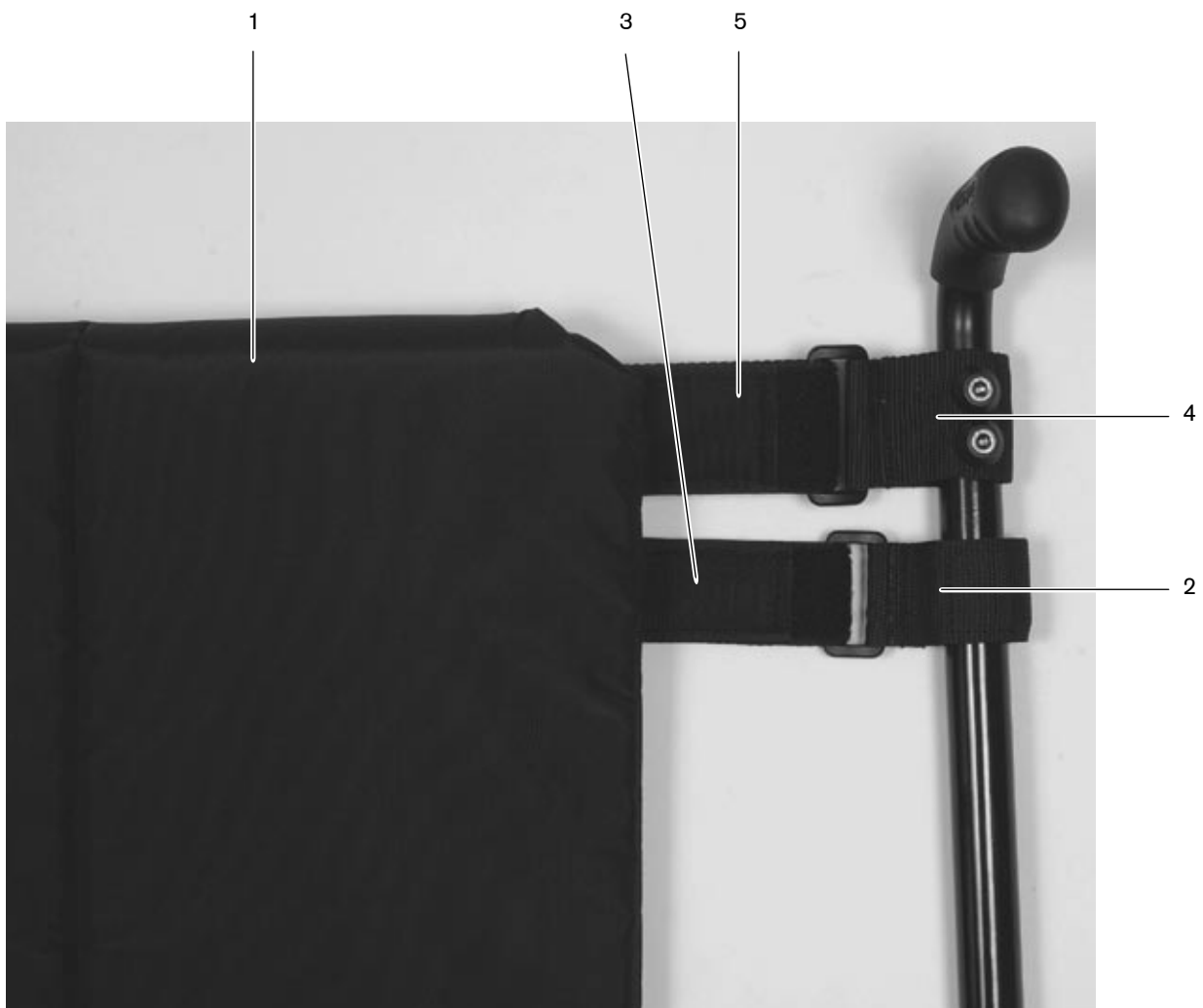


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D00=SK320	Rückenbespannung anpassbar für Ergo-Rücken Modell T, VR und XXL2 (Pos. 1-7) Sitzbreite: Rückenhöhe: Bespannungsfarbe:	1	St.
1	481D00=SK315	Rückenbespannung anpassbar Modell T, VR und XXL2 (incl. Pos. 2-5) Sitzbreite: Rückenhöhe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481D00=ST329	Schlaufe für Rückenbespannung 38 mm breit		St.
3	481D00=ST330	Gurtband für Rückenbespannung 38 mm breit Sitzbreite:		St.
4	481D00=ST326	Schlaufe für Rückenbespannung 50 mm breit	1	St.
5	481D00=ST327	Gurtband für Rückenbespannung 50 mm breit Sitzbreite:	1	St.
	481D00=ST321	Gurt für Höhenverstellung (Pos. 6, 7) Sitzbreite:	1	St.
6	481D00=ST322	Schlaufe für Höhenverstellung 50 breit	1	St.
7	481D00=ST324	Gurtband für Höhenverstellung 50 breit Sitzbreite:	1	St.
o. B.	623Z14=1002x25	Klettverschluss Flausch selbstklebend	0,18	m

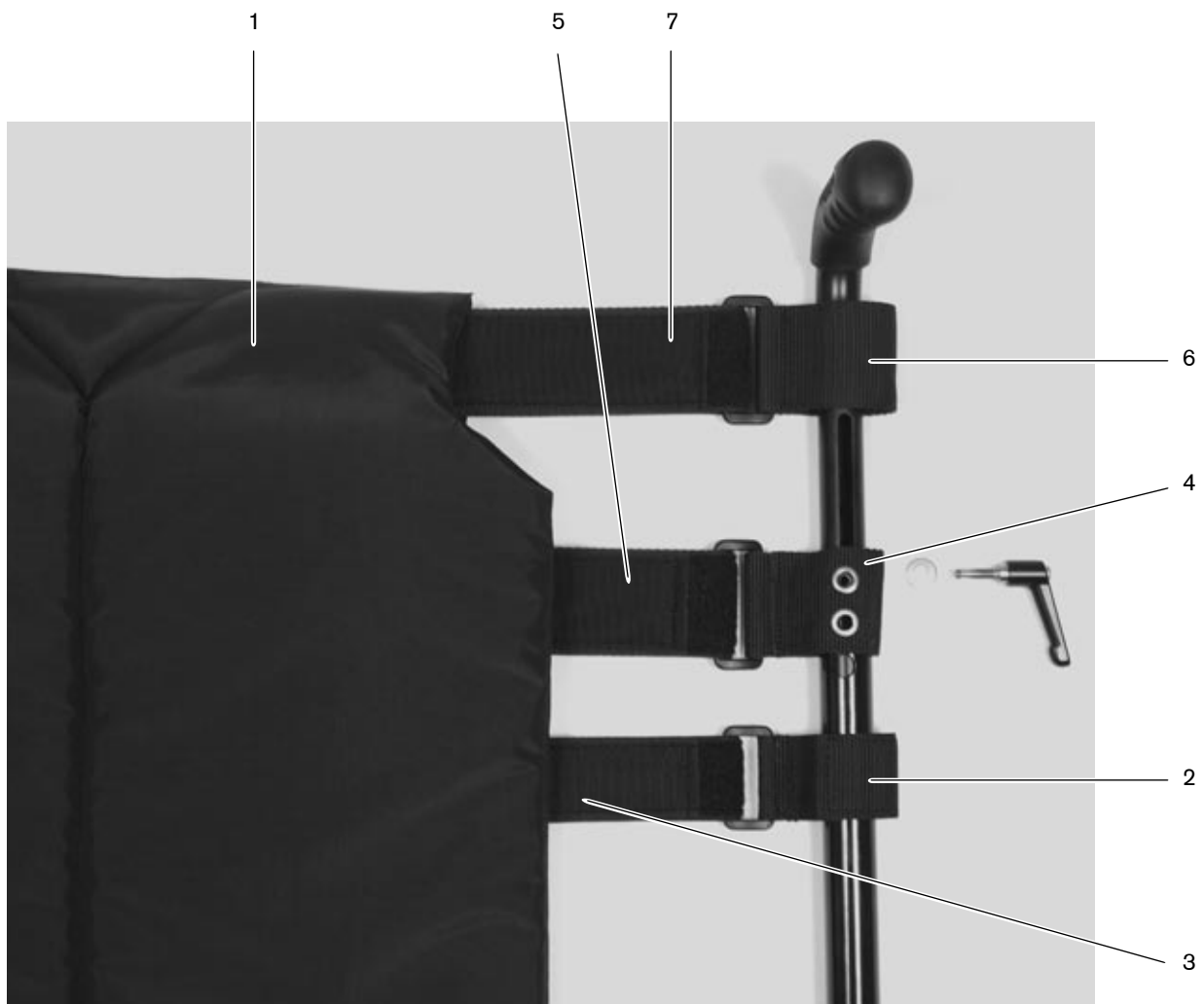


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481D45=SK055	Rückenbespannung anpassbar für Anbau Schiebegriffe höhenverstellbar abnehmbar Modell T, VR und XXL2 (incl. Pos. 2-5) Sitzbreite: Rückenhöhe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481D00=ST329	Schlaufe für Rückenbespannung 38 mm breit		St.
3	481D00=ST330	Gurtband für Rückenbespannung 38 mm breit Sitzbreite:		St.
4	481D00=ST331	Gurtband mit Schnalle 50 mm breit	1	St.
5	481D00=ST328	Gurtband für Rückenbespannung bei Anbau Schiebegriffe höhenverstellbar abnehmbar 50 mm breit Sitzbreite:	1	St.
o. B.	623Z14=1002x25	Klettverschluss Flausch selbstklebend	0,18	m

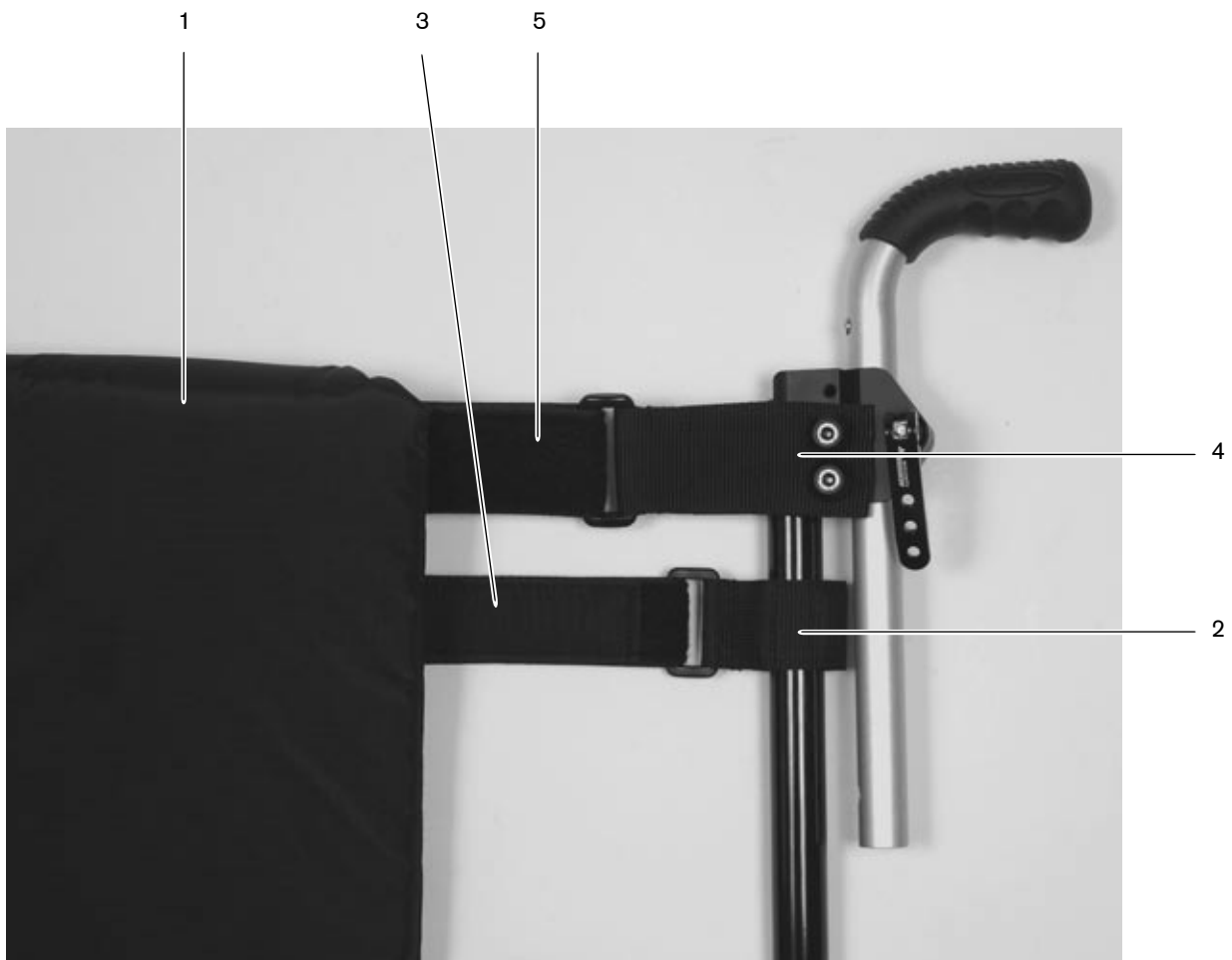


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481D45=SK050	Rückenbespannung anpassbar für Standard-Rücken Modell Ti 8.9 (incl. Pos. 2-5) Sitzbreite: Rückenhöhe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481D00=ST329	Schlaufe für Rückenbespannung 38 mm breit		St.
3	481D00=ST330	Gurtband für Rückenbespannung 38 mm breit Sitzbreite:		St.
4	481D00=ST326	Schlaufe für Rückenbespannung 50 mm breit	1	St.
5	481D00=ST327	Gurtband für Rückenbespannung 50 mm breit Sitzbreite:	1	St.
o. B.	623Z14=1002x25	Klettverschluss Flausch selbstklebend	0,18	m

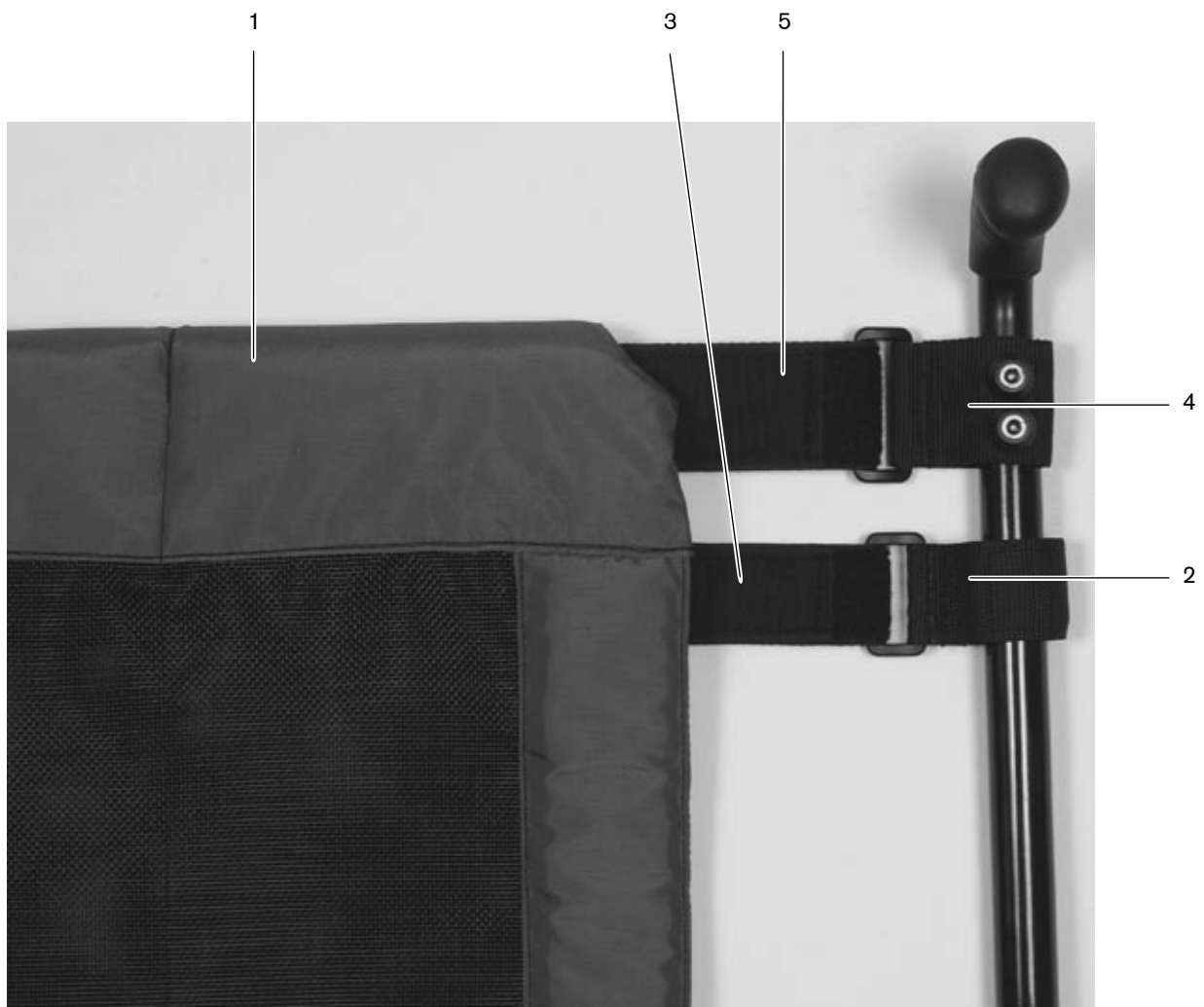


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK075	Rückenbespannung anpassbar für Ergo-Rücken Modell Ti 8.9 (Pos. 1-7) Sitzbreite: Rückenhöhe: Bespannungsfarbe:	1	St.
1	481D45=SK050	Rückenbespannung anpassbar Modell Ti 8.9 (incl. Pos. 2-5) Sitzbreite: Rückenhöhe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481D00=ST329	Schlaufe für Rückenbespannung 38 mm breit		St.
3	481D00=ST330	Gurtband für Rückenbespannung 38 mm breit Sitzbreite:		St.
4	481D00=ST326	Schlaufe für Rückenbespannung 50 mm breit	1	St.
5	481D00=ST327	Gurtband für Rückenbespannung 50 mm breit Sitzbreite:	1	St.
	481D00=ST321	Gurt für Höhenverstellung (Pos. 6, 7) Sitzbreite:	1	St.
6	481D00=ST322	Schlaufe für Höhenverstellung 50 mm breit	1	St.
7	481D00=ST324	Gurtband für Höhenverstellung 50 mm breit Sitzbreite:	1	St.
o. B.	623Z14=1002x25	Klettverschluss Flausch selbstklebend	0,18	m

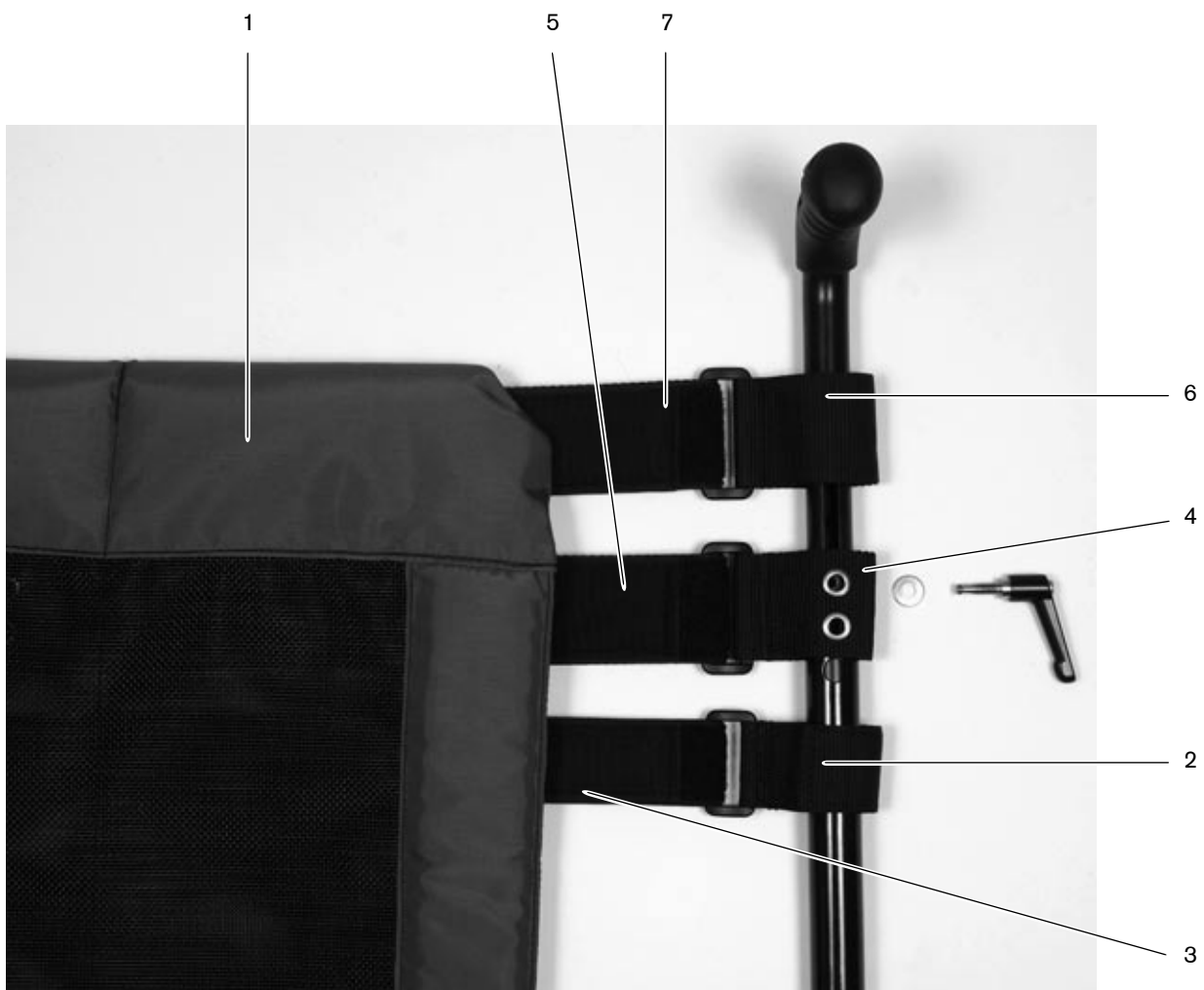

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481D45=SK080	Rückenbespannung anpassbar für Anbau Schiebegriffe höhenverstellbar abnehmbar Modell Ti 8.9 (incl. Pos. 2-5) Sitzbreite: Rückenhöhe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481D00=ST329	Schlaufe für Rückenbespannung 38 mm breit		St.
3	481D00=ST330	Gurtband für Rückenbespannung 38 mm breit Sitzbreite:		St.
4	481D00=ST331	Gurtband mit Schnalle 50 mm breit	1	St.
5	481D00=ST328	Gurtband für Rückenbespannung bei Anbau Schiebegriffe höhenverstellbar abnehmbar 50 mm breit Sitzbreite:	1	St.
o. B.	623Z14=1002x25	Klettverschluss Flausch selbstklebend	0,18	m

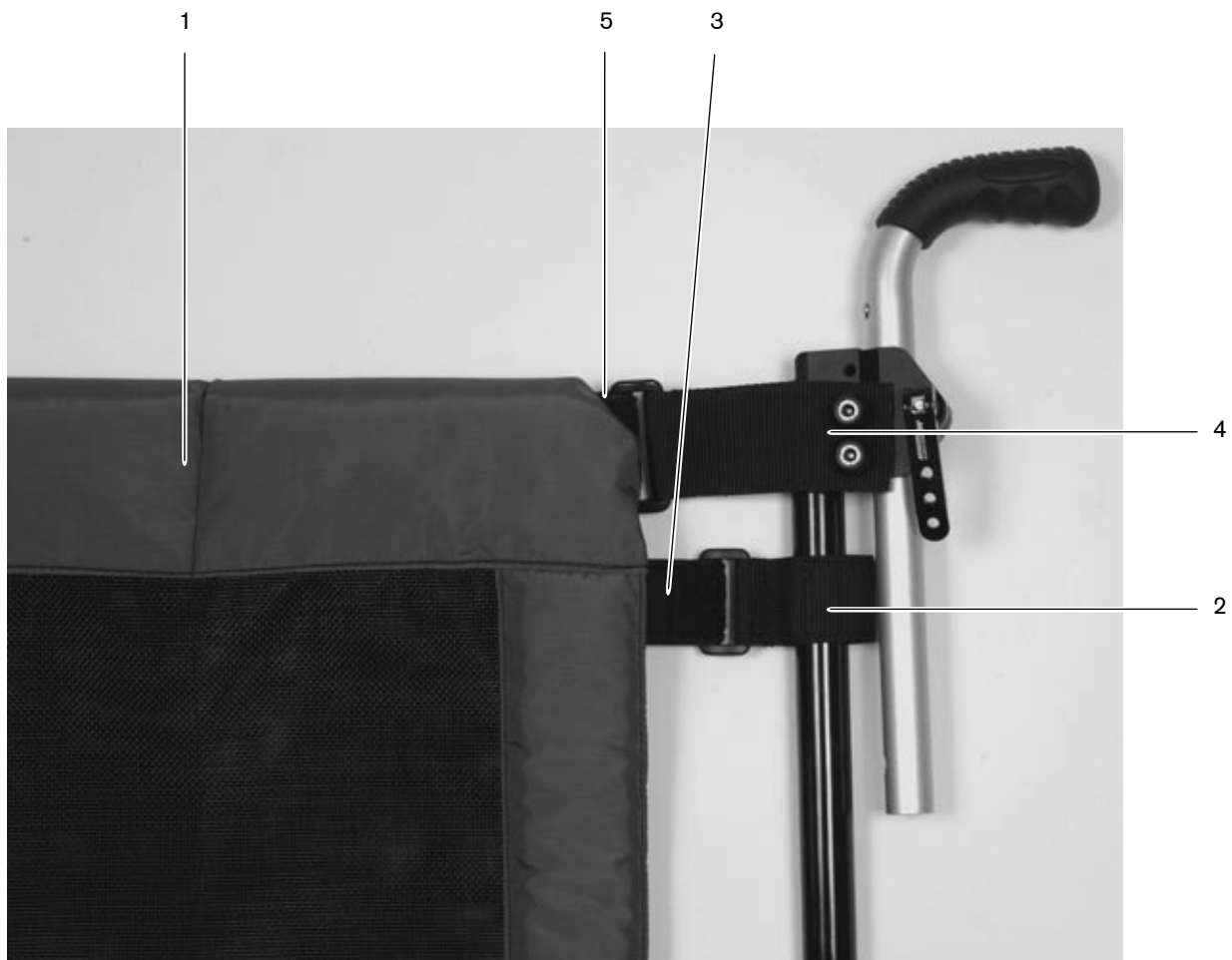


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481D45=SK085	Rückenbespannung anpassbar incl. Rückentasche für Standard-Rücken Modell Teen2 (incl. Pos. 2-5) Sitzbreite: Rückenhöhe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481D00=ST329	Schlaufe für Rückenbespannung 38 mm breit		St.
3	481D00=ST330	Gurtband für Rückenbespannung 38 mm breit Sitzbreite:		St.
4	481D00=ST326	Schlaufe für Rückenbespannung 50 mm breit	1	St.
5	481D00=ST327	Gurtband für Rückenbespannung 50 mm breit Sitzbreite:	1	St.
o. B.	623Z14=1002x25	Klettverschluss Flausch selbstklebend	0,18	m
Hinweis: Rückentasche erst ab SB26 möglich.				

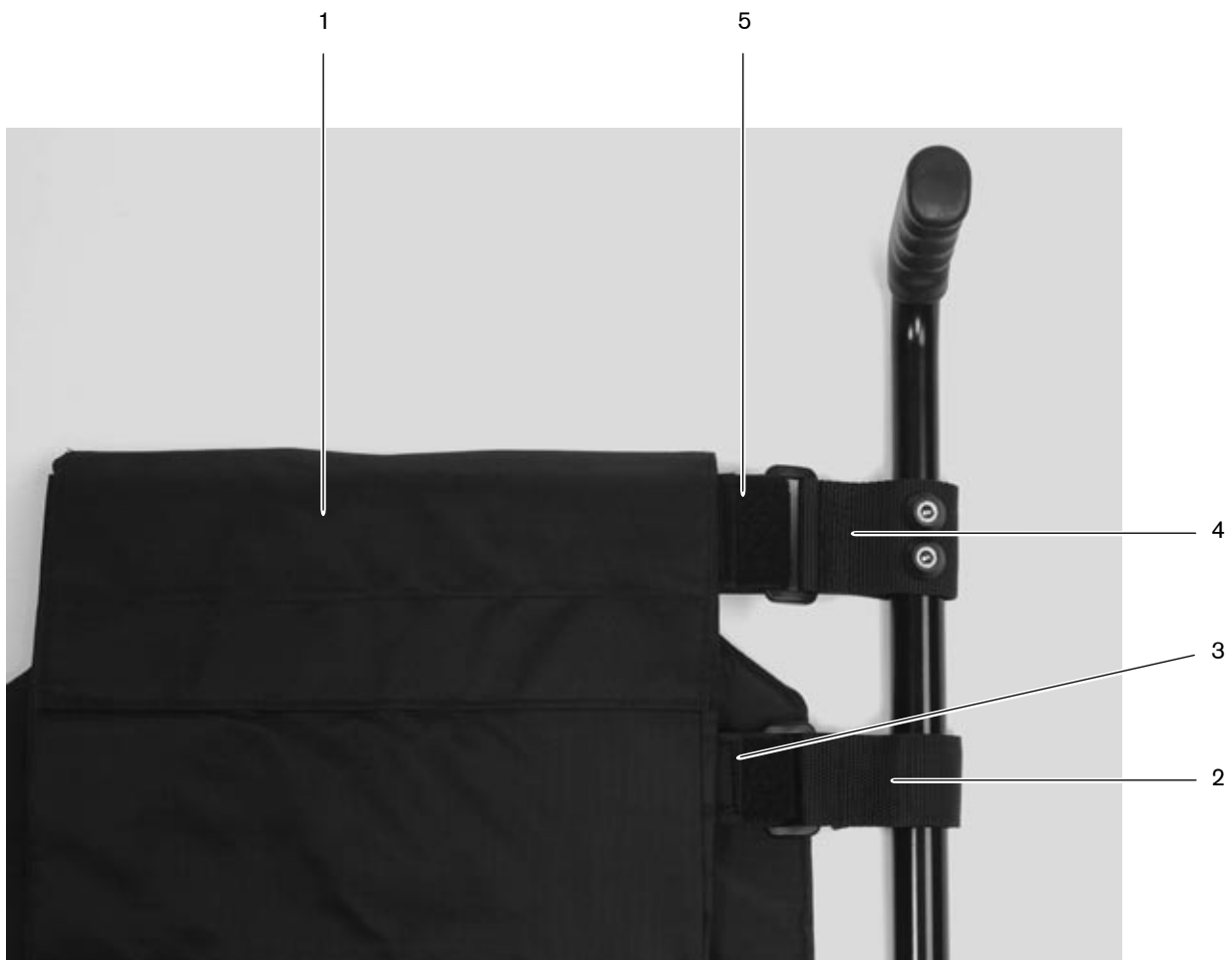


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D45=SK090	Rückenbespannung anpassbar incl. Rückentasche für Ergo-Rücken Modell Teen2 (Pos. 1-7) Sitzbreite: Rückenhöhe: Bespannungsfarbe:	1	St.
1	481D45=SK085	Rückenbespannung anpassbar incl. Rückentasche Modell Teen2 (incl. Pos. 2-5) Sitzbreite: Rückenhöhe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481D00=ST329	Schlaufe für Rückenbespannung 38 mm breit		St.
3	481D00=ST330	Gurtband für Rückenbespannung 38 mm breit Sitzbreite:		St.
4	481D00=ST326	Schlaufe für Rückenbespannung 50 mm breit	1	St.
5	481D00=ST327	Gurtband für Rückenbespannung 50 mm breit Sitzbreite:	1	St.
	481D00=ST321	Gurt für Höhenverstellung (Pos. 6, 7) Sitzbreite:	1	St.
6	481D00=ST322	Schlaufe für Höhenverstellung 50 mm breit	1	St.
7	481D00=ST324	Gurtband für Höhenverstellung 50 mm breit Sitzbreite:	1	St.
o. B.	623Z14=1002x25	Klettverschluss Flausch selbstklebend	0,18	m

Hinweis: Rückentasche erst ab SB26 möglich.

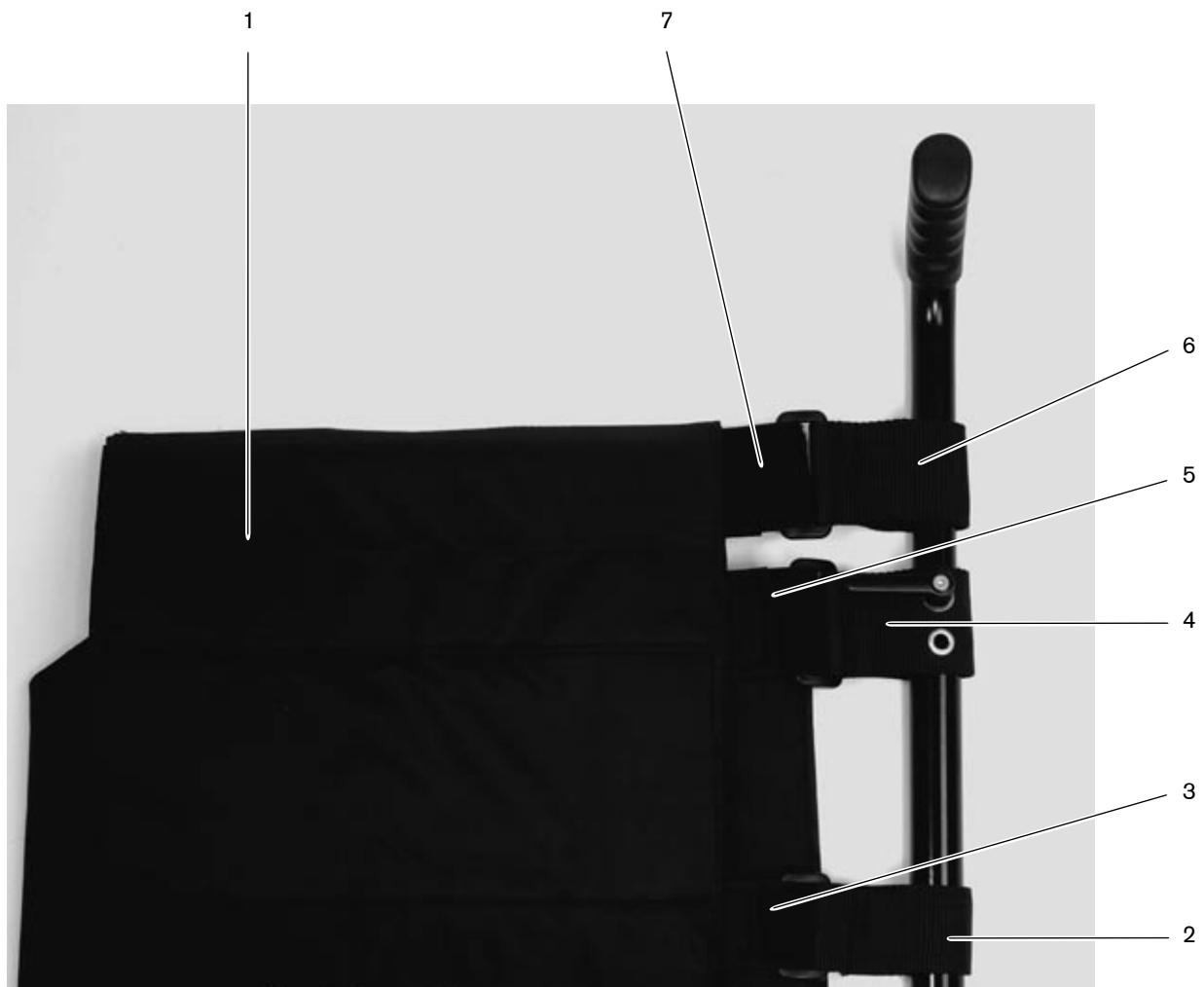


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481D05=SK015	Rückenbespannung anpassbar incl. Rückentasche für Anbau Schiebegriffe höhenverstellbar abnehmbar Modell Teen2 (incl. Pos. 2-5) Sitzbreite: Rückenhöhe: Bespannungsfarbe:	1	St.
2	481D00=ST329	Schlaufe für Rückenbespannung 38 mm breit		St.
3	481D00=ST330	Gurtband für Rückenbespannung 38 mm breit Sitzbreite:		St.
4	481D00=ST331	Gurtband mit Schnalle 50 mm breit	1	St.
5	481D00=ST328	Gurtband für Rückenbespannung bei Anbau Schiebegriffe höhenverstellbar abnehmbar 50 mm breit Sitzbreite:	1	St.
o. B.	623Z14=1002x25	Klettverschluss Flausch selbstklebend	0,18	m

Hinweis: Rückentasche erst ab SB26 möglich.

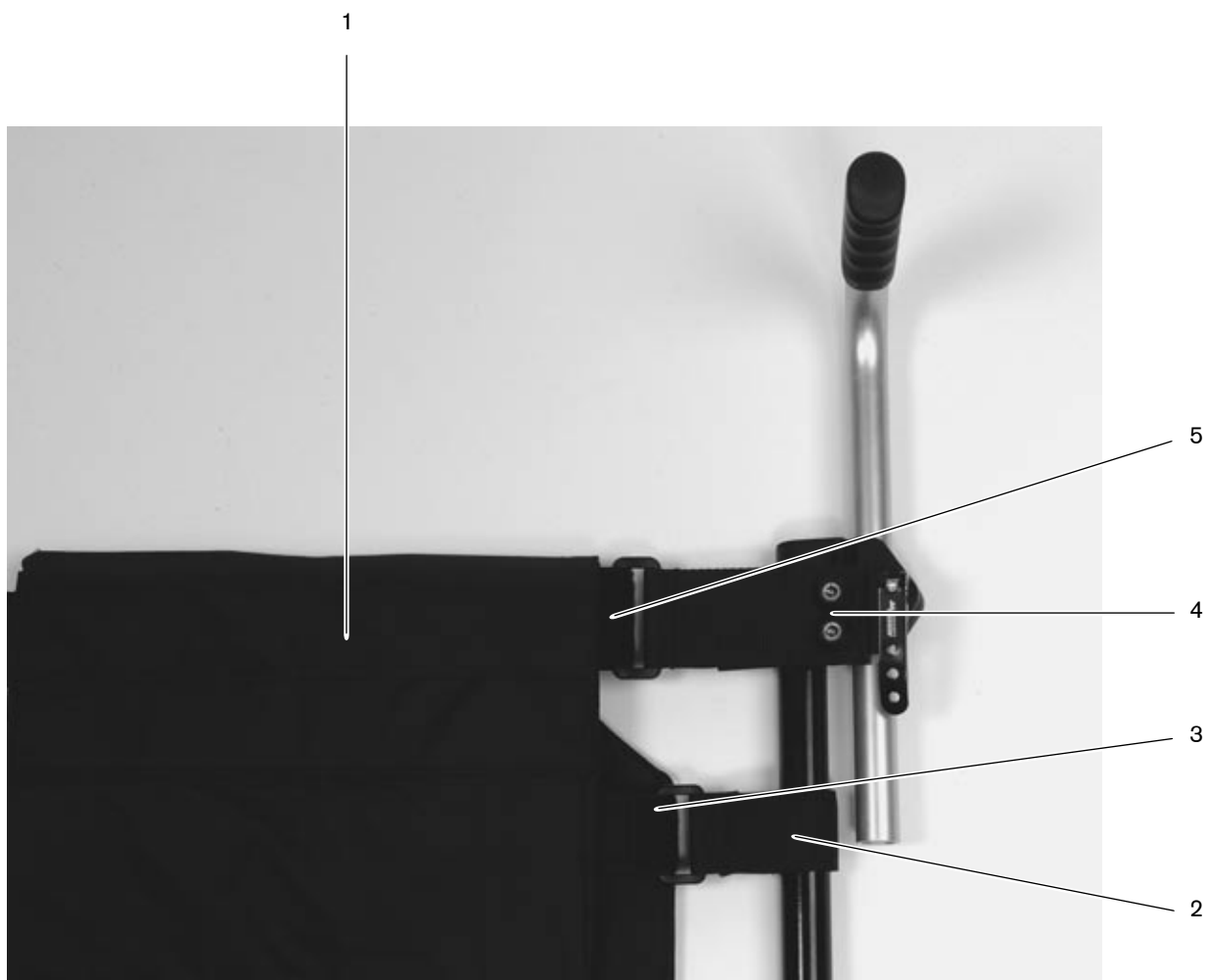


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D08=SK017	Verlängerung für Schiebegriff (Pos. 1-4)	2	St.
1	481D08=ST016	Verlängerung für Schiebegriff	1	St.
2	481B08=ST029	Klemmbolzen kurz	1	St.
3	507S27=6	Federring DIN 127	1	St.
4	501T35=M6x90	Zylinderschraube DIN 912, A2	1	St.
Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D05=SK009	Verlängerung für Schiebegriff höhenverstellbar abgewinkelt bzw. gerade (Pos. 1-4)	2	St.
1	481D05=ST007	Verlängerung für Schiebegriff	1	St.
2	481B05=ST008	Klemmbolzen kurz	1	St.
3	507S27=6	Federring DIN 127	1	St.
4	501T35=M6x70	Zylinderschraube DIN 912, A2	1	St.

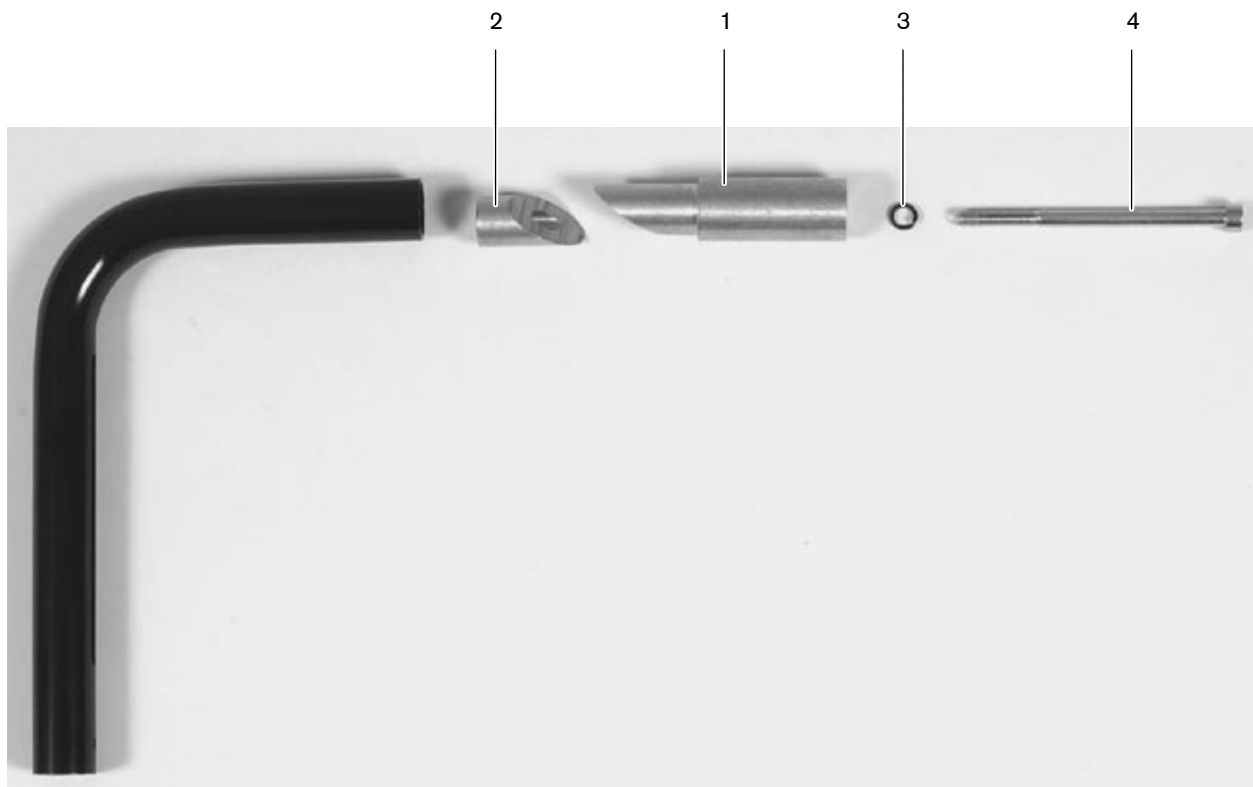

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	476D30=ARD15-17	Fester Rücken "The Back" SB38-44	1	St.
	476D30=ARD18-20	Fester Rücken "The Back" SB46-50	1	St.
1	ZPB=2000-8602	rechtes Seitenteil	1	St.
2	ZPB=2000-8601	linkes Seitenteil	1	St.
3	476D20=L2	Polster mit Bezug rechtes und linkes Seitenteil	1	Paar
4	476D20=FS	Mittelteil klein	1	St.
4	476D20=FL	Mittelteil groß	1	St.
5	476D20=P2S	Rückenpolster standard klein	1	St.
5	476D20=P2L	Rückenpolster standard groß	1	St.
6	476D20=P4S	Rückenpolster Floam-Zellen klein	1	St.
6	476D20=P4L	Rückenpolster Floam-Zellen groß	1	St.
7	476D20=L3	Laterale Unterstützung kpl.	1	Paar
8	476D20=L3TDE	Laterale Unterstützung Tropfenform kpl.	1	Paar
9	476D20=SK025	unterer Haken kpl.	1	St.
10	476D20=SK015	oberer Haken kpl.	1	St.
11	476D20=SK010	Rückenverlängerung	1	St.
o. B.	476D20=SV005	Schraubensatz kpl.	1	Satz

Hinweis: Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte den separaten Produktbeschreibungen 647A164 und 646A79

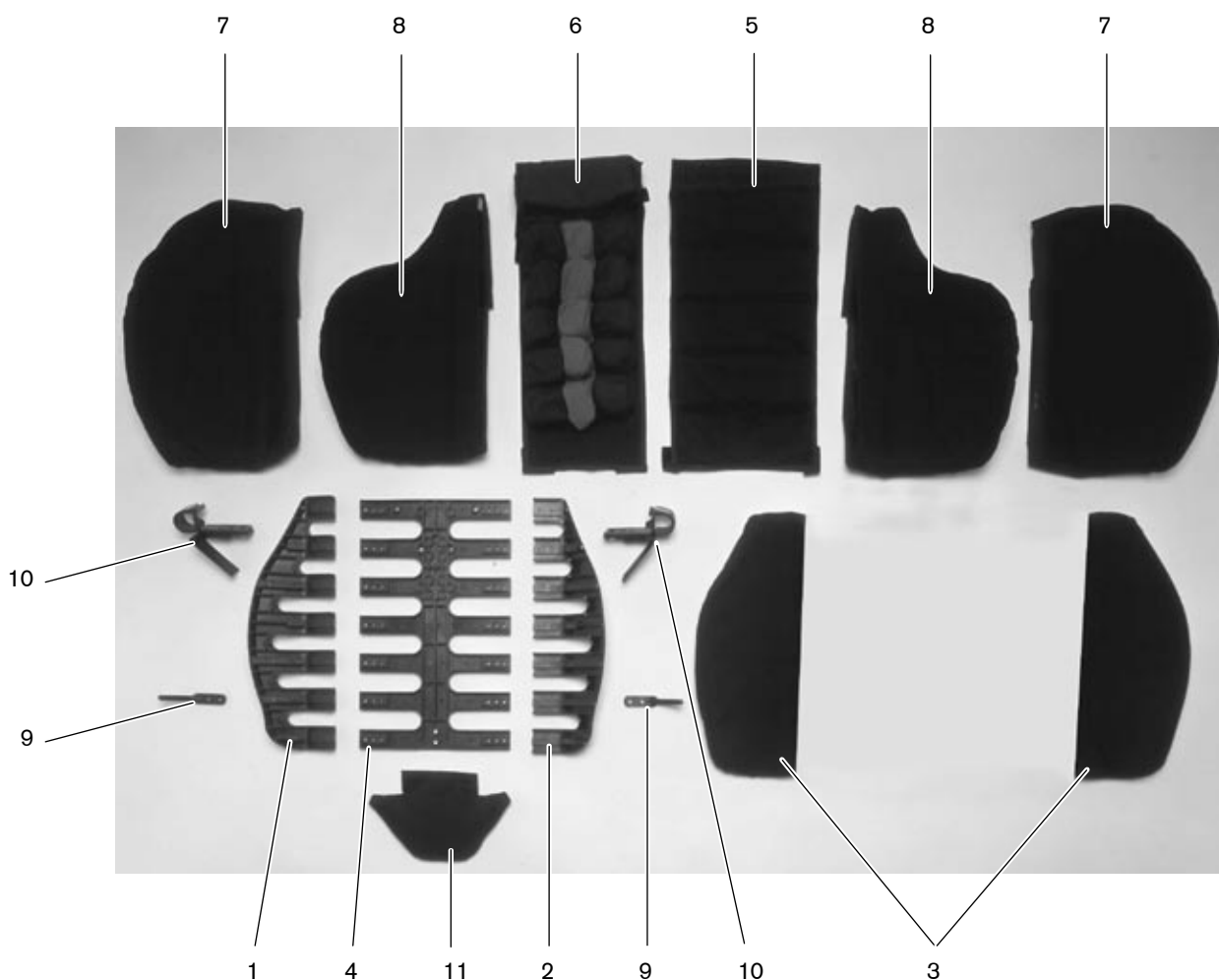

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481D00=SM850	Rückenkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz Sitzbreite: Rückenhöhe: Dicke: 3 oder 5 cm	1	St.
	481D00=ST840	Rückenkissen Schaumstoff Sitzbreite: Rückenhöhe: Dicke: 3 oder 5 cm	1	St.
	481D00=SV850	Rückenkissenbezug schwarz Sitzbreite: Rückenhöhe: Dicke: 3 oder 5 cm	1	St.


Rücken

Gruppe D

D

Baugruppe E

Seitenteil

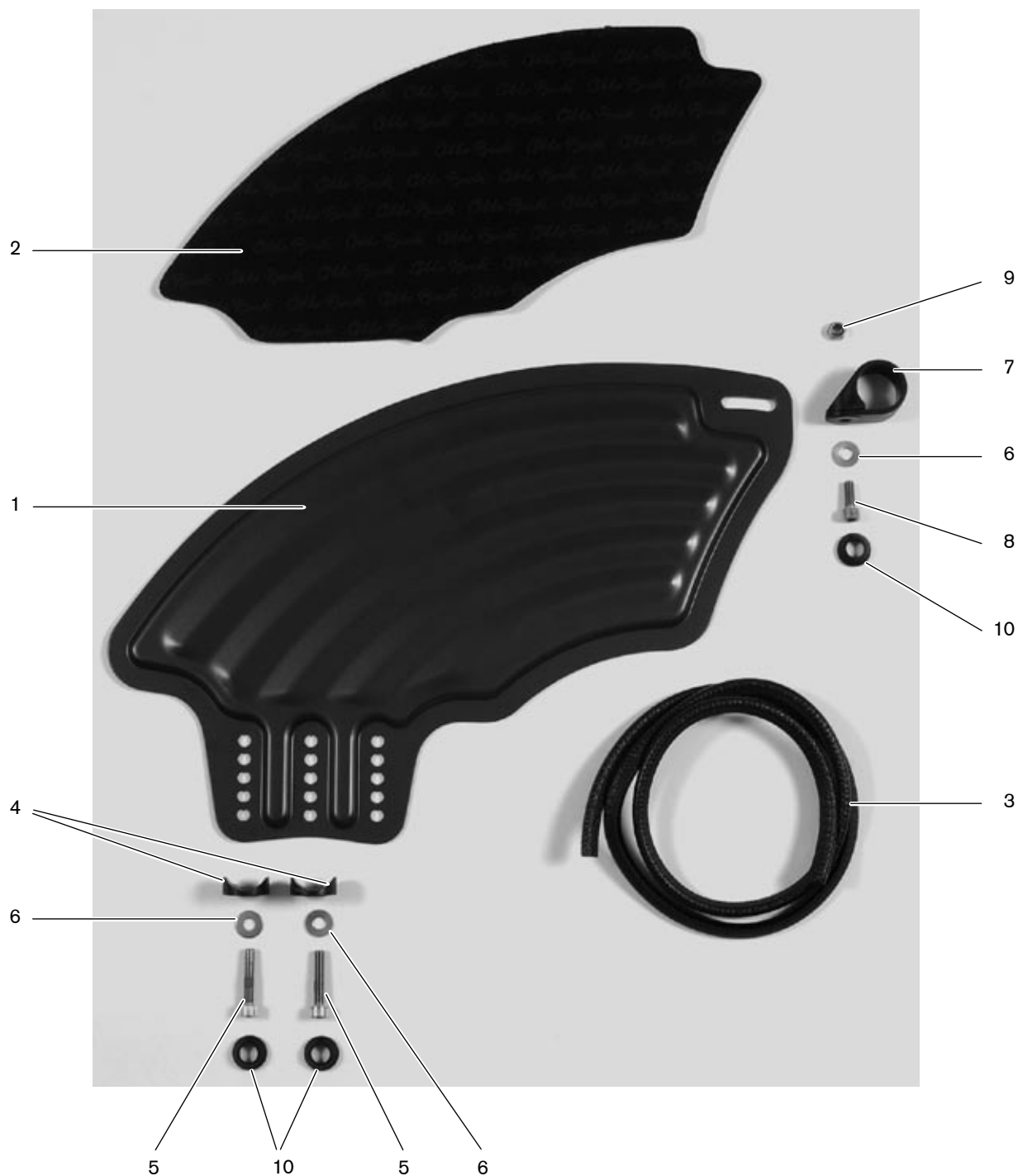

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK035	Seitenteil standard kpl. Modell T, VR und XXL2*	1	Paar
	481E45=LK035	Seitenteil standard kpl. links Modell T, VR und XXL2*	1	St.
		(Pos. 1-10)		
	481E45=RK035	Seitenteil standard kpl. rechts Modell T, VR und XXL2*	1	St.
1	481E45=LB030	Seitenteil standard links*	1	St.
o. B.	481E45=RB030	Seitenteil standard rechts*	1	St.
2	481E45=LT034	Neopreneinlage	1	St.
o. B.	481E45=RT034	Neopreneinlage	1	St.
3	481E00=SF003	Kantenschutzprofil	0,5	m
	481E45=SW029	Montagezubehör für Seitenteil/Kleiderschutz Modell T, VR und XXL2 (Pos. 4-10)	1	St.
4		Halbschale Durchmesser 25x6,2	2	St.
5		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x30, A2	2	St.
6		Scheibe	3	St.
7		Schelle	1	St.
8		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, A2	1	St.
9		Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
10		Schraubenkappe	3	St.
o. B.		Aufkleber „Otto Bock“ weiß oder	1	St.
o. B.		Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK055	Seitenteil standard kpl. Modell Ti 8.9*	1	Paar
	481E45=LK055	Seitenteil standard kpl. links Modell Ti 8.9*	1	St.
		(Pos. 1-4, 6, 7, 10)		
	481E45=RK055	Seitenteil standard kpl. rechts Modell Ti 8.9*	1	St.
1	481E45=LB030	Seitenteil standard links*	1	St.
o. B.	481E45=RB030	Seitenteil standard rechts*	1	St.
2	481E45=LT034	Neopreneinlage	1	St.
o. B.	481E45=RT034	Neopreneinlage	1	St.
3	481E00=SF003	Kantenschutzprofil	0,5	m
	481E45=SW059	Montagezubehör für Seitenteil/Kleiderschutz Modell Ti 8.9 (Pos. 4, 6, 7, 10)	1	St.
4		Halbschale Durchmesser 25x6,2	2	St.
o. B.		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
6		Scheibe	3	St.
7		Schelle	1	St.
o. B.		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
o. B.		Sechskantmutter, selbstsichernd, Aluminium	1	St.
10		Schraubenkappe	3	St.
o. B.		Aufkleber „Otto Bock“ weiß oder	1	St.
o. B.		Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.

* Rahmenfarbe:

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK036	Seitenteil Ergo kpl. Modell T, VR und XXL2*	1	Paar
	481E45=LK036	Seitenteil Ergo kpl. links Modell T, VR und XXL2*	1	St.
	481E45=RK036	Seitenteil Ergo kpl. rechts Modell T, VR und XXL2*	1	St.
1	481E45=LB032	Seitenteil Ergo links*	1	St.
o. B.	481E45=RB032	Seitenteil Ergo rechts*	1	St.
2	481E45=LT034	Neopreneinlage	1	St.
o. B.	481E45=RT034	Neopreneinlage	1	St.
3	481E00=SF003	Kantenschutzprofil	0,5	m
	481E45=SW029	Montagezubehör für Seitenteil/Kleiderschutz Modell T, VR und XXL2 (Einzelteile s. Seite 138, 139 Pos. 4-10)	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK056	Seitenteil Ergo kpl. Modell Ti 8.9*	1	Paar
	481E45=LK056	Seitenteil Ergo kpl. links Modell Ti 8.9*	1	St.
	481E45=RK056	Seitenteil Ergo kpl. rechts Modell Ti 8.9*	1	St.
1	481E45=LB032	Seitenteil Ergo links*	1	St.
o. B.	481E45=RB032	Seitenteil Ergo rechts*	1	St.
2	481E45=LT034	Neopreneinlage	1	St.
o. B.	481E45=RT034	Neopreneinlage	1	St.
3	481E00=SF003	Kantenschutzprofil	0,5	m
	481E45=SW059	Montagezubehör für Seitenteil/Kleiderschutz Modell Ti 8.9 (Einzelteile s. Seite 138, 139 Pos. 4, 6, 7, 10)	1	St.

* Rahmenfarbe:

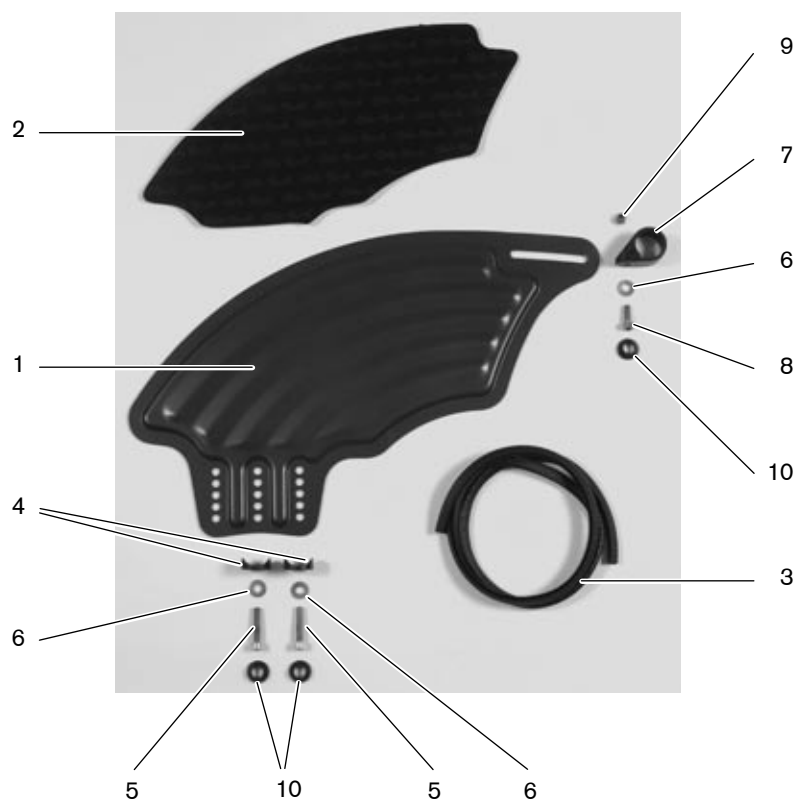


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK037	Kleiderschutz standard kpl. Modell T, VR und XXL2*	1	Paar
	481E45=LK037	Kleiderschutz standard kpl. links Modell T, VR und XXL2*	1	St.
	481E45=RK037	Kleiderschutz standard kpl. rechts Modell T, VR und XXL2*	1	St.
1	481E45=LB031	Kleiderschutz standard links*	1	St.
o. B.	481E45=RB031	Kleiderschutz standard rechts*	1	St.
2	481E45=LT034	Neopreneinlage	1	St.
o. B.	481E45=RT034	Neopreneinlage	1	St.
3	481E00=SF003	Kantenschutzprofil	0,5	m
	481E45=SW029	Montagezubehör für Seitenteil/Kleiderschutz Modell T, VR und XXL2 (Einzelteile s. Seite 138, 139 Pos. 4-10)	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK057	Kleiderschutz standard kpl. Modell Ti 8.9*	1	Paar
	481E45=LK057	Kleiderschutz standard kpl. links Modell Ti 8.9*	1	St.
	481E45=RK057	Kleiderschutz standard kpl. rechts Modell Ti 8.9	1	St.
1	481E45=LB031	Kleiderschutz standard links*	1	St.
o. B.	481E45=RB031	Kleiderschutz standard rechts*	1	St.
2	481E45=LT034	Neopreneinlage	1	St.
o. B.	481E45=RT034	Neopreneinlage	1	St.
3	481E00=SF003	Kantenschutzprofil	0,5	m
	481E45=SW059	Montagezubehör für Seitenteil/Kleiderschutz Modell Ti 8.9 (Einzelteile s. Seite 138, 139 Pos. 4, 6, 7, 10)	1	St.

* Rahmenfarbe:

Hinweis: Hintere SH bei 24"-Antriebsrädern ab 43 cm, bei 26"-Antriebsrädern ab 45 cm möglich.

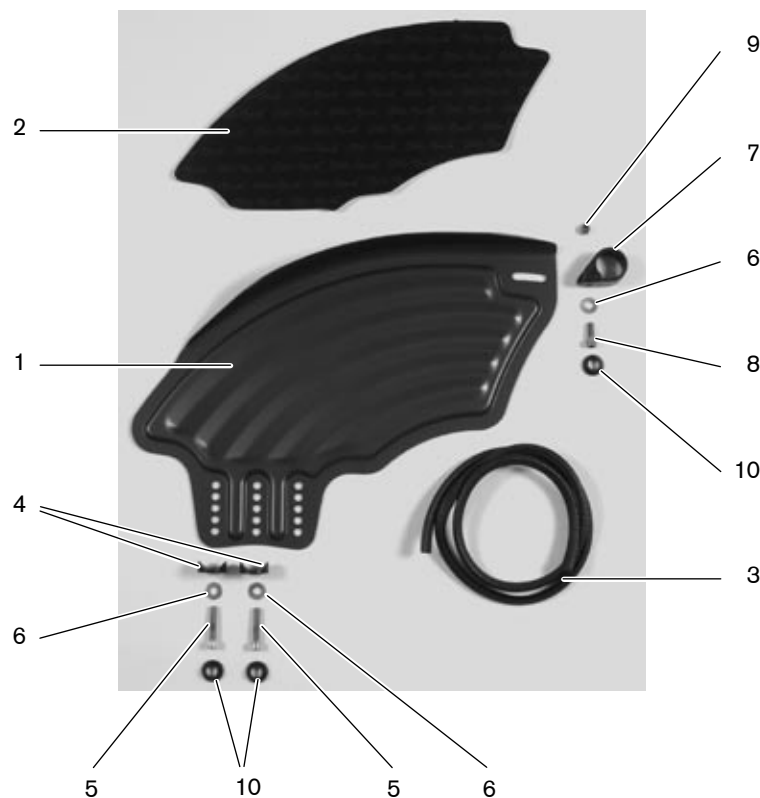


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK038	Kleiderschutz Ergo kpl. Modell T, VR und XXL2*	1	Paar
	481E45=LK038	Kleiderschutz Ergo kpl. links Modell T, VR und XXL2*	1	St.
	481E45=RK038	Kleiderschutz Ergo kpl. rechts Modell T, VR und XXL2*	1	St.
1	481E45=LB033	Kleiderschutz Ergo links*	1	St.
o. B.	481E45=RB033	Kleiderschutz Ergo rechts*	1	St.
2	481E45=LT034	Neopreneinlage	1	St.
o. B.	481E45=RT034	Neopreneinlage	1	St.
3	481E00=SF003	Kantenschutzprofil	0,5	m
	481E45=SW029	Montagezubehör für Seitenteil/Kleiderschutz Modell T, VR und XXL2 (Einzelteile s. Seite 138, 139 Pos. 4-10)	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK058	Kleiderschutz Ergo kpl. Modell Ti 8.9*	1	Paar
	481E45=LK058	Kleiderschutz Ergo kpl. links Modell Ti 8.9*	1	St.
	481E45=RK058	Kleiderschutz Ergo kpl. rechts Modell Ti 8.9*	1	St.
1	481E45=LB033	Kleiderschutz Ergo links*	1	St.
o. B.	481E45=RB033	Kleiderschutz Ergo rechts*	1	St.
2	481E45=LT034	Neopreneinlage	1	St.
o. B.	481E45=RT034	Neopreneinlage	1	St.
3	481E00=SF003	Kantenschutzprofil	0,5	m
	481E45=SW059	Montagezubehör für Seitenteil/Kleiderschutz Modell Ti 8.9 (Einzelteile s. Seite 138, 139 Pos. 4, 6, 7, 10)	1	St.


* Rahmenfarbe:

Hinweis: Hintere SH bei 24"-Antriebsrädern ab 43 cm, bei 26"-Antriebsrädern ab 45 cm möglich.

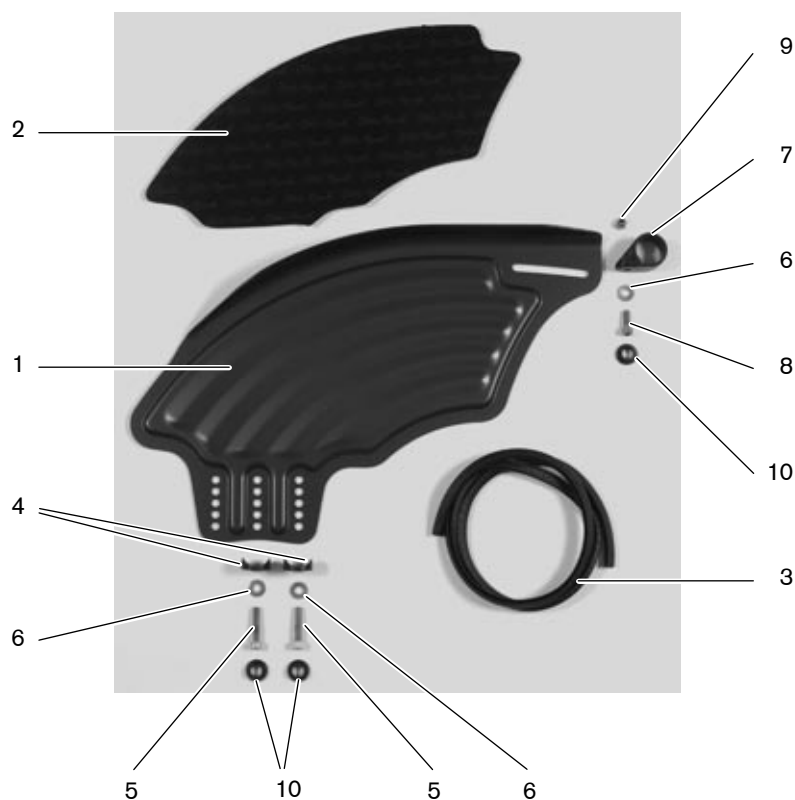


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK050	Kleiderschutz Carbon standard kpl. Modell Ti 8.9	1	Paar
	481E45=LK050	Kleiderschutz Carbon standard kpl. links Modell Ti 8.9	1	St.
	481E45=RK050	Kleiderschutz Carbon standard kpl. rechts Modell Ti 8.9	1	St.
1	481E45=LT048	Kleiderschutz Carbon standard links (Version bis 01/04)	1	St.
o. B.	481E45=LT121	Kleiderschutz Carbon standard links (Version ab 02/04)	1	St.
o. B.	481E45=RT048	Kleiderschutz Carbon standard rechts (Version bis 01/04)	1	St.
o. B.	481E45=RT121	Kleiderschutz Carbon standard rechts (Version ab 02/04)	1	St.
	481E45=SW059	Montagezubehör für Seitenteil/Kleiderschutz Modell Ti 8.9	1	St.
		(Pos. 2-8 Einzelteile s. Seite 138, 139 Pos. 4, 6, 7, 10)		

Hinweis: Hintere SH bei 24"-Antriebsrädern ab 43 cm, bei 26"-Antriebsrädern ab 45 cm möglich

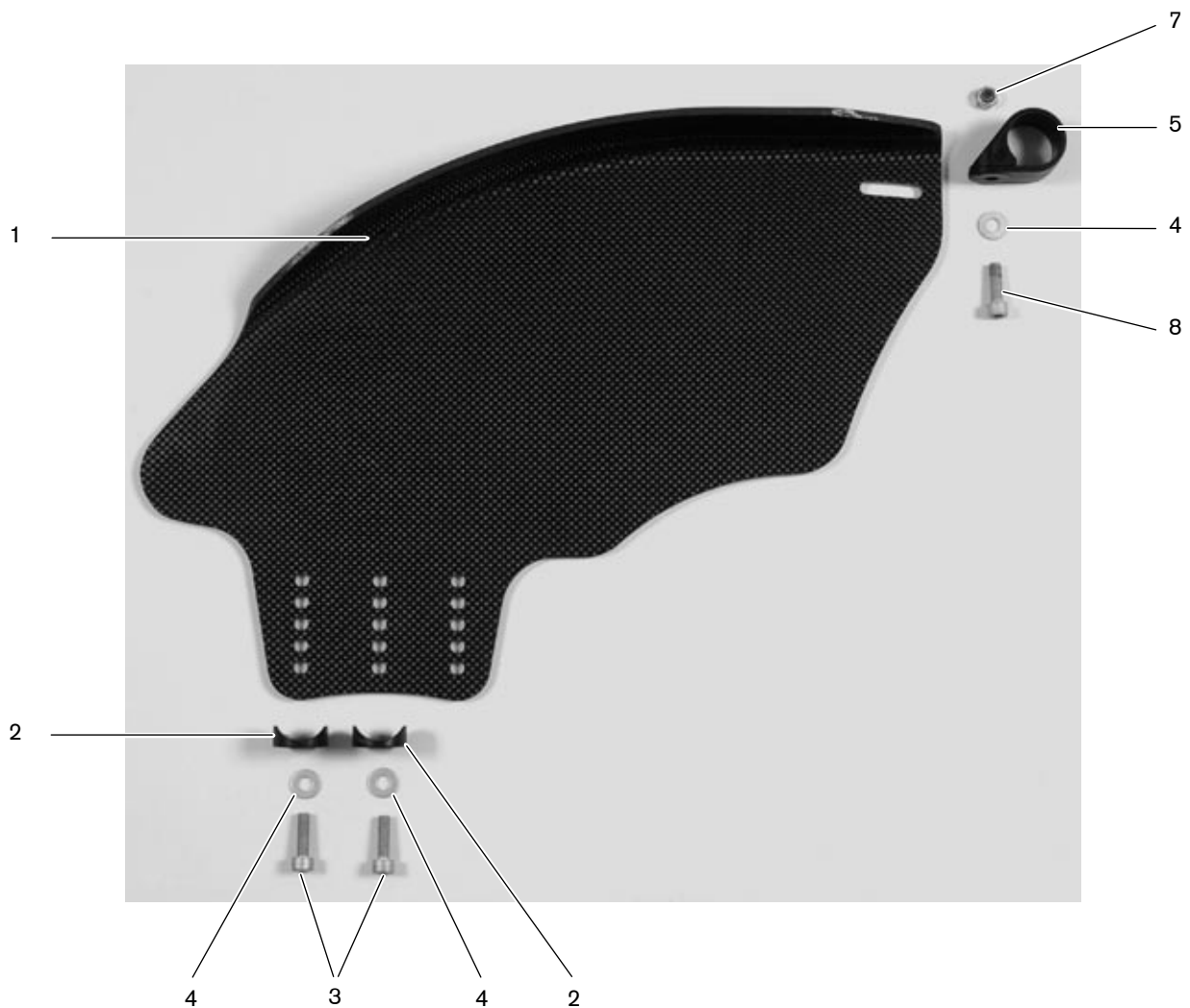


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK051	Kleiderschutz Carbon Ergo kpl. Modell Ti 8.9	1	Paar
	481E45=LK051	Kleiderschutz Carbon Ergo kpl. links Modell Ti 8.9 (Pos. 1-8)	1	St.
	481E45=RK051	Kleiderschutz Carbon Ergo kpl. rechts Modell Ti 8.9	1	St.
1	481E45=LT049	Kleiderschutz Carbon Ergo links (Version bis 01/04)	1	St.
o. B.	481E45=LT122	Kleiderschutz Carbon Ergo links (Version ab 02/04)	1	St.
o. B.	481E45=RT049	Kleiderschutz Carbon Ergo rechts (Version bis 01/04)	1	St.
o. B.	481E45=RT122	Kleiderschutz Carbon Ergo rechts (Version ab 02/04)	1	St.
	481E45=SW059	Montagezubehör für Seitenteil/Kleiderschutz Modell Ti 8.9 (Pos. 2-8 Einzelteile s. Seite 138, 139 Pos. 4, 6, 7, 10)	1	St.

Hinweis: Hintere SH bei 24"-Antriebsrädern ab 43 cm, bei 26"-Antriebsrädern ab 45 cm möglich.

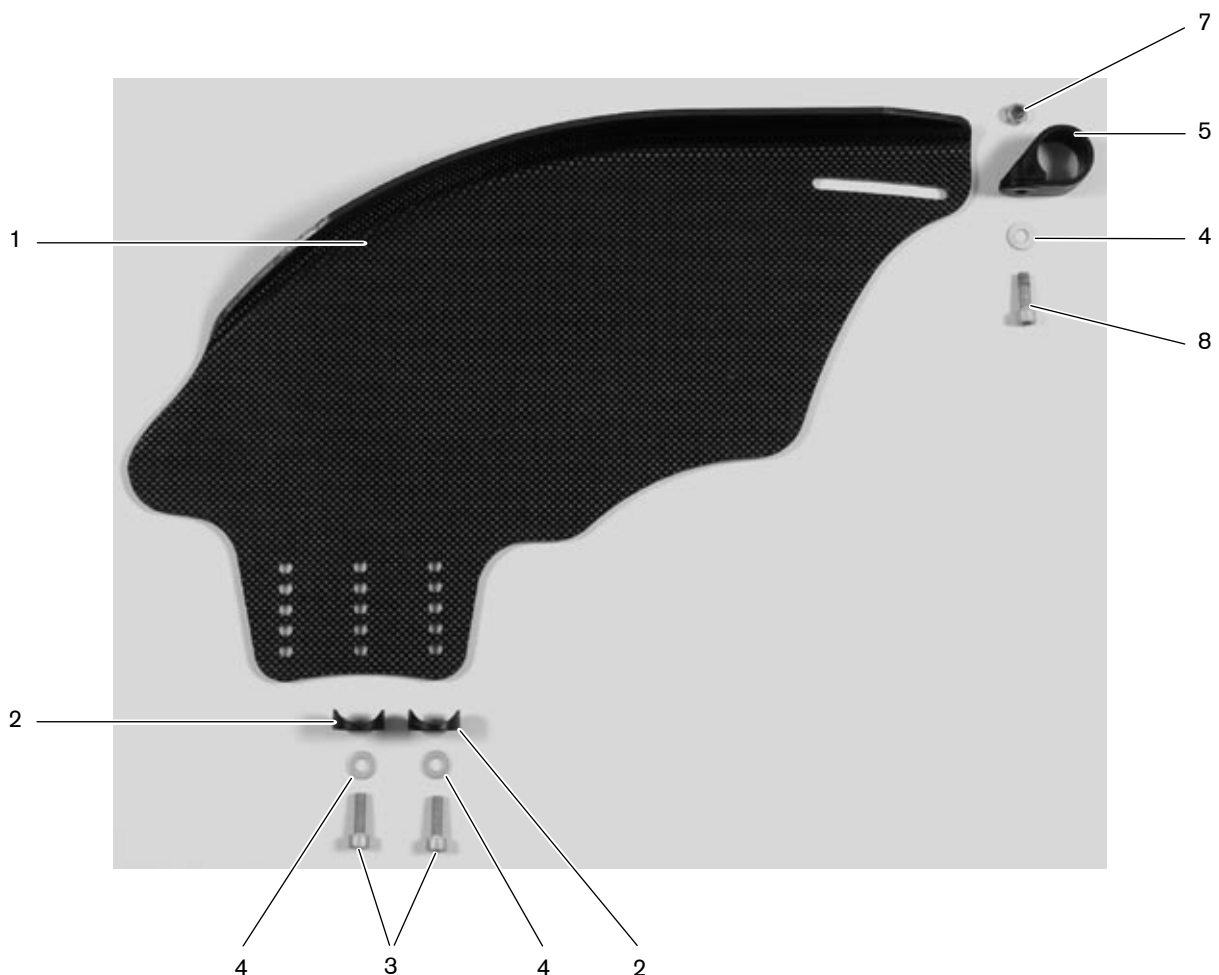

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK045	Kleiderschutz steckbar, kpl., Modell T, Ti 8.9, VR und XXL2	1	Paar
	481E45=LK045	Kleiderschutz steckbar, links, kpl. Modell T, Ti 8.9, VR und XXL2	1	St.
	481E45=RK045	Kleiderschutz steckbar, rechts, kpl. Modell T, Ti 8.9, VR und XXL2	1	St.
1	481E08=LT035	Kleiderschutz steckbar, links	1	St.
o. B.	481E08=RT035	Kleiderschutz steckbar, rechts	1	St.
	481E08=SW016	Montagezubehör für Befestigung Seitenteil (Pos. 2-4)	1	St.
2		Profil für Höhenverstellung	1	St.
3		Haltestange	2	St.
4		Senkschraube DIN 7991, selbstsichernd, M5x16, A2	4	St.
	481E45=SW039	Montagezubehör für Kleiderschutz steckbar (Pos. 5-6)	1	St.
5		Aufnahme für Kleiderschutz steckbar	1	St.
6		Zylinderschraube DIN 912, A2	2	St.
o. B.		Aufkleber „Otto Bock“, weiß	1	St.

Hinweis: Nicht geeignet bei Anbau von Trommelbremse 0° und Einhandantrieb.

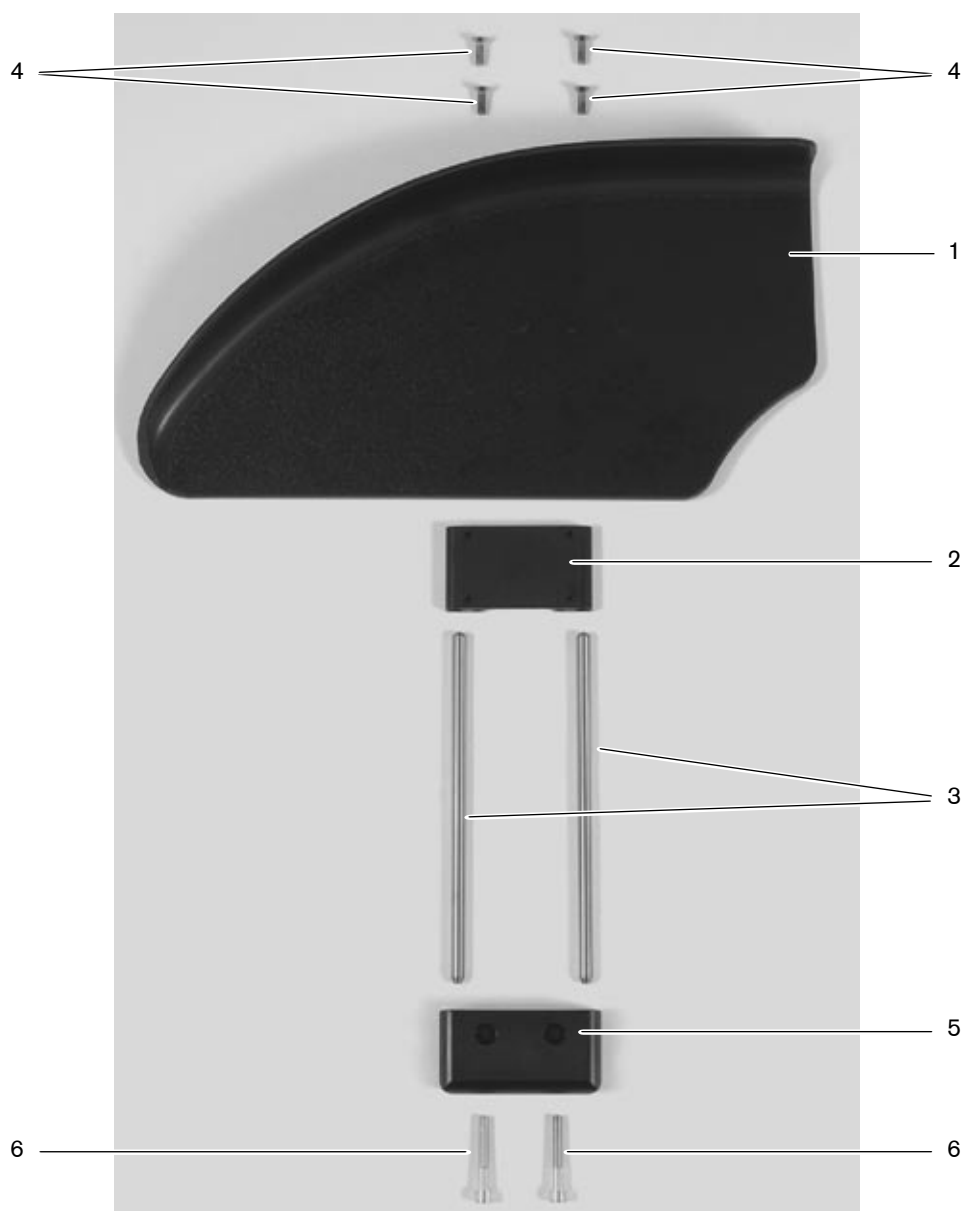


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=SK026	Seitenteil kurz kpl. Modell Teen2 (Pos. 1-9)*	2	St.
1	481E45=SB026	Seitenteil kurz, bunt beschichtet*	1	St.
2	481E00=SF003	Kantenschutzprofil	0,4	m
	481E45=SW111	Montagezubehör für Seitenteil Teen2 (Pos. 3-9)	1	St.
3		Schelle	1	St.
4		Scheibe	2	St.
5		Schraubenkappe	2	
6		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x33, A2	1	St.
7		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, A2	1	St.
8		Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
9		Abstandshalbschale oben	1	St.
o. B.		Aufkleber „Otto Bock“ weiß oder	1	St.
o. B.		Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=SK027	Seitenteil lang kpl. Modell Teen2 (Pos. 1-9)*	2	St.
1	481E45=SB027	Seitenteil lang, bunt beschichtet*	1	St.
2	481E00=SF003	Kantenschutzprofil	0,4	m
	481E45=SW111	Montagezubehör für Seitenteil Teen2 (Pos. 3-9)	1	St.

* Rahmenfarbe:


Hinweis: Seitenteil kurz bis ST34
Seitenteil lang ab ST36

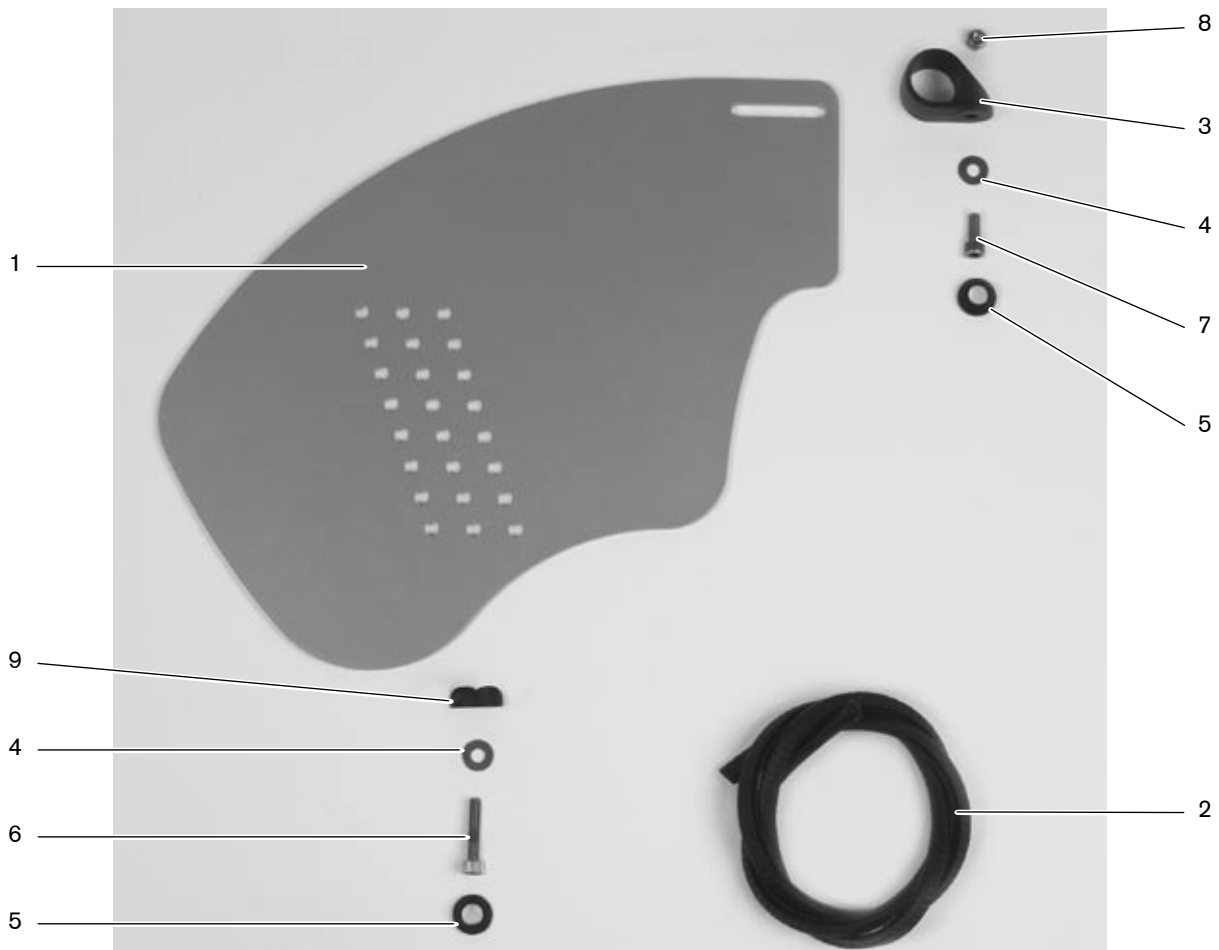


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1 o. B.	481E45=PK022	Kleiderschutz kurz kpl. Modell Teen2	1	Paar
	481E45=LK022	Kleiderschutz kurz links, kpl. Modell Teen2 (Pos. 1-8)	1	St.
	481E45=PK022	Kleiderschutz kurz rechts, kpl. Modell Teen2	1	St.
	481E45=LT019	Kleiderschutz kurz links	1	St.
	481E45=RT019	Kleiderschutz kurz rechts	1	St.
	481E45=SW111	Montagezubehör für Seitenteil Teen2 (Pos. 2-8, Einzelteile s. Seite 146 Pos. 3-9)	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1 o. B.	481E45=PK024	Kleiderschutz lang kpl. Modell Teen2	1	Paar
	481E45=LK024	Kleiderschutz lang links, kpl. Modell Teen2 (Pos. 1-8)	1	St.
	481E45=PK024	Kleiderschutz lang rechts, kpl. Modell Teen2	1	St.
	481E45=LT023	Kleiderschutz lang links	1	St.
	481E45=RT023	Kleiderschutz lang rechts	1	St.
	481E45=SW111	Montagezubehör für Seitenteil Teen2 (Pos. 2-8, Einzelteile s. Seite 146 Pos. 3-9)	1	St.

Hinweis: Seitenteil kurz bis ST34
Seitenteil lang ab ST36

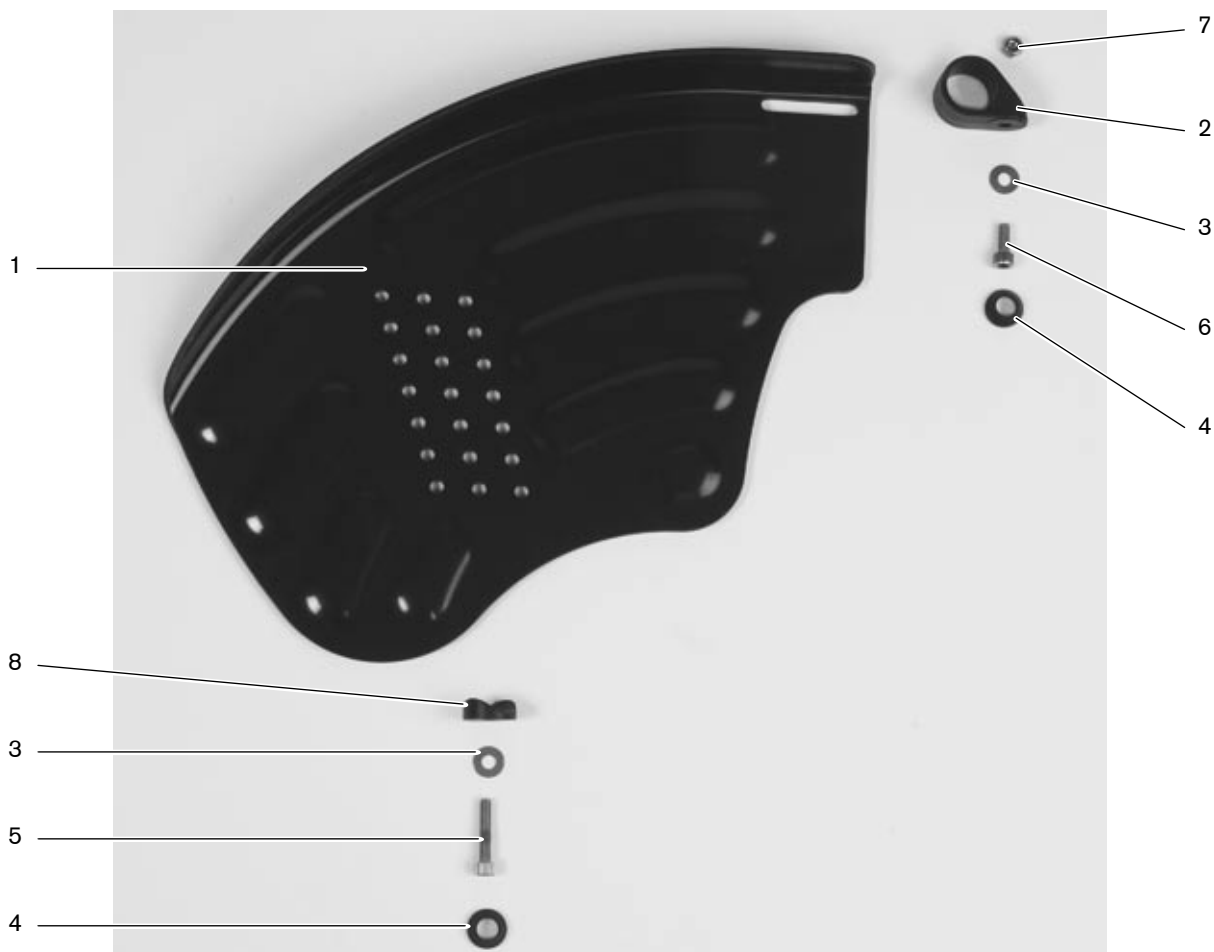

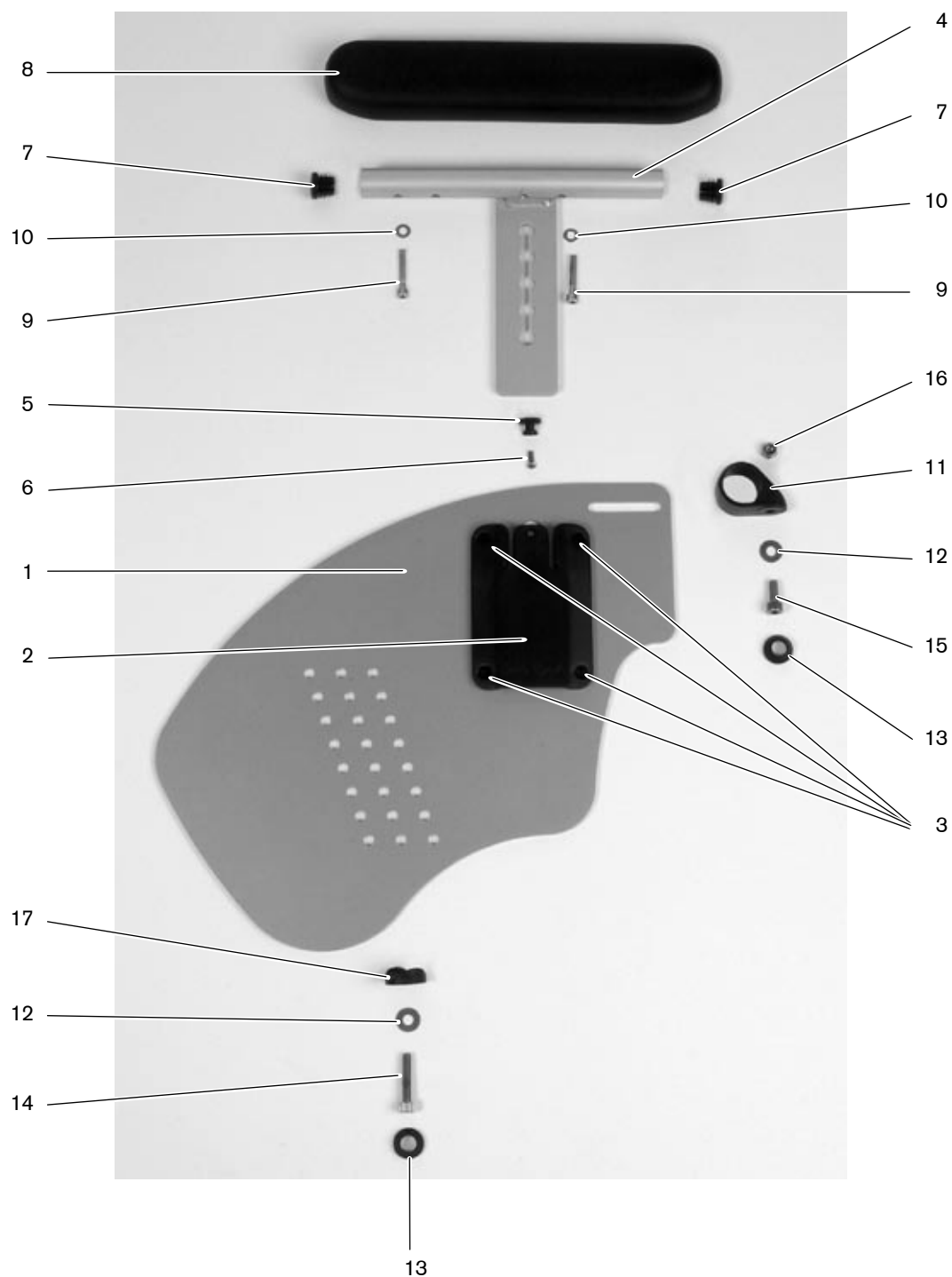


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK043	Seitenteil kurz mit Armauflage höhenverstellbar kpl. Modell Teen2*	1	Paar
	481E45=LK043	Seitenteil kurz mit Armauflage höhenverstellbar links, kpl. Modell Teen2 (Pos. 1-17)*	1	St.
	481E45=RK043	Seitenteil kurz mit Armauflage höhenverstellbar rechts, kpl. Modell Teen2*	1	St.
	481E45=LV041	Seitenteil kurz für Armauflage höhenverstellbar, links (Pos. 1-3)*	1	St.
	481E45=RV041	Seitenteil kurz für Armauflage höhenverstellbar, rechts*	1	St.
1		Seitenteil kurz für Armauflage höhenverstellbar, links*	1	St.
o. B.		Seitenteil kurz für Armauflage höhenverstellbar, rechts*	1	St.
2		Höhenverstellung	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	4	St.
o. B.		Scheibe DIN 125, A2	4	St.
o. B.	481E00=SF003	Kantenschutzprofil	0,4	m
4	481E38=LE006	Armlehnenhalter links	1	St.
o. B.	481E38=RE006	Armlehnenhalter rechts	1	St.
	481E02=SW071	Montagezubehör für Armlehnenhalter (Pos. 5-7)	1	St.
5		Rastelement	1	St.
6		Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M4x10, A2	1	St.
o. B.		Scheibe DIN 125, A2	1	St.
7		Lamellenstopfen	2	St.
8	481E09=ST014	Armauflage 270/83 mm	1	St.
9	501T50=2	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x30, verzinkt	2	St.
10	507U27=5.3	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
	481E45=SW111	Montagezubehör für Seitenteil Teen2 (Pos. 11-17, Einzelteile s. Seite 146 Pos. 3-9)	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK044	Seitenteil lang mit Armauflage höhenverstellbar kpl. Modell Teen2*	1	Paar
	481E45=LK044	Seitenteil lang mit Armauflage höhenverstellbar links, kpl. Modell Teen2 (Pos. 1-17)*	1	St.
	481E45=RK044	Seitenteil lang mit Armauflage höhenverstellbar rechts, kpl. Modell Teen2*	1	St.
	481E45=LV042	Seitenteil lang für Armauflage höhenverstellbar, links (Pos. 1-3)*	1	St.
	481E45=RV042	Seitenteil lang für Armauflage höhenverstellbar, rechts*	1	St.
1		Seitenteil lang für Armauflage höhenverstellbar, links*	1	St.
o. B.		Seitenteil lang für Armauflage höhenverstellbar, rechts*	1	St.
2		Höhenverstellung	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	4	St.
o. B.		Scheibe DIN 125, A2	4	St.
o. B.	481E00=SF003	Kantenschutzprofil	0,4	m
4	481E38=LE006	Armlehnenhalter links	1	St.
o. B.	481E38=RE006	Armlehnenhalter rechts	1	St.
	481E02=SW071	Montagezubehör für Armlehnenhalter (Pos. 5-7)	1	St.
8	481E09=ST014	Armauflage 270/ 83 mm	1	St.
9	501T50=2	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x30, verzinkt	2	St.
10	507U27=5.3	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
	481E45=SW111	Montagezubehör für Seitenteil Teen2 (Pos. 11-17, Einzelteile s. Seite 146 Pos. 3-9)	1	St.

* Rahmenfarbe:


Hinweis: Seitenteil kurz bis ST34
Seitenteil lang ab ST36

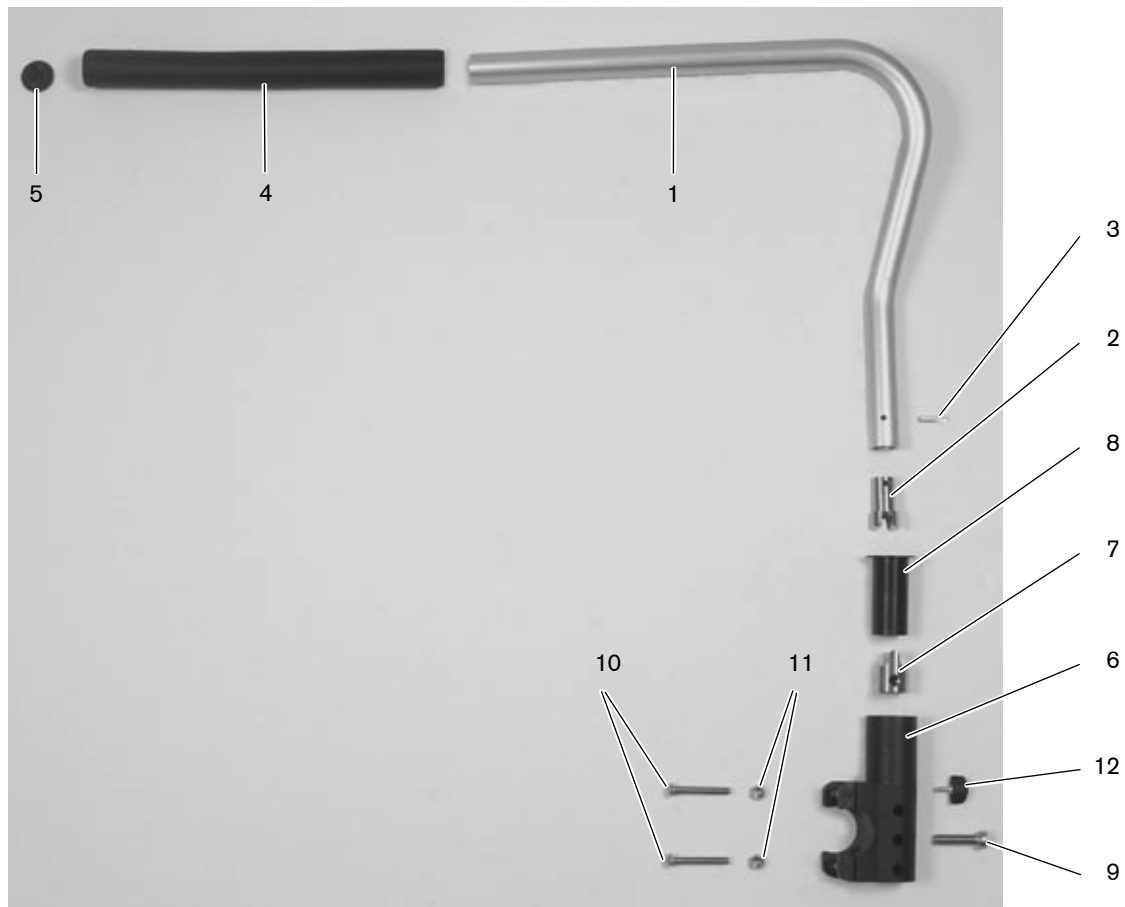

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK099	Armlehne hoch gepolstert lang, höheneinstellbar, abschwenkbar Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	1	Paar
	481E45=PK103	Armlehne hoch gepolstert kurz, höheneinstellbar, abschwenkbar Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	1	Paar
	481E45=PK113	Armlehne niedrig gepolstert lang, höheneinstellbar, abschwenkbar Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	1	Paar
	481E45=PK116	Armlehne niedrig gepolstert kurz, höheneinstellbar, abschwenkbar Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	1	Paar
	481E45=LK099	Armlehne hoch gepolstert lang, höheneinstellbar, abschwenkbar, links, Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2 (Pos. 1-12)	1	St.
	481E45=LK103	Armlehne hoch gepolstert kurz, höheneinstellbar, abschwenkbar, links, Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2 (Pos. 1-12)	1	St.
	481E45=LK113	Armlehne niedrig gepolstert lang, höheneinstellbar, abschwenkbar, links, Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2 (Pos. 1-12)	1	St.
	481E45=LK116	Armlehne niedrig gepolstert kurz, höheneinstellbar, abschwenkbar, links, Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2 (Pos. 1-12)	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=RK099	Armlehne hoch gepolstert lang, höhenstellbar, abschwenkbar, rechts, Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	1	St.
	481E45=RK103	Armlehne hoch gepolstert kurz, höhenstellbar, abschwenkbar, rechts, Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	1	St.
	481E45=RK113	Armlehne niedrig gepolstert lang, höhenstellbar, abschwenkbar, rechts, Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	1	St.
	481E45=RK116	Armlehne niedrig gepolstert kurz, höhenstellbar, abschwenkbar, rechts, Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	1	St.
	481E45=LV093	Armlehnenrohr hoch lang mit Arretierbolzen, links (Pos. 1-3)	1	St.
	481E45=LV102	Armlehnenrohr hoch kurz mit Arretierbolzen, links (Pos. 1-3)	1	St.
	481E45=LV114	Armlehnenrohr niedrig lang mit Arretierbolzen, links (Pos. 1-3)	1	St.
	481E45=LV117	Armlehnenrohr niedrig kurz mit Arretierbolzen, links (Pos. 1-3)	1	St.
	481E45=RV093	Armlehnenrohr hoch lang mit Arretierbolzen, rechts	1	St.
	481E45=RV102	Armlehnenrohr hoch kurz mit Arretierbolzen, rechts	1	St.
	481E45=RV114	Armlehnenrohr niedrig lang mit Arretierbolzen, rechts	1	St.
	481E45=RV117	Armlehnenrohr niedrig kurz mit Arretierbolzen, rechts	1	St.
1	481E45=LE091	Armlehnenrohr hoch lang links, farblos eloxiert	1	St.
1	481E45=LE088	Armlehnenrohr hoch kurz links, farblos eloxiert	1	St.
1	481E45=LE112	Armlehnenrohr niedrig lang links, farblos eloxiert	1	St.
1	481E45=LE115	Armlehnenrohr niedrig kurz links, farblos eloxiert	1	St.
o. B.	481E45=RE091	Armlehnenrohr hoch lang rechts, farblos eloxiert	1	St.
1	481E45=RE088	Armlehnenrohr hoch kurz rechts, farblos eloxiert	1	St.
1	481E45=RE112	Armlehnenrohr niedrig lang rechts, farblos eloxiert	1	St.
1	481E45=RE115	Armlehnenrohr niedrig kurz rechts, farblos eloxiert	1	St.
2	481E45=ST092	Arretierbolzen für Armlehne	1	St.
3	506A22=4x20	Passkerbstift ISO 8745, A2	1	St.
o. B.	636W55	Delo-Duopox 1895	0,001	Pkg.
4	HR11290048	Schiebegriff schwarz d20x260	1	St.
5	481E45=ST087	Abdeckstopfen	1	St.
	481E45=LV098	Halterung für Armlehne, vormontiert, links (Pos. 6-11)	1	St.
	481E45=RV098	Halterung für Armlehne, vormontiert	1	St.
6	481E45=LE095	Halterung für Armlehne	1	St.
o. B.	481E45=RE095	Halterung für Armlehne	1	St.
7	481E45=ST096	Höhenverstellung Armlehne	1	St.
8	481E45=ST097	Gleitbuchse Armlehne	1	St.
9	501T49=M8x30	Zylinderschraube DIN 7984, A2	1	St.
10	501T49=M6x45	Zylinderschraube DIN 7984, A2	2	St.
11	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd	2	St.
12	501Z24=M4x10	Flügelschraube (Version bis 07/03)	1	St.


Hinweis: Nicht möglich in Verbindung mit Seitenteilen mit Armauflagen
 Armlehne gepolstert kurz nicht möglich in Verbindung mit Therapietisch
 Armlehne gepolstert kurz möglich bis ST34
 Armlehne gepolstert lang möglich ab ST36

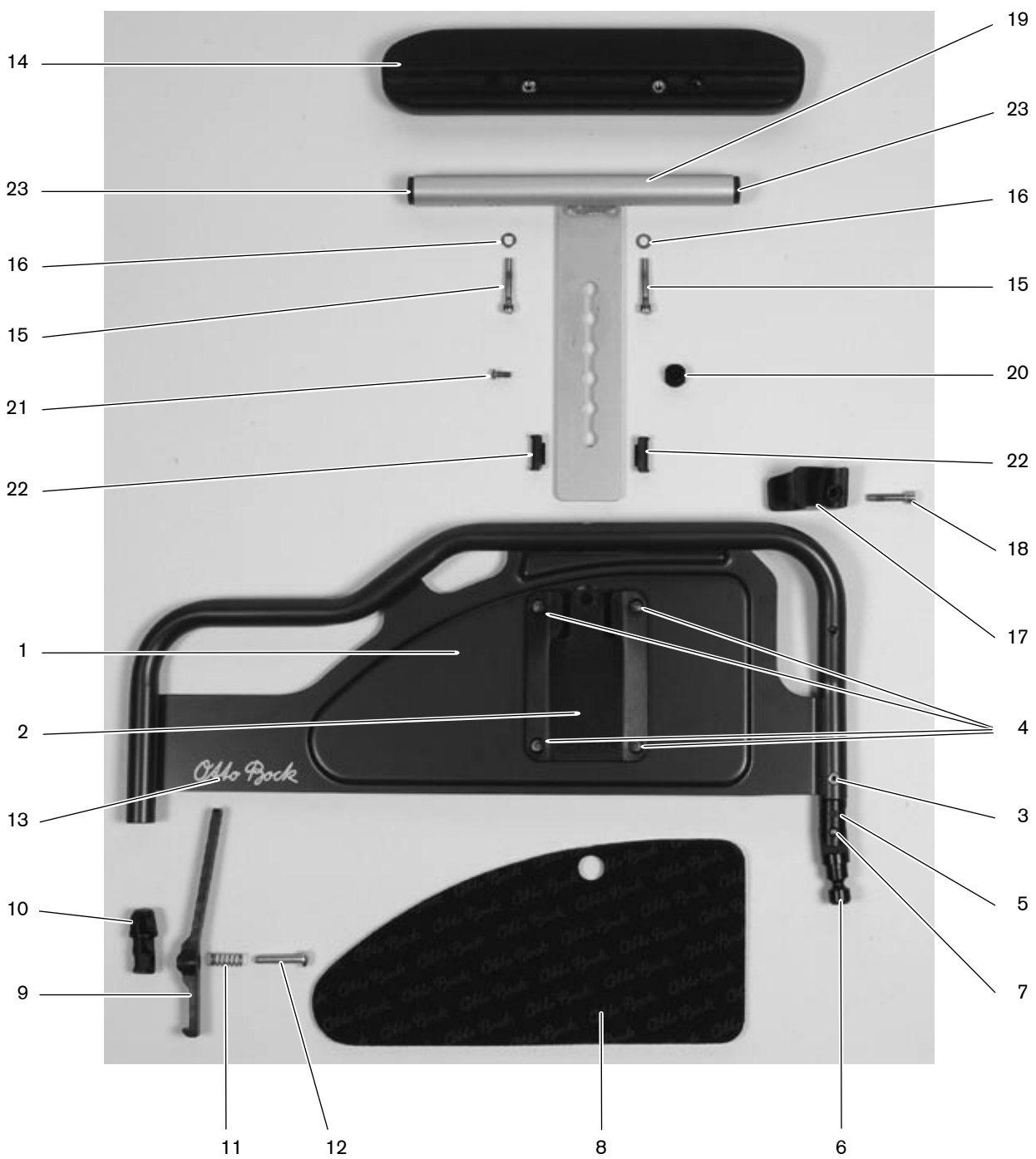

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E09=PK085	Desk-Seitenteil abnehmbar, kpl. Modell T, Ti 8.9 und VR (Version bis 10/03)*	1	Paar
	481E09=LK085	Desk-Seitenteil abnehmbar, links, kpl. Modell T, Ti 8.9 und VR (Pos. 1-23) (Version bis 10/03)*	1	St.
	481E09=RK085	Desk-Seitenteil abnehmbar, rechts, kpl. Modell T, Ti 8.9 und VR (Version bis 10/03)*	1	St.
	481E08=LV099	Desk-Seitenteil höhenverstellbar, links (Pos. 1-7)*	1	St.
	481E08=RV099	Desk-Seitenteil höhenverstellbar, rechts*	1	St.
1		Desk-Seitenteil höhenverstellbar, links*	1	St.
o. B.		Desk-Seitenteil höhenverstellbar, rechts*	1	St.
2		Höhenverstellung	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	1	St.
o. B.		Scheibe DIN 125, A2	4	St.
4		Blindniet DIN 7337	4	St.
	481E08=SV079	Gelenk vormontiert (Pos. 5-7)	1	St.
5		Gelenkgabel	1	St.
6		Gelenkzapfen	1	St.
7		Knebelkerbstift ISO 8742, Stahl	1	St.
8	481E08=LT056	Neopreneinlage für Höhenverstellung	1	St.
o. B.	481E08=RT056	Neopreneinlage für Höhenverstellung	1	St.
	481E09=SK006	Verriegelung kpl. (Pos. 9-12)	1	St.
9		Arretierhebel	1	St.
10		Stopfen für Desk-Seitenteil	1	St.
11		Druckfeder	1	St.
12		Linsenschraube mit Innensechskant, verzinkt	1	St.
o. B.		Sechskantmutter, selbstsichernd, verzinkt	1	St.
13	481E00=ST084	Aufkleber „Otto Bock“ weiß oder	1	St.
13	481E00=ST085	Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.
	481E09=SW051	Montagezubehör für Seitenteil abnehmbar	1	St.
o. B.		Desk-Aufnahme	1	St.
o. B.		Sechskantmutter, selbstsichernd, verzinkt	1	St.
o. B.		Zylinderschraube DIN 912, verzinkt	1	St.
14	481E09=ST014	Armauflage 270/83 mm	1	St.
15	501T50=2	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x30, verzinkt	2	St.
16	507U27=5.3	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
17	481E08=LT073	Sperre	1	St.
18	501T50=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x25, verzinkt	1	St.
19	481E08=LE057	Armlehnenhalter	1	St.
o. B.	481E08=RE057	Armlehnenhalter	1	St.
	481E08=SW071	Montagezubehör für Armlehnenhalter (Pos. 20-23)	1	St.
20		Rastelement	1	St.
21		Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M4x10, A2	1	St.
22		Abstandshalter für Höhenverstellung	2	St.
23		Lamellenstopfen	2	St.

* Rahmenfarbe:


Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken standard.
Seitenteil lang bei Modell VR erst ab ST40 möglich.

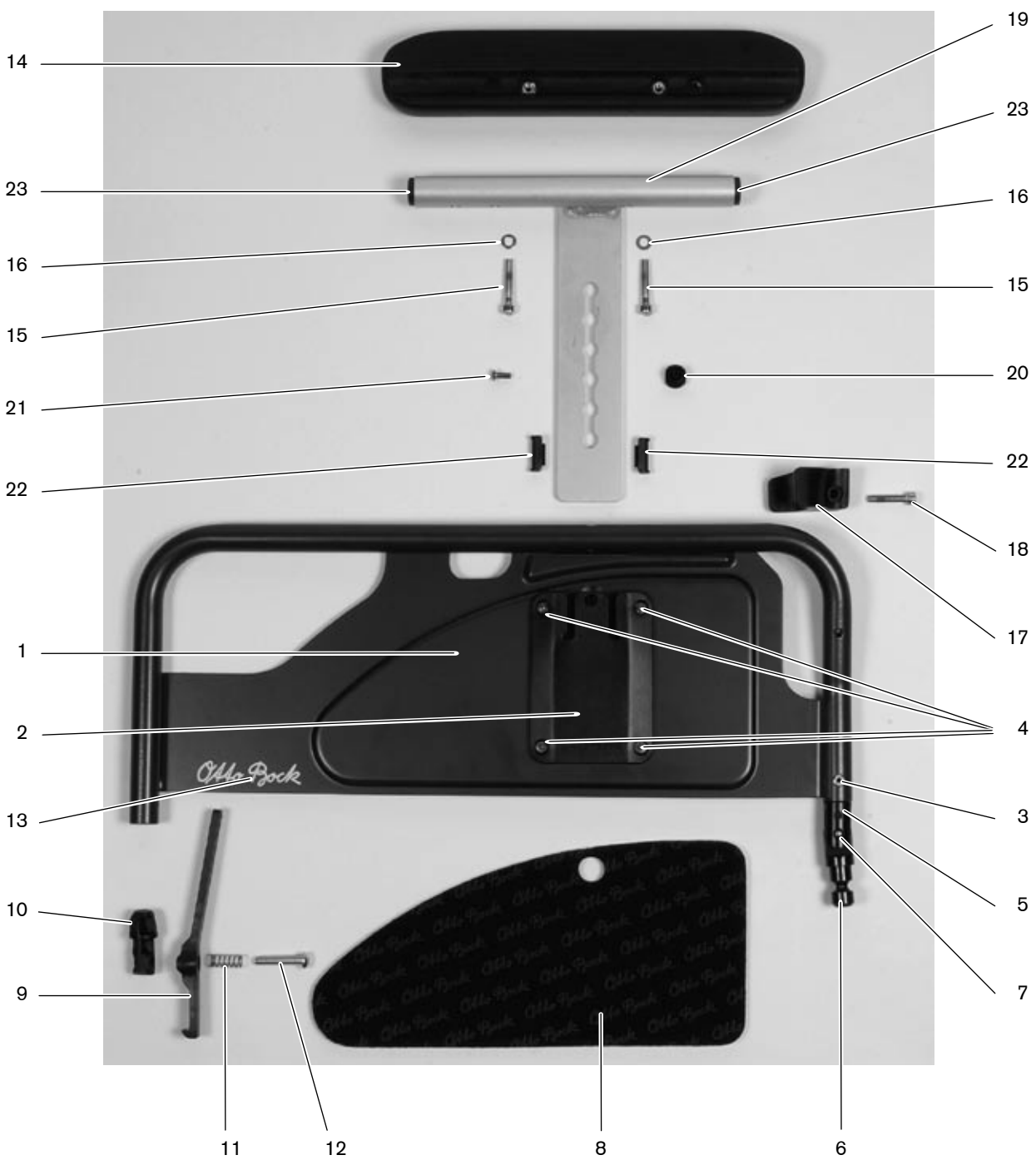

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E09=PK090	Seitenteil lang abnehmbar, kpl. Modell T, Ti 8.9 und VR (Version bis 10/03)*	1	Paar
	481E09=LK090	Seitenteil lang abnehmbar, links, kpl. Modell T, Ti 8.9 und VR (Pos. 1-23) (Version bis 10/03)*	1	St.
	481E09=RK090	Seitenteil lang abnehmbar, rechts, kpl. Modell T, Ti 8.9 und VR (Version bis 10/03)*	1	St.
	481E08=LV101	Seitenteil lang höhenverstellbar, links (Pos. 1-7)*	1	St.
	481E08=RV101	Seitenteil lang höhenverstellbar, rechts*	1	St.
1		Seitenteil lang höhenverstellbar, links*	1	St.
o. B.		Seitenteil lang höhenverstellbar, rechts*	1	St.
2		Höhenverstellung	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	1	St.
o. B.		Scheibe DIN 125, A2	4	St.
4		Blindniet DIN 7337	4	St.
	481E08=SV079	Gelenk vormontiert (Einzelteile s. Seite 152, 153 Pos. 5-7)	1	St.
8	481E08=LT056	Neopreneinlage für Höhenverstellung	1	St.
o. B.	481E08=RT056	Neopreneinlage für Höhenverstellung	1	St.
	481E09=SK006	Verriegelung kpl. (Einzelteile s. Seite 152, 153 Pos. 9-12)	1	St.
	481E09=SW051	Montagezubehör für Seitenteil abnehmbar (Einzelteile s. Seite 152, 153)	1	St.
13	481E00=ST084	Aufkleber „Otto Bock“ weiß oder	1	St.
13	481E00=ST085	Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.
14	481E09=ST014	Armauflage 270/83 mm	1	St.
15	501T50=2	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x30, verzinkt	2	St.
16	507U27=5.3	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
17	481E08=LT073	Sperre	1	St.
18	501T50=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x25, verzinkt	1	St.
19	481E08=LE057	Armlehnenhalter	1	St.
o. B.	481E08=RE057	Armlehnenhalter	1	St.
	481E08=SW071	Montagezubehör für Armlehnenhalter (Einzelteile s. Seite 152, 153 Pos. 20-23)	1	St.

* Rahmenfarbe:

Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken standard.
Seitenteil lang bei Modell VR erst ab ST40 möglich.

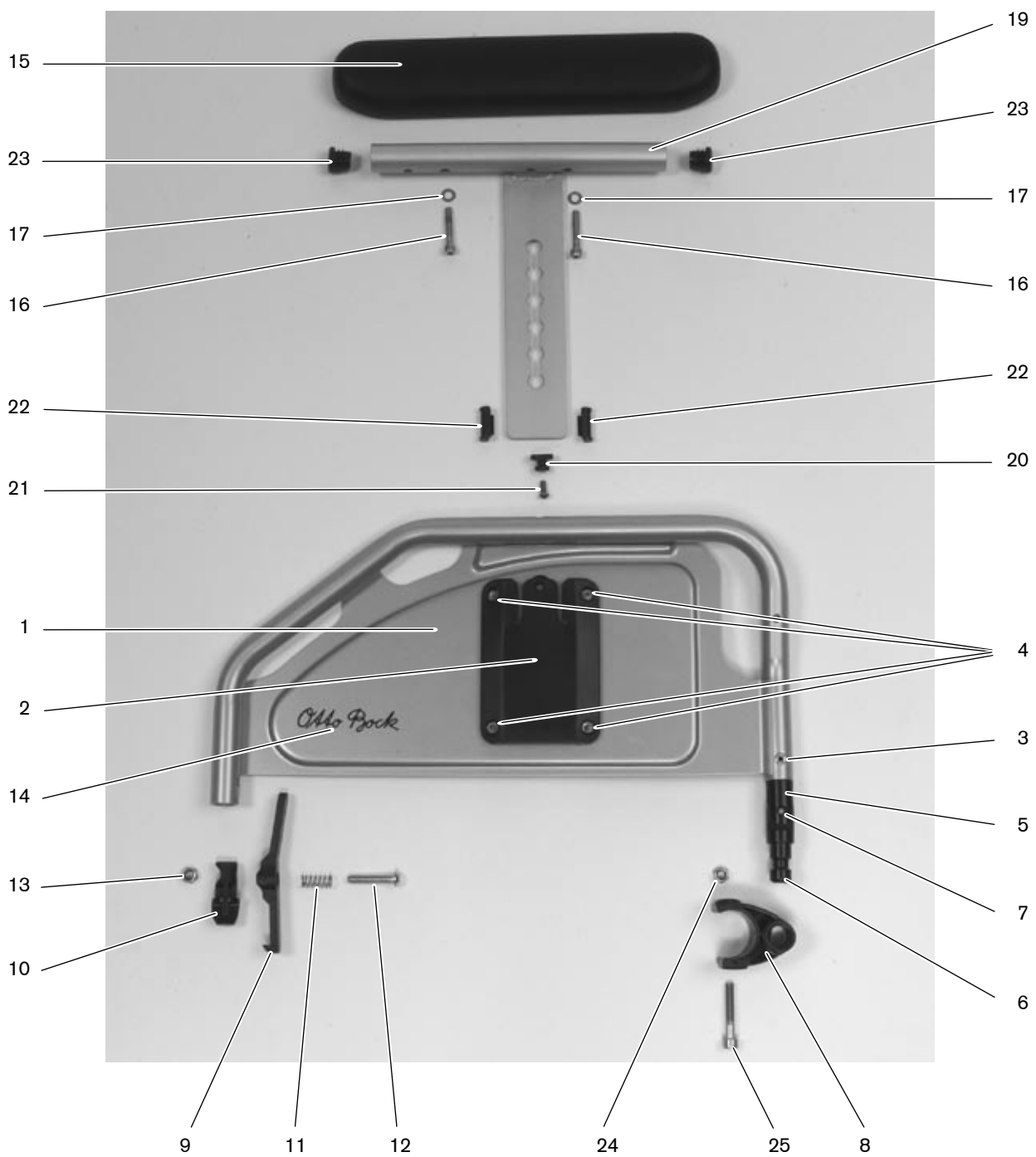


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK125	Seitenteil mit Armauflage abnehmbar, kpl. Modell VR und Teen2 (Version bis 10/03)*	1	Paar
	481E45=LK125	Seitenteil mit Armauflage abnehmbar, links, kpl. Modell VR und Teen2 (Pos. 1-25) (Version bis 10/03)*	1	St.
	481E45=RK125	Seitenteil mit Armauflage abnehmbar, rechts, kpl. Modell VR und Teen2 (Version 10/03)*	1	St.
	481E05=LV019	Seitenteil höhenverstellbar, links (Pos. 1-7)*	1	St.
	481E05=RV019	Seitenteil höhenverstellbar, rechts*	1	St.
1		Seitenteil höhenverstellbar, links*	1	St.
o. B.		Seitenteil höhenverstellbar, rechts*	1	St.
2		Höhenverstellung	1	St.
3		Blindniet DIN 7337	1	St.
o. B.		Scheibe DIN 125, A2	4	St.
4		Blindniet DIN 7337	4	St.
	481E08=SV079	Gelenk vormontiert (Einzelteile s. Seite 152, 153 Pos. 5-7)	1	St.
o. B.	481E08=LT056	Neopreneinlage für Höhenverstellung	1	St.
o. B.	481E08=RT056	Neopreneinlage für Höhenverstellung	1	St.
	481E09=SK006	Verriegelung kpl. (Pos. 9-13 Einzelteile s. Seite 152, 153 Pos. 9-12)	1	St.
	481E09=SW051	Montagezubehör für Seitenteil abnehmbar (Pos. 8, 24, 25 Einzelteile s. Seite 152, 153)	1	St.
14	481E00=ST084	Aufkleber „Otto Bock“ weiß oder	1	St.
14	481E00=ST085	Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.
15	481E09=ST014	Armauflage 270/83 mm	1	St.
16	501T50=2	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x30, verzinkt	2	St.
17	507U27=5.3	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
o. B.	481E08=LT073	Sperre	1	St.
o. B.	481E45=RT073	Sperre	1	St.
o. B.	501T50=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x25, verzinkt	1	St.
19	481E08=LE057	Armlehnenhalter	1	St.
o. B.	481E08=RE057	Armlehnenhalter	1	St.
	481E08=SW071	Montagezubehör für Armlehnenhalter (Pos. 20-23 Einzelteile s. Seite 152, 153 Pos. 21-24)	1	St.

* Rahmenfarbe:

Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken standard.

Seitenteil mit Armauflage abnehmbar bei Modell VR nur für ST36 und 38.

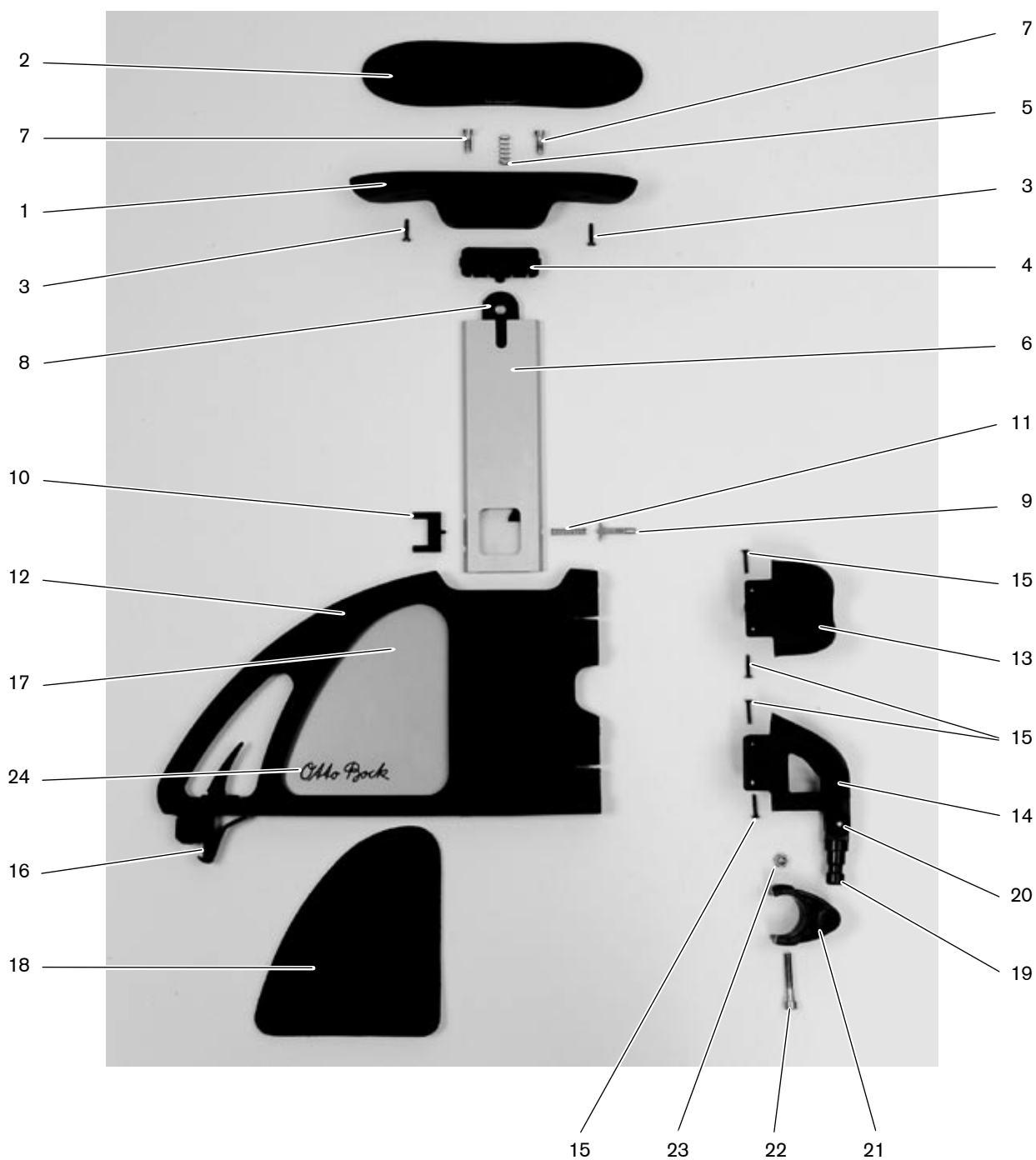

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK054	Seitenteil mit kurzer Armauflage kpl. Modell VR und Teen2*	1	Paar
	481E45=LK054	Seitenteil mit kurzer Armauflage links, kpl.	1	St.
		Modell VR und Teen2 (Pos. 1-24)*		
	481E45=RK054	Seitenteil mit kurzer Armauflage rechts, kpl.	1	St.
		Modell VR und Teen2*		
	481E45=LK071	Armlehne kurz, links (Pos. 1-11)	1	St.
	481E45=RK071	Armlehne kurz, rechts	1	St.
1	481E45=ST073	Polsterschale kurz	1	St.
2	481E45=SV076	Gelkissen Technogel, kurz	1	St.
3	501S114=4	Senkschraube für Kunststoff, M4x18, schwarz	2	St.
4	481E45=ST075	Taster	1	St.
5	513D52=6	Druckfeder	1	St.
6	481E45=SE011	Schwert	1	St.
7	501T45=M6x14	Zylinderschraube DIN 912, A2	2	St.
8	481E45=ST016	Mitnehmer	1	St.
9	481E45=ST017	Bolzen	1	St.
10	481E45=ST018	Klemmfeder	1	St.
11	513D52=31	Druckfeder	1	St.
12	481E45=ST066	Basisträger kurz	1	St.
13	481E45=ST069	Halter oben	1	St.
14	481E45=LT068	Gelenk	1	St.
o. B.	481E45=RT068	Gelenk	1	St.
15	501S114=4	Senkschraube für Kunststoff, M4x18, schwarz	4	St.
16	481E45=ST070	Hebel	1	St.
o. B.	506S9=2x18	Spannstift geschlitzt DIN EN 28752, schwarz	1	St.
17	481E45=SB083	Blecheinlage vorn, bunt beschichtet*	1	St.
o. B.	501S114=2	Senkschraube für Kunststoff, M3x8, schwarz	3	St.
18	481E45=LT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
o. B.	481E45=RT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
19	481E08=SS083	Gelenkzapfen	1	St.
20	506A26=4x25	Knebelkerbstift ISO 8742	1	St.
	481E09=SW051	Montagezubehör für Seitenteil abnehmbar	1	St.
		(Einzelteile s. Seite 152, 153 Pos. 21-23)		
24	481E00=ST084	Aufkleber „Otto Bock“ weiß	1	St.
		oder		
24	481E00=ST085	Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.

* Rahmenfarbe:

Hinweis: Nur für Standard-Rücken.

Seitenteil mit kurzer Armauflage bei Modell VR nur für ST36 und 38.


Seitenteil mit kurzer Armauflage bei Modell Teen2 VR nicht möglich.

Seitenteil mit kurzer Armauflage bei Modell Teen2 erst möglich ab ST34/RH22,5.

Bei Anbau Seitenteil mit kurzer Armauflage in Verbindung mit Trommelbremsrad nur 0° Radsturz möglich.

Bitte beachten: Bei Anbau Seitenteil mit kurzer Armauflage in Verbindung mit Radsturz 4° muss der Fitting

481G45=ST026 verwendet werden.

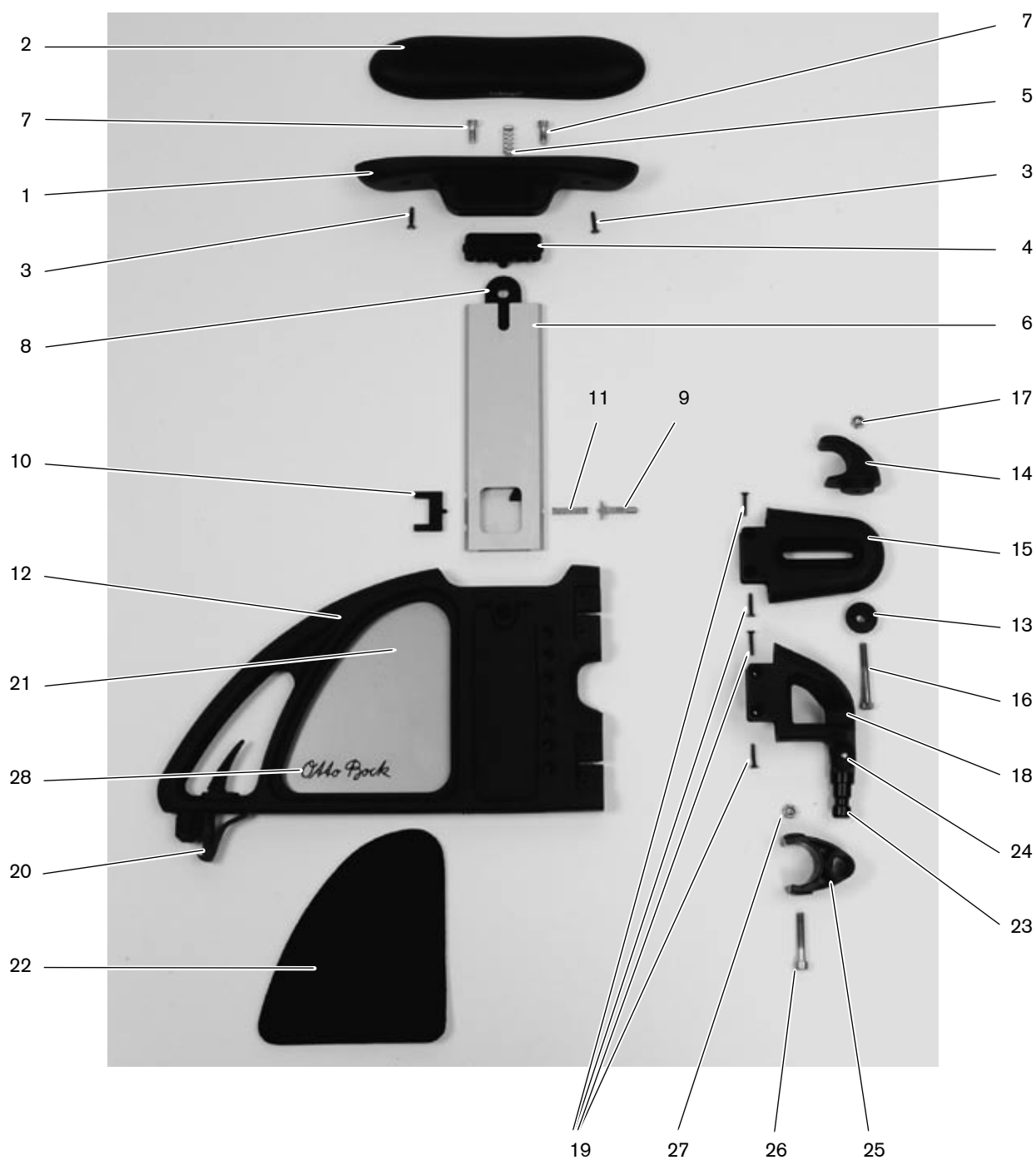

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK052	Seitenteil mit kurzer Armauflage kpl. Modell VR und Teen2*	1	Paar
	481E45=LK052	Seitenteil mit kurzer Armauflage links, kpl. Modell VR und Teen2 (Pos. 1-28)*	1	St.
	481E45=RK052	Seitenteil mit kurzer Armauflage rechts, kpl. Modell VR und Teen2*	1	St.
	481E45=LK071	Armlehne kurz, links (Einzelteile s. Seite 158, 159 Pos. 1-11)	1	St.
	481E45=RK071	Armlehne kurz, rechts	1	St.
12	481E45=ST066	Basisträger kurz	1	St.
	481E45=SV118	Rasterung Ergo-Rücken (Pos. 13-17)	1	St.
13	481E45=ST106	Raste	1	St.
14	481E45=ST107	Riegel	1	St.
15	481E45=ST108	Halter oben Ergo	1	St.
16	501T39=M6x45	Zylinderschraube DIN 6912, A2	1	St.
17	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
18	481E45=LT068	Gelenk	1	St.
o. B.	481E45=RT068	Gelenk	1	St.
19	501S114=4	Senkschraube für Kunststoff, M4x18, schwarz	4	St.
20	481E45=ST070	Hebel	1	St.
o. B.	506S9=2x18	Spannstift geschlitzt DIN EN 28752, schwarz	1	St.
21	481E45=SB083	Blecheinlage vorn, bunt beschichtet*	1	St.
o. B.	501S114=2	Senkschraube für Kunststoff, M3x8, schwarz	3	St.
22	481E45=LT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
o. B.	481E45=RT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
23	481E08=SS083	Gelenkzapfen	1	St.
24	506A26=4x25	Knebelkerbstift ISO 8742	1	St.
	481E09=SW051	Montagezubehör für Seitenteil abnehmbar (Einzelteile s. Seite 152, 153 Pos. 25-27)	1	St.
28	481E00=ST084	Aufkleber „Otto Bock“ weiß oder	1	St.
28	481E00=ST085	Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.

* Rahmenfarbe:

Hinweis: Nur für Ergo-Rücken.


Seitenteil mit kurzer Armauflage bei Modell VR nur für ST36 und 38.

Seitenteil mit kurzer Armauflage bei Modell Teen2 VR nicht möglich.

Seitenteil mit kurzer Armauflage bei Modell Teen2 erst möglich ab ST34/RH22,5.

Bei Anbau Seitenteil mit kurzer Armauflage in Verbindung mit Trommelbremsrad nur 0° Radsturz möglich.

Bitte beachten: Bei Anbau Seitenteil mit kurzer Armauflage in Verbindung mit Radsturz 4° muss der Fitting
481G45=ST026 verwendet werden.

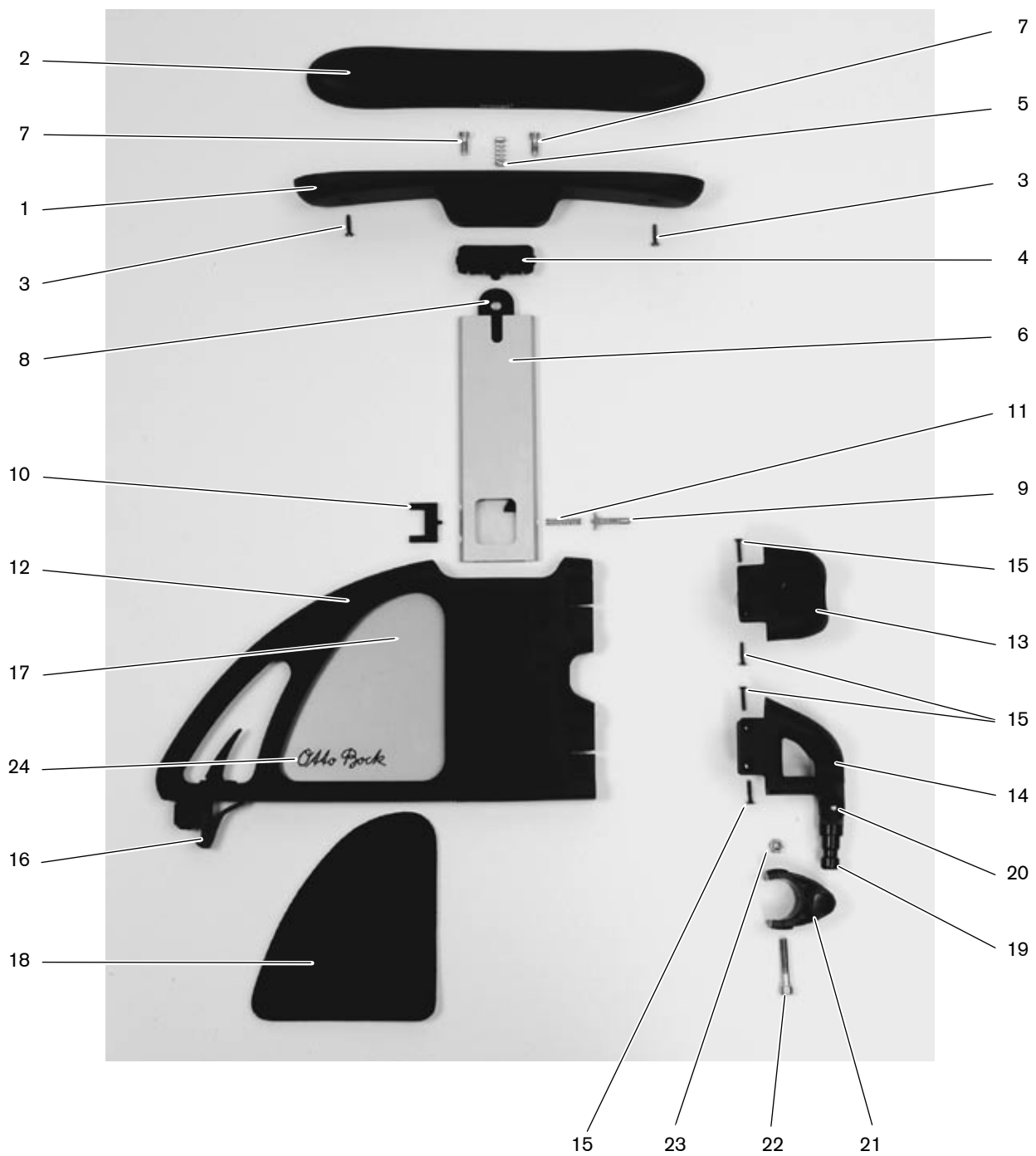

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK119	Seitenteil mit langer Armauflage kpl. Modell VR und Teen2*	1	Paar
	481E45=LK119	Seitenteil mit langer Armauflage links, kpl.	1	St.
		Modell VR und Teen2 (Pos. 1-24)*		
	481E45=RK119	Seitenteil mit langer Armauflage rechts, kpl.*	1	St.
		Modell VR und Teen2		
	481E45=LK072	Armlehne lang, links (Pos. 1-11)	1	St.
	481E45=RK072	Armlehne lang, rechts	1	St.
1	481E45=ST074	Polsterschale lang	1	St.
2	481E45=SV077	Gelkissen Technogel, lang	1	St.
3	501S114=4	Senkschraube für Kunststoff, M4x18, schwarz	2	St.
4	481E45=ST075	Taster	1	St.
5	513D52=6	Druckfeder	1	St.
6	481E45=SE011	Schwert	1	St.
7	501T45=M6x14	Zylinderschraube DIN 912, A2	2	St.
8	481E45=ST016	Mitnehmer	1	St.
9	481E45=ST017	Bolzen	1	St.
10	481E45=ST018	Klemmfeder	1	St.
11	513D52=31	Druckfeder	1	St.
12	481E45=ST066	Basisträger kurz	1	St.
13	481E45=ST069	Halter oben	1	St.
14	481E45=LT068	Gelenk	1	St.
o. B.	481E45=RT068	Gelenk	1	St.
15	501S114=4	Senkschraube für Kunststoff, M4x18, schwarz	4	St.
16	481E45=ST070	Hebel	1	St.
o. B.	506S9=2x18	Spannstift geschlitzt DIN EN 28752, schwarz	1	St.
17	481E45=SB083	Blecheinlage vorn, bunt beschichtet *	1	St.
o. B.	501S114=2	Senkschraube für Kunststoff, M3x8, schwarz	3	St.
18	481E45=LT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
o. B.	481E45=RT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
19	481E08=SS083	Gelenkzapfen	1	St.
20	506A26=4x25	Knebelkerbstift ISO 8742	1	St.
	481E09=SW051	Montagezubehör für Seitenteil abnehmbar	1	St.
		(Pos. 21-23, Einzelteile s. Seite 152, 153)		
24	481E00=ST084	Aufkleber „Otto Bock“ weiß	1	St.
		oder		
24	481E00=ST085	Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.

* Rahmenfarbe:

Hinweis: Nur für Standard-Rücken.

Seitenteil mit langer Armauflage bei Modell VR nur für ST36 und 38.


Seitenteil mit langer Armauflage bei Modell Teen2 VR nicht möglich.

Seitenteil mit langer Armauflage bei Modell Teen2 erst möglich ab ST34/RH22,5.

Bei Anbau Seitenteil mit langer Armauflage in Verbindung mit Trommelbremsrad nur 0° Radsturz möglich.

Bitte beachten: Bei Anbau Seitenteil mit langer Armauflage in Verbindung mit Radsturz 4° muss der Fitting

481G45=ST026 verwendet werden.

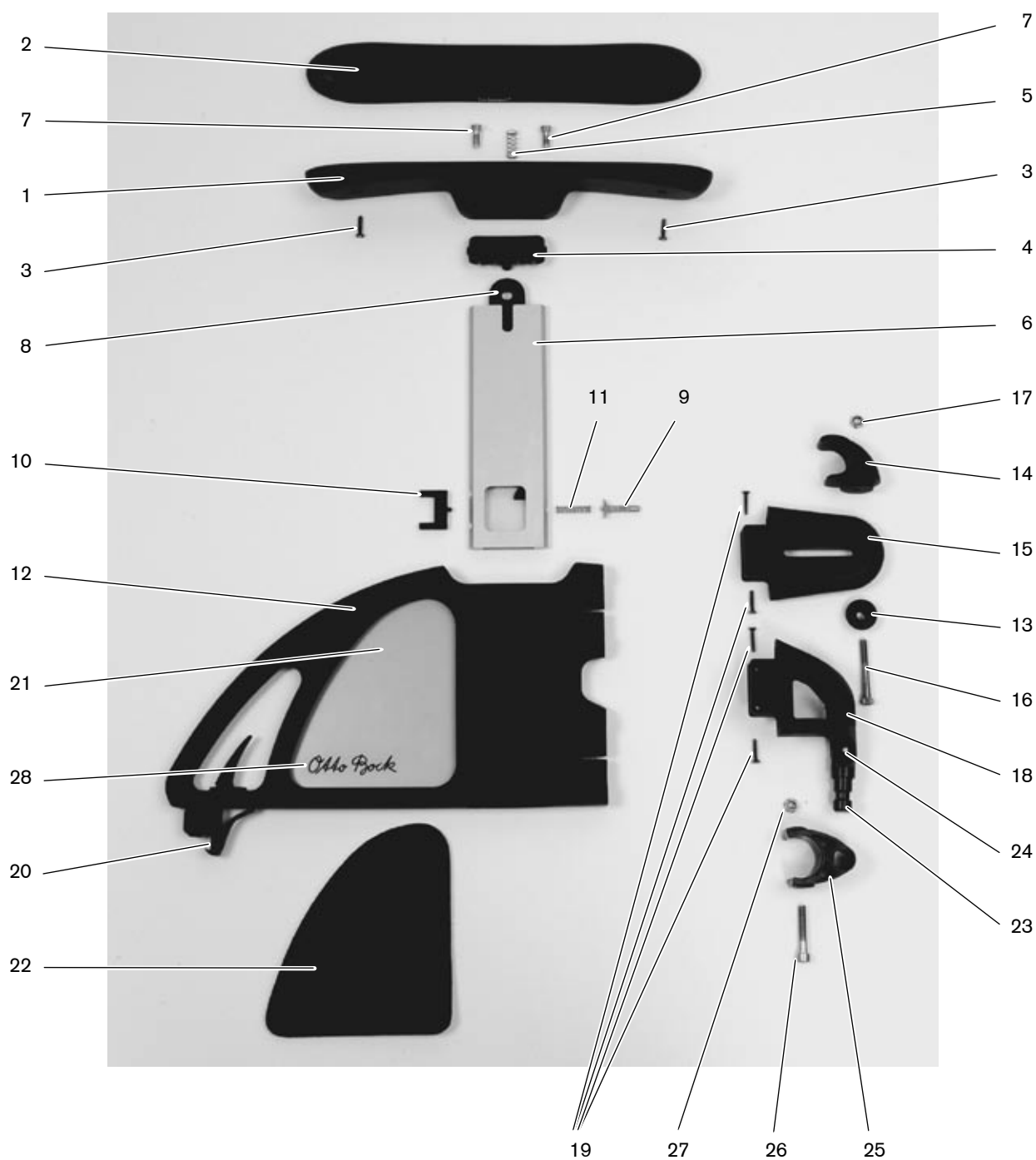

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK120	Seitenteil mit langer Armauflage kpl. Modell VR und Teen2*	1	Paar
	481E45=LK120	Seitenteil mit langer Armauflage links, kpl. Modell VR und Teen2 (Pos. 1-28)*	1	St.
	481E45=RK120	Seitenteil mit langer Armauflage rechts, kpl.* Modell VR und Teen2	1	St.
	481E45=LK072	Armlehne lang, links (Pos. 1-11, Einzelteile s. Seite 162, 163)	1	St.
	481E45=RK072	Armlehne lang, rechts	1	St.
12	481E45=ST066	Basisträger kurz	1	St.
	481E45=SV118	Rasterung Ergo-Rücken (Pos. 13-17, Einzelteile s. Seite 160, 161)	1	St.
18	481E45=LT068	Gelenk	1	St.
o. B.	481E45=RT068	Gelenk	1	St.
19	501S114=4	Senkschraube für Kunststoff, M4x18, schwarz	4	St.
20	481E45=ST070	Hebel	1	St.
o. B.	506S9=2x18	Spannstift geschlitz DIN EN 28752, schwarz	1	St.
21	481E45=SB083	Blecheinlage vorn, bunt beschichtet*	1	St.
o. B.	501S114=2	Senkschraube für Kunststoff, M3x8, schwarz	3	St.
22	481E45=LT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
o. B.	481E45=RT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
23	481E08=SS083	Gelenkzapfen	1	St.
24	506A26=4x25	Knebelkerbstift ISO 8742	1	St.
	481E09=SW051	Montagezubehör für Seitenteil abnehmbar (Pos. 25-27, Einzelteile s. Seite 152, 153)	1	St.
28	481E00=ST084	Aufkleber „Otto Bock“ weiß oder	1	St.
28	481E00=ST085	Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.

* Rahmenfarbe:

Hinweis: Nur für Ergo-Rücken.


Seitenteil mit langer Armauflage bei Modell VR nur für ST36 und 38.

Seitenteil mit langer Armauflage bei Modell Teen2 VR nicht möglich.

Seitenteil mit langer Armauflage bei Modell Teen2 erst möglich ab ST34/RH22,5.

Bei Anbau Seitenteil mit langer Armauflage in Verbindung mit Trommelbremsrad nur 0° Radsturz möglich.

Bitte beachten: Bei Anbau Seitenteil mit langer Armauflage in Verbindung mit Radsturz 4° muss der Fitting
481G45=ST026 verwendet werden.

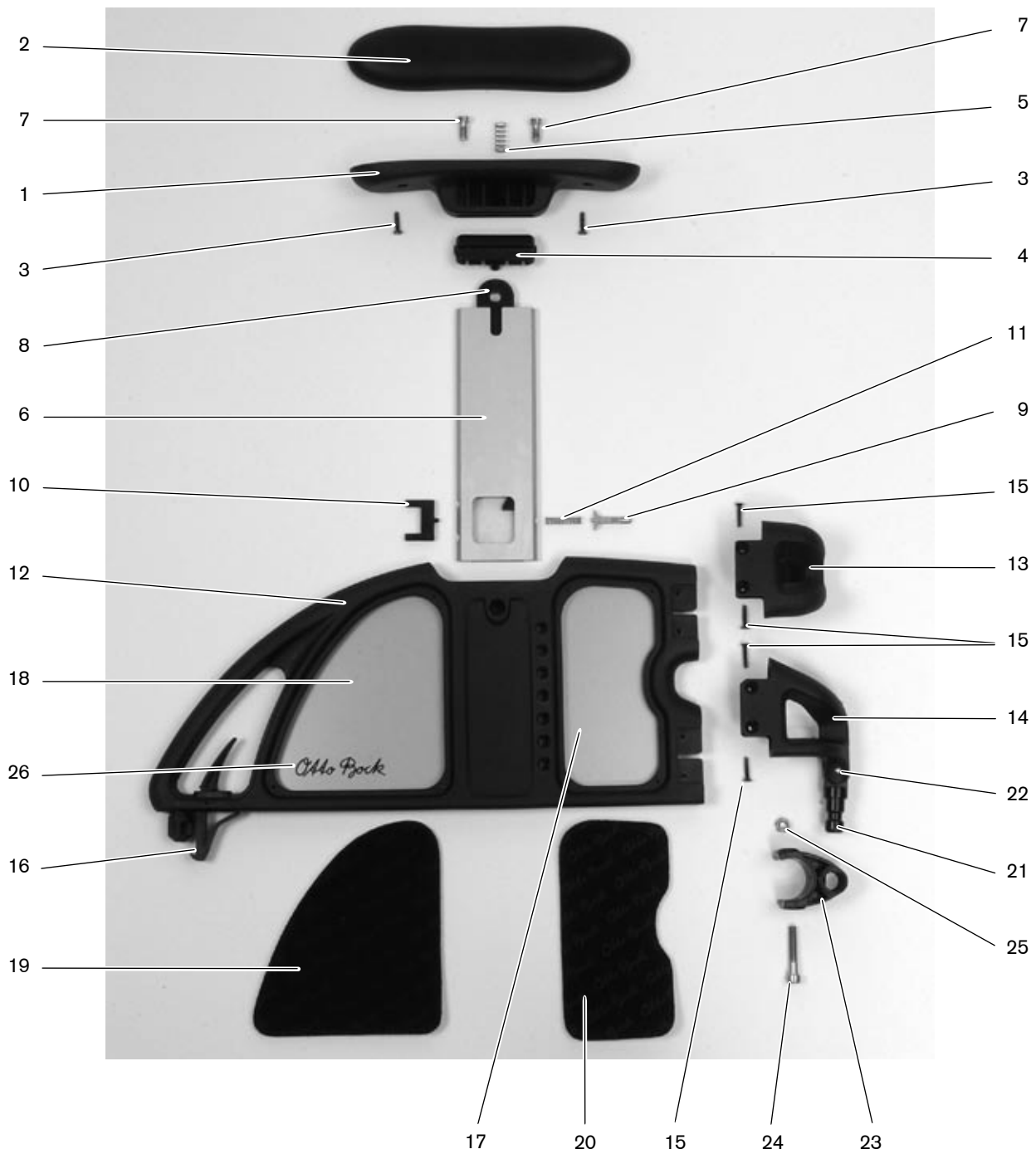

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK090	Seitenteil mit kurzer Armauflage kpl. Modell T, Ti8.9, VR und XXL2*	1	Paar
	481E45=LK090	Seitenteil mit kurzer Armauflage links, kpl. Modell T, Ti8.9, VR und XXL2 (Pos. 1-26)*	1	St.
	481E45=RK090	Seitenteil mit kurzer Armauflage rechts, kpl. Modell T, Ti8.9, VR und XXL2*	1	St.
	481E45=LK071	Armlehne kurz, links (Pos. 1-11, Einzelteile s. Seite 158, 159)	1	St.
	481E45=RK071	Armlehne kurz, rechts	1	St.
12	481E45=ST067	Basisträger lang	1	St.
13	481E45=ST069	Halter oben	1	St.
14	481E45=LT068	Gelenk	1	St.
o. B.	481E45=RT068	Gelenk	1	St.
15	501S114=4	Senkschraube für Kunststoff, M4x18, schwarz	4	St.
16	481E45=ST070	Hebel	1	St.
o. B.	506S9=2x18	Spannstift geschlitzt DIN EN 28752, schwarz	1	St.
17	481E45=SB082	Blecheinlage hinten, bunt beschichtet*	1	St.
18	481E45=SB083	Blecheinlage vorn, bunt beschichtet*	1	St.
o. B.	501S114=2	Senkschraube für Kunststoff, M3x8, schwarz	7	St.
19	481E45=LT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
o. B.	481E45=RT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
20	481E45=LT085	Neopreneinlage hinten	1	St.
o. B.	481E45=RT085	Neopreneinlage hinten	1	St.
21	481E08=SS083	Gelenkzapfen	1	St.
22	506A26=4x25	Knebelkerbstift ISO 8742	1	St.
	481E09=SW051	Montagezubehör für Seitenteil abnehmbar (Pos. 23-25, Einzelteile s. Seite 152, 153)	1	St.
26	481E00=ST084	Aufkleber „Otto Bock“ weiß oder	1	St.
26	481E00=ST085	Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.


* Rahmenfarbe:

Hinweis: Nur für Standard-Rücken.

Seitenteil mit kurzer Armauflage bei Modell VR erst ab ST40 möglich.

Bei Anbau Seitenteil mit kurzer Armauflage in Verbindung mit Trommelbremsrad nur 0° Radsturz möglich.

Bitte beachten: Bei Anbau Seitenteil mit kurzer Armauflage in Verbindung mit Radsturz 4° muss der Fitting
481G45=ST026 verwendet werden.

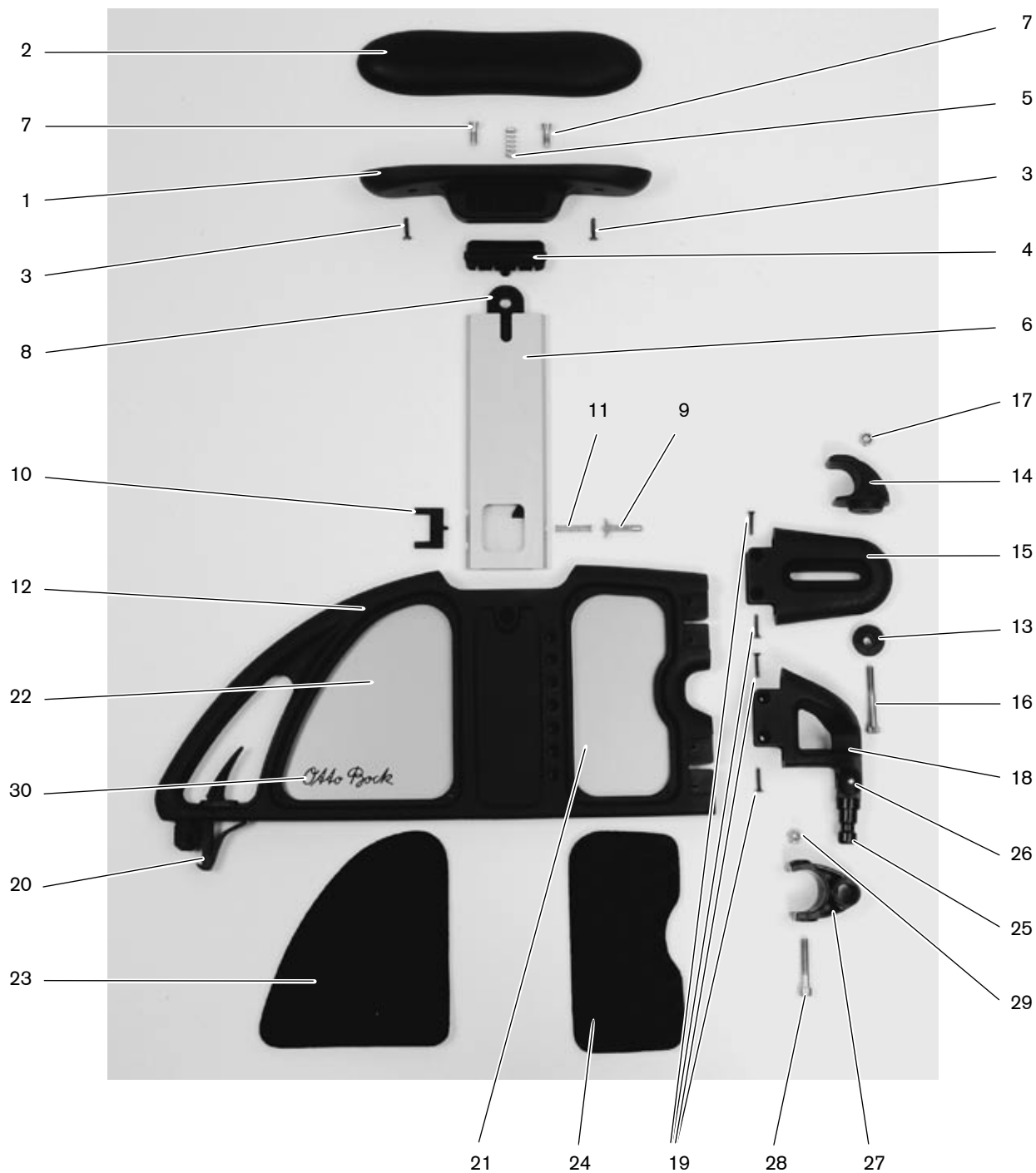

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK064	Seitenteil mit kurzer Armauflage kpl.	1	Paar
		Modell T, Ti8.9, VR und XXL2*		
	481E45=LK064	Seitenteil mit kurzer Armauflage links, kpl.	1	St.
		Modell T, Ti8.9, VR und XXL2 (Pos. 1-30)*		
	481E45=RK064	Seitenteil mit kurzer Armauflage rechts, kpl.	1	St.
		Modell T, Ti8.9, VR und XXL2*		
	481E45=LK071	Armlehne kurz, links (Pos. 1-11, Einzelteile s. Seite 158, 159)	1	St.
	481E45=RK071	Armlehne kurz, rechts	1	St.
12	481E45=ST067	Basisträger lang	1	St.
	481E45=SV118	Rasterung Ergo-Rücken (Pos. 13-17, Einzelteile s. Seite 160, 161)	1	St.
18	481E45=LT068	Gelenk	1	St.
o. B.	481E45=RT068	Gelenk	1	St.
19	501S114=4	Senkschraube für Kunststoff, M4x18, schwarz	4	St.
20	481E45=ST070	Hebel	1	St.
o. B.	506S9=2x18	Spannstift geschlitzt DIN EN 28752, schwarz	1	St.
21	481E45=SB082	Blecheinlage hinten, bunt beschichtet*	1	St.
22	481E45=SB083	Blecheinlage vorn, bunt beschichtet*	1	St.
o. B.	501S114=2	Senkschraube für Kunststoff, M3x8, schwarz	7	St.
23	481E45=LT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
o. B.	481E45=RT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
24	481E45=LT085	Neopreneinlage hinten	1	St.
o. B.	481E45=RT085	Neopreneinlage hinten	1	St.
25	481E08=SS083	Gelenkzapfen	1	St.
26	506A26=4x25	Knebelkerbstift ISO 8742	1	St.
	481E09=SW051	Montagezubehör für Seitenteil abnehmbar	1	St.
		(Pos. 27-29, Einzelteile s. Seite 152, 153)		
30	481E00=ST084	Aufkleber „Otto Bock“ weiß	1	St.
		oder		
30	481E00=ST085	Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.


* Rahmenfarbe:

Hinweis: Nur für Ergo-Rücken.

Seitenteil mit kurzer Armauflage bei Modell VR erst möglich ab ST40.

Bei Anbau Seitenteil mit kurzer Armauflage in Verbindung mit Trommelbremsrad nur 0° Radsturz möglich.

Bitte beachten: Bei Anbau Seitenteil mit kurzer Armauflage in Verbindung mit Radsturz 4° muss der Fitting
481G45=ST026 verwendet werden.

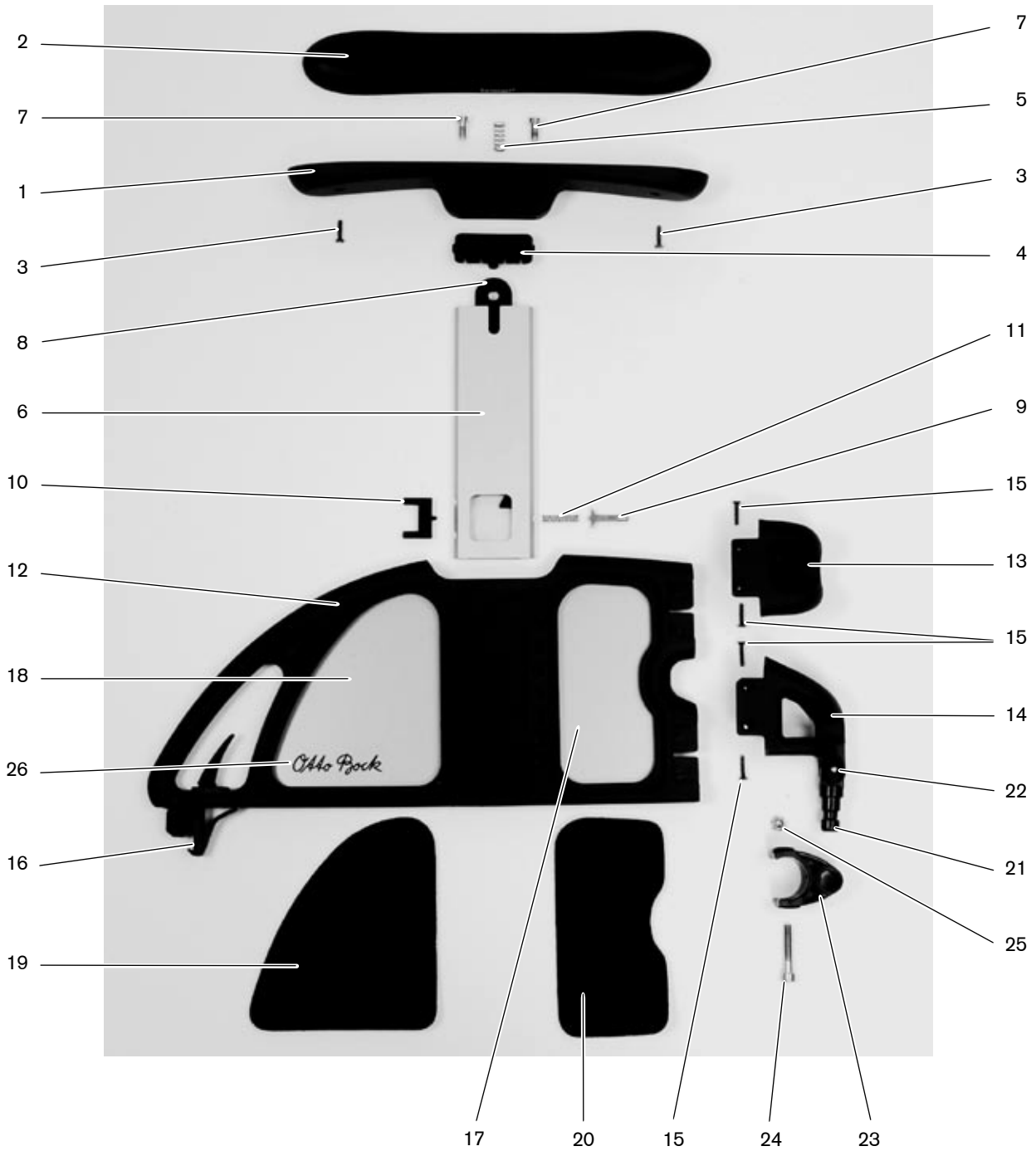

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK100	Seitenteil mit langer Armauflage kpl. Modell T, Ti8.9, VR und XXL2*	1	Paar
	481E45=LK100	Seitenteil mit langer Armauflage links, kpl. Modell T, Ti8.9, VR und XXL2 (Pos. 1-26)*	1	St.
	481E45=RK100	Seitenteil mit langer Armauflage rechts, kpl. Modell T, Ti8.9, VR und XXL2*	1	St.
	481E45=LK072	Armlehne lang, links (Pos. 1-11, Einzelteile s. Seite 162, 163)	1	St.
	481E45=RK072	Armlehne lang, rechts	1	St.
12	481E45=ST067	Basisträger lang	1	St.
13	481E45=ST069	Halter oben	1	St.
14	481E45=LT068	Gelenk	1	St.
o. B.	481E45=RT068	Gelenk	1	St.
15	501S114=4	Senkschraube für Kunststoff, M4x18, schwarz	4	St.
16	481E45=ST070	Hebel	1	St.
o. B.	506S9=2x18	Spannstift geschlitzt DIN EN 28752, schwarz	1	St.
17	481E45=SB082	Blecheinlage hinten, bunt beschichtet*	1	St.
18	481E45=SB083	Blecheinlage vorn, bunt beschichtet*	1	St.
o. B.	501S114=2	Senkschraube für Kunststoff, M3x8, schwarz	7	St.
19	481E45=LT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
o. B.	481E45=RT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
20	481E45=LT085	Neopreneinlage hinten	1	St.
o. B.	481E45=RT085	Neopreneinlage hinten	1	St.
21	481E08=SS083	Gelenkzapfen	1	St.
22	506A26=4x25	Knebelkerbstift ISO 8742	1	St.
	481E09=SW051	Montagezubehör für Seitenteil abnehmbar (Pos. 23-25, Einzelteile s. Seite 152, 153)	1	St.
26	481E00=ST084	Aufkleber „Otto Bock“ weiß oder	1	St.
26	481E00=ST085	Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.


* Rahmenfarbe:

Hinweis: Nur für Standard-Rücken.

Seitenteil mit langer Armauflage bei Modell VR erst ab ST40 möglich.

Bei Anbau Seitenteil mit langer Armauflage in Verbindung mit Trommelbremsrad nur 0° Radsturz möglich.

Bitte beachten: Bei Anbau Seitenteil mit langer Armauflage in Verbindung mit Radsturz 4° muss der Fitting
481G45=ST026 verwendet werden.

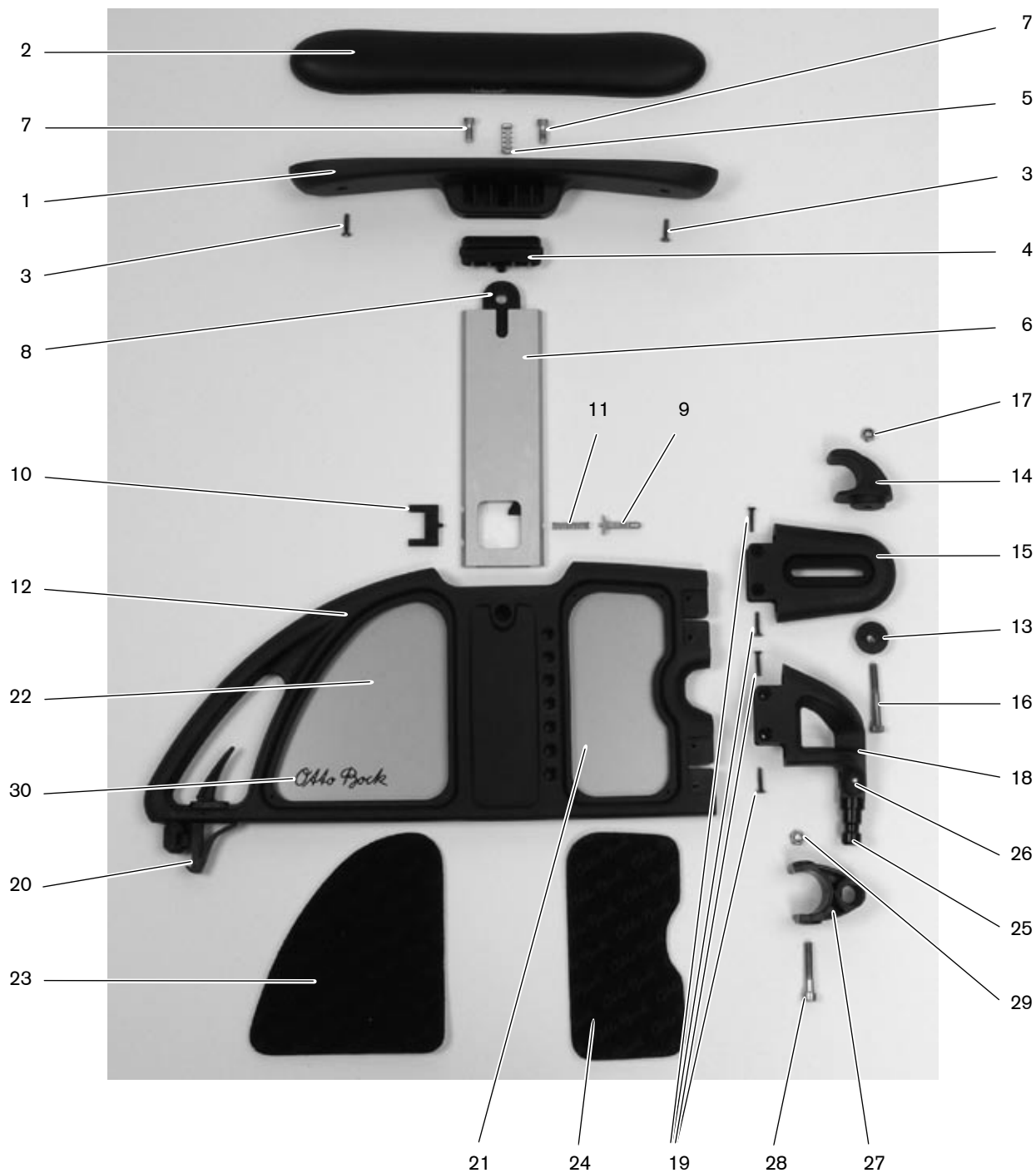

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=PK110	Seitenteil mit langer Armauflage kpl. Modell T, Ti8.9, VR und XXL2*	1	Paar
	481E45=LK110	Seitenteil mit langer Armauflage links, kpl. Modell T, Ti8.9, VR und XXL2 (Pos. 1-30)*	1	St.
	481E45=RK110	Seitenteil mit langer Armauflage rechts, kpl. Modell T, Ti8.9, VR und XXL2*	1	St.
	481E45=LK072	Armlehne lang, links (Pos. 1-11, Einzelteile s. Seite 162, 163)	1	St.
	481E45=RK072	Armlehne lang, rechts	1	St.
12	481E45=ST067	Basisträger lang	1	St.
	481E45=SV118	Rasterung Ergo-Rücken (Pos. 13-17, Einzelteile s. Seite 160,161)	1	St.
18	481E45=LT068	Gelenk	1	St.
o. B.	481E45=RT068	Gelenk	1	St.
19	501S114=4	Senkschraube für Kunststoff, M4x18, schwarz	4	St.
20	481E45=ST070	Hebel	1	St.
o. B.	506S9=2x18	Spannstift geschlitzt DIN EN 28752, schwarz	1	St.
21	481E45=SB082	Blecheinlage hinten, bunt beschichtet*	1	St.
22	481E45=SB083	Blecheinlage vorn, bunt beschichtet*	1	St.
o. B.	501S114=2	Senkschraube für Kunststoff, M3x8, schwarz	7	St.
23	481E45=LT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
o. B.	481E45=RT084	Neopreneinlage vorn	1	St.
24	481E45=LT085	Neopreneinlage hinten	1	St.
o. B.	481E45=RT085	Neopreneinlage hinten	1	St.
25	481E08=SS083	Gelenkzapfen	1	St.
26	506A26=4x25	Knebelkerbstift ISO 8742	1	St.
	481E09=SW051	Montagezubehör für Seitenteil abnehmbar (Pos. 27-29, Einzelteile s. Seite 152, 153)	1	St.
30	481E00=ST084	Aufkleber „Otto Bock“ weiß oder	1	St.
30	481E00=ST085	Aufkleber „Otto Bock“ schwarz	1	St.

* Rahmenfarbe:

Hinweis: Nur für Ergo-Rücken.

Seitenteil mit langer Armauflage bei Modell VR erst möglich ab ST40.


Bei Anbau Seitenteil mit langer Armauflage in Verbindung mit Trommelbremsrad nur 0° Radsturz möglich.

Bitte beachten: Bei Anbau Seitenteil mit langer Armauflage in Verbindung mit Radsturz 4° muss der Fitting

481G45=ST026 verwendet werden.


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E45=SV065	Adapter für Seitenteil ab hinterer Sitzhöhe 48 cm, kpl. (Pos. 1-7)	1	St.
1	481E45=SE065	Adapter	1	St.
2	507U45=15x6.2x1	Scheibe	2	St.
3	433A1=7	Schraubenkappe	2	St.
o. B.	501T43=M6x16	Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, A2	2	St.
4	507U35=6x12x0.5	Passscheibe DIN 988	2	St.
5	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	2	St.
6	501T40=3	Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x30, A2	2	St.
7	481G00=ST006	Sechskantschutzkappe für M6	2	St.

Hinweis: Nicht möglich in Verbindung mit Kleiderschutz steckbar, Desk-Seitenteil mit höhenverstellbarer Armauflage und Seitenteil lang mit höhenverstellbarer Armauflage.

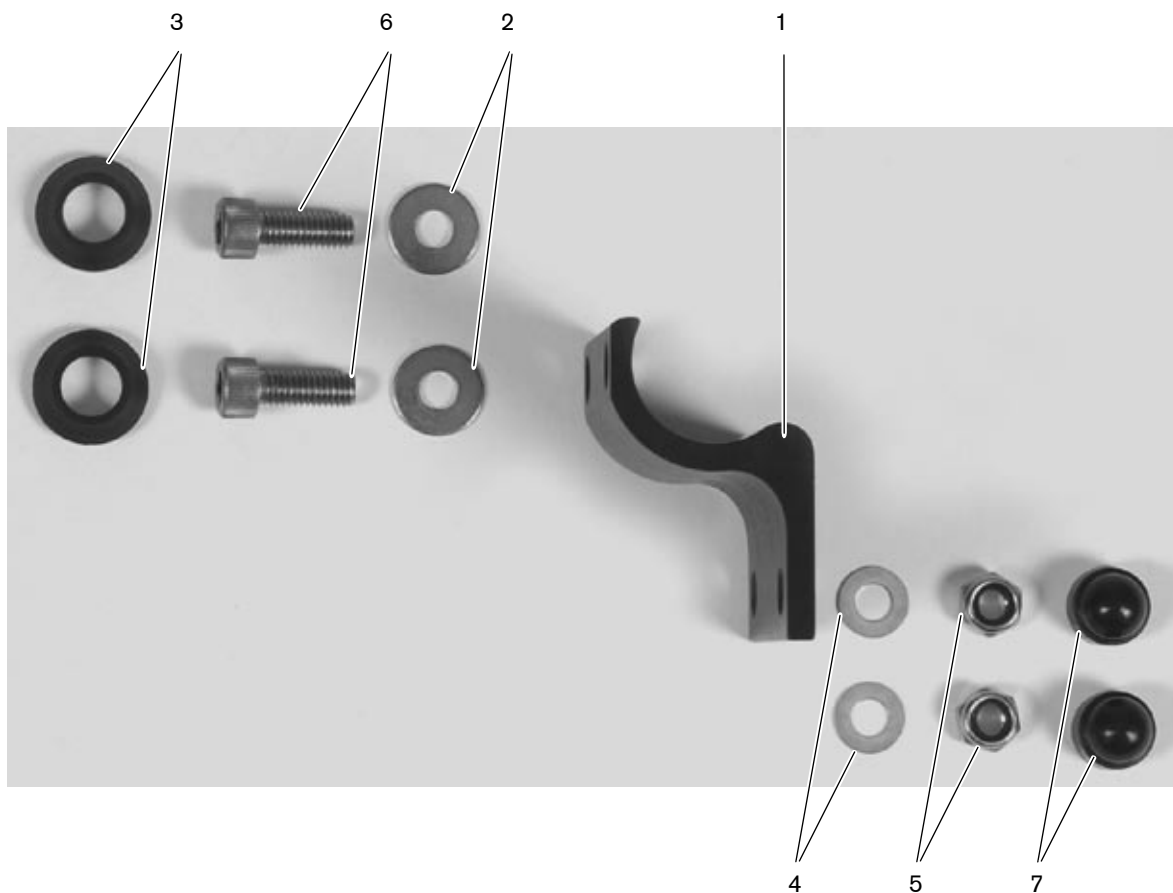


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481E00=SK160	Therapietisch Größe 1 für SB26-32 Modell T, Teen2 und VR (Pos. 1-5)	1	St.
	481E00=SK170	Therapietisch Größe 2 für SB34-38 Modell T, Teen2 und VR (Pos. 1-5)	1	St.
	481E00=SK180	Therapietisch Größe 3 für SB40-44 Modell T und VR (Pos. 1-5)	1	St.
	481E00=SK190	Therapietisch Größe 4 für SB46-50 Modell T (Pos. 1-5)	1	St.
1	481E00=ST061	Therapietisch Größe 1 für SB32	1	St.
1	481E00=ST071	Therapietisch Größe 2 für SB34-38	1	St.
1	481E00=ST081	Therapietisch Größe 3 für SB40-44	1	St.
1	481E00=ST091	Therapietisch Größe 4 für SB46-50	1	St.
2a	481E00=LT072	Befestigungsschiene z-förmig links für Größe 1	1	St.
2a	481E00=LT082	Befestigungsschiene z-förmig links für Größe 2-4	1	St.
2b	481E00=RT072	Befestigungsschiene z-förmig rechts für Größe 1	1	St.
2b	481E00=RT082	Befestigungsschiene z-förmig rechts für Größe 2-4	1	St.
3	481E00=ST074	Distanz	4	St.
4	502Z15=M6	Rändelmutter DIN 466, verzinkt	4	St.
5	501Z30=M6x50	Flachkopfschraube mit Vierkantansatz DIN 603, verzinkt	4	St.

Hinweis: Anbau von Therapietischen nur in Verbindung mit Seitenteilen mit langen Armauflagen bzw. Armlehne lang gepolstert möglich!

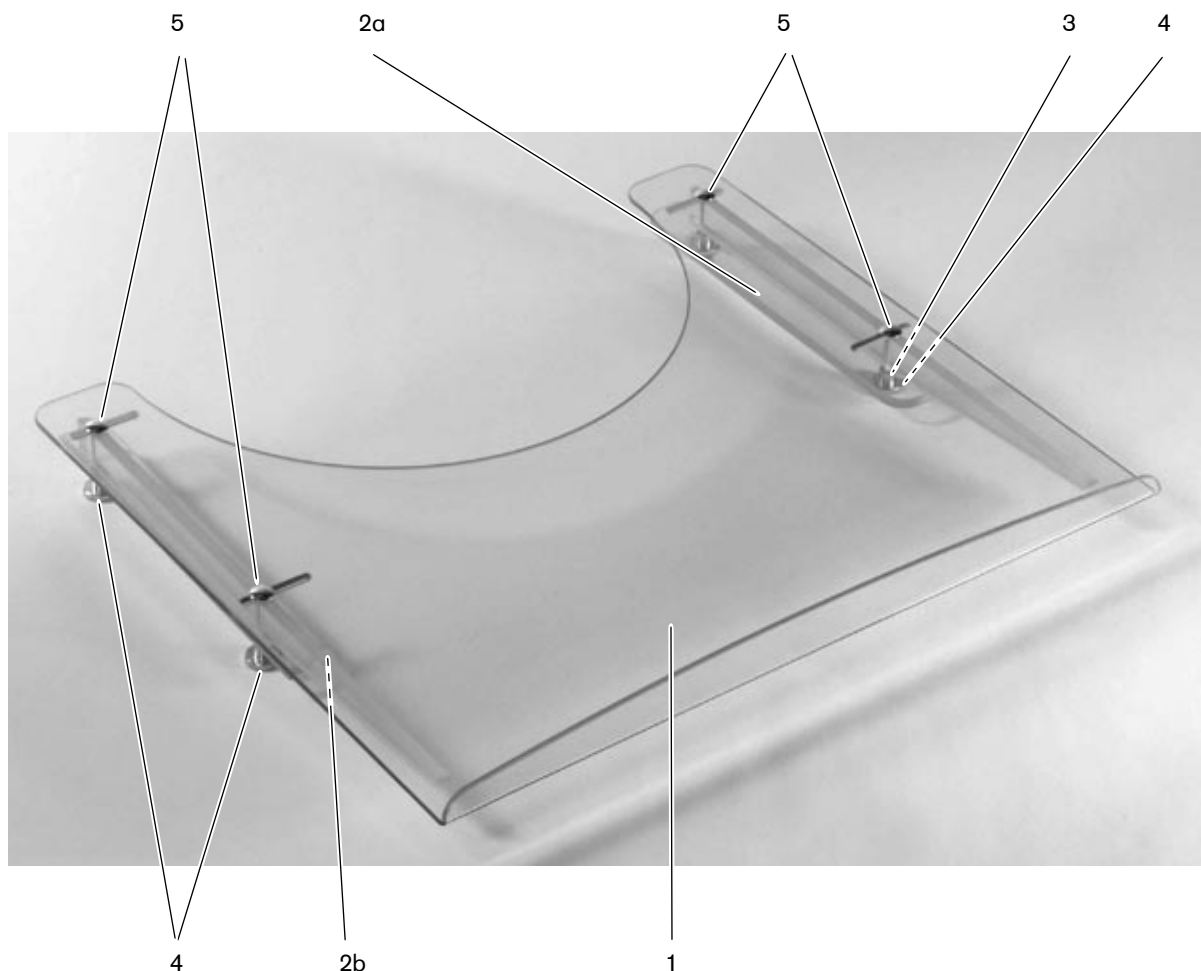

Baugruppe F


Lenkrad

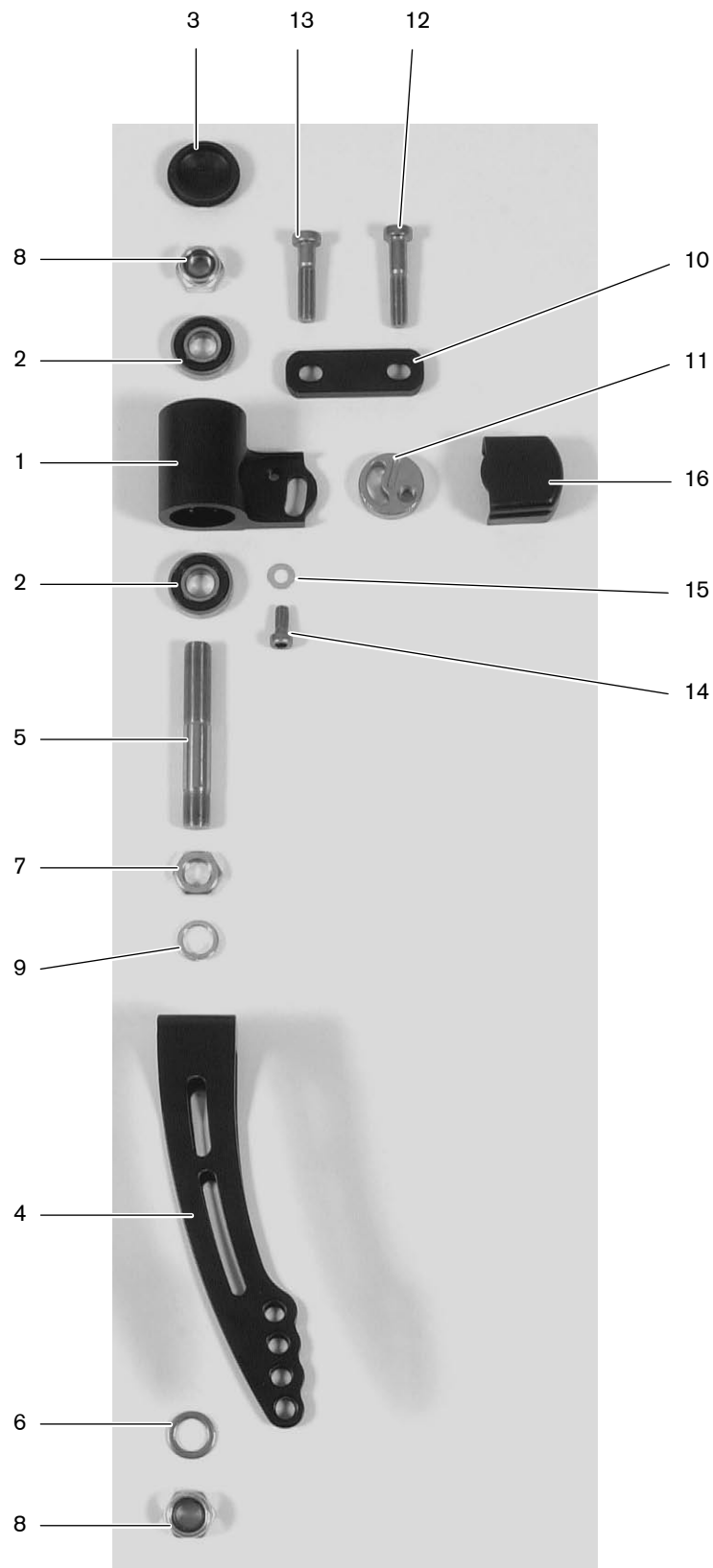

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F45=PK010	Gabel kpl. mit Aufnahme und Schraubachse Modell T und VR*	1	Paar
	481F45=LK010	Gabel kpl. mit Aufnahme und Schraubachse Modell T und VR, links (Pos. 1-16)*	1	St.
	481F45=RK010	Gabel kpl. mit Aufnahme und Schraubachse Modell T und VR, rechts*	1	St.
	481F08=LV015	Lenkradaufnahme links (Pos. 1, 2)	1	St.
	481F08=RV015	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
	481F08=LV025	Lenkradaufnahme poliert links (Pos. 1, 2)	1	St.
	481F08=RV025	Lenkradaufnahme poliert rechts	1	St.
1	481F08=LE015	Lenkradaufnahme links	1	St.
o. B.	481F08=RE015	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
1	481F08=LP015	Lenkradaufnahme links, poliert	1	St.
o. B.	481F08=RP015	Lenkradaufnahme rechts, poliert	1	St.
2	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
3	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	1	St.
4	481F00=SS061	Lenkradgabel für Schraubachse kurz	1	St.
4	481F00=SS060	Lenkradgabel für Schraubachse lang	1	St.
4	481F00=SP061	Lenkradgabel für Schraubachse kurz, poliert	1	St.
4	481F00=SP060	Lenkradgabel für Schraubachse lang, poliert	1	St.
	481F08=SK013	Schraubachse 79.5x12 mm Standard kpl. (Pos. 5-9)	1	St.
5		Schraubachse 79.5x12 mm	1	St.
6		Scheibe DIN 433, A2	1	St.
7		Sechskantmutter DIN 439, verzinkt	1	St.
8		Sechskantmutter, selbstsichernd DIN 985, verzinkt	2	St.
9		Federring DIN 7980	1	St.
	481F45=SW011	Montagezubehör für Lenkradbefestigung (Pos. 10-16)	1	St.
10		Halbschale 40 mm, schwarz eloxiert	1	St.
11		Exzenter für Lenkradaufnahme	1	St.
12		Zylinderschraube DIN 6912, selbstsichernd M8x40, A2	1	St.
13		Zylinderschraube DIN 6912, selbstsichernd M8x35, A2	1	St.
14		Zylinderschraube DIN 6912, selbstsichernd M6x14, A2	1	St.
15		Passscheibe DIN 988	1	St.
16		Abdeckung	1	St.

* Bitte angeben: Lenkradgabel kurz schmal - für 3" bis 7" Lenkräder
 Lenkradgabel lang schmal - für 3" bis 7" Lenkräder


* Bitte angeben: Ausführung schwarz eloxiert oder poliert.

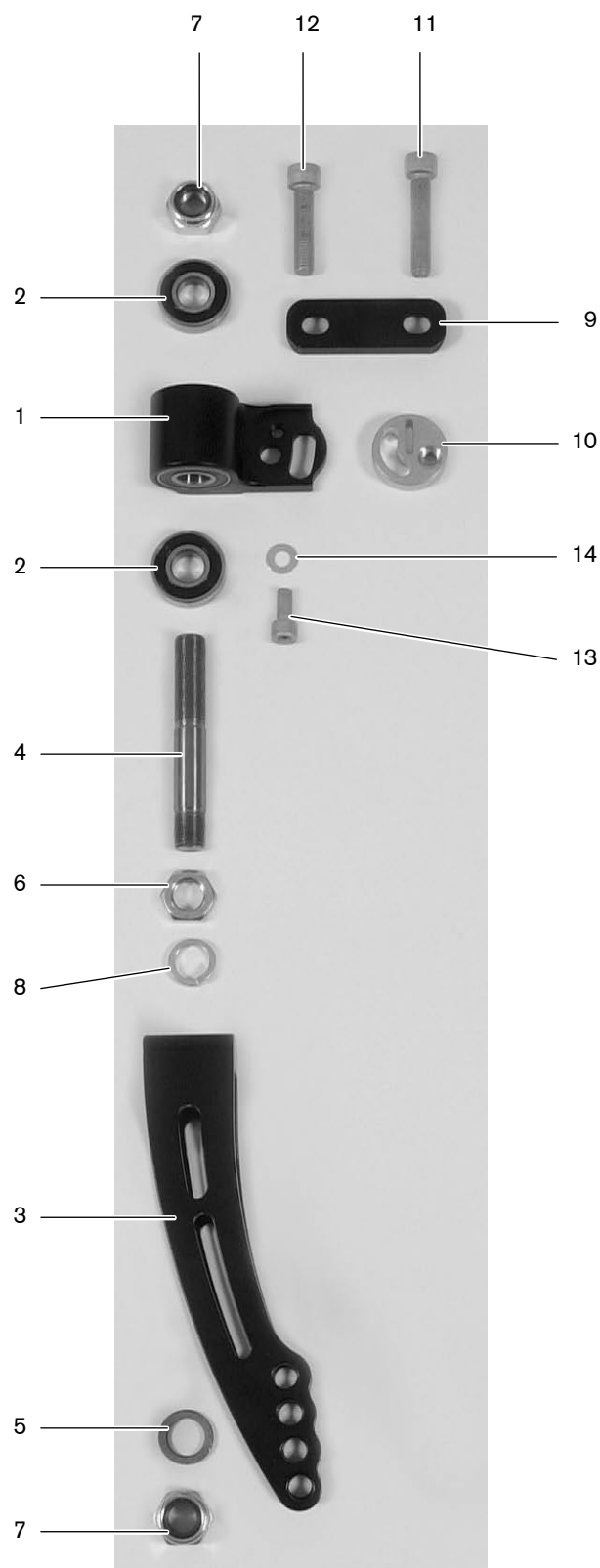

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F45=PK020	Gabel kpl. mit Aufnahme und Schraubachse Modell Ti 8.9*	1	Paar
	481F45=LK020	Gabel kpl. mit Aufnahme und Schraubachse Modell Ti 8.9, links (Pos. 1-14)*	1	St.
	481F45=RK020	Gabel kpl. mit Aufnahme und Schraubachse Modell Ti 8.9, rechts*	1	St.
	481F45=LV003	Lenkradaufnahme links (Pos. 1, 2)	1	St.
	481F45=RV003	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
	481F45=LV009	Lenkradaufnahme poliert links (Pos. 1, 2)	1	St.
	481F45=RV009	Lenkradaufnahme poliert rechts	1	St.
1	481F45=LE003	Lenkradaufnahme links	1	St.
o. B.	481F45=RE003	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
1	481F45=LP003	Lenkradaufnahme links, poliert	1	St.
o. B.	481F45=RP003	Lenkradaufnahme rechts, poliert	1	St.
2	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
3	481F00=SS061	Lenkradgabel für Schraubachse kurz	1	St.
3	481F00=SS060	Lenkradgabel für Schraubachse lang	1	St.
3	481F00=SP061	Lenkradgabel für Schraubachse kurz, poliert	1	St.
3	481F00=SP060	Lenkradgabel für Schraubachse lang, poliert	1	St.
	481F45=SK002	Schraubachse Titan kpl. (Pos. 4-8)	1	St.
4		Schraubachse Titan	1	St.
5		Scheibe DIN 433, A2	1	St.
6		Sechskantmutter DIN 439, verzinkt	1	St.
7		Sechskantmutter, selbstsichernd DIN 985, verzinkt	2	St.
8		Federring DIN 7980	1	St.
	481F45=SW021	Montagezubehör für Lenkradbefestigung Modell Ti 8.9 (Pos. 9-14)	1	St.
9		Halbschale 40 mm, schwarz eloxiert	1	St.
10		Exzenter für Lenkradaufnahme	1	St.
11		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
12		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
13		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
14		Passscheibe DIN 988	1	St.


* Bitte angeben: Lenkradgabel kurz schmal - für 3" bis 7" Lenkräder
 Lenkradgabel lang schmal - für 3" bis 7" Lenkräder

* Bitte angeben: Ausführung schwarz eloxiert oder poliert.

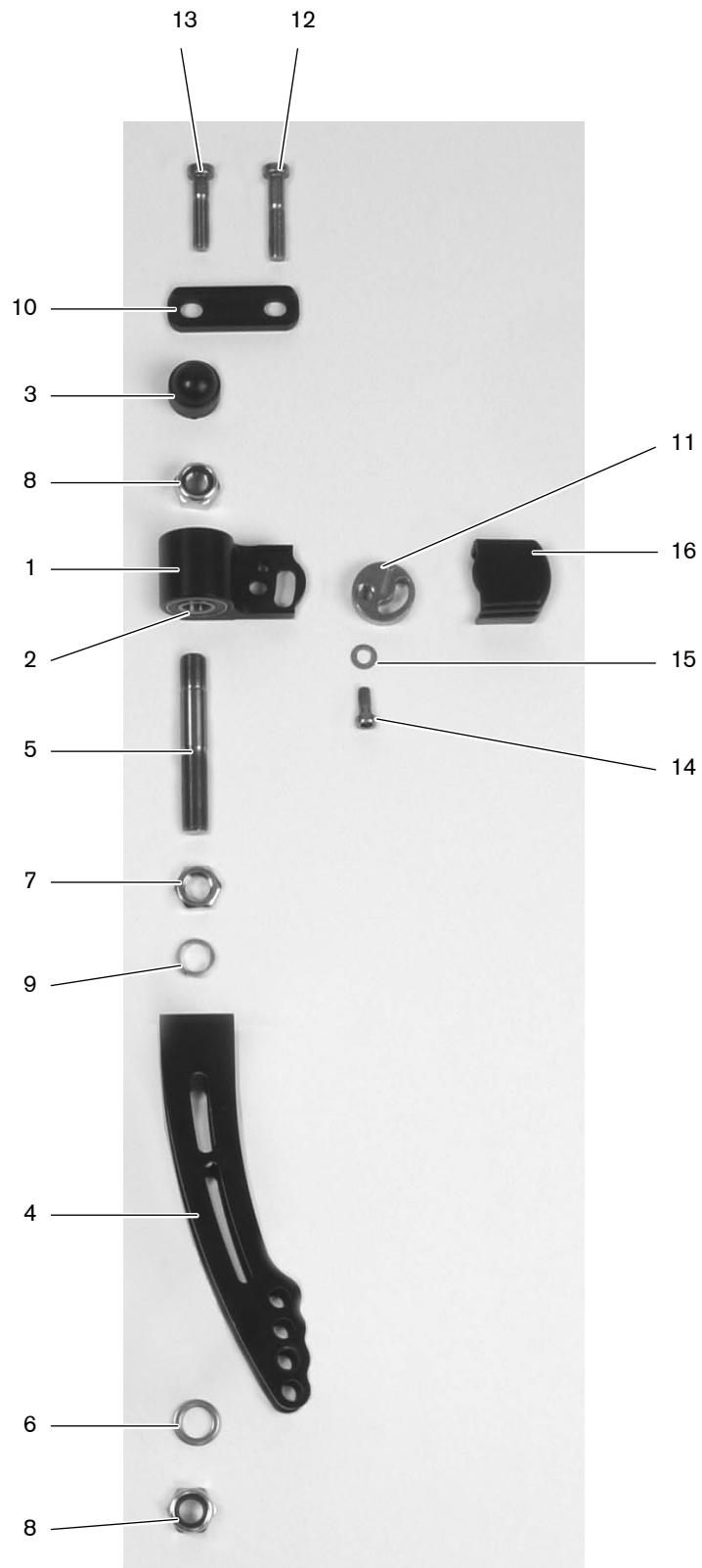


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F45=PK030	Gabel kpl. mit Aufnahme und Schraubachse Modell Teen2*	1	Paar
	481F45=LK030	Gabel kpl. mit Aufnahme und Schraubachse Modell Teen2, links (Pos. 1-16)*	1	St.
	481F45=RK030	Gabel kpl. mit Aufnahme und Schraubachse Modell Teen2, rechts*	1	St.
	481F45=LV003	Lenkradaufnahme links (Pos. 1, 2)	1	St.
	481F45=RV003	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
1	481F45=LE003	Lenkradaufnahme links	1	St.
o. B.	481F45=RE003	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
2	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
3	481G00=ST027	Sechskantschutzkappe für M12	1	St.
4	481F00=SS061	Lenkradgabel für Schraubachse kurz	1	St.
4	481F00=SS060	Lenkradgabel für Schraubachse lang	1	St.
	481F08=SK013	Schraubachse 79.5x12 mm Standard kpl. (Einzelteile s. Seite 178, 179 Pos. 5-9)	1	St.
	481F45=SW011	Montagezubehör für Lenkradbefestigung (Einzelteile s. Seite 178, 179 Pos. 10-16)	1	St.

* Bitte angeben: Lenkradgabel kurz schmal - für 3" bis 6" Lenkräder
 Lenkradgabel lang schmal - für 3" bis 6" Lenkräder

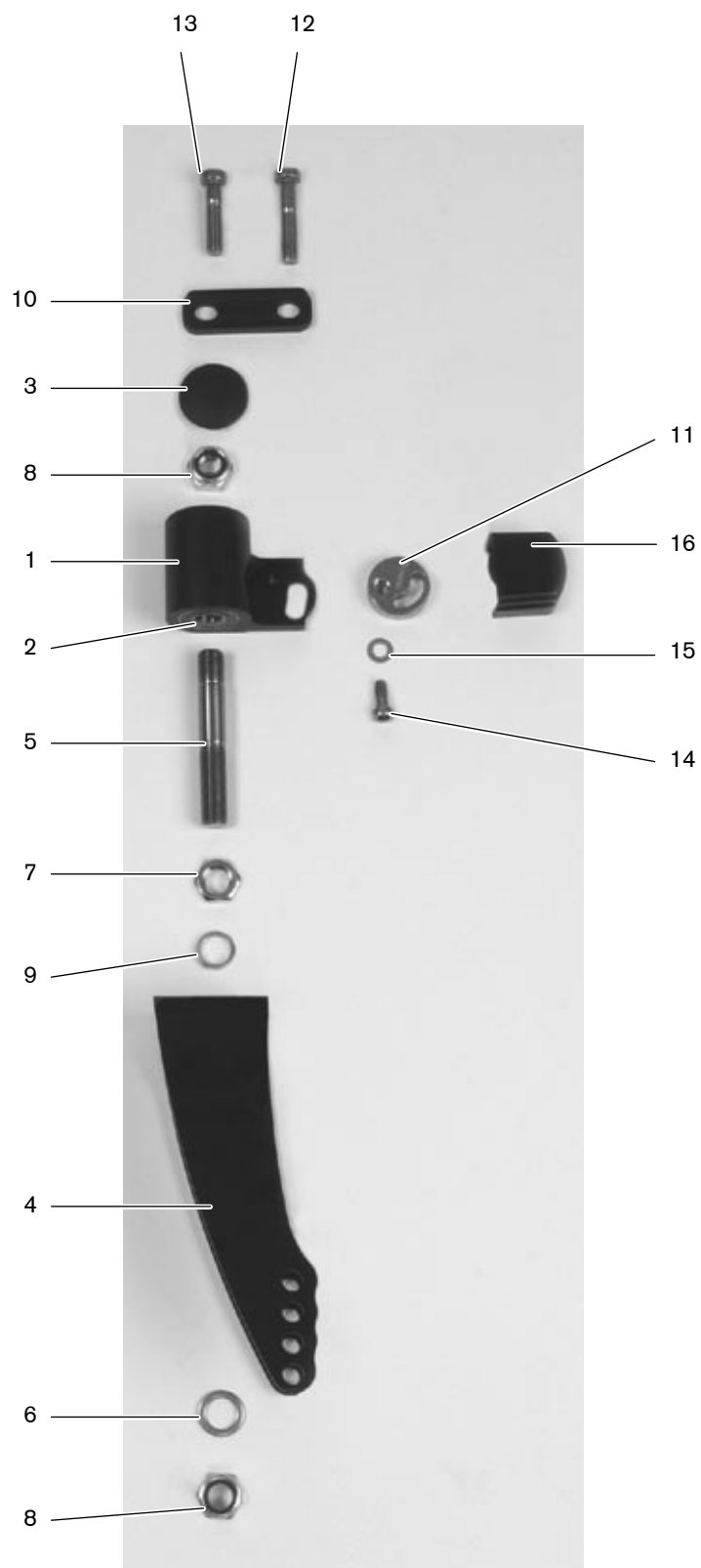

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F45=PK040	Gabel kpl. mit Aufnahme und Schraubachse Modell XXL2*	1	Paar
	481F45=LK040	Gabel kpl. mit Aufnahme und Schraubachse Modell XXL2, links (Pos. 1-16)*	1	St.
	481F45=RK040	Gabel kpl. mit Aufnahme und Schraubachse Modell XXL2, rechts*	1	St.
	481F08=LV015	Lenkradaufnahme links (Pos. 1, 2)	1	St.
	481F08=RV015	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
1	481F08=LE015	Lenkradaufnahme links	1	St.
o. B.	481F08=RE015	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
2	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
3	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	1	St.
4	481F45=SS016	Lenkradgabel für Schraubachse kurz	1	St.
4	481F45=SS017	Lenkradgabel für Schraubachse lang	1	St.
	481F08=SK013	Schraubachse 79.5x12 mm Standard kpl. (Einzelteile s. Seite 178, 179 Pos. 5-9)	1	St.
	481F45=SW011	Montagezubehör für Lenkradbefestigung (Einzelteile s. Seite 178, 179 Pos. 10-16)	1	St.


* Bitte angeben: Lenkradgabel kurz schmal - für 7" Lenkräder
 Lenkradgabel lang schmal - für 7" bis 8" Lenkräder

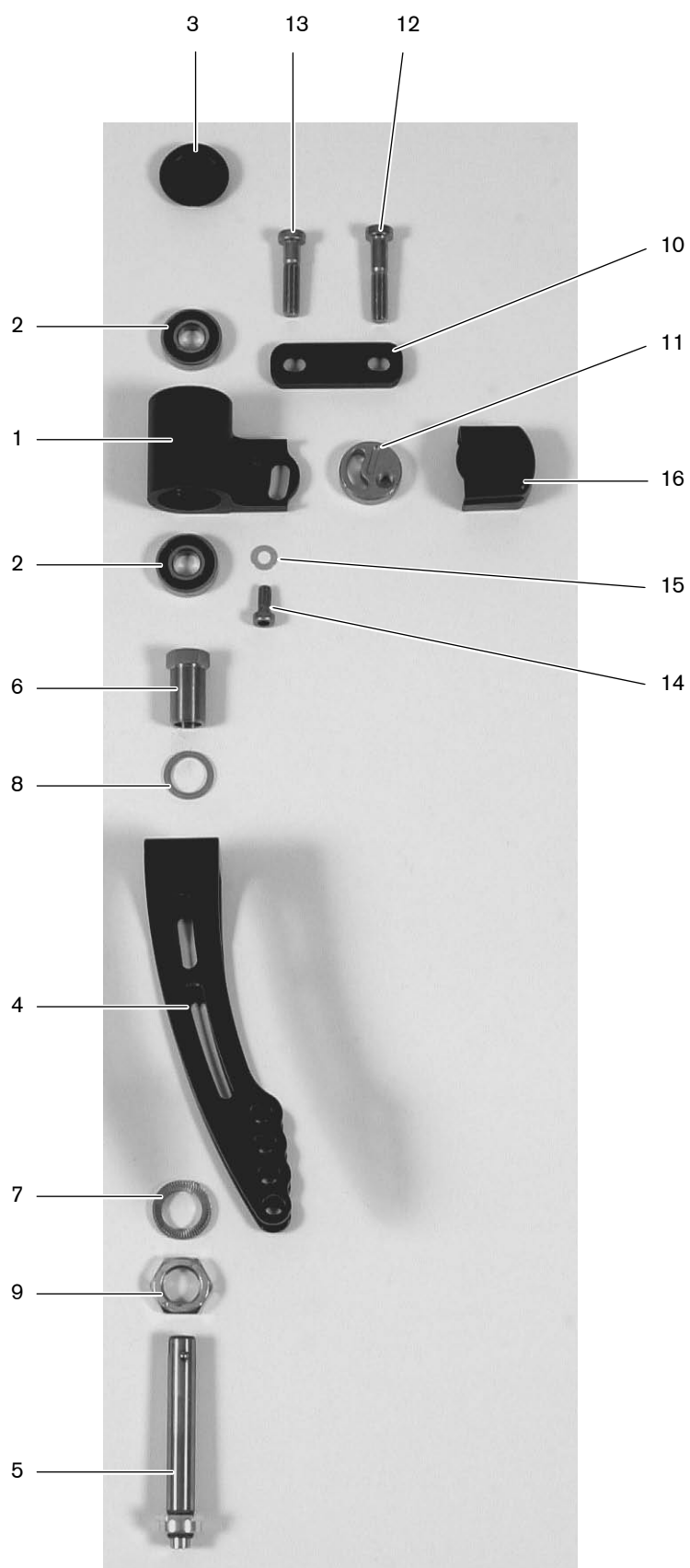

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F45=PK015	Gabel kpl. mit Aufnahme und Steckachse Modell T und VR*	1	Paar
	481F45=LK015	Gabel kpl. mit Aufnahme und Steckachse Modell T und VR, links (Pos. 1-16)*	1	St.
	481F45=RK015	Gabel kpl. mit Aufnahme und Steckachse Modell T und VR, rechts*	1	St.
	481F08=LV015	Lenkradaufnahme links (Pos. 1, 2)	1	St.
	481F08=RV015	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
	481F08=LV025	Lenkradaufnahme poliert links (Pos. 1, 2)	1	St.
	481F08=RV025	Lenkradaufnahme poliert rechts	1	St.
1	481F08=LE015	Lenkradaufnahme links	1	St.
o. B.	481F08=RE015	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
1	481F08=LP015	Lenkradaufnahme links, poliert	1	St.
o. B.	481F08=RP015	Lenkradaufnahme rechts, poliert	1	St.
2	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
3	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	1	St.
4	481F00=SS063	Lenkradgabel für Steckachse kurz	1	St.
4	481F00=SS062	Lenkradgabel für Steckachse lang	1	St.
4	481F00=SP063	Lenkradgabel für Steckachse kurz, poliert	1	St.
4	481F00=SP062	Lenkradgabel für Steckachse lang, poliert	1	St.
	481F08=SK022	Steckachse 12x65/84.5 mm kpl. (Pos. 5-9)	1	St.
5		Steckachse 12x65/84.5 mm	1	St.
6		Fitting 33 mm	1	St.
7		Nordlockscheibe	1	St.
8		Scheibe 22x16x1.5	2	St.
9		Sechskantmutter DIN 439, verzinkt	1	St.
	481F45=SW011	Montagezubehör für Lenkradbefestigung (Einzelteile s. Seite 178, 179 Pos. 10-16)	1	St.

* Bitte angeben: Lenkradgabel kurz schmal - für 3" bis 7" Lenkräder
 Lenkradgabel lang schmal - für 3" bis 7" Lenkräder


* Bitte angeben: Ausführung schwarz eloxiert oder poliert.

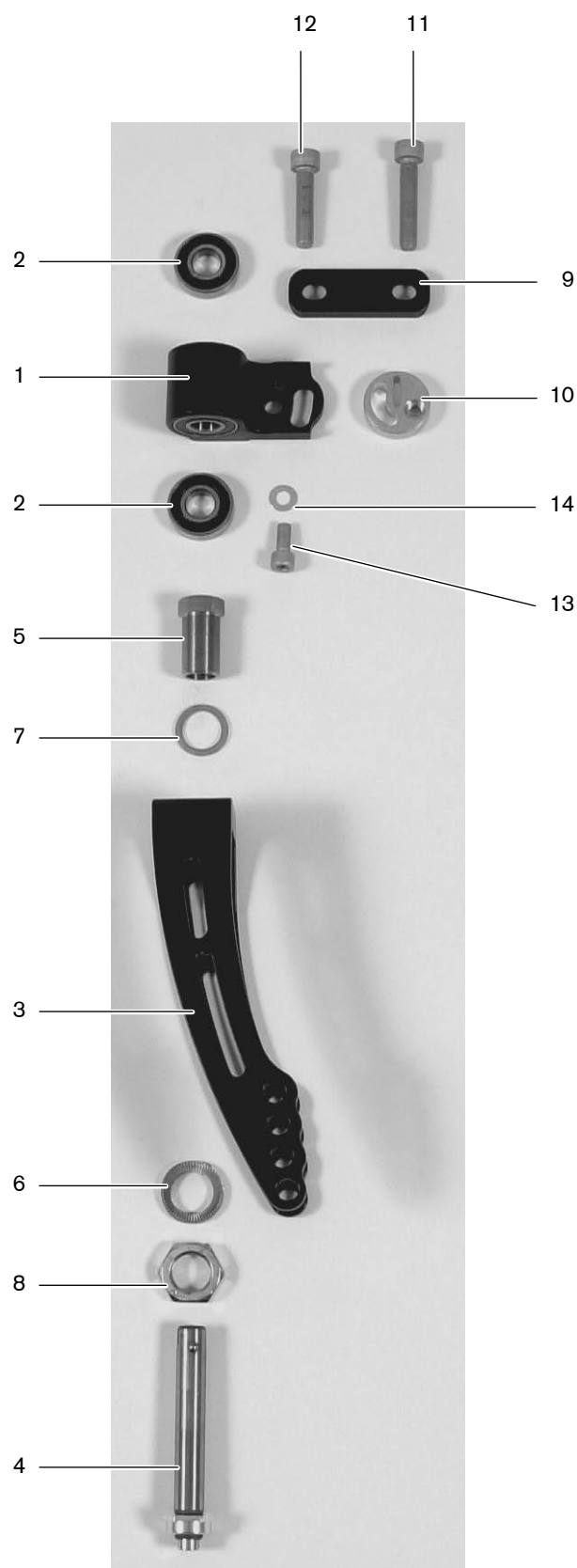

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F45=PK025	Gabel kpl. mit Aufnahme und Steckachse Modell Ti 8.9*	1	Paar
	481F45=LK025	Gabel kpl. mit Aufnahme und Steckachse Modell Ti 8.9, links (Pos. 1-14)*	1	St.
	481F45=RK025	Gabel kpl. mit Aufnahme und Steckachse Modell Ti 8.9, rechts*	1	St.
	481F45=LV003	Lenkradaufnahme links (Pos. 1, 2)	1	St.
	481F45=RV003	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
	481F45=LV009	Lenkradaufnahme poliert links (Pos. 1, 2)	1	St.
	481F45=RV009	Lenkradaufnahme poliert rechts	1	St.
1	481F45=LE003	Lenkradaufnahme links	1	St.
o. B.	481F45=RE003	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
1	481F45=LP003	Lenkradaufnahme links, poliert	1	St.
o. B.	481F45=RP003	Lenkradaufnahme rechts, poliert	1	St.
2	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
3	481F00=SS063	Lenkradgabel für Steckachse kurz	1	St.
3	481F00=SS062	Lenkradgabel für Steckachse lang	1	St.
3	481F00=SP063	Lenkradgabel für Steckachse kurz, poliert	1	St.
3	481F00=SP062	Lenkradgabel für Steckachse lang, poliert	1	St.
	481F08=SK022	Steckachse 12x65/84.5 mm, kpl. (Pos. 4-8 Einzelteile s. Seite 186, 187 Pos. 5-9)	1	St.
	481F45=SW021	Montagezubehör für Lenkradbefestigung Modell Ti 8.9 (Einzelteile s. Seite 180, 181 Pos. 9-14)	1	St.


* Bitte angeben: Lenkradgabel kurz schmal - für 3" bis 7" Lenkräder
 Lenkradgabel lang schmal - für 3" bis 7" Lenkräder

* Bitte angeben: Ausführung schwarz eloxiert oder poliert.

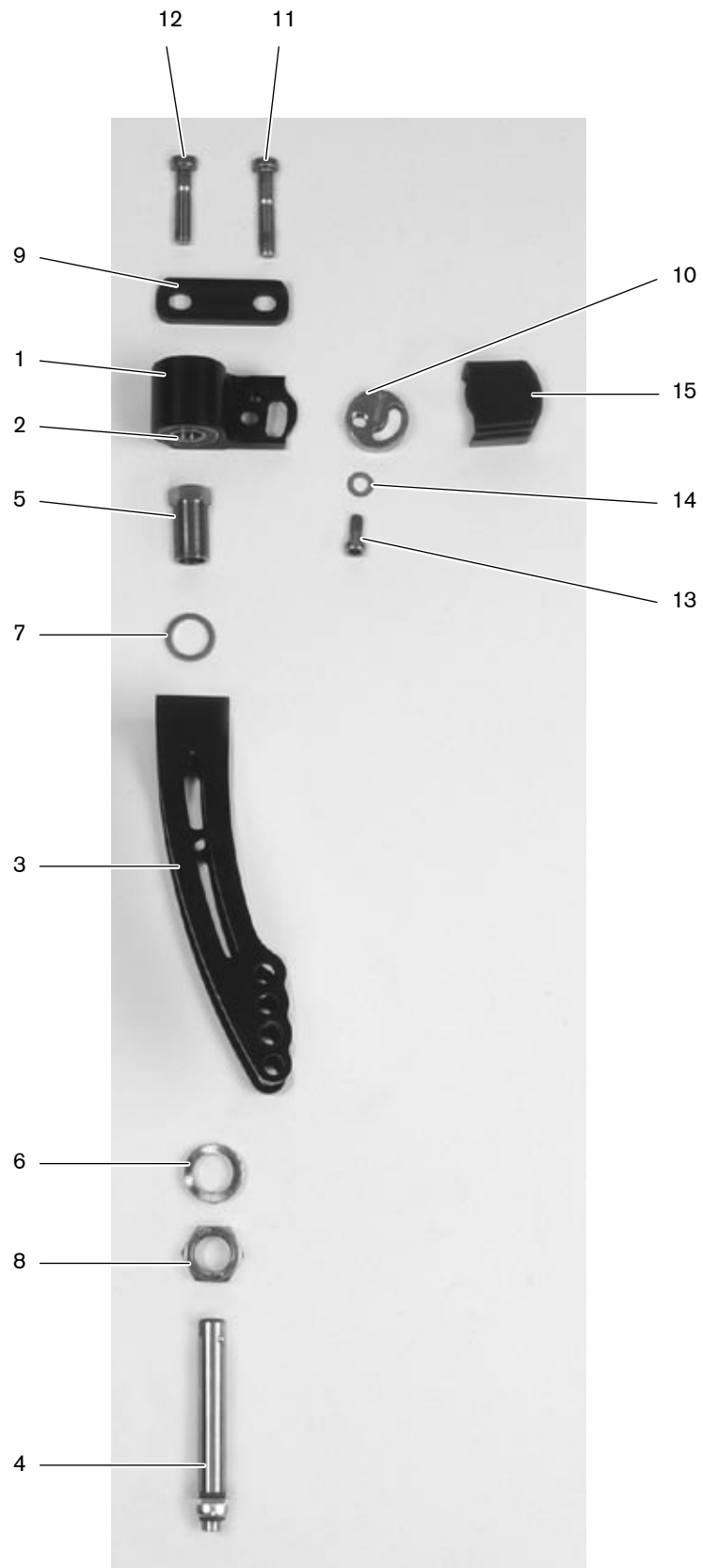


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F45=PK035	Gabel kpl. mit Aufnahme und Steckachse Modell Teen2*	1	Paar
	481F45=LK035	Gabel kpl. mit Aufnahme und Steckachse Modell Teen2, links (Pos. 1-15)*	1	St.
	481F45=RK035	Gabel kpl. mit Aufnahme und Steckachse Modell Teen2, rechts*	1	St.
	481F45=LV003	Lenkradaufnahme links (Pos. 1, 2)	1	St.
	481F45=RV003	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
1	481F45=LE003	Lenkradaufnahme links	1	St.
o. B.	481F45=RE003	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
2	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
3	481F00=SS063	Lenkradgabel für Steckachse kurz	1	St.
3	481F00=SS062	Lenkradgabel für Steckachse lang	1	St.
	481F08=SK022	Steckachse 12x65/84.5 mm, kpl. (Pos. 4-8 Einzelteile s. Seite 186, 187 Pos. 5-9)	1	St.
	481F45=SW011	Montagezubehör für Lenkradbefestigung (Pos. 9-15, Einzelteile s. Seite 178, 179 Pos. 10-16)	1	St.

* Bitte angeben: Lenkradgabel kurz schmal - für 3" bis 6" Lenkräder
 Lenkradgabel lang schmal - für 3" bis 6" Lenkräder

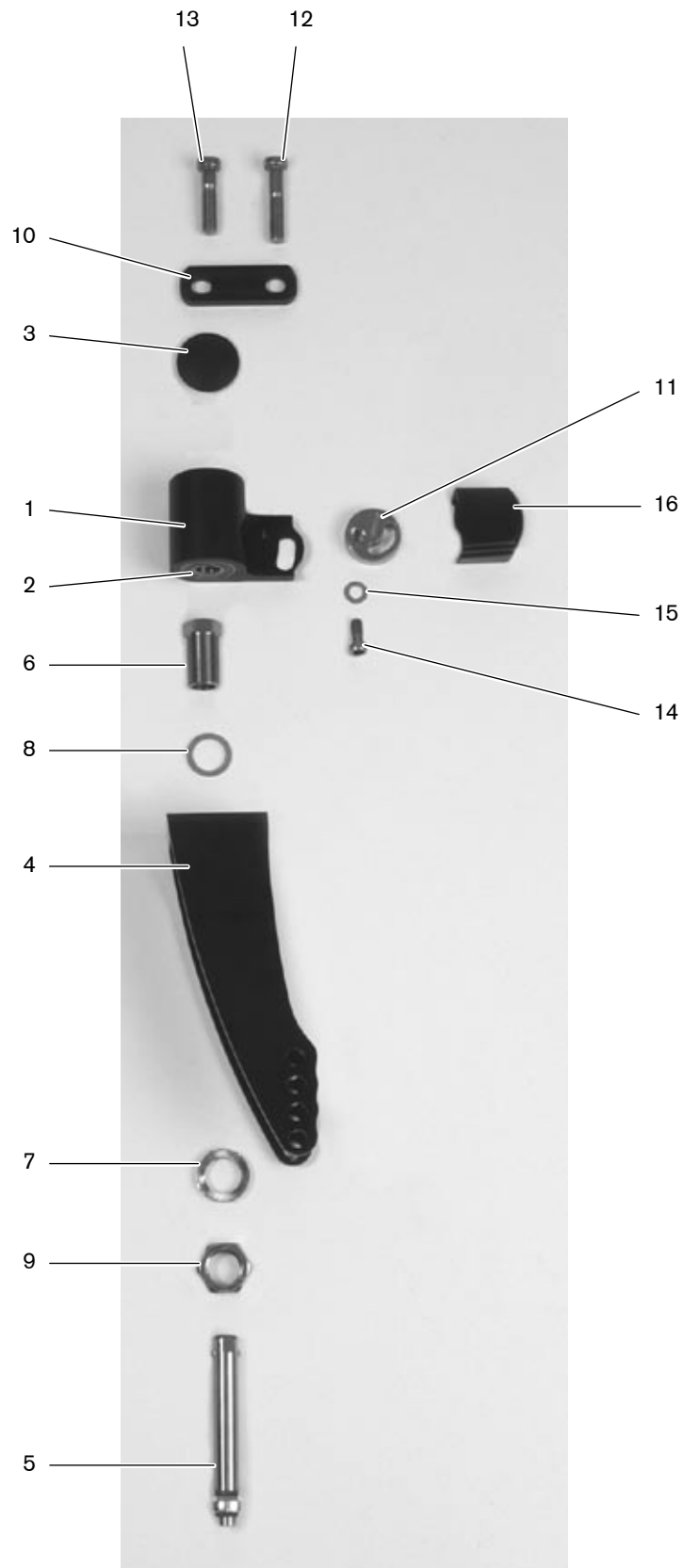

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F45=PK045	Gabel kpl. mit Aufnahme und Steckachse Modell XXL2*	1	Paar
	481F45=LK045	Gabel kpl. mit Aufnahme und Steckachse Modell XXL2, links (Pos. 1-16)*	1	St.
	481F45=RK045	Gabel kpl. mit Aufnahme und Steckachse Modell XXL2, rechts*	1	St.
	481F08=LV015	Lenkradaufnahme links (Pos. 1, 2)	1	St.
	481F08=RV015	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
1	481F08=LE015	Lenkradaufnahme links	1	St.
o. B.	481F08=RE015	Lenkradaufnahme rechts	1	St.
2	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
3	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	1	St.
4	481F45=SS008	Lenkradgabel für Steckachse kurz	1	St.
4	481F45=SS007	Lenkradgabel für Steckachse lang	1	St.
	481F08=SK022	Steckachse 12x65/84.5 mm, kpl. (Pos. 5-9 Einzelteile s. Seite 186, 187)	1	St.
	481F45=SW011	Montagezubehör für Lenkradbefestigung (Pos. 10-16 Einzelteile s. Seite 178, 179)	1	St.

* Bitte angeben: Lenkradgabel kurz schmal - für 140 mm Soft und 7" Lenkräder
 Lenkradgabel lang schmal - für 140 mm Soft, 7" bis 8" Lenkräder

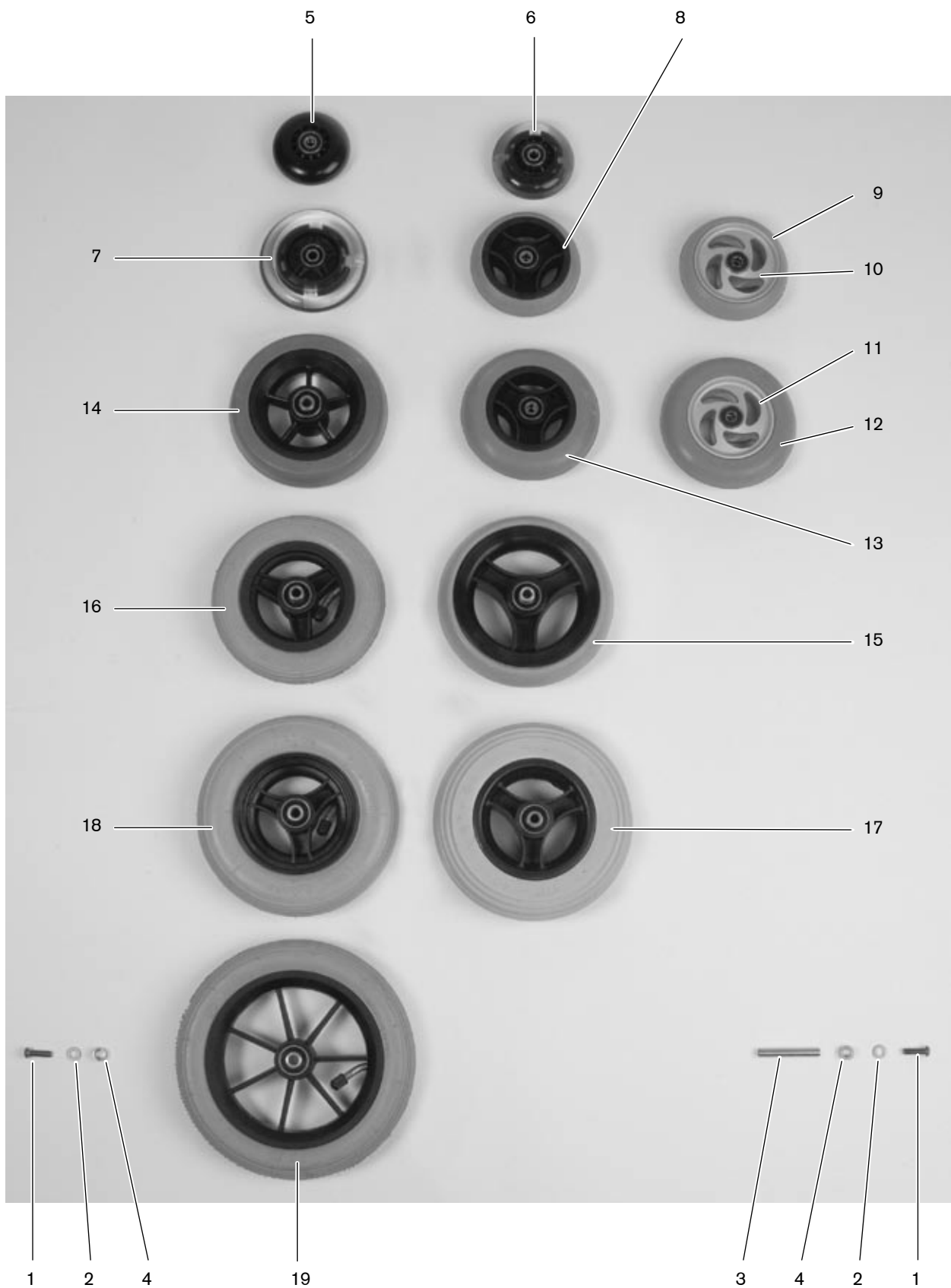

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV303	Lenkrad 3" mit Achse Modell T und Teen2 (Pos. 1-5)	2	St.
1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
4	481F00=SR051	Distanz 11 mm	2	St.
5	481F00=ST200	Lenkrad 3" hart 70x25 mm	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV343	Leuchttrolle 3" mit Achse Modell Teen2 (Pos. 1-4, 6)	2	St.
1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
4	481F00=SR051	Distanz 11 mm	2	St.
6	481F00=ST343	Leuchttrolle 3" 70x24 mm	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV344	Leeuchttrolle 4" mit Achse Modell Teen2 (Pos. 1-4, 7)	2	St.
1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
4	481F00=SR051	Distanz 11 mm	2	St.
7	481F00=ST344	Leuchttrolle 4" 100x24 mm	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV324	Lenkrad 4" Design-Line mit Achse Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1, 2, 9, 10)	2	St.
1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
9	481F00=ST064	Vollgummireifen 100x32 mm grau	1	St.
10	481F00=SV059	Felge vormontiert	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV304	Lenkrad 4" mit Achse Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1-3, 8)	2	St.
1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
o. B.	481F00=SR052	Distanz 6.75 mm	2	St.
8	481F00=ST204	Lenkrad 4" Vollgummi 100x32 mm	1	St.

Hinweis: 3" und 4" Lenkräder nur für den Innenbereich!
4" Lenkräder bei Modell Teen2 mit ST24-28 nur in Kombination mit Fußraste für kleine Unterschenkellängen möglich.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV325	Lenkrad 5" Design-Line mit Achse Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1, 2, 11, 12)	2	St.
1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
11	481F00=SV059	Felge vormontiert	1	St.
12	481F00=ST065	Vollgummireifen 125x32 grau	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV305	Lenkrad 5" mit Achse Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1-3, 13)	2	St.
1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
o. B.	481F00=SR052	Distanz 6.75 mm	2	St.
13	481F00=ST205	Lenkrad 5" Vollgummi 125x32 mm	1	St.

Hinweis 5" Lenkräder bei Modell Teen2 mit ST24-34 nur in Kombination mit Fußraste für kleine Unterschenkellängen möglich

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV310	Lenkrad 140 mm Soft mit Achse Modell T, VR, Teen2 und XXL2 (Pos. 1-3, 14)	2	St.
1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
14	481F00=ST117	Elastic-Vollgummirad 140x45 mm	1	St.

Hinweis Lenkrad 140 mm für Modell XXL2 nur in Kombination mit Lenkradgabel mit Steckachse möglich.
Lenkrad 140 mm bei Modell Teen2 mit ST24-34 nur in Kombination mit Fußraste für kleine Unterschenkellängen möglich

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV308	Lenkrad 6" Vollgummi mit Achse Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1-3, 15)	2	St.
1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
15	481F00=ST106	Lenkrad 6" Vollgummi 150x33 mm	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV306	Lenkrad 6" luftbereift mit Achse Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1-3, 16)	2	St.
1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
16	481F00=ST206	Lenkrad 6" luftbereift 150x30 mm	1	St.
o. B.	481F00=ST208	Schlauch 6"	1	St.
o. B.	481F00=ST209	Raddecke 6"	1	St.

Hinweis 6" Lenkräder bei Modell Teen2 nur in Kombination mit Fußraste für kleine Unterschenkellängen möglich

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV326	Lenkrad 7" Vollgummi mit Achse Modell T und VR (Pos. 1-3, 17)	2	St.

1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
17	481F00=ST120	Lenkrad 7" Vollgummi 178x30 mm	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV320	Lenkrad 7" luftbereift mit Achse Modell T, VR und XXL2 (Pos. 1-3, 18)	2	St.
1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
18	481F00=ST206	Lenkrad 7" luftbereift 180x45 mm	1	St.
o. B.	481F00=ST111	Schlauch 7"	1	St.
o. B.	481F00=ST112	Raddecke 7"	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV345	Lenkrad 8" luftbereift mit Achse Modell XXL2 (Pos. 1-3, 19)	2	St.
1	501S92=1	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
2	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
19	481F00=ST121	Lenkrad 8" luftbereift 200x30 mm	1	St.
o. B.	481F00=ST211	Schlauch 8x1¼"	1	St.
o. B.	481F00=ST221	Raddecke 8x1¼"	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV333	Lenkrad 3" mit Achse Modell Ti 8.9 (Pos. 3-5)	2	St.
o. B.	501T69=M6x20	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
o. B.	507U64=6.4	Scheibe DIN 125, Aluminium	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
4	481F00=SR051	Distanz 11 mm	2	St.
5	481F00=ST200	Lenkrad 3" hart 70x25 mm	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV339	Lenkrad 4" Design-Line mit Achse Modell Ti 8.9 (Pos. 9, 10)	2	St.
o. B.	501T69=M6x20	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
o. B.	507U64=6.4	Scheibe DIN 125, Aluminium	2	St.
9	481F00=ST064	Vollgummireifen 100x32 grau	1	St.
10	481F00=SV059	Felge vormontiert	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV334	Lenkrad 4" mit Achse Modell Ti 8.9 (Pos. 3, 8)	2	St.
o. B.	501T69=M6x20	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
o. B.	507U64=6.4	Scheibe DIN 125, Aluminium	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
o. B.	481F00=SR052	Distanz 6.75 mm	2	St.
8	481F00=ST204	Lenkrad 4" Vollgummi 100x32 mm	1	St.

Hinweis: 3" und 4" Lenkräder nur für den Innenbereich!

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
------	----------	--------------	--------	----

	481F00=SV340	Lenkrad 5" Design-Line mit Achse Modell Ti 8.9	2	St.
		(Pos. 11, 12)		
o. B.	501T69=M6x20	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
o. B.	507U64=6.4	Scheibe DIN 125, Aluminium	2	St.
11	481F00=SV059	Felge vormontiert	1	St.
12	481F00=ST065	Vollgummireifen 125x32 grau	1	St.


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV335	Lenkrad 5" mit Achse Modell Ti 8.9 (Pos. 3, 13)	2	St.
o. B.	501T69=M6x20	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
o. B.	507U64=6.4	Scheibe DIN 125, Aluminium	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
o. B.	481F00=SR052	Distanz 6.75 mm	2	St.
13	481F00=ST205	Lenkrad 5" Vollgummi 125x32 mm	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV337	Lenkrad 140 mm Soft mit Achse Modell Ti 8.9	2	St.
		(Pos. 3, 14)		
o. B.	501T69=M6x20	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
o. B.	507U64=6.4	Scheibe DIN 125, Aluminium	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
14	481F00=ST117	Elastic-Vollgummirad 140x45 mm	1	St.


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV338	Lenkrad 6" Vollgummi mit Achse Modell Ti 8.9	2	St.
		(Pos. 3, 15)		
o. B.	501T69=M6x20	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
o. B.	507U64=6.4	Scheibe DIN 125, Aluminium	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
15	481F00=ST106	Lenkrad 6" Vollgummi 150x33 mm	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F00=SV336	Lenkrad 6" luftbereift mit Achse Modell Ti 8.9	2	St.
		(Pos. 3, 16)		
o. B.	501T69=M6x20	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
o. B.	507U64=6.4	Scheibe DIN 125, Aluminium	2	St.
3	481F08=SZ035	Gewindehülse kurz	1	St.
16	481F00=ST206	Lenkrad 6" luftbereift 150x30 mm	1	St.
o. B.	481F00=ST208	Schlauch 6"	1	St.
o. B.	481F00=ST208	Raddecke 6"	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F45=SK001	Lenkradadapter für große vordere Sitzhöhe (+3,5 cm) Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2 (Pos. 1-4)	2	St.
1	481A45=SS006	Adapter für vordere Sitzhöhe	1	St.
2	501T41=5	Zylinderschraube DIN 6912, selbstsichernd, M8x30, A2	2	St.
3	501T41=6	Zylinderschraube DIN 6912, selbstsichernd, M8x20, A2	1	St.
4	501T41=7	Zylinderschraube DIN 6912, selbstsichernd, M8x15, A2	1	St.

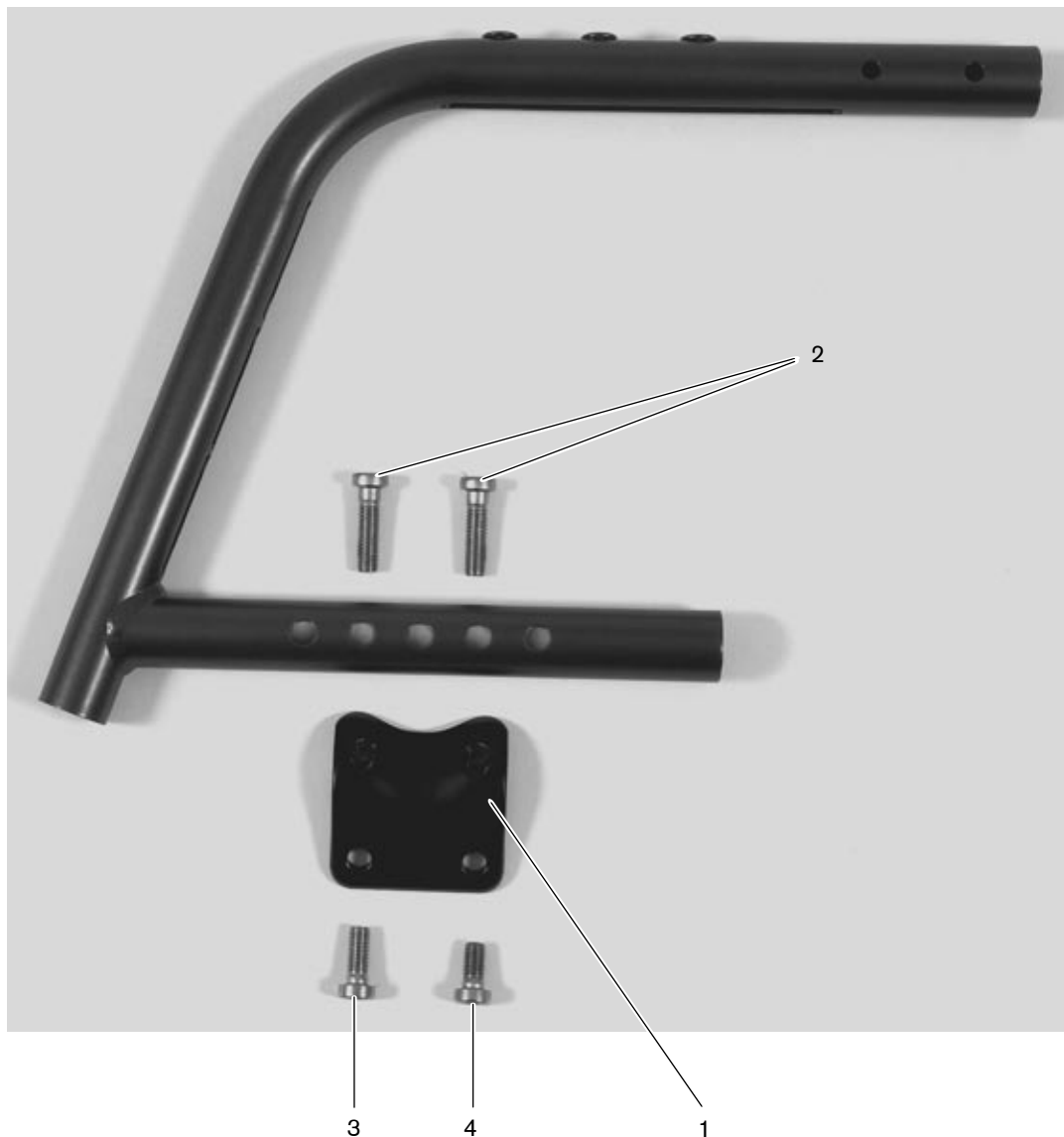

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481F45=SK005	Lenkradadapter für kleine vordere Sitzhöhe (-3,5 cm) Modell VR und Teen2 (Pos. 1-4)	2	St.
1	481A45=SS006	Adapter für vordere Sitzhöhe	1	St.
2	481A45=SE081	Distanz für Adapter für kleine Sitzhöhen	1	St.
3	501T41=5	Zylinderschraube DIN 6912, selbstsichernd, M8x30, A2	3	St.
4	501T41=10	Zylinderschraube DIN 6912, selbstsichernd, M8x25, A2	1	St.

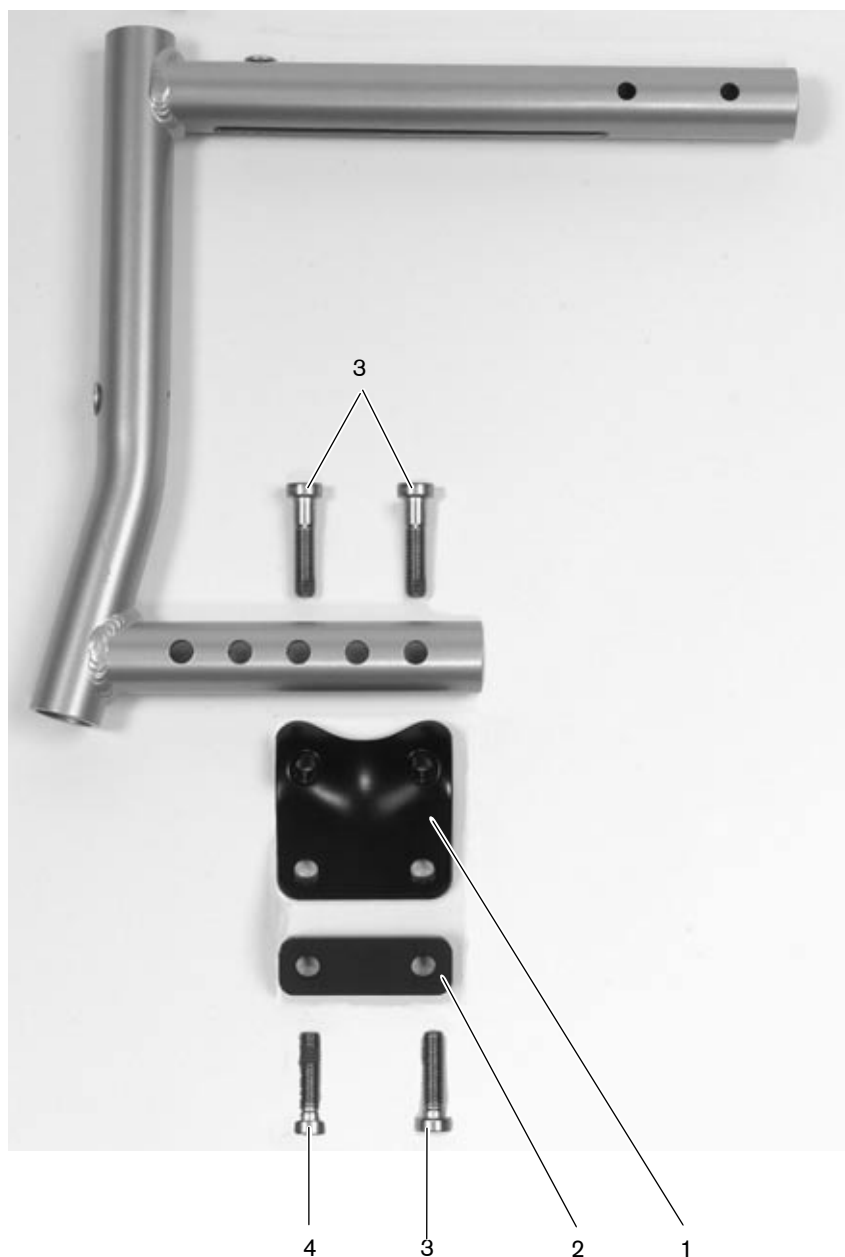

Baugruppe G

Antriebsrad



1

2

3

5

4

6

G

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G00=SV220	Speichenrad 20" standard Modell Teen2 (Pos.1-6)	2	St.
1	481G00=ST220	Felge 20" schwarz	1	St.
2	481G00=ST010	Speiche 2 mm, 211 mm	36	St.
3	481G00=ST007	Nippel 2 mm	36	St.
4	481G00=ST013	Nabe kpl. mit Rillenkugellager	1	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
5	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	1	St.
6	481G00=ST015	Speichenstrahler	3	St.
o. B.	481G00=ST100	Felgenband 20x1 3/8"	1	St.
o. B.	507S91=28x1.2	Sicherungsring DIN 472	1	St.
o. B.	507U56=18.4x28.5x1	Arretierscheibe	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G00=SV222	Speichenrad 22" standard Modell T, VR und Teen2 (Pos.1-6)	2	St.
1	481G00=ST222	Felge 22" schwarz	1	St.
2	481G00=ST011	Speiche 2 mm, 230 mm	36	St.
3	481G00=ST007	Nippel 2 mm	36	St.
4	481G00=ST013	Nabe kpl. mit Rillenkugellager	1	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
5	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	1	St.
6	481G00=ST015	Speichenstrahler	3	St.
o. B.	481G00=ST102	Felgenband 22x1 3/8"	1	St.
o. B.	507S91=28x1.2	Sicherungsring DIN 472	1	St.
o. B.	507U56=18.4x28.5x1	Arretierscheibe	1	St.

Hinweis: 22"-Antriebsräder bei Modell Teen2 erst ab ST32 und bei Teen2 VR erst ab ST36 möglich

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G00=SV224	Speichenrad 24" standard Modell T und VR (Pos.1-6)	2	St.
1	481G00=ST224	Felge 24" schwarz	1	St.
2	481G00=ST012	Speiche 2 mm, 255 mm	36	St.
3	481G00=ST007	Nippel 2 mm	36	St.
4	481G00=ST013	Nabe kpl. mit Rillenkugellager	1	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
5	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	1	St.
6	481G00=ST015	Speichenstrahler	3	St.
o. B.	481G00=ST104	Felgenband 24x1 3/8"	1	St.
o. B.	507S91=28x1.2	Sicherungsring DIN 472	1	St.
o. B.	507U56=18.4x28.5x1	Arretierscheibe	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1, 2	481G00=SV022	Speichenrad 24" mit Hohlwandfelge Modell T und VR	2	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
o. B.	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	1	St.
2	481G00=ST015	Speichenstrahler	3	St.
o. B.	481G00=ST114	Felgenband 24" für Hohlwandfelge	1	St.
o. B.	507S91=28x1.2	Sicherungsring DIN 472	1	St.
o. B.	507U56=18.4x28.5x1	Arretierscheibe	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1, 2	481G00=SV026	Speichenrad 26" mit Hohlwandfelge Modell T, Ti 8.9 und VR	2	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
o. B.	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	1	St.
2	481G00=ST015	Speichenstrahler	3	St.
o. B.	481G00=ST116	Felgenband 26" für Hohlwandfelge	1	St.
o. B.	507S91=28x1.2	Sicherungsring DIN 472	1	St.
o. B.	507U56=18.4x28.5x1	Arretierscheibe	1	St.

Hinweis: Bei 26"-Speichenrad Speichenschutz in Größe 24" auswählen!



2

1

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1, 2	481G00=SV230	Speichenrad 24" mit Hohlwandfelge radial gespeicht Modell T und VR	2	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
o. B.	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	1	St.
2	481G00=ST015	Speichenstrahler	3	St.
o. B.	481G00=ST114	Felgenband 24" für Hohlwandfelge	1	St.
o. B.	507S91=28x1.2	Sicherungsring DIN 472	1	St.
o. B.	507U56=18.4x28.5x1	Arretierscheibe	1	St.



1

2

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1, 2	481G00=SV229	Six-Star Laufrad 24" inkl. Greifring Modell T, Ti 8.9 und VR	2	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
o. B.	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	1	St.
2	481G00=ST031	Speichenstrahler	1	St.
o. B.	481G00=ST104	Felgenband 24x1 3/8"	1	St.
o. B.	507S91=28x1.2	Sicherungsring DIN 472	1	St.
o. B.	507U56=18.4x28.5x1	Arretierscheibe	1	St.

Hinweis: Anbau von Speichenschutz nicht möglich!



1

2

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SV290	Speichenrad 24" Spox-Light black/black Modell T, Ti 8.9 und VR	2	St.
o. B.	481G00=ST061	Speiche schwarz	18	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
o. B.	481G00=ST018	Speichenstrahler	1	St.
o. B.	481G00=ST104	Felgenband 24x1 3/8"	1	St.
Hinweis: Anbau von Speichenschutz nicht möglich!				



1

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1, 2	481G00=SV034	Infinity-Super-Light Speichenrad 20" Modell Teen2	2	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
2	481G00=ST032	Speichenstrahler	1	St.
o. B.	481G00=ST117	Textiles Felgenband	1,35	m
o. B.	481G00=ST100	Felgenband 20x1 3/8"	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1, 2	481G00=SV032	Infinity-Super-Light Speichenrad 24" Modell Teen2	2	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
2	481G00=ST032	Speichenstrahler	1	St.
o. B.	481G00=ST117	Textiles Felgenband	1,5	m
o. B.	481G00=ST102	Felgenband 22x1 3/8"	1	St.

Hinweis: 22" Antriebsräder bei Modell Teen2 erst ab ST32 und bei Teen2 VR erst ab ST36 möglich!

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1, 2	481G00=SV028	Infinity-Super-Light Speichenrad 24" Modell Ti 8.9	2	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
2	481G00=ST032	Speichenstrahler	1	St.
o. B.	481G00=ST117	Textiles Felgenband	1,7	m
o. B.	481G00=ST104	Felgenband 24x1 3/8"	1	St.

Hinweis: Anbau von Speichenschutz nicht möglich!



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SV276	Speichenrad 24" standard Modell XXL2 (incl. Pos. 2)	2	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
2	481G00=ST015	Speichenstrahler	3	St.
o. B.	481G00=ST114	Felgenband 24" für Hohlwandfelge	1	St.
Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SV278	Speichenrad 26" standard Modell XXL2 (incl. Pos. 2)	2	St.
o. B.	509K20=3	Rillenkugellager	2	St.
2	481G00=ST015	Speichenstrahler	3	St.
o. B.	481G00=ST116	Felgenband 26" für Hohlwandfelge	1	St.



2


1

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SK027	Mountainbike-Antriebsrad 24" kpl. inkl. Greifring und Steckachse Modell T, Ti 8.9 und VR (Pos. 1-10)	2	St.
	481G00=SV292	Speichenrad 24" (Pos. 1-5)	1	St.
1	481G00=ST223	Felge 24"	1	St.
2	481G00=ST019	Speichen 2 mm, 228 mm	36	St.
3	481G00=ST007	Nippel 2 mm	36	St.
4	481G00=ST024	Flansch-Nabe	1	St.
o. B.	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	1	St.
5	481G00=ST015	Speichenstrahler	2	St.
o. B.	481G00=ST113	Felgenband 24"	1	St.
	481G00=SK424	Bereifung 24", kpl. (Pos. 6)	1	St.
6	481G00=ST424	Raddecke 24"	1	St.
o. B.	481G00=ST327	Schlauch 24"	1	St.
	481G00=SK121	Steckachse Durchmesser 12x98 mm, kpl. (Einzelteile s. Seite 125)	1	St.
7	481G00=SS828	Greifring 24" hoch Aluminium, schwarz	1	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau (Pos. 8-10)	1	St.
8	501S86=M5x14	Linien-Senkschraube DIN 966, A2	6	St.
9	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd	6	St.
10	481G00=ST802	Laschenschutz 20 mm	6	St.

Hinweis: Anbau von Speichenschutz nicht möglich!



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SK420	Bereifung 20x1 3/8" standard kpl. Modell Teen2 VR	2	St.
o. B.	481G00=ST420	Raddecke 20x1 3/8" standard	1	St.
o. B.	481G00=ST320	Schlauch 20x1 3/8"	1	St.
Hinweis: Erst ab ST32 möglich.				
Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SK422	Bereifung 22x1 3/8" standard kpl. Modell T, VR und Teen2 VR	2	St.
o. B.	481G00=ST422	Raddecke 22x1 3/8" standard	1	St.
o. B.	481G00=ST322	Schlauch 22x1 3/8"	1	St.
Hinweis: Erst ab ST36 möglich.				
Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SK423	Bereifung 24x1 3/8" standard Weißwand kpl. Modell T, VR und XXL2	2	St.
o. B.	481G00=ST423	Raddecke 24x1 3/8" standard	1	St.
o. B.	481G00=ST324	Schlauch 24x1 3/8"	1	St.

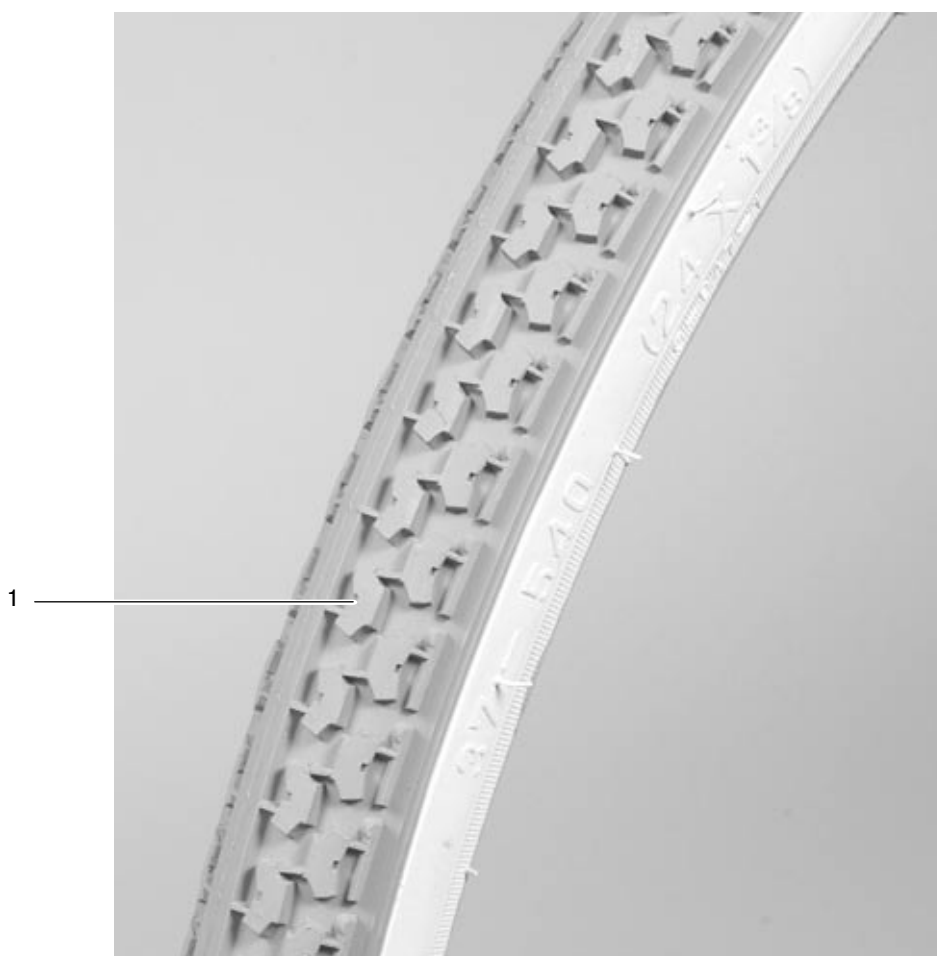

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SK439	Hochdruckreifen 20x1" Feinprofil kpl. Modell Teen2	2	St.
o. B.	481G00=ST439	Hochdruckreifen 20x1" Feinprofil	1	St.
o. B.	481G00=ST321	Schlauch 20x1"	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SK441	Hochdruckreifen 22x1" Feinprofil kpl. Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	2	St.
o. B.	481G00=ST441	Hochdruckreifen 22x1" Feinprofil	1	St.
o. B.	481G00=ST323	Schlauch 22x1"	1	St.

Hinweis: Bei Modell Teen2 erst ab ST32 und bei Modell Teen2 VR erst ab ST36 möglich.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SK431	Hochdruckreifen 24x1" Feinprofil kpl. Modell T, Ti 8.9 und VR	2	St.
o. B.	481G00=ST431	Hochdruckreifen 24x1" Feinprofil	1	St.
o. B.	481G00=ST328	Schlauch 24x1"	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SK435	Hochdruckreifen 26x1" Feinprofil kpl. Modell T, Ti 8.9 und VR	2	St.
o. B.	481G00=ST435	Hochdruckreifen 26x1" Feinprofil	1	St.
o. B.	481G00=ST329	Schlauch 26x1"	1	St.

1



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SK438	Hochdruckreifen 22x1" Grobprofil kpl. Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	2	St.
o. B.	481G00=ST438	Hochdruckreifen 22x1" Grobprofil	1	St.
o. B.	481G00=ST323	Schlauch 22x1"	1	St.

Hinweis: Bei Modell Teen2 erst ab ST32 und bei Modell Teen2 VR erst ab ST36 möglich.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SK434	Hochdruckreifen 24x1" Grobprofil kpl. Modell T, Ti 8.9 und VR	2	St.
o. B.	481G00=ST434	Hochdruckreifen 24x1" Grobprofil	1	St.
o. B.	481G00=ST328	Schlauch 24x1"	1	St.

1



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SK429	Bereifung „DownTown“ 24x1", kpl. Modell T, Ti 8.9 und VR	2	St.
o. B.	481G00=ST429	Raddecke „Schwalbe DownTown“ 24x1"	1	St.
o. B.	481G00=ST328	Schlauch 24x1"	1	St.

1



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SK446	Luftbereifung Schwarzwand 24x1", kpl. Modell T, Ti 8.9 und VR	2	St.
o. B.	481G00=ST446	Raddecke 24x1"	1	St.
o. B.	481G00=ST328	Schlauch 24x1"	1	St.

1



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=ST436	PU-Bereifung 24x1" Modell T und VR	2	St.

1



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
2	481G00=ST440	PU-Bereifung 22x1 3/8" Modell T, VR und Teen2	2	St.


Hinweis: Bei Modell Teen2 erst ab ST32 und bei Modell Teen2 VR erst ab ST36 möglich.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
2	481G00=ST437	PU-Bereifung 24x1 3/8" Modell T, VR und XXL2	2	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
2	481G00=ST443	PU-Bereifung 26x1 3/8" Modell XXL2	2	St.

2



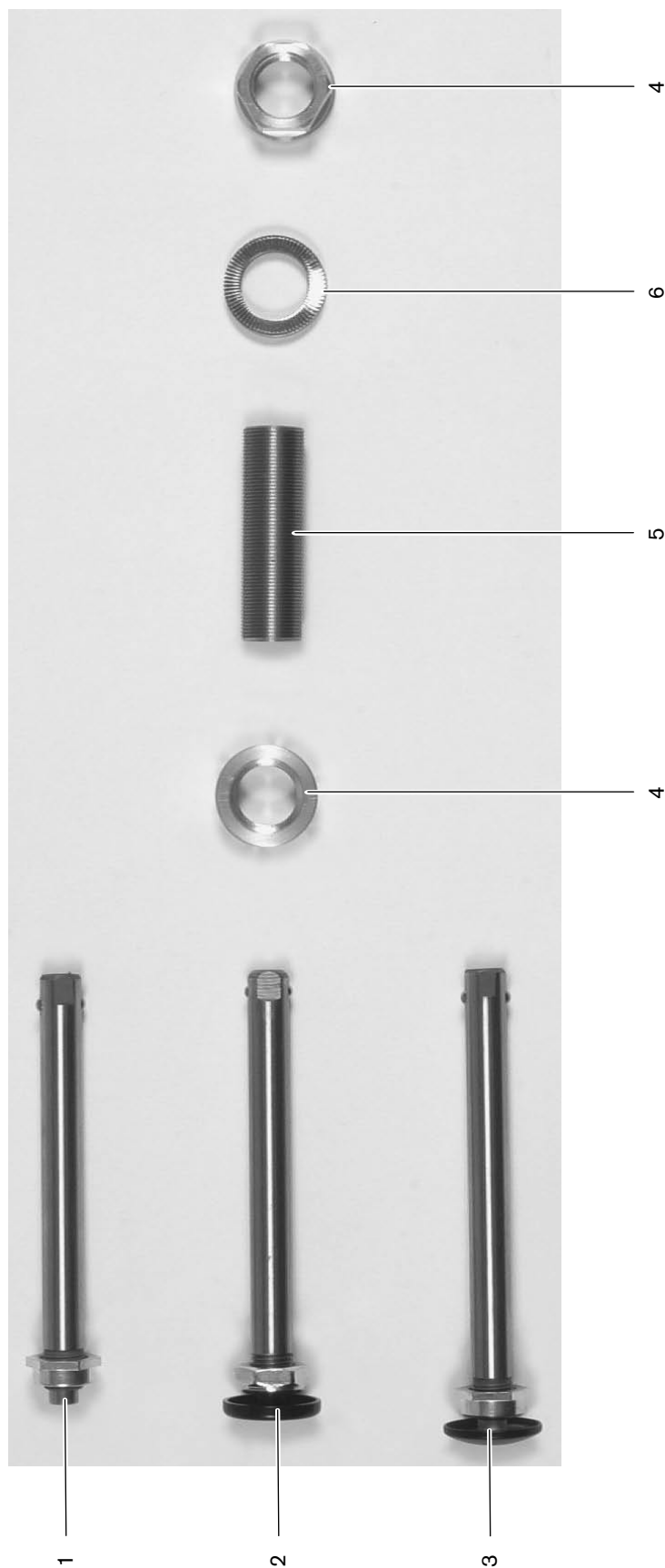


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G45=SK011	Steckachse kpl. Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2 (Pos. 1, 4-6)*	2	St.
	481G00=ST021	Steckachse Durchmesser 12x98 mm	1	St.
	481G09=SK013	Fitting M18x1, kpl. (Pos. 4-6)	1	St.
4	481G45=SE008	Sechskantmutter	2	St.
5	481G09=ST013	Fitting M18x1	1	St.
6	507S30=M18	Nordlockscheibe	1	St.
Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
2	481G45=SK013	Steckachse kpl. für Modell XXL2 und Spox-Light-Rad (Pos. 2, 4-6)*	2	St.
	481G00=ST040	Steckachse Durchmesser 12x108 mm	1	St.
	481G09=SK013	Fitting M18x1, kpl. (Pos. 4-6)	1	St.
Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
2	481G45=SK027	Steckachse kpl. für Infinity-Rad (Pos. 2, 4-6)	2	St.
	481G00=ST033	Steckachse Durchmesser 12x103 mm (Version bis 11/03)	1	St.
	481G00=ST030	Steckachse Durchmesser 12x98 mm (Version ab 12/03)	1	St.
	481G09=SK013	Fitting M18x1, kpl. (Pos. 4-6)	1	St.
Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
o. B.	481G08=SK020	Steckachse Durchmesser 12x108 mm kpl. für Shock-Absorber-System in Verbindung mit Kleiderschutz steckbar bzw. Desk-Seitenteilen mit höhenverstellbarer Armauflage bei 2° bzw. 4° Sturz und Bereifung 22x1 3/8" und 24x1 3/8"	2	St.
	481G08=SK113	Steckachse Durchmesser 12x108 mm kpl.	1	St.
	481G08=ST013	Steckachse Durchmesser 12x108 mm	1	St.
	481G00=SK123	Fitting M18x1, 50 mm kpl.	1	St.
	481G00=ST123	Fitting M18x1, 50 mm kpl.	1	St.
	502S33=M18x1	Sechskantmutter flach M18x1	2	St.
	507S30=M18	Nordlockscheibe	1	St.
	507S30=M18	Nordlockscheibe	1	St.
	481G08=SE012	Distanz für Entriegelungshilfe	1	St.
Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
o. B.	481G08=SK049	Steckachse Durchmesser 12x108 mm kpl. für Shock-Absorber-System in Verbindung mit Kleiderschutz steckbar bzw. Desk-Seitenteilen und Spox-Light-Rädern	2	St.
	481G08=SK056	Steckachse Durchmesser 12x123 mm kpl.	1	St.
	481G00=ST056	Steckachse Durchmesser 12x123 mm	1	St.
	481G08=SK027	Fitting M18x1, 57 mm kpl.	1	St.
	481G08=ST057	Fitting M18x1, 57 mm kpl.	1	St.
	502S33=M18x1	Sechskantmutter flach M18x1	2	St.
	507S30=M18	Nordlockscheibe	1	St.
	507S30=M18	Nordlockscheibe	1	St.
	HR32021194	Distanz für 12"-Rad	1	St.

* Bitte angeben: Seitenteilvariante und Radsturz.


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G45=SK005	Antriebsradadapter kpl. Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1-5)	2	St.
1	481G45=SS001	Antriebsradadapter	1	St.
2	481G45=SS002	Klemmschelle	2	St.
3	481G45=ST003	Sturzscheibe	2	St.
4	501T39=M8x25	Zylinderschraube DIN 6912, A2	2	St.
5	502S24=M8	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	2	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G45=SK010	Antriebsradadapter poliert kpl. Modell T und VR (Pos. 3-5)	2	St.
o. B.	481G45=SP001	Antriebsradadapter poliert	1	St.
o. B.	481G45=SP002	Klemmschelle poliert	2	St.
3	481G45=ST003	Sturzscheibe	2	St.
4	501T39=M8x25	Zylinderschraube DIN 6912, A2	2	St.
5	502S24=M8	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	2	St.

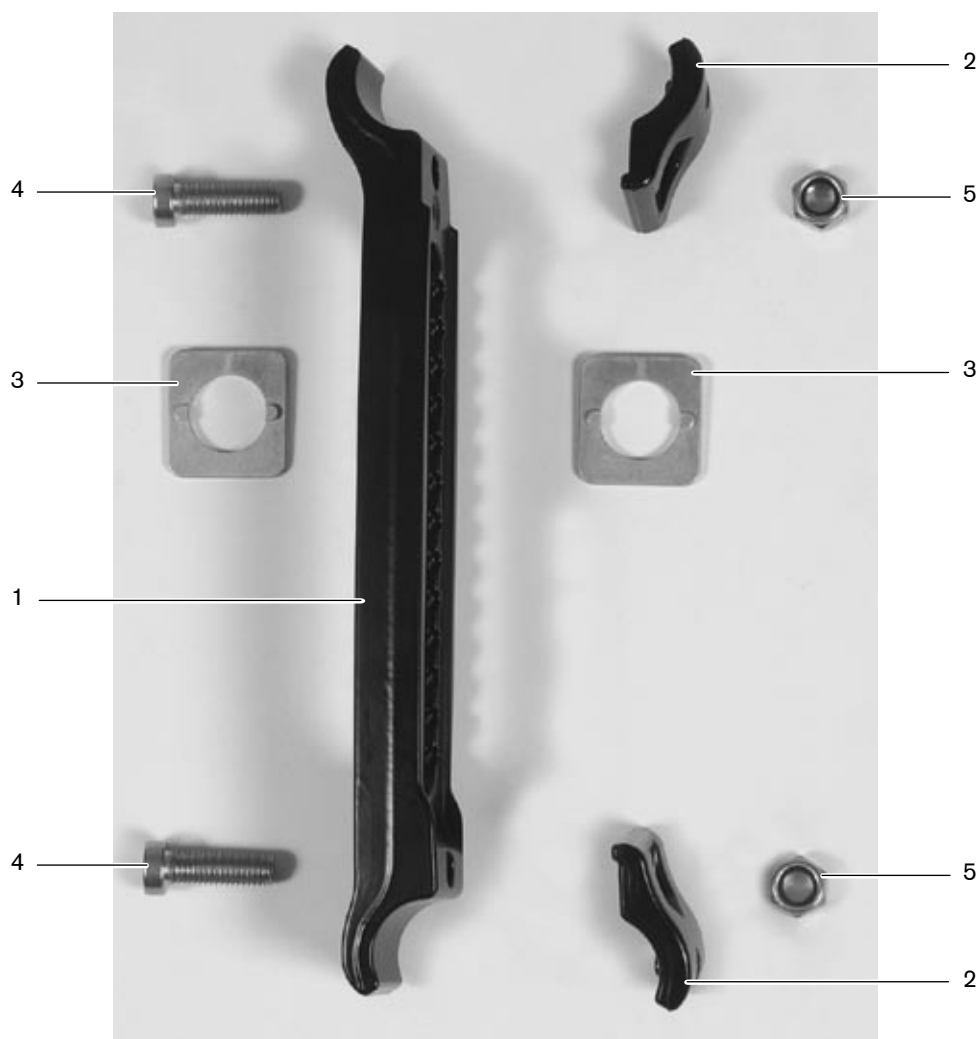


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G45=SK040	Antriebsradadapter kpl. Modell Ti 8.9 (Pos. 1-5)	2	St.
1	481G45=SS001	Antriebsradadapter	1	St.
2	481G45=SS002	Klemmschelle	2	St.
3	481G45=ST003	Sturzscheibe	2	St.
4	501T69=M8x25	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
5	502S44=M8	Sechskantmutter, selbstsichernd, Aluminium	2	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G45=SK045	Antriebsradadapter poliert kpl. Modell Ti 8.9 (Pos. 3-5)	2	St.
o. B.	481G45=SP001	Antriebsradadapter poliert	1	St.
o. B.	481G45=SP002	Klemmschelle poliert	2	St.
3	481G45=ST003	Sturzscheibe	2	St.
4	501T69=M8x25	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
5	502S44=M8	Sechskantmutter, selbstsichernd, Aluminium	2	St.

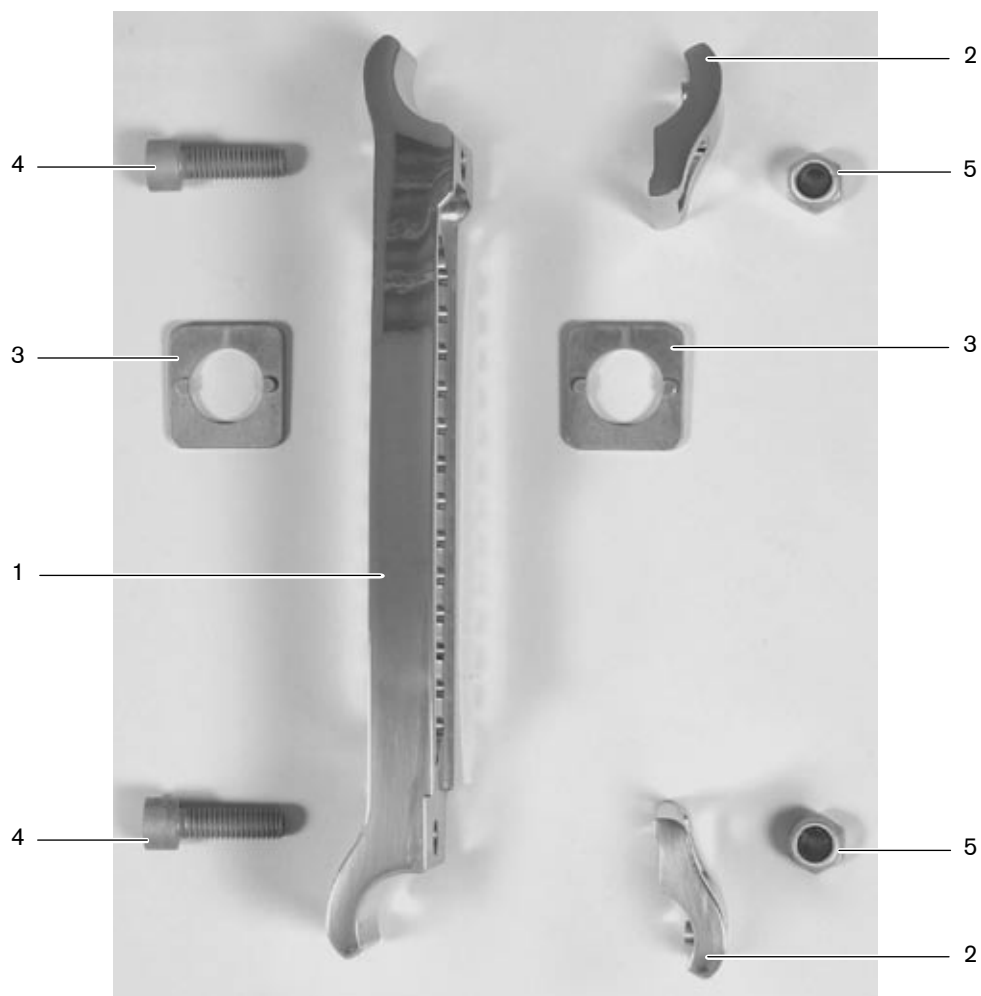


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G45=SK012	Antriebsradadapter kpl. Modell XXL2 (Pos. 1-4)	2	St.
1	481G45=SS004	Antriebsradaufnahme Modell XXL2	1	St.
2	481G45=SS002	Klemmschelle	2	St.
3	501T39=M8x25	Zylinderschraube DIN 6912, A2	2	St.
4	502S24=M8	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	2	St.

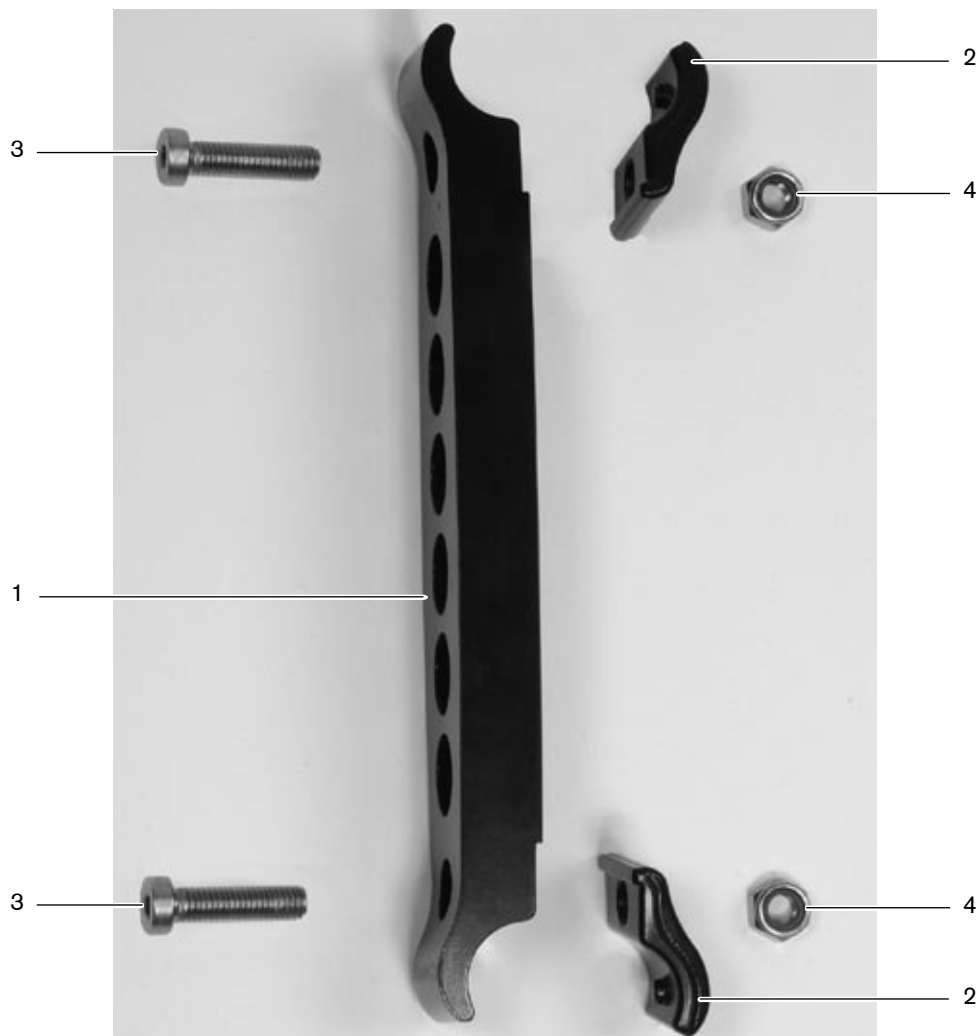

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=ST301	Hochdruckpumpe 14 bar	1	St.



G

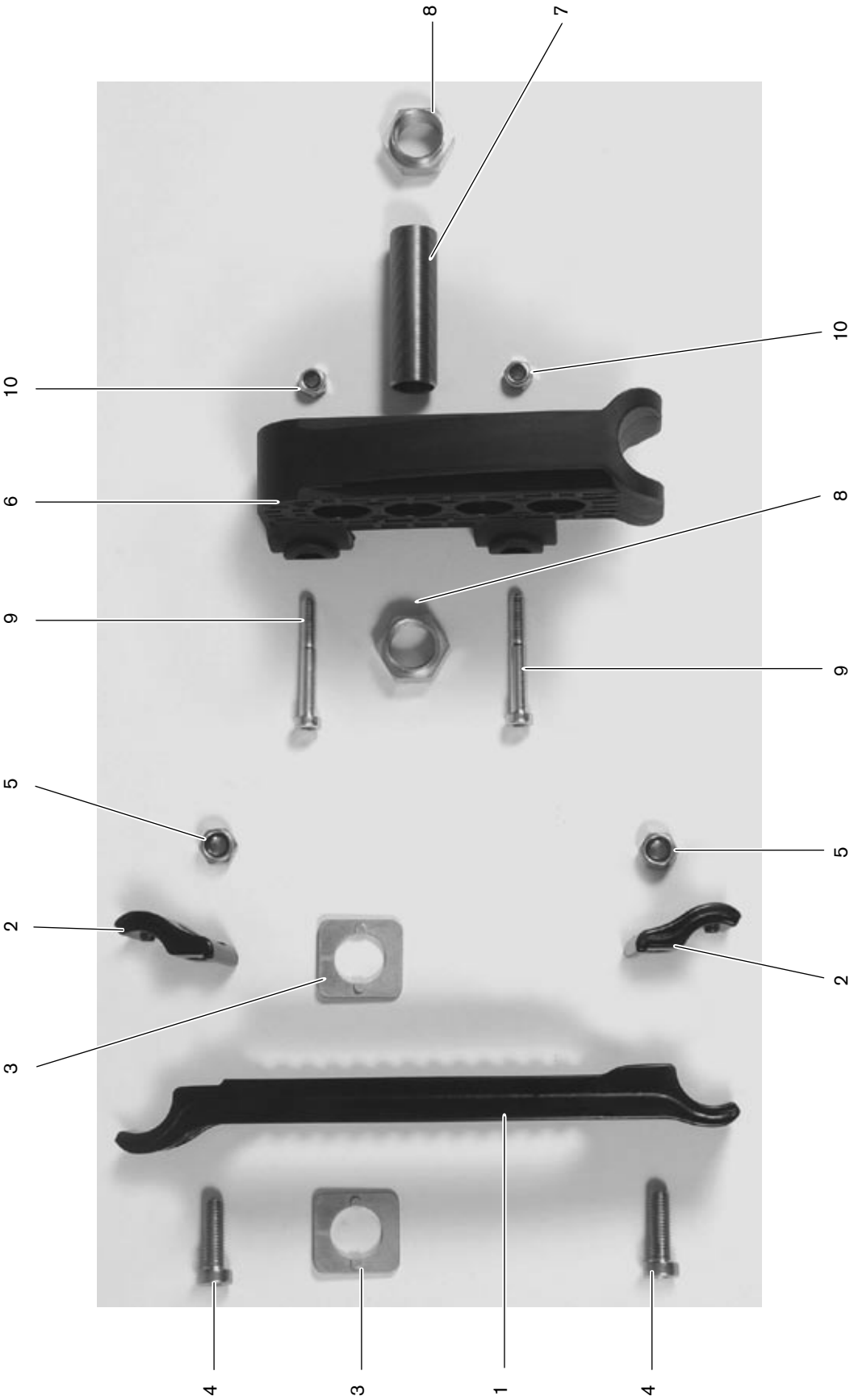


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G45=SK015	Radstandsverlängerung incl. Bremsadapter kpl. Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1-10)	2	St.
	481G45=SK005	Antriebsradadapter kpl. Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1-5, Einzelteile s. Seite 218)	1	St.
	481H08=SK026	Bremsadapter für Radstandsverlängerung (Einzelteile s. Seite 266)	1	St.
	481G45=SK017	Radstandsverlängerung kpl. Modell T, VR und Teen2 (Pos. 6-10)	1	St.
6	481G09=ST035	Antriebsradadapter/Radstandsverlängerung	1	St.
7	481G09=ST013	Fitting M18x1	1	St.
8	481G09=SZ037	Mutter für Steckachsenadapter	2	St.
9	501T39=M6x45	Zylinderschraube DIN 6912, A2	2	St.
10	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	2	St.
o. B.	481A45=SR057	Hülse für Radstandsverlängerung	1	St.
o. B.	501S89=M6x30	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	1	St.
o. B.	481A45=SE098	Hülse für Radstandsverlängerung	1	St.
o. B.	702F96=18.5	Universalstopfen	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G45=SK050	Radstandsverlängerung incl. Bremsadapter kpl. Modell Ti 8.9 (Pos. 1-8)	2	St.
	481G45=SK040	Antriebsradadapter kpl. Modell Ti 8.9 (Pos. 1-5, Einzelteile s. Seite 219)	1	St.
	481H08=SK026	Bremsadapter für Radstandsverlängerung (Einzelteile s. Seite 266)	1	St.
	481G45=SK018	Radstandsverlängerung kpl. Modell Ti 8.9 (Pos. 6-8)	1	St.
6	481G09=ST035	Antriebsradadapter/Radstandsverlängerung	1	St.
7	481G09=ST013	Fitting M18x1	1	St.
8	481G09=SZ037	Mutter für Steckachsenadapter	2	St.
o. B.	501T69=M6x45	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
o. B.	502S424=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, Aluminium	2	St.
o. B.	481A45=SR057	Hülse für Radstandsverlängerung	1	St.
o. B.	501T69=M6x30	Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	1	St.
o. B.	481A45=SE098	Hülse für Radstandsverlängerung	1	St.
o. B.	702F96=18.5	Universalstopfen	1	St.

Hinweis: Nur Radsturz 0° einstellbar.
Nicht möglich in Verbindung mit Shock-Absorber-System.

Bitte beachten: Hintere SH eingeschränkt:

- 20" - 39.5 cm, 42 cm, 45 cm, 47.5 cm
- 22" - 42 cm, 45 cm, 47.5 cm, 50 cm
- 24" - 45 cm, 47.5 cm, 50 cm, 52.5 cm
- 26" - 47.5 cm, 50 cm, 52.5 cm

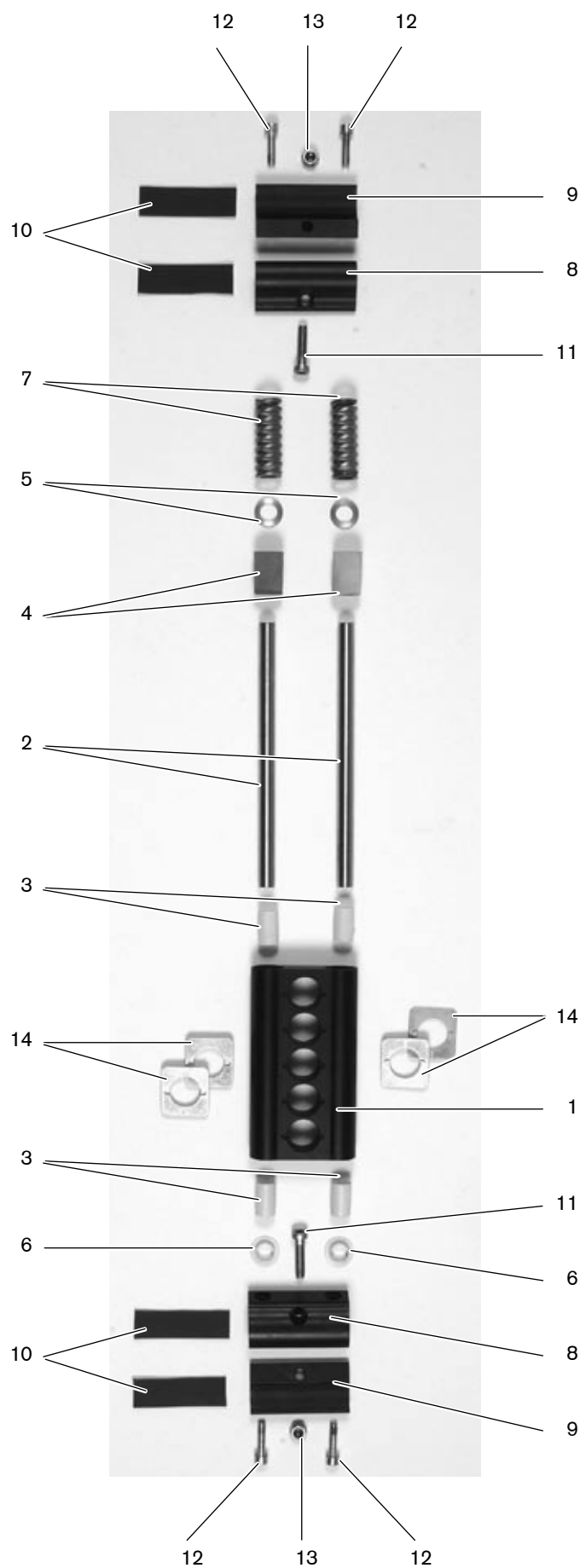


G

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G45=SK055	Shock-Absorber-System Modell T, Ti 8.9, VR und Teen2	2	St.
		(Pos. 1-14)*		
1	481G08=SE132	Lochplatte, schwarz eloxiert	1	St.
1	481G08=SE142	Lochplatte, farblos eloxiert	1	St.
2	481G08=ST131	Welle	2	St.
3	509G7=1	Gleitlager	4	St.
4	481G08=ST135	Elastomer, hart	2	St.
4	481G08=ST136	Elastomer, mittel	2	St.
4	481G08=ST139	Elastomer, weich	2	St.
5	481G08=ST137	Scheibe	2	St.
6	509G8=1	Gleitlager	2	St.
7	513D52=12	Druckfeder, hart	2	St.
7	513D52=13	Druckfeder, mittel	2	St.
7	513D52=14	Druckfeder, weich	2	St.
8	481G08=SE133	Rohrklemme, vorn, schwarz eloxiert	2	St.
8	481G08=SE143	Rohrklemme, vorn, farblos eloxiert	2	St.
9	481G08=SE134	Rohrklemme, hinten, schwarz eloxiert	2	St.
9	481G08=SE144	Rohrklemme, hinten, farblos eloxiert	2	St.
10	481G08=ST138	Elastikpuffer	4	St.
11	501T39=M6x25	Zylinderschraube DIN 6912, A2	2	St.
12	501T50=1	Zylinderschraube DIN 912, M5x20, selbstsichernd, verzinkt	2	St.
13	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	2	St.
14	481G45=ST003	Sturzscheibe	4	St.

* Bitte angeben: Eloxalfarbe und Patientengewicht

- Hinweis:
- Nicht möglich in Verbindung mit Radstandsverlängerung, Einhandantrieb und Antriebsrad mit Nabenbremse.
 - Bei Montage von Desk-Seitenteilen oder Kniehebelbremse mit Rückrollsperr, Steckachse 481G08=SK113 und Distanz 481G08=SE012 verwenden.
 - Bei Montage von Desk-Seitenteilen oder Kleiderschutz steckbar in Verbindung mit Spox-Light-Rädern, Steckachse 481G08=SK049 bestellen.
 - Bei Montage von Desk-Seitenteilen mit höhenverstellbarer Armauflage bzw. Kleiderschutz steckbar bei 2° bzw. 4° Sturz und Bereifung 22x1 3/8" oder 24x1 3/8", Steckachse 481G08=SK020 bestellen.
 - Bei Montage von Antriebsrädern mit Trommelbremse nur 0° Radsturz möglich.
 - Bei Modell Teen2 erst ab ST26 und bei Modell Teen2 VR erst ab ST32 möglich

	Patientengewichtsklasse		
	40-65 kg	66-90 kg	91-120 kg
Druckfeder	513D52=14 weich	513D52=13 mittel	513D52=12 hart
Elastomer (Dichte)	0.55 g/cm³	0.60 g/cm³	0.65 g/cm³

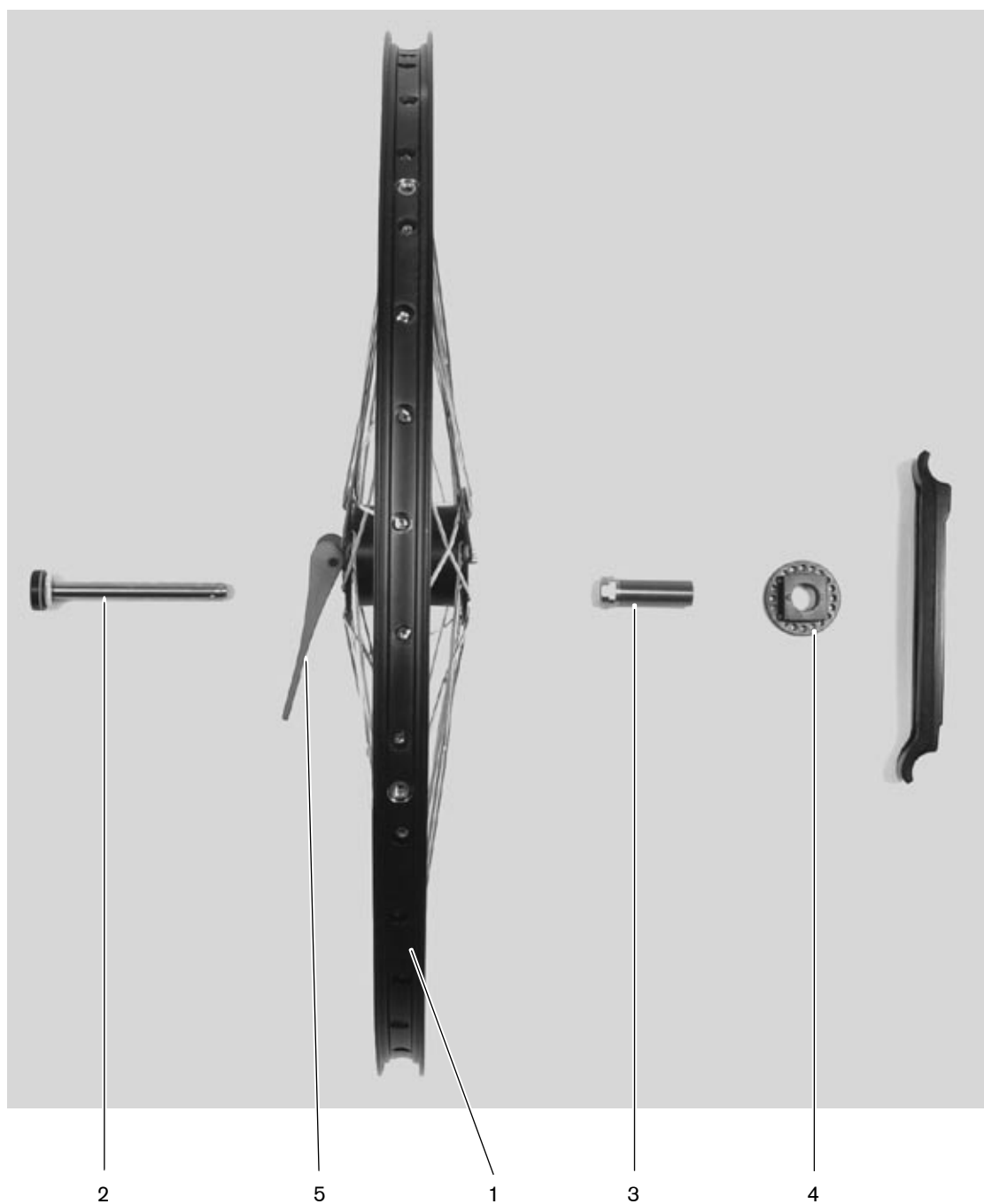

G

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G45=SK030	Antriebsrad mit Nabenbremse kpl. Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1-5)	2	St.
1	481G00=SV280	Speichenrad 20" mit Standardfelge und Stoplock-Rollstuhlnabe (inkl. Pos. 5)	1	St.
1	481G00=SV282	Speichenrad 22" mit Standardfelge und Stoplock-Rollstuhlnabe (inkl. Pos. 5)	1	St.
1	481G00=SV284	Speichenrad 24" mit Standardfelge und Stoplock-Rollstuhlnabe (inkl. Pos. 5)	1	St.
1	481G00=SV294	Speichenrad 24" mit Hohlwandfelge und Stoplock-Rollstuhlnabe (inkl. Pos. 5)	1	St.
1	481G00=SV296	Speichenrad 26" mit Hohlwandfelge und Stoplock-Rollstuhlnabe (inkl. Pos. 5)	1	St.
o. B.	481G00=ST018	Speichenstrahler	3	St.
o. B.	481G00=ST100	Felgenband 20x1 3/8"	1	St.
o. B.	481G00=ST102	Felgenband 22x1 3/8"	1	St.
o. B.	481G00=ST104	Felgenband 24x1 3/8"	1	St.
o. B.	481G00=ST114	Felgenband 24" für Hohlwandfelge	1	St.
o. B.	481G00=ST116	Felgenband 26" für Hohlwandfelge	1	St.
2	481G00=ST095	Steckachse mit Viso-Lock	1	St.
3	481G45=ST025	Fitting M18x1, 60 mm (- bei Anbau Seitenteil bzw. Kleiderschutz standard bzw. Ergo in Verbindung mit Antriebsradadapter und Radsturz 0°, 2°, 4° oder Desk-Seitenteil mit höhenverstellbarer Armauflage bzw. Kleiderschutz steckbar in Verbindung mit Antriebsradadapter und Radsturz 0° und 2° in Verbindung mit allen Bereifungsvarianten; - bei Anbau Seitenteil bzw. Kleiderschutz standard bzw. Ergo in Verbindung mit Shock-Absorber-System bei Radsturz 0° in Verbindung mit allen Bereifungsvarianten; - bei Anbau Seitenteil bzw. Kleiderschutz standard bzw. Ergo in Verbindung mit Shock-Absorber-System bei Radsturz 2° in Verbindung mit Bereifung 20x1", 22x1" und 24x1")	1	St.
3	481G45=ST026	Fitting M18x1, 80 mm (- bei Anbau Seitenteil bzw. Kleiderschutz standard bzw. Ergo in Verbindung mit Shock-Absorber-System bei Radsturz 2° in Verbindung mit Bereifung 20x1 3/8", 22x1 3/8", 24x1 3/8" und 26x1"; - bei Anbau Desk-Seitenteil mit höhenverstellbarer Armauflage bzw. Kleiderschutz steckbar in Verbindung mit Antriebsradadapter bei Radsturz 4° in Verbindung mit allen Bereifungsvarianten; - bei Anbau Desk-Seitenteil mit höhenverstellbarer Armauflage bzw. Kleiderschutz steckbar in Verbindung mit Shock-Absorber-System bei Radsturz 0°, 2° in Verbindung mit allen Bereifungsvarianten)	1	St.
o. B.	481G45=SE008	Sechskantmutter	1	St.
o. B.	507S30=M18	Nordlockscheibe	1	St.
o. B.	507U56=18.4x28.5x1	Arretierscheibe	1	St.
o. B.	506A2=4x14	Zylinderstift ISO 2338	2	St.
4	481G45=SZ019	Lochscheibe 10 mm (- bei Anbau Seitenteil bzw. Kleiderschutz standard bzw. Ergo in Verbindung mit Antriebsradadapter und Radsturz 0° in Verbindung mit allen Bereifungsvarianten; - bei Anbau Seitenteil bzw. Kleiderschutz standard bzw. Ergo in Verbindung mit Shock-Absorber-System bei Radsturz 0° in Verbindung mit allen Bereifungsvarianten; - bei Anbau Seitenteil bzw. Kleiderschutz standard bzw. Ergo in Verbindung mit Shock-Absorber-System bei Radsturz 2° in Verbindung mit Bereifung 20x1", 22x1" und 24x1")	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
4	481G45=SZ021	Lochscheibe 15 mm (- bei Anbau Seitenteil bzw. Kleiderschutz standard bzw. Ergo in Verbindung mit Antriebsradadapter und Radsturz 2° in Verbindung mit Bereifung 20x1", 22x1" und 24x1"; - bei Anbau Seitenteil bzw. Kleiderschutz standard bzw. Ergo in Verbindung mit Shock-Absorber-System bei Radsturz 2° in Verbindung mit Bereifung 20x1 3/8", 22x1 3/8", 24x1 3/8" und 26x1"; - bei Anbau Desk-Seitenteil bzw. Kleiderschutz steckbar in Verbindung mit Antriebsradadapter bzw. Shock-Absorber-System bei Radsturz 0° in Verbindung mit Bereifung 20x1", 22x1", 24x1" und 26x1")	1	St.
4	481G45=SZ022	Lochscheibe 20 mm (- bei Anbau Seitenteil bzw. Kleiderschutz standard bzw. Ergo in Verbindung mit Antriebsradadapter und Radsturz 2° in Verbindung mit Bereifung 20x1 3/8", 22x1 3/8", 24x1 3/8" und 26x1" und bei Radsturz 4° in Verbindung mit Bereifung 20x1", 22x1" und 24x1"; - bei Anbau Desk-Seitenteil bzw. Kleiderschutz steckbar in Verbindung mit Antriebsradadapter bei Radsturz 0° in Verbindung mit Bereifung 20x1 3/8", 22x1 3/8" und 24x1 3/8"; - bei Anbau Desk-Seitenteil bzw. Kleiderschutz steckbar in Verbindung mit Shock-Absorber-System bei Radsturz 0° in Verbindung mit Bereifung 20x1 3/8", 22x1 3/8" und 24x1 3/8" und bei Radsturz 2° in Verbindung mit Bereifung 20x1", 22x1" und 24x1")	1	St.
4	481G45=SZ023	Lochscheibe 25 mm (- bei Anbau Seitenteil bzw. Kleiderschutz standard bzw. Ergo in Verbindung mit Antriebsradadapter und Radsturz 4° in Verbindung mit Bereifung 20x1 3/8", 22x1 3/8", 24x1 3/8" und 26x1"; - bei Anbau Desk-Seitenteil bzw. Kleiderschutz steckbar in Verbindung mit Antriebsradadapter bei Radsturz 2° in Verbindung mit allen Bereifungsvarianten; - bei Anbau Desk-Seitenteil bzw. Kleiderschutz steckbar in Verbindung mit Shock-Absorber-System bei Radsturz 2° in Verbindung mit Bereifung 20x1 3/8", 22x1 3/8" und 24x1 3/8" und 26x1")	1	St.
4	481G45=SZ037	Lochscheibe 35 mm (- bei Anbau Desk-Seitenteil bzw. Kleiderschutz steckbar in Verbindung mit Antriebsradadapter bei Radsturz 4° in Verbindung mit Bereifung 20x1", 22x1" und 24x1")	1	St.
4	481G45=SZ038	Lochscheibe 40 mm (- bei Anbau Desk-Seitenteil bzw. Kleiderschutz steckbar in Verbindung mit Antriebsradadapter bei Radsturz 4° in Verbindung mit Bereifung 20x1 3/8", 22x1 3/8", 24x1 3/8" und 26x1")	1	St.
5	481G00=ST110	Hebel für Stoplock-Nabe	1	St.
o. B.	481G00=ST108	Feder	2	St.
o. B.	481G00=ST109	Benzing	2	St.
o. B.	481G00=ST099	Stift mit Bolzen	2	St.


Bitte angeben: Seitenteilvarainte, Bereifungsvariante, Antriebsradvariante und Antriebsradadaptervariante

Hinweis: Radsturz 4° in Verbindung mit Shock-Absorber-System nicht möglich.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=ST454	Silikon-Greifringüberzug 24" Modell T, Ti 8.9, VR und XXL2	2	St.

Hinweis: Nicht möglich in Verbindung mit Greifring gummiert.



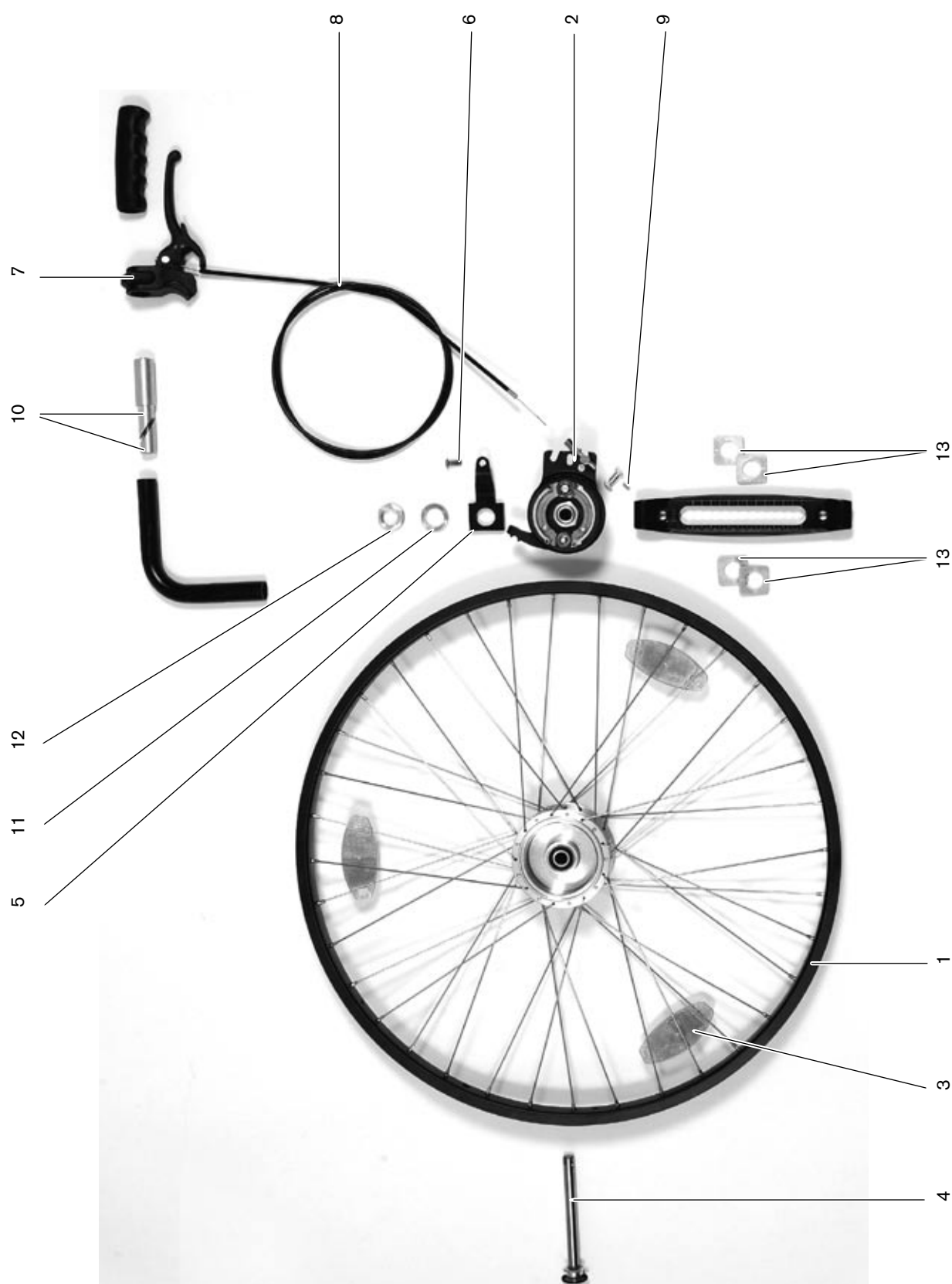

G


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G45=PK028	20"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., Modell Teen2	1	Paar
	481G45=PK032	22"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., Modell T, VR und Teen2	1	Paar
	481G45=PK034	24"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., Modell T und VR	1	Paar
	481G45=LK028	20"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., links, Modell Teen2 (Pos.1-13)	1	Paar
	481G45=LK032	22"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., links, Modell T, VR und Teen2 (Pos.1-13)	1	St.
	481G45=LK034	24"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., links, Modell T und VR (Pos.1-13)	1	St.
	481G45=RK028	20"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., rechts, Modell Teen2	1	Paar
	481G45=RK032	22"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., rechts, Modell T, VR und Teen2	1	St.
	481G45=RK034	24"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., rechts, Modell T und VR	1	St.
	471G00=LV120	20"-Rad mit Trommelbremse, links (Pos. 1-3)	1	St.
	471G00=LV122	22"-Rad mit Trommelbremse, links (Pos. 1-3)	1	St.
	481G00=LV124	24"-Rad mit Trommelbremse, links (Pos. 1-3)	1	St.
	471G00=RV120	20"-Rad mit Trommelbremse, rechts	1	St.
	471G00=RV122	22"-Rad mit Trommelbremse, rechts	1	St.
	481G00=RV124	24"-Rad mit Trommelbremse, rechts	1	St.
1	481G00=SV120	20"-Felge inkl. Kugellager und Bremstrommel	1	St.
1	HR12155621	22"-Felge inkl. Kugellager und Bremstrommel	1	St.
1	HR12155121	24"-Felge inkl. Kugellager und Bremstrommel	1	St.
2	481G00=LT125	Ankerplatte links für Trommelbremsrad	1	St.
2	481G09=LT076	Ankerplatte mit Fitting 18x72 mm, links (bei Anbau Radstandsverlängerung)	1	St.
o. B.	481G00=RT125	Ankerplatte rechts für Trommelbremsrad	1	St.
o. B.	481G09=RT076	Ankerplatte mit Fitting 18x72 mm, rechts (bei Anbau Radstandsverlängerung)	1	St.
o. B.	481G00=ST100	Felgenband 20x1 3/8"	1	St.
o. B.	481G00=ST102	Felgenband 22x1 3/8"	1	St.
o. B.	481G00=ST104	Felgenband 24x1 3/8"	1	St.
3	481G00=ST015	Speichenstrahler	3	St.
4	481G00=ST040	Steckachse Durchmesser 12x108 mm	1	St.
	481G45=SW033	Montagezubehör für Befestigung-Trommelbremse (Pos. 5, 6)	1	St.
5	481H45=SS010	Drehmomentstütze	1	St.
6	501S89=M6x14	Linsenschraube mit Innensechskant	1	St.
o. B.	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd	1	St.
	481G09=SW071	Montagezubehör für Befestigung-Trommelbremse in Verbindung mit Radstandsverlängerung	1	St.
o. B.	481G09=SS036	Drehmomentstütze	1	St.
o. B.	481G09=ST053	Distanz	1	St.
o. B.	501S72=M6x60	Linsenschraube mit Innensechskant, verzinkt	1	St.
o. B.	502S18=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, verzinkt	2	St.
o. B.	501S72=M6x16	Linsenschraube mit Innensechskant, verzinkt	1	St.
	481G08=SW016	Montagezubehör für Begleitperson-Trommelbremse (Pos. 7-9)	1	St.
7	445B31	Brems-Bedien-Hebel	1	St.
8	481H00=ST031	Bowdenzug für Bremse HB-FM	1	St.
9	471H00=SR009	Abschlusshülse	2	St.
o. B.	445B22	Kabelendkappe	1	St.
o. B.	461H10=ST005	Kabelbinder schwarz	3	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
10	481D08=SK017	Verlängerung für Schiebegriff kpl. (Einzelteile s. Seite 133)	1	St.
10	481D05=SK009	Verlängerung für Schiebegriff kpl. (Einzelteile s. Seite 133)	1	St.
11	507S30=M18	Nordlockscheibe	1	St.
12	481G45=SE008	Sechskantmutter	1	St.
13	481G45=ST003	Sturzscheibe	4	St.

Hinweis: Bitte Radsturzeinstellung des Antriebsrades, Rücken- und Schiebegriffvariante angeben.
 In Verbindung mit Shock-Absorber-System nur 0° Radsturz möglich.
 Nicht möglich in Verbindung mit Schiebegriffen kurz.
 22"-Antriebsräder bei Modell Teen2 ab ST32 und bei Modell Teen2 VR ab ST36 möglich.
 Bei Anbau Trommelbremsrad in Verbindung mit Seitenteil mit kurzer bzw. langer Armauflage
 nur 0° Radsturz möglich.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G00=ST307	AirMan-Pumpe, Akku betrieben	1	St.



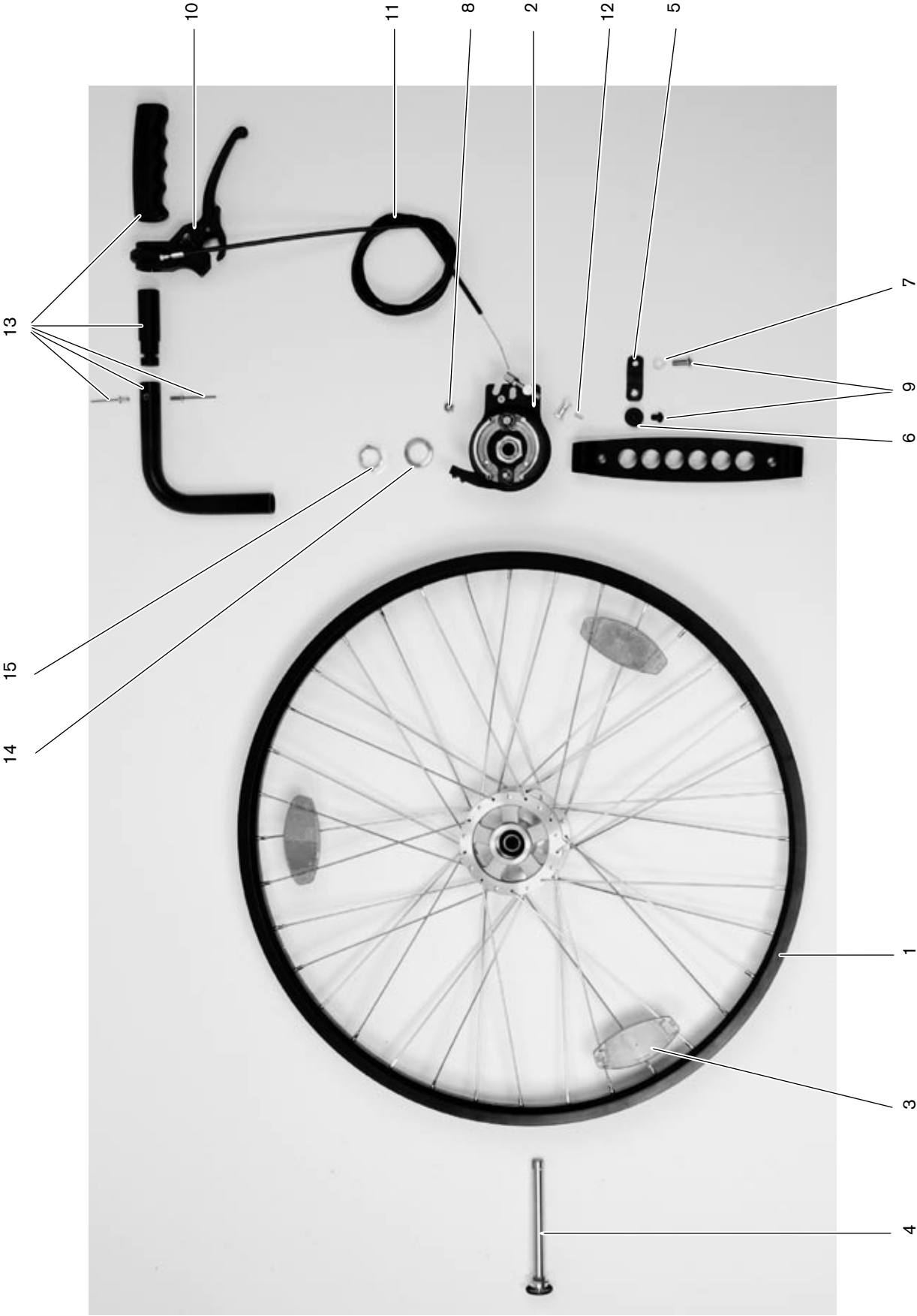

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G45=PK054	24"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., Modell XXL2	1	Paar
	481G45=PK056	26"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., Modell XXL2	1	Paar
	481G45=LK054	24"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., links, Modell XXL2 (Pos.1-15)	1	St.
	481G45=LK056	26"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., links, Modell XXL2 (Pos.1-15)	1	St.
	481G45=RK054	24"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., rechts, Modell XXL2	1	St.
	481G45=RK056	26"-Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter kpl., rechts, Modell XXL2	1	St.
	481G45=LV014	24"-Rad mit Trommelbremse, links (Pos. 1-3)	1	St.
	481G45=LV016	26"-Rad mit Trommelbremse, links (Pos. 1-3)	1	St.
	481G45=RV014	24"-Rad mit Trommelbremse, rechts	1	St.
	481G45=RV016	26"-Rad mit Trommelbremse, rechts	1	St.
1	481G00=SV227	24"-Felge inkl. Kugellager und Bremstrommel Modell XXL2	1	St.
1	481G00=SV279	26"-Felge inkl. Kugellager und Bremstrommel Modell XXL2	1	St.
2	481G00=LT125	Ankerplatte links für Trommelbremsrad	1	St.
o. B.	481G00=RT125	Ankerplatte rechts für Trommelbremsrad	1	St.
o. B.	481G00=ST114	Felgenband 24" für Hohlwandfelge	1	St.
o. B.	481G00=ST116	Felgenband 26" für Hohlwandfelge	1	St.
3	481G00=ST015	Speichenstrahler	3	St.
4	481G08=ST013	Steckachse Durchmesser 12x108 mm	1	St.
	481G45=SW053	Montagezubehör für Befestigung-Trommelbremse Modell XXL2 (Pos. 5-9)	1	St.
5	481H45=SS047	Drehmomentstütze Modell XXL2	1	St.
6	481G45=ST048	Buchse für Drehmomentstütze Modell XXL2	1	St.
7	507U27=6,4	Scheibe DIN 125, A2	1	St.
8	502S24=M6	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
9	501S89=M6x16	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	2	St.
	481G08=SW016	Montagezubehör für Begleitperson-Trommelbremse (Pos. 10-12, Einzelteile s. Seite 230, 231 Pos. 7-9)	1	St.
13	481D45=SK130	Schiebegriff standard mit Verlängerung Modell XXL2, kpl. (Einzelteile s. Seite 114)	1	St.
13	481D45=SK131	Schiebegriff lang mit Verlängerung Modell XXL2, kpl. (Einzelteile s. Seite 114, 116)	1	St.
13	481D45=SK132	Schiebegriff teleskopierbar lang mit Verlängerung Modell XXL2, kpl. (Einzelteile s. Seite 114, 116)	1	St.
13	481D45=SK133	Schiebegriff abnehmbar mit Verlängerung Modell XXL2, kpl. (Einzelteile s. Seite 117)	1	St.
13	481D45=SK134	Schiebegriff abnehmbar mit Verlängerung Modell XXL2, kpl. (Einzelteile s. Seite 118)	1	St.
14	507S30=M18	Nordlockscheibe	1	St.
15	481G45=SE008	Sechskantmutter	1	St.

Hinweis: Bitte Radstureinstellung des Antriebsrades, Rücken- und Schiebegriffvariante angeben.
Nicht möglich in Verbindung mit Schiebegriffen kurz.
Bei Anbau Trommelbremsrad in Verbindung mit Seitenteil mit kurzer bzw. langer Armauflage
nur 0° Radsturz möglich.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G00=SV245	Einhandantrieb 24" mit Steckachse, kpl. Modell T und VR (Pos. 1-5) Sitzbreite:	1	St.
1	481G00=ST232	Teleskopstange für SB 32	1	St.
1	481G00=ST233	Teleskopstange für SB 34-36	1	St.
1	481G00=ST238	Teleskopstange für SB 38-42	1	St.
1	481G00=ST239	Teleskopstange für SB 44-50	1	St.
	481G00=ST340	Radsatz 24" mit Einhandbedienung, Steckachse (Pos. 2-5)	1	St.
2	481G00=SV364	Antriebsrad mit Doppelgreifreifen 24" (incl. Pos. 4, 5)	1	St.
4	481G00=ST353	Greifring für 24" außen	1	St.
5	481G00=ST356	Greifring für 24" innen	1	St.
3	481G00=SV363	Angetriebenes Rad 24" für Einhandantrieb	1	St.
o. B.	502S33=M18x1	Sechskantmutter flach	2	St.
o. B.	481G00=ST104	Felgenband 24x1 3/8"	2	St.
o. B.	507S30=M18	Nordlockscheibe	2	St.
o. B.	481G00=ST015	Speichenstrahler	6	St.
o. B.	481G00=ST008	Außenkappe für Media-Nabe	2	St.


Bitte beachten: Greifringe und Steckachsen müssen nicht zusätzlich bestellt werden!
Speichenschutz nicht möglich.
Nur 0°-Radsturz möglich.



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G00=SK722	Speichenschutz 20" transparent Modell Teen2 (Pos. 1, 2)*	2	St.
	481G00=SK712	Speichenschutz 22" transparent Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1, 2)*	2	St.
	481G00=SK702	Speichenschutz 24" transparent Modell T und VR (Pos. 1, 2)*	2	St.
	481G08=SK702	Speichenschutz 24" transparent Modell XXL2 (Pos. 1)*	2	St.
1	481G00=ST722	Speichenschutz 20" transparent	1	St.
1	481G00=ST712	Speichenschutz 22" transparent	1	St.
1	481G00=ST702	Speichenschutz 24" transparent	1	St.
	481G00=SW711	Montagezubehör für Speichenschutz transparent Modell T, VR und Teen2 (Pos. 2)	1	St.
2	481G00=ST902	Befestigungsniessel	6	St.
	481G08=SW044	Montagezubehör für Speichenschutz transparent Modell XXL2	1	St.
o. B.	481G00=ST870	Scheibe Durchmesser 5.3	6	St.
o. B.	481G00=ST903	Distanzhülse 7.5 mm	6	St.
o. B.	501S89=M5x16	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	6	St.
o. B.	702F81=M5	Käfigmutter	6	St.
	481G00=SW721	Montagezubehör für Speichenschutz bei Rad mit Trommelbremse Modell T, VR, Teen2 und XXL2	1	St.
o. B.	481G00=ST780	Scheibe Durchmesser 5.3	6	St.
o. B.	481G00=ST901	Distanzhülse	6	St.
o. B.	501S89=M5x14	Linsenschraube mit Innensechskant, A2	6	St.
o. B.	702F81=M5	Käfigmutter	6	St.

* Bitte Antriebsradvariante angeben:

Hinweis: Nicht möglich in Verbindung mit Infinity-Super-Light-Rad, Spox-Rad, Six-Star-Rad und MTB-Komplett-Rad sowie Einhandantrieb und Zusatzantrieben.
Für 26"-Antriebsräder bitte Speichenschutz in Größe 24" bestellen.

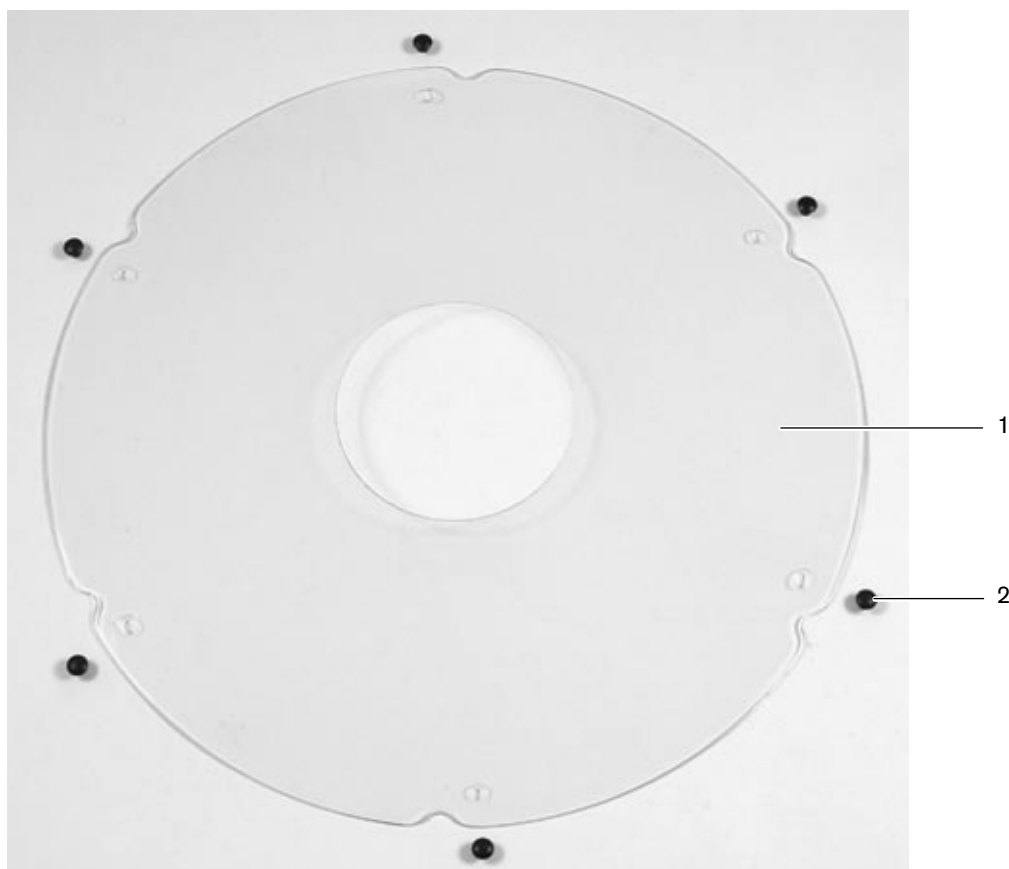

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G00=SK732	Speichenschutz 22", Motiv: Dreiecke Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1, 2)*	2	St.
	481G00=SK734	Speichenschutz 24", Motiv: Dreiecke Modell T und VR (Pos. 1, 2)*	2	St.
	481G08=SK734	Speichenschutz 24", Motiv: Dreiecke Modell XXL2 (Pos. 1)*	2	St.
1	481G00=ST732	Speichenschutz 22", Motiv: Dreiecke	1	St.
1	481G00=ST734	Speichenschutz 24", Motiv: Dreiecke	1	St.
	481G00=SW711	Montagezubehör für Speichenschutz transparent Modell T, VR und Teen2 (Pos. 2 Einzelteile s. Seite 237)	1	St.
	481G08=SW044	Montagezubehör für Speichenschutz transparent Modell XXL2 (Einzelteile s. Seite 237)	1	St.
	481G00=SW721	Montagezubehör für Speichenschutz bei Rad mit Trommel-bremse Modell T, VR, Teen2 und XXL2 (Einzelteile s. Seite 237)	1	St.

* Bitte Antriebsradvariante angeben:

Hinweis: Nicht möglich in Verbindung mit Infinity-Super-Light-Rad, Spox-Rad, Six-Star-Rad und MTB-Komplett-Rad sowie Einhandantrieb und Zusatzantrieben.
Für 26"-Antriebsräder bitte Speichenschutz in Größe 24" bestellen.




1

2

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G00=SK772	Speichenschutz 22", Motiv: Street Modell T, VR und Teen2 (Pos. 1, 2)*	2	St.
	481G00=SK774	Speichenschutz 24", Motiv: Street Modell T und VR (Pos. 1, 2)*	2	St.
	481G08=SK774	Speichenschutz 24", Motiv: Street Modell XXL2 (Pos. 1)*	2	St.
1	481G00=ST772	Speichenschutz 22", Motiv: Street	1	St.
1	481G00=ST774	Speichenschutz 24", Motiv: Street	1	St.
	481G00=SW711	Montagezubehör für Speichenschutz transparent Modell T, VR und Teen2 (Pos. 2 Einzelteile s. Seite 237)	1	St.
	481G08=SW044	Montagezubehör für Speichenschutz transparent Modell XXL2 (Einzelteile s. Seite 237)	1	St.
	481G00=SW721	Montagezubehör für Speichenschutz bei Rad mit Trommel-bremse Modell T, VR, Teen2 und XXL2 (Einzelteile s. Seite 237)	1	St.

* Bitte Antriebsradvariante angeben:

Hinweis: Nicht möglich in Verbindung mit Infinity-Super-Light-Rad, Spox-Rad, Six-Star-Rad und MTB-Komplett-Rad sowie Einhandantrieb und Zusatzantrieben.
Für 26"-Antriebsräder bitte Speichenschutz in Größe 24" bestellen.

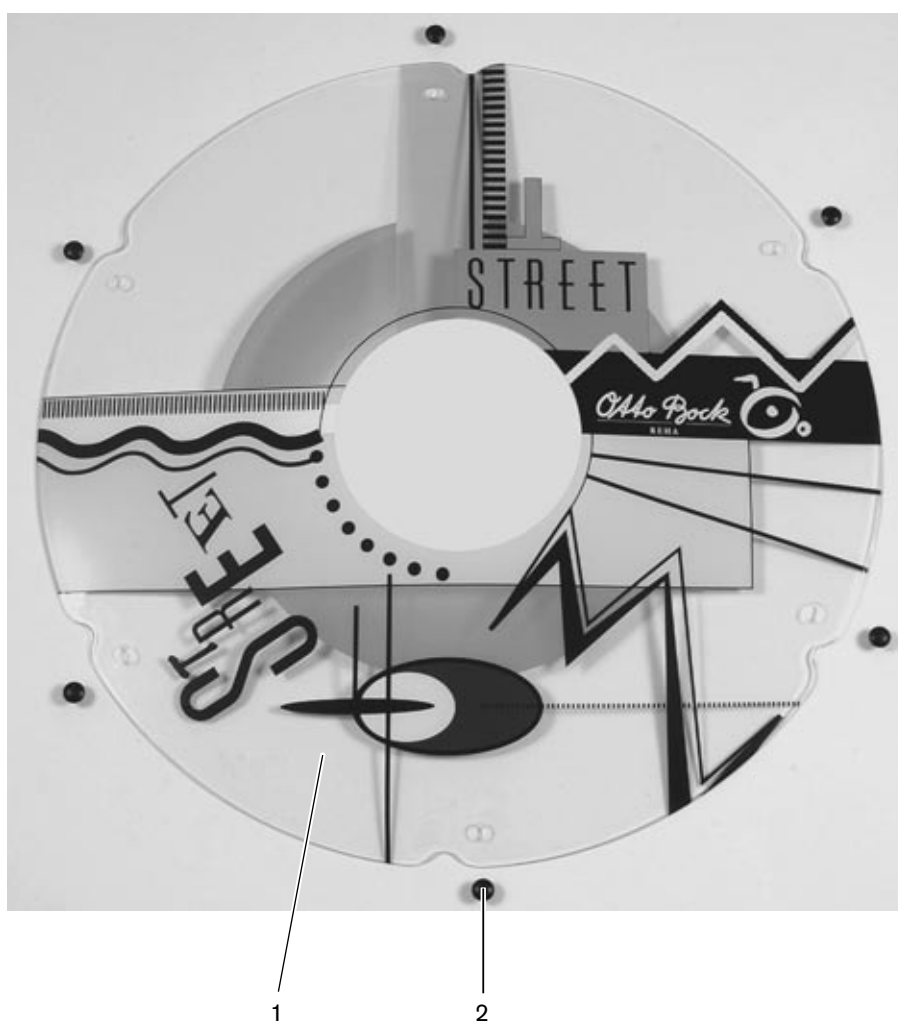

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G00=SK750	Speichenschutz 20", Motiv: Tiger blau Modell Teen2 (Pos. 1, 2)*	2	St.
	481G00=SK760	Speichenschutz 20", Motiv: Tiger grün Modell Teen2 (Pos. 1, 2)*	2	St.
	481G00=SK752	Speichenschutz 22", Motiv: Tiger blau Modell Teen2 (Pos. 1, 2)*	2	St.
	481G00=SK762	Speichenschutz 22", Motiv: Tiger grün Modell Teen2 (Pos. 1, 2)*	2	St.
1	481G00=ST750	Speichenschutz 20", Motiv: Tiger blau	1	St.
1	481G00=ST760	Speichenschutz 20", Motiv: Tiger grün	1	St.
1	481G00=ST752	Speichenschutz 22", Motiv: Tiger blau	1	St.
1	481G00=ST762	Speichenschutz 22", Motiv: Tiger grün	1	St.
	481G00=SW711	Montagezubehör für Speichenschutz transparent Modell Teen2 (Pos. 2 Einzelteile s. Seite 237)	1	St.
	481G00=SW721	Montagezubehör für Speichenschutz bei Rad mit Trommelbremse Modell Teen2 (Einzelteile s. Seite 237)	1	St.

* Bitte Antriebsradvariante angeben:

Hinweis: Nicht möglich in Verbindung mit Infinity-Super-Light-Rad.



1

2

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481G00=SK775	Speichenschutz 20", Motiv: Kinderzeichnung Modell Teen2 (Pos. 1, 2)*	2	St.
	481G00=SK776	Speichenschutz 22", Motiv: Kinderzeichnung Modell Teen2 (Pos. 1, 2)*	2	St.
1	481G00=ST775	Speichenschutz 20", Motiv: Kinderzeichnung	1	St.
1	481G00=ST776	Speichenschutz 22", Motiv: Kinderzeichnung	1	St.
	481G00=SW711	Montagezubehör für Speichenschutz transparent Modell Teen2 (Pos. 2 Einzelteile s. Seite 237)	1	St.
	481G00=SW721	Montagezubehör für Speichenschutz bei Rad mit Trommelbremse Modell Teen2 (Einzelteile s. Seite 237)	1	St.

* Bitte Antriebsradvariante angeben:

Hinweis: Nicht möglich in Verbindung mit Infinity-Super-Light-Rad.



1

2

G

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SS812	Greifring 22" tief Aluminium, schwarz beschichtet	2	St.
1	481G00=SS814	Greifring 24" tief Aluminium, schwarz beschichtet	2	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau für 20"/22"-Standardfelge*	2	St.
o. B.		Linsensenkschraube DIN 966, A2	6	St.
o. B.		Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	6	St.
o. B.		Laschenschutz für Greifringanbau	6	St.
	481G00=SW801	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"-Standardfelge*	2	St.
o. B.		Linsensenkschraube DIN 966, A2	6	St.
o. B.		Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	6	St.
o. B.		Laschenschutz für Greifringanbau	6	St.
o. B.		Distanzhülse	6	St.
	481G00=SW870	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"/26"-Hohlwandfelge*	2	St.
o. B.		Linsenschraube mit Innensechskant, A2	6	St.
o. B.		Federring DIN 127, A2	6	St.
o. B.		Scheibe DIN 125, A2	6	St.
o. B.		Laschenschutz für Greifringanbau	6	St.



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SS820	Greifring 20" hoch Aluminium, schwarz beschichtet	2	St.
1	481G00=SS822	Greifring 22" hoch Aluminium, schwarz beschichtet	2	St.
1	481G00=SS824	Greifring 24" hoch Aluminium, schwarz beschichtet	2	St.
1	481G00=SS826	Greifring 26" hoch Aluminium, schwarz beschichtet	2	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau für 20"/22"-Standardfelge*	2	St.
	481G00=SW801	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"-Standardfelge*	2	St.
	481G00=SW870	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"/26"-Hohlwandfelge*	2	St.



* Bitte angeben: Greifringanbau eng oder weit.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SE812	Greifring 22" tief Aluminium, schwarz eloxiert	2	St.
1	481G00=SE814	Greifring 24" tief Aluminium, schwarz eloxiert	2	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau für 20"/22"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW801	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW870	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"/26"-Hohlwandfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SE820	Greifring 20" hoch Aluminium, schwarz eloxiert	2	St.
1	481G00=SE822	Greifring 22" hoch Aluminium, schwarz eloxiert	2	St.
1	481G00=SE824	Greifring 24" hoch Aluminium, schwarz eloxiert	2	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau für 20"/22"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW801	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW870	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"/26"-Hohlwandfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.



* Bitte angeben: Greifringanbau eng oder weit.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SU812	Greifring 22" tief Aluminium, gummiert	2	St.
1	481G00=SU814	Greifring 24" tief Aluminium, gummiert	2	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau für 20"/22"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW801	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW870	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"/26"-Hohlwandfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.




Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SU820	Greifring 20" hoch Aluminium, gummiert	2	St.
1	481G00=SU822	Greifring 22" hoch Aluminium, gummiert	2	St.
1	481G00=SU824	Greifring 24" hoch Aluminium, gummiert	2	St.
1	481G00=SU826	Greifring 26" hoch Aluminium, gummiert	2	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau für 20"/22"-Standardfelge (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW801	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"-Standardfelge (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW870	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"/26"-Hohlwandfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.



* Bitte angeben: Greifringanbau eng oder weit.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SP842	Greifring 22" tief Edelstahl, poliert	2	St.
1	481G00=SP844	Greifring 24" tief Edelstahl, poliert	2	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau für 20"/22"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW801	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW870	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"/26"-Hohlwandfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.

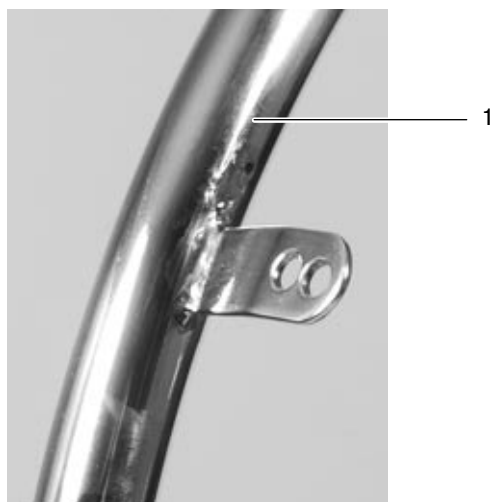

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SP830	Greifring 20" hoch Edelstahl, poliert	2	St.
1	481G00=SP832	Greifring 22" hoch Edelstahl, poliert	2	St.
1	481G00=SP834	Greifring 24" hoch Edelstahl, poliert	2	St.
1	481G00=SP836	Greifring 26" hoch Edelstahl, poliert	2	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau für 20"/22"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW801	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW870	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"/26"-Hohlwandfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.




* Bitte angeben: Greifringanbau eng oder weit.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SP862	Greifring 22" tief Titan, poliert	2	St.
1	481G00=SP864	Greifring 24" tief Titan, poliert	2	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau für 20"/22"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW801	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW870	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"/26"-Hohlwandfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.



Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=SP850	Greifring 20" hoch Titan, poliert	2	St.
1	481G00=SP852	Greifring 22" hoch Titan, poliert	2	St.
1	481G00=SP854	Greifring 24" hoch Titan, poliert	2	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau für 20"/22"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW801	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW870	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"/26"-Hohlwandfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.

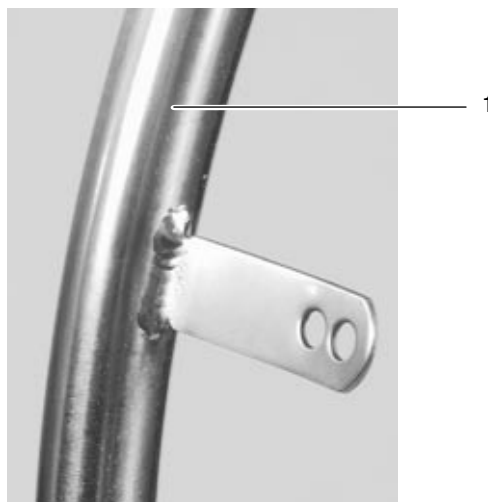

* Bitte angeben: Greifringanbau eng oder weit.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
1	481G00=ST822	Greifring 22" hoch Aluminium Top Grip	2	St.
1	481G00=ST824	Greifring 24" hoch Aluminium Top Grip	2	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau für 20"/22"-Standardfelge (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW801	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"-Standardfelge (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.
	481G00=SW870	Montagezubehör für Greifringanbau für 24"/26"-Hohlwandfelge (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.

Hinweis: Nur Greifringanbau weit möglich.




1

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
o. B.	481G00=SB820	Greifring 20" hoch Aluminium bunt beschichtet Rahmenfarbe:	2	St.
o. B.	481G00=SB822	Greifring 22" hoch Aluminium bunt beschichtet Rahmenfarbe:	2	St.
	481G00=SW800	Montagezubehör für Greifringanbau für 20"/22"-Standardfelge* (Einzelteile s. Seite 242)	2	St.

* Bitte angeben: Greifringanbau eng oder weit.

Baugruppe H

Bremse

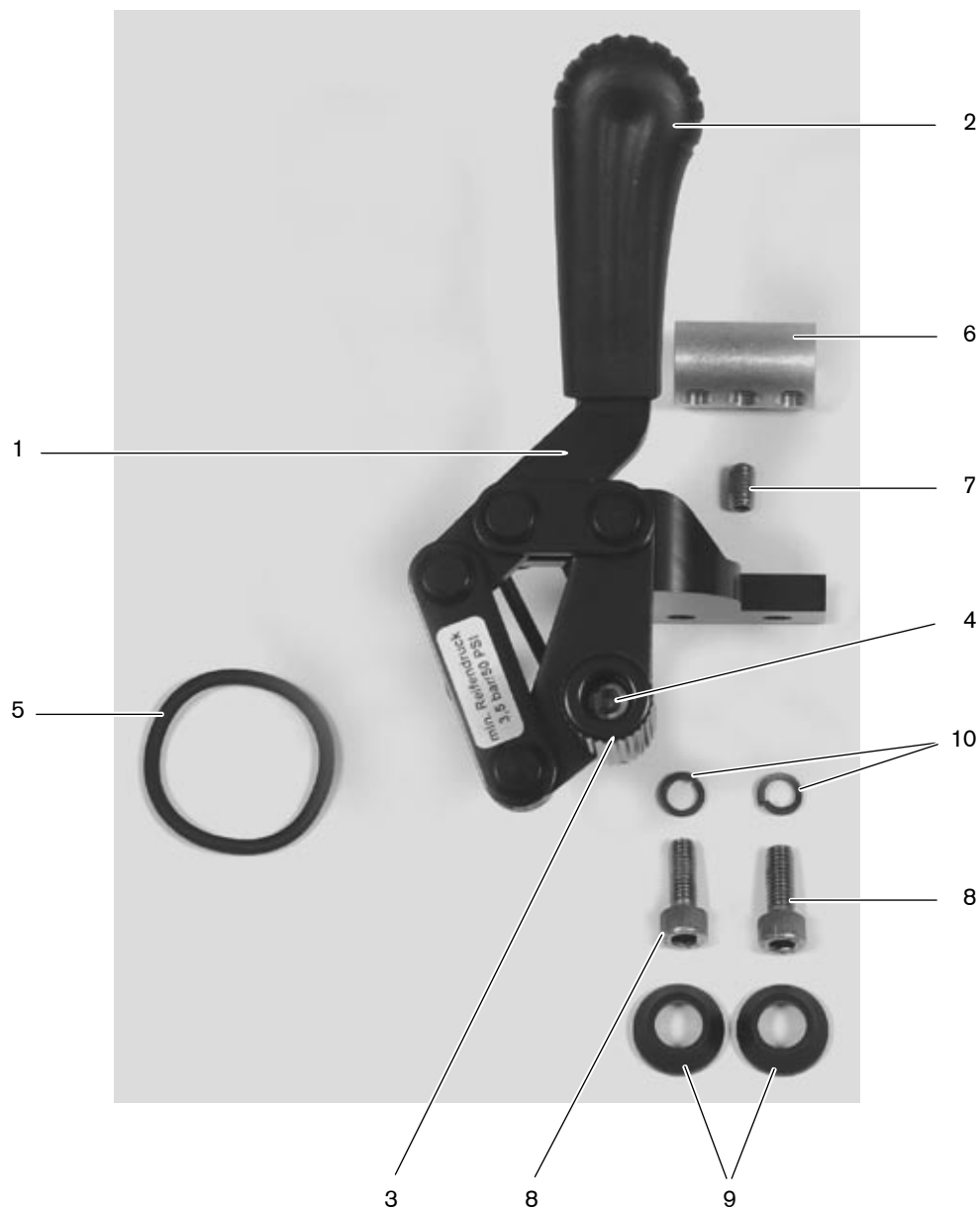


H

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H08=PK001	Kniehebelbremse standard, kpl., Modell T*	1	Paar
	481H08=LK001	Kniehebelbremse standard, kpl., links (Pos. 1-10)*	1	St.
	481H08=RK001	Kniehebelbremse standard, kpl., rechts*	1	St.
1	481H08=LM090	Kniehebelbremse standard, links, kurz (incl. Pos. 1-5)	1	St.
o. B.	481H08=RM090	Kniehebelbremse standard, rechts, kurz	1	St.
1	481H08=LM091	Kniehebelbremse standard, links, lang (incl. Pos. 1-5)	1	St.
o. B.	481H08=RM091	Kniehebelbremse standard, rechts, lang	1	St.
2	481H45=ST006	Bremsgriff	1	St.
3	481H45=SS013	Andruckbolzen kurz 23 mm	1	St.
3	481H08=SS072	Andruckbolzen kurz 33 mm	1	St.
3	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
4	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
5	627F14=31.34x3.53	O-Ring	1	St.
	481H08=SW050	Montagezubehör für Kniehebelbremse Modell T, VR, Teen2 VR und XXL2 (Pos. 6-10)	1	St.
6		Gewindebolzen	1	St.
7		Gewindestift DIN 913, A2	1	St.
8		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x16, A2	2	St.
9		Schraubenkappe	2	St.
10		Federring DIN 7980	2	St.
Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H45=PK020	Kniehebelbremse standard, kpl., Modell Ti 8.9*	1	Paar
	481H45=LK020	Kniehebelbremse standard, kpl., links (Pos. 1-7)*	1	St.
	481H45=RK020	Kniehebelbremse standard, kpl., rechts*	1	St.
1	481H08=LM090	Kniehebelbremse standard, links, kurz (incl. Pos. 1-5)	1	St.
o. B.	481H08=RM090	Kniehebelbremse standard, rechts, kurz	1	St.
1	481H08=LM091	Kniehebelbremse standard, links, lang (incl. Pos. 1-5)	1	St.
o. B.	481H08=RM091	Kniehebelbremse standard, rechts, lang	1	St.
2	481H45=ST006	Bremsgriff	1	St.
3	481H45=SS013	Andruckbolzen kurz 23 mm	1	St.
3	481H08=SS072	Andruckbolzen kurz 33 mm	1	St.
3	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
4	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
5	627F14=31.34x3.53	O-Ring	1	St.
	481H45=SW009	Montagezubehör für Kniehebelbremse Modell Ti 8.9 (Pos. 6, 7)	1	St.
6		Gewindebolzen	1	St.
7		Gewindestift DIN 913, A2	1	St.
o. B.		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
o. B.		Federring DIN 127	2	St.

* Bitte Radsturzeinstellung des Antriebsrades angeben (0°/ 2°/ 4°).


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H05=PK001	Kniehebelbremse standard, kpl., Modell VR und XXL2*	1	Paar
	481H05=LK001	Kniehebelbremse standard, kpl., links (Pos. 1-10)*	1	St.
	481H05=RK001	Kniehebelbremse standard, kpl., rechts*	1	St.
1	481H08=LM070	Kniehebelbremse standard, links (incl. Pos. 1-5)	1	St.
o. B.	481H08=RM070	Kniehebelbremse standard, rechts	1	St.
2	481H45=ST006	Bremsgriff	1	St.
3	481H45=SS013	Andruckbolzen kurz 23 mm	1	St.
3	481H08=SS072	Andruckbolzen kurz 33 mm	1	St.
3	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
4	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
5	627F14=31.34x3.53	O-Ring	1	St.
	481H08=SW050	Montagezubehör für Kniehebelbremse Modell T, VR, Teen2 VR und XXL2 (Pos. 6-10 Einzelteile s. Seite 250, 251)	1	St.


* Bitte Radsturzeinstellung des Antriebsrades angeben (0°/ 2°/ 4°).

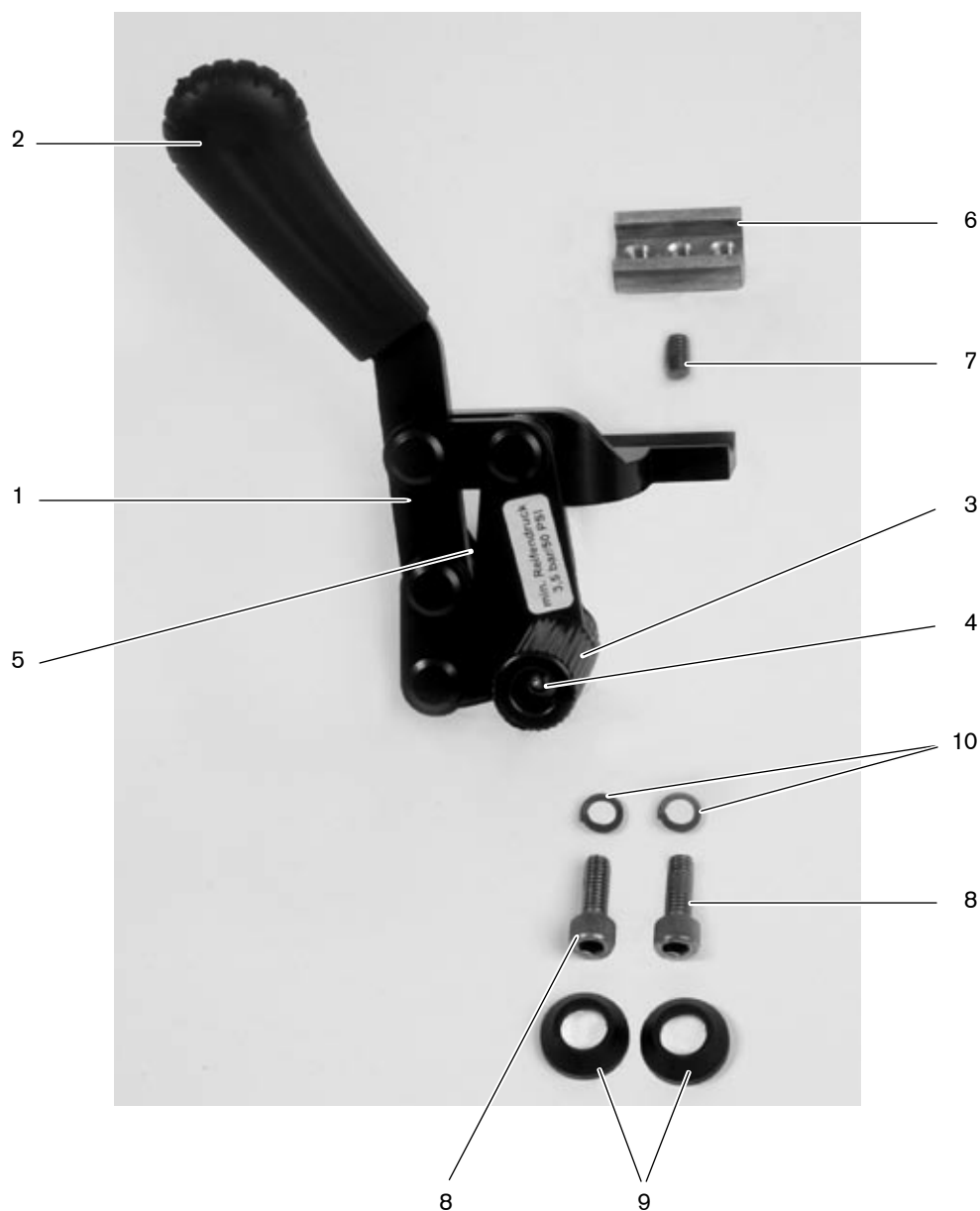

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H08=SK028	Verlängerung für Bremshebel, kpl. (Pos. 1-5)	2	St.
1	481H08=SE027	Verlängerung für Bremshebel	1	St.
2	702F80=18	Lamellenstopfen	1	St.
3	481H08=SV042	Kordel mit Verschluss	1	St.
4	507U27=6.4	Scheibe DIN 125, A2	1	St.
5	501S92=6	Linsenschraube mit Innensechskant, selbstsichernd, M6x12, A2	1	St.

Hinweis: Anbau der Bremshebelverlängerung in Verbindung mit Kniehebelbremsen 481H45=PK030 und 481H45=PK045 nicht möglich.

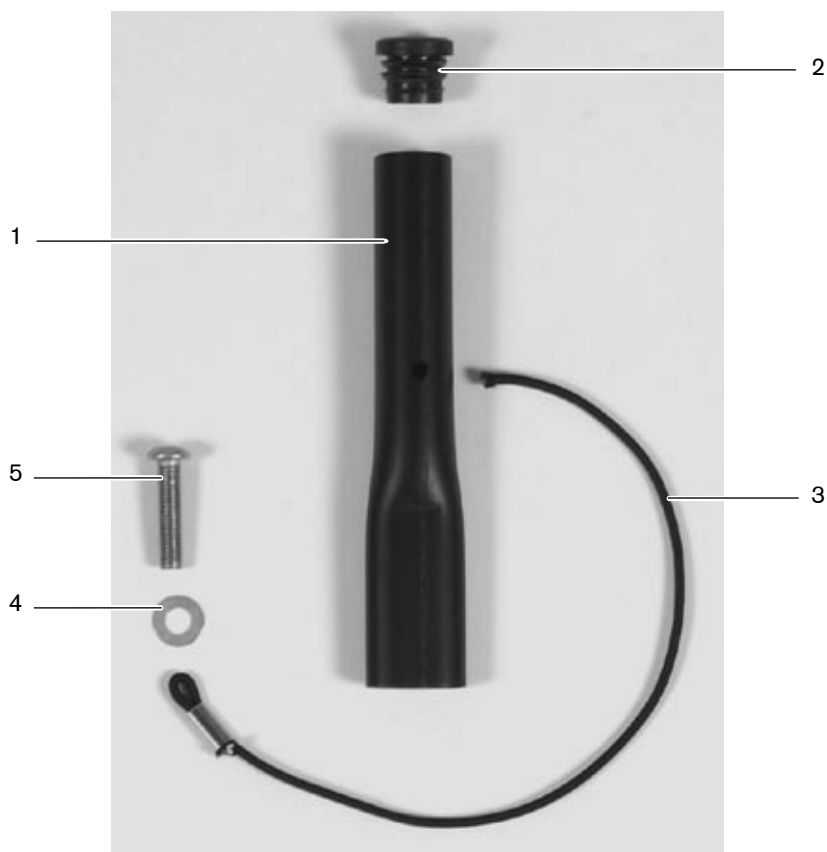

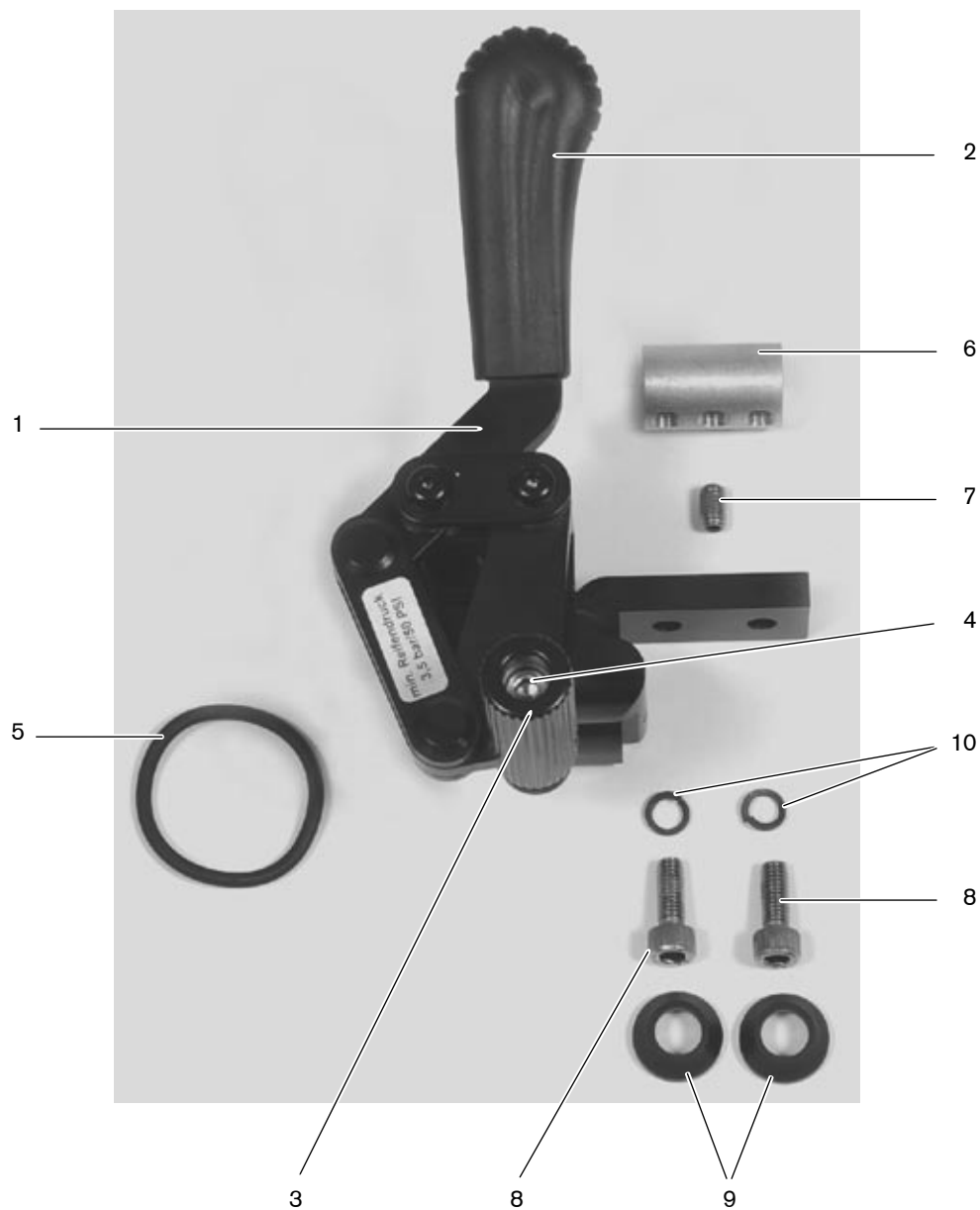


H

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H08=PK030	Kniehebelbremse abschwenkbar, kpl., Modell T, VR und XXL2*	1	Paar
	481H08=LK030	Kniehebelbremse abschwenkbar, kpl., links (Pos. 1-10)*	1	St.
	481H08=RK030	Kniehebelbremse abschwenkbar, kpl., rechts*	1	St.
1	481H08=LM100	Kniehebelbremse abschwenkbar, links (incl. Pos. 1-5)	1	St.
o. B.	481H08=RM100	Kniehebelbremse abschwenkbar, rechts	1	St.
2	481H45=ST006	Bremsgriff	1	St.
3	481H45=SS013	Andruckbolzen kurz 23 mm	1	St.
3	481H08=SS072	Andruckbolzen kurz 33 mm	1	St.
3	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
4	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
5	627F14=36.51x3.53	O-Ring	1	St.
	481H08=SW060	Montagezubehör für Kniehebelbremse abschwenkbar Modell T, VR und XXL2 (Pos. 6-10)	1	St.
6		Gewindebolzen	1	St.
7		Gewindestift DIN 913, A2	1	St.
8		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x16, A2	2	St.
9		Schraubenkappe	2	St.
10		Federring DIN 7980	2	St.
o. B.		Passscheibe DIN 988	2	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H45=PK025	Kniehebelbremse abschwenkbar, kpl., Modell Ti 8.9*	1	Paar
	481H45=LK025	Kniehebelbremse abschwenkbar, kpl., links (Pos. 1-7)*	1	St.
	481H45=RK025	Kniehebelbremse abschwenkbar, kpl., rechts*	1	St.
1	481H08=LM100	Kniehebelbremse abschwenkbar, links (incl. Pos. 1-5)	1	St.
o. B.	481H08=RM100	Kniehebelbremse abschwenkbar, rechts	1	St.
2	481H45=ST006	Bremsgriff	1	St.
3	481H45=SS013	Andruckbolzen kurz 23 mm	1	St.
3	481H08=SS072	Andruckbolzen kurz 33 mm	1	St.
3	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
4	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
5	627F14=31.34x3.53	O-Ring	1	St.
	481H45=SW012	Montagezubehör für Kniehebelbremse abschwenkbar Modell Ti 8.9 (Pos. 6, 7)	1	St.
6		Gewindebolzen	1	St.
7		Gewindestift DIN 913, A2	1	St.
o. B.		Zylinderschraube DIN 912, Aluminium	2	St.
o. B.		Federring DIN 127	2	St.
o. B.		Passscheibe DIN 988	2	St.

* Bitte Radstureinstellung des Antriebsrades angeben (0°/ 2°/ 4°).

Hinweis: Nicht möglich in Verbindung mit Radstandsverlängerung.

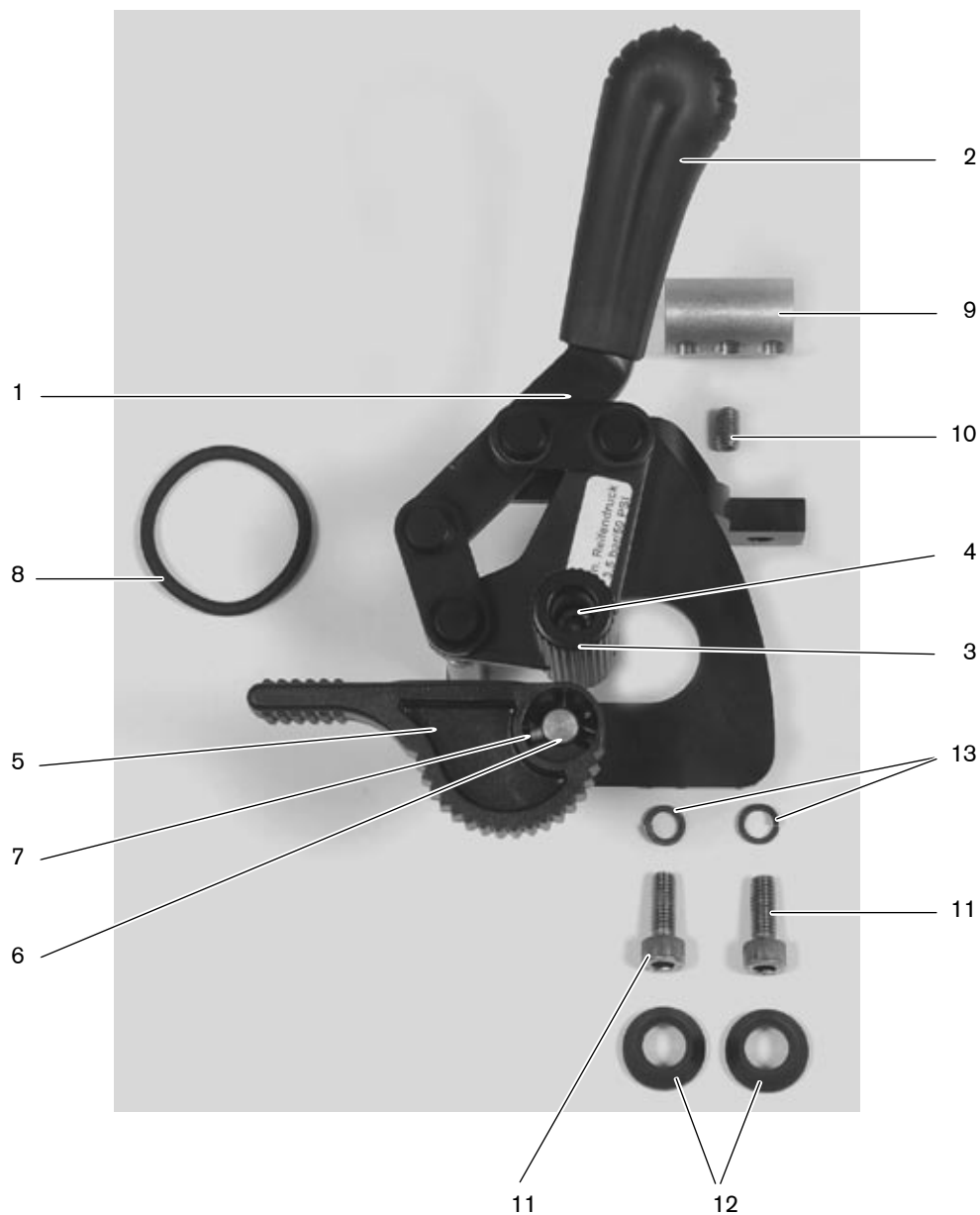


H

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H08=PK085	Kniehebelbremse mit Rückrollsperr, kpl., Modell T und VR*	1	Paar
	481H08=LK085	Kniehebelbremse mit Rückrollsperr, kpl., links (Pos. 1-13)*	1	St.
	481H08=RK085	Kniehebelbremse mit Rückrollsperr, kpl., rechts*	1	St.
1	481H08=LM085	Kniehebelbremse mit Rückrollsperr, links (incl. Pos. 1-8)	1	St.
o. B.	481H08=RM085	Kniehebelbremse mit Rückrollsperr, rechts	1	St.
2	481H45=ST006	Bremsgriff	1	St.
3	481H45=SS013	Andruckbolzen kurz 23 mm	1	St.
3	481H08=SS072	Andruckbolzen kurz 33 mm	1	St.
3	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
4	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
5	481H08=LT089	Rückrollsperr	1	St.
o. B.	481H08=RT089	Rückrollsperr	1	St.
6	481H08=LT088	Bolzen	1	St.
o. B.	481H08=RT088	Bolzen	1	St.
6	481H08=LT097	Bolzen für Anbau Trommelbremse	1	St.
o. B.	481H08=RT097	Bolzen für Anbau Trommelbremse	1	St.
7	506A22=3x10	Passkerbstift ISO 8745	1	St.
o. B.	513D52=24	Druckfeder	1	St.
8	627F14=31.34x3.53	O-Ring	1	St.
	481H08=SW050	Montagezubehör für Kniehebelbremse Modell T, VR, Teen2 VR und XXL2 (Pos. 9-13 Einzelteile s. Seite 250, 251 Pos. 6-10)	1	St.
Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H45=PK035	Kniehebelbremse mit Rückrollsperr, kpl., Modell Ti 8.9*	1	Paar
	481H45=LK035	Kniehebelbremse mit Rückrollsperr, kpl., links (Pos. 1-10)*	1	St.
	481H45=RK035	Kniehebelbremse mit Rückrollsperr, kpl., rechts*	1	St.
1	481H08=LM085	Kniehebelbremse mit Rückrollsperr, links (incl. Pos. 1-8)	1	St.
o. B.	481H08=RM085	Kniehebelbremse mit Rückrollsperr, rechts	1	St.
2	481H45=ST006	Bremsgriff	1	St.
3	481H45=SS013	Andruckbolzen kurz 23 mm	1	St.
3	481H08=SS072	Andruckbolzen kurz 33 mm	1	St.
3	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
4	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
5	481H08=LT089	Rückrollsperr	1	St.
o. B.	481H08=RT089	Rückrollsperr	1	St.
6	481H08=LT088	Bolzen	1	St.
o. B.	481H08=RT088	Bolzen	1	St.
6	481H08=LT097	Bolzen für Anbau Trommelbremse	1	St.
o. B.	481H08=RT097	Bolzen für Anbau Trommelbremse	1	St.
7	506A22=3x10	Passkerbstift ISO 8745	1	St.
o. B.	513D52=24	Druckfeder	1	St.
8	627F14=31.34x3.53	O-Ring	1	St.
	481H45=SW009	Montagezubehör für Kniehebelbremse Modell Ti 8.9 (Pos. 9, 10 Einzelteile s. Seite 250, 251 Pos. 6, 7)	1	St.

* Bitte Antriebsradvariante und Radsturzeinstellung des Antriebsrades angeben (0°/ 2°/ 4°).

Hinweis: Nicht möglich in Verbindung mit PU-Bereifung.

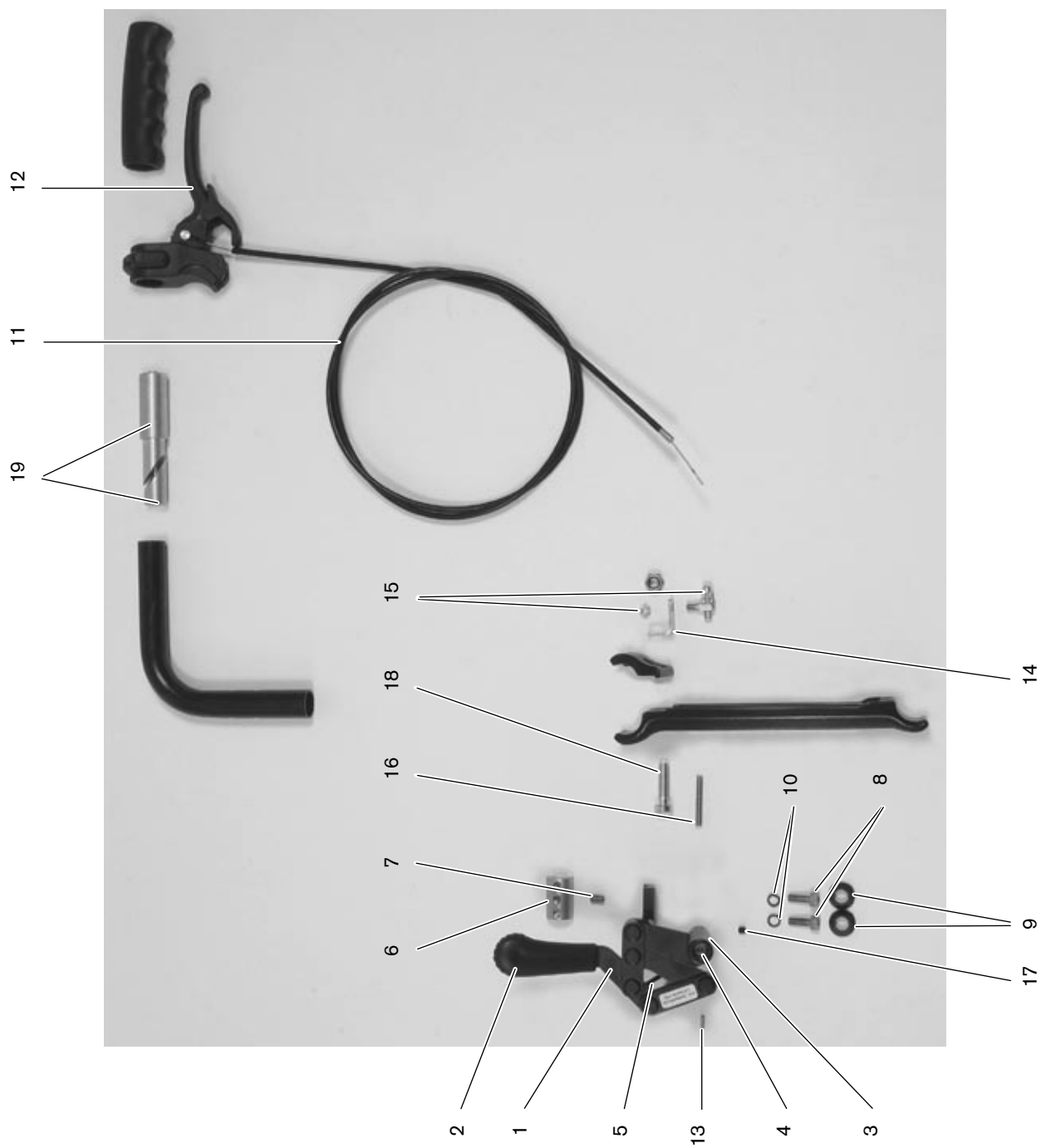


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H45=PK040	Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter, kpl., Modell T, VR und XXL2*	1	Paar
	481H45=LK040	Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter, kpl., links* (Pos. 1-19)	1	St.
	481H45=RK040	Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter, kpl., rechts*	1	St.
1	481H45=LM040	Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter, links (incl. Pos. 1-8)	1	St.
o. B.	481H45=RM040	Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter, rechts	1	St.
2	481H45=ST006	Bremsgriff	1	St.
3	481H45=SS038	Andruckbolzen B+B kurz 33 mm	1	St.
3	481H45=SS039	Andruckbolzen B+B lang 48 mm	1	St.
4	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
5	627F14=36.51x3.53	O-Ring	1	St.
	481H08=SW050	Montagezubehör für Kniehebelbremse Modell T, VR, Teen2 VR und XXL2 (Pos. 6-10 Einzelteile s. Seite 250, 251)	1	St.
	481H45=SW041	Montagezubehör Begleitperson (Pos. 11-18)	1	St.
11		Bowdenzug für Bremse HB-FM	1	St.
12		Brems-Bedien-Hebel	1	St.
13		Abschlusshülse	4	St.
14		Einstellhalter Bremse B+B	1	St.
15		Mikromatik-Stellschraube	1	St.
16		Druckfedernstrang	0,04	m
17		Gewindestift DIN 913, A2	1	St.
18		Zylinderschraube DIN 6912, A2	1	St.
o. B.		Kabelbinder schwarz	3	St.
	481H45=SW042	Montagezubehör Begleitperson bei Anbau Shock-Absorber-System (Pos. 11-18)	1	St.
11		Bowdenzug für Bremse HB-FM	1	St.
12		Brems-Bedien-Hebel	1	St.
13		Abschlusshülse	4	St.
14		Halter für Bremse B+B	1	St.
15		Mikromatik-Stellschraube	1	St.
16		Druckfedernstrang	0,04	m
17		Gewindestift DIN 913, A2	1	St.
18		Zylinderschraube DIN 6912, A2	1	St.
o. B.		Kabelbinder schwarz	3	St.
o. B.		Zylinderschraube DIN 6912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x30, A2	1	St.
o. B.		Schraubenkappe	1	St.
o. B.		Scheibe	1	St.
19	481D08=SK017	Verlängerung für Schiebegriff für Modell T und VR (Einzelteile s. Seite 133)	1	St.
19	481D05=SK009	Verlängerung für Schiebegriff für Modell T und VR (Einzelteile s. Seite 133)	1	St.
	481D45=SK130	Schiebegriff standard mit Verlängerung Modell XXL2, kpl. (Einzelteile s. Seite 114)	1	St.
	481D45=SK131	Schiebegriff lang mit Verlängerung Modell XXL2, kpl. (Einzelteile s. Seite 114, 116)	1	St.
	481D45=SK132	Schiebegriff teleskopierbar lang mit Verlängerung Modell XXL2, kpl. (Einzelteile s. Seite 114, 116)	1	St.
	481D45=SK133	Schiebegriff abnehmbar mit Verlängerung Modell XXL2, kpl. (Einzelteile s. Seite 117)	1	St.
	481D45=SK134	Schiebegriff abnehmbar mit Verlängerung Modell XXL2, kpl. (Einzelteile s. Seite 118)	1	St.

* Bitte angeben: Modell, Radsturzeinstellung des Antriebsrades (0°/ 2°/ 4°) und Schiebegriffvariante.

Hinweis: Nicht möglich in Verbindung mit Schiebegriffen kurz.

H

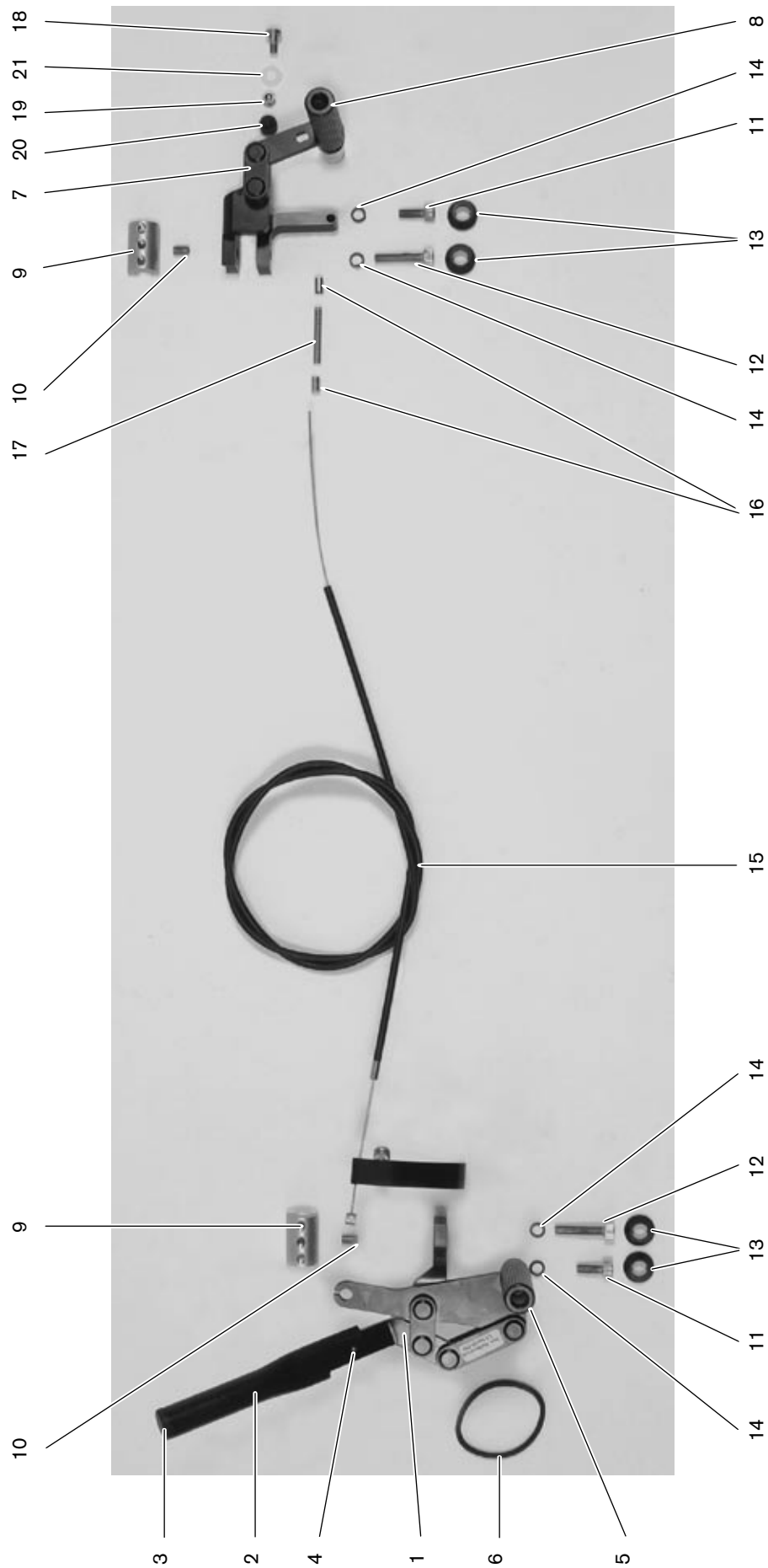


Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H08=LK036	Kniehebelbremse für Einhandbedienung Modell T, VR und XXL2, Bedienseite links, kpl. (Pos.1-21)	1	St.
1	481H08=LM133	Kniehebelbremse für Einhandbedienung, links, Bedienseite (incl. Pos.2-6)	1	St.
2	481H08=SE049	Verlängerung für Bremshebel	1	St.
3	702F80=18	Lamellenstopfen	1	St.
4	506A20=3x12	Zylinderkerbstift DIN 1473, A2	1	St.
5	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
o. B.	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
6	627F14=42.86x3.53	O-Ring	1	St.
7	481H08=RM134	Kniehebelbremse für Einhandbedienung, rechts, mitgeführte Seite (incl. Pos. 8)	1	St.
8	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
o. B.	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
	481H08=SW037	Montagezubehör für Bremse EHD (Pos.9-14)	2	St.
9		Gewindebolzen	1	St.
10		Gewindestift DIN 913, A2	1	St.
11		Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, selbstsichernd, M6x16, A2	1	St.
12		Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x25, A2	1	St.
13		Schraubenkappe	2	St.
14		Federring DIN 7980	2	St.
	481H08=SW029	Montagezubehör für Bremse für EHD mitgeführte Seite (Pos. 15-21)	1	St.
15		Bowdenzug	1	St.
16		Abschlusshülse	4	St.
17		Druckfedernstrang	0,04	m
18		Kabelbefestigungsstift	1	St.
19		Sechskantmutter, selbstsichernd, A2	1	St.
20		Sechskantschutzkappe für M5	1	St.
21		Passscheibe DIN 988	1	St.
o. B.		Kabelbinder schwarz	3	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H08=RK036	Kniehebelbremse für Einhandbedienung Modell T, VR und XXL2, Bedienseite rechts, kpl. (Pos.1-21)	1	St.
1	481H08=RM133	Kniehebelbremse für Einhandbedienung, rechts, Bedienseite (incl. Pos.2-6)	1	St.
2	481H08=SE049	Verlängerung für Bremshebel	1	St.
3	702F80=18	Lamellenstopfen	1	St.
4	506A20=3x12	Zylinderkerbstift DIN 1473, A2	1	St.
5	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
o. B.	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
6	627F14=42.86x3.53	O-Ring	1	St.
7	481H08=LM134	Kniehebelbremse für Einhandbedienung, links, mitgeführte Seite (incl. Pos. 8)	1	St.
8	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
o. B.	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
	481H08=SW037	Montagezubehör für Bremse EHD (Pos.9-14)	2	St.
	481H08=SW029	Montagezubehör für Bremse für EHD mitgeführte Seite (Pos. 15-21)	1	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H45=PK016	Kniehebelbremse standard, kpl., Modell Teen2*	1	Paar
	481H45=LK016	Kniehebelbremse standard, kpl., links (Pos. 1-11)*	1	St.
	481H45=RK016	Kniehebelbremse standard, kpl., rechts*	1	St.
1	481H08=LM090	Kniehebelbremse standard, links (incl. Pos. 1-4)	1	St.
o. B.	481H08=RM090	Kniehebelbremse standard, rechts	1	St.
2	481H45=ST006	Bremsgriff	1	St.
3	481H45=SS013	Andruckbolzen kurz 23 mm	1	St.
3	481H08=SS072	Andruckbolzen kurz 33 mm	1	St.
3	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
o. B.	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
4	627F14=31.34x3.53	O-Ring	1	St.
	481H45=SW021	Montagezubehör für Kniehebelbremse Modell Teen2 (Pos. 5-11)	1	St.
5	481H45=SE014	Bremsaufnahme	1	St.
6	481H45=SE018	Klemmschelle vorn	1	St.
7	481H45=SE019	Klemmschelle hinten	1	St.
8	501T38=2	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
9	507S27=6	Federring DIN 7980	2	St.
10	501T40=1	Zylinderschraube DIN 912 mit gerändeltem Kopf, M6x16, A2	2	St.
11	433A1=7	Schraubenkappe	2	St.


* Bitte Radsturzeinstellung des Antriebsrades angeben (0°/ 2°/ 4°).

Hinweis: Kniehebelbremse standard bei Rahmen 6 cm Abduktion erst ab ST32 möglich.

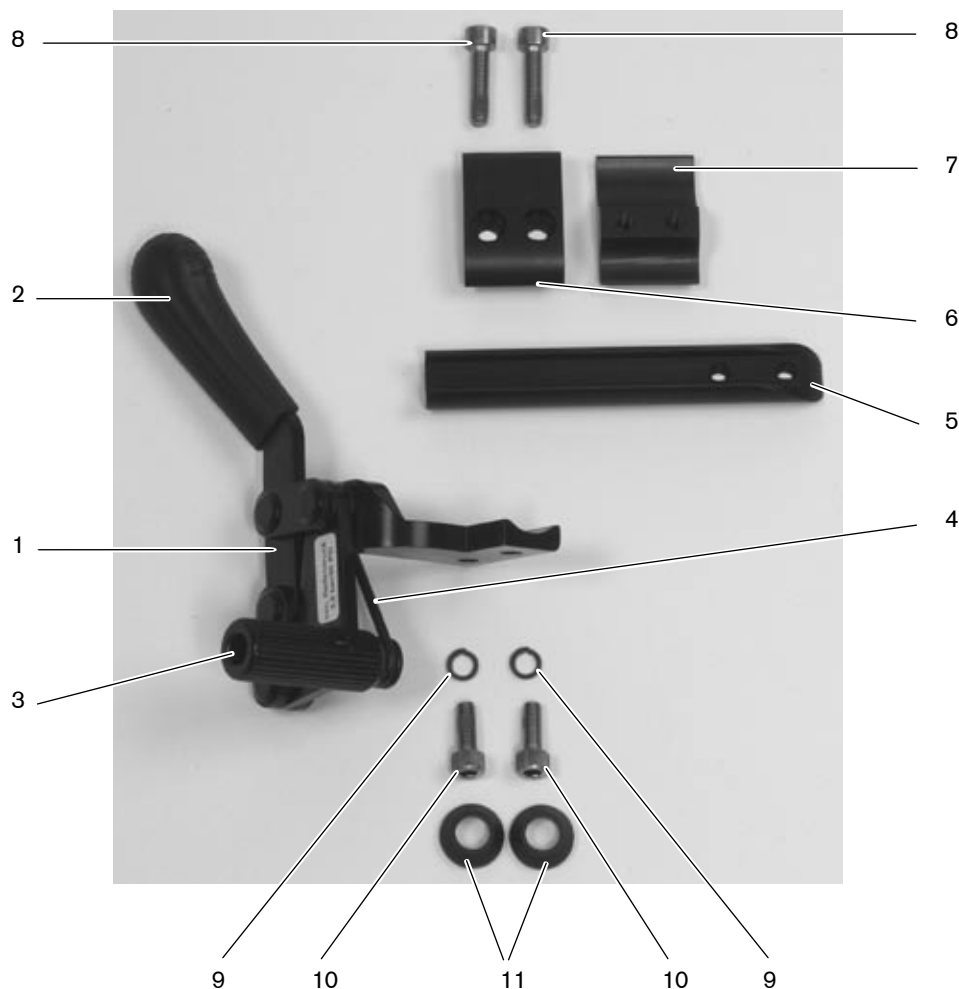

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H45=PK045	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, kpl., Modell Teen2 VR*	1	Paar
	481H45=LK045	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, kpl., links (Pos. 1-10)*	1	St.
	481H45=RK045	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, kpl., rechts*	1	St.
1	481H45=LM045	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, links (incl. Pos. 1-5)	1	St.
o. B.	481H45=RM045	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, rechts	1	St.
2	481H05=ST006	Kappe	1	St.
3	481H45=SS013	Andruckbolzen kurz 23 mm	1	St.
3	481H08=SS072	Andruckbolzen kurz 33 mm	1	St.
3	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
4.	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
5	627F14=31.34x3.53	O-Ring	1	St.
	481H08=SW050	Montagezubehör für Kniehebelbremse Modell T, VR, Teen2 VR und XXL2 (Pos. 6-10 Einzelteile s. Seite 250, 251)	1	St.


* Bitte Radsturzeinstellung des Antriebsrades angeben (0°/ 2°/ 4°).

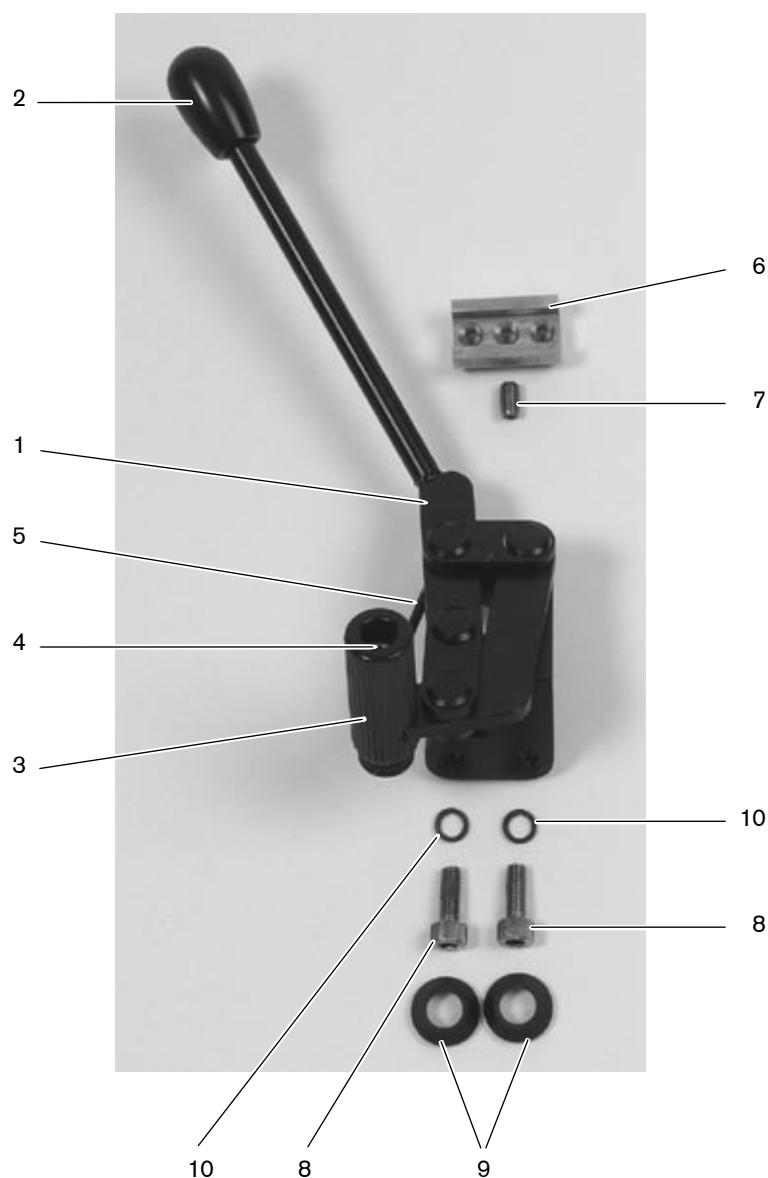

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H45=PK017	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, kpl., Modell Teen2*	1	Paar
	481H45=LK017	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, kpl., links (Pos. 1-12)*	1	St.
	481H45=RK017	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, kpl., rechts*	1	St.
1	481H45=LM024	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, links (incl. Pos. 1-5)	1	St.
o. B.	481H45=RM024	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, rechts	1	St.
2	481H05=ST006	Kappe	1	St.
3	481H08=SS072	Andruckbolzen kurz 33 mm	1	St.
3	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
4.	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
5	627F14=31.34x3.53	O-Ring	1	St.
	481H45=SW021	Montagezubehör für Kniehebelbremse Modell Teen2 (Pos. 6-12 Einzelteile s. Seite 262 Pos. 5-11)	1	St.

* Bitte Radsturzeinstellung des Antriebsrades angeben (0°/ 2°/ 4°).


Hinweis: Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel nur bei Rahmen kurz 6 cm Abduktion in Verbindung mit 20"-Antriebsrädern möglich.

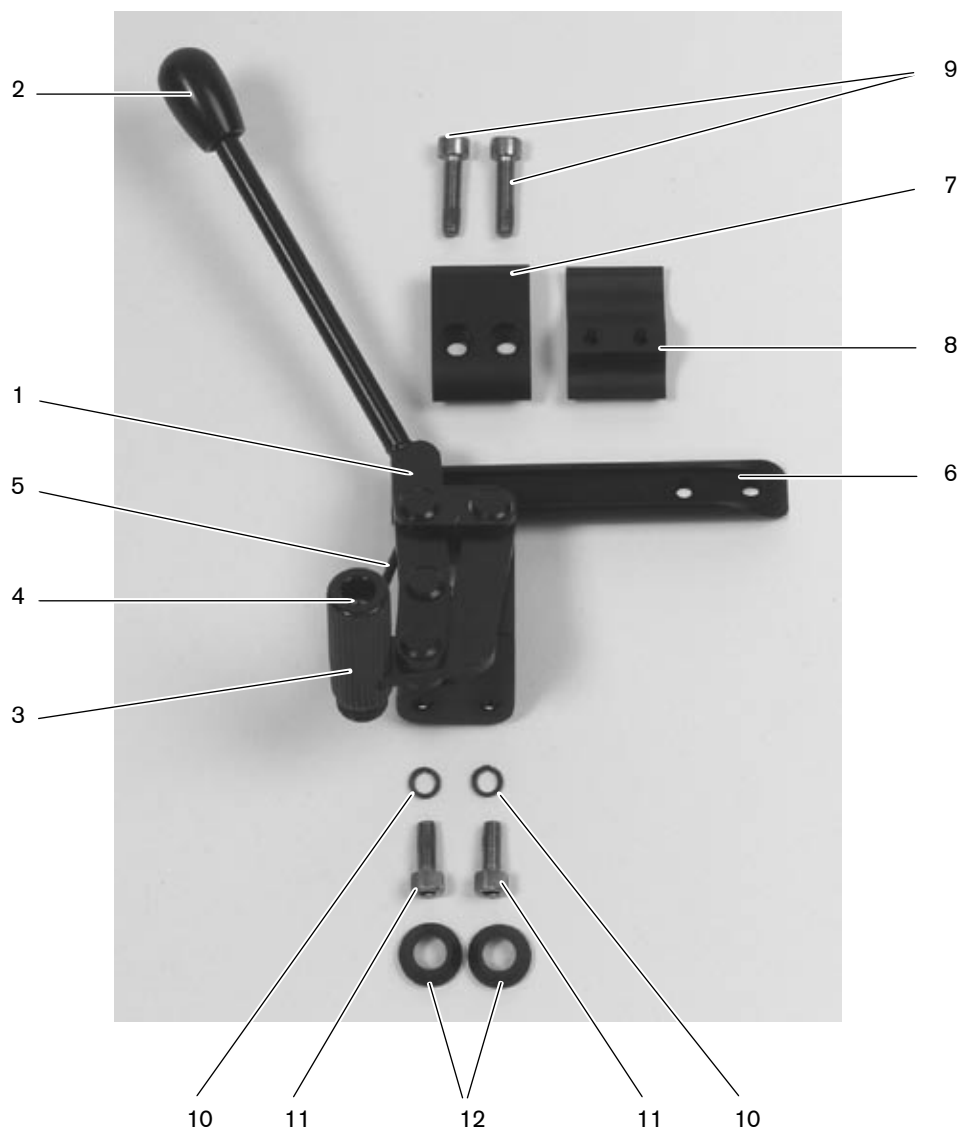

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H45=PK030	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, kpl., Modell Teen2*	1	Paar
	481H45=LK030	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, kpl., links (Pos. 1-12)*	1	St.
	481H45=RK030	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, kpl., rechts*	1	St.
1	481H05=LM020	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, links (incl. Pos. 1-5)	1	St.
o. B.	481H05=RM020	Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel, rechts	1	St.
2	481H05=ST006	Kappe	1	St.
3	481H08=SS072	Andruckbolzen kurz 33 mm	1	St.
3	481H08=SS081	Andruckbolzen lang 48 mm	1	St.
4.	501T38=7	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M5x40, A2	1	St.
5	627F14=31.34x3.53	O-Ring	1	St.
	481H45=SW021	Montagezubehör für Kniehebelbremse Modell Teen2 (Pos. 6-12 Einzelteile s. Seite 262 Pos. 5-11)	1	St.


* Bitte Radsturzeinstellung des Antriebsrades angeben (0°/ 2°/ 4°).

Hinweis: Kniehebelbremse mit anpassbarem Bedienhebel bei Rahmen 6 cm Abduktion und ST30 nur in Verbindung mit 20"-Antriebsrädern möglich.

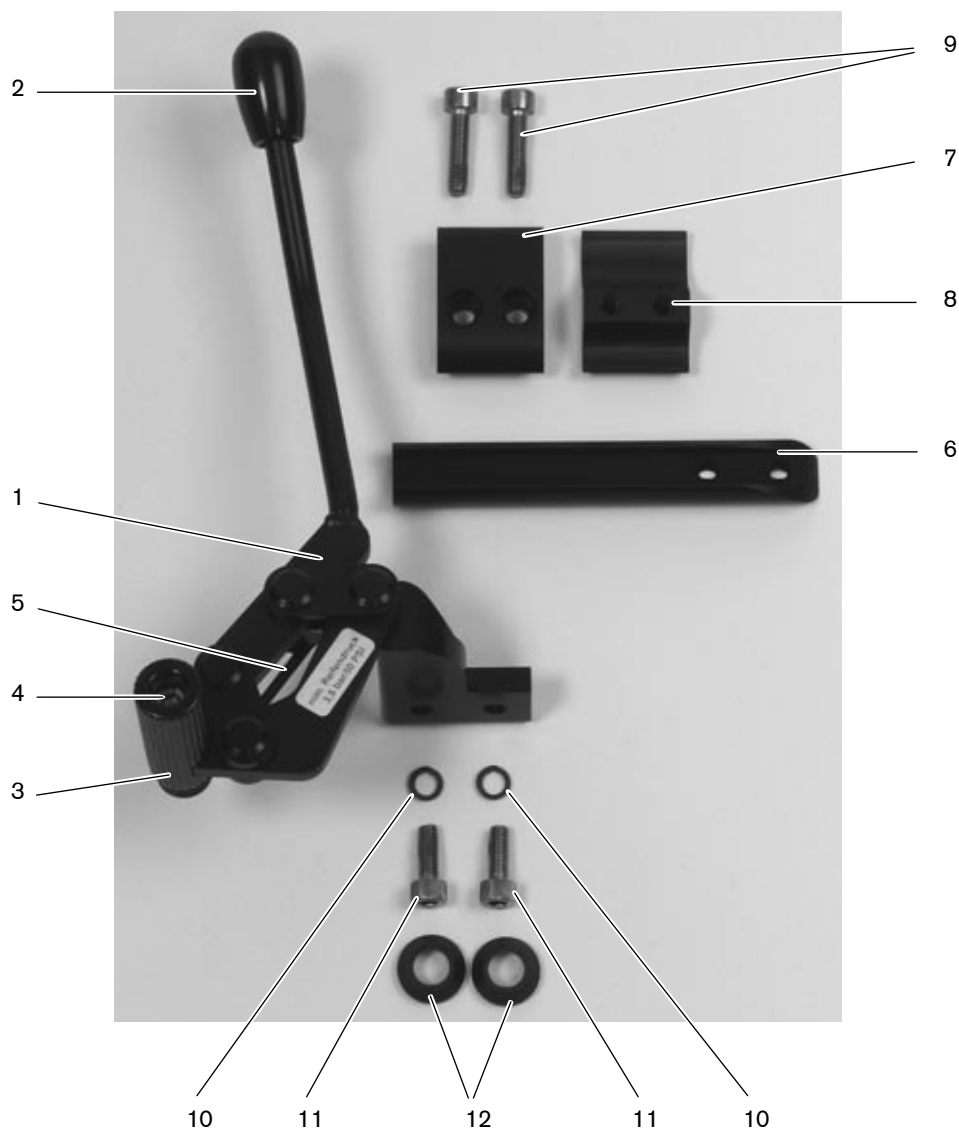

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H08=SK026	Bremsadapter bei Radstandsverlängerung, kpl. (Pos. 1, 2)	2	St.
1	481H08=SE026	Bremsadapter bei Radstandsverlängerung	1	St.
2	501T38=2	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	ME
	481H45=SK046	Bremsadapter bei Radstandsverlängerung bei Anbau Seitenteil/Kleiderschutz standard bzw. Ergo, kpl. (Pos. 1, 2)	2	St.
1	481H08=SE026	Bremsadapter bei Radstandsverlängerung	1	St.
2	501T38=2	Zylinderschraube DIN 912, selbstsichernd, M6x20, A2	2	St.
o. B.	481H45=SE031	Adapter für Radstandsverlängerung	1	St.
o. B.	507S27=6	Federring DIN 7980	2	St.
o. B.	501T39=M6x55	Zylinderschraube DIN 6912, A2	2	St.
o. B.	481G08=ST003	Rosette für DIN 6912, M6	2	St.

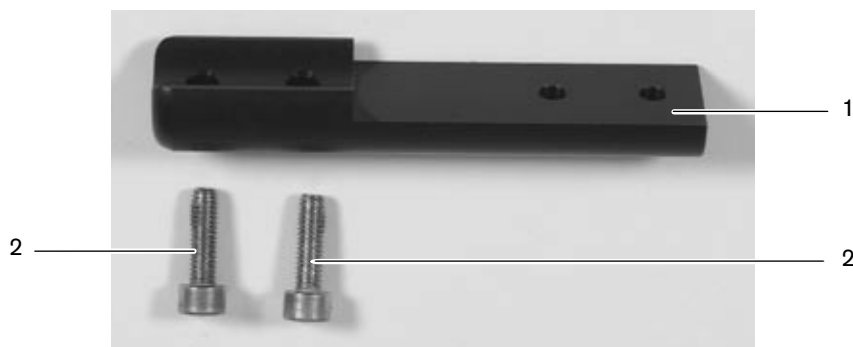


Montageanleitung für Umbau Brems-Bedien-Hebel von „selbstausslösend“ in „selbsteinrastend“

Abb. 1 Klemmschraube (Pos. 1) mit Sechskantschraubendreher, Größe 2 mm, lösen, Abschlusshülse (Pos. 2) vom Bowdenzug (Pos.3) entfernen, Bowdenzug (Pos. 3) herausziehen. Sperrklinke (Pos. 4) festhalten, Feder 445B96 (Pos. 5) zusammendrücken und herausnehmen.


Abb. 2 Sperrklinke (Pos. 4) nach unten drücken, Feder 445B96 (Pos. 5) in die Bohrung am Handhebel (Pos. 6) einsetzen und zusammendrücken, Sperrklinke (Pos. 4) nach oben drücken und einrasten lassen, Bowdenzug (Pos. 3) einziehen, Abschlusshülse (Pos. 2) aufstecken, Klemmschraube (Pos. 1) mit Sechskantschraubendreher festziehen.

Abb. 1

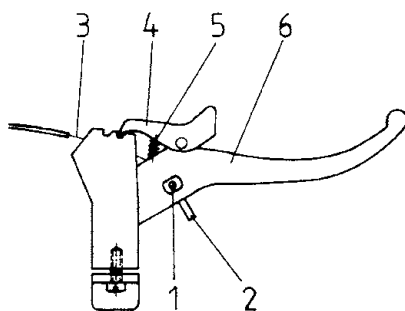

selbstausslösend

Abb. 2

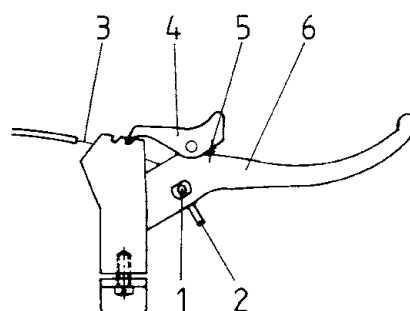

selbsteinrastend

Hersteller/Manufacturer:

Otto Bock HealthCare GmbH

Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt/Germany

National: Telefon (0 55 27) 848 1461/1462/1463 · Fax (0 55 27) 848 14 60

International: Phone +49-5527-848-1304/1562/1590/1594/3663 · Fax +49-5527-848-1676

e-mail: reha@ottobock.de · Internet: <http://www.ottobock.com>

Versandanschrift für Rücksendungen/Address for Returns

Otto Bock HealthCare GmbH

Lindenstraße 13 · 07426 Königsee/Germany



Otto Bock HealthCare GmbH has been certified by the German Society for the Certification of Quality Assurance Systems (DQS)
in accordance with DIN EN ISO 9001 standard, reg. no. 779 (management system)